

Ιούλιος 2023

# Οδηγίες χρήσης του NeuMoDx™ Cartridge



576

Έκδοση 1

**IVD**

Για in vitro διαγνωστική χρήση με τα συστήματα NeuMoDx 288 και NeuMoDx 96 Molecular Systems

**R** only

Για χρήση μόνο με ιατρική συνταγή



**REF**

100100



NeuMoDx Molecular, Inc.  
1250 Eisenhower Place  
Ann Arbor, MI  
48108 USA

**EC REP**

Emergo Europe B.V.  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

40600591-EL\_B



Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης του NeuMoDx 288 Molecular System*, P/N 40600108

Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χρήσης του NeuMoDx 96 Molecular System*, P/N 40600317

# Περιεχόμενα

Προβλεπόμενη χρήση .....	4
Σύνοψη και επεξήγηση .....	4
Αρχές της διαδικασίας .....	4
Παρεχόμενα υλικά .....	6
Περιεχόμενα του κιτ.....	6
Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται .....	7
Εξοπλισμός .....	7
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.....	8
Πληροφορίες ασφάλειας.....	8
Στοιχεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.....	9
Απόρριψη.....	9
Φύλαξη, χειρισμός και σταθερότητα προϊόντος .....	10
Συλλογή, μεταφορά και φύλαξη δοκιμών .....	10
Οδηγίες χρήσης.....	11
Περιορισμοί .....	12
Ποιοτικός έλεγχος.....	13
Βιβλιογραφικές αναφορές.....	14
Σύμβολα .....	15
Στοιχεία επικοινωνίας .....	16
Πληροφορίες παραγγελίας .....	17
Ιστορικό αναθεώρησης εγγράφου .....	18

---

## Προβλεπόμενη χρήση

Η φύσιγγα NeuMoDx Cartridge είναι ένα αποκλειστικό αναλώσιμο που χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική εκχύλιση, καθαρισμό, ενίσχυση, και ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων στα συστήματα NeuMoDx 288 και NeuMoDx 96 Molecular System (σύστημα/συστήματα NeuMoDx System). Η φύσιγγα NeuMoDx Cartridge χρησιμοποιείται καθολικά για όλες τις εξετάσεις που εκτελούνται σε συστήματα NeuMoDx Systems. Για in vitro διαγνωστική χρήση.

## Σύνοψη και επεξήγηση

Κάθε φύσιγγα NeuMoDx Cartridge περιέχει δώδεκα μικροϋδραυλικά κυκλώματα που επιτρέπουν την ανεξάρτητη επεξεργασία έως δώδεκα δειγμάτων εφόσον τοποθετηθούν κατάλληλα μέσα στις μονάδες XPCR του συστήματος NeuMoDx System. Η φύσιγγα NeuMoDx Cartridge ενσωματώνει επίσης έναν θάλαμο όπου εναποτίθενται όλα τα υγρά απόβλητα τα οποία δημιουργούνται κατά την επεξεργασία των δειγμάτων.

## Αρχές της διαδικασίας

Τα συστήματα NeuMoDx Systems χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό θερμότητας και αποκλειστικών αντιδραστηρίων εκχύλισης για την πραγματοποίηση κυτταρικής λύσης, εκχύλισης νουκλεϊκού οξέος και απενεργοποίησης/μείωσης των αναστολέων από ανεπεξέργαστα κλινικά δοκίμια πριν από τη διάθεση του εκχυλισμένου νουκλεϊκού οξέος για ανίχνευση μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου. Ένα κλάσμα του ανεπεξέργαστου δοκιμίου αναμιγνύεται με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα NeuMoDx Lysis Buffer και υπόκειται σε λύση σε προκαθορισμένες θερμοκρασίες παρουσία λυτικών ενζύμων και παραμαγνητικών σωματιδίων.

---

Τα αποδεσμευμένα νουκλεϊκά οξέα συλλαμβάνονται μέσω παραμαγνητικών σωματιδίων και αυτά τα σωματίδια (μαζί με τα δεσμευμένα νουκλεϊκά οξέα) φορτώνονται, στη συνέχεια, στη φύσιγγα NeuMoDx Cartridge όπου τα μη δεσμευμένα/μη συγκεκριμένα δεσμευμένα συστατικά απομακρύνονται με πλύση με χρήση του αντιδραστηρίου NeuMoDx Wash Reagent και το δεσμευμένο νουκλεϊκό οξύ εκλύεται με χρήση του αντιδραστηρίου NeuMoDx Release Reagent.

Τα συστήματα NeuMoDx Systems αναμιγνύουν το αποδεσμευμένο νουκλεϊκό οξύ με εκκινήτες, ανιχνευτή/-ές για τη συγκεκριμένη μέθοδο προσδιορισμού και με το αφυδατωμένο κύριο μίγμα που περιέχεται σε μια ταινία NeuMoDx Test Strip. Στη συνέχεια, το σύστημα διανέμει το παρασκευασμένο μίγμα που είναι έτοιμο για PCR στη φύσιγγα NeuMoDx Cartridge, όπου πραγματοποιείται PCR πραγματικού χρόνου.

# Παρεχόμενα υλικά

## Περιεχόμενα του ΚΙΤ

<b>NeuMoDx Cartridge REF 100100</b>	<b>Τεμάχια ανά συσκευασία</b>	<b>Εξετάσεις ανά τεμάχιο</b>	<b>Εξετάσεις ανά συσκευασία</b>
NeuMoDx Cartridge	48	12	576

## Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται

REF	Περιεχόμενα
διάφορα	<b>NeuMoDx Lysis Buffer(s)</b>
100200	<b>NeuMoDx Extraction Plate</b> <i>Αφυδατωμένα παραμαγνητικά σωματίδια, αφυδατωμένα λυτικά ένζυμα και αφυδατωμένοι μάρτυρες επεξεργασίας δείγματος</i>
400100	<b>NeuMoDx Wash Reagent</b>
400200	<b>NeuMoDx Release Reagent</b>
διάφορα	<b>NeuMoDx Test Strip (ανάλογα με την περίπτωση)</b>
235903	<b>Ρύγχη Hamilton CO-RE/CO-RE II (300 μL) με φίλτρα</b>
235905	<b>Ρύγχη Hamilton CO-RE/CO-RE II (1.000 μL) με φίλτρα</b>

### Εξοπλισμός\*

- NeuMoDx 288 Molecular System [REF 500100] Ή  
NeuMoDx 96 Molecular System [REF 500200]

\* Πριν από τη χρήση, διασφαλίστε ότι τα όργανα έχουν ελεγχθεί και βαθμονομηθεί σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

# Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

## Πληροφορίες ασφάλειας

- Αυτό το αναλώσιμο παρέχεται για *in vitro* διαγνωστική χρήση μόνο με τα συστήματα NeuMoDx Systems.
- Μη χρησιμοποιείτε την NeuMoDx Cartridge μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
- Μη χρησιμοποιείτε την NeuMoDx Cartridge αν το προϊόν ή η συσκευασία παρουσιάζουν ορατή φθορά κατά την άφιξη.
- Μη χρησιμοποιείτε μια φύσιγγα NeuMoDx Cartridge που έχει πέσει κάτω, καθώς η πτώση μπορεί να προκαλέσει μη έγκυρα αποτελέσματα.
- Χειρίζεστε πάντα την NeuMoDx Cartridge από τις πλευρικές όψεις. Μην αγγίζετε την επάνω επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε ετικέτες πάνω στην NeuMoDx Cartridge.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε μια φύσιγγα NeuMoDx Cartridge.
- Μην ανοίγετε μια φύσιγγα NeuMoDx Cartridge πριν ή μετά τη χρήση.
- Φοράτε πάντα καθαρά γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα κατά τον χειρισμό δοκιμίων ή τυχόν αντιδραστηρίων ή αναλώσιμων NeuMoDx.
- Πλένετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά την εκτέλεση της εξέτασης.
- Μην πραγματοποιείτε αναρρόφηση με το στόμα. Μην καπνίζετε και μην καταναλώνετε ποτά ή φαγητά σε περιοχές όπου εκτελείται χειρισμός δοκιμίων ή αντιδραστηρίων kit.
- Χειρίζεστε πάντα τα δοκίμια ως εάν ήταν μολυσματικά και σύμφωνα με τις ασφαλείς εργαστηριακές διαδικασίες, όπως εκείνες που περιγράφονται στο έγγραφο *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*<sup>1</sup> και στο έγγραφο του CLSI M29-A4.<sup>2</sup>
- Απορρίπτετε τα μη χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια και τα απόβλητα σύμφωνα με τους εθνικούς, ομοσπονδιακούς, περιφερειακούς, κρατικούς και τοπικούς κανονισμούς.



---

## Στοιχεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

CHEMTREC

Εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά +1 703-527-3887

## Απόρριψη

Απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Η οδηγία ισχύει και για μη χρησιμοποιημένα προϊόντα. Τηρείτε τις συστάσεις των δελτίων δεδομένων ασφάλειας (Safety Data Sheets, SDS).

---

## Φύλαξη, χειρισμός και σταθερότητα προϊόντος

- Η φύσιγγα NeuMoDx Cartridge είναι σταθερή μέσα στην κύρια συσκευασία σε θερμοκρασία 18 έως 28 °C έως την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα της στοιχειώδους συσκευασίας του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε αναλώσιμα μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται.
- Η φύσιγγα NeuMoDx Cartridge που είναι σε χρήση απορρίπτεται αυτόματα μετά από τρεις ημέρες.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν αυτό ή η συσκευασία παρουσιάζουν ορατές αλλοιώσεις.
- Χειρίζεστε πάντα τις φύσιγγες από τις πλευρικές όψεις και φοράτε καθαρά γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χειρισμού.

## Συλλογή, μεταφορά και φύλαξη δοκιμίων

*Χειρίζετε όλα τα δοκίμια ως εάν ήταν ικανά να μεταδώσουν μολυσματικούς παράγοντες.*

Η επικύρωση των βέλτιστων συνθηκών αποστολής δοκιμίου και σταθερότητας δοκιμίου θα πρέπει να διενεργείται από το εργαστήριο του χρήστη για τη μήτρα δειγμάτων που χρησιμοποιείται και για κάθε τύπο εξέτασης που εκτελείται.

# Οδηγίες χρήσης

1. Ανοίξτε το πλαστικό χιτώνιο και αφαιρέστε μια φύσιγγα NeuMoDx Cartridge, προσέχοντας να χειρίζεστε τη φύσιγγα μόνο από τις πλευρικές όψεις και να μην αγγίζετε την επάνω επιφάνεια της φύσιγγας.
2. Ακουμπήστε το βέλος κάτω από το εικονίδιο του επιθυμητού φορέα φυσιγγών στην οθόνη αφής του συστήματος NeuMoDx System.
3. Τοποθετήστε τη φύσιγγα NeuMoDx Cartridge μέσα στον φορέα φυσιγγών με τον γραμμωτό κωδικό στραμμένο προς τα δεξιά, ώστε να αναγνωστεί από τον σαρωτή γραμμωτού κωδικού. Οι φύσιγγες μπορούν να στοιβάζονται σε στήλες των πέντε μέσα στον φορέα φυσιγγών.
4. Ακουμπήστε ξανά το βέλος στην οθόνη αφής, για να φορτώσετε τον φορέα φυσιγγών στο σύστημα NeuMoDx System.
5. Εφόσον ο γραμμωτός κωδικός στη φύσιγγα NeuMoDx Cartridge αναγνωστεί, θα εμφανιστεί στην οθόνη αφής ένα πράσινο τμήμα για τις φύσιγγες στον φορτωμένο φορέα. Αν αυτό δεν συμβεί, εκφορτώστε τον φορέα και διασφαλίστε ότι ο γραμμωτός κωδικός στη φύσιγγα NeuMoDx Cartridge είναι στραμμένος προς τα δεξιά.
6. Το σύστημα N288 System θα απορρίπτει τις χρησιμοποιημένες φύσιγγες και τα χρησιμοποιημένα ρύγχη στον περιέκτη βιολογικά επικίνδυνων αποβλήτων, ο οποίος πρέπει να αδειάζεται το συντομότερο δυνατό αφού εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση από το λογισμικό του NeuMoDx System.
7. Το σύστημα N96 System θα τοποθετεί τις χρησιμοποιημένες φύσιγγες στον κάδο βιολογικά επικίνδυνων αποβλήτων και τα ρύγχη στον κάδο βιολογικά επικίνδυνων χρησιμοποιημένων ρυγχών. Και οι δύο κάδοι αποβλήτων πρέπει να αδειάζονται το συντομότερο δυνατό αφού εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση από το λογισμικό του NeuMoDx System.

# Περιορισμοί

1. Η φύσιγγα NeuMoDx Cartridge μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στα συστήματα NeuMoDx Systems και δεν είναι συμβατή με κανένα άλλο αυτοματοποιημένο μοριακό διαγνωστικό σύστημα.
2. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης των ανεπτυγμένων από το εργαστήριο μεθόδων προσδιορισμού με τη χρήση αυτού του αναλώσιμου πρέπει να επικυρωθούν από το εργαστήριο του χρήστη προτού διατυπωθούν ισχυρισμοί για διαγνώσεις.
3. Εφόσον η ανίχνευση των περισσότερων παθογόνων εξαρτάται από τον αριθμό των μικροοργανισμών που υπάρχουν στο δείγμα, η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τη σωστή συλλογή, τον σωστό χειρισμό και τη σωστή φύλαξη των δοκιμίων.
4. Εσφαλμένα αποτελέσματα εξέτασης μπορεί να προκύψουν λόγω ακατάλληλης συλλογής, χειρισμού ή φύλαξης των δοκιμίων, τεχνικού σφάλματος ή σύγχυσης δειγμάτων. Επιπλέον, ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν επειδή ο αριθμός των μικροοργανισμών στο δοκίμιο είναι μικρότερος από την αναλυτική ευαισθησία της εξέτασης.
5. Η χρήση αυτού του αναλώσιμου περιορίζεται σε προσωπικό καταρτισμένο σχετικά με τη χρήση του συστήματος NeuMoDx System.
6. Για να μειωθεί η πιθανότητα επιμόλυνσης, είναι κρίσιμες οι ορθές εργαστηριακές πρακτικές, όπως η εφαρμογή γαντιών κατά τη φόρτωση όλων των αντιδραστηρίων και των αναλώσιμων στο σύστημα και η αλλαγή των γαντιών κατά την προετοιμασία των δοκιμίων.

---

## Ποιοτικός έλεγχος

Συνήθως, οι κατά τόπους κανονισμοί ορίζουν συνήθως ότι το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες ελέγχου με τις οποίες παρακολουθούνται η ορθότητα και η ακρίβεια ολόκληρης της αναλυτικής διαδικασίας, καθώς και ότι το εργαστήριο πρέπει να καθορίζει τον αριθμό, τον τύπο και τη συχνότητα ελέγχου των υλικών μαρτύρων. Ανάλογα με τη μέθοδο προσδιορισμού που χρησιμοποιείται, ενδέχεται τα υλικά των μαρτύρων να μην παρέχονται από την NeuMoDx Molecular, Inc.

Οι κατάλληλοι μάρτυρες πρέπει να επιλεγούν και να επικυρωθούν από το εργαστήριο. Συνιστάται γενικά οι χρήστες να υποβάλλουν σε επεξεργασία ένα σύνολο θετικών και αρνητικών μαρτύρων κάθε 24 ώρες λειτουργίας του συστήματος πριν την επεξεργασία δειγμάτων ασθενών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που αφορούν ειδικά τη μέθοδο προσδιορισμού.








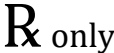





---

## Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Centers for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th edition. HHS Publication No. (CDC) 21-1112, Revised December 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition. CLSI document M29-A4; May 2014.

# Σύμβολα

Τα ακόλουθα σύμβολα ενδέχεται να περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης ή στη συσκευασία και τις ετικέτες:

Σύμβολο	Ορισμός του συμβόλου
	Περιέχει επαρκή αντιδραστήρια για <N> αντιδράσεις
	Ημερομηνία λήξης
	In vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Αριθμός καταλόγου
	Κωδικός παρτίδας
	Κατασκευαστής
	Περιορισμός θερμοκρασίας
	Για χρήση μόνο με ιατρική συνταγή
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Να μην επαναχρησιμοποιείται
	Σήμανση CE
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Περιέχει

---

## Στοιχεία επικοινωνίας

Για τεχνική βοήθεια και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης στη διεύθυνση **support@qiagen.com**.

Τεχνική υποστήριξη/Υποβολή αναφορών επαγρύπνησης: **support@qiagen.com**

Οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν έχει σημειωθεί σε σχέση με το προϊόν θα αναφέρεται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.



# Πληροφορίες παραγγελίας

Προϊόν	Αρ. κατ.
NeuMoDx Cartridge	100100
<b>Σχετικά προϊόντα</b>	
NeuMoDx Lysis Buffer 1	400400
NeuMoDx Lysis Buffer 2	400500
NeuMoDx Lysis Buffer3	400600
NeuMoDx Lysis Buffer 4	400700
NeuMoDx Lysis Buffer 5	400900
NeuMoDx Lysis Buffer 6	401700
NeuMoDx Extraction Plate	100200
NeuMoDx Wash Reagent	400100
NeuMoDx Release Reagent	400200
NeuMoDx Test Strip	διάφορα
Ρύγχη Hamilton CO-RE/CO-RE II (300 µL) με φίλτρα	235903
Ρύγχη Hamilton CO-RE/CO-RE II (1.000 µL) με φίλτρα	235905

Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης και για δηλώσεις αποποίησης ευθύνης σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, βλ. το αντίστοιχο εγχειρίδιο κιτ ή εγχειρίδιο χρήστη NeuMoDx. Τα εγχειρίδια των κιτ NeuMoDx είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση [www.neumodx.com](http://www.neumodx.com). Μπορείτε επίσης να τα ζητήσετε στη διεύθυνση [support@qiagen.com](mailto:support@qiagen.com) ή από τον τοπικό σας διανομέα.

## Ιστορικό αναθεώρησης εγγράφου

Αναθεώρηση	Σύνοψη αλλαγών
A, 05/2022	Αρχική κυκλοφορία Νέος κωδικός προϊόντος (P/N 40600591) για την υποβολή των γενικών αντιδραστηρίων σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (IVDR).
B, 07/2023	Ενημέρωση διεύθυνσης Emergo σε Westervoortsedijk 60; 6827 AT Arnhem Κάτω Χώρες. Αλλαγή διεύθυνσης <a href="http://www.neumodx.com/client-resources">www.neumodx.com/client-resources</a> σε <a href="http://www.qiagen.com/neumodx-ifu">www.qiagen.com/neumodx-ifu</a> .

### Περιορισμένη άδεια χρήσης για το NeuMoDx Cartridge

Η χρήση αυτού του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος των παρακάτω όρων:

1. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον όπως ορίζεται στα πρωτόκολλα που παρέχονται μαζί με το προϊόν και όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο αυτό και μόνο με τα συστατικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σετ. Η NeuMoDx δεν παρέχει άδεια χρήσης υπό οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της για τη χρήση ή ενσωμάτωση των παρεχόμενων συστατικών αυτού του σετ σε οποιαδήποτε στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το σετ, παρά μόνον όπως περιγράφεται στα πρωτόκολλα που παρέχονται μαζί με το προϊόν, στο παρόν εγχειρίδιο και στα πρόσθετα πρωτόκολλα που διατίθενται στον ιστότοπο [www.neumodx.com](http://www.neumodx.com). Ορισμένα από αυτά τα επιπλέον πρωτόκολλα έχουν παρασχεθεί από χρήστες της NeuMoDx για χρήστες της NeuMoDx. Αυτά τα πρωτόκολλα δεν έχουν ελεγχθεί διεξοδικά ή βελτιστοποιηθεί από την NeuMoDx. Η NeuMoDx δεν παρέχει εγγυήσεις για αυτά και δεν παρέχει καμία διασφάλιση ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.
2. Εκτός από τις άδειες που αναφέρονται ρητά, η NeuMoDx δεν εγγυάται ότι αυτό το σετ ή/και η χρήση του δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.
3. Αυτό το σετ και τα συστατικά του παραχωρούνται με άδεια για μία μόνο χρήση και δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση, η επανεπεξεργασία, η ανακατασκευή ή η μεταπώλησή τους.
4. Η NeuMoDx αποποιείται ειδικά κάθε άλλης άδειας χρήσης, ρητής ή σιωπηρής, εκτός από εκείνες που αναφέρονται ρητά.
5. Ο αγοραστής και ο χρήστης του σετ συμφωνούν να μην προβούν και να μην επιτρέψουν σε άλλο πρόσωπο να προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή να διευκολύνουν τυχόν ενέργειες που απαγορεύονται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Η NeuMoDx διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τις απαγορεύσεις της παρούσας περιορισμένης άδειας χρήσης σε οποιοδήποτε δικαστήριο και πρέπει να αποζημιώνεται για όλες τις ερευνητικές και δικαστικές δαπάνες της, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, στο πλαίσιο οποιασδήποτε ενέργειας για την επιβολή της παρούσας περιορισμένης άδειας χρήσης ή οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων πνευματικής της ιδιοκτησίας σχετικά με το σετ ή/και τα συστατικά του.

Για τους ενημερωμένους όρους της άδειας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.neumodx.com](http://www.neumodx.com).

