

Za uporabo  
s kompletom  
QuantiFERON-CMV  
ELISA  
(kat. št. 0350-0201).

## QuantiFERON®-CMV

①

Epruvete za odvzem krvi

Pakiranje za posameznega bolnika

Kat. št. 0192-0301

VSEBINA

3 x 1 ml epruveta za odvzem krvi QF CMV (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1x navodila za izdelek

Za več informacij preberite *Navodila za izdelek*

*QuantiFERON-CMV*, ki so na voljo na naslovu

[www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com).

### ODVZEM KRVI

②

⚠ OPOZORILO:

- Veljajo običajni previdnostni ukrepi pri odvzemu krvi.
- Epruvete se lahko hranijo pri temperaturi 4–25 °C in morajo imeti sobno temperaturo (17–25 °C) v času uporabe.

Opravite odvzem krvi iz vene.

*Zaradi vakuuma se epruveta napolni do črne oznake (1 ml). Tok krvi je lahko počasen. Ko se tok ustavi, držite epruveto na igli še 2–3 sekunde. Epruveto morate napolniti do oznake.*

#### Tehnični nasvet

Igle z metuljčki – s prazno epruveto (ni priložena) zagotovite, da je cevka napolnjena s krvjo, preden uporabite epruvete QuantiFERON-CMV.

### ODVZEM KRVI

③



Takoj ko napolnite epruvete, jih desetkrat (10) stresite, in sicer dovolj močno, da je celotna notranja površina prekrita s krvjo in se antigeni na stenah epruvete pomešajo s krvjo.

*Epruvete morajo imeti v času polnjenja s krvjo temperaturo 17–25 °C.*


*Zaradi premočnega tresenja se lahko prekine zgoščevanje, kar lahko povzroči odklon pri rezultatih.*



*Epruvete ustrezno označite.*

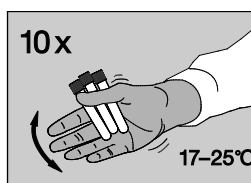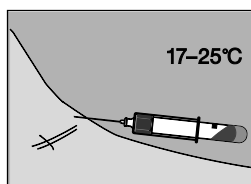

Sample & Assay Technologies

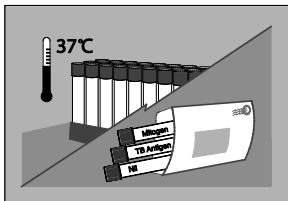

#### TRANSPORT/INKUBACIJA

④

Prenesite epruvete v laboratorij pri temperaturi 17–27 °C. Kri je treba čim prej dati v inkubacijo pri 37 °C (v 16 urah od odvzema).


*Laboratorijsko osebje mora znova pretresti epruvete neposredno pred inkubacijo pri 37 °C.*

#### Tehnični nasvet

Epruvete označite kot „Ni v inkubaciji“.

#### MOŽNOST 1

##### Inkubacija v laboratoriju

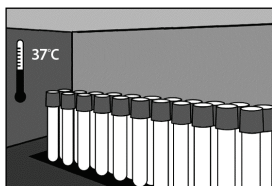

#### TRANSPORT/INKUBACIJA

⑤

Kri je treba čim prej dati v inkubacijo (v 16 urah od odvzema). Epruvete naj v inkubaciji stojijo pokončno pri 37 °C 16–24 ur.

*Inkubatorje lahko zagotovi QIAGEN.*


#### Tehnični nasvet

Raven vlažnosti/CO<sub>2</sub> ni predpisana.

Če epruvete niso v inkubaciji pri temperaturi 37 °C hitro po odvzemu krvi, jih je treba neposredno pred inkubacijo premešati, tako da se 10-krat obrnejo na glavo.

#### MOŽNOST 2

##### Inkubacija na mestu odvzema

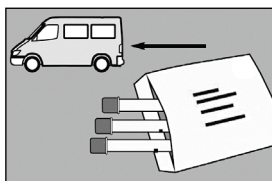

#### TRANSPORT/INKUBACIJA

⑥

Prenesite epruvete v inkubaciji v testni laboratorij (v roku 3 dni, če se ne centrifugirajo).


*Epruvete hranite na temperaturi 4–27 °C.*

#### Tehnični nasvet

Epruvete označite kot „V inkubaciji“.

#### MOŽNOST 2

(nadaljevanje)

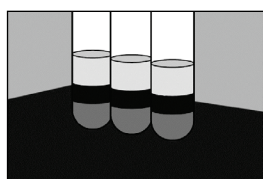

#### CENTRIFUGIRANJE

⑦

Epruvete pred jemanjem vzorcev centrifugirajte.

*15 minut centrifugirajte pri centrifugalni sili 2000–3000 xg.*

Plazma v centrifugiranih epruveh je stabilna do 28 dni, če se hrani pri temperaturi 2–8 °C.

Posodobljene informacije o licenciranju in zavrnitve odgovornosti za izdelek so na voljo v navodilih za izdelek QuantiFERON-CMV.

## KONTAKTNE INFORMACIJE

⑧

### QIAGEN

Asia-Pacific: [techservice-ap@qiagen.com](mailto:techservice-ap@qiagen.com)

Europe: [techserviceQFT-eu@qiagen.com](mailto:techserviceQFT-eu@qiagen.com)

Middle East / Africa: [techserviceQFT-eu@qiagen.com](mailto:techserviceQFT-eu@qiagen.com)

USA / Canada: [techservice-na@qiagen.com](mailto:techservice-na@qiagen.com)

Latin America (not including Brazil or Mexico):

[techservice-latam@qiagen.com](mailto:techservice-latam@qiagen.com)

Mexico: [techservice-MX@qiagen.com](mailto:techservice-MX@qiagen.com)

Brazil: [techsebr@qiagen.com](mailto:techsebr@qiagen.com)

[www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com)

Blagovne znamke: QIAGEN®, QuantiFERON® (skupina QIAGEN).

© 2017 QIAGEN, vse pravice pridržane

1075109SL Rev. 01 01/2017



**QIAGEN**  
19300 Germantown Road,  
Germantown, MD 20874  
USA  
+1-800-426-8157



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
Nemčija



---

Sample & Assay Technologies