

Fiche de protocole QIASymphony SP

Protocole Complex400_OBL_V4_DSP

Informations générales

Pour utilisation en diagnostic *in vitro*.

Kit	Kit QIASymphony® DSP Virus/Pathogen Midi
Support de l'échantillon	Échantillons respiratoires et urogénitaux
Nom du protocole	Complex400_OBL_V4_DSP
Set témoin d'analyse par défaut	ACS_Complex400_OBL_V4_DSP_default_IC
Données	Volume d'éluat : 60 µl, 85 µl, 110 µl
Version logicielle requise	Version 4.0

Tiroir à échantillons « Sample »

Type d'échantillon	Échantillons respiratoires (LBA, prélèvements secs, milieux de transport, aspirations, salive) et échantillons urogénitaux (urine, milieux de transport)
Volume d'échantillon	Dépend du type de tube utilisé pour l'échantillon ; pour en savoir plus, consulter la page www.qiagen.com/goto/dsphandbooks
Tubes primaires d'échantillon	Pour en savoir plus, consulter la page www.qiagen.com/goto/dsphandbooks
Tubes secondaires d'échantillon	Pour en savoir plus, consulter la page www.qiagen.com/goto/dsphandbooks
Inserts	Dépend du type de tube utilisé pour l'échantillon ; pour en savoir plus consulter la page www.qiagen.com/goto/dsphandbooks
Autre	Tampon AVE avec solution d'ARN nécessaire ; l'utilisation d'une solution témoin est facultative



Sample & Assay Technologies

Mars 2012

Tiroir à réactifs et consommables « Reagents and Consumables »

Position A1 et/ou A2	Cartouches de réactif (RC)
Position B1	néant
Porte support des pointes 1 à 17	Pointes de filtres jetables, 200 μ l
Porte support des pointes 1 à 17	Filtres jetables, 1500 μ l
Porte boîte d'unités 1 à 4	Boîtes d'unités contenant des cartouches de préparation d'échantillon
Porte boîte d'unités 1 à 4	Boîtes d'unités contenant des manchons pour 8 barreaux

Tiroir à la poubelle « Waste »

Porte boîte d'unités 1 à 4	Boîtes d'unités vides
Support pour sac poubelle	Sac poubelle
Support pour bouteille à déchets liquides	Flacon à déchets liquides

Tiroir à éluats «Eluate »

Support d'éluat (nous conseillons d'utiliser la fente 1, position refroidissement)	Pour en savoir plus, consulter la page www.qiagen.com/goto/dsphanbooks
---	---

Éléments en plastique nécessaires

	Un lot, 24 échan- -tillons*	Deux lots, 48 échan- -tillons*	Trois lots, 72 échan- -tillons*	Quatre lots, 96 échan- -tillons*
Pointes de filtres jetables, 200 µl ^{†‡}	96	96	128	128
Pointes de filtres jetables, 1500 µl ^{†‡}	128	192	224	288
Cartouches de préparation d'échantillon [§]	18	36	54	72
Manchons pour 8 barreaux [¶]	3	6	9	12

* La réalisation de plusieurs inventaires nécessite des cônes jetables munis de filtres supplémentaires. Si vous utilisez moins de 24 échantillons par lot, réduisez le nombre de pointes de filtres jetables nécessaires par traitement.

† Il y a 32 pointes de filtres sur chaque support de pointes.

‡ Le nombre de pointes de filtres requises correspond à 1 scan d'inventaire par cartouche de réactif.

§ Il y a 28 cartouches de préparation d'échantillon par boîte d'unités.

¶ Il y a douze manchons pour 8 barreaux par boîte d'unité.

Remarque : Le nombre de pointes de filtres indiqué peut s'avérer différent du nombre affiché sur l'écran tactile, selon les paramètres, notamment le nombre de solutions témoins utilisées par lot.

Volume d'éluat choisi

Volume d'éluat choisi (µl)*	Volume d'éluat initial (µl)*
60	90
85	115
110	140

* Le volume d'éluat choisi sur l'écran tactile. Il correspond au volume minimum accessible d'éluat dans le tube d'éluat final.

† Le volume initial de solution d'éluat nécessaire pour assurer le même volume réel d'éluat que le volume choisi.

Préparation du mélange témoin interne-ARN entraîneur (CARRIER)-tampon AVE (AVE)

Volume d'éluat choisi (μ l)	Volume ARN entraîneur (CARRIER) (μ l)	Volume de solution témoin (μ l)*	Volume de tampon AVE (AVE) (μ l)	Volume final par échantillon (μ l)
60	3	9	108	120
85	3	11,5	105,5	120
110	3	14	103	120

* Le calcul de la quantité de solution témoin s'appuie sur les volumes d'éluat initiaux. Le volume mort supplémentaire dépend du type de tube utilisé pour l'échantillon ; pour en savoir plus, consulter la page www.qiagen.com/goto/dsphandbooks.

Remarque : Les valeurs indiquées dans le tableau sont destinées à la préparation du mélange solution témoin-ARN entraîneur (CARRIER) pour une analyse en aval nécessitant 0,1 μ l de solution témoin/ μ l d'éluat.

Lyse manuelle

Lors de la manipulation de produits chimiques, toujours porter une blouse de laboratoire, des gants jetables et des lunettes de protection adéquats. Pour plus d'informations, consulter les fiches techniques de données de sécurité (MSDS) appropriées, disponibles auprès du fournisseur du produit.

Les protocoles QIASymphony Complex comportent 4 étapes : lyse, fixation, lavage et éluat. Pour certains échantillons, il peut être utile de réaliser la lyse manuellement, par exemple pour inactiver les agents pathogènes dans une enceinte de sécurité biologique. Le protocole Complex400_OBL_V4_DSP permet d'effectuer une lyse manuelle selon une méthode similaire à celle du protocole Complex400_V4_DSP. Les échantillons prétraités sont transférés sur le QIASymphony SP pour être soumis au protocole Complex400_OBL_V4_DSP.

Remarque : Le protocole Complex400_OBL_V4_DSP utilise les tampons ACL (référence 939017) et ATL (ATL) (référence 939016) qui ne font pas partie du kit QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi et doivent être commandés séparément.

Lyse manuelle

1. Pipeter 40 μ l de protéinase K, 165 μ l de tampon ATL (ATL), 120 μ l de mélange de témoins internes d'ARN entraîneur et 315 μ l de tampon ACL dans un tube Sarstedt de 2 ml (références 72.693 ou 72.694).

Remarque : Si plusieurs échantillons doivent subir une lyse manuelle, il est possible de préparer une solution-mère de ce mélange. Il suffit pour cela de multiplier les volumes nécessaires à un échantillon par le nombre total d'échantillons à traiter et d'ajouter des volumes correspondants à 2 échantillons supplémentaires. Retourner le tube plusieurs fois pour mélanger puis, pour chaque échantillon, transférer 640 μ l de solution dans un tube Sarstedt de 2 ml et passer à l'Étape 4.

2. **Boucher le tube et le retourner 5 fois pour mélanger.**
3. **Centrifuger brièvement le tube pour éliminer les gouttelettes à l'intérieur du bouchon.**
4. **Ajouter 400 μ l d'échantillon dans le tube, boucher celui-ci et mélanger au vortex par impulsion de 10 secondes.**
5. **Incuber le tube à 68 °C pendant 15 minutes (\pm 1 minute).**
6. **Centrifuger brièvement le tube pour éliminer les gouttelettes à l'intérieur du bouchon.**
7. **Placer les adaptateurs correspondants aux tubes d'échantillons utilisés sur un porte-tubes et charger les tubes d'échantillon (non bouchés).**

Préparation des échantillons

Urine

L'urine peut être traitée sans prétraitement. Le système est optimisé pour les échantillons d'urine pure ne contenant aucun conservateur. Pour accroître la sensibilité aux pathogènes bactériens, les échantillons peuvent être centrifugés. Une fois le surnageant mis au rebut, le culot peut être remis en suspension dans au moins 400 μ l de solution tampon ATL (ATL) (référence 939016). Utiliser 400 μ l de substance prétraitée comme échantillon pour la préparation de la lyse manuelle.

Isolation de l'ADN génomique à partir d'une bactérie à gram positif

Il est possible d'améliorer la purification de l'ADN pour certaines bactéries à gram positif au moyen d'un prétraitement réalisé avant le transfert de l'échantillon dans le QIA Symphony SP et avant de lancer le protocole Complex400_OBL_V4_DSP.

1. **Sédimer les bactéries par centrifugation à 5000 x g pendant 10 minutes.**
2. **Suspendre le sédiment bactérien dans 400 μ l de la solution enzymatique adaptée (lysozyme à 20 mg/ml ou lysostaphine à 200 μ g/ml dans le Tris HCl 20 mM à pH 8,0, l'EDTA 2 mM et le Triton X-100 à 1,2 %).**
3. **Placer en incubation à 37 °C pendant au moins 30 minutes (\pm 2 minutes).**
4. **Centrifuger brièvement pour évacuer les gouttelettes formées sur l'intérieur du couvercle.**
5. **Utiliser 400 μ l de substance prétraitée comme échantillon pour la préparation de la lyse manuelle.**

Échantillons visqueux ou muqueux

Certains échantillons (comme les crachats ou les aspirations respiratoires) présentent une texture visqueuse et il convient de les liquéfier pour en permettre le pipetage. Les échantillons à faible viscosité ne nécessitent aucune préparation supplémentaire. Les échantillons à viscosité moyenne à élevée doivent être préparés comme suit.

1. **Diluer l'échantillon dans une solution à 1:1 de Sputasol*† (Oxoid, référence SR0233) ou 0,3% (w/v) de DTT.**

Remarque : Il est possible de préparer la solution de DTT à 0,3 % (w/v) à l'avance et de la conserver en aliquotes à -20 °C. Il convient de jeter les aliquotes décongelées après usage.

2. **Faire incuber à 37 °C jusqu'à ce que la viscosité de l'échantillon convienne au pipetage.**
3. **Utiliser 400 µl de substance prétraitée comme échantillon pour la préparation de la lyse manuelle.**

Fluide corporel séché et prélèvements de sécrétions

1. **Plonger l'embout sec de l'écouvillon dans 650 µl de solution tampon ATL (ATL) (référence 939016) et faire incuber à 56 °C pendant 15 minutes (± 1 minute), en mélangeant sans cesse. S'il n'est pas possible de mélanger, mélanger au vortex avant et après l'incubation pendant au moins 10 secondes.**
2. **Retirer l'écouvillon et en éliminer le liquide en le pressant contre la paroi interne du tube.**
3. **Utiliser 400 µl de substance prétraitée comme échantillon pour la préparation de la lyse manuelle.**

Remarque : Ce protocole est optimisé pour les écouvillons en coton ou en polyéthylène. Si d'autres types d'écouvillons sont utilisés, il peut être nécessaire d'ajuster le volume du tampon ATL (ATL) afin d'assurer un minimum de 400 µl d'échantillon disponible.

Prélèvements respiratoires ou urogénitaux

Les solutions de stockage des prélèvements respiratoires ou urogénitaux peuvent être utilisées sans prétraitement. Si l'écouvillon n'a pas été retiré, le presser contre la paroi du tube pour en extraire le liquide. Tout excès de mucus dans l'échantillon doit être à présent retiré à l'aide de l'écouvillon. Tout liquide résiduel du mucus ou de l'écouvillon doit être extrait en pressant l'écouvillon contre la paroi du tube. Pour finir, retirer, puis jeter l'écouvillon et le mucus. Si les échantillons sont visqueux, commencer par une étape de liquéfaction (voir « Échantillons visqueux ou muqueux » ci-dessus)

* Sputasol (Oxoid, référence SR0233, www.oxoid.com) ou dithiothréitol (DTT).

† Cette liste de fournisseurs n'est pas exhaustive.

avant de transférer l'échantillon dans le QIASymphony SP. Si le volume d'amorce est insuffisant, pipeter la solution tampon ATL (ATL) dans le milieu de transport pour ajuster le volume minimum requis, puis mélanger au vortex pendant 15 à 30 secondes dans le tube (si l'écouvillon est présent dans le milieu de transport, procéder à cette étape avant de le retirer). Utiliser 400 µl de substance comme échantillon pour la préparation de la lyse manuelle.

Pour obtenir des informations à jour et les clauses de responsabilité spécifiques aux produits, consulter le manuel du kit ou le manuel d'utilisation QIAGEN respectifs. Les manuels QIAGEN sont à demander auprès du support technique QIAGEN, ou bien à votre distributeur QIAGEN local. Il est possible de télécharger un certain nombre de manuels à cette adresse : www.qiagen.com/literature. Les fiches techniques de données de sécurité (MSDS) correspondant aux produits QIAGEN peuvent être téléchargées à l'adresse suivante : www.qiagen.com/Support/MSDS.aspx.

Marques de commerce : QIAGEN®, QIASymphony® (Groupe QIAGEN). Les noms enregistrés, les marques déposées etc., utilisés dans ce document, même si non mentionnés comme tels ne peuvent être considérés comme non protégés juridiquement.
© 2012 QIAGEN, tous droits réservés.

www.qiagen.com

Australia = 1-800-243-800

Austria = 0800/281010

Belgium = 0800-79612

Canada = 800-572-9613

China = 021-51345678

Denmark = 80-885945

Finland = 0800-914416

France = 01-60-920-930

Germany = 02103-29-12000

Hong Kong = 800 933 965

Ireland = 1800 555 049

Italy = 800 787980

Japan = 03-5547-0811

Korea (South) = 1544 7145

Luxembourg = 8002 2076

The Netherlands = 0800 0229592

Norway = 800-18859

Singapore = 65-67775366

Spain = 91-630-7050

Sweden = 020-790282

Switzerland = 055-254-22-11

UK = 01293-422-911

USA = 800-426-8157



Sample & Assay Technologies