

pigtype[®] Trichinella Ab **Gebrauchsinformation**



1 (Katalog-Nr. 273501)



5 (Katalog-Nr. 273503)



20 (Katalog-Nr. 273505)*

Multispezies ELISA-Kit zum Nachweis
von Antikörpern gegen *Trichinella* spp.

REF 273501, 273503, 273505*



QIAGEN Leipzig GmbH, Deutscher Platz 5b,
04103 Leipzig, Deutschland



* Nur auf Anfrage erhältlich.

QIAGEN Sample and Assay Technologies

QIAGEN ist der führende Anbieter von innovativen Probenvorbereitungs- und Testtechnologien zur Isolierung und Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen in biologischen Proben. Unsere fortschrittlichen und qualitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen sind ein Garant für Erfolg – von der Probenvorbereitung bis zum Ergebnis.

QIAGEN setzt Standards in den Bereichen:

- Reinigung von DNA, RNA und Proteinen
- Nukleinsäure- und Protein-Assays
- microRNA-Forschung und RNAi
- Automatisierung von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien

Unsere Mission ist es, Ihnen herausragende Erfolge und bahnbrechend neue Erkenntnisse bei Ihrer Arbeit zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.qiagen.com.

Zusätzlich bietet QIAGEN jetzt qualitativ hochwertige, einfach anzuwendende, sensitive molekulare Lösungen zum Nachweis von veterinärmedizinisch relevanten Pathogenen und zur Forschung an. Das veterinärmedizinische Produktangebot von QIAGEN umfasst eine breite Auswahl verschiedener pathogenspezifischer PCR-Assays und eine wachsende Auswahl an ELISA-Tests. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.qiagen.com/Animal-and-Veterinary-Testing.



Inhalt

Kit-Inhalt	6
Verwendungszweck	7
Symbole	7
Lagerung	8
Sicherheitshinweise	8
Qualitätskontrolle	9
Einleitung	10
Testprinzip	10
Zusätzlich benötigte Materialien	12
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	12
Vorbereitungen	13
Protokoll: ELISA zum Nachweis von Antikörpern gegen <i>Trichinella</i> spp.	15
Auswertung	17
Validitätskriterien	17
Interpretation der Ergebnisse	18
Hilfe zur Fehlersuche	19
Bestellinformationen	20
Kurzanleitung	23
Auswertung	23

Kit-Inhalt

<i>pigtype</i> Trichinella Ab			
Katalog-Nr.	273501	273503	273505*
Anzahl der Platten	1	5	20
Test Plate (Testplatte): Mikrotiterplatte mit 96 Kavitäten, beschichtet mit nicht-infektiösem <i>Trichinella</i> - E/S-Antigen	1	5	20
Sample Diluent (Verdünnungspuffer), gebrauchsfertig	1 x 60 ml	2 x 125 ml	2 x 500 ml
Negative Control (Negativkontrolle), gebrauchsfertig	1 x 1,5 ml	1 x 3,5 ml	2 x 3,5 ml
Positive Control (Positivkontrolle), gebrauchsfertig	1 x 1,5 ml	1 x 3,5 ml	2 x 3,5 ml
Wash Buffer (10x) (Waschpuffer, 10x)	1 x 125 ml	2 x 125 ml	2 x 500 ml
Conjugate (Anti-IgG-HRP- Konjugat), gebrauchsfertig	1 x 12 ml	1 x 60 ml	1 x 240 ml
TMB Substrate (TMB- [Tetramethylbenzidin]- Substratlösung), gebrauchsfertig	1 x 12 ml	1 x 60 ml	1 x 240 ml
Stop solution (Stopplösung), gebrauchsfertig	1 x 12 ml	1 x 60 ml	1 x 240 ml
Gebrauchsinformation	1	1	1

* Nur auf Anfrage erhältlich.

Verwendungszweck

pigtype Trichinella Ab ist ein indirekter Enzym-Immunoassay (ELISA) zum Nachweis von Antikörpern gegen *Trichinella* spp. in Serum, Plasma und Fleischsaftproben von Schweinen und Wildschweinen. Serum- und Plasmaproben von Schweinen können auch als Pools von bis zu 10 Einzelproben getestet werden.

Nur für den tierärztlichen Gebrauch.

Symbole



<N>

Kit enthält Reagenzien für <N> Platten



Hersteller



Chargennummer



Zur Verwendung bis



Zulässiger Temperaturbereich für die Lagerung



Gebrauchsinformation



Katalognummer



Materialnummer



Vor Licht schützen



Für Proben von Schwein und Wildschwein

Lagerung

Die Komponenten des *pigtype* Trichinella Ab ELISA-Kits sind bei 2–8°C zu lagern – unter diesen Lagerbedingungen sind sie mindestens bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar. Waschpuffer (10x) und Stopplösung können bei Raumtemperatur (18–25°C) gelagert werden, um die Bildung von Salzkristallen zu vermeiden. Falls der Kit Teststreifen enthält, sind nicht benutzte Teststreifen bis zur Verwendung im wieder verschlossenen Folienbeutel mit Trockenmittel bei 2–8°C zu lagern. Nach erstmaliger Öffnung des Plattenbeutels sind die Teststreifen mindestens 6 Wochen haltbar.

Sicherheitshinweise

Tragen Sie beim Umgang mit Chemikalien immer einen Laborkittel, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Weitere Informationen können Sie den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern entnehmen (*safety data sheets*, SDS). In unserer Online-Sammlung der Sicherheitsdatenblätter unter www.qiagen.com/safety finden Sie zu jedem QIAGEN-Kit und zu jeder Kit-Komponente das jeweilige SDS als PDF-Datei, die Sie einsehen und ausdrucken können.



VORSICHT: Die Stopplösung enthält 0,5 mol/l Schwefelsäure.

Alle Reste von Proben und mit Proben in Berührung gekommene Gegenstände sind als potenziell infektiöse Materialien zu entsorgen bzw. zu dekontaminieren.

Qualitätskontrolle

Gemäß dem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagement-System von QIAGEN wird jede Charge des Testkits *pigtype* Trichinella Ab nach festgelegten Prüfkriterien getestet, um eine einheitliche Produktqualität sicherzustellen.

Einleitung

pigtype Trichinella Ab ist ein hochempfindliches System zum Nachweis von Antikörpern gegen *Trichinella* spp. Die Trichinellose ist eine Zoonose, die durch Fadenwürmer der Gattung *Trichinella* verursacht wird und beim Menschen mild bis tödlich verlaufen kann. Die Infektion erfolgt bei Menschen durch den Verzehr von Fleisch, das *Trichinella*-Larven, sogenannte Trichinen, enthält. Beim Schwein verläuft die Infektion meist subklinisch. Mit Hilfe der Trichinenuntersuchung (künstliche Verdauung) wird verhindert, dass Fleisch infizierter Tiere in die Lebensmittelkette gelangt.

Gemäß der europäischen Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 können Betriebe unter bestimmten Voraussetzungen als trichinenfrei anerkannt werden. Ein Überwachungsprogramm ist dafür die Voraussetzung. Damit ist für Mastschweine in integrierten Produktionssystemen die alternative Überwachung über ein serologisches Monitoring auf *Trichinella*-Antikörper ohne kostenintensive Trichinenuntersuchung möglich. Der Testkit *pigtype* Trichinella Ab kann im Rahmen eines solchen Monitorings auf *Trichinella*-Infektionen eingesetzt werden.

Testprinzip

pigtype Trichinella Ab funktioniert nach dem Prinzip eines indirekten ELISA. Die Mikrotiterplatte ist mit inaktiviertem *Trichinella*-Antigen (E/S-Antigen) beschichtet. Während der Inkubation der Proben binden *Trichinella*-spezifische Antikörper an das immobilisierte Antigen, nichtgebundenes Material wird durch Waschen entfernt. Die an das Antigen gebundenen Serumantikörper werden durch ein Multispezies-Meerrettichperoxidasekonjugat (HRP-Konjugat) detektiert, nicht

gebundenes Konjugat wird durch Waschen entfernt. Durch Zugabe der Substratlösung wird eine Farbreaktion gestartet, die nach 10 Minuten wieder gestoppt wird. Sind *Trichinella*-spezifische Antikörper in der Probe vorhanden, bewirkt die Peroxidase eine blaue Farbentwicklung, die nach Abstoppen der Reaktion durch Zugabe der Stopplösung nach gelb umschlägt. Die optische Dichte (OD) wird im Photometer gemessen; sie ist proportional zur Konzentration der *Trichinella*-spezifischen Antikörper in der Probe.

Zusätzlich benötigte Materialien

Tragen Sie beim Umgang mit Chemikalien immer einen Laborkittel, Einmal-Laborhandschuhe und eine Schutzbrille. Weitere Informationen können Sie den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern (SDS) entnehmen, die Sie vom jeweiligen Hersteller beziehen können.

- Bechergläser
- Messzylinder
- Pipetten (verstellbar)
- Mehrkanalpipetten (verstellbar)
- Alufolie oder Abklebefolie zum Abdecken der Testplatte
- Gerät zum Einfüllen und Absaugen von Waschlösung (optional)
- Mikrotiterplatten-Photometer
- Reaktionsgefäße oder Vorverdünnungsplatten für die Verdünnung der Proben
- Destilliertes Wasser

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Folgendes sollte vom Anwender immer beachtet werden:

- Setzen Sie die TMB-Substratlösung während der Testdurchführung nicht starkem Lichteinfluss oder direktem Sonnenlicht aus.
- Die Komponenten des Testkits dürfen nicht verunreinigt und nicht mit Komponenten aus anderen Chargen vermischt werden.
- Benutzen Sie die Komponenten des Testkits nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Das für die Verdünnung des Waschpufferkonzentrates (10x) verwendete Wasser, insbesondere Wasser aus

Ionenaustauscheranlagen, kann bei ungenügender Reinheit die Reaktion beeinträchtigen. Wasser mit der Qualität von bidestilliertem Wasser oder Reinstwasser (Milli-Q) ist geeignet.

- Die Verwendung sorgfältig gereinigter Glasmaterialien, sorgfältiges Pipettieren und Waschen während der Testdurchführung und die genaue Einhaltung der angegebenen Inkubationszeiten sind unabdingbare Voraussetzungen, um die Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten.

Vorbereitungen

- Reagenzien unmittelbar vor der Benutzung auf Raumtemperatur (18-25 °C) bringen und durch Schwenken mischen. Eventuell gebildete Salzkristalle im Waschpuffer (10x) müssen durch Schwenken und leichtes Erwärmen wieder aufgelöst werden.

Waschpuffer: Waschpuffer (10x) 1:10 mit destilliertem Wasser verdünnen, z. B. für eine Testplatte 25 ml Waschpuffer (10x) in 225 ml destilliertem Wasser verdünnen und mischen.

Serum, Plasma: Serum- und Plasmaproben vor der Analyse **1:100** mit Verdünnungspuffer verdünnen (z. B. 5 µl Probe in 495 µl Verdünnungspuffer) und gut mischen. Verwenden Sie Plastik-Reaktionsgefäße oder unbeschichtete Vorverdünnungsplatten zur Verdünnung. Nach jeder Probe die Pipettenspitze wechseln.

Poolproben: Serum- und Plasmaproben können auch als Pools von 10 Einzelproben getestet werden (z. B. jeweils 10 µl

von 10 Einzelproben vereinigen und mischen). Poolproben vor der Analyse **1:20** mit Verdünnungspuffer verdünnen (z. B. 10 µl Poolprobe in 190 µl Verdünnungspuffer) und mischen.

Fleischsaft: Fleischsaftproben vor der Analyse **1:10** mit Verdünnungspuffer verdünnen (z. B. 25 µl Probe in 225 µl Verdünnungspuffer) und gut mischen.

Alternativ können die Fleischsaftproben direkt in der Testplatte verdünnt werden. Hierzu 90 µl Verdünnungspuffer in jede Kavität vorlegen, jeweils 10 µl unverdünnte Fleischsaftprobe hinzupipettieren und anschließend gut mischen (siehe Durchführung, Schritt 1a).

Die Fleischsaftproben aus etwa 10 g fettfreiem und von Blutverunreinigungen freiem Muskelfleisch (z. B. vom Zwerchfellpfeiler) extrahieren.

Die Fleischsaftproben in einem Fleischsaftbehälter einfrieren und wieder auftauen. Bei 2–8°C gelagerte Proben sollten innerhalb von 24 Stunden analysiert werden. Alternativ können die Proben bis zur Analyse bei –20°C über mehrere Monate gelagert werden.

- Die **Kontrollen** sind gebrauchsfertig und müssen nicht verdünnt werden.

Protokoll: ELISA zum Nachweis von Antikörpern gegen *Trichinella* spp.

Bitte lesen Sie den Abschnitt „Vorbereitungen“ auf Seite 13.

Durchführung

- 1. Jeweils 100 µl der gebrauchsfertigen Positiv- und Negativkontrolle (in Doppelbestimmung) sowie der 1:10 verdünnten Fleischsaftproben und/oder der 1:100 verdünnten Serum- oder Plasmaproben in die Kavitäten der Testplatte pipettieren.**
- 1a. Alternativ 90 µl Verdünnungspuffer in jede Kavität pipettieren und je 10 µl der unverdünnten Fleischsaftproben hinzufügen. Gut mischen.**
Halten Sie die Positionen der Kontrollen und Proben in einem Testprotokoll fest. Sie können zum Mischen entweder einen Plattenschüttler verwenden oder die Flüssigkeit wiederholt Auf- und Abpipettieren. Die Testplatte abdecken.
- 2. 60 min bei Raumtemperatur (18–25°C) oder über Nacht (12–18h) bei 2–8°C inkubieren.**
- 3. Die Flüssigkeit durch Absaugen oder Ausschlagen entfernen.**
- 4. Jede Kavität 3x mit je 300 µl angesetztem Waschpuffer waschen; nach jedem Waschen die Flüssigkeit durch Absaugen oder Ausschlagen entfernen.**
- 5. In jede Kavität 100 µl gebrauchsfertiges Anti-IgG-HRP-Konjugat geben und 30 min bei Raumtemperatur inkubieren.**
- 6. Die Flüssigkeit durch Absaugen oder Ausschlagen aus den Kavitäten entfernen.**

7. Jede Kavität 3x mit je 300 μ l angesetztem Waschpuffer waschen; nach jedem Waschen die Flüssigkeit durch Absaugen oder Ausschlagen entfernen.
8. In jede Kavität 100 μ l TMB-Substratlösung pipettieren.
9. 10 min bei Raumtemperatur im Dunkeln inkubieren. Beginn der Zeitmessung nach dem Füllen der ersten Kavität.
10. Reaktion durch Zugabe von 100 μ l Stopplösung pro Kavität stoppen. Die Stopplösung ist in der gleichen Reihenfolge wie die Substratlösung zuzugeben.
11. Messung der OD im Plattenphotometer bei 450 nm innerhalb von 20 min nach Abstoppen der Reaktion.
Optional kann zusätzlich bei 620–650 nm als Referenzwellenlänge gemessen werden.

Auswertung

Validitätskriterien

Die Ergebnisse sind gültig, wenn die folgenden Kriterien erfüllt werden:

- Der Mittelwert (MW) der gemessenen OD-Werte der Positivkontrolle (PK) muss $\geq 0,7$ sein.
- Der MW der gemessenen OD-Werte der Negativkontrolle (NK) muss $\leq 0,2$ sein.

Bei ungültigen Testergebnissen sollte der Test nach gründlichem Lesen der Gebrauchsinformation wiederholt werden.

Berechnung

Berechnen Sie aus den OD-Werten der Negativkontrolle (NK) und der Positivkontrolle (PK) jeweils die Mittelwerte (MW).

Berechnen Sie das Verhältnis der OD der Proben zum OD-Mittelwert der Positivkontrolle („S/P-Quotient“) nach der folgenden Formel:

$$S / P = \frac{OD_{\text{Probe}} - MW\ OD_{\text{Neg}}}{MW\ OD_{\text{Pos}} - MW\ OD_{\text{Neg}}}$$

Interpretation der Ergebnisse

Auswertung Kurzprotokoll (60 min Inkubationszeit)

Proben mit einem S/P-Quotienten $\geq 0,3$ werden als positiv befundet.

Es wurden spezifische Antikörper gegen *Trichinella* spp. nachgewiesen.

Proben mit einem S/P-Quotienten $< 0,3$ werden als negativ befundet.

Spezifische Antikörper gegen *Trichinella* spp. wurden nicht nachgewiesen.

Auswertung Übernachtprotokoll (Inkubation über Nacht)

Proben mit einem S/P-Quotienten $\geq 0,45$ werden als positiv befundet.

Es wurden spezifische Antikörper gegen *Trichinella* spp. nachgewiesen.

Proben mit einem S/P-Quotienten $< 0,45$ werden als negativ befundet.

Spezifische Antikörper gegen *Trichinella* spp. wurden nicht nachgewiesen.

Hilfe zur Fehlersuche

Die Wissenschaftler des Technischen Service bei QIAGEN beantworten gerne Ihre Fragen zu den Angaben und Protokollen in diesem Handbuch sowie zu Probenvorbereitungs- und Testtechnologien allgemein (Möglichkeiten der Kontaktaufnahme finden Sie auf der hinteren Umschlagseite und im Internet unter www.qiagen.com).

Bestellinformationen

Produkt	Inhalt	Kat.-Nr.
<i>pigtype</i> Trichinella Ab (1)	Für 96 Reaktionen: 1 Testplatte (Streifen), Waschpuffer, Verdünnungspuffer, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Anti-IgG-HRP-Konjugat, TMB-Substratlösung, Stopplösung	273501
<i>pigtype</i> Trichinella Ab (5)	Für 480 Reaktionen: 5 Testplatten (Streifen), Waschpuffer, Verdünnungspuffer, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Anti-IgG-HRP-Konjugat, TMB-Substratlösung, Stopplösung	273503
<i>pigtype</i> Trichinella Ab (20)*	Für 1920 Reaktionen: 20 Testplatten, Waschpuffer, Verdünnungspuffer, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Anti-IgG-HRP-Konjugat, TMB-Substratlösung, Stopplösung	273505
Verwandte Produkte		
<i>pigtype</i> Salmonella Ab (5)†	Für 480 Reaktionen: 5 Testplatten (Streifen), Waschpuffer, Verdünnungspuffer, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Anti-IgG-HRP-Konjugat, TMB-Substratlösung, Stopplösung	273003

* Nur auf Anfrage erhältlich.

† Kit ist auch in anderen Größen erhältlich; siehe www.qiagen.com.

Produkt	Inhalt	Kat.-Nr.
<i>pigtype</i> Toxoplasma Ab (5)*	Für 480 Reaktionen: 5 Testplatten (Streifen), Waschpuffer, Verdünnungspuffer, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Anti-IgG-HRP-Konjugat, TMB-Substratlösung, Stopplösung	273403
<i>pigtype</i> Yersinia Ab (1)*	Für 96 Reaktionen: 1 Testplatte (Streifen), Waschpuffer, Verdünnungspuffer, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Anti-IgG-HRP-Konjugat, TMB-Substratlösung, Stopplösung	273801

* Kit ist auch in anderen Größen erhältlich; siehe www.qiagen.com.

QIAGEN bietet zum Nachweis von veterinärmedizinisch relevanten Pathogenen eine Auswahl verschiedener ELISA Kits sowie real-time PCR und real-time RT-PCR Kits an. Weitere Informationen zu den Produktgruppen *bactotype*[®], *cador*[®], *cattletype*[®], *flocktype*[®], *pigtype* und *virotype*[®] und finden Sie im Internet unter www.qiagen.com/Animal-and-Veterinary-Testing.

Aktuelle Lizenzinformationen und produktspezifische Anwendungseinschränkungen finden Sie im jeweiligen QIAGEN Kit- oder Geräte-Handbuch. QIAGEN Kit- und Geräte-Handbücher stehen im Internet unter www.qiagen.com zur Verfügung oder können vom Technischen Service von QIAGEN oder Ihrem Händler vor Ort angefordert werden.

Kurzanleitung

Probenverdünnung:

Serum/Plasma 1:100

Fleischsaft 1:10

Schritt	Kurzprotokoll	Übernachtprotokoll
1. Probe	100 µl/Kavität	
2. Inkubation	60 min RT	über Nacht 2–8°C
3. Waschen	3 x 300 µl	
4. Konjugat	100 µl/Kavität	
5. Inkubation	30 min RT	
6. Waschen	3 x 300 µl	
7. TMB	100 µl/Kavität	
8. Inkubation	10 min RT	
9. Stopp	100 µl/Kavität	
10. Messung	450 nm	

Auswertung

	Negativ	Positiv
Kurzprotokoll	S/P < 0,3	S/P ≥ 0,3
Übernachtprotokoll	S/P < 0,45	S/P ≥ 0,45

Notizen

Warenzeichen/Markennamen: QIAGEN®, *bactotype*®, *cador*®, *cattletype*®, *flocktype*®, *pigtype*®, *virotype*® (QIAGEN-Gruppe). Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die in diesem Handbuch verwendeten Markennamen oder Warenzeichen ungeschützt sind, auch wenn sie nicht als Markenname oder Warenzeichen gekennzeichnet sind.

Eingeschränkte Nutzungsvereinbarung für den *pigtype* Trichinella Ab

Mit der Nutzung dieses Produkts erkennen Käufer und Anwender des Produkts die folgenden Bedingungen an:

1. Das Produkt darf nur gemäß den mit dem Produkt zur Verfügung gestellten Protokollen und diesem Handbuch und mit den Komponenten, die im Kit geliefert werden, verwendet werden. QIAGEN gewährt im Rahmen seiner Eigentumsrechte keinerlei Lizenz, die zum Kit gehörenden Komponenten mit anderen Komponenten, die nicht zum Kit gehören, zu verwenden oder zu kombinieren, mit Ausnahme der in mit dem Produkt zur Verfügung gestellten Protokollen, diesem Handbuch sowie in zusätzlichen, unter www.qiagen.com verfügbaren Protokollen beschriebenen Anwendungen. Einige dieser zusätzlichen Protokolle wurden von Anwendern für andere Anwender zur Verfügung gestellt. Diese Protokolle wurden von QIAGEN nicht vollständig getestet und optimiert. QIAGEN gewährt auf diese Protokolle keine Garantie und übernimmt auch keine Garantie dafür, dass sie die Rechte Dritter nicht verletzen.
2. Über die ausdrücklich erwähnten Lizenzanwendungen hinaus übernimmt QIAGEN keinerlei Garantie dafür, dass dieser Kit und/oder die mit ihm durchgeführte(n) Anwendung(en) die Rechte Dritter nicht verletzen.
3. Dieser Kit und seine Komponenten sind für die einmalige Verwendung lizenziert und dürfen nicht wiederverwendet, wiederaufgearbeitet oder weiterverkauft werden.
4. QIAGEN lehnt außer der ausdrücklich gewährten Lizenzgewährung jede weitere Lizenzgewährung ab, sowohl ausdrücklich als auch konkludent.
5. Käufer und Anwender des Kits stimmen zu, keinerlei Schritte zu unternehmen oder anderen die Einleitung von Schritten zu gestatten, die zu unerlaubten Handlungen im obigen Sinne führen könnten oder solche erleichtern könnten. QIAGEN kann die Verbote dieser eingeschränkten Nutzungsvereinbarung an jedem Ort gerichtlich geltend machen und wird sämtliche Ermittlungs- und Gerichtskosten, inklusive Anwaltsgebühren, zurückfordern, die ihm bei der Geltendmachung dieser eingeschränkten Nutzungsvereinbarung oder irgendeines seiner geistigen Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Kit und/oder dessen Komponenten entstehen.

Aktualisierte Nutzungs- und Lizenzbedingungen können unter www.qiagen.com nachgelesen werden.

© 2015 QIAGEN, alle Rechte vorbehalten.

www.qiagen.com

Austria ■ techservice-at@qiagen.com

Germany ■ techservice-de@qiagen.com

Switzerland ■ techservice-ch@qiagen.com

