

1 QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus)


Skúmavky na odber krvi Balenie pre jedného pacienta

(Kat. č. 622222) Na použitie do nadmorskej výšky 810 m
(Kat. č. 623222) Na použitie v nadmorskej výške od 1020 m do 1875 m

OBSAH

4 skúmavky na odber krvi QFT-Plus (Nil, TB1, TB2, Mitogen)

1 príbalový leták

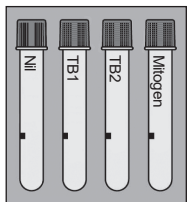


1085211SK Rev. 04 09/2018

⚠ Použitie mimo uvedeného rozsahu nadmorskej výšky môže viesť k zmene objemu odobratej krvi.
Na použitie so súpravou QFT-Plus ELISA (Kat. č. 622120 a 622822).



2 ODBER KRVI

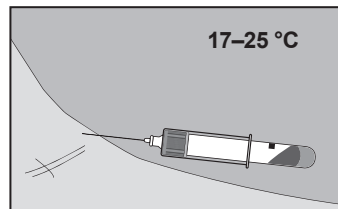

VAROVANIE:

- Postupujte podľa štandardných preventívnych opatrení týkajúcich sa manipulácie s krvou.
- Skúmavky je možné skladovať a musia sa používať pri izbovej teplote (17 °C – 25 °C).

Krv odoberte pomocou venepunkcie.

Podtlak vyplní do objemu 1 ml (čierna značka predstavuje prijateľný rozsah 0,8 – 1,2 ml).

Prietok krvi môže byť pomalý.

Po ukončení prietoku podržte skúmavku na ihle ďalšie 2 – 3 sekundy.


Ak hladina nedosiahne značku, opakujte činnosť s novou skúmavkou.

Technická rada

Ihly s krídelkami – pred začatím plnenia skúmaviek QFT-Plus naplňte hadičku so štandardnou skúmavkou (nie je súčasťou balenia).

2

3 ODBER KRVI

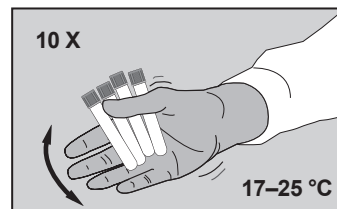

Ihneď po naplnení skúmaviek pretrepte ich obsah desať (10) krát, čo postačuje na to, aby sa celý vnútorný povrch skúmavky pokryl krvou a aby sa rozpustili antigény na stenách skúmavky.




V čase plnenia krvou by mala byť teplota skúmavky 17 – 25 °C.

Nadmerné trepanie môže viesť k rozkladu gélu a k odchylným výsledkom.

Skúmavky správnym spôsobom označte.

3

4 PREPRAVA/INKUBÁCIA

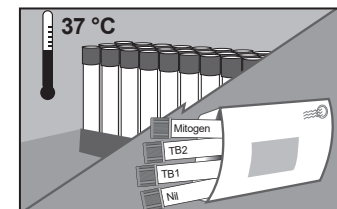

MOŽNOSŤ 1
Inkubácia v
laboratóriu

Preneste skúmavky do laboratória pri teplote 17 – 27 °C. Krv je potrebné čo najskôr (najneskôr však do 16 hodín od odberu) inkubovať pri teplote 37 °C.


Laborátni pracovníci musia premiešať obsah skúmaviek tak, že ich 10-krát otočia, a to bezprostredne pred inkubáciou s teplotou 37 °C.

Technická rada

Skúmavky označte nadpisom „neinkubované“.

4

5 PREPRAVA/INKUBÁCIA

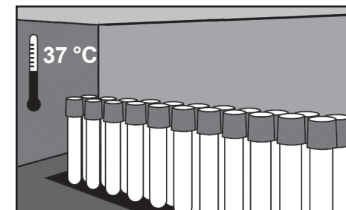

MOŽNOSŤ 2
Inkubácia na
mieste odberu

Krv je potrebné inkubovať vo vzpriamenej polohe čo najskôr (najneskôr však do 16 hodín od odberu). Skúmavky inkubujte vo **vzpriamenej polohe** pri teplote 37 °C po dobu 16 – 24 hodín.


Inkubátory možno zakúpiť od spoločnosti QIAGEN.

Technická rada

Nevyžaduje sa vlhkosť/CO₂.

Ak nebudete skúmavky inkubovať pri teplote 37 °C čo najskôr po odbere, **bezprostredne pred samotnou inkubáciou je potrebné premiešať obsah skúmaviek ich otočením 10-krát.**

6 PREPRAVA/INKUBÁCIA

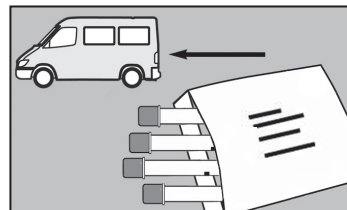

MOŽNOSŤ 2
(pokračovanie)

Prepravte **inkubované** skúmavky do testovacieho laboratória (do 3 dní).
Skúmavky uchovávajte v prostredí s teplotou 4 – 27 °C.

Technická rada


Skúmavky označte nadpisom „inkubované“.



www.QuantiFERON.com

6

7 ODS TREĎOVANIE

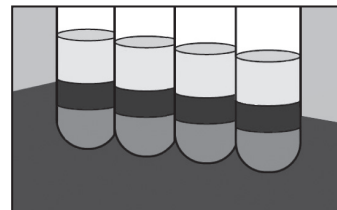

Pred začatím analýzy vzoriek odstreďte skúmavky.

Skúmavky odstreďte s otáčkami 2 000 – 3 000 g po dobu 15 minút.

Otestujte plazmu pomocou QFT-Plus ELISA alebo LIAISON® QuantiFERON-TB Gold Plus System (REF: 311010).

Plazma v odstredeních skúmavkách ostane stabilná po dobu 28 dní pri uchovávaní skúmaviek v prostredí s teplotou 2 – 8 °C.

Aktuálne licenčné a právne informácie týkajúce sa produktu nájdete v príbalovom letáku k QFT-Plus ELISA alebo LIAISON QuantiFERON-TB Gold Plus System.

7

8 KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

QIAGEN
Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com
Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com
Middle East/Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com
Latin America (not including Brazil or Mexico): techservice-latam@qiagen.com
Mexico: techservice-MX@qiagen.com
Brazil: techsebr@qiagen.com



QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Nemecko
+49-2103-29-0



IVD



4 °C – 25 °C



Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, QFT®, QuantiFERON® (skupina QIAGEN), LIAISON® (DiaSorin).

© 2016-2018 QIAGEN. Všetky práva vyhradené.

— Sample to Insight —

