



Juillet 2023

Remarque importante

Durée de stockage de l'ADNc — *therascreen*[®] FGFR RGQ RT-PCR Kit (24),
RÉF 874711

Cher utilisateur du *therascreen* FGFR RGQ RT-PCR Kit,

Veuillez noter que l'information concernant le stockage à court terme de l'ADNc à une température comprise entre -30 et -15 °C n'est pas correcte dans le mode d'emploi.

L'information correcte dans la procédure « Transcription inverse » à la page 28, étape 21 concernant le stockage à court terme des échantillons d'ADNc est la suivante :

Stocker les échantillons d'ADNc jusqu'à leur utilisation comme matrice pour l'étape de PCR. Pour un stockage à court terme, les échantillons peuvent être conservés à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 5 jours maximum, ou à une température comprise entre -30 et -15 °C pendant **10** jours maximum.

Pour l'utilisation continue du *therascreen* FGFR RGQ RT-PCR Kit RÉF 874711 :

- Utilisez les informations relatives au stockage de l'ADNc décrites dans la présente Remarque importante.
- Étudiez cet avis avec votre directeur de laboratoire/médical.
- Transmettez ces informations à toutes les personnes et à tous les services de votre organisation qui utilisent le *therascreen* FGFR RGQ RT-PCR Kit RÉF 874711, version 1.

Mesures prises par QIAGEN

QIAGEN travaille à la correction du mode d'emploi (manuel).

Traductions de la présente Remarque importante

QIAGEN fournit la Remarque importante au format papier, en anglais. Les traductions de la Remarque importante sont disponibles sous forme électronique, au format PDF. Vous pouvez accéder aux traductions dans l'onglet Product Resources (Ressources produit) de la page *therascreen*[®] FGFR RGQ RT-PCR Kit sur www.qiagen.com.

Pour toute question ou préoccupation, contactez les services techniques de QIAGEN à l'une des adresses suivantes :

Filiales QIAGEN

www.qiagen.com/de/about-us-old/contact/global-contacts/subsidiaries

Partenaires commerciaux et importateurs QIAGEN

www.qiagen.com/de/about-us-old/contact/global-contacts/distributors-and-importers

Nous sommes sincèrement désolés de la gêne occasionnée et vous remercions par avance de votre coopération.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

QIAGEN

www.qiagen.com

Marques commerciales : QIAGEN[®], Sample to Insight[®], *therascreen*[®] (groupe QIAGEN). Les noms déposés, marques de commerce, etc. cités dans ce document doivent être considérés comme protégés par la loi, même s'ils ne sont pas spécifiquement signalés comme tels.
1132390FR 07-2023 HB-3436-001 © 2023 QIAGEN, tous droits réservés.