
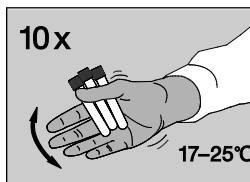


QuantiFERON-CMV  
ELISA kittel történő  
használathoz  
(Kat. szám: 0350-0201).

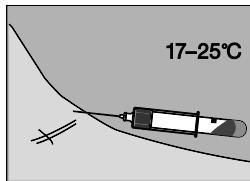

## QuantiFERON®-CMV

vérvételi csövek

Single Patient Pack

Kat. szám: 0192-0301

KISZERELÉS TARTALMA

3 x 1 ml-es QF-CMV vérvételi cső (Nil, CMV Antigen,  
Mitogen)

1 x kézikönyv

További információkért tanulmányozza a **QuantiFERON-  
CMV kézikönyvet** az alábbi honlapon:

[www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com).

### VÉRVÉTEL

**!** FIGYELMEZTETÉS:

- A vérrel történő munkával kapcsolatos biztonsági előírásokat kell követni.
- A csövek tárolási hőmérséklete 4 °C–25 °C, alkalmazáskor pedig legyenek szobahőmérsékletűek (17 °C–25 °C).

A vérvételt vénapunkcióval végezze.

*A vákuum hatására a cső a fekete jelölésig (1 ml) telik meg. Lassú lehet a véráramlás. Az áramlás megszűnését követően tartsa a tűn a csövet 2-3 másodpercig. Töltse meg a csövet még több vérrel, amíg a vér szintje nem került a jelölés közelébe.*

### Technikai tanács

Pillangótű – töltse fel a csőrendszert egy erre használatos cső segítségével (nem képezi az alapkiszérelés részét) a QuantiFERON-CMV csövek megtöltése előtt.

### VÉRVÉTEL

Közvetlenül a megtöltést követően rázza meg a csöveket **10x** tízszer (10) kellő erősséggel ahhoz, hogy a cső teljes belső felszíne vérrel legyen borítva, ami a csőfalon található antigének feloldásához szükséges.




*Miközben vérrel tölti meg a csöveket, azok hőmérsékletének 17–25° C között kell lennie. A túlságosan erős rázás a gél felszakadását okozhatja, aminek köszönhetően téves eredményeket kaphat.*

Végezze el a csövek megfelelő címkézését.



Sample & Assay Technologies

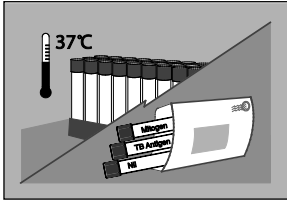

## SZÁLLÍTÁS / INKUBÁLÁS

④


A csöveket 17–27 °C hőmérsékleten szállítsa laboratóriumba. A vért, amilyen gyorsan csak lehet, fel kell melegíteni 37 °C-ra (a vérvételtől számított 16 órán belül).

*A laboratóriumi személyzet feladata, hogy közvetlenül a 37 °C-ra való inkubálás előtt újra felrúzzák a csöveket.*

### Technikai tanács

A csöveket lássa el "Nem inkubált" címkével.

### 1. LEHETŐSÉG Inkubálás laboratóriumban

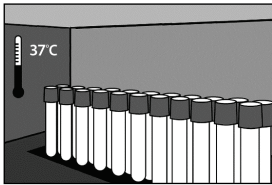

## SZÁLLÍTÁS / INKUBÁLÁS

⑤

A vért, amilyen gyorsan csak lehet, inkubálni kell (a vérvételtől számított 16 órán belül). A csöveket melegítse fel álló helyzetben 37 °C-ra, és tartsa ezen a hőmérsékleten 16–24 órán keresztül.


*Inkubátorok beszerezhetők a QIAGEN-től.*

### Technikai tanács

Páratartalom/CO<sub>2</sub> nem szükséges.

### 2. LEHETŐSÉG Inkubálás a vérvétel helyén

Ha a csövek nincsenek 37 °C-on inkubálva a vérvételt követően, közvetlenül az inkubálás előtt fordítsa meg a csöveket 10-szer, hogy a tartalmuk újrakeveredjen.

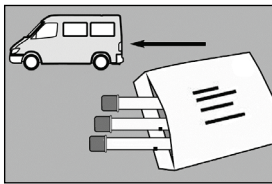

## SZÁLLÍTÁS / INKUBÁLÁS

⑥


Szállítsa az inkubált csöveket a vizsgálati laboratóriumba (3 napon belül, ha nincsenek centrifugálva).

*Tartsa a csöveket 4–27 °C közötti hőmérsékleten.*

### Technikai tanács

A csöveket lássa el "Inkubált" címkével.

### 2. LEHETŐSÉG (folytatás)

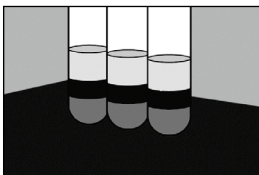

## CENTRIFUGÁLÁS

⑦

Mintavétel előtt centrifugálja a csöveket.

*Pörgesse le a csöveket 2000–3000 g értéken 15 percen keresztül.*

Centrifugált csövekben a plazma 28 napig marad stabil 2–8 °C tárolási hőmérsékleten.

Az engedélyezéssel kapcsolatos aktuális tudnivalókat és termékspecifikus nyilatkozatokat a QuantiFERON-CMV ELISA kézikönyvben talál.

## ELÉRHETŐSÉGEK

⑧

### QIAGEN

Asia-Pacific: [techservice-ap@qiagen.com](mailto:techservice-ap@qiagen.com)

Europe: [techserviceQFT-eu@qiagen.com](mailto:techserviceQFT-eu@qiagen.com)

Middle East / Africa: [techserviceQFT-eu@qiagen.com](mailto:techserviceQFT-eu@qiagen.com)

USA / Canada: [techservice-na@qiagen.com](mailto:techservice-na@qiagen.com)

Latin America (not including Brazil or Mexico):

[techservice-latam@qiagen.com](mailto:techservice-latam@qiagen.com)

Mexico: [techservice-MX@qiagen.com](mailto:techservice-MX@qiagen.com)

Brazil: [techsebr@qiagen.com](mailto:techsebr@qiagen.com)

[www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com)

Védjegyek: QIAGEN®, QuantiFERON® (QIAGEN Csoport).

© 2017 QIAGEN, minden jog fenntartva

1075109HU Rev. 01 01/2017



**QIAGEN**

19300 Germantown Road  
Germantown, MD 20874  
USA  
+1-800-426-8157



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
Germany



---

Sample & Assay Technologies