


## digene® HC2 DNA Collection Device

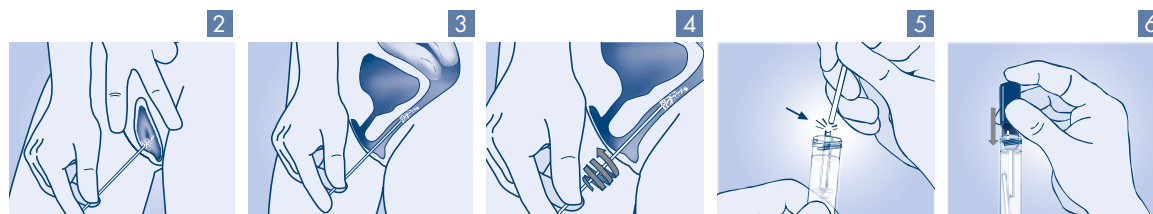

### Naziv i namjena

Uređaj za prikupljanje *digene* HC2 DNA Collection Device namijenjen je za prikupljanje i transport cervikalnih ispitaka koje je prikupio liječnik radi testiranja isključivo s pomoću testova *digene* Hybrid Capture® 2 (HC2) HPV i CT/GC DNA Test te samostalno prikupljenih vaginalnih ispitaka radi testiranja isključivo s pomoću testa *digene* HC2 High-Risk HPV DNA Test®. OVAJ UREĐAJ NIJE NAMIJENJEN ZA PRIKUPLJANJE UZORAKA ZA PAPA TEST.

Za najbolje rezultate korisnici moraju prvo pročitati ove upute prije nego što započnu prikupljanje, a zatim izvesti svaki korak navedenim redoslijedom. Za upute o čuvanju, transportu ispitaka ili postupku prikupljanja koje obavlja liječnik pogledajte upute za uporabu za ispitke koje prikuplja liječnik u kutiji za isporuku.

### Reagensi i isporučeni materijali

1 × 1 **BRUSH** četkica

1 × 1 ml **STM** transportnog medija za ispitke (sadržava 0,05 % natrijeva azida)

### Upozorenja i mjere opreza



Transportni medij za ispitke: Upozorenje! Uzrokuje blago nadraživanje kože. Nosite zaštitne rukavice / zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice. Odmah vodom i sapunom operite zahvaćeno područje kože i temeljito isperite. Pogledajte poleđinu za upute o uzimanju ispitaka i rukovanju.



Za jednokratnu uporabu



Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno

- Uporaba cervikalnih četkica nije dopuštena za trudnice. Obavijestite svog liječnika ako mislite da biste mogli biti trudni.


- Transportni medij za ispitke (tekućinu iz epruvete) nemojte stavljati u usta niti gutati. Ako tekućinu iz epruvete stavite u usta ili progutate, odmah se obratite liječniku.
- Nemojte udisati transportni medij za ispitke (tekućinu iz epruvete). Ako udahnate tekućinu iz epruvete, izađite na svjež zrak; obratite se liječniku u slučaju tegoba.
- Ako tekućina iz epruvete dođe u kontakt s vašim očima, ispirite otvoreno oko nekoliko minuta pod tekućom vodom. Zatim se obratite liječniku.
- Sve ljudske ispitke smatrajte potencijalno zaraznima.
- Upotrebljavajte samo testove *digene* HC2 HPV DNA i *digene* HC2 CT/GC DNA Test za cervikalne ispitke koje uzima liječnik. Ispitci prikupljeni ovim sustavom ne mogu se upotrebljavati za kulturu.
- Upotrebljavajte samo test *digene* HC2 High-Risk HPV DNA Test za vaginalne ispitke koji se uzimaju samostalno. Ispitci prikupljeni ovim sustavom ne mogu se upotrebljavati za kulturu.
- Nemojte uzimati vaginalne ispitke koji se prikupljaju samostalno ako upotrebljavate kremu protiv gljivica ili kontracepcijski gel.
- Nemojte dodirivati četkicu prije ili nakon uzimanja ispitka.
- Nemojte četkicom dodirivati nijednu površinu izvan epruvete za prikupljanje.
- Samostalno prikupljanje namijenjeno je za uporabu pod vodstvom medicinskog stručnjaka.




Transportni medij za ispitke sadrži natrijev azid koji može reagirati s olovnim ili bakrenim cijevima i tvoriti iznimno eksplozivne spojeve metalnih azida. Odložite proizvod u otpad u skladu s lokalnim propisima. **Obratite se svom lokalnom predstavniku tvrtke QIAGEN ili lokalnom medicinskom stručnjaku za upute o postupku odlaganja u otpad ili čišćenja u slučaju da dođe do prolijevanja.**

epruveti). Pričvrstite poklopac (6. korak), jasno obilježite epruvetu, a zatim je predajte medicinskom stručnjaku.

### Upute za čuvanje

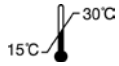

Komplete čuvajte na temperaturi od 15 do 30 °C. Nemojte ih upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti naznačenog pokraj simbola  na naljepnici vrećice.

### Uzimanje ispitaka i rukovanje

#### Postupak samostalnog uzimanja vaginalnog ispitka

1. Odvrnite ili povucite čep s epruvete i odložite ga na tvrdi ravnu površinu tako da unutrašnjost čepa bude okrenuta prema gore. Pazite da ne prolijete transportni medij za ispitke (tekućinu u epruveti).
2. Nježno otvorite vanjski dio svoje rodnice i umetnite četkicu u otvor (2. korak).
3. Nastavite umetati četkicu nježnim rotiranjem četkice ulijevo ili udesno sve dok ne osjetite otpor (3. korak). Ako osjećate bol ili veliku nelagodu, prekinite i posavjetujte se s medicinskom sestrom ili liječnikom.
4. Nježno držite četkicu na mjestu. Polagano brojite do 10 prije rotiranja. Rotirajte četkicu 5 puta ukруг kako biste prikupili uzorak (4. korak).
5. Izvadite četkicu iz rodnice i odložite je u isporučenu epruvetu (s četkicom okrenutom prema dolje) tako da dotakne dno. Prelomite kraj drške tako da ga otkinete na liniji na dršci držeći pritom epruvetu čvrsto jednom rukom dok drugu ruku postavljate blizu kraja četkice (5. korak). Nakon otkidanja drške bacite otkinuti dio.
6. Samo bi donji dio, s četkicom okrenutom prema dolje, trebao biti u epruveti i uronjen u transportni medij za ispitke (tekućinu u

Zaštitni znakovi: QIAGEN®, *digene*® Hybrid Capture® (QIAGEN Group).  
© 2015. – 2019. QIAGEN, sva prava pridržana.

