

Μάρτιος 2022

Σημαντική σημείωση

Αγαπητέ χρήστη του *artus*[®] SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit,

Η QIAGEN είναι αφοσιωμένη στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες ώστε να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες με κορυφαία αξία. Υπό αυτό το πρίσμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια αλλαγή όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στις Οδηγίες χρήσης (Εγχειρίδιο) του *artus* SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit.

Στον Πίνακα 17 του εγχειριδίου, οι παράμετροι ανάλυσης για το κανάλι Yellow στο Rotor-Gene[®] Q (RGQ) MDx πλέον θα περιλαμβάνουν την **Αφαίρεση έκτοπων τιμών: Τιμή κατωφλίου απόδοσης** αντίδρασης σε τιμή της τάξεως του **-85%** (η νέα παράμετρος βρίσκεται στο μπλε κείμενο στον Πίνακα 1 παρακάτω).

Πίνακας 1. Παράμετροι ανάλυσης για το RGQ MDx

Κανάλια	Green	Red	Yellow
Τιμή κατωφλίου φθορισμού	0,03	0,03	0,03
Διόρθωση κλίσης	Ναι	Ναι	Ναι
Δυναμικό σκληνάριο	Ναι	Ναι	Ναι
Σημείο μέτρησης	Όχι	10 – 20	10 – 20
Αφαίρεση έκτοπων τιμών: Τιμή κατωφλίου απόδοσης αντίδρασης	Ναι Ενεργοποίηση 0%	Όχι	Ναι Ενεργοποίηση -85%
Διαγραφή κύκλων έναρξης	5	5	5
Κύκλοι αποκοπής	Τιμή Ct >38,00 εκλαμβανόμενη ως 40,00	Όχι	Τιμή Ct >35,00 εκλαμβανόμενη ως 40,00

Η νέα παράμετρος ανάλυσης προστίθεται ώστε να αποφευχθεί πιθανή εσφαλμένη μη εγκυρότητα ή/και ψευδή-θετικά αποτελέσματα, και δεν επηρεάζεται η απόδοση του προϊόντος από την αλλαγή. Το λογισμικό ανάλυσης θα παραμείνει αμετάβλητο.

Οι πληροφορίες αυτές θα προστεθούν επίσης σε μελλοντικές αναθεωρήσεις του εγχειριδίου.

Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών της QIAGEN ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της QIAGEN.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της QIAGEN