

Sierpień 2020 r.

Ważna uwaga

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Szanowni Użytkownicy zestawu *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit!

Jak już wcześniej informowaliśmy, firma QIAGEN wprowadza zmiany w instrukcjach użycia zestawów *therascreen* EGFR PCR w celu zmniejszenia ryzyka wynikającego z obecności artefaktów sygnału fluorescencyjnego, które powodują unieważnienie reakcji lub generowanie wyników fałszywie pozytywnych względem mutacji, oraz podkreślenia znaczenia dokładnego wymieszania odczynników. W celu uniknięcia wyników fałszywie pozytywnych spowodowanych przez takie artefakty sygnału fluorescencyjnego wprowadzono niższy punkt odcięcia wartości delta C_T (ΔC_T) oraz dodatkową ręczną kontrolę wartości delta CT (ΔCT).

W niniejszej Ważnej uwadze przekazujemy informację o zmianie w automatycznym wywoływaniu wyników w oprogramowaniu Rotor-Gene oraz o nowych wydaniach odpowiednich instrukcji obsługi zestawów:

- Wydanie 7 do zestawu REF 874111 *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Wydanie 5 do zestawu REF 870311 *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Nowe wydania instrukcji obsługi zawierają wszystkie odpowiednie zmiany w instrukcjach użycia. Więcej informacji znajdą Państwo w historiach zmian instrukcji obsługi odpowiednich zestawów *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit.

Pakiet oznaczeń do automatycznego wywoływania wyników (dostępny tylko dla zestawu REF 874111) można pobrać ze strony internetowej produktu *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit pod adresem **www.qiagen.com**.



Aby pobrać pakiet oznaczeń, należy przejść do sekcji „**Product Resources**” (Zasoby dotyczące produktu) > „**Supplementary Protocols**” (Protokoły uzupełniające).

Tłumaczenia niniejszej Ważnej uwagi

Firma QIAGEN udostępnia drukowaną wersję Ważnej uwagi w języku angielskim. Tłumaczenia Ważnej uwagi są dostępne w postaci elektronicznej, w formacie PDF (Portable Document Format). Przetłumaczone dokumenty są dostępne w witrynie **www.qiagen.com** na karcie „Product Resources” (Zasoby dotyczące produktu) strony odpowiedniego produktu.

Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami prosimy zwracać się do lokalnego działu serwisu firmy QIAGEN. Informacje kontaktowe można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Przedsiębiorstwa zależne firmy QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

Partnerzy handlowi firmy QIAGEN i importerzy:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Z poważaniem

QIAGEN

www.qiagen.com