

Wichtiger Hinweis

Lagerungszeiten von cDNA für das *therascreen*[®] FGFR RGQ RT-PCR Kit (24), REF 874711

Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender des *therascreen* FGFR RGQ RT-PCR Kits,

bitte beachten Sie, dass die Angaben zur kurzfristigen Lagerung von cDNA bei -30 bis -15 °C in der Gebrauchsanweisung nicht korrekt sind.

Im Abschnitt „Reverse transcription“ (Reverse Transkription) auf S. 28 muss die Information zur kurzfristigen Lagerung von cDNA-Proben in Schritt 21 wie folgt lauten:

Lagern Sie die cDNA-Proben, bis sie für den PCR-Schritt verwendet werden. Für eine kurzfristige Lagerung können die Proben maximal 5 Tage lang bei $2-8$ °C aufbewahrt werden. Alternativ ist eine Lagerung bei -30 bis -15 °C für maximal **10** Tage möglich.

Um das *therascreen* FGFR RGQ RT-PCR Kit, REF 874711, weiterhin verwenden zu können:

- Verwenden Sie die Angaben zur Lagerung von cDNA, wie in diesem wichtigen Hinweis beschrieben.
- Besprechen Sie diese Sicherheitsinformation mit Ihrer Labor-/medizinischen Leitung.
- Leiten Sie diese Mitteilung an alle Personen und Abteilungen in Ihrer Organisation weiter, die das *therascreen* FGFR RGQ RT-PCR Kit, Version 1, REF 874711, verwenden.

Von QIAGEN eingeleitete Maßnahmen

QIAGEN arbeitet daran, die Gebrauchsanweisung (Handbuch) zu korrigieren.

Übersetzungen dieses wichtigen Hinweises

QIAGEN stellt den wichtigen Hinweis in gedruckter Form in englischer Sprache bereit. Übersetzungen des wichtigen Hinweises sind elektronisch als PDF (Portable Document Format) verfügbar. Sie finden die übersetzten Dokumente unter der Registerkarte „Product Resources“ (Produktressourcen) auf der Produktseite des *therascreen*[®] FGFR RGQ RT-PCR Kits unter www.qiagen.com.

Mit Ihren Fragen oder Bedenken können Sie sich gern an den örtlichen Technischen Service von QIAGEN wenden. Kontaktdaten finden Sie hier:

QIAGEN Niederlassungen

www.qiagen.com/de/about-us-old/contact/global-contacts/subsidiaries

Handelspartner und Importeure von QIAGEN

www.qiagen.com/de/about-us-old/contact/global-contacts/distributors-and-importers

Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle damit verbundenen Unannehmlichkeiten und bedanken uns im Voraus für Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen

QIAGEN

www.qiagen.com

Marken: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], *therascreen*[®] (QIAGEN Gruppe). Eingetragene Namen, Marken usw., die in diesem Dokument verwendet werden, gelten auch ohne ausdrückliche Kennzeichnung als gesetzlich geschützt.
1132390DE 07-2023 HB-3436-001 © 2023 QIAGEN, alle Rechte vorbehalten.