

Novembre 2015

Manuale utente Rapid Capture[®] System




Per un utilizzo con la versione software 2.20



6000-3101



QIAGEN
19300 Germantown Road
Germantown, MD 20874
USA

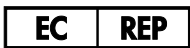

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
GERMANIA

1058530IT Rev. 04

Sommario

1	Introduzione	10
1.1	Informazioni sul presente manuale utente	10
1.2	Informazioni generali.....	10
1.2.1	Assistenza tecnica	10
1.2.2	La nostra politica	10
1.3	Uso previsto dello strumento	11
1.3.1	Requisiti per gli utenti dello strumento	11
1.3.2	Software operativo	12
2	Informazioni di sicurezza.....	14
2.1	Uso corretto.....	14
2.2	Sicurezza elettrica.....	18
2.3	Ambiente	19
2.4	Smaltimento dei materiali di scarto.....	20
2.5	Sicurezza biologica	20
2.6	Sostanze pericolose.....	21
2.7	Pericoli meccanici	21
2.8	Pericolo termico	23
2.9	Sicurezza durante la manutenzione.....	23
2.10	Simboli sullo strumento.....	24
3	Descrizione generale.....	26
3.1	Componenti hardware	27
3.1.1	Braccio robotico.....	28
3.1.2	Processore campioni	29
3.1.3	Moduli pompa a siringa e pompa peristaltica.....	29
3.1.4	Adattatori per puntali	29
3.1.5	Rilevatori del livello del liquido.....	30
3.1.6	Stazione di lavaggio puntali e asciugatura	30
3.1.7	Dispositivo robotizzato di movimentazione con pinze per micropiastre integrata	30

3.1.8	Impilatore micropiastre a temperatura ambiente e incubatrice di ibridizzazione	31
3.1.9	Posizioni di pipettaggio.....	31
3.1.10	Rack recipienti reagente.....	31
3.1.11	Impilatore A e impilatore B	32
3.1.12	Siringhe	32
3.1.13	Agitatore per micropiastre	32
3.1.14	Lavatore di micropiastre	32
3.1.15	Stazione di espulsione puntali.....	33
3.1.16	Interruttore di alimentazione e ingresso apparecchio	33
3.1.17	Collegamento del sistema.....	34
3.1.18	Collegamenti dei contenitori	34
3.1.19	Flacone del liquido di sistema, flacone di lavaggio e contenitore dei residui.....	35
3.1.20	Computer dell'RCS	35
3.1.21	Letto di codici a barre RCS	35
3.2	Componenti del software	37
3.2.1	Icone del software	37
3.3	Attrezzatura aggiuntiva	38
3.3.1	MST Vortexer 2 e portaprovette per campioni.....	38
3.3.2	Strumento DML e software di analisi dei dosaggi <i>digene</i>	39
4	Installazione, trasferimento e smaltimento.....	40
4.1	Spedizione dello strumento.....	40
4.1.1	Apparecchiature occorrenti ma non in dotazione	40
4.2	Requisiti del sito	40
4.3	Collegamento all'alimentazione AC	41
4.3.1	Requisiti di alimentazione.....	41
4.3.2	Requisiti di messa a terra.....	41
4.4	Disimballaggio, installazione, trasferimento e smaltimento dell'hardware....	42
4.5	Gruppo di continuità	42
4.6	Installazione del software.....	42
4.7	Programmi antivirus.....	43

5	Accensione/spengimento dell'RCS.....	44
5.1	Accensione dell'RCS.....	44
5.2	Spegnimento dell'RCS	45
6	Utilizzo del software ScriptSelect	48
6.1	Installazione del software ScriptSelect.....	48
6.2	Avvio del software ScriptSelect	48
6.3	Nomenclatura degli script	49
6.3.1	Esempi di nomi di script	49
6.4	Finestra principale del software ScriptSelect	51
6.5	Selezione degli script	53
6.5.1	Utilizzo del pulsante View All Scripts	55
6.5.2	Utilizzo del pulsante Details	59
6.5.3	Utilizzo del pulsante View Definitions	61
7	Esecuzione dei test <i>digene</i> HC2 DNA	62
7.1	Preparazione e conservazione dei reagenti.....	62
7.2	Configurazione del deck RCS.....	62
7.2.1	Layout del deck RCS	63
7.2.2	Caricamento dei materiali di consumo sul deck RCS.....	64
7.2.3	Caricamento dei reagenti sul deck RCS.....	66
7.2.4	Preparazione del portaprovette per campioni	67
7.3	Avvio del processo RCS	69
7.3.1	Lavaggio delle tubazioni	69
7.3.2	Selezione dello script.....	70
7.3.3	Caricamento dei portaprovette per campioni	72
7.3.4	Avvio del dosaggio	73
7.4	Misurazione delle micropiastre di cattura e generazione dei risultati	73
7.5	Comprensione dei limiti della procedura.....	75
7.6	Caratteristiche delle prestazioni	75
8	Manutenzione.....	76
8.1	Pulizia di routine	76
8.2	Manutenzione mensile	77

8.3	Manutenzione semi-annuale	78
8.4	Pulizia delle tubazioni e dei recipienti	78
8.4.1	Lavaggio delle linee del sistema	78
8.4.2	Risciacquo dei contenitori offline	79
8.4.3	Risciacquo e riempimento delle linee dell'RCS	79
8.4.4	Pulizia del contenitore dei residui con candeggina	80
8.5	Pulizia e sostituzione delle siringhe.....	80
8.5.1	Rimozione di un siringa.....	81
8.5.2	Pulizia di una siringa	81
8.5.3	Sostituzione di una siringa.....	81
8.6	Decontaminazione del sistema.....	82
8.7	Controllo della contaminazione dell'RCS	82
9	Risoluzione dei problemi	85
9.1	Utilizzo non corretto del portaprovette per campioni	85
9.1.1	Portaprovette per campioni (blu) <i>digene</i> usato con uno script C	85
9.1.2	Rack di conversione (argento) usato con uno script D :.....	85
9.1.3	Tipo di campione e portaprovette per campioni	85
9.2	Posizionamento non corretto dei reagenti o dei portaprovette per campioni 86	
9.2.1	Posizionamento non corretto di sonda o calibratore.....	86
9.2.2	Ordine non corretto del portaprovette per campioni per il trasferimento dei campioni.....	86
9.3	Errori durante l'inizializzazione de processo	86
9.3.1	Numero di campioni inseriti non corretto.....	86
9.3.2	Allagamento da materiali di scarto	87
9.3.3	Rack per puntali monouso prelevato	87
9.3.4	Inceppamento degli adattatori per puntali nella stazione di espulsione puntali	87
9.4	Errori di trasferimento del campione	87
9.4.1	Orientamento non corretto o tappi a discesa mancanti	87
9.4.2	Nessuna micropiastre di ibridizzazione caricata sull'agitatore per micropiastre	87

9.4.3	Micropiastre e coperchi non correttamente caricati sull'agitatore per micropiastre	88
9.4.4	Problemi di rilevamento del livello del liquido	88
9.4.5	Mancato trasferimento o trasferimento parziale dei campioni	88
9.4.6	Il dispositivo robotizzato di movimentazione non preleva la micropiastra o i coperchi delle micropiastre	89
9.5	Errore di aggiunta dei reagenti.....	89
9.5.1	Miscela della sonda non trasferita	89
9.5.2	Problemi di rilevamento del livello del liquido	89
9.5.3	Schizzi di campioni durante la fase di agitazione	89
9.5.4	L'incubatrice a 65°C non funziona	90
9.5.5	Il dispositivo robotizzato di movimentazione non preleva la micropiastra o i coperchi delle micropiastre	90
9.6	Errori di trasferimento da una piastra all'altra.....	90
9.6.1	Il sistema esaurisce i puntali monouso	90
9.6.2	Mancato caricamento di micropiastre di cattura o numero errato di micropiastre di cattura caricate sull'impilatore A.....	90
9.6.3	Micropiastre di ibridizzazione di scarto rimaste nell'impilatore B dal precedente processo.....	91
9.6.4	Mancato utilizzo di strisce vuote di pozzetti per micropiastra per riempire micropiastre di cattura parziali	91
9.6.5	Micropiastre o coperchi lasciati nelle camere di incubazione da processi precedenti.....	91
9.6.6	Mancato prelievo di micropiastre o coperchi di micropiastra da parte del dispositivo robotizzato di movimentazione:.....	91
9.7	Errori della fase di cattura	91
9.7.1	Problemi con i rulli dell'agitatore per micropiastre	91
9.7.2	Schizzi di campioni durante la fase di agitazione	92
9.8	Errori della fase di aspirazione e lavaggio-lavatore di piastre	92
9.8.1	Flacone di lavaggio non riempito o tubazione non correttamente inserita....	92
9.8.2	Allagamento del lavatore di micropiastre	92
9.8.3	Lavatore di micropiastre con accumulo di residui di tampone di lavaggio ...	92

9.8.4	Aspirazione liquido non regolare	92
9.8.5	La testata del lavatore di micropiastre non è allineata:	93
9.9	Errori di completamento della micropiastra	93
9.9.1	Mancata rimozione della micropiastra quando il sistema l'RCS lo richiede..	93
9.10	Spostamento del dispositivo robotizzato di movimentazione.....	94
9.11	Spegnimento dell'RCS dopo un'interruzione del sistema	95
9.12	Interruzione o messa in pausa di uno script.....	96
9.13	Tempo di inattività massimo consentito per le fasi RCS durante un dosaggio	98
9.14	Riavvio degli script.....	99
9.14.1	Riavvio dello script nel mezzo di un dosaggio	99
9.14.2	Riavvio di uno script dopo un'interruzione dell'alimentazione o la selezione di	
	uno script sbagliato	102
9.14.3	Riavviare lo script dopo aver inserito un numero sbagliato di campione o del	
	totale dei pozzetti micropiastra.....	102
9.15	Eliminazione di aria nelle tubazioni	103
9.16	Codici di errore, interruzioni del sistema e tabella di riferimento per l'azione	
	correttiva	104
10	Glossario	137
	Appendice A – Dati tecnici	140
	Appendice B – Sostituzione della vaschetta del lavatore RCS.....	142
	Appendice C – Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE)	144
	Appendice D – Dichiarazione FCC	145
	Appendice E – Clausola di garanzia.....	146
	Indice analitico	147

1 Introduzione

Grazie per aver scelto Rapid Capture System (RCS). Siamo certi che diventerà parte integrante del vostro laboratorio.

Prima di utilizzare l'RCS, è fondamentale leggere attentamente il presente manuale utente e prestare particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza contenute nel manuale utente devono essere rispettate per garantire il funzionamento sicuro dello strumento e per mantenere lo stesso in condizioni di sicurezza.

1.1 Informazioni sul presente manuale utente

Il software RCS controlla l'RCS e questo manuale utente fornisce informazioni all'utente per eseguire analisi automatizzate sull'RCS dei test *digene*[®] Hybrid Capture[®] 2 (HC2) DNA.

1.2 Informazioni generali

1.2.1 Assistenza tecnica

QIAGEN è orgogliosa della qualità e della disponibilità del proprio supporto tecnico. In caso vogliate porre domande o incontriate difficoltà con l'RCS o con qualsiasi altro prodotto QIAGEN, vi preghiamo di non esitare a contattarci.

I clienti QIAGEN sono una preziosa fonte d'informazione relativa ai nostri prodotti. Vi incoraggiamo a contattarci qualora abbiate suggerimenti o feedback sui nostri prodotti.

Per ottenere assistenza tecnica e altre informazioni, contattare i QIAGEN Technical Services.

1.2.2 La nostra politica

La politica di QIAGEN è quella di ottimizzare i propri prodotti non appena si rendono disponibili tecniche e componenti nuovi. QIAGEN si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento. Nell'intento di produrre una documentazione utile e appropriata, saremo lieti di ricevere i vostri commenti sul presente manuale utente. A tale scopo si prega di contattare i QIAGEN Technical Services.

1.3 Uso previsto dello strumento

L'RCS è un sistema di pipettaggio e diluizione automatici di uso generico che può essere utilizzato con i test *digene* HC2 DNA approvati per test ad alta produttività di volumi e campioni.

L'intervento dell'utente si limita alla preparazione dei campioni, alla configurazione del deck RCS, al caricamento dei portaprovette per campioni sul deck RCS, alla rilevazione del segnale chemiluminescente e alla refertazione dei risultati.

Nota: Non tutti i test *digene* HC2 DNA sono stati convalidati per l'utilizzo sull'RCS. Controllare le istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA che interessa allo scopo di determinare se il tipo di dosaggio e/o campione che si desidera mettere sul deck RCS è stato convalidato per l'RCS.

1.3.1 Requisiti per gli utenti dello strumento

La seguente tabella riporta il livello di addestramento ed esperienza necessario per il trasporto, l'installazione, l'utilizzo, la manutenzione e l'assistenza dell'RCS.

Tipo di intervento	Personale	Formazione ed esperienza
Trasporto	Vettore approvato	Adeguatamente addestrato, con esperienza e approvato da QIAGEN
Installazione	Dipendenti dell'assistenza in loco QIAGEN o personale formato da QIAGEN	Personale addestrato, certificato e autorizzato da QIAGEN
Utilizzo di routine	Tecnici di laboratorio o personale equivalente	Personale che abbia ricevuto un addestramento adeguato e che abbia esperienza e familiarità con l'uso del computer e con l'automazione in generale
Manutenzione di routine	Tecnici di laboratorio o personale equivalente	Personale che abbia ricevuto un addestramento adeguato e che abbia esperienza e familiarità con l'uso del computer e con l'automazione in generale
Assistenza e manutenzione semi-annuale preventiva	Dipendenti dell'assistenza in loco QIAGEN o personale formato da QIAGEN	Personale addestrato, certificato e autorizzato da QIAGEN

1.3.2 Software operativo

Il software RCS viene installato sull'hard disk del computer ed utilizza il sistema operativo Microsoft® Windows® 7, rendendo quindi il software facile da apprendere e semplice per un uso quotidiano.

Per definire le caratteristiche del software vengono utilizzati i termini riportati nella seguente tabella.

Termine	Descrizione
Casella	Un elemento in una finestra di dialogo che può essere selezionato o deselezionato.
Pulsante	Un elemento in una finestra di dialogo o barra strumenti che l'utente clicca per eseguire qualcosa.
Finestra di dialogo	Una finestra che compare temporaneamente e visualizza informazioni o richiede un inserimento da parte dell'utente.
Campo di finestra di dialogo	Un elemento in una finestra di dialogo dove l'utente può scrivere o selezionare qualcosa. Nota: Alcuni campi sono disattivati oppure visualizzano semplicemente informazioni numeriche o testuali.
Elenco a tendina	Un elenco di elementi che compaiono quando l'utente fa clic sul menu o sulla freccia verso il basso, che compare in alcuni campi delle finestre di dialogo.
Grafico	Un'immagine visualizzata nel software per rappresentare lo strumento o una funzione dello strumento.
Icona	Un piccolo simbolo grafico sul desktop o nel file manager, che rappresenta un file, un'applicazione o una cartella.
Menu	Un elemento nella barra del menu sul quale l'utente fa clic per visualizzare un elenco a tendina. Un menu è anche un elenco di elementi che compare quando l'utente fa clic con il pulsante destro del mouse.
Pannello	Un'area chiaramente contrassegnata in una schermata o in una finestra di dialogo che contiene un gruppo particolare di informazioni.
Parametro	Qualcosa che è specificato dall'utente. Un parametro viene specificato selezionando/deselezionando finestre ed inserendo/selezionando informazioni nei campi di dialogo.
Pulsante radio	Un cerchio in una finestra di dialogo che può essere selezionato o deselezionato.
Subpannello	Una suddivisione di un pannello.

Termine	Descrizione
Scheda	Funzione in una schermata che assomiglia ad una "linguetta" contenente un particolare subset di informazioni.
Schermata	Interfaccia utente primaria del software.
Procedura guidata	Una sequenza di schermate o finestre di dialogo che guidano l'utente attraverso una procedura.

Per descrivere le operazioni del software vengono utilizzati i termini riportati nella seguente tabella.

Termine	Descrizione
Segno di spunta	Spostare il puntatore su una casella e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per visualizzare un segno di spunta.
Fare clic	Spostare il puntatore su un pulsante o una scheda e fare clic con il pulsante sinistro del mouse.
Clicca e trascina	Spostare il puntatore su un elemento, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, trascinare il puntatore e l'elemento in una nuova posizione e rilasciare il pulsante del mouse.
Deseleziona	Spostare il puntatore su un radiopulsante e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per deselezionare il radiopulsante.
Doppio clic	Spostare il puntatore su un elemento e con il pulsante sinistro del mouse fare clic due volte in sequenza rapida.
Evidenzia	Spostare il puntatore su un elemento e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per evidenziare tale elemento. Nota: È possibile evidenziare contemporaneamente più elementi del software tenendo premuti i tasti Ctrl o Maiusc sulla tastiera e selezionando gli elementi desiderati.
Clic destro	Spostare il puntatore su un elemento e fare clic con il pulsante destro del mouse.
Seleziona	Spostare il puntatore su un elemento nell'elenco a tendina o sopra un radiopulsante e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per fare una selezione.
Toglie segno di spunta	Spostare il puntatore su una finestra e fare clic sul pulsante sinistro del mouse per eliminare il segno di spunta.

2 Informazioni di sicurezza

Il presente manuale utente contiene informazioni sulle avvertenze e sulle precauzioni che l'utente è tenuto ad osservare per un utilizzo sicuro dell'RCS e per mantenere lo strumento in condizioni di sicurezza.

Il presente manuale utente contiene le informazioni sulla sicurezza riportate di seguito.

AVVERTENZA



Il termine AVVERTENZA segnala situazioni che potrebbero avere come conseguenza **lesioni personali** per l'utente o terzi.

Sono riportati i dettagli di queste circostanze per evitare lesioni personali per l'utente o terzi.

ATTENZIONE



Il termine ATTENZIONE segnala situazioni che potrebbero avere come conseguenza un **danno allo strumento** o ad altre apparecchiature.

Sono riportati i dettagli di queste circostanze per evitare danni allo strumento o ad altre apparecchiature.

Le linee guida fornite nel presente manuale utente sono volte ad integrare, e non a sostituire, i normali requisiti di sicurezza in vigore nel paese dell'utente.

Prima di utilizzare lo strumento è fondamentale leggere attentamente il presente manuale utente, prestando particolare attenzione a tutte le indicazioni dei potenziali pericoli correlati all'utilizzo dello strumento.

Nota: Gli operatori di questo strumento devono essere esperti nelle pratiche di sicurezza di laboratorio generali e nei requisiti di sicurezza propri dell'RCS. Utilizzando lo strumento in modo non specificato dal produttore, potrebbe essere compromessa la protezione offerta dallo strumento stesso.

2.1 Uso corretto

Utilizzare lo strumento esclusivamente come specificato nelle istruzioni per l'uso del presente manuale utente per non compromettere o danneggiare le funzioni di sicurezza incorporate nello strumento. Seguire le buone pratiche di sicurezza durante l'utilizzo dello strumento.

AVVERTENZA**Rischio di risultati imprecisi del test**

Cambiarsi sempre i guanti dopo aver maneggiato il contenitore dei residui, i raccordi a distacco rapido o i rifiuti liquidi.

La contaminazione delle aree di lavoro con fosfatasi alcalina può pregiudicare i risultati del test.

AVVERTENZA**Rischio di risultati imprecisi del test**

Controllare che il contenitore dei residui sia vuoto, in quanto il traboccamento del suo contenuto può causare una contaminazione da fosfatasi alcalina.

La contaminazione delle aree di lavoro con fosfatasi alcalina può pregiudicare i risultati del test.

AVVERTENZA**Rischio di risultati imprecisi del test**

Controllare che il flacone del liquido di sistema e il flacone di lavaggio siano pieni prima di iniziare il processo sull'RCS.

Un volume di reagenti insufficiente per il processo può dare risultati imprecisi del test.

AVVERTENZA**Rischio di risultati imprecisi del test**

Attendere la richiesta dello strumento prima di caricare il portaprovette per campioni sul deck RCS.

Se il portaprovette per campioni viene caricato sul deck RCS prima di aver riempito e lavato le linee del sistema, è possibile che si verifichi contaminazione da schizzi; la contaminazione può causare risultati imprecisi del test.

AVVERTENZA**Rischio di risultati imprecisi del test**

Quando si avvia un processo, non spuntare la casella **same for all tests** (Stesso per tutti i test) nella finestra di dialogo **Start run** (Avvia processo).

L'attivazione del segno di spunta su questa casella influisce sul volume aggiunto di reagente e determina risultati imprecisi del test.

AVVERTENZA**Rischio di risultati imprecisi del test**

Controllare che sia stato immesso il numero corretto di campioni per la micropiastra appropriata.

L'esecuzione del test su un pozzetto vuoto potrebbe ostruire il collettore del lavatore di micropiastre e dare risultati imprecisi del test.

AVVERTENZA**Rischio di risultati imprecisi del test**

Controllare che tutti i pozzetti testati della micropiastra contengano liquido.

L'esecuzione del test su un pozzetto vuoto potrebbe ostruire il collettore del lavatore di micropiastre e dare risultati falso-negativi.

AVVERTENZA**Rischio di risultati imprecisi del test**

Per i test HPV ad alto rischio accertarsi che vengano usati solo protocolli specifici per l'RCS forniti da QIAGEN quando si creano i layout delle piastre nel software di analisi dei dosaggi.

L'uso di un protocollo non corretto potrebbe dare risultati falso-negativi.

AVVERTENZA**Rischio di risultati imprecisi del test**

Non stampare i risultati di un test contemporaneamente alla misurazione di una micropiastra.

La stampa dei report di un test durante la misurazione di una micropiastra può rallentare la processazione del dosaggio sull'RCS e dare risultati imprecisi del test.

**AVVERTENZA/
ATTENZIONE****Rischio di lesioni personali e danni all'apparecchiatura**

L'uso improprio dell'RCS può causare lesioni personali all'utente o danni allo strumento.

L'RCS deve essere azionato esclusivamente da personale qualificato e adeguatamente formato.

ATTENZIONE**Rischio di danni all'apparecchiatura**

Le siringhe sono di vetro. Osservare cautela durante la manipolazione.

ATTENZIONE**Rischio di danni all'apparecchiatura**

Solo i dipendenti dell'assistenza in loco QIAGEN o il personale formato da QIAGEN possono effettuare operazioni di assistenza o riparazione sullo strumento.

ATTENZIONE**Danni allo strumento**

Rimuovere tutti gli elementi dal deck RCS.

Gli elementi rimanenti sul deck RCS possono danneggiare lo strumento.

2.2 Sicurezza elettrica

L'RCS non espone gli operatori a rischi eccezionali di shock elettrico se installato e azionato senza alterazioni e collegato a una fonte di alimentazione con le specifiche richieste.

Vedere "Appendice A – Dati tecnici", pagina 140, per i dettagli sui requisiti dell'alimentazione.

Per un funzionamento sicuro di tutti i sistemi è essenziale conoscere i rischi elettrici di base. Le nozioni fondamentali della sicurezza elettrica includono, tra l'altro, quanto segue:

- Non scollegare alcuna connessione elettrica mentre l'alimentazione è collegata.
Nota: anche se la commutazione dell'interruttore di alimentazione su OFF toglie energia a tutti i sistemi elettromagnetici, la tensione di rete continua ad arrivare allo strumento finché il cavo di alimentazione non viene scollegato dall'ingresso dell'apparecchio (dispositivo di scollegamento), alloggiato nell'angolo inferiore a sinistra della parte posteriore dello strumento.
- Tenere i liquidi a distanza da tutti i connettori di componenti elettrici.
- Tenere pulito e asciutto il pavimento sotto e attorno all'RCS.
- Per proteggersi contro shock elettrici utilizzare solo cavi di alimentazione e accessori elettrici approvati, quali ad esempio quelli forniti con lo strumento.
- Collegare i cavi di alimentazione solo a prese correttamente collegate a massa.
- Non toccare alcun interruttore o presa con le mani bagnate.
- Spegnerlo strumento prima di scollegare il cavo di alimentazione CA.
- Spegnerlo strumento e staccare il cavo di alimentazione dall'ingresso dell'apparecchio (dispositivo di scollegamento) prima di pulire fuoriuscite di liquido.
- Accertarsi che lo schermo di sicurezza sia in posizione prima di mettere in funzione lo strumento.
- Non violare lo spazio definito dallo schermo mentre lo strumento è in uso, a meno che non sia il software RCS a richiederlo.

AVVERTENZA **Rischio elettrico**



Eventuali interruzioni del conduttore di protezione (conduttore di terra/massa) all'interno o all'esterno dello strumento o la disconnessione del morsetto del conduttore di protezione potrebbero rendere pericoloso lo strumento.

È vietato procurare un'interruzione intenzionale.

Tensioni letali all'interno dello strumento

Quando lo strumento è connesso alla linea di alimentazione, i morsetti potrebbero essere sotto tensione e l'apertura di coperchi o la rimozione di componenti potrebbero esporre parti collegate all'alimentazione.

AVVERTENZA **Rischio elettrico**



Il tentativo di eseguire un intervento di manutenzione su componenti elettrici dell'RCS può essere fonte di gravi lesioni da shock elettrico. Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da dipendenti dell'assistenza in loco QIAGEN o da personale formato da QIAGEN, se non diversamente specificato in questo manuale utente.

Il compartimento fusibili della linea AC (a intervento ritardato) è situato sotto l'interruttore di alimentazione sul retro dello strumento.

Importante: I fusibili devono essere sostituiti solo da personale qualificato e autorizzato. Contattare i QIAGEN Technical Services.

ATTENZIONE **Danni allo strumento**



Lo strumento può venire danneggiato da un guasto dell'alimentazione durante un processo. QIAGEN raccomanda di collegare l'RCS a un gruppo di continuità.

2.3 Ambiente

ATTENZIONE **Danni allo strumento**



L'RCS non dovrebbe essere collocato vicino a una fonte di calore o esposto alla luce solare diretta.

2.4 Smaltimento dei materiali di scarto

I materiali di scarto possono contenere sostanze chimiche pericolose o materiali contagiosi/biologicamente pericolosi, pertanto devono essere opportunamente raccolti e smaltiti nel rispetto di tutte le normative e leggi sanitarie e antinfortunistiche vigenti a livello nazionale, statale e locale.

Per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (direttiva WEEE), vedere "Appendice C – Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici", pagina 144.

2.5 Sicurezza biologica

AVVERTENZA Sostanze biologicamente pericolose



I materiali utilizzati con questo strumento possono contenere sostanze biologicamente pericolose.

Quando si utilizza lo strumento, osservare le precauzioni universali riguardanti i materiali potenzialmente infettivi.

Per ulteriori avvertenze e precauzioni riguardanti reagenti e campioni consultare le istruzioni per l'uso specifiche del test *digene* HC2 DNA.

Adottare le procedure di laboratorio sulla sicurezza descritte in pubblicazioni quali Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, HHS (www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosft.htm).

2.6 Sostanze pericolose

AVVERTENZA Sostanze pericolose



Quando si opera con sostanze chimiche, indossare sempre un camice da laboratorio, guanti monouso e occhiali di protezione. Per ulteriori informazioni, consultare le appropriate schede di sicurezza (SDS). Le schede SDS, nel pratico e compatto formato PDF, sono disponibili online all'indirizzo www.qiagen.com/safety. Qui è possibile trovare, visualizzare e stampare la scheda SDS per ciascun kit QIAGEN e i relativi componenti.

I materiali utilizzati da questo strumento possono contenere sostanze pericolose. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso allegate al kit.

Per lo smaltimento dei rifiuti di laboratorio, osservare tutte le norme e le leggi sulla salute e la sicurezza in vigore a livello nazionale e locale.

2.7 Pericoli meccanici

Il braccio robotico può esercitare una forza tale da costituire pericolo di schiacciamento.

La tastiera del computer deve essere collocata a portata dell'RCS per garantire accesso al tasto **Esc** sulla tastiera stessa. Il tasto **Esc** è considerato un meccanismo di arresto d'emergenza.

AVVERTENZA Rischio di lesioni personali



Non togliere lo schermo di sicurezza dallo strumento. Non violare lo spazio definito dallo schermo mentre lo strumento è in uso, a meno che non sia il software RCS a richiederlo.

AVVERTENZA Rischio di lesioni personali



Non indossare indumenti o accessori che potrebbero impigliarsi sull'RCS. In caso di intasamento meccanico o altri problemi dello strumento, contattare immediatamente i QIAGEN Technical Services.

AVVERTENZA**Parti in movimento**

Non toccare le parti interne dello strumento mentre è in funzione. Le parti in movimento possono causare lesioni personali.

Arrestare il funzionamento dello strumento prima di toccare le parti interne del deck RCS.

AVVERTENZA**Rischio di lesioni personali**

Non infilare parti della mano sotto un puntale monouso mentre si tira verso il basso per rimuoverlo. Mettere la mano sotto un puntale monouso durante la rimozione può causare lesioni all'utente.

AVVERTENZA/**Rischio di lesioni personali e danni all'apparecchiatura****ATTENZIONE**

NON cercare di sollevare o spostare l'RCS. Il peso dell'RCS supera 68 kg.



Contattare i QIAGEN Technical Services.

AVVERTENZA/**Rischio di lesioni personali e danni all'apparecchiatura****ATTENZIONE**

Non toccare il deck RCS mentre lo strumento è in funzione a meno che il sistema non sia in pausa e visualizzi una finestra di dialogo con la richiesta di un intervento dell'utente.



Toccare il deck RCS in qualsiasi altro momento di un processo potrebbe causare lesioni all'utente e/o l'interruzione del processo.

ATTENZIONE**Danni allo strumento**

Controllare che tutte le micropiastre occorrenti, inclusi i coperchi necessari, siano state caricate sul deck RCS prima di iniziare un processo. La mancanza di micropiastre o coperchi causerebbe la rottura del dispositivo robotizzato di movimentazione.

Una rottura potrebbe richiedere il riavvio del processo e/o danneggiare l'RCS.

2.8 Pericolo termico

AVVERTENZA **Rischio di lesioni personali**



Evitare il contatto con l'incubatrice di ibridizzazione.

Lasciar raffreddare l'incubatrice di ibridizzazione prima di toccarla, poiché raggiunge una temperatura di 65°C.

2.9 Sicurezza durante la manutenzione

Eseguire la manutenzione secondo quanto previsto nella sezione "Manutenzione", pagina 76. QIAGEN addebita all'utente eventuali riparazioni necessarie in seguito ad errata manutenzione.

AVVERTENZA **Rischio di lesioni personali**



Gli utenti devono indossare camici da laboratorio, guanti non talcati e occhiali di sicurezza mentre eseguono la procedura di pulizia.

AVVERTENZA **Parti in movimento**



Non toccare le parti interne dello strumento mentre è in funzione. Le parti in movimento possono causare lesioni personali.

Arrestare il funzionamento dello strumento prima di toccare le parti interne del deck RCS.

AVVERTENZA/ **Rischio di lesioni personali e danni all'apparecchiatura**










ATTENZIONE








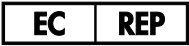


Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da dipendenti dell'assistenza in loco QIAGEN o da personale formato da QIAGEN, se non diversamente specificato in questo manuale utente.

2.10 Simboli sullo strumento

La seguente tabella descrive i simboli e le etichette eventualmente applicati sullo strumento, presenti su marcature associate allo strumento o utilizzati nel presente manuale utente.

Simbolo	Posizione	Descrizione
	Sullo strumento	Simbolo generale di avvertenza
	Sullo strumento	Avvertenza, tensione pericolosa
	Nel presente manuale utente	Avvertenza, pericolo biologico
	Nel presente manuale utente	Attenzione, superficie rovente
	Targhetta identificativa sullo strumento	Marchio CE per la Conformità Europea
	Targhetta identificativa sullo strumento	Dispositivo medico per diagnostica in vitro
	Targhetta identificativa sullo strumento	Marchio RCM per l'Australia/Nuova Zelanda, in precedenza marchio C-Tick (identificazione fornitore N17965)
	Targhetta identificativa sullo strumento	Marchio RoHS per la Cina (limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche)
	Targhetta identificativa sullo strumento	Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE)

Simbolo	Posizione	Descrizione
	Targhetta identificativa sullo strumento	Numero di serie
	Targhetta identificativa sullo strumento	Fabbricante
	Targhetta identificativa sullo strumento	Fare riferimento alle informazioni fornite nel manuale
	Sullo strumento	Marchio FCC della Federal Communications Commission degli Stati Uniti
	Sullo strumento	Avvertenza, pericolo di schiacciamento: mani
	Sullo strumento	Codice GTIN
	Copertina del manuale utente	Numero di catalogo
	Copertina del manuale utente	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

3 Descrizione generale

L'RCS è un processore di micropiastre robotizzato che comprende componenti con comando a microprocessore. Tutte le operazioni dell'RCS sono gestite dal software che risiede nell'hard drive di un computer collegato all'RCS tramite un'interfaccia RS-232.

Il sistema è azionato da una tensione di linea con alimentazione di tipo switching e tutta l'energia viene distribuita al sistema a 240 volt AC o meno.

Le funzioni controllate dal software e il meccanismo dell'apparecchio includono:

- Pipettaggio dei campioni nella micropiastre
- Aggiunta di reagente
- Lavaggio delle micropiastre
- Incubazione
- Miscelazione
- Un dispositivo robotizzato di movimentazione trasporta le micropiastre tra le stazioni di funzionamento e sposta i coperchi delle micropiastre e i coperchi dei recipienti per reagente.
- Il controllo del movimento dei quattro puntali per pipette e il trasporto delle micropiastre avvengono grazie a 8 servomotori DC che utilizzano encoder ottici per il controllo della posizione e della velocità.
- La gestione dei liquidi è realizzata con 4 unità-siringa dotate di motore passo-passo, 2 pompe a diaframma DC e una pompa peristaltica DC.
- Un agitatore orbitale a 4 piastre è comandato da un motore passo; lo stesso vale per l'asse X del carrello e l'asse Z del collettore del lavatore di micropiastre.
- L'incubatrice di ibridizzazione è controllato da firmware e regola ognuna della 5 camere a 65°C.
- Ogni camera dell'incubatrice di ibridizzazione contiene un cassetto motorizzato DC che si estende per consentire il caricamento e lo scaricamento delle micropiastre.
- Scansione automatica dei codici a barre delle micropiastre ed esportazione al software del *digene* Microplate Luminometer (funzione disponibile solo con l'upgrade del lettore di codici a barre RCS)

Per compiere la semi-automazione dei test *digene* HC2 DNA, l'RCS può eseguire le 6 fasi procedurali del metodo manuale riportate di seguito:

- Pipettaggio campioni
- Dispensazione reagente
- Gestione micropiastre
- Miscelazione micropiastre
- Incubazione micropiastre
- Lavaggio delle micropiastre


La denaturazione dei campioni in preparazione dell'analisi con i test *digene* HC2 DNA viene eseguita indipendentemente dall'RCS. Inoltre, la rilevazione del segnale chemiluminescente e la refertazione dei risultati vengono eseguiti utilizzando un luminometro offline (comune sia alla metodica manuale sia alla metodica RCS), con l'uso del software di analisi dei dosaggi *digene*. La miscelazione delle micropiastre, l'incubazione e il lavaggio sono eseguiti con lo stesso tipo di apparecchi utilizzati come accessori separati da banco per la metodica manuale dei test; questi apparecchi sono tuttavia integrati sul deck RCS.

Ciascuna fase procedurale dell'HC2 è eseguita con la stessa sequenza della procedura del test manuale. L'RCS consente l'elaborazione scaglionata di 4 micropiastre al massimo, ognuna contenente i campioni, i calibratori necessari per i dosaggi e i controlli di qualità. L'operatore prepara i campioni secondo le istruzioni riportate nelle istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA. Dopo aver caricato i rack sul deck RCS, l'operatore torna a un tempo impostato per estrarre le micropiastre ed eseguire la fase di rilevazione. Il segnale amplificato generato viene rilevato in un lettore di micropiastre chemiluminescente separato e i risultati sono calcolati e riportati con il software di analisi dei dosaggi *digene*. Le istruzioni del luminometro sono disponibili nel manuale utente fornito con lo strumento.

3.1 Componenti hardware

La base dell'unità dell'RCS è costituita da:

- sottogruppo telaio dello strumento (telaio di base, supporti del deck, deck meccanico, pannelli laterale e superiore, schermo di sicurezza e guida per la tubazione)
- sottogruppo componenti elettrici (alimentazione, schede circuiti stampati (PCB), schermature, connettori e fusibili)

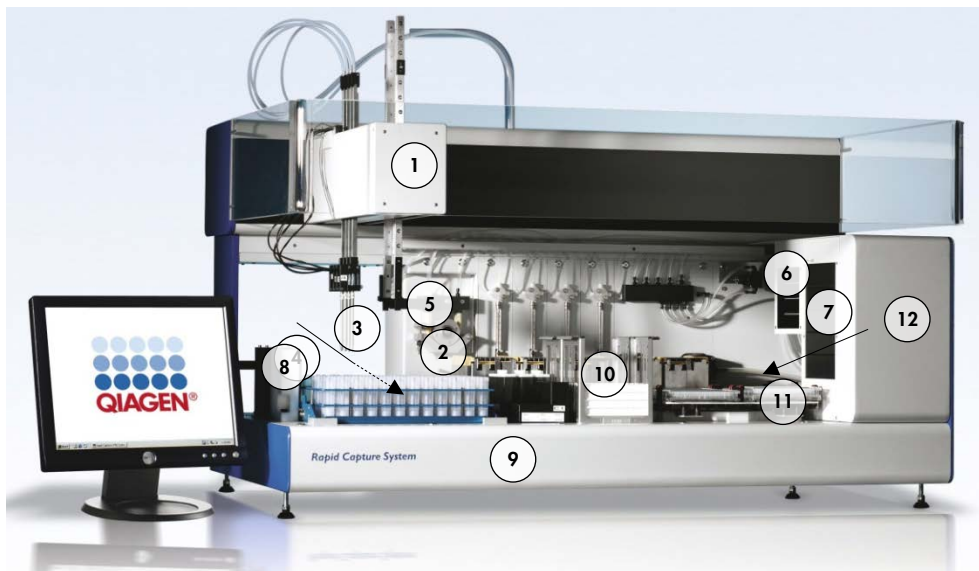

- | | | | |
|---|---|----|----------------------------------|
| 1 | Braccio robotico | 7 | Incubatrice di ibridizzazione |
| 2 | Moduli pompa a siringa e pompa peristaltica | 8 | Posizioni di pipettaggio |
| 3 | Adattatori per puntali | 9 | Rack dei recipienti per reagente |
| 4 | Stazione di lavaggio puntali e asciugatura | 10 | Impilatore A e impilatore B |
| 5 | Dispositivo robotizzato di movimentazione | 11 | Agitatore per micropiastre |
| 6 | Agitatore per micropiastre a temperatura ambiente | 12 | Lavatore di micropiastre |

3.1.1 Braccio robotico

Tutti i movimenti X/Y/Z/V (V=VariSpan) del braccio robotico sono comandati da motori DC con encoder. Ogni adattatore per puntali può muoversi indipendentemente dagli altri in direzione Z (su e giù). Gli adattatori per puntali sono montati sullo scivolo Y, che si muove avanti e indietro (direzione Y) all'interno del braccio robotico. Il braccio robotico è montato sullo scivolo X situato all'interno dell'involucro dello strumento e si muove da sinistra a destra (direzione X).

L'RCS è dotato di VariSpan, la funzione di spaziatura variabile degli adattatori per puntali. Questa funzione è attuata dal motore VariSpan, che viene usato anche per variare il range del dispositivo robotizzato di movimentazione.

3.1.2 Processore campioni

Il processore di micropiastre robotizzato Rapid Capture è dotato di 4 puntali di campionamento portati dal braccio robotico. Ogni puntale è collegato a una valvola a 4 vie di un modulo pompa a siringa di precisione e può aspirare, dispensare e diluire nella maggior parte delle posizioni sulla superficie di lavoro dello strumento. Il software RCS controlla la sequenza di pipettaggio, i volumi e le modalità di pipettaggio.

3.1.3 Moduli pompa a siringa e pompa peristaltica

La pompa a siringa è una pompa a microprocessore con una valvola a 4 vie che si collega alla siringa, alla pompa peristaltica, agli adattatori per puntali e al flacone del liquido di sistema. Il liquido viene trasferito nella siringa dal flacone del liquido di sistema e gli adattatori per puntali sono lavati mediante la pompa peristaltica. Tutte le parti che entrano a contatto con il liquido sono realizzate in materiali inerti, come acciaio inossidabile, etilene propilene fluorurato (FEP), ecc.

Ogni adattatore per puntale ha una pompa a siringa dedicata, che controlla l'aspirazione e le funzioni di dispensazione dell'adattatore per puntali.

La pompa peristaltica a 4 canali è usata per alimentare il liquido di sistema utilizzato per lavare i tubi ad una portata media di 2 ml al secondo per canale.

3.1.4 Adattatori per puntali

L'RCS ha 4 adattatori per puntali portati dal braccio robotico. Ogni adattatore per puntali è collegato a una valvola a 4-vie di un modulo pompa a siringa di precisione e può aspirare, dispensare e diluire nella maggior parte delle posizioni presenti sul deck RCS.

Ogni adattatore per puntali è caratterizzato da un movimento indipendente in direzione Z; il movimento trasversale (direzione Y), invece, è variabile. Questa funzione è nota come VariSpan.

L'RCS fa uso di puntali monouso conduttivi da 300 µl e rileva automaticamente la presenza di puntali monouso. Se i puntali monouso non vengono rilevati dopo 5 tentativi, il sistema andrà in pausa e un allarme acustico informerà l'operatore.

3.1.5 Rilevatori del livello del liquido

Ogni adattatore per puntale è provvisto di un rilevatore del livello del liquido, che abilita il rilevamento di soluzioni ioniche al contatto. I rilevatori del livello del liquido monitorano le variazioni di capacità tra il puntale per pipetta monouso e il deck RCS.

Il rilevatore del livello del liquido è utilizzato per rilevare una quantità insufficiente o la totale assenza di controlli di qualità, calibratori e reagenti; i rilevatori di livello del liquido non sono attivati durante il trasferimento dei campioni. Quando il puntale per pipetta monouso tocca la superficie del liquido, la variazione improvvisa di capacità genera immediatamente un segnale di rilevamento. Se il volume rilevato è insufficiente, il sistema si bloccherà automaticamente e visualizzerà una finestra di dialogo, offrendo all'utente un'opportunità di effettuare il rifornimento di eventuali liquidi.

QIAGEN non può garantire un funzionamento corretto dei rilevatori di livello dei liquidi se l'apparecchio utilizzato per contenere i controlli di qualità, i calibratori e i reagenti non è fornito da QIAGEN.

Importante: Poiché il rilevatore del livello del liquido non è in grado di identificare quale è il tipo di materiale che causa una variazione di capacità, è di fondamentale importanza che i puntali non tocchino alcuna superficie (ad es., schiuma sopra il menisco) ad eccezione del liquido che deve essere rilevato.

3.1.6 Stazione di lavaggio puntali e asciugatura

Le linee del sistema e gli adattatori per puntali sono lavati nella stazione di lavaggio per puntali. Quando gli adattatori per puntali vengono posizionati nella stazione di lavaggio puntali, l'acqua deionizzata o distillata proveniente dal flacone del liquido di sistema viene aspirata dalla pompa peristaltica e forzata attraverso tutti gli adattatori per puntali. Il flusso viene dispensato nel canale della stazione di lavaggio puntali e lungo lo scarico. Eventuali bolle d'aria nelle linee del sistema o negli adattatori per puntali vengono sfiate. La tubazione porta il liquido di scarto dallo scarico all'apposito contenitore.

3.1.7 Dispositivo robotizzato di movimentazione con pinze per micropiastre integrata

Le pinze di manipolazione per piastre, che sono parte integrante del dispositivo robotizzato di movimentazione, vengono utilizzate per trasportare micropiastre e coperchi per micropiastre tra le posizioni e i moduli, quali l'impilatore di micropiastre a temperatura ambiente, l'incubatrice di ibridazione, le posizioni di pipettaggio, l'agitatore per micropiastre e il lavatore.

Il motore VariSpan è utilizzato per variare l'ampiezza delle 2 pinze per micropiastre e ha un azionamento e un motore Z indipendenti.

Le micropiastre sono caricate manualmente sul deck RCS (nell'impilatore A e nell'agitatore per micropiastre) e vengono inviate dal dispositivo robotizzato di movimentazione, a posizioni definite nel momento in cui il processo viene avviato.

3.1.8 Impilatore micropiastre a temperatura ambiente e incubatrice di ibridizzazione

L'impilatore di micropiastre a temperatura ambiente fisso alloggia micropiastre e coperchi per micropiastre a pochi gradi sopra la temperatura ambiente durante le incubazioni a temperatura ambiente. La torre dell'incubatrice automatica a 5 cassette è a controllo di temperatura con un range che varia da circa 5°C sopra la temperatura ambiente a 65°C a intervalli di 0,1°C.

L'incubatrice di ibridizzazione è composta da 5 cassette protetti da temperatura ambiente e luce per mezzo di sportelli caricati a molla motorizzati. Lo sportello viene aperto e chiuso dall'azione del motore/cassetto; il dispositivo robotizzato di movimentazione invia e recupera la micropiastra dal singolo cassetto.

3.1.9 Posizioni di pipettaggio

Per le fasi di pipettaggio, il dispositivo robotizzato di movimentazione porta la micropiastra alla posizione di pipettaggio, una piastra permanente montata sulla superficie del deck RCS. La posizione di pipettaggio 1 e la posizione di pipettaggio 2 sono realizzate per micropiastre di dimensioni regolari e/o coperchi per micropiastre. Il dispositivo robotizzato di movimentazione depositerà sempre la micropiastra corretta nella posizione di pipettaggio appropriata, purché le micropiastre siano state collocate nei posti corretti durante la configurazione del deck RCS.

3.1.10 Rack recipienti reagente

I reagenti utilizzati durante i test sono contenuti in recipienti per reagente, con i relativi coperchi, e posizionati nel rack per recipienti per reagente. Il rack dei recipienti per reagente ha spazio per la sistemazione di 5 recipienti per reagente e 1 spazio per il coperchio dei recipienti, definito sosta coperchi, mentre il reagente viene eliminato. Durante l'esecuzione del test, il dispositivo robotizzato di movimentazione rimuove il coperchio per recipienti e lo posiziona nella sosta coperchi. Dopo aver tolto il coperchio per recipienti, gli adattatori per puntali, con puntali monouso attaccati, pipettano il reagente dal recipiente per reagente.

3.1.11 Impilatore A e impilatore B

Le micropiastre di cattura (in un impilatore con un coperchio per micropiastre sopra l'impilatore) usate durante l'esecuzione del test vengono posizionate nell'impilatore A. Durante il test, le micropiastre di ibridizzazione usate vengono impilate nell'impilatore B dopo che i campioni sono stati trasferiti alle micropiastre di cattura. Ogni impilatore alloggia fino a 4 micropiastre.

3.1.12 Siringhe

Tutte le operazioni di trasferimento dei campioni e di aggiunta di reagente sono eseguite con l'uso di siringhe da 500 µl azionate da pompe. Le specifiche che segue si basa sul pipettaggio di una soluzione salina normale (NaCl 0,9% con acqua deionizzata o distillata): al 10% dell'intera corsa e fino a un volume di pipettaggio massimo della siringa, il CV (variazione del coefficiente di percentuale) è uguale o inferiore all'1%. Quando si pipettano volumi bassi di soluzione viscosa (ad es. 25 µl di miscela della sonda), è previsto un CV max. del 5%.

3.1.13 Agitatore per micropiastre

L'agitatore per micropiastre è utilizzato per la miscelazione dopo aver aggiunto i reagenti e per l'agitazione durante l'incubazione. L'agitatore per micropiastre alloggia fino a 4 micropiastre. L'agitatore per micropiastre ha 4 posizioni di agitazione con clamp appositamente realizzate che garantiscono la combinazione di micropiastra e rispettivo coperchio. L'orbita ha un diametro di 1,5 mm e una velocità di 1100 ± 50 giri/min.

3.1.14 Lavatore di micropiastre


L'RCS dispone di un lavatore di micropiastre modulare con una testata di lavaggio a 8 canali che garantisce flessibilità e velocità. Per controllare la pressione del liquido, il lavatore di micropiastre si avvale di pompe di aspirazione e dispensazione, di un collettore a valvola solenoide e di una valvola di limitazione. Il lavatore di micropiastre può funzionare indipendentemente dalle altre funzioni dell'RCS grazie alle capacità multitasking del sistema. Il flacone di lavaggio alimenta il lavatore di micropiastre.

Durante il processo RCS, il lavatore di micropiastre dispensa $1,5 \text{ ml} \pm 10\%$ in ogni pozzetto della micropiastra mentre aspira dalla parte superiore dei pozzetti della micropiastra. Il flusso è determinato dalla pressione di dispensazione di 10 psi ed è approssimato a 500 µl/s. I pozzetti della micropiastra sono aspirati fino a un volume residuo medio massimo di 7 µl/pozzetto. Il ciclo di riempimento/aspirazione viene ripetuto 6 volte.

3.1.15 Stazione di espulsione puntali

La stazione di espulsione puntali si estende sul lato sinistro dello strumento RCS.

Nota: Prima di utilizzare l'RCS, è necessario posizionare un contenitore scarti sotto l'area di espulsione dei puntali.

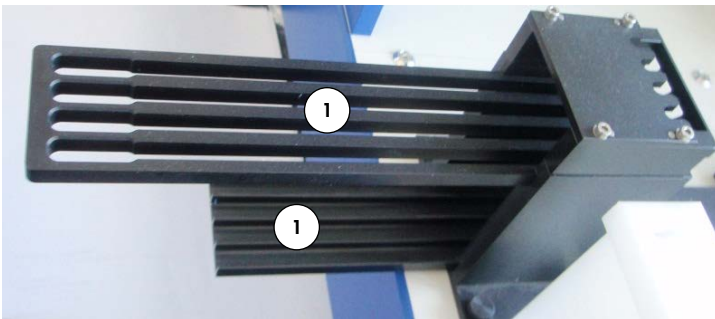

- 1 Guida di espulsione puntali

3.1.16 Interruttore di alimentazione e ingresso apparecchio


L'interruttore di alimentazione e il collegamento sono posizionati nell'angolo inferiore di sinistra del pannello posteriore dell'RCS.



- 1 Interruttore di alimentazione
- 2 Ingresso dell'apparecchio (dispositivo di scollegamento)

3.1.17 Collegamento del sistema

Il collegamento del sistema è posizionato nell'angolo inferiore di sinistra del pannello posteriore dell'RCS.

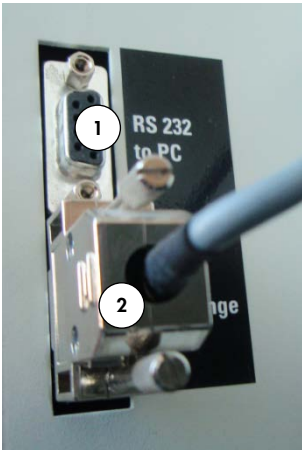

- | | |
|---|--|
| 1 Interfaccia RS-232 per il collegamento al computer | 2 Interfaccia RS-232 per il collegamento alla pompa a siringa |
|---|--|

3.1.18 Collegamenti dei contenitori




I collegamenti dei contenitori sono sul pannello di destra dello strumento.



Consultare “Pulizia delle tubazioni e dei recipienti”, pagina 78, per istruzioni sul collegamento dei contenitori dopo la pulizia.

3.1.19 Flacone del liquido di sistema, flacone di lavaggio e contenitore dei residui

L'RCS è dotato dei seguenti contenitori:

Flacone del liquido di sistema	Flacone di lavaggio	Contenitore dei residui
		

3.1.20 Computer dell'RCS

L'RCS deve essere collegato al PC fornito insieme all'RCS. Il kit di fornitura include computer, tastiera, mouse, monitor e cavo di collegamento.

Nota: Il computer dell'RCS è usato anche per il collegamento al *digene* Microplate Luminometer (strumento DML).

3.1.21 Lettore di codici a barre RCS


Può essere aggiunto un lettore di codici a barre all'RCS. L'aggiunta di un lettore di codici a barre all'RCS consente di automatizzare la tracciatura delle micropiastre dal caricamento all'analisi finale dei risultati. Le micropiastre di ibridizzazione e di cattura fornite da QIAGEN includono diciture leggibili dall'operatore e codici a barre che possono essere letti dal lettore di codici a barre RCS.

L'Upgrade Package del lettore di codici a barre RCS utilizza i codici a barre presenti sulle piastre per associare gli ID delle piastre di ibridizzazione e di cattura processate sull'RCS. L'ID della piastra di cattura viene poi associato automaticamente quando nel software di analisi del test *digene* viene creato l'ID della piastra di ibridizzazione. Ciò consente la gestione integrata di piastre e campioni.

È importante che l'utente non cambi la sequenza delle piastre sull'RCS, ad esempio durante la procedura di recupero, allo scopo di mantenere la corretta associazione fra la piastra di cattura e la piastra di ibridizzazione. Una corretta associazione fra le piastre potrebbe causare risultati errati.

L'Upgrade Package del lettore di codici a barre RCS include un'applicazione che salva i codici a barre scansionati affinché possano essere utilizzati dal software del sistema *digene* HC2. Quando l'applicazione di scansione dei codici a barre è in funzione, viene visualizzata una finestra di comando.

Esempio:

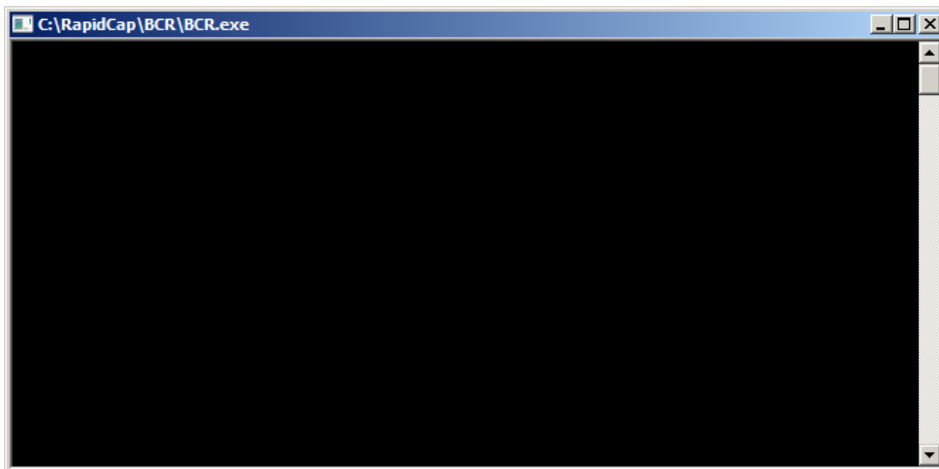


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
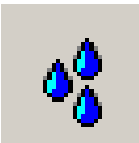


Non chiudere la finestra di comando. La finestra si chiude automaticamente dopo il salvataggio del codice a barre. Se l'utente chiude la finestra di comando, il codice a barre scansionato non verrà salvato.

L'Upgrade Package del lettore di codici a barre RCS può essere installato unicamente da un rappresentante QIAGEN. Non cercare di installare i componenti hardware, gli script RCS o l'applicazione software del lettore di codici a barre. Contattare i QIAGEN Technical Services.

3.2 Componenti del software

I componenti del software RCS comprendono il software RCS con l'applicazione del lettore di codici a barre e il software ScriptSelect.

3.2.1 Icone del software

Software	Icona	Descrizione	Azione
Software RCS	 Icona sul desktop Rapid Capture System	Icona sul desktop Rapid Capture System	lancia il software operativo dell'RCS che comanda lo strumento.
Software RCS	 Icona Run (Processo) sulla barra Strumenti dell'RCS	Icona Run (Processo) sulla barra Strumenti dell'RCS	visualizza la finestra di dialogo Scripts .
Software RCS	 Icona Flush System (Lavaggio del sistema) sulla barra Strumenti dell'RCS	Icona Flush System (Lavaggio del sistema) sulla barra Strumenti dell'RCS	lava il sistema
Software RCS	 Icona Park (Sosta) sulla barra Strumenti dell'RCS	Park (Sosta) sulla barra Strumenti dell'RCS	sposta il braccio robotico alla posizione di sosta.
Software ScriptSelect	 Icona sul desktop ScriptSelect	Icona sul desktop ScriptSelect	lancia il software per facilitare la selezione dello script corretto per un processo. Vedere "Utilizzo del software ScriptSelect", pagina 48.

Nota: Nel computer dell'RCS sono presenti altre applicazioni software. Queste applicazioni controllano lo strumento DML, il software LumiCheck e l'interfaccia dei dati con il sistema informatico di gestione di laboratorio (LIMS). Per ulteriori istruzioni, consultare i manuali utente relativi a queste applicazioni software aggiuntive.


3.3 Attrezzatura aggiuntiva

3.3.1 MST Vortexer 2 e portaprovette per campioni

Il Multi-Specimen Tube (MST) Vortexer 2, comprensivo di portaprovette per campioni e componenti accessori per coperchio, è richiesto per la preparazione, la processazione e la denaturazione dei campioni. Su ogni portaprovette per campioni è inciso un numero seriale che corrisponde al numero inciso sul coperchio; durante l'uso, i numeri seriali di portaprovette e coperchio devono corrispondere. Sono disponibili i seguenti design di portaprovette per campioni:

Nome portaprovette per campioni	Colore portaprovette	Uso previsto
Portaprovette campioni <i>digene</i>	Blu	Test di campioni <i>digene</i>
Rack di conversione	Argento	Test di campioni citologici liquidi in provette coniche da 15 ml

La figura seguente di un portaprovette per campioni riproduce una micropiastra e indica le posizioni dei calibratori (NC, PC1 e PC2), dei controlli qualità (QC1, QC2) e dei campioni.

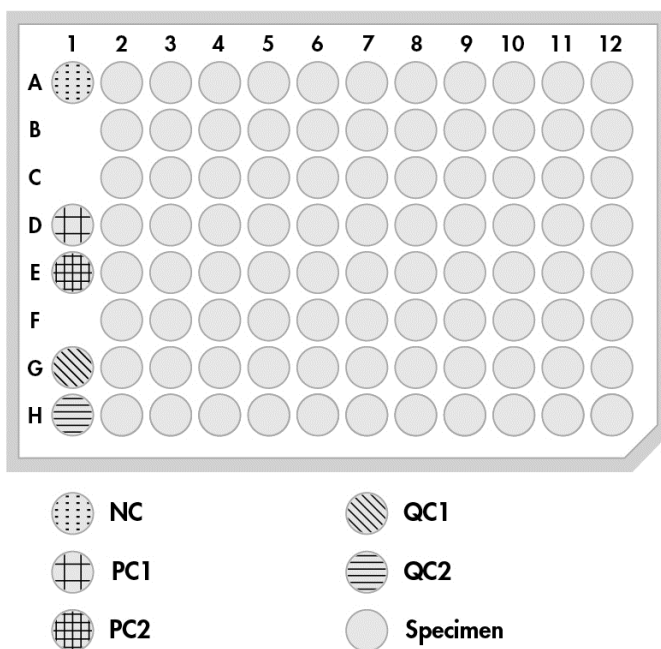

3.3.2 Strumento DML e software di analisi dei dosaggi *digene*

Lo strumento DML e il software del relativo luminometro sono realizzati per misurare e analizzare la luce prodotta per chemiluminescenza dai test *digene* HC2 DNA.

4 Installazione, trasferimento e smaltimento

4.1 Spedizione dello strumento

Solo le apparecchiature e gli accessori elencati sono stati convalidati per l'utilizzo con l'RCS e sono disponibili presso QIAGEN.

Con l'RCS vengono forniti i seguenti articoli:

- Strumento RCS
- Flacone del liquido di sistema
- Flacone di lavaggio
- Contenitore dei residui
- Cavo di alimentazione

Le seguenti apparecchiature sono necessarie per il funzionamento dell'RCS, ma potrebbero non essere incluse nell'RCS:

- Computer dell'RCS comprensivo di CPU, tastiera, mouse, Microsoft Windows 7, software del sistema RCS, software ScriptSelect
- Monitor
- Cavo della stampante
- Cavi RS-232

4.1.1 Apparecchiature occorrenti ma non in dotazione

- Gruppo di continuità (UPS) della capacità di ≥ 1.000 VA, soppressione di sovratensioni, filtraggio EMI/REI

4.2 Requisiti del sito

ATTENZIONE **Danni allo strumento**



L'RCS non dovrebbe essere collocato vicino a una fonte di calore o esposto alla luce solare diretta.

L'apparecchio deve essere collocato nelle immediate vicinanze di una presa di alimentazione AC.

Lasciare uno spazio aggiuntivo compreso tra 30 cm e 61 cm dietro lo strumento per interventi di manutenzione e distacco del cavo di alimentazione dall'ingresso dell'apparecchio (il dispositivo di scollegamento situato nell'angolo inferiore a sinistra sul pannello posteriore dello strumento). Accertarsi che le linee di alimentazione dell'apparecchio siano a tensione regolata e dotate di protezione da sovratensioni.

Lo strumento deve essere collocato su un banco di lavoro robusto e abbastanza largo da poter alloggiare l'RCS, il flacone del liquido di sistema, il contenitore dei residui e il computer dell'RCS. Verificare che il banco di lavoro sia asciutto, pulito e dotato di spazio supplementare per gli accessori.

Consultare "Appendice A – Dati tecnici", pagina 140 per il peso e le dimensioni dell'RCS.

Contattare i QIAGEN Technical Services per maggiori informazioni sulle specifiche che deve possedere il banco di lavoro.

- Collocare la tastiera del computer dell'RCS a portata dell'RCS per garantire l'accesso al tasto **Esc**, che è considerato un meccanismo di stop d'emergenza.
- Sistemare l'RCS in modo tale che l'utente possa udire l'allarme acustico, consentendo l'attenzione immediata in caso di un errore o di un malfunzionamento.
- Sul lato destro dello strumento posizionato sul banco di lavoro (o in prossimità dello stesso) deve essere lasciato uno spazio tale da poter sistemare il flacone del liquido di sistema e il flacone di lavaggio in prossimità dello strumento e sullo stesso livello.
- Il contenitore dei residui deve essere posizionato in un punto visibile e sicuro sul pavimento, dietro lo strumento per impedire eventuali fuoriuscite.
- Accertarsi che lo spazio per riporre il contenitore dei residui sia entro una distanza di 1,5 m dallo strumento.

4.3 Collegamento all'alimentazione AC

4.3.1 Requisiti di alimentazione

Consultare "Appendice A – Dati tecnici", pagina 140 per i requisiti di alimentazione.

4.3.2 Requisiti di messa a terra

Per proteggere il personale operativo, la NEMA (National Electrical Manufacturers' Association) raccomanda di mettere a terra lo strumento in maniera adeguata. Lo strumento è dotato di un

cavo di alimentazione AC a 3 conduttori che, se collegato ad una presa AC adeguata, mette a terra lo strumento. Per garantire questa funzione di protezione, non collegare lo strumento a prese di alimentazione in AC che non siano dotate di messa a terra.

4.4 Disimballaggio, installazione, trasferimento e smaltimento dell'hardware

L'RCS viene disimballato e installato dai dipendenti dell'assistenza in loco QIAGEN o da personale formato da QIAGEN.

Se lo strumento va spostato in una nuova posizione, i dipendenti dell'assistenza in loco QIAGEN o il personale formato da QIAGEN eseguono il reimballaggio e il trasferimento dello strumento.

L'organo responsabile deve contattare i QIAGEN Technical Services per avere maggiori informazioni sul trasporto dello strumento dopo la consegna e per istruzioni relative all'eliminazione o riduzione dei rischi e/o rischi biologici derivanti dalla messa fuori uso, dal trasporto e/o dallo smaltimento dello strumento.

4.5 Gruppo di continuità

ATTENZIONE Danni allo strumento



Lo strumento può venire danneggiato da un guasto dell'alimentazione durante un processo. QIAGEN raccomanda di collegare l'RCS a un gruppo di continuità.

Dopo l'installazione e prima dell'accensione dell'RCS, collegare l'RCS all'UPS. In caso di un guasto dell'alimentazione, un UPS consente all'RCS di continuare a funzionare per almeno 30 minuti, rendendo possibile l'intervento dell'utente per concludere o interrompere un processo.

Non collegare la stampante fornita con lo strumento DML direttamente nell'UPS.

4.6 Installazione del software

Il software RCS viene installato sul computer dell'RCS da un dipendente dell'assistenza in loco QIAGEN o da personale formato da QIAGEN.

Il software RCS è preinstallato sul computer dell'RCS con la versione Suite 4.4 del sistema *digene* HC2 per l'uso con il lettore di codici a barre RCS.

4.7 Programmi antivirus

Siamo consapevoli della minaccia posta dai virus a ogni computer che scambia dati con altri computer. Il sistema HC2, incluso l'RCS, è destinato all'installazione in ambienti in cui esistono già politiche locali che riducono tale minaccia al minimo e dove il sistema non è esposto a Internet. Le politiche locali di solito richiedono l'uso di un particolare antivirus. Sebbene il software RCS sia stato testato su un computer che utilizza McAfee® Endpoint Protection Essential for SMB e su un computer che utilizza Windows Defender, a causa del gran numero di antivirus disponibili, QIAGEN non è in grado di prevedere il possibile impatto sul sistema di uno qualsiasi di questi strumenti, se utilizzati. La scelta di uno strumento antivirus appropriato ricade sotto la responsabilità del cliente. QIAGEN non ha convalidato il software RCS per l'uso con nessun software antivirus.

L'amministratore del sistema deve garantire quanto segue:

- Le directory di QIAGEN devono essere escluse dall'esecuzione di un programma antivirus. Per il software RCS, tali directory sono le seguenti:
 - **C:\RapidCap**
 - **C:\Program Files\Selector**
- L'accesso ai file non deve essere intercettato da un antivirus quando il sistema RCS è in uso.
- Gli aggiornamenti al database dei virus non devono essere eseguiti quando il sistema è in uso.
- Le scansioni dei file non devono essere eseguite quando il sistema è in uso.

Si raccomanda vivamente di disabilitare il software antivirus durante le ore di lavoro del laboratorio per evitare che il software antivirus interferisca con il funzionamento del sistema *digene* HC2, incluso l'RCS. Le attività dell'antivirus sopra descritte possono essere eseguite in sicurezza unicamente quando il sistema *digene* HC2, incluso l'RCS, non è in esecuzione, in caso contrario esiste il rischio di influenzare negativamente le prestazioni del sistema.

5 Accensione/spegnimento dell'RCS

Il computer dell'RCS è impostato con due account utenti amministrativi e un account utente standard. Si raccomanda di utilizzare il software RCS con l'account utente standard.

Nota: Non si possono modificare gli utenti Windows mentre l'RCS è in funzione.

Si forniscono di seguito le credenziali relative agli account utente (le password sono case-sensitive):

a. Account utente amministrativo:

- ID utente: Administrator
- Password: digene

Il sistema invita l'utente a modificare la password al primo login nell'account Administrator.

b. Account utente standard:

- ID utente: Welcome
- Password: welcome

L'account utente Technician è destinato a essere utilizzato unicamente dal personale dell'assistenza QIAGEN.

5.1 Accensione dell'RCS

1. Accendere il computer dell'RCS.
2. Si apre la schermata di benvenuto.
3. Cliccare sull'icona per inserire l'account utente Windows corretto.
4. Per registrarsi nel sistema operativo Windows utilizzare le seguenti credenziali case-sensitive corrispondenti.
5. Premere il tasto **Enter** sulla tastiera del computer dell'RCS.
Dopo aver inserito la password, compare il desktop dell'RCS con le icone.
6. Confermare che gli adattatori per puntali e le pinze per micropiastre sono situati nelle posizioni di pipettaggio o nell'area di caricamento portaprovette per campioni (vedere "Layout del deck RCS", pagina 63).
Se necessario, sollevare manualmente gli adattatori per puntali e le pinze per micropiastre e spostare il braccio robotico nella posizione corretta. Abbassare gli adattatori per puntali e le pinze per micropiastre portandoli nel punto di stop naturale.
7. Accertarsi che non siano presenti elementi vari sul deck RCS.

8. Accendere l'RCS.

Nota: Guardando lo strumento dal davanti, l'interruttore di alimentazione è situato sul retro dello strumento a destra.

9. Posizionare la tastiera del computer dell'RCS in modo tale che sia vicina all'RCS.

Nel caso in cui lo strumento debba essere arrestato immediatamente, premere il tasto **Esc** sulla tastiera del computer dell'RCS che funge da meccanismo di arresto d'emergenza. Per ulteriori istruzioni di sicurezza, vedere "Informazioni di sicurezza", pagina 14.

10. Per lanciare il software RCS, fare doppio clic sull'icona del desktop **Rapid Capture System**.

In alternativa, cliccare sull'icona Windows **Start**, poi **Tutti i programmi** e poi ancora su **RapidCap**.


11. Fare clic sull'icona **Park** sulla barra Strumenti dell'RCS.

Gli adattatori per puntali e il dispositivo robotizzato di movimentazione si muoveranno lentamente verso la posizione neutra e il sistema inizierà tutti i componenti e segnalerà all'incubatrice di ibridizzazione di raggiungere 65°C.

5.2 Spegnimento dell'RCS

Si raccomanda di lasciare lo strumento sempre acceso.

Talvolta, potrebbe essere visualizzato il **Program Compatibility Assistant** (Assistente di Compatibilità Programma) di Windows alla chiusura del software RCS. Il software RCS è stato convalidato per l'uso con Windows 7 e l'utente può chiudere questo messaggio cliccando sulla **X** nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo oppure selezionando **This program works correctly** (Questo programma funziona correttamente).

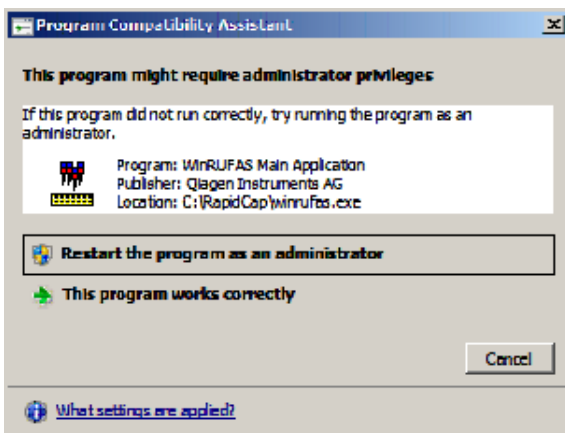


Sono necessarie due persone per spegnere lo strumento allo scopo di non danneggiare gli adattatori per puntali e le pinze per micropiastre. L'RCS parcheggia in modo sicuro gli adattatori per puntali e le pinze per micropiastre al termine di ogni script. L'interruttore di alimentazione è posizionato nell'angolo in basso a sinistra del pannello posteriore dello strumento.

Vedere anche "Spegnimento dell'RCS dopo un'interruzione del sistema", pagina 95.

1. La prima persona sostiene gli adattatori per puntali mettendo una mano sotto la plastica nera nella parte inferiore di ogni barra verticale. Prestare attenzione a non spingere o tirare sulle barre in linea orizzontale poiché il loro allineamento è delicato.
2. La prima persona sostiene le pinze per micropiastre da sotto con l'altra mano.

Nota: Questa fase non è richiesta dopo il completamento di un dosaggio, in quanto le pinze per micropiastre si troveranno già accanto alla superficie del deck RCS.

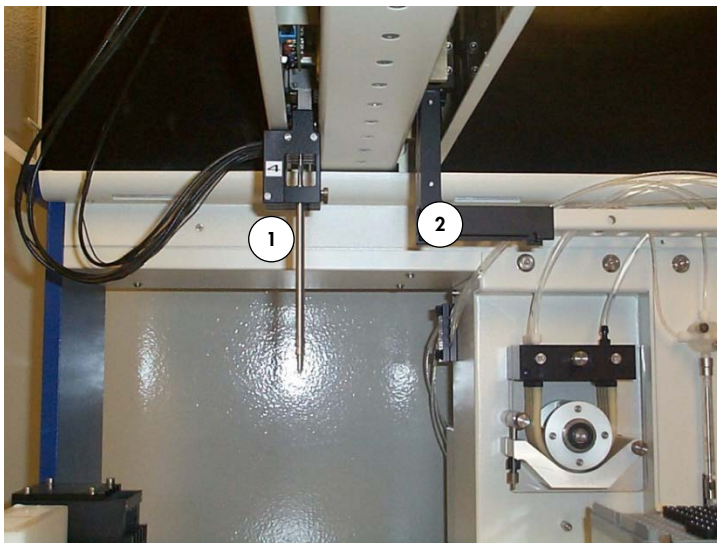

1 Adattatori per puntali 2 Pinze per micropiastre

3. A questo punto, la seconda persona può spegnere l'alimentazione usando l'apposito interruttore. Se è presente una micropiastro nel dispositivo robotizzato di movimentazione, va rimossa ora.
4. A questo punto, la prima persona può guidare il braccio robotico alla posizione di pipettaggio utilizzando le pinze per micropiastre e non gli adattatori per puntali. Ora gli adattatori per puntali e le pinze per micropiastre possono essere abbassati sul deck RCS.

-
5. Se negli adattatori per puntali sono presenti dei puntali monouso, è preferibile che l'RCS scarichi tali adattatori riaccendendo l'RCS ed eseguendo lo script **FLUSH** (Lavaggio) script (vedere la schermata a pagina 103).

Se ciò non fosse possibile a causa di un malfunzionamento, i puntali possono essere rimossi singolarmente tirando il puntale verso il basso e supportando allo stesso tempo la plastica nera nella parte inferiore di ogni barra verticale. È di fondamentale importanza che gli adattatori per puntali non vengano tirati orizzontalmente.

Importante: Gli utenti devono osservare le precauzioni universali riguardanti i materiali potenzialmente infettivi. Non infilare parti della mano sotto un puntale monouso mentre si tira verso il basso per rimuoverlo.

6 Utilizzo del software ScriptSelect

Gli script definiscono il set di istruzioni specifico per il software RCS. Lo script controlla la sequenza di processazione necessaria per eseguire il test *digene* HC2 DNA sull'RCS. Gli script offrono all'utente flessibilità in termini di numero di campioni, tipi di campioni e tipi di test *digene* HC2 DNA per un determinato processo RCS. Gli script sono denominati in modo generico per un utilizzo con molteplici test *digene* HC2 DNA.

Il software ScriptSelect assiste l'utente nella selezione dello script necessario per eseguire un test *digene* HC2 DNA sull'RCS. Funziona generando una serie di opzioni su schermo dove l'utente compie le seguenti selezioni:

- il test *digene* HC2 DNA appropriato
- il numero di sonde
- il numero e il tipo di portaprovette per campioni
- le configurazioni delle sonde

L'utente deve selezionare uno script dal software ScriptSelect per aggiungerlo alla **Run List** (Lista del processo).

Nota: Alcuni degli script sono realizzati per applicazioni future e non sono disponibili per un uso corrente. Nel momento in cui questi script diventeranno disponibili, QIAGEN fornirà una password per sbloccarli. I disclaimer relativi alle applicazioni non IVD, nonché le dichiarazioni riguardanti le applicazioni IVD sono riportati nella sezione **Disclaimers:** delle varie finestre e nella sezione "Disclaimers:" delle stampe.

6.1 Installazione del software ScriptSelect

Il software ScriptSelect viene installato sul computer dell'RCS da un dipendente dell'assistenza in loco QIAGEN o da personale formato da QIAGEN.

6.2 Avvio del software ScriptSelect

Fare doppio clic sull'icona del desktop **ScriptSelect**.

Si apre la finestra del software ScriptSelect RCS. Per ulteriori informazioni su questa finestra, vedere "Finestra principale del software ScriptSelect", pagina 51.

6.3 Nomenclatura degli script

L'ordine corretto dei portaprovette per campioni è sempre indicato dal nome dello script. In generale, se c'è un dosaggio doppio, il portaprovette per campioni per il dosaggio doppio è il primo, seguito da qualsiasi altro portaprovette per campioni dello stesso tipo di campione. Se lo script non richiede un dosaggio doppio, i rack di conversione saranno sempre i primi, seguiti dai portaprovette per i campioni *digene*.

Elementi nel nome dello script	Definizione
C	C si riferisce alle micropiastre processate da un rack di conversione.
D	D si riferisce alle micropiastre processate da un portaprovette per campioni <i>digene</i> .
du	du si riferisce a un dosaggio doppio.
p	p è un suffisso che indica dosaggi multipli a sonda singola, ovvero un passaggio a una sonda diversa.

6.3.1 Esempi di nomi di script

6.3.1.1 Esempio 1

Nome dello script	Significato
2C1D	Descrive uno script a sonda singola, a tre piastre, a tre portaprovette.
2C	<ul style="list-style-type: none">● 2 rack di conversione● Micropiastre 1 e 2● La miscela della sonda per le micropiastre 1 e 2 è in posizione sonda 1
1D	<ul style="list-style-type: none">● 1 portaprovette per campioni <i>digene</i>● Micropiastra 3● La miscela della sonda per la micropiastra 3 è in posizione sonda 1

6.3.1.2 Esempio 2

Nome dello script	Significato
1Ddu2D	Descrive uno script a sonda singola e doppia, a quattro piastre, a tre portaprovette.
1Ddu	<ul style="list-style-type: none">● 1 portaprovette per campioni <i>digene</i>● Micropiastre 1 e 2● La miscela della sonda per la micropiastra 1 è in posizione sonda 1● La miscela della sonda per la micropiastra 2 è in posizione sonda 2
2D	<ul style="list-style-type: none">● 2 portaprovette per campioni <i>digene</i>● Micropiastre 3 e 4● La miscela della sonda per le micropiastre 3 e 4 è in posizione sonda 3

6.3.1.3 Esempio 3

Nome dello script	Significato
1Cp2Dp	Descrive uno script a sonda doppia, a tre piastre, a tre portaprovette.
1Cp	<ul style="list-style-type: none">● 1 rack di conversione● Micropiastra 1● La miscela della sonda per la micropiastra 1 è in posizione sonda 1
2Dp	<ul style="list-style-type: none">● 2 portaprovette per campioni <i>digene</i>● Micropiastre 2 e 3● La miscela della sonda per le micropiastre 2 e 3 è in posizione sonda 2

6.3.1.4 Esempio 4


Nome dello script	Significato
1Ddu	Descrive uno script a sonda doppia, a due piastre, a un portaprovette. <ul style="list-style-type: none">● 1 portaprovette per campioni <i>digene</i>

Nome dello script	Significato
-------------------	-------------

- Micropiastre 1 e 2
- La miscela della sonda per la micropiastra 1 è in posizione sonda 1
- La miscela della sonda per la micropiastra 2 è in posizione sonda 2

6.4 Finestra principale del software ScriptSelect

Il software ScriptSelect è gestito con l'uso della finestra principale.

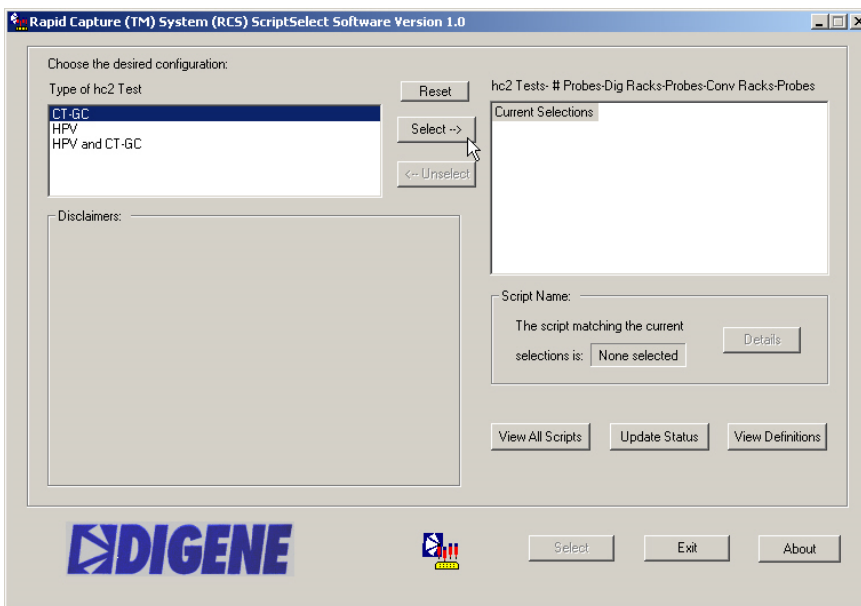

La tabella che segue descrive le funzioni della finestra principale:

Funzione	Descrizione
Pannello Choose the desired configuration: (Seleziona la configurazione desiderata:)	Questo pannello abilita l'utente a selezionare lo script appropriato.
<< nome della casella di riepilogo >> nel pannello Choose the desired configuration:	Il nome di questa casella si aggiorna in base alle opzioni precedentemente selezionate (ad es. "Type of hc2 Test" (Tipo di test HC2)).

Funzione	Descrizione
Pulsante Reset (Resetta)	Fare clic su questo pulsante per cancellare tutte le opzioni selezionate nella casella di riepilogo a destra.
Pulsante Select --> (Seleziona)	<p>Selezionare l'opzione appropriata nella casella di riepilogo a sinistra e fare clic su questo pulsante per spostare l'opzione nella casella di riepilogo a destra.</p> <p>In alternativa, fare doppio clic sull'opzione nella casella di riepilogo a sinistra per spostarla nella casella di riepilogo a destra.</p>
Pulsante <-- Unselect (Deseleziona)	<p>Selezionare l'opzione appropriata nella casella di riepilogo a destra e fare clic su questo pulsante per rimuovere l'opzione dalla casella di riepilogo a destra.</p> <p>In alternativa, fare doppio clic sull'opzione per spostarla nella casella di riepilogo a destra.</p> <p>Per eliminare più opzioni in una sola volta, fare doppio clic sull'opzione al livello più alto.</p>
Casella di riepilogo hc2 Tests-# Probes-Dig Racks-Probes-Conv Racks-Probes (N° test HC2 Sonde-Rack dig.-Sonde-Rack conv.-Sonde)	Questa casella di riepilogo riporta le scelte fatte nella casella di riepilogo a sinistra.
Pannello Disclaimers:	Questo pannello si compila automaticamente con informazioni correlate al dosaggio.
Pannello Script Name: (Nome dello script:)	Questo pannello fornisce il nome dello script corrispondente alle selezioni correnti.
The script matching the current selection is: (Lo script corrispondente alla selezione corrente è:)	Questo pannello visualizza automaticamente il nome dello script corrispondente alle selezioni correnti.

Funzione	Descrizione
Pulsante Details (Dettagli)	Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo RCS Script Details (Dettagli script RCS) che visualizza la micropiastra, il tipo di portaprovette per campioni e la configurazione della sonda per uno script specifico.
Pulsante View All Scripts (Visualizza tutti gli script)	Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo RCS SelectScripts: Full Listing of Scripts (SelectScripts RCS: Elenco completo di script).
Pulsante Update Status (Aggiorna stato)	Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Unlock Scripts (Sblocca script) che abilita l'utente a sbloccare uno script inserendo la password fornita da QIAGEN e cliccando su OK .
Pulsante View Definitions (Visualizza definizioni)	Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo ScriptSelect Definitions (Definizioni ScriptSelect) che abilita l'utente a visualizzare le definizioni.
Pulsante Select	Fare clic su questo pulsante per aggiungere lo script alla Run List . Nota: Se lo script è bloccato, il pulsante Select non è disponibile.
Pulsante Exit (Esci)	Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra.
Pulsante About (Informazioni)	Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo About che fornisce la versione del software.

6.5 Selezione degli script

Il software ScriptSelect fornisce all'utente le scelte basate su selezioni precedenti. Le schermate con le opzioni del menu vengono bypassate quando c'è una sola opzione. Il software seleziona per default lo script appropriato sulla base delle selezioni dell'utente.

Seguire le seguenti istruzioni per aggiungere uno script alla Run List.

1. Innanzitutto, selezionare uno script.

Prompt sulla casella di riepilogo a sinistra

Azione

Casella di riepilogo **Type of hc2 Test** (Tipo di test HC2)

Selezionare il test appropriato.

Casella di riepilogo **Number of Probe(s)** (Numero di sonde)

Selezionare il numero corretto di sonde.

Casella di riepilogo **Number of Racks with Digene Specimens** (Numero di portaprovette con campioni digene)

Selezionare il numero desiderato di portaprovette per campioni *digene* da testare.

Casella di riepilogo **Probe Configuration(s) with Digene Specimens** (Configurazione/i sonda con campioni digene)

Selezionare la corretta configurazione della sonda da usare con i portaprovette per campioni *digene*.

Casella di riepilogo **Number of Converted Racks** (Numero di rack di conversione)

Selezionare il numero desiderato di rack di conversione da testare.

Casella di riepilogo **Probe Configurations(s) with Converted Specimens** (Configurazione/i sonda con campioni di conversione)

Selezionare una delle configurazioni sonda corrette da usare con i rack di conversione.

Terminata la selezione, nella casella di riepilogo a sinistra compare il messaggio **Script selection is now complete. (La selezione dello script è ora completa.) See highlighted script name** (La selezione dello script ora è completa. Vedi nome dello script selezionato.) e il nome dello script viene visualizzato nel pannello **Script Name** a destra.

2. Per aggiungere lo script alla **Run List** fare clic su **Select**.

Se lo script è approvato per l'uso, lo script viene selezionato e aggiunto alla **Run List**.

Se lo script non è approvato per l'uso, lo script non è disponibile.

Si apre la finestra di dialogo **RCS ScriptSelect**.

3. Fare clic su **OK**.

Se lo script è approvato ed è disponibile per l'uso, compare la finestra di dialogo **ScriptSelect Notice** (Nota ScriptSelect).

4. Fare clic su **Print** (Stampa).


Compare la finestra di dialogo **Print**. Se non si desidera fare una stampa, fare clic su **Cancel** (Annulla).

5. Per stampare le informazioni dello script, fare clic su **OK**.

6.5.1 Utilizzo del pulsante **View All Scripts**

Fare clic sul pulsante **View All Scripts** per aprire la finestra di dialogo **RCS ScriptSelect: Full Listing of Scripts**.


Esempio:

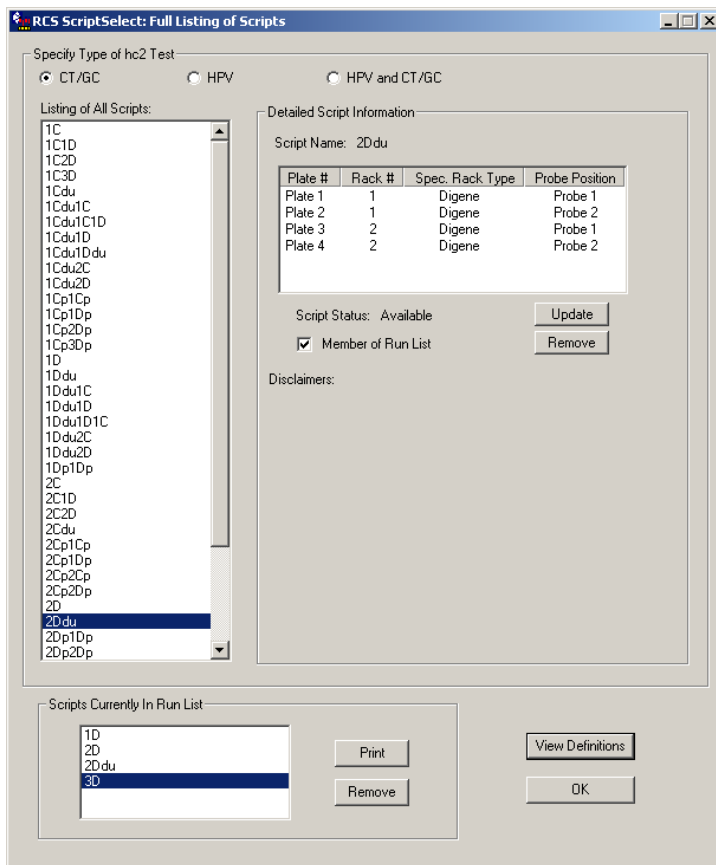


La tabella seguente descrive le funzioni della finestra di dialogo **RCS ScriptSelect: Full Listing of Scripts**:

Funzione	Descrizione
Pannello Specify Type of hc2 Test : (Specifica tipo di test HC2)	Questo pannello fornisce un elenco di script per il tipo di test selezionato.
Casella di riepilogo Listing of All Scripts (Elenco di tutti gli script)	La casella di riepilogo visualizza una lista completa di script installati sul sistema. Nota: Per attivare lo script e aggiungere lo script alla Run List fare doppio clic sul nome dello script nella casella di riepilogo.
Pannello Detailed Script Information (Informazioni)	Questo pannello fornisce informazioni dettagliate sullo script selezionato nella casella di riepilogo Listing of All Scripts .

Funzione	Descrizione
script dettagliate)	
Campo Script Name:	<p>Questo campo si aggiorna automaticamente per fornire il nome dello script che è selezionato nella casella di riepilogo Listing of All Scripts e fornisce le informazioni sullo script riportate di seguito in formato tabella:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Piastra # ● Rack # ● Tipo specifico di portaprovette campioni ● Posizione sonda
Campo Script Status: (Stato dello script:)	<p>Questo campo si aggiorna automaticamente per fornire lo stato dello script, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Available (Disponibile) – Indica che lo script è disponibile per l'uso e può essere aggiunto alla Run List. ● Locked (Bloccato) – Indica che lo script non è disponibile per l'uso e non può essere aggiunto alla Run List.
Pulsante Update (Aggiorna)	<p>Questo pulsante offre l'opzione di inserire una password fornita da QIAGEN per cambiare lo stato dello script da "locked" a "available".</p>
Casella di riepilogo Member of Run List (Elemento della lista di processo)	<p>Indica se lo script selezionato nella casella di riepilogo Listing of All Scripts è o un elemento della Run List.</p>
Pulsante Select	<p>Fare clic su questo pulsante per aggiungere lo script selezionato nella casella di riepilogo Listing of All Scripts alla Run List.</p> <p>Nota: Se uno script è attualmente bloccato, il pulsante Select diventa un pulsante Locked grigio.</p>

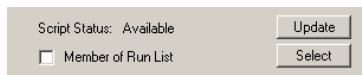


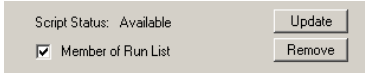Funzione	Descrizione
Pulsante Remove (Elimina)	Fare clic su questo pulsante per eliminare lo script selezionato nella casella di riepilogo Listing of All Scripts dalla Run List . 
Campo Disclaimers :	Questo campo si compila automaticamente con informazioni correlate al dosaggio.
Pannello Scripts Currently in Run List (Script attualmente nella lista di processo)	Questo pannello elenca gli script che sono stati aggiunti alla Run List .
Pulsante Print	Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Print e stampare le corrispondenti informazioni dello script.
Pulsante Remove	Fare clic su questo pulsante per eliminare lo script selezionato nella casella di riepilogo Listing of All Scripts dalla Run List .
Pulsante View Definitions	Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo ScriptSelect Definitions che abilita l'utente a visualizzare le definizioni.
Pulsante OK	Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo.

6.5.2 Utilizzo del pulsante **Details**

Selezionare uno script nella finestra principale del software ScriptSelect e fare clic sul pulsante **Details** per aprire la finestra di dialogo **RCS Script Details**.

Esempio:

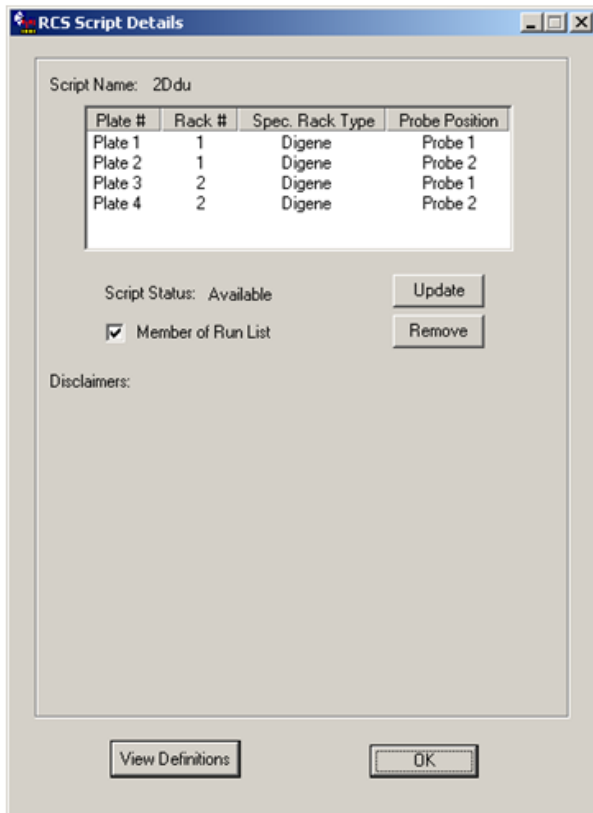

La tabella che segue descrive le funzioni della finestra di dialogo **RCS Script Details**.


Funzione	Descrizione
Pannello Script Name :	Questo campo fornisce il nome dello script selezionato.

Funzione	Descrizione
<< tabella >>	<p>La tabella elenca le seguenti informazioni per ogni micropiastra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Piastra # ● Rack # ● Tipo specifico di portaprovette campioni ● Posizione sonda
Campo Script Status:	Questo campo si aggiorna automaticamente in modo da indicare lo stato dello script, ossia "locked" o "available".
Pulsante Update	Questo pulsante offre l'opzione di inserire una password fornita da QIAGEN per cambiare lo stato dello script da "locked" a "available".
Casella di riepilogo Member of Run List	<p>Questa casella di controllo indica se lo script è incluso o meno nella Run List. Se è spuntato, lo script è riportato nella Run List.</p> <p>Se non è spuntato, lo script non è riportato nella Run List.</p>
Pulsante Remove	Fare clic su questo pulsante per eliminare lo script selezionato dalla Run List .
Campo Disclaimers:	Questo campo si compila automaticamente con informazioni correlate al dosaggio.
Pulsante View Definitions	Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo ScriptSelect Definitions che abilita l'utente a visualizzare le definizioni.
Pulsante OK	Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo.

6.5.3 Utilizzo del pulsante **View Definitions**

In tutto il software ScriptSelect, facendo clic su **View Definitions** si apre la finestra di dialogo **ScriptSelect Definitions**.

Esempio:

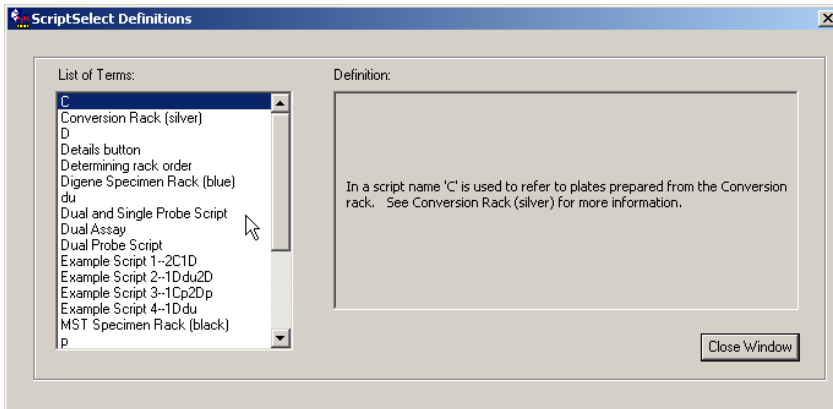

La tabella che segue descrive le funzioni della finestra di dialogo **ScriptSelect Definitions**.

Funzione	Descrizione
Casella di riepilogo List of Terms: (Elenco di termini:)	Questa casella di riepilogo contiene un elenco di termini.
Campo Definition: (Definizione:)	Questo campo visualizza la definizione del termine selezionato nella casella di riepilogo List of Terms .
Pulsante Close Window (Chiudi finestra)	Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra di dialogo ScriptSelect Definitions .

7 Esecuzione dei test *digene* HC2 DNA

7.1 Preparazione e conservazione dei reagenti

Per ottenere risultati di analisi riproducibili e coerenti è assolutamente necessario attenersi all'uso e alle limitazioni specificati per i reagenti nelle rispettive istruzioni per l'uso dei test *digene* HC2 DNA. Il mancato rispetto dei requisiti per l'uso dei reagenti può dare come esito analisi non valide e risultati imprecisi.

Consultare le rispettive istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA per ottenere le seguenti informazioni:

- Tipi di campioni approvati per l'uso con l'RCS
- Preparazione e conservazione dei reagenti in kit
- Volumi dei reagenti necessari per l'esecuzione del test sull'RCS

7.2 Configurazione del deck RCS

È indispensabile che il deck RCS sia configurato e mantenuto esattamente come descritto nel presente manuale, senza collocare elementi estranei sul deck durante il suo funzionamento.

Prima di iniziare:

- Indossare guanti monouso non talcati durante la configurazione.
- Accendere l'RCS. Per ulteriori istruzioni, vedere "Accensione/spegnimento dell'RCS". pagina 44.

Il software RCS controlla la temperatura dell'incubatrice di ibridizzazione. Lo script inizierà solo quando l'incubatrice di ibridizzazione raggiunge 65 °C.

Raccomandazione: Lasciare sempre acceso l'RCS.

- Accendere lo strumento DML almeno 1 ora prima di misurare la prima micropiastra di cattura in quanto lo strumento richiede un periodo di riscaldamento.

Raccomandazione: Lasciare sempre acceso lo strumento DML.

- Usando il software per analisi dei dosaggi *digene*, creare il layout delle piastre per ogni micropiastra testata.


Consultare il manuale utente del relativo software e le istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA.

Importante: Il layout della piastra deve corrispondere al portaprovette per campioni e alla micropiastra corretti al fine di ottenere risultati precisi dal test.

- Controllare che la vaschetta in argento del lavatore RCS sia installata nel lavatore di micropiastre. In caso contrario, vedere "Appendice B – Sostituzione della vaschetta del lavatore RCS", pagina 142, per ulteriori istruzioni.
- Svuotare il contenitore dei puntali da eliminare e ripetere l'operazione ogni volta che sarà necessario per assicurarsi che i puntali cadendo lascino completamente libera la stazione di espulsione.
- Ispezionare il deck RCS e rimuovere micropiastre, coperchi o qualsiasi altro oggetto.

Nota: Se l'incubatrice di ibridizzazione contenesse micropiastre di un processo interrotto in precedenza, contattare i QIAGEN Technical Services per l'ispezione dell'incubatrice.

7.2.1 Layout del deck RCS

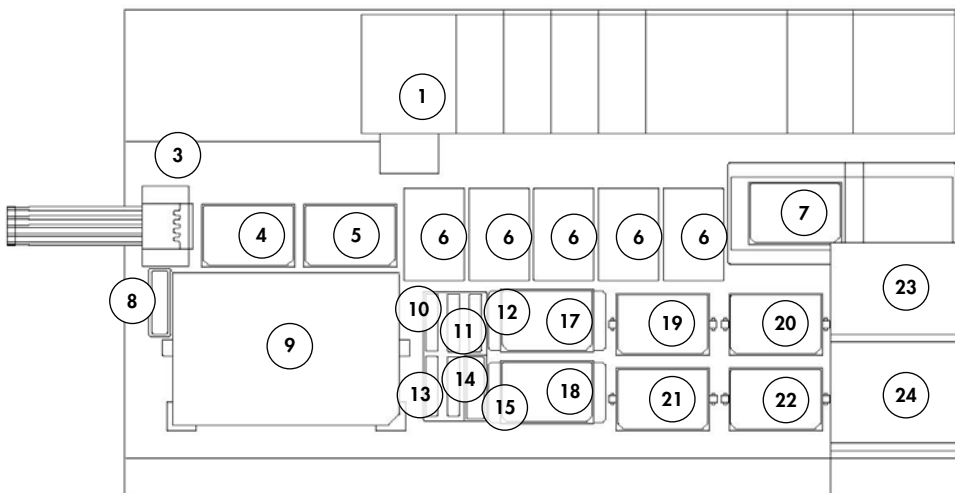

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|---|
| 1 | Pompa peristaltica | 13 | Miscela della sonda 3 |
| 2 | Diluente (4) | 14 | Miscela della sonda 2 |
| 3 | Stazione di espulsione puntali | 15 | Sosta coperchi |
| 4 | Posizione pipettaggio 1 | 16 | Rack dei recipienti per reagente |
| 5 | Posizione pipettaggio 2 | 17 | Impilatore B |
| 6 | Rack puntali monouso (5) | 18 | Impilatore A |
| 7 | Lavatore di micropiastre | 19 | Posizione agitazione 1 |
| 8 | Stazione lavaggio puntali | 20 | Posizione agitazione 2 |
| 9 | Posizione caricamento rack campioni | 21 | Posizione agitazione 3 |
| 10 | Reagente di rilevamento 2 (DR2) | 22 | Posizione agitazione 4 |
| 11 | Reagente di rilevamento 1 (DR1) | 23 | Impilatore piastre a temperatura ambiente |
| 12 | Miscela della sonda 1 | 24 | Incubatrice di ibridizzazione |

7.2.2 Caricamento dei materiali di consumo sul deck RCS

AVVERTENZA Rischio di lesioni personali



Evitare il contatto con l'incubatrice di ibridizzazione.

Lasciar raffreddare l'incubatrice di ibridizzazione prima di toccarla, poiché raggiunge una temperatura di 65°C.

ATTENZIONE Danni allo strumento



Rimuovere tutti gli elementi dal deck RCS.

Gli elementi rimanenti sul deck RCS possono danneggiare lo strumento.

1. Riempire tutti i 5 rack per puntali monouso con vassoi per puntali monouso.

Quando si caricano i vassoi per puntali monouso, la tacca a "U" del vassoio deve essere posizionata sul lato anteriore sinistro del rack. Il vassoio deve andare in posizione con uno scatto.

Nota: Se il vassoio dei puntali monouso non è posizionato correttamente, gli adattatori dei puntali potrebbero non riuscire a localizzare correttamente i puntali stessi. Se il vassoio non va in posizione con uno scatto, contattare i QIAGEN Technical Services.

Nota: Se in un dato momento la quantità di puntali monouso è insufficiente, il sistema entra in pausa, visualizza un messaggio e lo segnala all'utente con un allarme acustico. Caricare altri puntali monouso sul deck RCS.

2. Se necessario, numerare da 1 a 4 il lato frontale delle micropiastre di ibridizzazione. Mettere un coperchio per micropiastra su ogni micropiastra di ibridizzazione.

ATTENZIONE Danni allo strumento



Controllare che tutte le micropiastre occorrenti, inclusi i coperchi necessari, siano state caricate sul deck RCS prima di iniziare un processo. La mancanza di micropiastre o coperchi causerebbe la rottura del dispositivo robotizzato di movimentazione.

Una rottura potrebbe richiedere il riavvio del processo e/o danneggiare l'RCS.

3. Posizionare le micropiastre di ibridizzazione con coperchio sul deck RCS nelle posizioni di agitazione da 1 a 4 (vedere "Layout del deck RCS", pagina 63) corrispondenti al numero della micropiastro di ibridizzazione.
4. Orientare le micropiastre di ibridizzazione con il pozzetto A1 nell'angolo posteriore sinistro e posizzionarle dentro le guide.
5. Numerare il lato frontale delle micropiastre di cattura da 1 a 4, come applicabile.
6. Se una micropiastro di cattura piena non viene analizzata, rimuovere il numero adeguato di strisce o pozzetti della micropiastro di cattura, riporli nel loro sacchetto originale Mylar® con agente essiccante, sigillare accuratamente e conservare a 2–8°C.
7. Sostituire tutti i pozzetti della micropiastro di cattura mancanti con strisce di pozzetti della micropiastro RCS.
8. Orientando ogni micropiastro di cattura con il pozzetto A1 nell'angolo posteriore sinistro, impilare in ordine numerico le micropiastre di cattura con la micropiastro 1 in cima.
9. Posizionare un coperchio solo sulla micropiastro di cattura 1 e collocare la pila di micropiastre di cattura sul deck RCS nell'impilatore A (vedere "Layout del deck RCS", pagina 63).

Nota: Si raccomanda di etichettare il coperchio per micropiastro "REMOVE" per aumentare la visibilità del coperchio durante la pulizia di routine. Un coperchio per micropiastro che rimane sul deck RCS può causare la rottura dello strumento.

AVVERTENZA **Rischio di risultati imprecisi del test**



Cambiarsi sempre i guanti dopo aver maneggiato il contenitore dei residui, i raccordi a distacco rapido o i rifiuti liquidi.

La contaminazione delle aree di lavoro con fosfatasi alcalina può pregiudicare i risultati del test.

AVVERTENZA **Rischio di risultati imprecisi del test**



Controllare che il contenitore dei residui sia vuoto, in quanto il traboccamento del suo contenuto può causare una contaminazione da fosfatasi alcalina.

La contaminazione delle aree di lavoro con fosfatasi alcalina può pregiudicare i risultati del test.

10. Svuotare il contenitore dei residui, se necessario.

11. Controllare che le tubazioni che vanno dallo strumento al contenitore dei rifiuti non presentino sul loro percorso pieghe o anse che impediscano il deflusso del liquido verso il basso.

7.2.3 Caricamento dei reagenti sul deck RCS

AVVERTENZA Rischio di risultati imprecisi del test



Controllare che il flacone del liquido di sistema e il flacone di lavaggio siano pieni prima di iniziare il processo sull'RCS.

Un volume di reagenti insufficiente per il processo può dare risultati imprecisi del test.

1. Riempire il flacone di lavaggio con tampone di lavaggio. Controllare che il raccordo a distacco rapido vada saldamente in posizione con uno scatto.
2. Controllare che la tubazione tra il flacone di lavaggio e lo strumento sia priva di pieghe e correttamente collegata. Controllare specialmente i punti in cui la tubazione si connette al flacone di lavaggio e l'ingresso nello strumento.
3. Svuotare il flacone del liquido di sistema e riempirlo con acqua deionizzata/distillata. Controllare che il raccordo a distacco rapido vada saldamente in posizione con uno scatto.
4. Controllare che la tubazione tra il flacone del liquido di sistema e lo strumento sia priva di pieghe e correttamente collegata. Controllare specialmente i punti in cui la tubazione si connette al flacone del liquido di sistema e l'ingresso nello strumento.
5. Etichettare i recipienti per reagente e i relativi coperchi, se necessario.

Importante: Etichettare i recipienti per reagente e segregare i reagenti per evitare una possibile contaminazione tra un processo e l'altro. Una volta etichettati, usare solo i recipienti dei reagenti con il reagente specificato.

Raccomandazione: Tenere a disposizione due serie di recipienti per reagente, per averne sempre disponibile una pulita e asciutta per ogni processo.

6. Aggiungere il volume occorrente della sonda 1 al recipiente per reagente designato e collocare il recipiente nella posizione posteriore destra del rack dei recipienti per reagente (vedere "Layout del deck RCS", pagina 63). Coprire il recipiente per reagente con il coperchio corrispondente.
7. Se necessario, aggiungere il volume occorrente della sonda 2 al recipiente per reagente designato e collocare il recipiente nella posizione anteriore centrale del rack dei recipienti per reagente (vedere "Layout del deck RCS", pagina 63). Coprire il recipiente per reagente con il coperchio corrispondente.

8. Se necessario, aggiungere il volume occorrente della sonda 3 al recipiente per reagente designato e collocare il recipiente nella posizione anteriore sinistra del rack dei recipienti per reagente (vedere "Layout del deck RCS", pagina 63). Coprire il recipiente per reagente con il coperchio corrispondente.
9. Mescolare accuratamente il reagente di rilevamento 1 (DR1), aggiungerne il volume occorrente al recipiente del reagente designato e collocare il recipiente nella posizione posteriore centrale del rack dei recipienti per reagente (vedere "Layout del deck RCS", pagina 63). Coprire il recipiente per reagente con il coperchio corrispondente.

Importante: Cambiarsi i guanti dopo aver manipolato il DR1 per evitare la contaminazione da fosfatasi alcalina.

10. Mescolare accuratamente il reagente di rilevamento 2 (DR2), aggiungerne il volume occorrente al recipiente del reagente designato e collocare il recipiente nella posizione posteriore sinistra nel rack dei recipienti per reagente (vedere "Layout del deck RCS", pagina 63). Coprire il recipiente per reagente con il coperchio corrispondente.

Nota: L'RCS impiega il rilevamento del livello del liquido quando dispensa i reagenti dai recipienti per reagente a una micropiastra di cattura o di ibridizzazione. In caso di volume insufficiente, il sistema entra in pausa, visualizza un messaggio e lo segnala all'utente con un allarme acustico. L'utente può in questo caso collocare il recipiente per reagente pieno sul deck RCS o aggiungere altro reagente, se necessario.

7.2.4 Preparazione del portaprovette per campioni

AVVERTENZA **Rischio di risultati imprecisi del test**




Attendere la richiesta dello strumento prima di caricare il portaprovette per campioni sul deck RCS.

Se il portaprovette per campioni viene caricato sul deck RCS prima di aver riempito e lavato le linee del sistema, è possibile che si verifichi contaminazione da schizzi; la contaminazione può causare risultati imprecisi del test.

Se i calibratori denaturati, i controlli qualità o i campioni sono stati conservati, lasciarli scongelare a 20–25°C. Se i calibratori denaturati, i controlli di qualità o i campioni sono stati conservati in un portaprovette per campioni con tappo, rimuovere ed eliminare i tappi dalle provette.

1. Agitare i campioni utilizzando uno dei seguenti metodi:


- Se in un portaprovette per campioni, coprire le provette con pellicola per sigillare DuraSeal™ e fissare il coperchio sul portaprovette per campioni. Agitare per 10 secondi sull'MST Vortexer 2.
 - Con un tappo sulla provetta, agitare singolarmente ogni provetta per 5 secondi.
2. Se i campioni sono in un portaprovette per campioni, posizionare immediatamente il portaprovette per campioni sul piano di lavoro e sbloccare le clip. Sollevare il coperchio del portaprovette di circa 1 cm e muoverlo delicatamente da sinistra a destra per sbloccare tutte le provette che potrebbero essersi attaccate alla pellicola per sigillare DuraSeal. Togliere il coperchio del portaprovette sollevandolo verticalmente fino a quando il portaprovette per campioni risulta visibile. Togliere con cautela la pellicola per sigillare DuraSeal dal coperchio del portaprovette ed eliminarla.
 3. Rimuovere i tappi dalle provette per campioni, se presenti. Per ogni portaprovette analizzato, verificare che i calibratori denaturati, i controlli di qualità e i campioni siano nelle posizioni del portaprovette per campioni appropriato, come segue:
 - Calibratore negativo (NC) nella posizione A1
 - Calibratore positivo 1 (PC1) nella posizione D1
 - Calibratore positivo 2 (PC2) nella posizione E1 (usato solo per test a doppio dosaggio)
 - Controllo di qualità (QC1) nella posizione G1
 - Controllo di qualità (QC2) nella posizione H1
 - Campioni nelle posizioni restanti disponibili del portaprovette

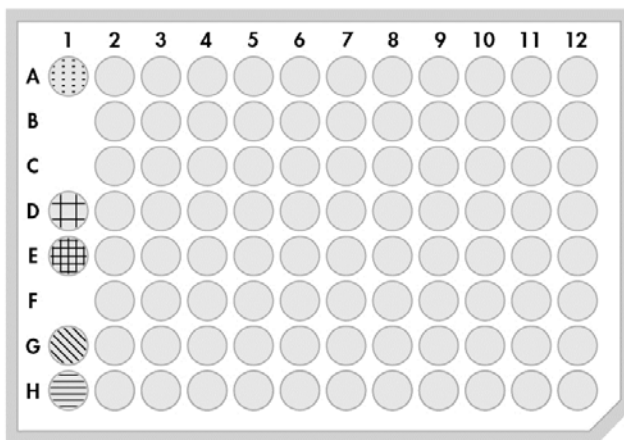

L'RCS pipetta i calibratori e i controlli di qualità nella colonna 1 della micropiastra di ibridizzazione. Sulla micropiastra di ibridizzazione, l'RCS colloca i replicati di NC in A1, B1, C1; i replicati di PC in D1, E1, F1; il QC1 in G1; e il QC2 in H1.

Importante: Il software *digene* per analisi dei dosaggi riporta i risultati dei calibratori e dei controlli di qualità per verificare il processo di dosaggio in base alla loro collocazione. Il posizionamento corretto dei calibratori e dei controlli di qualità sul portaprovette per campioni e la corretta selezione del protocollo di dosaggio *digene* sono essenziali per risultati validi del dosaggio.

4. Per ogni campione contenente un dispositivo di prelievo, mettere un tappo a discesa su ogni provetta. Verificare che lo stelo del dispositivo di prelievo sia trattenuto tra la linguetta del tappo a discesa e il lato della provetta. I tappi a discesa devono essere orientati in modo che la linguetta sia il più vicino possibile all'utente in quanto sono rivolti verso il portaprovette per campioni.

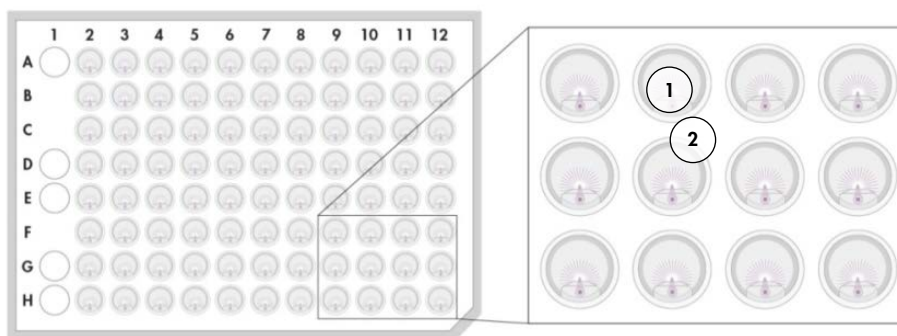

1 Tappo a discesa e portaprovette per campioni *digene*

2 Stelo spazzolino

7.3 Avvio del processo RCS

7.3.1 Lavaggio delle tubazioni

Riempire l'RCS con acqua deionizzata/distillata attivando lo script **FLUSH**. Controllare che tutte le bolle d'aria siano state rimosse dalle linee del sistema e che non goccioli liquido dagli adattatori dei puntali. Il mancato completamento del lavaggio del sistema può causare dispensazione non corretta dei volumi delle aliquote.

7.3.2 Selezione dello script

AVVERTENZA Parti in movimento



Non toccare le parti interne dello strumento mentre è in funzione. Le parti in movimento possono causare lesioni personali.

Arrestare il funzionamento dello strumento prima di toccare le parti interne del deck RCS.

1. Nel software RCS, cliccare sull'icona **Run**.
In alternativa, selezionare **Script/Run Script** (Script/Script processo).
Si apre la finestra di dialogo **Scripts**, che elenca gli script disponibili.
2. Selezionare lo script appropriato per il processo e fare clic su **OK**.

Nota: Vedere "Selezione degli script", pagina 53, per le istruzioni per selezionare lo script corretto e aggiungerlo alla **Run List**.

Compare la finestra di dialogo **Start run**.

Esempio:

The screenshot shows the 'Start run' dialog box with the following details:

- Tests:** A list box containing: SAMC1PC1[1], SAMC2PC1[1], SAMC3PC1[1], AMD1PC1[1], PM1[1], PM2[1], PM3[1], PM4[1].
- Static:** A section containing:
 - Number of samples: 88 (spin box)
 - same for all tests
 - Start on Destination: 1 (spin box)
 - Start on Source: 9 (spin box)
- Source Rack IDs:** A table with 8 rows. Row 1 contains 'SOURCE01'.
- Destination Rack IDs:** A table with 8 rows. Row 1 contains 'SAMC1PC111'.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

AVVERTENZA **Rischio di risultati imprecisi del test**



Quando si avvia un processo, non spuntare la casella **same for all tests** nella finestra di dialogo **Start run**.

L'attivazione del segno di spunta su questa casella influisce sul volume aggiunto di reagente e determina risultati imprecisi del test.

AVVERTENZA **Rischio di risultati imprecisi del test**



Controllare che sia stato immesso il numero corretto di campioni per la micropiastra appropriata.

L'esecuzione del test su un pozzetto vuoto potrebbe ostruire il collettore del lavatore di micropiastre e dare risultati imprecisi del test.

3. Selezionare il SAMXXPC1[1] desiderato nella casella di riepilogo **Tests** (Test).
4. Nel pannello **Static** (Statico), inserire il numero dei campioni, includendo calibratori e controlli di qualità, per la corrispondente micropiastra di ibridizzazione nel campo della finestra di dialogo **Number of samples** (Numero di campioni).

Il dato predefinito è una micropiastra completa di 88 campioni.

Nota: La lettera che segue immediatamente **SAM**, sia essa una **C** o una **D**, indica una micropiastra processata da un portaprovette per campioni di conversione o da un portaprovette per campioni *digene*.

Nota: Il valore numerico immediatamente successivo al tipo di campione, da 1 a 4, indica l'ordine delle micropiastre determinato dalla posizione di agitazione.

Ripetere la procedura per ogni micropiastra aggiuntiva, se necessario.

5. Selezionare il PMX[1] desiderato nella casella di riepilogo **Tests**.
6. Nel pannello **Static**, inserire il numero dei campioni, includendo calibratori e controlli di qualità, per la corrispondente micropiastra di ibridizzazione nel campo della finestra di dialogo **Number of samples**.

$$PM = SAM + 8$$

Il dato predefinito è una micropiastra completa di 96 campioni.

Ripetere la procedura per ogni micropiastra aggiuntiva, se necessario.

Nota: La "X" in "PMX[1]" indica l'ordine delle micropiastre determinato dalla posizione di agitazione.

7. Fare clic su **OK** per iniziare lo script.

8. Al prompt, inserire i tipi di sonda usati per il processo RCS e fare clic su **OK**.

Sarà generata una stampa con lo script selezionato e il tipo di sonda.

Tutti i componenti a bordo saranno inizializzati.

7.3.3 Caricamento dei portaprovette per campioni

1. Allo script di allarme riguardante il caricamento del deck RCS, confermare che i rack per puntali monouso, le micropiastre di ibridizzazione con coperchi, le micropiastre di cattura con un coperchio e i recipienti per reagente pieni sono sul deck RCS nelle posizioni corrette (vedere "Layout del deck RCS", pagina 63). Fare clic su **OK**.
Le linee del sistema si riempiono e si lavano.
2. Se necessario e allo script di allarme, confermare che i tappi a discesa si trovano sui campioni contenenti i dispositivi di prelievo. Fare clic su **OK**.
3. Allo script di allarme riguardante il caricamento del portaprovette per campioni, collocare il portaprovette per campioni della micropiastra 1 sul deck RCS con l'angolo intagliato del portaprovette per campioni a destra sul davanti e posizionato dentro le guide. Fare clic su **OK** per iniziare il trasferimento dei campioni.
4. Allo script di allarme riguardante il completamento del trasferimento del portaprovette per campioni, rimuovere il portaprovette per campioni dal deck RCS.

ATTENZIONE **Danni allo strumento**



Controllare che tutte le micropiastre occorrenti, inclusi i coperchi necessari, siano state caricate sul deck RCS prima di iniziare un processo. La mancanza di micropiastre o coperchi causerebbe la rottura del dispositivo robotizzato di movimentazione.

Una rottura potrebbe richiedere il riavvio del processo e/o danneggiare l'RCS.

AVVERTENZA **Rischio di risultati imprecisi del test**



Controllare che tutti i pozzetti testati della micropiastra contengano liquido.

L'esecuzione del test su un pozzetto vuoto potrebbe ostruire il collettore del lavatore di micropiastre e dare risultati falso-negativi.

5. Ispezionare visivamente le micropiastre di ibridizzazione per verificare se i pozzetti hanno ricevuto il campione.

Se il trasferimento del campione non è avvenuto, trasferire manualmente 75 µl del campione nel corretto pozzetto della micropiastra di ibridizzazione con un pipettatore monocanale (20–

200 µl) e puntali per pipette extra lunghi. Le micropiastre di ibridizzazione possono essere rimosse dal deck RCS per il trasferimento manuale. Verificare che la micropiastre di ibridizzazione, una volta rimossa, sia restituita e correttamente posizionata sul deck RCS.

6. Fare clic su **OK**.
7. Seguire gli allarmi dello script e ripetere le fasi per caricare i restanti portaprovette per campioni.

7.3.4 Avvio del dosaggio

1. Dopo aver trasferito l'ultimo portaprovette per campioni e all'allarme dello script, riempire di nuovo tutti i rack per puntali monouso vuoti e parzialmente vuoti con vassoi di puntali pieni.
2. Svuotare il contenitore dei puntali monouso da eliminare.

Importante: Seguire le istruzioni degli allarmi dello script prima di fare clic su **OK**. Il software RCS controllerà il timing del dosaggio una volta aggiunta la miscela della sonda. Qualsiasi interruzione dell'utente dopo quel punto interferirà con i tempi di incubazione del dosaggio.

3. Fare clic su **OK**.

L'RCS completa tutte le fasi successive del test fino a tutta l'incubazione di DR2, dando 3,5 ore di autonomia all'utente. Impostare un timer a 3 ore e 20 minuti per tornare allo strumento in tempo per misurare la prima micropiastre di cattura.

Raccomandazione: Rimanere a portata di udito dallo strumento durante il processo. Se si verifica un errore dello strumento, l'RCS emette un allarme acustico, va in pausa e attende l'intervento dell'utente. Se si verifica un errore, contattare immediatamente i QIAGEN Technical Services.

7.4 Misurazione delle micropiastre di cattura e generazione dei risultati

AVVERTENZA Rischio di risultati imprecisi del test



Per i test HPV ad alto rischio accertarsi che vengano usati solo protocolli specifici per l'RCS forniti da QIAGEN quando si creano i layout delle piastre nel software di analisi dei dosaggi.

L'uso di un protocollo non corretto potrebbe dare risultati falso-negativi.

Prima di iniziare:

- L'utente deve prelevare ogni micropiastre di cattura dal deck RCS alla fine dell'incubazione di DR2. Ciascuna micropiastre di cattura viene poi misurata nello strumento DML.

- Per il test HPV, verificare che il layout della piastra sia stato creato usando un protocollo specifico per RCS.
1. Allo script di allarme e all'allarme acustico, estrarre la micropiastra di cattura dalla posizione di pipettaggio sul deck RCS (vedere "Layout del deck RCS", pagina 63).
 2. Fare clic su **OK** per permettere all'RCS di continuare a processare le micropiastre di cattura rimanenti, ove applicabile.

AVVERTENZA **Rischio di risultati imprecisi del test**



Non stampare i risultati di un test contemporaneamente alla misurazione di una micropiastra.

La stampa dei report di un test durante la misurazione di una micropiastra può rallentare la processazione del dosaggio sull'RCS e dare risultati imprecisi del test.

3. Collocare la micropiastra di cattura nello strumento DML e misurarla. Consultare il manuale utente del rispettivo software per dettagli sulla misurazione di una micropiastra di cattura e la generazione dei report dei risultati.

Raccomandazione: Stampare i report dei risultati della micropiastra di cattura corrente prima di misurare le micropiastre di cattura successive per evitare di rallentare il funzionamento dell'RCS. In alternativa, stampare i report dopo che il processo dell'RCS è stato completato e tutte le micropiastre di cattura sono state misurate.

4. Ripetere le fasi descritte sopra per tutte le micropiastre di cattura rimanenti, ove applicabile.
5. Consultare le rispettive istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA per il controllo di qualità, la verifica del dosaggio e le istruzioni per l'interpretazione dei risultati.

7.5 Comprensione dei limiti della procedura

Consultare le rispettive istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA per i limiti specifici del test.

7.6 Caratteristiche delle prestazioni

Consultare le rispettive istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA per le caratteristiche delle prestazioni specifiche del test.

8 Manutenzione

AVVERTENZA/ Rischio di lesioni personali e danni all'apparecchiatura

ATTENZIONE



Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da dipendenti dell'assistenza in loco QIAGEN o da personale formato da QIAGEN, se non diversamente specificato in questo manuale utente.

8.1 Pulizia di routine

Eseguire questa procedura per pulire l'RCS dopo ogni processo.

1. Eliminare le micropiastre usate, i coperchi delle micropiastre e i materiali di scarto in conformità con le disposizioni di sicurezza locali vigenti in materia.
2. Sostituire il contenitore dei residui e ricollegare i raccordi a distacco rapido accertandosi che si senta chiaramente lo scatto. Controllare che il contenitore dei residui sia posizionato correttamente senza pieghe nei tubi.

Nota: I rifiuti dell'RCS hanno un pH relativamente neutro.

3. Eliminare tutte le aliquote di reagente e i residui di reagente nei rispettivi contenitori in conformità con le disposizioni di sicurezza locali.
4. Pulire i recipienti dei reagenti nel seguente ordine:
 - Lavare e risciacquare con acqua deionizzata/distillata.
 - Riempire completamente con soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% v/v.
 - Lasciare i recipienti a bagno in soluzione di ipoclorito di sodio fino al giorno dopo.
 - Il giorno seguente risciacquare accuratamente con acqua deionizzata/distillata per almeno 60 secondi.
 - Lasciare asciugare i recipienti capovolti su una salvietta di carta anti-pelucchi.
5. Pulire i coperchi dei recipienti per reagente nel seguente ordine:
 - Lavare e risciacquare con acqua deionizzata/distillata.
 - Lasciare a bagno fino al giorno dopo in una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% v/v.
 - Il giorno seguente risciacquare accuratamente i recipienti con acqua deionizzata/distillata per almeno 60 secondi.
 - Lasciare asciugare all'aria su una salvietta di carta anti-pelucchi.

6. Coprire i rack per puntali monouso contenenti puntali monouso non utilizzati con un coperchio per micropiastre per impedire ai puntali di contaminarsi con la polvere.
7. Svuotare il contenitore dei puntali monouso da eliminare.
8. Rimuovere e risciacquare il paragonce della stazione di espulsione dei puntali con acqua deionizzata/distillata. Passare sulla stazione di espulsione dei puntali una salvietta nuova di carta anti-pelucchi inumidita con alcol.
9. Rimuovere tutti i puntali dallo scivolo di espulsione. Passare tra le guide una salvietta di carta nuova anti-pelucchi inumidita con alcol per rimuovere il fluido residuo.
10. Rimuovere il coperchio della stazione di risciacquo dei puntali e risciacquare con acqua deionizzata/distillata. Passare sulla stazione di risciacquo dei puntali e sul suo coperchio una salvietta di carta nuova anti-pelucchi inumidita con alcol.
11. Passare su tutte le superfici del deck RCS una salvietta di carta nuova anti-pelucchi inumidita con alcol, includendo i seguenti componenti:
 - Posizioni di agitazione e rulli (i rulli non devono incepparsi)
 - Rack per recipienti
 - Parte interna dell'impilatore A e dell'impilatore B
 - Posizioni di pipettaggio
12. Pulire ogni adattatore per puntali con una salvietta imbevuta di alcol.
13. Rimuovere la vaschetta del lavatore RCS e pulire la parte alta e il fondo con una salvietta di carta nuova anti-pelucchi inumidita con alcol. Dopo aver rimosso la vaschetta del lavatore RCS, pulire il lavatore di micropiastre con una salvietta di carta nuova anti-pelucchi inumidita con alcol.

8.2 Manutenzione mensile

Eseguire questa procedura una volta al mese per garantire prestazioni ottimali dell'RCS.

1. Sostituire i recipienti per reagente con recipienti nuovi. Etichettare adeguatamente i nuovi recipienti dei reagenti.
Nota: Non è necessario sostituire i coperchi per recipienti mensilmente.
2. Lavare le tubazioni dell'RCS e i contenitori con soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% (v/v). Per ulteriori istruzioni vedere "Lavaggio delle linee del sistema", pagina 78.
3. Controllare visivamente le siringhe per verificare l'eventuale presenza di perdite, bolle o contaminazione interna. Se indicato, sostituire le siringhe. Per ulteriori istruzioni vedere "Pulizia e sostituzione delle siringhe", pagina 80.

8.3 Manutenzione semi-annuale

La manutenzione semi-annuale sull'RCS deve essere eseguita da tecnici dell'assistenza in loco QIAGEN o da personale formato da QIAGEN. Contattare i QIAGEN Technical Services.

8.4 Pulizia delle tubazioni e dei recipienti

AVVERTENZA/ **Rischio di lesioni personali e danni all'apparecchiatura**

ATTENZIONE



Non toccare il deck dell'RCS mentre lo strumento è in funzione a meno che il sistema non sia in pausa e visualizzi una finestra di dialogo che indica la richiesta di un intervento dell'utente.

Toccare il deck RCS in qualsiasi altro momento di un processo potrebbe causare lesioni all'utente e/o l'interruzione del processo.

AVVERTENZA **Rischio di lesioni personali**



Gli utenti devono indossare camici da laboratorio, guanti non talcati e occhiali di sicurezza mentre eseguono la procedura di pulizia.

8.4.1 Lavaggio delle linee del sistema

1. Verificare che lo strumento sia acceso, ma non in funzione. Sullo schermo del computer dell'RCS non devono essere presenti finestre del sistema RCS aperte o ridotte a icona.
2. Scollegare il raccordo a distacco rapido del flacone del liquido di sistema. Per prevenire contaminazione da fosfatasi alcalina, riporre l'estremità scollegata del tubo su un panno Kimtowels® pulito o salvietta equivalente di carta anti-pelucchi.
3. Togliere il coperchio e svuotare il contenitore in un lavandino.
4. Riempire il contenitore con 1 litro di soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% v/v appena preparata.
5. Sostituire il coperchio del contenitore. Sigillare bene.
6. Coprire la presa d'aria nel coperchio con un panno Kimtowels o salvietta equivalente di carta anti-pelucchi. Agitare vigorosamente il contenitore per garantire che la soluzione di ipoclorito di sodio lavi tutte le superfici interne, incluso il coperchio.
7. Ripristinare il collegamento del tubo.
8. Ripetere le fasi da 2 a 7, utilizzando questa volta il flacone di lavaggio.

9. Lanciare il software del sistema RCS facendo doppio clic sull'icona del desktop **Rapid Capture System**.

10. Fare clic sull'icona **Run** della barra Strumenti dell'RCS.

11. Selezionare lo script **CLEANSYS** e fare clic su **OK**.

In questo modo tutte le linee del liquido di sistema, comprese le siringhe e le cannule del lavatore di piastre, saranno lavate a fondo con una soluzione di ipoclorito sodio.

8.4.2 Risciacquo dei contenitori offline

1. Scollegare i raccordi a distacco rapido del flacone del liquido di sistema e del flacone di lavaggio. Riporre le estremità libere del tubo su panni Kimtowels puliti o salviette equivalenti di carta anti-pelucchi per prevenire contaminazione da fosfatasi alcalina.
2. Togliere i coperchi e svuotare i contenitori in un lavandino.
3. Aggiungere 1 litro di acqua deionizzata o distillata al flacone del liquido di sistema e 2 litri di acqua deionizzata o distillata al flacone di lavaggio.
4. Riposizionare correttamente i coperchi.
5. Per ogni contenitore, coprire la presa d'aria nel coperchio con un panno Kimtowels o salvietta equivalente di carta anti-pelucchi e agitare vigorosamente in modo da risciacquare tutte le superfici interne con soluzione di ipoclorito di sodio.
6. Svuotare ogni contenitore, ripetere di nuovo il risciacquo con acqua deionizzata o distillata per un totale di due risciacqui con acqua deionizzata o distillata per ogni contenitore.

8.4.3 Risciacquo e riempimento delle linee dell'RCS

1. Dopo aver svuotato entrambi i contenitori durante il secondo risciacquo con acqua deionizzata o distillata, riempire il flacone del liquido di sistema con acqua deionizzata o distillata e il flacone di lavaggio con tampone di lavaggio preparato.

Nota: Consultare le istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA per la preparazione del reagente.

2. Ricollegare i tubi dello strumento ai coperchi dei recipienti. Accertarsi che ogni contenitore sia collegato alla tubazione corretta.

Nota: La presa di ingresso di ogni tubazione collegata allo strumento è etichettata.

3. Controllare che i raccordi a distacco rapido vadano saldamente in posizione con uno scatto.
4. Eseguire lo script **CLEANSYS**.

In questo modo la soluzione di ipoclorito di sodio sarà sostituita in tutte le linee con acqua deionizzata o distillata o con tampone di lavaggio, ove applicabile.

8.4.4 Pulizia del contenitore dei residui con candeggina

1. Scollegare entrambi i raccordi a distacco rapido che portano al contenitore dei residui. Accertarsi che le estremità scollegate possono essere riposte su un panno Kimtowels pulito o salvietta di carta equivalente anti-pelucchi per impedire contaminazione delle superfici del laboratorio.
2. Togliere il coperchio e svuotare con attenzione il contenitore in un lavandino. Sciacquare il lavandino con cura, poiché questo tipo di rifiuti è fonte di fosfatasi alcalina.
3. Aggiungere al contenitore 2 litri di soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% v/v appena preparata.
4. Riposizionare correttamente il coperchio.
5. Coprire la presa d'aria nel coperchio con un panno Kimtowels o salvietta equivalente di carta anti-pelucchi e agitare vigorosamente il contenitore per risciacquare tutti i lati con la soluzione di ipoclorito di sodio.
6. Svuotare il contenitore e aggiungere 2 litri di acqua deionizzata o distillata.
7. Riposizionare correttamente il coperchio.
8. Coprire la presa d'aria nel coperchio con un panno Kimtowels o salvietta equivalente di carta anti-pelucchi e agitare vigorosamente il contenitore per risciacquare tutti i lati con acqua deionizzata o distillata.
9. Svuotare il contenitore nel lavandino.
10. Riposizionare correttamente il coperchio e ricollegare entrambe le tubazioni rifiuti al contenitore, accertandosi che i raccordi a distacco rapido vadano saldamente in posizione con uno scatto.

Le linee del liquido del sistema e i contenitori ora sono puliti e pronti per l'uso. Accertarsi di registrare la data, il numero di serie dello strumento e le proprie iniziali nel registro di manutenzione.

8.5 Pulizia e sostituzione delle siringhe

Se le siringhe devono essere sostituite a causa di perdite, bolle o contaminazione interna (ad es. particelle, cristalli, ecc.), spegnere lo strumento e rimuovere le siringhe dai moduli pompa a siringa come descritto di seguito.

In caso perdite, cercare innanzitutto di pulire la siringa. In caso di mancata soluzione del problema, sostituire la siringa.

Verificare di avere siringhe di ricambio a portata di mano. Per ordinare siringhe di ricambio contattare i QIAGEN Technical Services.


ATTENZIONE Rischio di danni all'apparecchiatura



Le siringhe sono di vetro. Osservare cautela durante la manipolazione.

8.5.1 Rimozione di un siringa

1. Spegnerlo lo strumento.

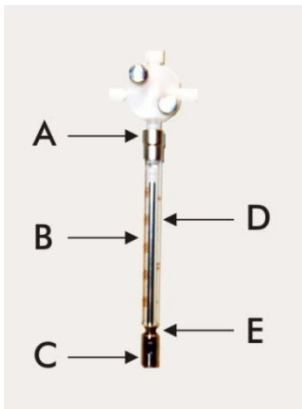

2. Svitare il connettore Luer-lock (A) della siringa dalla presa inferiore della valvola.
3. Tirare il corpo della siringa (B) lentamente verso il basso discostandolo dalla valvola.
4. Allentare la vite di blocco dello stantuffo (C) e togliere con attenzione la siringa dal perno di guida dello stantuffo (E).

8.5.2 Pulizia di una siringa

1. Spegnerlo lo strumento.
2. Togliere lo stantuffo (D) dal corpo della siringa.
3. Lavare con un detergente delicato.
4. Sciacquare con acqua deionizzata o distillata e poi con isopropanolo al 70%.

8.5.3 Sostituzione di una siringa

1. Posizionare la parte inferiore dello stantuffo della siringa sopra il perno di guida dello stantuffo (E) e serrare la vite sul lato inferiore dello stantuffo (C).

2. Tirare verso l'alto il corpo della siringa fino ad inserire il connettore Luer-lock (A) sulla siringa nel perno Luer-lock sul foro inferiore della valvola; avvitare con attenzione la siringa nella valvola girando in senso orario. Fare attenzione a non spanare i filetti.
3. Accertarsi che tutte le viti della valvola, la connessione Luer-lock, tutte le connessioni dei tubi della siringa e la vite dello stantuffo siano ben sigillati per evitare perdite.
4. Accendere e lasciare in sosta lo strumento. Accertarsi che la siringa si inizializzi.
5. Eseguire lo script **FLUSH** almeno due volte per verificare eventuali perdite. Lavare il sistema finché le bolle d'aria nella siringa e nella tubazione non saranno state eliminate.

8.6 Decontaminazione del sistema

In caso di allagamento del deck RCS o di qualsiasi altra postazione, l'area deve essere pulita e decontaminata.

1. Rimuovere tutto il liquido in eccesso con salviette di carta assorbente anti-pelucchi.
2. Pulire l'area interessata con una soluzione di ipoclorito di sodio 0,5% v/v e una salvietta di carta anti-pelucchi.
3. Passare su tutta l'area con una salvietta di carta inumidita con acqua deionizzata.
Prestare estrema attenzione durante la pulizia e l'asciugatura di un lavatore per piastre allagato per evitare che la vaschetta del lavatore aderisca alla piattaforma.
4. Lavare le tubazioni dell'RCS e i contenitori con soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% v/v.
Per ulteriori istruzioni vedere "Pulizia delle tubazioni e dei recipienti", pagina 78.

8.7 Controllo della contaminazione dell'RCS

Se si sospetta che l'RCS sia contaminato (ad es. contaminazione da fosfatasi alcalina), eseguire la procedura indicata di seguito ai fini di una verifica. Questa procedura avvia lo script 1D, poi lo interrompe e riavvia lo script alla linea appropriata, sulla base del tipo di script utilizzato.

Apparecchiature richieste e forniture:

- 1 telaio micropiastra di cattura
- 3 strisce nuove di pozzetti di cattura del kit per il test *digene* HC2 del DNA
- 9 strisce vuote di pozzetti micropiastra
- 1 coperchio micropiastra
- 1 contenitore DR1
- 1 contenitore DR2

- Tampone di lavaggio
 - Soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% v/v
1. Eseguire la procedura descritta in "Pulizia delle tubazioni e dei recipienti", pagina 78.
 2. Posizionare 3 strisce di cattura sul telaio micropiastra di cattura vuoto.
Accertarsi di riempire le altre 9 colonne vuote con strisce di pozzetti per micropiastra in bianco. Le strisce fungono da pozzetti per micropiastra filler e servono a controbilanciare le posizioni.
 3. Posizionare la micropiastra di cattura nella posizione di pipettaggio 2 sul deck RCS.
 4. Posizionare il coperchio della micropiastra a faccia in giù nella posizione di pipettaggio 1 sul deck RCS.
Nota: Quando la micropiastra di cattura e il coperchio vengono messi nella posizione di pipettaggio 2 e nella posizione di pipettaggio 1, è fondamentale sistemare correttamente i componenti all'interno delle scanalature delle rispettive posizioni.
 5. Riempire i rispettivi recipienti per reagente con 4 ml di DR1 e DR2.
 6. Mettere i recipienti per reagente DR1 e DR2 sul deck RCS nella postazione corretta sul rack dei recipienti per reagente.
 7. Nella finestra **Scripts** nel software RCS selezionare **1D**.
Nota: Se lo script 1D non è nella Run List, aggiungerlo servendosi del software ScriptSelect.
 8. Nella **Run List** avviare lo script **1D**.
 9. Digitare **16** per il numero di campioni e **24** per il numero di pozzetti della micropiastra.
 10. Dopo il lavaggio del sistema, interrompere il dosaggio premendo il tasto **Esc** sulla tastiera del computer dell'RCS oppure facendo clic su **Abort** (Interrompi) nell'angolo inferiore a sinistra dello schermo.
 11. Al prompt **Abort**, fare clic sul pulsante **Yes (Sì)**.
 12. Avviare lo script **1D**.
Sarà visualizzata la finestra di dialogo **Continue at line** (Continua alla linea).
Se non è stato installato un lettore di codici a barre RCS, inserire 83 nel campo **Continue at line**.
Se è stato installato un lettore di codici a barre RCS, inserire 88 nel campo **Continue at line**.
 13. Fare clic sul pulsante **Continue run** (Continua il processo).
L'RCS esegue il dosaggio partendo dall'aggiunta di reagente DR1 fino all'incubazione della micropiastra DR2.
 14. Misurare la micropiastra utilizzando lo strumento DML.

Nota: Dal software di analisi del dosaggio *digene* è possibile eseguire una misurazione dei dati non elaborati. Per istruzioni consultare il manuale utente del software di analisi del dosaggio *digene*.

15. Inviare i dati ai QIAGEN Technical Services per l'analisi.

16. Confrontare i valori RLU di pre- e post-decontaminazione.

Se si osserva una riduzione significativa nei valori RLU dopo la decontaminazione, è possibile supporre che i valori elevati mostrati dall'RCS siano attribuibili alla contaminazione.

9 Risoluzione dei problemi

Consultare questa sezione per la gestione degli errori e la risoluzione dei problemi. Se le procedure consigliate non risolvono il problema, contattare i QIAGEN Technical Services.

9.1 Utilizzo non corretto del portaprovette per campioni

9.1.1 Portaprovette per campioni (blu) *digene* usato con uno script **C**

Quando si eseguono test su campioni di tipo STM (Specimen Transport Medium), l'utente deve selezionare uno script **D**. I parametri dello script **C** sono programmati per aspirare da un volume del campione di 150 µl. Pertanto, gli adattatori per puntali sono impostati per spostarsi più in basso e aspirare il campione. Se si seleziona lo script **C** e si utilizza un portaprovette per campioni *digene*, gli adattatori per puntali possono incepparsi nel dispositivo di prelievo durante il trasferimento del campione e generare un messaggio di errore. Usare il software ScriptSelect per scegliere lo script corretto per il processo specifico.

9.1.2 Rack di conversione (argento) usato con uno script **D**:

Quando si analizzano campioni di conversione in provette coniche da 15 ml, l'utente deve scegliere uno script **C** appropriato. In generale, il volume del campione di conversione è molto più piccolo di un campione STM. I parametri dello script **C** sono programmati per aspirare da un volume del campione di 150 µl. Se si seleziona uno script **D** per i campioni di conversione, il campione non sarà trasferito alla micropiastre di ibridizzazione perché gli adattatori per puntali sono impostati su una posizione superiore per aspirare il campione ed evitare interferenze con lo spazzolino. Usare il software ScriptSelect per scegliere lo script corretto per il processo specifico.

9.1.3 Tipo di campione e portaprovette per campioni

Verificare di utilizzare il portaprovette per campioni corretto in base al tipo di campione. I campioni STM devono essere messi nel portaprovette per campioni (blu) *digene*. I campioni citologici liquidi devono essere posizionati nel rack di conversione (argento). Il coperchio del portaprovette per campioni *digene* non è idoneo per i campioni di conversione in provette coniche da 15 ml.

9.2 Posizionamento non corretto dei reagenti o dei portaprovette per campioni

9.2.1 Posizionamento non corretto di sonda o calibratore

Quando si esegue uno script che richiede più di una sonda, è indispensabile che il posizionamento di sonda e calibratore corrisponda all'ordine del portaprovette per campioni in accordo con lo script selezionato. Il posizionamento non corretto di sonda o calibratore produrrà un dosaggio non valido. Per un dosaggio doppio, la sonda 1 deve coincidere con il calibratore positivo 1 (PC1) che si trova nella posizione D1 e la sonda 2 deve coincidere con il calibratore positivo 2 (PC2) che si trova nella posizione E1. Utilizzare la stampa del software ScriptSelect per una corretta configurazione del desk RCS.

9.2.2 Ordine non corretto del portaprovette per campioni per il trasferimento dei campioni

Etichettare i portaprovette per campioni in modo da garantire che i campioni trasferiti per la sonda/il dosaggio da testare siano corretti. Se viene scambiato il posto del portaprovette per i campioni da trasferire, la sonda distribuita sulla micropiastra di ibridizzazione non sarà corretta e, di conseguenza, si otterrà un dosaggio non valido o un dosaggio valido con risultati di campioni abbinati in modo non corretto. Etichettare i portaprovette per campioni e utilizzare la stampa del software ScriptSelect per una corretta configurazione del desk RCS.

9.3 Errori durante l'inizializzazione de processo

9.3.1 Numero di campioni inseriti non corretto

L'utente deve inserire il numero di campioni corretto se il numero di campioni per micropiastra da analizzare sull'RCS è inferiore a quello predefinito (una micropiastra completa). Se si inserisce il numero di campioni non corretto nella finestra **Start run**, si verificherà uno dei seguenti problemi:

- I campioni non saranno trasferiti.
- I campioni non riceveranno i reagenti o i reagenti saranno dispensati a troppi pozzetti della micropiastra.

Questi problemi causeranno o un risultato falso-negativo o un intasamento del puntale ed entrambi i casi possono determinare risultati errati. Il dosaggio dovrà essere interrotto e riavviato dopo l'inserimento del numero di campioni corretto. Per la procedura corretta in questo caso, vedere " Riavvio degli script", pagina 99.

9.3.2 Allagamento da materiali di scarto

Durante la fase di lavaggio, è possibile che si verifichi un allagamento se la tubazione è piegata o non è correttamente scattata in posizione nel contenitore dei residui. Se si verifica un allagamento, controllare che le tubazioni siano correttamente dimensionate e saldamente inserite nel contenitore dei residui. Se il sistema è allagato, eseguire la procedura di decontaminazione prevista nella pulizia post-processo. Contattare i QIAGEN Technical Services per riconsiderare l'installazione delle tubazioni e i collegamenti qualora si verificano frequenti allagamenti dovuti a tubazioni troppo piccole.

9.3.3 Rack per puntali monouso prelevato

Se il rack per puntali monouso non è correttamente inserito nel supporto del rack per puntali monouso o se la linguetta non è più in grado di fissare saldamente il rack per puntali, è possibile che il rack per puntali venga prelevato dagli adattatori per puntali e generi un messaggio di errore che interrompe il processo.

9.3.4 Inceppamento degli adattatori per puntali nella stazione di espulsione puntali

Se il contenitore dei puntali monouso da eliminare è troppo pieno o se lo scivolo di espulsione è bloccato, è possibile che si verifichi un inceppamento nella stazione di espulsione puntali. Questo inceppamento impedisce ai puntali espulsi di cadere lasciando libera la stazione di espulsione puntali. L'adattatore per puntali potrebbe quindi subire danni e generare un messaggio di errore.

9.4 Errori di trasferimento del campione

9.4.1 Orientamento non corretto o tappi a discesa mancanti

I tappi a discesa sono necessari solo per i campioni STM. Se i tappi a discesa non sono posizionati sulle provette di raccolta campioni o se sono orientati in modo non corretto, i tappi o il dispositivo di prelievo potrebbero interferire con i puntali monouso. L'adattatore per puntali può quindi subire danni e generare un messaggio di errore.

9.4.2 Nessuna micropiastre di ibridizzazione caricata sull'agitatore per micropiastre

Il dispositivo robotizzato di movimentazione delle piastre non rileva se un oggetto viene effettivamente prelevato o meno. Il dispositivo robotizzato di movimentazione non è dotato di un sensore che mette in allarme il sistema se un oggetto, ad es. una micropiastre o un coperchio per micropiastre, non si trova entro il suo raggio di azione. Se le micropiastre di ibridizzazione non

sono caricate sull'agitatore per micropiastre, il dispositivo robotizzato di movimentazione eseguirà il movimento per lo spostamento della micropiastre o del coperchio e aggiungerà reagenti indipendentemente dalla presenza effettiva di una micropiastre. Questo fa sì che i reagenti vengano trasferiti sul deck RCS, richiedendo una pulizia e una possibile decontaminazione.

9.4.3 Micropiastre e coperchi non correttamente caricati sull'agitatore per micropiastre

Le impostazioni di posizione per il posizionamento delle micropiastre all'inizio di un processo sono esattamente definite. Le micropiastre non posizionate correttamente causano un messaggio di errore.

9.4.4 Problemi di rilevamento del livello del liquido

Il rilevamento del livello del liquido è attivato per l'aspirazione dei controlli e dei calibratori, ma è disattivato per l'aspirazione dei campioni. Se lo strumento non rileva il liquido nei controlli e/o nei calibratori e indica un messaggio di errore, verificare che il volume nei controlli e nei calibratori sia sufficiente. Se il volume è sufficiente, è possibile che il liquido del sistema utilizzato sia sbagliato (diverso da acqua deionizzata o distillata) e che il raccordo non sia correttamente inserito nel flacone del liquido di sistema. Se il problema è diverso e il rilevatore del livello del liquido del sistema continua a generare un messaggio di errore, contattare i QIAGEN Technical Services.

9.4.5 Mancato trasferimento o trasferimento parziale dei campioni

Se i campioni non vengono trasferiti alla micropiastre di ibridizzazione, è possibile che sia stato selezionato uno script **D**, mentre in realtà era in corso di processazione un rack di conversione richiedente uno script **C**. Evitare questo problema selezionando lo script corretto.

Questo problema può verificarsi anche se le tubazioni sono vuote o contengono una grande quantità di bolle d'aria. Se la tubazione non è saldamente inserita nel flacone del liquido di sistema o se il contenitore è vuoto, si formeranno delle bolle d'aria nelle linee.

È importante ispezionare visivamente ogni micropiastre dopo il trasferimento campioni, come suggerito dal software RCS, per determinare se a ogni micropiastre sono stati trasferiti tutti i campioni. È disponibile una pausa per consentire il trasferimento manuale dei campioni

mancanti. Il rilevamento dei liquidi è disattivato, pertanto è possibile che i campioni non siano rilevati se le provette hanno intrappolato bolle d'aria o se il volume del campione è basso.

9.4.6 Il dispositivo robotizzato di movimentazione non preleva la micropiastre o i coperchi delle micropiastre

Il posizionamento corretto di micropiastre e coperchi è necessario affinché lo strumento prelevi e sposti correttamente una micropiastre o un coperchio. Se un coperchio o una micropiastre è prelevato in modo non corretto, il dispositivo robotizzato di movimentazione non lo rileverà e si verificheranno problemi nella gestione delle piastre.

9.5 Errore di aggiunta dei reagenti

9.5.1 Miscela della sonda non trasferita

Se la miscela sonda viene rilevata ma non correttamente trasferita, verificare che il volume presente sia sufficiente e che la presenza di bolle sia minima. Se uno dei reagenti è schiumoso, il rilevatore del livello del liquido potrebbe rilevare bolle e non prelevare il reagente.

9.5.2 Problemi di rilevamento del livello del liquido

Se il liquido non viene rilevato e viene generato un messaggio di errore, controllare il livello del liquido del reagente e accertarsi che il volume presente sia sufficiente. Se il volume del reagente è sufficiente, potrebbe sussistere un problema con il rilevatore del livello del liquido. Se così fosse, contattare i QIAGEN Technical Services. Se si fa clic su **Continue** (Continua) quando compare la finestra di dialogo del messaggio di errore, i puntali si sposteranno a un'altezza impostata e trasferiranno il reagente senza l'uso del rilevamento del livello del liquido. Se il rilevatore del livello del liquido non funziona correttamente, sarà necessario fare clic su **Continue** quando compare la finestra di dialogo di errore per ogni prelievo di reagente.

9.5.3 Schizzi di campioni durante la fase di agitazione

I campioni possono produrre schizzi se l'agitatore per micropiastre non funziona correttamente. I risultati non sono validi in caso di schizzi (indicati da gocce sul coperchio), in quanto potrebbe essersi verificata contaminazione. Contattare i QIAGEN Technical Services.

9.5.4 L'incubatrice a 65°C non funziona

Se l'incubatrice a 65°C non funziona correttamente o non ha raggiunto la temperatura specificata, compare un messaggio di errore. Se l'incubatrice non funziona, contattare i QIAGEN Technical Services.

9.5.5 Il dispositivo robotizzato di movimentazione non preleva la micropiastre o i coperchi delle micropiastre

Per ulteriori istruzioni vedere "Errori di trasferimento del campione", pagina 87.

9.6 Errori di trasferimento da una piastra all'altra

9.6.1 Il sistema esaurisce i puntali monouso

Lo strumento invia un allarme e invita a ricaricare i puntali monouso non appena il trasferimento di tutti i campioni sarà completato. Se i puntali monouso non vengono sostituiti durante questa pausa, i puntali presenti non saranno sufficienti per completare il dosaggio. Se i puntali si esauriscono durante il dosaggio, lo strumento cercherà di prelevare puntali per cinque volte, dopodiché visualizzerà un messaggio di errore. A questo punto lo strumento non consentirà all'utente di mettere nuovi puntali, a meno che il processo non sia interrotto e riavviato. Contattare i QIAGEN Technical Services.

9.6.2 Mancato caricamento di micropiastre di cattura o numero errato di micropiastre di cattura caricate sull'impilatore A

Se il numero di micropiastre di cattura caricate non è corretto, il dispositivo robotizzato di movimentazione non preleverà la micropiastre. Il dispositivo robotizzato di movimentazione non ha le caratteristiche di un sensore, pertanto non rileverà se sta trasportando una micropiastre o un coperchio per micropiastre. Il mancato caricamento di un numero sufficiente di micropiastre farà sì che il dispositivo robotizzato di movimentazione compia il movimento di spostamento della micropiastre o del coperchio e trasferisca campioni, a prescindere dalla presenza di una micropiastre. Il caricamento di un numero eccessivo di micropiastre di cattura determinerà l'interruzione del processo e genererà un messaggio di errore. Il processo dovrà essere interrotto e riavviato dal punto di interruzione. Contattare i QIAGEN Technical Services.

9.6.3 Micropiastre di ibridizzazione di scarto rimaste nell'impilatore B dal precedente processo

Se sono rimasti nell'impilatore B micropiastre di scarto o coperchi del precedente dosaggio, il dispositivo robotizzato di movimentazione non sarà in grado di posizionare le successive micropiastre di ibridizzazione di scarto nell'impilatore B. Il processo sarà interrotto e comparirà un messaggio di errore.

9.6.4 Mancato utilizzo di strisce vuote di pozzetti per micropiastra per riempire micropiastre di cattura parziali

Le strisce di pozzetti per micropiastra sono necessarie per controbilanciare micropiastre di cattura parziali. Il mancato inserimento di strisce vuote di pozzetti per micropiastra in micropiastre di cattura parziali può far sì che il dispositivo robotizzato di movimentazione s'inclini e lasci cadere la micropiastra mentre cerca di trasferirla nella camera di incubazione a temperatura ambiente.

9.6.5 Micropiastre o coperchi lasciati nelle camere di incubazione da processi precedenti

Le micropiastre o i coperchi lasciati nelle camere di incubazione impediranno a una nuova micropiastra o coperchio di essere posizionati in una camera occupata. Il processo sarà interrotto e comparirà un messaggio di errore.

9.6.6 Mancato prelievo di micropiastre o coperchi di micropiastra da parte del dispositivo robotizzato di movimentazione:

Per ulteriori istruzioni vedere "Errori di trasferimento del campione", pagina 87.

9.7 Errori della fase di cattura

9.7.1 Problemi con i rulli dell'agitatore per micropiastre

Se i rulli dell'agitatore per micropiastre sono allentati o rotti, il dispositivo robotizzato di movimentazione potrebbe posizionare in modo non corretto la micropiastra sull'agitatore. Un posizionamento non corretto della micropiastra sull'agitatore per micropiastre potrebbe causare un messaggio di errore. Inoltre, se i rulli sono troppo lenti o danneggiati, l'agitatore per micropiastre potrebbe afferrare la micropiastra non saldamente, generando schizzi. Se così fosse, contattare i QIAGEN Technical Services. I risultati non sono validi in caso di schizzi (indicati da gocce sul coperchio), in quanto potrebbe essersi verificata contaminazione.

9.7.2 Schizzi di campioni durante la fase di agitazione

Per ulteriori istruzioni vedere "Errore di aggiunta dei reagenti", pagina 89.

9.8 Errori della fase di aspirazione e lavaggio-lavatore di piastre

9.8.1 Flacone di lavaggio non riempito o tubazione non correttamente inserita

La tubazione deve essere correttamente inserita nel flacone di lavaggio e nel flacone del liquido di sistema, altrimenti il liquido non defluirà in modo corretto. Ne deriveranno problemi di pipettaggio, di allagamento o di mancato lavaggio. L'RCS non rileva se i contenitori hanno una quantità di liquido sufficiente o se la tubazione non è correttamente collegata. Ricaricare i contenitori con il liquido appropriato e collegare correttamente la tubazione. Se il problema persiste, contattare i QIAGEN Technical Services.

9.8.2 Allagamento del lavatore di micropiastre

Un collegamento non corretto della tubazione del lavatore di micropiastre può causare allagamento del lavatore. Controllare la tubazione per verificare che non sia piegata e che sia correttamente inserita con uno scatto nel recipiente di lavaggio. Se così non fosse o se l'allagamento si ripettesse anche dopo aver verificato la tubazione, contattare i QIAGEN Technical Services.

9.8.3 Lavatore di micropiastre con accumulo di residui di tampone di lavaggio

Un precedente allagamento del lavatore di micropiastre può rendere appiccicosa la piattaforma del lavatore e determinare un movimento non corretto. Questa situazione potrebbe non essere rilevata poiché questa porzione dello script non è monitorata dallo strumento e quindi non causa un codice di errore. Il tampone di lavaggio essiccato si cristallizza sulla piattaforma impedendo il potenziale movimento della piattaforma di lavaggio; pertanto il ciclo di lavaggio non avviene in modo corretto. Ciò potrebbe causare anche un ulteriore allagamento durante le fasi di lavaggio e aspirazione. La pulizia e la decontaminazione del lavatore di piastre risolverà la situazione. Contattare i QIAGEN Technical Services.

9.8.4 Aspirazione liquido non regolare

Se il liquido nelle strisce di pozzetti per micropiastre non aspira in modo regolare, la testata del lavatore di piastre potrebbe essere intasata e richiedere una pulizia. Contattare i QIAGEN Technical Services.

9.8.5 La testata del lavatore di micropiastre non è allineata:

Se la testata del lavatore di piastre non è allineata, i pozzetti della micropiastra potrebbero non essere aspirati. La testata del lavatore di piastre deve essere allineata. Contattare i QIAGEN Technical Services.

9.9 Errori di completamento della micropiastra

9.9.1 Mancata rimozione della micropiastra quando il sistema l'RCS lo richiede

L'RCS posiziona la micropiastra nella posizione di pipettaggio 1 al termine del processo di ogni micropiastra. L'RCS emette un allarme che notifica all'utente di rimuovere la micropiastra e di misurare la micropiastra nello strumento DML. Se si rimuove la micropiastra, ma non si fa clic su **OK** per continuare il processo, il sistema rimane in pausa nello stato di allerta. Se si fa clic su **OK**, ma non si rimuove la micropiastra dalla posizione di pipettaggio 1, lo strumento non è in grado di posizionare la micropiastra successiva sulla posizione di pipettaggio 1 e quindi genera un messaggio di errore. Si tenga presente che entrambi gli eventi determinano tempi di incubazione più lunghi per le micropiastre successive e potrebbero invalidare i dosaggi. Consultare "

Spostamento del dispositivo robotizzato di movimentazione", pagina 94, o " Codici di errore, interruzioni del sistema e tabella di riferimento per l'azione correttiva", pagina 104 per ulteriori informazioni o contattare i QIAGEN Technical Services.

L'utente deve leggere la micropiastra nello strumento DML entro l'arco di tempo indicato secondo le istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA per ottenere risultati validi.

9.10 Spostamento del dispositivo robotizzato di movimentazione

Utilizzare questa procedura per spostare un oggetto inceppato dopo aver interrotto lo script dal software RCS.


1. Nel menu principale dell'RCS selezionare **External** (Esterno).

Compare un menu.

2. Selezionare **Move Handler** (Sposta dispositivo di movimentazione).

Si apre la schermata **Plato Control Panel** (Pannello di controllo Plato):

Esempio:

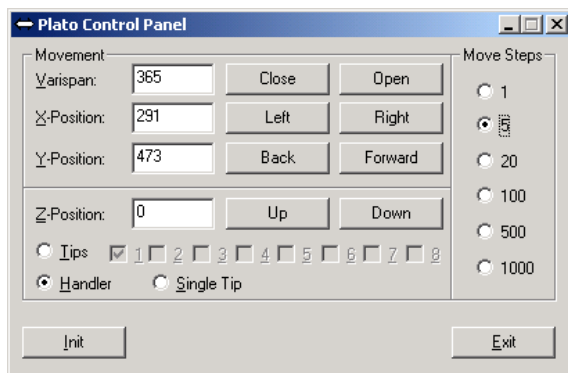

3. Cambiare le impostazioni in modo appropriato per manipolare il braccio robotico e il dispositivo robotizzato di movimentazione.

Importante: In questa fase è molto importante accertarsi che nulla intralci il percorso quando l'utente sposta il braccio robotico e il dispositivo di movimentazione piastre con i comandi **Move Handler**.

Note:

- Selezionando **Move Steps** (Passi graduali) sul lato destro della finestra di dialogo si controlla il grado di spostamento del dispositivo robotizzato di movimentazione. I numeri più bassi spostano il dispositivo robotizzato di movimentazione di una piccola quantità di passi e i numeri più alti spostano il dispositivo di più passi. Il valore di default è impostato a **5** per impedire all'utente di danneggiare accidentalmente il braccio robotico, gli adattatori per puntali o il dispositivo robotizzato di movimentazione spostandolo troppo bruscamente.
- Il VariSpan del dispositivo robotizzato può essere aperto o chiuso.
- Le posizioni X, Y, e Z sono definite in relazione alla "0 position" (Posizione 0) della posizione di sosta. La posizione X è definita come l'area che va dalla stazione di espulsione puntali in direzione delle camere di incubazione (spostamento nelle direzioni da sinistra a destra). La posizione Y va dalla parte anteriore della piattaforma verso la parte posteriore (spostamento

nelle direzioni avanti e indietro). La posizione Z sposta in direzione su e giù. All'inizio dovrebbero essere fatti spostamenti a piccoli passi per essere certi che l'operatore stia muovendo il braccio robotico nella direzione corretta. Il braccio robotico può essere spostato separatamente nelle posizioni X e/o Y.

- Il dispositivo robotizzato di movimentazione e gli adattatori per puntali possono essere spostati in direzione Z.

9.11 Spegnimento dell'RCS dopo un'interruzione del sistema

Quando l'RCS viene spento, gli adattatori per puntali e le pinze per micropiastre scendono automaticamente verso la piattaforma nella posizione esatta in cui si trovavano prima che l'unità venisse spenta. Per impedire eventuali danni agli adattatori per puntali e alle pinze per micropiastre, sono necessarie 2 persone per spegnere lo strumento. Per eseguire questa procedura, una persona deve manualmente supportare gli adattatori per puntali e le pinze per micropiastre, mentre l'altra persona spegne lo strumento.

AVVERTENZA Rischio di lesioni personali



Non infilare parti della mano sotto un puntale monouso mentre si tira verso il basso per rimuoverlo. Mettere la mano sotto un puntale monouso durante la rimozione può causare lesioni all'utente.

AVVERTENZA Sostanze biologicamente pericolose



I materiali utilizzati con questo strumento possono contenere sostanze biologicamente pericolose.

Quando si utilizza lo strumento, osservare le precauzioni universali riguardanti i materiali potenzialmente infettivi.

1. La prima persona sostiene gli adattatori per puntali mettendo una mano sotto la plastica nera nella parte inferiore di ogni barra verticale. Prestare attenzione a non spingere o tirare sulle barre in linea orizzontale poiché il loro allineamento è delicato.
2. Inoltre, la prima persona sostiene le pinze per micropiastre da sotto con l'altra mano.
3. La seconda persona spegne lo strumento usando l'interruttore ubicato nell'angolo in basso a sinistra del pannello posteriore dello strumento.

4. Se è presente una micropiastro nel dispositivo robotizzato di movimentazione, va rimossa ora.
5. La prima persona sposta il braccio robotico nella posizione di pipettaggio 1 usando le pinze per micropiastre e gli adattatori per puntali.
6. Abbassare in modo sicuro gli adattatori per puntali e le pinze per micropiastre fino al deck RCS.
7. Se sono presenti dei puntali monouso, è preferibile scaricare tali puntali. A tale scopo accendere l'RCS ed eseguire lo script **FLUSH**.

Qualora tale procedura non sia possibile a causa di un malfunzionamento, i puntali monouso possono essere rimossi manualmente.


Per rimuovere manualmente i puntali monouso, tirare ogni puntale delicatamente ma saldamente verso il basso supportando la plastica nera alla base di ogni barra verticale. È di fondamentale importanza che gli adattatori per puntali non vengano tirati orizzontalmente.

8. Se gli adattatori per puntali e le pinze per micropiastre non sono danneggiati, mettere in sosta il sistema e spegnere lo strumento.

9.12 Interruzione o messa in pausa di uno script

1. Fare clic sul pulsante **Abort**. In alternativa, premere il tasto **Esc** sulla tastiera del computer dell'RCS.

Esempio del pulsante **Abort**:

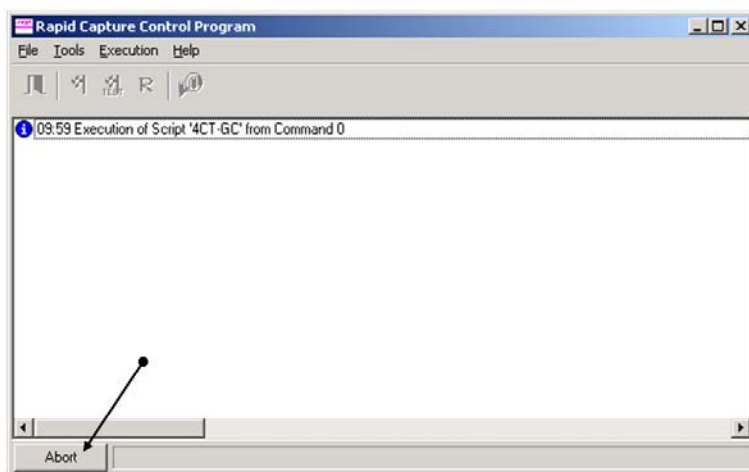

Compare una finestra di dialogo con il seguente messaggio: **Do you want to abort the current run? (Vuoi interrompere il processo in corso?)**

2. Selezionare la risposta appropriata:
 - Selezionare **Yes** per interrompere il processo in corso.

-
- Selezionare **No** per continuare il processo.
 - Selezionare **Skip** (Salta) per passare alla fase successiva e continuare il processo.

9.13 Tempo di inattività massimo consentito per le fasi RCS durante un dosaggio

In base al momento in cui si verifica l'interruzione di un dosaggio, il periodo di tempo consentito prima della continuazione del dosaggio è limitato. Lo schema di seguito riportato riepiloga i limiti di tempo previsti per ciascuna fase di dosaggio del test *digene* HC2 DNA. Attenersi a questi tempi per essere certi di ottenere risultati validi.

Fase	Tempo corrente	Tempo supplementare consentito	Tempo totale del dosaggio
Denaturazione	45 minuti	45 minuti	90 minuti
Ibridizzazione	60 minuti	60 minuti	120 minuti
Cattura degli ibridi	60 minuti	60 minuti	120 minuti
Pausa di cattura degli ibridi	N/A	60 minuti	60 minuti
Rilevamento degli ibridi	45 minuti	60 minuti	105 minuti
Amplificazione del segnale	15 minuti	75 minuti	90 minuti

I processi dell'RCS nei quali si verificano problemi risolvibili possono essere continuati se l'interruzione rientra nel tempo totale consentito precedentemente indicato. I risultati sono validi se i criteri di verifica del dosaggio sono soddisfatti.

9.14 Riavvio degli script

Contattare i QIAGEN Technical Services per determinare la linea corretta da cui procedere per il riavvio dopo l'interruzione di uno script.

9.14.1 Riavvio dello script nel mezzo di un dosaggio

Uno script non può riavviarsi nel mezzo di una delle seguenti fasi dopo che è stato interrotto:

- Trasferimento di campioni dal portaprovette per campioni alla micropiastra di ibridizzazione
- Aggiunta di reagente ai pozzetti della micropiastra
- Trasferimento di campione da una piastra all'altra
- Fase di aspirazione
- Fase di lavaggio

Per queste procedure, lo script deve essere avviato o all'inizio della fase o alla fase successiva.

Se uno script viene interrotto durante un'operazione di distribuzione (trasferimento di campioni, aggiunta di reagente o trasferimento da piastra a piastra), lo script non può riprendere dai pozzetti dell'ultima micropiastra del reagente trasferito.

Lo script può essere avviato solo dall'inizio dell'operazione di distribuzione o dopo il completamento dell'operazione di distribuzione. L'intera operazione di distribuzione è considerata un comando nel log dello script. Lo script permette solo l'avvio di un comando all'inizio.

Il trasferimento dell'intero campione può ricominciare se il volume del campione è sufficiente. Avviare lo script all'inizio del comando di trasferimento. In alternativa, il trasferimento di campione può essere completato manualmente. Anche l'aggiunta di reagente può essere completata manualmente. Il trasferimento da piastra a piastra può essere riavviato e quindi solo pochi puntali saranno sprecati. Dopodiché lo script può essere continuato.

La procedura di aspirazione e lavaggio non può essere riavviata nel mezzo del processo. Le fasi richiedono un riavvio dall'inizio o il completamento manuale del processo prima che lo script sia riavviato.

Se lo script viene interrotto durante una fase di agitazione della piastra, l'agitatore per micropiastre non continuerà automaticamente l'agitazione. Per riavviare l'agitatore per micropiastre, lo script deve essere riavviato prima della linea che avvia l'incubazione di agitazione.

Non posizionare manualmente micropiastre o coperchi nell'incubatrice a 65°C e neppure nella camera a temperatura ambiente. Il sistema deve mettere la micropiastro o il coperchio esattamente nella posizione in cui il dispositivo robotizzato di movimentazione riuscirà ad estrarli con successo dalle incubatrici. Potrebbe essere necessario interrompere lo script e fare marcia indietro fino al punto di prelievo della micropiastro per spostare la micropiastro nella posizione appropriata. In alternativa, quando la micropiastro non è in una fase di incubazione a 65°C, di lavaggio o di agitazione, la micropiastro o il coperchio possono essere spostati e la micropiastro può essere riportata nella posizione corretta. Realizzare quanto indicato mettendo in pausa lo script e avviando lo script dopo il comando che ha portato la micropiastro nella posizione appropriata.

Un messaggio di errore o un'interruzione del sistema possono richiedere l'eliminazione di una o più micropiastre. A seconda della situazione, l'interruzione del dosaggio e il danno a una micropiastro particolare possono impossibilitare la generazione di risultati validi.

Per ottenere risultati validi dalle micropiastre restanti del processo, la micropiastro/e non valida/e non può essere semplicemente rimossa dal processo. All'inizio di un processo, l'utente inizia lo script che corrisponde al numero di micropiastre. Lo script continua a lavorare e a funzionare in base al numero di micropiastro originale programmato; pertanto, la micropiastro danneggiata non può essere rimossa da un processo senza causare un altro errore di sistema.

L'utente può anche manipolare il sistema utilizzando una micropiastro dummy o continuare ad usare la micropiastro non valida. La micropiastro dummy deve essere usata per manipolare il dosaggio e impedire un'aggiunta di reagenti a una posizione di pipettaggio vuota o un lavaggio che potrebbe causare l'allagamento del lavatore di micropiastre con tampone di lavaggio.

Il riavvio dello script resetta il recupero dei puntali al primo rack per puntali. Pertanto è indispensabile che i rack per puntali siano ricaricati.

L'utente non dispone dell'opzione di riavviare uno script a partire dalla linea desiderata se si verificano le seguenti situazioni:


- In caso di guasto all'alimentazione o di spegnimento dell'RCS prima di aver interrotto uno script in modo corretto.

Dopo un guasto dell'alimentazione, il sistema non conserva in memoria la posizione dell'ultimo puntale ottenuta dal rack per puntali monouso. Di conseguenza, l'adattatore per puntali si avvierà per ottenere un puntale dal primo rack, posizione uno.

- Se lo script selezionato è sbagliato e l'utente desidera continuare il dosaggio utilizzando lo script corretto.

Dopo aver riavviato uno script interrotto, comparirà una finestra di dialogo.

Esempio:

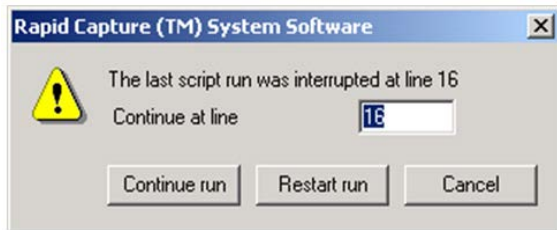


Nota: Se lo strumento è spento, il software notificherà all'utente la linea in cui l'ultimo script è stato interrotto. L'utente non vedrà la finestra di dialogo riportata sopra.

Nella tabella seguente sono descritte le opzioni possibili relative a un processo interrotto.

Opzione	Definizione
Continue run	<p>Questa opzione continua il processo dello script dalla linea successiva a quella dell'interruzione del processo.</p> <p>Il software è impostato per default sulla linea alla quale il dosaggio è stato interrotto. Lo script continua quindi dalla linea dello script successiva a quella corrispondente al numero visualizzato nella finestra di dialogo Continue at line. Il numero della linea visualizzata nella finestra di dialogo è già stato eseguito come previsto dal sistema. Per stabilire il numero della linea per il riavvio, contattare i QIAGEN Technical Services.</p>
Restart run (Riavvia processo)	<p>Questa opzione cancella il processo dello script in corso e riporta alla finestra Start run dello stesso script.</p>
Cancel	<p>Questa opzione chiude la finestra di dialogo. L'utente ha l'opzione di riselectare lo script dalla Run List e di visualizzare di nuovo la stessa finestra di dialogo.</p>

9.14.2 Riavvio di uno script dopo un'interruzione dell'alimentazione o la selezione di uno script sbagliato

Per avviare lo script a partire da una determinata linea dopo un'interruzione dell'alimentazione o la selezione di uno script sbagliato, selezionare innanzitutto lo script desiderato nella **Run List**. Interrompere il processo dopo il lavaggio all'inizio del processo e riavviare lo script una seconda volta. Comparirà la finestra di dialogo seguente che offre all'utente l'opzione di continuare lo script dalla linea richiesta.

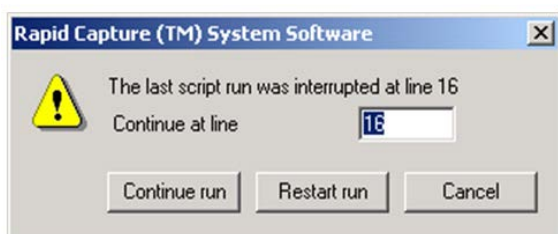

9.14.3 Riavviare lo script dopo aver inserito un numero sbagliato di campione o del totale dei pozzetti micropiastra

Se è stato selezionato il numero sbagliato di campioni e se si desidera riavviare lo script con il numero corretto di campioni, riavviare e interrompere lo script (vedere "Interruzione o messa in pausa di uno script", pagina 96). Riavviare il processo utilizzando una delle seguenti opzioni:


- Fermare lo script e riavviarlo dopo aver inserito il numero corretto per il trasferimento di campioni e la distribuzione reagenti.
- Se il dosaggio è arrivato ad un punto in cui non si vuole riavviare il dosaggio dall'inizio, interrompere lo script originale e riavviare lo script.

Dopo la fase di lavaggio, interrompere di nuovo lo script. A questo punto, quando lo script viene riavviato, inserire il numero della linea di avvio per continuare il processo.

9.15 Eliminazione di aria nelle tubazioni

La presenza di bolle d'aria nella tubazione dell'RCS può causare inesattezze di pipettaggio. Le bolle d'aria devono essere eliminate prima di iniziare un processo RCS. Se sono visibili bolle d'aria nelle tubazioni dell'RCS, eliminare tali bolle ricaricando il liquido del sistema, collegando correttamente il connettore delle tubazioni e lavando il sistema. Per eliminare le bolle d'aria è richiesto uno script **FLUSH**.

1. Selezionare lo script **FLUSH** nella finestra **Scripts** e fare clic su **OK**.

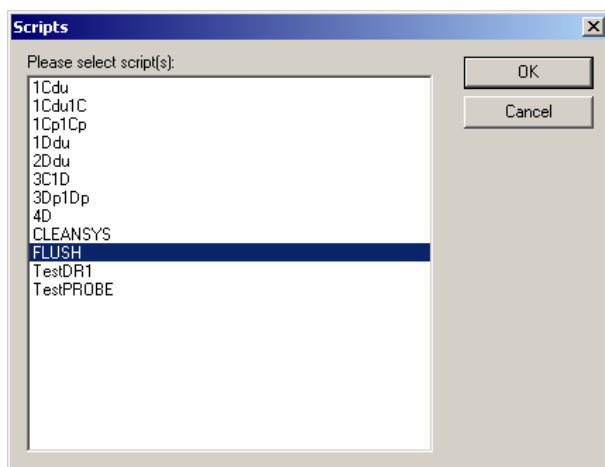

2. Ripetere lo script **FLUSH** finché le bolle d'aria grandi non saranno scomparse dalle linee o dalle siringhe.

Se si continuano a vedere bolle d'aria e le fasi precedentemente indicate sono state seguite, contattare i QIAGEN Technical Services.

9.16 Codici di errore, interruzioni del sistema e tabella di riferimento per l'azione correttiva

L'intervento e le azioni correttive indicati di seguito non sono garanzia della non compromissione dei risultati del dosaggio. Contattare i QIAGEN Technical Services per ulteriori informazioni.

Per l'analisi di mancata convalida del dosaggio, consultare le istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA o contattare i QIAGEN Technical Services.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Incubatrice (65°C) Lo schermo visualizza Module Error at Module Incu1 (21) (Errore modulo nel modulo Incu1 (21)). Mancata inizializzazione di una o di tutte le camere dell'incubatrice.	Potrebbe trattarsi un problema con i motori dei cassettei dell'incubatrice che non consente l'inizializzazione.	<ol style="list-style-type: none">1. Cliccare sul pulsante Retry (Riprova). Se l'inizializzazione continua a non funzionare, spegnere l'RCS, accendere l'RCS e fare clic sull'icona Park per inizializzare l'RCS.2. Se persiste l'errore di inizializzazione dell'incubatrice, significa che questa deve essere riparata o sostituita da un tecnico dell'assistenza. Contattare i QIAGEN Technical Services.




Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Il sistema è pronto per l'aggiunta di miscela per sonda. Una finestra visualizza la temperatura effettiva dell'incubatrice. L'incubatrice non ha raggiunto la temperatura specificata di 65°C.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● L'incubatrice potrebbe non aver avuto tempo sufficiente per riscaldarsi completamente. ● Potrebbe trattarsi di un problema con gli elementi riscaldanti dell'incubatrice. Attendere almeno 20 minuti per il riscaldamento dell'incubatrice. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnerne l'RCS, accendere l'RCS ed eseguire lo script FLUSH per inizializzare l'RCS. 2. Avviare lo script dalla linea desiderata e lasciare all'incubatrice il tempo di riscaldarsi completamente. 3. Se dopo 20 minuti l'incubatrice non ha raggiunto 65°C o la temperatura non sta aumentando, sussiste un problema con gli elementi riscaldanti dell'incubatrice. Contattare i QIAGEN Technical Services.

Agitatore per micropiastre

Il sistema si è arrestato durante l'inizializzazione.

L'RCS si è arrestato durante l'esecuzione del dosaggio. Il braccio robotico è sospeso sulla micropiastre che si trova sull'agitatore per micropiastre. Compare un messaggio di errore.

Lo schermo visualizza **Module Error at Module Shaker (22)**. (Errore modulo nel modulo agitatore 22).

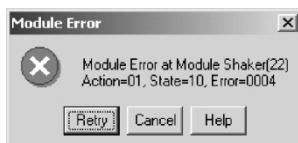

- L'agitatore per micropiastre non ha eseguito l'inizializzazione prima che il dispositivo robotizzato di movimentazione prelevasse la micropiastre.
- L'agitatore per micropiastre potrebbe non aver raggiunto 1100 giri/min.

1. Cliccare sul pulsante **Retry**.
2. Se il messaggio di errore si ripresenta, interrompere il processo ed eseguire lo script **FLUSH** per inizializzare l'RCS. Se l'inizializzazione procede, continuare lo script dalla linea corrispondente.
3. Se il messaggio di errore ricompare, contattare i QIAGEN Technical Services.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Schizzi di liquido nei pozzetti della micropiastra (gocce sul coperchio della micropiastra).</p> <p>Presenza di soluzione di ibridizzazione sull'agitatore per micropiastre.</p> <p>La micropiastra di ibridizzazione potrebbe avere o non avere dei pozzetti vuoti o con scarso volume. Non viene generato alcun messaggio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La micropiastra non è trattenuta saldamente dai rulli dell'agitatore per micropiastre. ● La micropiastra è disallineata. ● L'agitatore per micropiastre è fuori allineamento (oscilla anziché ruotare su un piano). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare che il braccio dei rulli sia stretto e che i rulli si muovano liberamente. In caso di difetto, contattare i QIAGEN Technical Services. 2. Controllare l'allineamento della micropiastra sull'agitatore per micropiastre. 3. Se i rulli e l'allineamento della micropiastra sono in buone condizioni di lavoro, l'agitatore per micropiastre potrebbe essere fuori allineamento. 4. Prendere nota della formazione di schizzi sui coperchi micropiastra. Testare di nuovo i campioni. 5. Contattare i QIAGEN Technical Services.
<p>La micropiastra fa un tintinnio mentre l'agitatore è in funzione. Potrebbe essere o non essere visibile del liquido sul coperchio della micropiastra o sul deck RCS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La micropiastra non è saldamente agganciata all'agitatore per micropiastre. ● Il rivestimento sulle guide dell'agitatore per micropiastre è usurato. ● La micropiastra è disallineata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare l'allineamento della micropiastra sull'agitatore per micropiastre. Controllare che i bracci dei rulli dell'agitatore siano stabili e si muovano liberamente. In caso di difetto, contattare i QIAGEN Technical Services. 2. Una polvere biancastra sulle guide dell'agitatore per micropiastre indica che il rivestimento delle guide si sta usurando. Contattare i QIAGEN Technical Services.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Lavatore di micropiastre		
<p>Il sistema si blocca e lo schermo visualizza il codice di errore Error Addressing Module Washer (5). (Errore indirizzamento modulo lavatore (5)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lavatore di micropiastre non ha eseguito l'inizializzazione prima che il dispositivo robotizzato di movimentazione prelevasse o mettesse la micropiastre sul lavatore. ● La vaschetta del lavatore RCS è bloccata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliccare sul pulsante Retry. Se l'RCS non risponde, interrompere lo script. Spegnerne l'RCS, accendere l'RCS ed eseguire lo script FLUSH per inizializzare l'RCS. 2. Rimuovere la vaschetta del lavatore RCS. Pulire le ruote della vaschetta del lavatore RCS e del lavatore con soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% v/v usando una salvietta di carta anti-pelucchi. 3. Se il problema persiste, contattare i QIAGEN Technical Services.
<p>I pozzetti della micropiastre sono pieni. La pompa di aspirazione è in funzione e si sentono i consueti rumori associati al lavaggio della piastra e all'aspirazione. Potrebbe verificarsi un grave allagamento in quanto è in corso la dispensazione di tampone.</p> <p>Il recipiente del lavatore di micropiastre è pieno e il lavatore di micropiastre non sta aspirando dai pozzetti della micropiastre o dal recipiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Il raccordo a distacco rapido per il flacone di lavaggio non è andato bene in posizione con uno scatto. ● La testata del lavatore di micropiastre non è correttamente allineata. ● La testata del lavatore di micropiastre è bloccata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare che il raccordo a distacco rapido per il flacone di lavaggio sia in sede e correttamente collegato. 2. Accertarsi che la tubazione che va al flacone di lavaggio non sia piegata o schiacciata. 3. Se la testata del lavatore di micropiastre è ostruita, contattare i QIAGEN Technical Services. 4. Se la testata del lavatore è disallineata, contattare i QIAGEN Technical Services.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>La pompa di aspirazione non è in funzione e non si sentono i rumori normalmente associati all'aspirazione della micropiastra.</p> <p>Potrebbe verificarsi grave allagamento in quanto la valvola di ingresso sta dispensando il tampone, ma non c'è aspirazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Malfunzionamento della pompa di aspirazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se la pompa di aspirazione non sta funzionando, contattare i QIAGEN Technical Services per far verificare la pompa di aspirazione. 2. Rimuovere tutte le micropiastre, i coperchi e i recipienti per reagente dal deck RCS. Pulire il lavatore nel miglior modo possibile.
<p>La vaschetta del lavatore RCS non si muove durante l'aspirazione del campione o il lavaggio della micropiastra e, di conseguenza, la testata del lavatore di micropiastre si muove su e giù solo all'interno del recipiente del lavatore, cioè non si sposta verso le singole colonne della micropiastra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● A causa di un precedente allagamento si sono depositati residui di sale sul lavatore di micropiastre che impediscono il movimento. ● Malfunzionamento della pompa di aspirazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire il lavatore di micropiastre e fare clic sul pulsante Retry. 2. Se la pompa di aspirazione non funziona correttamente, contattare i QIAGEN Technical Services. 3. Se la testata del lavatore non è correttamente allineata, contattare i QIAGEN Technical Services. <p>Nota: In caso di allagamento diffuso, contattare i QIAGEN Technical Services per installare un nuovo lavatore di micropiastre e pulire il lato inferiore del lavatore di micropiastre, le superfici interne del deck RCS e il telaio.</p>


Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Mancata dispensazione del tampone durante l'aspirazione del campione o la fase di lavaggio della micropiastra; il recipiente del lavatore di micropiastre è vuoto. La testata del lavatore di micropiastre sta compiendo i movimenti dell'aspirazione, ma il tampone non viene dispensato. Non compare alcun messaggio di errore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Il flacone di lavaggio è vuoto. ● Il raccordo a distacco rapido del flacone di lavaggio non è collegato o è stato inserito in modo non corretto. ● La tubazione non sta funzionando correttamente. La tubazione all'interno del flacone di lavaggio si sta attorcigliando sopra il livello del liquido oppure il flusso del liquido è ridotto a causa dell'aspirazione contro la parete del flacone. ● La pompa di dispensazione del tampone di lavaggio non sta funzionando in modo corretto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che i volumi nel recipiente di lavaggio corrispondano a quanto raccomandato. 2. Accertarsi che il raccordo a distacco rapido che va al flacone di lavaggio sia in sede. 3. Accertarsi che la tubazione funzioni correttamente e rimanga in posizione nel tampone di lavaggio. 4. In base alla fase del dosaggio in cui non si verifica la dispensazione del tampone ed anche al fatto che il problema sia o non sia stato rilevato e risolto, si potrebbe mettere in pausa, interrompere e continuare lo script per lavare la micropiastra. In caso contrario il processo deve essere interrotto. 5. Contattare i QIAGEN Technical Services se la pompa non funziona correttamente. Rimuovere tutte le micropiastre, i coperchi e i recipienti per reagente dal deck RCS.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Il dispositivo robotizzato di movimentazione ha urtato mentre stava cercando di prelevare una micropiastra dal lavatore.</p> <p>L'aspirazione è terminata e il lavatore di micropiastre è senza tampone.</p> <p>Il dispositivo robotizzato di movimentazione e la micropiastra si trovano leggermente al di sopra della vaschetta del lavatore RCS e l'estremità destra della micropiastra è agganciata sotto la testata del lavatore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La testata del lavatore di micropiastre non è tornata alla posizione di partenza dopo l'aspirazione dell'ultima colonna e ha arrestato la corsa mentre le cannule si trovavano appena sopra il bordo del recipiente. ● È possibile che la vaschetta del lavatore RCS appoggi su un pezzo di metallo non livellato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sganciare la micropiastra dal dispositivo robotizzato spegnendo il sistema. 2. Prelevare la micropiastra e spostare il braccio robotico in una posizione sicura per la messa in pausa. 3. Sistemare la micropiastra sulla vaschetta del lavatore RCS. 4. Accendere l'RCS e metterlo in pausa. Eseguire lo script FLUSH per inizializzare le siringhe. 5. Trovare la linea corretta dello script per continuare il processo. 6. Contattare i QIAGEN Technical Services per regolare il sensore del magnete sulla vaschetta del lavatore RCS o per installare un nuovo lavatore.
<p>Distribuzione irregolare del tampone di lavaggio in una o più file.</p>	<p>Il puntale di dispensazione della testata del lavatore di micropiastre corrispondente a quella determinata fila è bloccato.</p>	<p>Contattare i QIAGEN Technical Services per la pulizia della testata del lavatore.</p>

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Presenza di tampone di lavaggio sul lavatore piastre o nella vaschetta del lavatore RCS.</p> <p>La vaschetta del lavatore RCS potrebbe essere coperta di residui di sale che ne impediscono il libero movimento.</p> <p>Presenza di una perdita/gocciolamento nel lavatore di micropiastre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Collegamento della tubazione difettoso. ● Tubazione in ingresso o uscita che perde. ● La tubazione rifiuti potrebbe non convogliare i rifiuti liquidi al contenitore. ● La testata del lavatore di micropiastre è bloccata. ● La testata della pompa è bloccata. ● Una valvola del liquido del lavatore di micropiastre è aperta. ● Una pompa del vuoto a due testate è difettosa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se il gocciolamento non è così grave da causare allagamento e se la vaschetta del lavatore RCS si muove liberamente, continuare il dosaggio. 2. Controllare tutte le connessioni delle tubazioni. 3. Controllare il percorso della tubazione rifiuti. Accertarsi che la tubazione non sia attorcigliata o piegata. 4. Svotare il contenitore dei residui se pieno. 5. Rimuovere la vaschetta del lavatore RCS; pulire e asciugare il lavatore micropiastre nel miglior modo possibile. 6. Contattare i QIAGEN Technical Services per controllare o sostituire la testata della pompa e la valvola e per rimuovere e pulire la testata del lavatore di micropiastre, ecc.


Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>L'apertura di sfiato della pressione sul coperchio del contenitore spruzza liquido di scarto.</p> <p>Il contenitore dei residui sta straripando.</p>	<p>Il contenitore dei residui non è stato svuotato prima di avviare il processo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Svuotare il contenitore dei residui e ricollegarlo. Premere Continue per proseguire con lo script. Se l'RCS è in fase di lavaggio o aspirazione, mettere in pausa lo script per poter intervenire una volta che la fase è terminata. 2. Spegnerne l'RCS e staccare il cavo di alimentazione dalla presa dell'apparecchio (dispositivo di scollegamento), che si trova nell'angolo inferiore a sinistra del pannello posteriore dello strumento. Eliminare i residui liquidi e decontaminare l'area della fuoriuscita.
<p>Residui di tampone di lavaggio in una o più strisce.</p> <p>Una o più strisce presentano tampone di lavaggio e DR2 nei singoli pozzetti della micropiastre al momento della lettura delle micropiastre.</p>	<p>La testata del lavatore di micropiastre non è correttamente allineata e alcune strisce non sono state correttamente aspirate durante l'ultima fase di lavaggio.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contattare i QIAGEN Technical Services per riallineare la testata del lavatore. 2. Testare di nuovo i campioni in questione.



Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Mancata dispensazione del tampone di lavaggio.	<ul style="list-style-type: none"> ● La tubazione a distacco rapido del tampone di lavaggio non è correttamente collegata al flacone di lavaggio. ● Volume insufficiente del tampone di lavaggio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricaricare il flacone di lavaggio. Eseguire lo script aspirazione/lavaggio per riempire le linee in preparazione del prossimo lavaggio micropiastre. 2. A meno che il problema non venga rilevato e corretto prima che la micropiastre sia passata alla fase successiva, il dosaggio andrà perso e i campioni dovranno essere analizzati di nuovo.
Siringhe		
La siringa perde.	La siringa è usurata.	Sostituire la/e siringa/e. Per ulteriori istruzioni vedere "Pulizia e sostituzione delle siringhe", pagina 80.
La siringa ha costantemente delle bolle d'aria.	<ul style="list-style-type: none"> ● Liquido del sistema basso ● Le linee del sistema non sono completamente riempite. ● La siringa è usurata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riempire il flacone del liquido di sistema. 2. Eseguire lo script FLUSH più volte finché le bolle non scompaiono. 3. Sostituire la siringa usurata. Per ulteriori istruzioni vedere "Pulizia e sostituzione delle siringhe", pagina 80.
Il sistema si ferma durante l'inizializzazione o il lavaggio. Lo schermo visualizza un errore del modulo diluatore 1, 2, 3 o 4.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le siringhe non sono state inizializzate durante il lavaggio. ● Un modulo diluatore è guasto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare il pulsante Retry. Se l'errore si ripresenta, spegnere e riaccendere l'RCS. Eseguire lo script FLUSH e riavviare lo script. 2. Se le siringhe non eseguono l'inizializzazione, contattare i QIAGEN Technical Services.

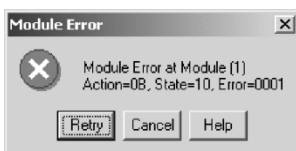

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Rilevamento del livello del		
Uno o più puntali non stanno rilevando il livello del liquido.	Connessione non buona del cavo del rilevatore.	Contattare i QIAGEN Technical Services per fissare il collegamento o sostituire il rack Z.
I reagenti non vengono aspirati.	<ul style="list-style-type: none"> ● Troppe bolle sulla superficie del liquido del reagente. ● Perdita in una tubazione. ● Una o più siringhe usurate. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eliminare lo strato di schiuma aspirando le bolle manualmente con una pipetta (senza aspirare il reagente). 2. Controllare eventuali perdite nella tubazione. Se sono presenti perdite, contattare i QIAGEN Technical Services. 3. Sostituire le siringhe usurate. Per ulteriori istruzioni vedere "Pulizia e sostituzione delle siringhe", pagina 80.
I puntali urtano contro il fondo del recipiente per reagente.	Connessioni dei cavi non riuscite.	Contattare i QIAGEN Technical Services per sostituire la tubazione o la scheda del rilevatore.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Dispositivo robotizzato di</p> <p>Il dispositivo robotizzato di movimentazione non preleva una micropiastra.</p> <p>Il dispositivo robotizzato di movimentazione non posiziona una micropiastra.</p> <p>Il dispositivo robotizzato di movimentazione lascia cadere una micropiastra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Posizionamento non corretto delle micropiastre e dei coperchi sull'agitatore per micropiastre. ● La micropiastra è disallineata. ● Strisce posizionate capovolte nella micropiastra. ● Pinze per micropiastre piegate. ● Le pinze per micropiastre sono disallineate. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accertarsi che la micropiastra sia correttamente posizionata in fase di configurazione. 2. Accertarsi che le micropiastre coperte siano posizionate all'interno delle guide dell'agitatore per micropiastre. 3. Accertarsi che le strisce di micropiastre siano posizionate con l'orientamento corretto. Le strisce posizionate capovolte impediscono al coperchio di poggiare in piano sulla micropiastra e possono impedire al dispositivo robotizzato di movimentazione di prelevare la micropiastra. 4. Contattare i QIAGEN Technical Services per sostituire le pinze per micropiastre.
<p>Il braccio robotico e il dispositivo robotizzato di movimentazione si muovono avanti e indietro. Il sistema non risponde. Lo schermo visualizza un errore nel modulo motore Y (15) o motore X (16).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Il braccio robotico ha urtato un ostacolo e ha perso la propria posizione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare i pulsanti Retry o Cancel. 2. Eseguire la funzione Park e riavviare lo script dalla linea appropriata.

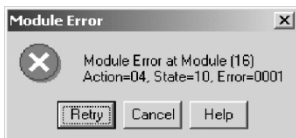

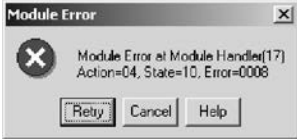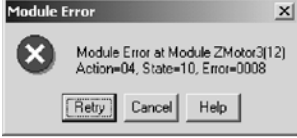Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva	
<p>Il dispositivo robotizzato di movimentazione si trova nell'impilatore B. C'è una micropiastra inceppata nel dispositivo robotizzato di movimentazione; sullo schermo compare Module Error at Module Handler (17) (Errore modulo nel modulo dispositivo di movimentazione (17)). Il dispositivo robotizzato di movimentazione potrebbe muoversi su e giù lentamente e ha perso il proprio posizionamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Configurazione sbagliata. Micropiastre rimaste nell'impilatore B da un precedente processo. ● La micropiastra già presente nell'impilatore B è stata manipolata manualmente e spostata dalla sua posizione originale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare il pulsante Retry. Sbloccare manualmente la micropiastra dal dispositivo robotizzato di movimentazione o uscire dallo script e usare i comandi Move Handler (vedere pagina 94) per sbloccare la micropiastra. 2. Correggere l'errore di configurazione del deck RCS rimuovendo eventuali micropiastre rimaste dal precedente processo. 3. Continuare lo script dalla linea appropriata. 	
	<p>Messaggio di errore Module Error at Module Z Motor 3 (12) (Errore modulo nel modulo motore Z 3(12)).</p>	<p>Il rack Z potrebbe essere bloccato da un ostacolo oppure è possibile che il motore Z non funzioni correttamente.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare il pulsante Retry. 2. Reinizializzare l'RCS selezionando Park oppure accendendo e spegnendo l'RCS. 3. Se il problema persiste, contattare i QIAGEN Technical Services per far riparare o sostituire il motore Z.
			

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Il dispositivo robotizzato di movimentazione non raggiunge l'impostazione VariSpan chiuso e genera il messaggio di errore Module Error at Module V Motor (14) (Errore modulo nel modulo motore V (14)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Potrebbe essere rimasta una micropiastre nel dispositivo robotizzato di movimentazione che impedisce la chiusura del VariSpan. ● Il VariSpan potrebbe aver bisogno di essere pulito e lubrificato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se è presente una micropiastre nel dispositivo robotizzato di movimentazione, usare i comandi Move Handler per sbloccare la micropiastre (vedere pagina 94), mettere in sosta il dispositivo robotizzato e continuare il recupero. 2. Contattare i QIAGEN Technical Services per pulire e lubrificare il VariSpan.
<p>Il dispositivo robotizzato di movimentazione sobbalza o va ad urtare mentre preleva o posiziona micropiastre o coperchi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Le micropiastre o i coperchi non sono stati messi correttamente nelle rispettive posizioni. ● Pinze per micropiastre piegate. ● Le allocazioni delle impostazioni sono disattivate. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adattare il coperchio o le micropiastre se sono mal posizionati, poi selezionare il pulsante Retry. 2. Se le pinze per micropiastre sono piegate, contattare i QIAGEN Technical Services per la sostituzione. 3. Contattare i QIAGEN Technical Services per regolare le allocazioni impostate.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Il dispositivo robotizzato di movimentazione urta contro le micropiastre di cattura nell'impilatore A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Le micropiastre sono state caricate non correttamente nell'impilatore A. ● Troppe micropiastre o coperchi extra. ● Le impostazioni sono disattivate. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interrompere lo script con la funzione Abort. 2. Usare i comandi Move Handler per spostare il dispositivo robotizzato di movimentazione (vedere pagina 94) oppure mettere il dispositivo in sosta se non sta tenendo una micropiastre. Riposizionare correttamente le micropiastre nell'impilatore A e continuare lo script dalla linea appropriata. 3. Se si tratta di un problema persistente, le impostazioni devono essere regolate da un tecnico dell'assistenza. Contattare i QIAGEN Technical Services.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Presenza di una micropiastra sulla piattaforma o urto del dispositivo robotizzato di movimentazione contro una micropiastra lasciata nella posizione di pipettaggio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Il dispositivo robotizzato di movimentazione ha lasciato cadere una micropiastra. ● Il dispositivo robotizzato di movimentazione non ha prelevato una micropiastra dalla posizione di pipettaggio nelle fasi precedenti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. I risultati della micropiastra non saranno validi se la micropiastra è caduta e i campioni hanno prodotto degli schizzi oppure se la micropiastra ha saltato una fase importante. Scartare la micropiastra. 2. In un dosaggio a più micropiastre recuperabile viene utilizzata una micropiastra dummy per occupare la posizione e impedire a reagenti e tampone di lavaggio di essere aggiunti al deck RCS o al lavatore di micropiastre. 3. Se i campioni della micropiastra non hanno prodotto schizzi e se la micropiastra non ha saltato una fase del dosaggio, lo script può essere continuato dalla linea appropriata. 4. Se il problema persiste, contattare i QIAGEN Technical Services per controllare l'allineamento delle pinze per micropiastre ed effettuare le regolazioni necessarie.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Coperchio di micropiastra trovato sulla piattaforma.</p> <p>Il dispositivo robotizzato di movimentazione ha urtato contro un coperchio di micropiastra lasciato nella stazione di pipettaggio o nell'impilatore a temperatura ambiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Il dispositivo robotizzato di movimentazione ha lasciato cadere un coperchio di micropiastra. ● Il dispositivo robotizzato di movimentazione non ha prelevato un coperchio di micropiastra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se il coperchio può essere tolto senza forzare alcun componente, rimuovere il coperchio e continuare lo script. 2. Se il coperchio è incastrato, interrompere lo script e usare i comandi Move Handler per liberare le parti coinvolte (vedere pagina 94). Sostituire tutti i componenti e continuare lo script dalla linea appropriata. 3. Se il problema persiste, contattare i QIAGEN Technical Services per controllare l'allineamento delle pinze per micropiastre ed effettuare le regolazioni necessarie.
Adattatori per puntali e		
<p>Un puntale colpisce il lato di un pozzetto della micropiastra.</p> <p>Uno o tutti i puntali colpiscono il lato di un pozzetto della micropiastra.</p> <p>Un puntale colpisce il fondo di un pozzetto della micropiastra.</p> <p>Tutti i puntali colpiscono il fondo dei pozzetti della micropiastra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Problema di allineamento puntali. ● Adattatore per puntali allentato. ● Adattatore per puntali piegato. ● Rack Z rotto, piegato o incurvato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare se la vite ad alette sull'adattatore per puntali è serrata. In caso contrario, serrarla a mano e controllare l'allineamento dei puntali. 2. Contattare i QIAGEN Technical Services per sostituire l'adattatore per puntali. 3. Ispezionare il rack Z per verificare la presenza di danni. 4. Contattare QIAGEN Technical Services per sostituire il rack Z. 5. Contattare i QIAGEN Technical Services per regolare l'allocazione dei puntali.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Un puntale perde.	<ul style="list-style-type: none"> ● Bolle d'aria nelle linee del sistema. ● L'adattatore per puntali è usurato e non sigilla il puntale. ● Una siringa usurata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare le linee di sistema per verificare la presenza di bolle visibili. Eseguire lo script FLUSH. 2. Contattare i QIAGEN Technical Services per sostituire l'adattatore per puntali. 3. Contattare i QIAGEN Technical Services per sostituire le siringhe usurate.
Formazione di gocce all'estremità del puntale per pipetta monouso.	<ul style="list-style-type: none"> ● Gli adattatori per puntali hanno raccolto pelucchi o altri detriti, impedendo un accoppiamento a tenuta tra adattatore per puntale e puntale per pipetta monouso. ● Collegamento del sistema di liquidi allentato. ● Siringhe usurate. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire l'adattatore per puntali con alcol e una salvietta di carta anti-pelucchi. 2. Contattare i QIAGEN Technical Services per serrare i collegamenti del sistema di liquidi e pulire o sostituire le siringhe e i cappucci degli stantuffi.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Il campione non viene aspirato.	<ul style="list-style-type: none"> ● Aspirazione di una bolla di aria. ● Volume del campione insufficiente. ● Perdita tubazione. ● Siringa usurata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare per verificare la presenza di bolle d'aria o la mancanza o insufficienza di volume nella provetta del campione. 2. Trasferire manualmente i campioni mancanti quando lo script richiede il controllo del trasferimento dei campioni. Riposizionare la micropiastre sul deck RCS e selezionare OK per continuare. 3. Controllare eventuali perdite nella tubazione. Contattare i QIAGEN Technical Services per sostituire le tubazioni, se necessario. 4. Contattare i QIAGEN Technical Services per sostituire le siringhe usurate.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Il reagente non viene aspirato.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il livello del reagente nel recipiente è troppo basso. ● Le linee di sistema sono state caricate con acqua deionizzata. ● Una siringa usurata. ● C'è un problema con il meccanismo di rilevazione del livello di liquido. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricaricare il recipiente per reagente e selezionare il pulsante Retry . 2. Accertarsi che le linee dell'RCS siano riempite con acqua deionizzata. (L'acqua di rubinetto e altri reagenti interferiscono con il rilevamento del livello del liquido.) 3. Potrebbe sussistere un problema con il meccanismo di rilevamento del livello del liquido. Contattare i QIAGEN Technical Services. 4. Vedere "Rilevamento del livello del liquido" in questa tabella. 5. Contattare i QIAGEN Technical Services per sostituire le siringhe usurate.
Diversi campioni non sono stati trasferiti alla micropiastra di ibridizzazione durante la fase di trasferimento del campione.	<ul style="list-style-type: none"> ● Selezione di uno script non corretto. ● Volume del campione insufficiente. ● Bolle d'aria intrappolate nelle provette. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli script C richiedono un volume minimo di 150 µl per un singolo trasferimento. 2. Gli script D richiedono un volume minimo di 1125 µl più un dispositivo di prelievo per un singolo trasferimento. 3. Verificare che l'MST Vortexer 2 rientri nelle specifiche di calibrazione. 4. Trasferire manualmente i campioni saltati dal sistema. 5. Interrompere il processo con la funzione Abort e avviare lo script FLUSH.


Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Il volume di pipettaggio non è regolare.</p> <p>I puntali per pipette perdono reagente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Delle bolle d'aria potrebbero essere intrappolate nelle linee del sistema ed interferire con un trasferimento preciso di campione/reagente ● Un adattatore per puntale è danneggiato o usurato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interrompere il processo con la funzione Abort e lavare il sistema per eliminare le bolle d'aria nelle linee. 2. Se il problema persiste, contattare i QIAGEN Technical Services per sostituire gli adattatori per puntali danneggiati o usurati.
<p>I reagenti non vengono aggiunti a tutti i campioni trasferiti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● All'inizio dello script è stato inserito il numero sbagliato di campioni totali e di controlli per la piastra parziale. ● La finestra same for all tests è stata controllata quando è stato inserito il numero di campioni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se il problema viene riscontrato nel momento in cui viene aggiunta la miscela per sonde, interrompere lo script e reinserire il numero corretto di campioni. Continuare il dosaggio dal punto in cui viene aggiunta la miscela per sonde. Vedere "Riavviare lo script dopo aver inserito un numero sbagliato di campione o del totale dei pozzetti micropiastra", pagina 102. 2. Se il problema viene scoperto dopo aver aggiunto la miscela per sonde, prendere nota dei campioni non testati e testare tali campioni in un processo successivo.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Il vassoio per puntali monouso viene sollevato dal rack per puntali e prelevato insieme all'adattatore per puntali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Il rack per puntali monouso si è allentato o non era stato ben inserito in posizione. ● Le staffe che tengono in posizione il rack per puntali monouso potrebbero essere allentate. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il rack Z genererà un messaggio di errore quando avvia il VariSpan per eseguire la fase successiva. 2. Per evitare un urto, mettere in pausa lo script premendo Esc sulla tastiera del computer dell'RCS. 3. In caso di urto, liberare i componenti coinvolti senza forzare. Lo script può essere continuato dopo aver eseguito la configurazione, quando il vassoio per puntali è tornato nella posizione corretta ed è stato adeguatamente agganciato nel rack per puntali. Accertarsi che le clip del vassoio per puntali mantengano una tensione tale da tenere in posizione il vassoio per puntali monouso. 4. Se il vassoio per puntali e gli adattatori per puntali sono inceppati, interrompere lo script. Utilizzare i comandi Move Handler (vedere pagina 94) per sollevare e spostare gli adattatori per puntali e liberare il vassoio per puntali. Se i campioni non sono stati alterati da fuoriuscite o schizzi e se gli adattatori per puntali non sono piegati, lo script può continuare. 5. Se i rack per puntali sono piegati o non mantengono una tensione tale da tenere in posizione il vassoio per puntali monouso, contattare i QIAGEN Technical Services.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
I puntali monouso si incepano nella stazione di espulsione puntali e i puntali non sono rimovibili.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il contenitore dei puntali da eliminare non è stato svuotato e sta traboccando. ● Lo scivolo di espulsione puntali deve essere pulito. ● Un puntale monouso si è inceppato nella stazione di espulsione puntali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettere in pausa lo script, pulire la stazione di espulsione puntali e continuare. 2. Svuotare il contenitore dei puntali da eliminare. 3. Se un adattatore per puntali ha due puntali inceppati, usare i comandi Move Handler per sganciare gli adattatori per puntali (vedere pagina 94). In alternativa, spegnere l'RCS per sbloccare gli adattatori per puntali inceppati. 4. Selezionare il pulsante Retry e continuare lo script. 5. Pulire lo scivolo di espulsione puntali con alcol.
Un adattatore per puntali non riconosce che un puntale è caricato e cerca di caricare un secondo puntale, urtando contro il rack per puntali monouso.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'impostazione per caricare il puntale è leggermente off. ● L'adattatore per puntali è allentato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare se ci sono intasamenti nella via di fuga della stazione di espulsione puntali. 2. Contattare i QIAGEN Technical Services.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Gli adattatori per puntali urtano contro i rack per puntali monouso.	<ul style="list-style-type: none"> ● I rack per puntali monouso non sono correttamente inseriti nei supporti per puntali. ● Le posizioni impostate non sono corrette e necessitano di regolazione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se il rack per puntali monouso non è correttamente inserito, reinserirlo, selezionare il pulsante Retry e continuare il dosaggio. 2. Se i rack per puntali monouso sono correttamente posizionati, ma continuano a urtare, è probabile che si tratti di un problema di impostazione o di un adattatore per puntali piegato. Contattare i QIAGEN Technical Services per interventi di riparazione e/o regolazione.
Gli adattatori per puntali non prelevano campioni né reagenti.	Il raccordo a distacco rapido non è correttamente inserito nel flacone del liquido di sistema.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bloccare lo script. Accertarsi che la tubazione sia ben collegata al flacone del liquido di sistema. 2. Eseguire lo script FLUSH.
L'RCS si è arrestato, gli adattatori per puntali si trovano sopra un rack per puntali vuoto e l'RCS emette un segnale acustico e visualizza una finestra di dialogo con il messaggio No Tips found with Motors 1, 2, 3, 4 (Non sono stati trovati puntali con i motori 1, 2, 3 e 4).	I puntali monouso non sono stati caricati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caricare i puntali e selezionare il pulsante Retry. (Sollevare gli adattatori per puntali se sono troppo bassi sul rack e interferiscono con il caricamento del rack). 2. Procedere secondo le istruzioni riportate in "Riavvio dello script nel mezzo di un dosaggio", pagina 99.




Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>L'RCS si è arrestato, i puntali si trovano sopra i recipienti per reagente vuoti e il sistema emette un segnale acustico e visualizza una finestra di dialogo con il messaggio No Liquid found with Tips 1, 2, 3, 4 (Non è stato trovato liquido con i puntali 1, 2, 3 e 4).</p> 	<p>I reagenti non sono stati caricati o sono stati esauriti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiungere reagente nei recipienti per reagente vuoti. 2. Selezionare il pulsante Retry.
<p>A volte, l'adattatore per puntali non preleva un puntale monouso dal rack per puntali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● L'adattatore per puntali è piegato. ● L'impostazione è off e quindi necessita di regolazione. Le fasi sono andate perse durante l'allineamento a causa di un precedente urto. 	<p>Contattare i QIAGEN Technical Services.</p>
<p>Il rilevamento del livello del liquido con puntale fa abbassare il puntale sotto il livello del reagente durante l'aspirazione del reagente. Il puntale scende sotto il livello del reagente e potrebbe risalire o non risalire di nuovo per conformarsi al livello degli altri puntali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Staffa Z allentata sull'adattatore per puntali. ● L'adattatore per puntali non è a contatto con la parte posteriore della staffa per completare il circuito di rilevazione di livello del liquido. 	<p>Contattare i QIAGEN Technical Services.</p>

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Uno o più adattatori per puntali (1, 2, 3, 4) sembrano leggermente disallineati, come se stessero quasi toccando il margine dei pozzetti della micropiastra.	Un urto del rack Z o qualsiasi altro impatto potrebbe aver causato il disallineamento dell'adattatore.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Continuare il dosaggio se i puntali stanno dispensando campione/reagente nei pozzetti della micropiastra. 2. Contattare i QIAGEN Technical Services.
Un adattatore per puntali urta contro la micropiastra di ibridizzazione e genera il messaggio di errore Module Error at Module Z Motor 1 (10) (Errore modulo nel modulo Motore Z 1 (10)).	<ul style="list-style-type: none"> • Una vite di bloccaggio dell'adattatore per puntali è allentata. 	Serrare la vite di bloccaggio dell'adattatore per puntali.



Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Errore non correlato al modulo		
I reagenti o i campioni sono pipettati sul deck RCS.	<ul style="list-style-type: none"> ● Configurazione errata del deck RCS. Le micropiastre non sono caricate nella posizione corretta e il dispositivo robotizzato di movimentazione non le preleva. ● L'impostazione o l'allineamento delle pinze per micropiastre è leggermente off e il dispositivo robotizzato di movimentazione non ha prelevato la micropiastro. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se ciò accade durante il trasferimento di un campione, il dosaggio può essere interrotto, riavviato o continuato dal punto del trasferimento del campione a seconda del numero di micropiastre da analizzare. 2. Se ciò accade nel momento in cui il reagente viene aggiunto ai campioni del dosaggio e se lo si rileva precocemente, l'RCS può essere messo in pausa, la micropiastro posta manualmente sulla piattaforma e il dosaggio può continuare. 3. Se ciò accade nel trasferimento da piastra a piastra e i campioni di ibridizzazione sono pipettati sulla piattaforma, i campioni andranno persi e il dosaggio dovrà essere interrotto e ripetuto. 4. Se altre micropiastre sono state trasferite in modo soddisfacente, il dosaggio potrebbe essere continuato con una micropiastro sostitutiva. 5. Rispettare una configurazione della piattaforma corretta.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Una parte della micropiastra si ribalta e cade mentre viene inserita nell'impilatore per micropiastre a temperatura ambiente.	Alla micropiastra parziale non sono state aggiunte strisce dummy (pulite) per equilibrare il peso delle strisce di cattura rimosse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La micropiastra andrà persa. Se si tratta dell'unica micropiastra testata, il dosaggio deve essere fermato e i campioni testati di nuovo in un momento successivo. 2. Se si tratta di una delle micropiastre multiple, al posto della micropiastra andata persa occorre mettere una micropiastra fittizia da usare durante tutto il dosaggio. Interrompere il dosaggio e continuare dal punto in cui la micropiastra è stata prelevata per l'inserimento nell'impilatore per micropiastre. <p>Nota: Non mettere le micropiastre manualmente nell'impilatore a temperatura ambiente.</p>
L'RCS non risponde e genera un errore di comunicazione Error addressing Module (10) (Errore indirizzamento modulo (10)).	L'RCS è spento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se l'RCS è stato spento, accendere il sistema e selezionare il pulsante Retry. 2. Se il computer non comunica con l'RCS, controllare i collegamenti, riavviare il sistema e provare di nuovo. 3. Se la comunicazione continua a non funzionare, contattare i QIAGEN Technical Services.

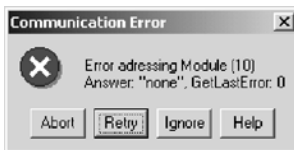


Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>L'alimentazione elettrica dell'edificio si è interrotta.</p> <p>Il gruppo di continuità (UPS) emette un segnale acustico per indicare che lo strumento sta funzionando ora con il gruppo di continuità (UPS).</p> <p>L'alimentazione elettrica dell'RCS si è interrotta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● L'RCS sta funzionando con un'alimentazione d'emergenza di back-up. ● L'alimentazione elettrica di emergenza si è esaurita. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se l'interruzione di alimentazione dura più di 45 minuti, interrompere lo script con la funzione Abort in un punto che consenta di evitare urti quando l'alimentazione si esaurisce. L'RCS si arresterà non appena l'alimentazione si esaurisce. Se l'alimentazione dell'RCS viene meno prima che venga interrotto un dosaggio, non ci saranno registrazioni del processo e nessuna possibilità di continuare lo script al ripristino dell'alimentazione. Contattare i QIAGEN Technical Services per riavviare il sistema. 2. Se l'alimentazione viene ripristinata entro 45 minuti, continuare lo script dalla linea appropriata (vedere "Riavvio di uno script dopo un'interruzione dell'alimentazione o la selezione di uno script sbagliato", pagina 102).

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
Selezione errata dello script o errore del campione		
Lo script richiede un numero errato di portaprovette per campioni (troppo pochi o troppi).	<ul style="list-style-type: none"> ● È stato usato lo script non corretto. ● L'utente non ha usato il software ScriptSelect. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interrompere il processo con la funzione Abort. 2. Per scegliere lo script corretto usare il software ScriptSelect. 3. Dal software RCS, selezionare lo script scelto dalla Run List. 4. Inserire il numero corretto di campioni. 5. Avviare lo script, poi interrompere il processo. 6. Riavviare il processo dalla linea appropriata del trasferimento del portaprovette per campioni. Le micropiastre già trasferite devono essere integrate nello script riavviato. Per ulteriori istruzioni vedere " Riavvio degli script", pagina 99.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>Gli ultimi pochi campioni vengono aggiunti alle strisce dummy vuote in una micropiastra parziale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● È stato inserito il numero errato di strisce nel supporto. ● È stato inserito il numero sbagliato di pozzetti della micropiastra per reagente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numero errato di strisce sulla micropiastra: se l'errore si nota nella fase del trasferimento da piastra a piastra, lo script può essere messo in pausa, le strisce aggiunte alla micropiastra e i campioni trasferiti manualmente. Se l'errore si nota dopo questa fase, i campioni sono andati persi e devono essere testati di nuovo. 2. È stato inserito il numero errato di pozzetti della micropiastra per reagente: Se si verifica questo nella fase di trasferimento da piastra a piastra, interrompere lo script con la funzione Abort e inserire il numero corretto di pozzetti della micropiastra per reagente. Continuare dalla linea appropriata. Se l'errore si nota in un momento successivo quando il DR1 è già stato mescolato con la miscela per sonda rimanente nella micropiastra, sarà prodotto un precipitato pesante che può potenzialmente ostruire le cannule del lavatore di piastre. 3. Se le micropiastre non effettuano un lavaggio corretto a causa di cannule ostruite, analizzare di nuovo i campioni corrispondenti.

Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
L'RCS non trasferisce tutti i campioni dal portaprovette per campioni all'ultima micropiastra parziale.	È stato inserito il numero sbagliato di campioni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se il dosaggio è nella fase di trasferimento campioni, interrompere lo script con la funzione Abort. Aggiungere i campioni mancanti manualmente. 2. Riavviare lo script ed inserire il numero corretto di campioni. Per ulteriori istruzioni vedere " Riavvio degli script", pagina 99. 3. Analizzare nuovamente i campioni non trasferiti.
Il sistema è impostato per procedere all'aggiunta di miscela per sonda senza trasferire tutti i portaprovette per campioni previsti.	È stato selezionato lo script sbagliato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interrompere lo script con la funzione Abort e avviare lo script corrispondente alle micropiastre da sottoporre a dosaggio. 2. Seguire le istruzioni indicate per l'avvio alla linea corretta dello script. Per ulteriori istruzioni vedere " Riavvio degli script", pagina 99.

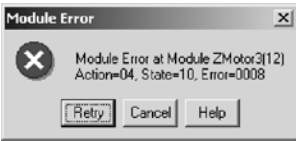Sintomo	Possibili problemi/cause	Intervento/azione correttiva
<p>I puntali urtano contro lo stick dello spazzolino della provetta per campioni.</p> <p>I puntali urtano o sbattono contro i tappi a discesa.</p> <p>Il sistema genera il messaggio di errore Module Error at Module Z Motor 3 (10, 11, 12, 13) (Errore modulo nel modulo motore Z 3 (10, 11, 12, 13)).</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● I tappi a discesa non sono stati messi sulla provetta di raccolta campioni. ● I tappi a discesa sono messi con l'orientamento sbagliato sulla provetta di raccolta campioni. ● Il portaprovette per campioni non è correttamente posizionato sulla piattaforma. ● Il sistema è disallineato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interrompere il processo con la funzione Abort. 2. Con i comandi Move Handler (vedere pagina 94) sollevare il rack Z. 3. Staccare l'adattatore per puntali dallo stick dello spazzolino. 4. Aggiungere tappi a discesa e posizionarli con l'orientamento corretto. Accertarsi che lo stick dello spazzolino rimanga in posizione. 5. Riavviare lo script dalla linea appropriata. Per ulteriori istruzioni vedere " Riavvio degli script", pagina 99. 6. Se il problema persiste dopo aver correttamente posizionato le provette e aver correttamente allineato i tappi a discesa, il sistema richiede una regolazione dell'allineamento. Contattare i QIAGEN Technical Services.

10 Glossario

Termine	Descrizione
Ingresso dell'apparecchio	Il dispositivo di scollegamento che è posizionato nell'angolo inferiore di sinistra del pannello posteriore dello strumento. Se un cavo di alimentazione viene collegato all'ingresso dell'apparecchio dello strumento e alla presa elettrica a parete, lo strumento riceve alimentazione dalla rete.
ATTENZIONE	Termine usato per segnalare situazioni che potrebbero determinare un danno allo strumento o ad altre apparecchiature.
Rack di conversione (argento)	Il portaprovette per campioni in argento è usato per i campioni di conversione.
Campione di conversione	Un campione di un paziente raccolto in un mezzo di raccolta non- <i>digene</i> che richiede una procedura di processazione prima di eseguire il test <i>digene</i> HC2 DNA. I campioni citologici liquidi devono essere campioni di conversione.
Campione <i>digene</i>	Un campione del paziente raccolto in STM (Specimen Transport Medium - mezzo di trasporto campione).
Portaprovette per campioni <i>digene</i> (blu)	Portaprovette per campioni blu usato per i campioni raccolti in STM (Specimen Transport Medium). Questo tipo di portaprovette per campioni può essere usato sia per dosaggi singoli sia per dosaggi doppi.
Dispositivo di scollegamento	Vedere Ingresso dell'apparecchio.
Dosaggio doppio	Un test durante il quale un singolo portaprovette di campioni viene distribuito a due diverse micropiastre. Ogni micropiastra viene testata con una sonda diversa. Vedere Esempio 4 nella sezione "Esempi di nomi di script", pagina 50, per ulteriori chiarimenti.

Termine	Descrizione
Script sonda singola e sonda doppia	Uno script che indica che l'RCS eseguirà un dosaggio a sonda doppia e un dosaggio a sonda singola. Il dosaggio doppio è sempre eseguito per primo e consente di testare un portaprovette per campioni su due micropiastre usando una sonda situata sul deck RCS nelle posizioni sonda 1 e 2. I portaprovette per campioni restanti sono testati usando la sonda posta sul deck RCS nella posizione sonda 3. La dicitura "Dual- and Single-Probe Script" (Script sonda doppia e sonda singola) è riportata sulla stampa di conferma generata all'inizio del processo RCS. Per ulteriori informazioni, vedere la definizione di dosaggio doppio e Esempio 2 nella sezione "Esempi di nomi di script", pagina 50.
Script sonda doppia	Uno script che indica che un singolo portaprovette distribuito su due micropiastre è testato con due sonde diverse. La dicitura "Dual-Probe Script" è riportata sulla stampa di conferma dell'RCS generata all'inizio del processo RCS. Per ulteriori informazioni, vedere la definizione di dosaggio doppio e Esempio 4 nella sezione "Esempi di nomi di script", pagina 50.
Sonda 1	La soluzione della sonda che è situata sul deck RCS nella posizione sonda 1.
Sonda 2	La soluzione della sonda che è situata sul deck RCS nella posizione sonda 2.
Sonda 3	La soluzione della sonda che è situata sul deck RCS nella posizione sonda 3.
Lista di processo	La lista di script attualmente disponibili nel software RCS. Gli script possono essere aggiunti o tolti dalla Run List utilizzando il software ScriptSelect. Solo gli script presenti nella Run List possono essere usati nel software RCS.
Script	La serie di istruzioni che l'RCS utilizza per eseguire un dosaggio o una serie di dosaggi.
Script sonda singola	Uno script che indica che tutti i portaprovette per campioni sono testati con la stessa sonda situata sul deck RCS nella posizione sonda 1. La dicitura "Single-Probe Script" (Script sonda singola) è riportata sulla stampa di conferma dell'RCS generata all'inizio di un processo RCS. Vedere Esempio 1 nella sezione "Esempi di nomi di script", pagina 49, per ulteriori chiarimenti.

Termine	Descrizione
Script a due sonde (script a 2 sonde)	Uno script che indica che ogni portaprovette testato genera risultati con l'uso di una sonda diversa. Le sonde multiple sono usate per portaprovette multipli, ma ogni portaprovette è testato solo con una singola sonda. La terminologia "Two-Probe Script" (Script due sonde) è riportata sulla stampa di conferma generata all'inizio del processo RCS e definisce la selezione della sonda e dello script usati in uno specifico processo RCS. Vedere Esempio 3 nella sezione "Esempi", pagina 50, per ulteriori chiarimenti.
UPS	Acronimo di Uninterruptible Power Supply, gruppo di continuità, ossia una fonte di alimentazione di backup esterna con una batteria ricaricabile che funge da fonte temporanea di elettricità durante un black-out elettrico.
AVVERTENZA	Termine usato per segnalare situazioni che possono avere come conseguenza lesioni personali per l'utente o terzi.

Appendice A – Dati tecnici

Dimensioni e peso dello strumento

Dimensioni (L x P x H) (incluse dimensioni dei tubi e stazione di espulsione puntali)	138 x 79 x 89 cm
Peso	68 kg

Requisiti relativi all'alimentazione dello strumento

Requisiti di alimentazione	100–240 V AC (frequenza online 50–60 Hz)
Variazione della tensione di linea	Fluttuazione di $\pm 10\%$ della tensione di rete nominale
Consumo di corrente (RCS e computer)	355 Watt/4,1 A a 120 V o inferiore
Categoria di sovratensione	II

Condizioni di funzionamento

Temperatura dell'aria	15-30°C
Umidità relativa	15%–75%
Livello di inquinamento	GRADO DI INQUINAMENTO 2
Altitudine	Fino a 2.000 metri
Luogo di funzionamento	Solo per uso in ambienti chiusi

Nota: Queste specifiche ambientali riguardano l'RCS. Le condizioni per i test *digene* HC2 DNA possono essere più restrittive. Consultare le istruzioni per l'uso del test *digene* HC2 DNA per ulteriori considerazioni di carattere ambientale.

Condizioni di conservazione

Posizione	In ambienti chiusi
Temperatura	da 5 a 40°C nell'imballo di produzione
Umidità relativa	15%-75%

Condizioni di trasporto

Temperatura	da -25 a 60°C nell'imballo di produzione
Max. umidità relativa	75%

Appendice B – Sostituzione della vaschetta del lavatore RCS

Prima di eseguire questa procedura, verificare quanto segue:

- Il flacone di lavaggio deve essere riempito con il tampone di lavaggio preparato.
- Il raccordo a distacco rapido si innesta saldamente in posizione con uno scatto.
- La tubazione tra il flacone di lavaggio e lo strumento deve essere priva di pieghe e correttamente collegata.

Controllare specialmente i punti in cui la tubazione si connette al flacone di lavaggio e l'ingresso nello strumento.

Per questa procedura è necessaria una micropiastra di cattura; non usare una micropiastra di ibridizzazione. Un supporto per micropiastra di cattura precedentemente usato può essere privato dei pozzetti e occupato con le strisce per pozzetti delle micropiastre RCS.

Importante: Le vaschette del lavatore RCS devono essere installate da un dipendente dell'assistenza in loco QIAGEN e non possono essere scambiate tra diversi strumenti RCS. Se è necessaria assistenza, rivolgersi ai QIAGEN Technical Services.

1. Sollevare il collettore della vaschetta RCS fino al punto in cui oppone resistenza. Far scorrere la vaschetta del lavatore RCS a sinistra, sollevarla e rimuoverla.

Nota: Quando si solleva la vaschetta del lavatore RCS dal lavatore micropiastre, occorre superare una leggera resistenza. Sul lato inferiore della vaschetta del lavatore RCS è presente un magnete usato per posizionare la vaschetta del lavatore RCS durante il funzionamento dell'RCS. Per togliere la vaschetta del lavatore RCS occorre esercitare una forza sufficiente a superare l'attrazione del magnete.

2. Orientare la nuova vaschetta del lavatore RCS in modo tale che il recipiente rettangolare bianco in plastica, all'atto dell'inserimento nel lavatore, si trovi a destra.
3. Applicare la nuova vaschetta del lavatore RCS sollevando il relativo collettore e facendo scorrere la vaschetta nel lavatore di micropiastre RCS.

La vaschetta del lavatore RCS si posizionerà con uno scatto quando è correttamente orientata e il magnete fa contatto con il lavatore micropiastre.

4. Abbassare il collettore del lavatore RCS in modo tale che poggi nel recipiente in plastica della vaschetta del lavatore RCS.

5. Nel software RCS, cliccare sull'icona **Run**.

In alternativa, selezionare **Script/Run Script**.

Si apre la finestra di dialogo **Scripts**, che elenca gli script disponibili.

6. Selezionare lo script **TestWash** (Test lavaggio) e fare clic su **OK**.
7. Quando compare una finestra di dialogo che richiede l'inserimento di una micropiastra di cattura sul lavatore micropiastre RCS, inserire la micropiastra di cattura nella vaschetta del lavatore RCS.

Importante: La micropiastra di cattura deve avere dei pozzetti in tutte le colonne, in quanto il lavatore per micropiastre RCS effettuerà il lavaggio di una micropiastra completa. L'utilizzo di una micropiastra di cattura incompleta potrebbe inondare il deck RCS.

8. Fare clic su **OK**.

L'RCS effettuerà il lavaggio della micropiastra di cattura. Al termine della procedura, comparirà la finestra principale del software RCS e l'esecuzione dei test potrà iniziare.

Se la sostituzione della vaschetta del lavatore RCS fallisce, contattare i QIAGEN Technical Services.

Appendice C – Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE)

La presente sezione fornisce informazioni sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici da parte degli utilizzatori.

Il simbolo del cassonetto barrato (vedi sotto) indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti, ma consegnato ad un'azienda di smaltimento autorizzata o ad un apposito centro di raccolta per il riciclaggio nel rispetto delle normative e leggi locali.



La raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti elettronici al momento dello smaltimento garantiscono la conservazione delle risorse naturali e assicurano che il prodotto venga riciclato nel rispetto della tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Su richiesta, il riciclaggio può essere effettuato da QIAGEN ad un costo supplementare. Nell'Unione Europea QIAGEN provvede al riciclaggio gratuito delle proprie apparecchiature elettroniche marcate WEEE e di eventuali prodotti sostitutivi forniti, conformemente ai requisiti specifici WEEE.

Appendice D — Dichiarazione FCC

La United States Federal Communications Commission (USFCC) ha dichiarato in 47 CFR 15.105 che gli utenti di questo prodotto devono essere informati dei seguenti fatti e circostanze.

Nota: il presente apparecchio è stato testato e riscontrato conforme ai limiti applicabili a un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono studiati per fornire una ragionevole protezione da interferenze nocive se l'apparecchio viene impiegato in ambienti ad uso commerciale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radio frequenza e, se non installato e utilizzato nel rispetto delle presenti istruzioni, può causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questo apparecchio in aree residenziali potrebbe causare interferenze nocive, nel qual caso l'utente è tenuto a correggere a proprie spese dette interferenze.

QIAGEN non è da ritenersi responsabile per eventuali interferenze radiotelevisive causate da modifiche non autorizzate del presente strumento oppure dalla sostituzione o dal collegamento di cavi di connessione e apparecchi diversi da quelli specificati da QIAGEN. L'utente sarà tenuto ad intervenire per correggere le interferenze causate da tali modifiche, sostituzioni o collegamenti non autorizzati.

Appendice E — Clausola di garanzia

QIAGEN è sollevata da tutti gli obblighi ai sensi della presente garanzia nel caso in cui vengano eseguite riparazioni o modifiche da persone diverse dal proprio personale, eccetto i casi in cui la società abbia dato il proprio consenso scritto ad eseguire tali riparazioni o modifiche.

Tutti i materiali sostituiti ai sensi della presente garanzia sono coperti da garanzia unicamente durante il periodo di garanzia originale e in nessun caso oltre la data di scadenza originale della garanzia originale, salvo autorizzazione scritta concessa da un funzionario della Società. I dispositivi di lettura, di interfaccia e il software collegato saranno garantiti solo per il periodo proposto dal fabbricante originale di tali prodotti. Eventuali dichiarazioni e garanzie rilasciate da chiunque, inclusi i rappresentanti di QIAGEN, che siano incoerenti o in conflitto con la presente garanzia non saranno vincolanti per la società salvo accordo scritto e approvato da un funzionario QIAGEN.

Indice analitico

- Accensione 44
- Account utenti 44
- Adattatori per puntali 29
- Agitatore 32
- Allagamento 108
- Annulla 96
- Attenzione 14
 - siringhe di vetro 17, 81
- Avvertenze 14
- Azione correttiva 104
- Braccio 28
- Braccio robotico 28
 - spostamento 94
- Campioni
 - citologici liquidi 38
 - digene* 38
- Clausola di garanzia 148
- Codici d'errore 104
- Collegamenti dei contenitori 34
- Collegamento del sistema 34
- Computer 35
- Contenitori 35
- Dati tecnici 142
- Deck RCS
 - caricamento dei materiali di consumo 64
 - caricamento dei reagenti 66
 - configurazione 62
 - layout 63
 - numerazione delle micropiastre 64
 - portaprovette per campioni 67
- Decontaminazione 82
 - controllo della contaminazione 82
- Dichiarazione
 - FCC 147
- Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici 146
- Dispositivo di movimentazione 30
- Dispositivo di scollegamento 18, 33
- Dispositivo robotizzato di movimentazione 30
- Flush
 - finestra degli script 103
- Fuoriuscite di liquidi, pulizia 18
- Icone 37
- Impilatore di micropiastre 31
- Impilatori 32
- Incubatrice di ibridizzazione 31
- Informazioni di sicurezza
 - ambiente 19
 - elettrica 18
 - fusibili 19
 - manutenzione 23
 - pericoli meccanici 21
 - pericolo termico 23
 - sicurezza biologica 20
 - simboli 24
 - smaltimento dei materiali di scarto 20
 - sostanze pericolose 21
 - uso corretto 14
- Ingresso dell'apparecchio 18, 33
- Installazione 42
- Interfaccia RS-232 34
- Interruttore di accensione/spengimento 33
- Interruttore di alimentazione 33
- Interruzione
 - riavvio 99
- Interruzione del sistema 104
- Lavaggio
 - icona 37
 - linee del sistema 78
 - tubazioni 69
- Lavatore di micropiastre 32
- Layout piastra 62
- Lettore dei codici a barre 35
- Luminometro 39
- Manutenzione
 - controllo della contaminazione 82
 - decontaminazione 82
 - mensile 77
 - semi-annuale 78
- Messa a terra 41
- MST Vortexer 2 38
- Nome dello script
 - esempi 49
- Pinze per micropiastre 30
- Pompa 29, 108
- Pompa a siringa 29
- Pompa peristaltica 29
- Portaprovette per campioni 38, 67, 68
 - calibratori 38
 - campioni 38
 - controlli qualità 38
 - posizionamento 69
 - posizionamento non corretto 86

utilizzo non corretto 85
 Posizioni di pipettaggio 31
 Processo 37
 Processo RCS
 avvio 69
 avvio del dosaggio 73
 caricamento dei portaprovette per
 campioni 72
 generazione dei risultati 73
 interruzione del sistema 95
 selezione dello script 70
 tempo di inattività massimo 98
 Processore campioni 29
 Programmi antivirus 43
 Pulizia
 fuoriuscite di liquidi 18
 lavaggio delle linee 78
 pulizia del contenitore dei residui con
 candeggina 80
 risciacquo dei contenitori 79
 risciacquo e riempimento delle linee 79
 routine 76
 siringhe 80
 Puntali
 insufficienti 64
 Rack recipienti reagente 31
 Reagente
 posizionamento non corretto 86
 Requisiti del sito 18, 19, 40, 142
 Requisiti di alimentazione 41, 142
 Rilevamento del livello del liquido 30, 67
 risoluzione dei problemi 88
 Risoluzione dei problemi
 adattatori per puntali 120
 agitatore per micropiastre 105
 dispositivo di movimentazione 115
 errore del campione 135
 errori non correlati al modulo 132
 incubatrice 104
 lavatore di micropiastre 107
 pipettaggio 120
 problemi relativi agli script 99
 rilevamento del livello del liquido 114
 rottura dello strumento 65
 selezione dello script 135
 siringhe 113
 Rottura strumento 65, 110, 114, 116,
 118, 119, 120, 126, 127
 Schermo di sicurezza 18, 21
 ScriptSelect 48
 aggiungere script alla Run List 53
 Details 59
 finestra principale 51
 nome dello script 49
 non disponibile 55, 57, 60
 View All Scripts 55
 View Definitions 61
 Sicurezza
 incubatrice di ibridizzazione 23, 64
 Simboli 24
 Siringa
 attenzione 17, 81
 pulizia 80
 sostituzione 82
 Siringhe 32
 Software
 analisi dei dosaggi *digene* 39
 icone 37
 RCS 37
 ScriptSelect 37, 48
 Software RCS
 sistema operativo 12
 Sosta 37
 Spegnimento 45
 Stazione di espulsione puntali 33
 Stazione lavaggio puntali 30
 Strumento DML 39, 73
 Tappo a discesa 69, 87
 Tubazioni
 eliminazione di aria 103
 UPS 40, 42
 Uso previsto 11
 Vaschetta lavatore RCS 63, 144

Questa pagina è stata lasciata in bianco intenzionalmente

Marchi commerciali: QIAGEN®, Sample to Insight®, *digene*®, Hybrid Capture®, Rapid Capture® (Gruppo QIAGEN); DuraSeal™ (Diversified Biotech); Kimtowels® (Kimberly-Clark Corporation); Microsoft®, Windows® (Microsoft Corporation); McAfee® (Intel Corporation); Mylar® (DuPont Teijin Films). I marchi, nomi registrati ecc. utilizzati nel presente documento, anche se non contrassegnati specificamente come tali, vanno considerati protetti dalla legge.

1058530 11/2015 © 2013–2015 QIAGEN, tutti i diritti riservati.

