

Maaliskuu 2022

Tärkeä ilmoitus

Hyvä *artus*[®] SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit -sarjan käyttäjä

QIAGEN on sitoutunut vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja pyrkii jatkuvasti tarjoamaan teille laadukkaita tuotteita ja palveluita. Sen vuoksi haluamme pitää teidät ajan tasalla *artus* SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit -sarjan käyttöohjeiden (käsikirja) sisältämien tietojen muutoksesta.

Käsikirjan taulukossa 17 Rotor-Gene[®] Q (RGQ) MDx -laitteen Yellow-kanavan analyysiparametrit sisältävät nyt **Poikkeavan arvon poisto: Reaktion tehokkuuden kynnyksarvon -85 %** (uusi parametri on sinisellä tekstillä alla olevassa taulukossa 1).

Taulukko 1. RGQ MDx -laitteen testiparametrit

Kanavat	Green	Red	Yellow
Fluoresenssikynnys	0,03	0,03	0,03
Kulmakertoimen korjaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Dynaaminen putki	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Mittauspiste	Ei	10-20	10-20
Poikkeavan arvon poisto Reaktion tehokkuuden kynnyksarvo	Kyllä Käytössä: 0 %	Ei	Kyllä Käytössä: -85 %
Rajatut aloitus sykli	5	5	5
Katkaistut sykli	Ct > 38,00 tulkitaan arvoksi 40,00	Ei	Ct > 35,00 tulkitaan arvoksi 40,00

Uusi analyysiparametri lisätään ehkäisemään potentiaalista invalidointia ja/tai virheellisesti positiivisia tuloksia, eikä muutos vaikuta tuotteen suorituskykyyn. Analyysiohjelmisto pysyy muuttumattomana.

Nämä tiedot lisätään myös käsikirjan myöhempisiin versioihin.

Jos teillä on vielä kysyttävää, ottakaa yhteyttä QIAGENin tekniseen palveluun tai paikalliseen QIAGENin edustajaan.

Parhain terveisin

QIAGEN-tiiminne