

Prosinac 2017.

# Popis laboratorijskih proizvoda — Komplet QIAasymphony<sup>®</sup> DSP HPV Media

Epruvete/stalci za uzorke i eluate koje se mogu rabiti s kompletom QIAasymphony DSP HPV Media te QIAasymphony SP (inačica softvera 5.0; paket za laboratorijske proizvode SOW-516-7)

Ovaj dokument predstavlja Komplet QIAasymphony DSP HPV Media, verzija 1, Popis laboratorijskih proizvoda R1 za paket za laboratorijske proizvode SOW-516-7.




## Opće informacije

Komplet QIASymphony DSP HPV Media je namijenjen za in vitro dijagnostičku uporabu.

Važno: Prije nego što se počnete koristiti ovim popisom laboratorijskih proizvoda, potvrdite njegovu konzistentnost s paketom za laboratorijske proizvode instaliranim na vašem sustavu QIASymphony.

Napomena: Komplet QIASymphony DSP HPV Media nije raspoloživ u Sjedinjenim Američkim Državama. Raspoloživost proizvoda možete provjeriti na internetskoj stranici [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

### Legenda

-  Zahtjevi: Ove epruvete predviđene su za primjenu u kombinaciji s ovim protokolom.
-  Korisnički definirano: Korisnik je odgovoran za definiranje i/ili validiranje na način koji smatra odgovarajućim.
-  Nije preporučeno: Ove epruvete nisu predviđene za primjenu u kombinaciji s ovim protokolom.

x/■ Minimalan volumen uzorka (µl) potreban po uzorku i protokolu (obilježeno s x)/moguća detekcija ugrušaka.

x/□ Minimalan volumen uzorka (µl) potreban po uzorku i protokolu (obilježeno s x)/nije moguća detekcija ugrušaka.

Napomena: Vodite računa da su raspoložive i druge epruvete koje se mogu primjenjivati u kombinaciji s kompletima QIASymphony, ali da njihovo korištenje nije preporučljivo za protokole koji se primjenjuju uz ovaj komplet.

## Pretinac za "Sample" (uzorke), nosač epruveta

Dobavljač	Materijal	Kat. br.	Naziv na zaslону osjetljivom na dodir	Umetak	Protokol	
					PC2500_HC2	SP800_HC2
BD*	14 ml Falcon® polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Ne zahtjeva se umetak	x/□	
QIAGEN	2 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	997055	QIA#997055 T2.0 Conical blue	03/3B		x/□

\* Raniji dobavljač ovih epruveta bila je tvrtka BD, a sada je tvrtka Corning Inc.

## Pretinac za "Eluate" (eluat)

Dobavljač	Materijal	Primjer kat. br.	Kategorija	Naziv na zaslonu osjetljivom na dodir	Adapter na slotovima za eluciju	Protokol	
						PC2500_HC2	SP800_HC2
QIAGEN	Hybridization microplate	6000-1203	Micro Plate	QIA#6000-1203 *MTP96 RB	Okruglo dno s 96 jažica QS (rashladni slot 1) Slotovi za eluciju 2-4 ne primjenjuju se za ovu proceduru		

\* Ukazuje na laboratorijski proizvod koji se može hladiti primjenom adaptera za hlađenje s ili bez kritičnog hoda.

Za informacije o naručivanju, posjetite internetsku stranicu [www.qiagen.com/goto/QIASymphony](http://www.qiagen.com/goto/QIASymphony).

## Povijest revizija

Povijest revizija dokumenta	
R1 12/2017	Ažuriranje za QIASymphony inačicu softvera 5.0

Za aktualne informacije o licencama i izjave o odricanju vezane za proizvod, pogledajte priručnik za odgovarajući komplet QIAGEN® ili korisničku uputu. Priručnici za komplete QIAGEN i korisničke upute raspoloživi su na internetskoj stranici [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) ili se mogu zatražiti od tehničke podrške tvrtke QIAGEN ili od lokalnog zastupnika.

Trgovački žigovi: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony® (QIAGEN Group); BD™ (Becton, Dickinson and Company); Corning®, Falcon® (Corning, Inc.). Registrirana imena, trgovački žigovi, itd, koji se primjenjuju u ovom dokumentu, čak i ako nisu označeni kao takvi, moraju se smatrati zaštićenim zakonom. 12/2017 HB-1554-L04-001 © 2017 QIAGEN, sva prava pridržana.

---

Naručivanje [www.qiagen.com/shop](http://www.qiagen.com/shop) | Tehnička podrška [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com) | Web stranica [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)