

# Mode d'emploi du QIASymphony® DSP Virus/Pathogen Kit (Fiche de protocole)

Protocole Complex200\_OBL\_V4\_DSP

Version 2

**IVD**

Pour utilisation diagnostique in vitro

À utiliser avec le QIASymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit

**CE**

**REF**

937036



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, Allemagne

R1 La fiche de protocole disponible au format électronique se trouve sous l'onglet Ressources, sur la page du produit sur [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Informations générales

Le QIASymphony DSP Virus/Pathogen Kit est destiné à être utilisé dans le cadre de diagnostics in vitro (IVD).

<b>Kit</b>	QIASymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit
Type d'échantillon	Échantillons respiratoires et urogénitaux
Nom du protocole	Complex200_OBL_V4_DSP
Jeu de contrôles de dosage par défaut	ACS_Complex200_OBL_V4_DSP
Données	Volume d'éluat : 60, 85 et 110 µl
Version logicielle requise	Version 4.0 ou ultérieure
Configuration logicielle requise pour l'utilisation IVD	Default Profile 1

## Tiroir « Sample » (Échantillon)

<b>Type d'échantillon</b>	Urine, échantillons urogénitaux sur écouvillons (dans un milieu de transport, p. ex. PreservCyt <sup>®</sup> , UTM, eNAT <sup>™</sup> ) et échantillons respiratoires sur écouvillons (écouvillons séchés ou dans un milieu de transport, p. ex. UTM, eNAT)
Volume d'échantillon	Pour plus d'informations, voir la liste du matériel de laboratoire, disponible sous l'onglet Ressources, sur la page du produit sur <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a> , selon le type de tube d'échantillon utilisé.
Volume d'échantillon traité	Pour plus d'informations, voir la liste du matériel de laboratoire, disponible sous l'onglet Ressources, sur la page du produit sur <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a>
Tubes d'échantillon primaires	Pour plus d'informations, voir la liste du matériel de laboratoire, disponible sous l'onglet Ressources, sur la page du produit sur <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a>
Tubes d'échantillon secondaires	Pour plus d'informations, voir la liste du matériel de laboratoire, disponible sous l'onglet Ressources, sur la page du produit sur <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a> , selon le type de tube d'échantillon utilisé.
Inserts	Pour plus d'informations, voir la liste du matériel de laboratoire, disponible sous l'onglet Ressources, sur la page du produit sur <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a> , selon le type de tube d'échantillon utilisé.
Autre	Mélange RNA (CARRIER)–Buffer AVE (AVE) nécessaire ; l'utilisation d'un contrôle interne est facultative

## Tiroir « Reagents and Consumables » (Réactifs et consommables)

<b>Position A1 et/ou A2</b>	Cartouche de réactif (RC)
Position B1	S.O.
Support de portoir à cônes 1 à 17	Cônes à filtre jetables, 200 µl
Support de portoir à cônes 1 à 17	Cônes à filtre jetables, 1500 µl
Support de boîtes 1 à 4	Boîtes contenant des cartouches de préparation d'échantillon
Support de boîtes 1 à 4	Boîtes contenant des 8-Rod Covers

S.O. = sans objet.

## Tiroir « Waste » (Déchets)

<b>Support de boîtes 1 à 4</b>	Boîtes vides
Support pour sac poubelle	Sac poubelle
Support pour flacon à déchets liquides	Flacon à déchets liquides

## Tiroir « Eluate » (Éluat)

Portoir d'éluat (il est recommandé d'utiliser la fente 1, position de refroidissement)

Pour plus d'informations, voir la liste du matériel de laboratoire, disponible sous l'onglet Ressources, sur la page du produit sur [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Matériel en plastique requis

Matériel en plastique	Un lot 24 échantillons*	Deux lots 48 échantillons*	Trois lots 72 échantillons*	Quatre lots 96 échantillons*
Disposable filter-tips, 200 µl†	96	96	128	128
Disposable filter-tips, 1500 µl†	128	192	224	288
Sample prep cartridges§	18	36	54	72
8-Rod Covers¶	3	6	9	12

\* La réalisation de plusieurs inventaires nécessite des cônes à filtre jetables supplémentaires. L'utilisation de moins de 24 échantillons par lot réduit le nombre requis de cônes à filtre jetables par cycle.

† Il y a 32 cônes à filtre par portoir à cônes.

‡ Le nombre de cônes à filtre requis correspond à 1 inventaire par cartouche de réactif.

§ Il y a 28 cartouches de préparation d'échantillon/boîte.

¶ Il y a douze 8-Rod Covers/boîte.

Remarque : les nombres de cônes à filtre indiqués peuvent différer des nombres affichés sur l'écran tactile en fonction des paramètres, par exemple le nombre de contrôles internes utilisés par lot.

## Volume d'éluat sélectionné

Volume d'éluat sélectionné (µl)*	Volume d'éluat initial (µl)†
60	90
85	115
110	140

\* Le volume d'éluat sélectionné sur l'écran tactile. Il correspond au volume d'éluat minimal accessible dans le tube d'éluat final.

† Le volume initial de solution d'éluat nécessaire pour assurer le même volume réel d'éluat que le volume sélectionné.

## Préparation du mélange contrôle interne–RNA (CARRIER)–Buffer AVE (AVE)

Volume d'éluat sélectionné (µl)	Volume de solution-mère d'ARN vecteur (CARRIER)	Volume de contrôle interne (µl)*	Volume de Buffer AVE (AVE) (µl)	Volume final par échantillon (µl)
60	3	9	108	120
85	3	11,5	105,5	120
110	3	14	103	120

\* Le calcul de la quantité de contrôle interne s'appuie sur les volumes d'éluat initiaux. Le volume mort supplémentaire dépend du type de tube d'échantillon utilisé ; pour plus d'informations, voir la liste du matériel de laboratoire disponible sous l'onglet Ressources, sur la page du produit sur [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

Remarque : les valeurs indiquées dans le tableau sont destinées à la préparation du mélange contrôle interne–ARN vecteur (CARRIER) pour un dosage en aval nécessitant 0,1 µl de contrôle interne/µl d'éluat.

## Lyse en dehors de l'instrument

Lors de la manipulation de produits chimiques, toujours porter une blouse de laboratoire, des gants jetables et des lunettes de protection adéquats. Pour plus d'informations, consulter les fiches de données de sécurité (FDS) appropriées, disponibles auprès du fournisseur des produits.

Les protocoles complexes QIASymphony comprennent 4 étapes : lyse, liaison, lavage, élution. Pour certains échantillons, il est utile d'effectuer la lyse manuellement, par exemple pour l'inactivation d'agents pathogènes dans une enceinte de biosécurité. Le protocole Complex200\_OBL\_V4\_DSP permet d'effectuer une lyse manuelle comme pour le protocole Complex200\_V6\_DSP. Les échantillons prétraités sont transférés sur le QIASymphony SP et traités selon le Complex200\_OBL\_V4\_DSP.

Remarque : le protocole Complex200\_OBL\_V4 nécessite du Buffer ACL et du Buffer ATL (ATL). Le Buffer ACL (n° de réf. 939017) et le Buffer ATL (ATL) (n° de réf. 939016) ne font pas partie du QIASymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit, ils doivent être commandés séparément.

### Lyse manuelle

1. Pipeter 20 µl de protéinase K, 100 µl de Buffer ATL (ATL), 120 µl de mélange ARN vecteur–contrôle interne et 190 µl de Buffer ACL dans un tube Sarstedt® de 2 ml (n° de réf. 72.693 ou 72.694).

Remarque : si plusieurs échantillons doivent être traités avec une lyse manuelle, une solution-mère de cette solution peut être préparée. Il suffit de multiplier les volumes requis pour un échantillon par le nombre total d'échantillons à traiter et d'ajouter le volume supplémentaire à l'équivalent de 2 échantillons supplémentaires. Retourner le tube plusieurs fois pour mélanger, transférer 430 µl dans un tube Sarstedt de 2 ml pour chaque échantillon puis passer à l'étape 4 pour chaque échantillon.

2. Fermer le bouchon et mélanger en retournant le tube 5 fois.
3. Centrifuger brièvement le tube afin d'éliminer les gouttelettes présentes dans le bouchon.
4. Ajouter 200 µl d'échantillon dans le tube, boucher celui-ci et passer au vortex par impulsions de 10 secondes.
5. Incuber le tube à 68 °C pendant 15 minutes.
6. Centrifuger brièvement le tube afin d'éliminer les gouttelettes présentes dans le bouchon.
7. Placer les inserts pour les tubes d'échantillon concernés dans un porte-tubes puis charger les tubes d'échantillon (sans bouchons).

## Préparation des échantillons

Éviter la formation de mousse dans ou sur les échantillons. Selon la nature de l'échantillon de départ, un traitement préalable peut être nécessaire. Amener tous les échantillons à température ambiante (15–25 °C) avant de lancer le cycle.

Remarque : la stabilité de l'échantillon dépend nettement de divers facteurs et concerne une application en aval spécifique. Elle a été définie pour les QIASymphony DSP Virus/Pathogen Kits avec des applications en aval types. L'utilisateur doit consulter le mode d'emploi de l'application en aval utilisée au sein de son laboratoire et/ou valider l'ensemble de la procédure afin de définir les conditions de conservation qui conviennent.

Pour les recommandations générales de prélèvement, transport et conservation, consulter la consigne du CLSI MM13-A « Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods » (Prélèvement, transport, préparation et conservation des échantillons en biologie moléculaire). Il convient en outre de respecter les consignes du fabricant relatives au dispositif/kit de prélèvement d'échantillon utilisé lors de la préparation, de la conservation, du transport et de la manipulation des échantillons.

## Urine

L'urine peut être conservée entre 2 et 8 °C jusqu'à 6 heures. Pour une conservation plus longue, il est recommandé de la congeler à -20 °C ou -80 °C. L'urine peut être traitée sans autre prétraitement. Le système est optimisé pour les échantillons d'urine pure qui ne contiennent aucun conservateur. Pour accroître la sensibilité aux agents pathogènes bactériens, les échantillons peuvent être centrifugés. Une fois le surnageant éliminé, le culot peut être remis en suspension dans au moins 200 µl de Buffer ATL (ATL) (n° de réf. 939016). Utiliser 200 µl du matériel prétraité comme échantillon pour la préparation de la lyse en dehors de l'instrument.

## Isolement de l'ADN génomique à partir de bactéries à Gram positif

La purification de l'ADN peut être améliorée pour certaines bactéries à Gram positif grâce au prétraitement enzymatique avant le transfert de l'échantillon dans le QIAasymphony SP et le démarrage du protocole Complex200\_OBL\_V4\_DSP.

1. Sédimenter les bactéries par centrifugation à 5 000 g pendant 10 minutes.
2. Suspendre le culot de bactéries dans 200 µl d'une solution enzymatique adaptée (20 mg/ml de lysozyme ou 200 µg/ml de lysostaphine dans 20 mM de Tris HCl, pH 8,0 ; 2 mM d'EDTA; 1,2 % Triton X-100).
3. Incuber à 37 °C au moins 30 minutes.
4. Centrifuger brièvement le tube afin d'éliminer les gouttes présentes dans le bouchon.
5. Utiliser 200 µl du matériel prétraité comme échantillon pour la préparation de la lyse en dehors de l'instrument.

## Échantillons visqueux ou muqueux

Certains échantillons peuvent être visqueux et nécessiter une liquéfaction pour pouvoir être pipetés. Les échantillons de faible viscosité ne nécessitent aucune préparation supplémentaire. Les échantillons de viscosité moyenne à élevée doivent être préparés comme suit :

1. Diluer l'échantillon à 1:1 avec du dithiothréitol (DTT) à 0,3% (M/V).  
Remarque : la solution de DTT à 0,3 % (M/V) peut être préparée à l'avance et conservée en aliquotes à -20 °C. Mettre les aliquotes décongelées au rebut après utilisation.
2. Incuber à 37 °C jusqu'à obtenir une viscosité d'échantillon adaptée au pipetage.
3. Utiliser 200 µl du matériel prétraité comme échantillon pour la préparation de la lyse en dehors de l'instrument.

## Liquides organiques et sécrétions sur écouvillons séchés

1. Plonger l'embout sec de l'écouvillon dans 450 µl de Buffer ATL (ATL) (n° de réf. 939016) et incuber à 56 °C pendant 15 minutes, en mélangeant sans cesse. S'il n'est pas possible de mélanger, passer au vortex avant et après l'incubation pendant au moins 10 secondes.
2. Sortir l'écouvillon et éliminer l'excédent de liquide en appuyant l'extrémité contre la paroi du tube.
3. Utiliser 200 µl du matériel prétraité comme échantillon pour la préparation de la lyse en dehors de l'instrument.  
Remarque : ce protocole est optimisé pour les écouvillons en coton ou en polyéthylène. Si d'autres types d'écouvillons sont utilisés, il peut être nécessaire d'ajuster le volume de Buffer ATL (ATL) pour être sûr d'avoir au moins 200 µl d'échantillon.

## Échantillons respiratoires ou urogénitaux sur écouvillons

Les échantillons urogénitaux sur écouvillons (dans un milieu de transport, p. ex. PreservCyt, UTM, eNAT) et les échantillons respiratoires sur écouvillons (écouvillons séchés ou dans un milieu de transport, p. ex. UTM, eNAT) peuvent être conservés entre 2 et 8 °C jusqu'à 6 heures. Pour une conservation plus longue, il est recommandé de les congeler à -20 °C ou -80 °C.

Les milieux de conservation pour les échantillons respiratoires ou urogénitaux sur écouvillons peuvent s'utiliser sans prétraitement. Si l'écouvillon n'a pas été retiré, l'appuyer contre la paroi du tube pour en extraire le liquide. Tout excédent de glaire dans l'échantillon doit alors être retiré par prélèvement sur écouvillon. Tout liquide résiduel des glaires ou de l'écouvillon doit être extrait en appuyant l'écouvillon contre la paroi du tube. Enfin, l'écouvillon et les glaires doivent être retirés puis mis au rebut. Si les échantillons sont visqueux, procéder à une liquéfaction (voir la section « Échantillons visqueux ou muqueux ») avant le transfert d'échantillon dans le QIASymphony SP. Si la quantité d'échantillon de départ est insuffisante, pipeter du Buffer ATL (ATL) dans le milieu de transport pour obtenir le volume de départ minimal requis et vortexer l'échantillon dans le tube pendant 15 à 30 secondes (si le milieu de transport contient l'écouvillon, effectuer cette étape avant de retirer l'écouvillon). Utiliser 200 µl du matériel comme échantillon pour la préparation de la lyse en dehors de l'instrument.

## Limitations et substances interférentes

Aucun impact négatif important de substances potentiellement interférentes n'a été observé (pour plus de détails, voir le document correspondant Caractéristiques de performances disponible sous l'onglet Ressources, sur la page du produit sur [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)).

Remarque : les tests ont été réalisés avec des applications en aval types à des fins d'évaluation de la qualité des acides nucléiques extraits. Mais des applications en aval diverses peuvent exiger des conditions diverses en matière de pureté (à savoir absence de substances potentiellement interférentes), il convient donc d'identifier et de tester les substances en question au regard des applications en aval pour toute procédure impliquant les QIASymphony DSP Virus/Pathogen Kits.






## Conservation des éluats

Remarque : la stabilité des éluats dépend nettement de divers facteurs et concerne une application en aval spécifique. Elle a été définie pour les QIASymphony DSP Virus/Pathogen Kits avec des applications en aval types. L'utilisateur doit consulter le mode d'emploi de l'application en aval utilisée au sein de son laboratoire et/ou valider l'ensemble de la procédure afin de définir les conditions de conservation qui conviennent.

Pour une conservation inférieure ou égale à 24 heures, il est recommandé de conserver les acides nucléiques purifiés entre 2 et 8 °C. Pour une conservation supérieure à 24 heures, il est recommandé de les conserver à -20 °C.

## Symboles

Les symboles suivants apparaissent dans ce document. Pour une liste complète des symboles utilisés dans le mode d'emploi ou apposés sur l'emballage et l'étiquetage, consulter le manuel.

Symbole	Définition du symbole
	Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne 2017/746 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
	Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Numéro de référence
<b>Rn</b>	R désigne une révision du mode d'emploi et n représente le numéro de révision
	Limites de température
	Fabricant

## Historique des révisions

Révision	Description
R1, juin 2022	Version 2, révision 1 <ul style="list-style-type: none"><li>Mise à jour vers la version 2 pour la conformité IVDR</li><li>Extension de la section Préparation des échantillons</li><li>Ajout de la section Limitations et substances interférentes</li><li>Ajout de la section Conservation des éluats</li><li>Ajout de la section Symboles</li></ul>

Pour les dernières informations sur les licences et les clauses limitatives de responsabilité spécifiques aux produits, consulter le manuel du kit ou le manuel d'utilisation QIAGEN® correspondant. Les manuels des kits et les manuels d'utilisation QIAGEN sont disponibles à l'adresse [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) ou peuvent être demandés auprès des services techniques QIAGEN ou de votre distributeur local.

Marques de commerce : QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony® (Groupe QIAGEN) ; eNAT™ (Copan Italia S.P.A.) ; PreservCy® (Hologic, Inc.) ; Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.). Les noms déposés, marques de commerce, etc. cités dans ce document doivent être considérés comme protégés par la loi, même s'ils ne sont pas spécifiquement signalés comme tels.  
06/2022 HB-3028-S02-001© 2022 QIAGEN, tous droits réservés.