

2020 m. rugpjūtis

## Svarbus pranešimas

„*therascreen*<sup>®</sup> EGFR RGQ PCR Kit (24)“, V2, REF 874111

„*therascreen*<sup>®</sup> EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)“, REF 870311

Gerb. „*therascreen* EGFR RGQ PCR Kit“ kliente,

Anksčiau informavome, kad QIAGEN peržiūrėjo „*therascreen* EGFR PCR Kit“ naudojimo instrukcijas, kad sumažintų riziką, kylančią dėl fluorescencijos artefaktų, dėl kurių tyrimai tampa netinkami arba dėl kurių gaunami klaidingai teigiami mutacijų rezultatai, ir siekia pabrėžti tinkamo reagentų sumaišymo svarbą. Kad būtų išvengta klaidingai teigiamų rezultatų dėl fluorescencijos artefaktų, pristatėme žemesnę delta C<sub>T</sub> ( $\Delta C_T$ ) kritinės ribos reikšmę ir papildomą ne automatiniu būdu atliekamą delta CT reikšmių ( $\Delta CT$ ) patikrą.

Šiuo svarbiu pranešimu norime jus informuoti, kad buvo atnaujintas „Rotor-Gene“ programinės įrangos automatinis rezultatų nustatymas ir išleisti nauji peržiūrėti atitinkamų rinkinių naudojimo vadovų leidimai:

- REF 874111 „*therascreen*<sup>®</sup> EGFR RGQ PCR Kit (24)“, V2, 7 peržiūrėtas leidimas
- REF 870311 „*therascreen*<sup>®</sup> EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)“, 5 peržiūrėtas leidimas

Į šiuos naujus peržiūrėtus leidimus įtrauktos visos atitinkamos naudojimo pakeitimų instrukcijos. Daugiau informacijos žr. atitinkamo „*therascreen* EGFR RGQ PCR Kit“ vadovo dokumento peržiūros istoriją.

Tyrimo paketą automatiniam rezultatų nustatymui (pasiekama tik REF 874111) galima atsisiųsti iš „*therascreen* EGFR RGQ PCR Kit“ produkto tinklalapio svetainėje **www.qiagen.com**. Eikite į „**Product Resources**“ (produkto ištekliai) > „**Supplementary Protocols**“ (papildomi protokolai), kad atsisiųstumėte tyrimo paketą.

---

Šio svarbaus pranešimo vertimai

QIAGEN pateikia spausdintą svarbų pranešimą anglų kalba. Svarbaus pranešimo vertimų elektroninės versijos pateikiamos nešiojamo dokumento formatu (PDF). Išverstus dokumentus rasite **www.qiagen.com** atitinkamo produkto puslapyje skirtame „Product Resources“ (produkto ištekliai).

Jei turite klausimų ar abejonių, susisiekite su savo vietiniu QIAGEN techninės pagalbos skyriumi. Kontaktinę informaciją rasite apsilankę toliau nurodytuose tinklalapiuose:

QIAGEN filialai:

**<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>**

QIAGEN komercijos partneriai ir importuotojai:

**<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>**

Pagarbiai

QIAGEN

**www.qiagen.com**