
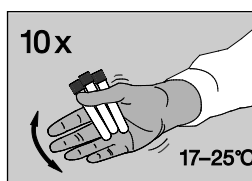


Za primjenu
s kompletom
QuantiFERON-CMV
ELISA (kataloški
broj 0350-0201).

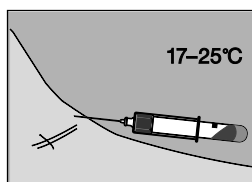

QuantiFERON®-CMV

Epruvete za prikupljanje krvi

Pakiranje za jednog pacijenta

Kataloški broj 0192-0301

①

SADRŽAJ

Epruvete za prikupljanje krvi 3x 1 ml QF CMV (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1 Uputa proizvođača

Za više informacija proučite *Uputu proizvođača QuantiFERON-CMV*, koja se može naći na www.QuantiFERON.com.

PRIKUPLJANJE KRVI

②

⚠ UPOZORENJE:

- Vrijede standardne mjere opreza prilikom prikupljanja krvi.
- Epruvete se mogu pohraniti pri temperaturama 4 °C–25 °C i trebaju biti na sobnoj temperaturi (17 °C–25 °C) cijelo vrijeme uporabe.

Prikupite krv venepunkcijom.

Primjenom vakuuma napunite epruvetu krvlju do crne oznake (1 ml). Protok krvi može biti spor. Držite epruvetu 2-3 sekunde nakon što krv prestane teći. Napunite istu epruvetu s više krvi, ako postojeća razina krvi u epruveti nije blizu oznake.

Tehnički savjet

Leptir-igle – istisnite zrak iz epruvete praznom epruvetom (ne isporučuje se u kompletu) prije punjenja epruveta QuantiFERON-CMV.

PRIKUPLJANJE KRVI

Neposredno nakon punjenja epruveta protresite ih deset (10) puta, dovoljno energično kako biste osigurali da je cijela unutarnja površina epruvete obložena krvlju kako bi se otopili antigeni na stijenkama epruvete.

③




U vrijeme punjenja krvlju epruvete moraju biti na temperaturi od 17 do 25 °C.

Prejako protresivanje epruvete može uzrokovati remećenje gela i odstupanje u rezultatima.

Označite epruvete na odgovarajući način.



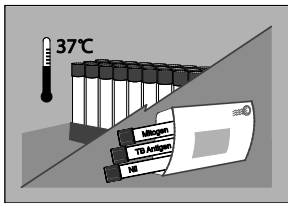

OTPREMA / INKUBACIJA

④

Otpremite epruvete u laboratorij pri temperaturi 17–27 °C. Krv treba što prije inkubirati pri temperaturi od 37 °C (te unutar 16 sati od prikupljanja).


Osoblje laboratorija treba ponovno promiješati epruvete neposredno prije inkubacije na 37 °C.

Tehnički savjet

Označite epruvete kao “Nisu inkubirane”.

OPCIJA 1

Inkubacija u laboratoriju

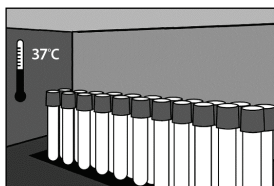

OTPREMA / INKUBACIJA

⑤

Krv treba što prije inkubirati (te unutar 16 sati od prikupljanja). Inkubirajte epruvete u uspravnom položaju pri temperaturi od 37 °C tijekom 16 do 24 sati.

Inkubatore je moguće nabaviti od tvrtke QIAGEN.


Tehnički savjet

Vlaga/CO₂ nije potreban.

OPCIJA 2

Inkubacija na lokaciji prikupljanja

Ako epruvete nisu inkubirane na 37 °C nakon prikupljanja, potrebno je ponovno promiješati epruvete prevrtanjem 10 puta neposredno prije inkubacije.

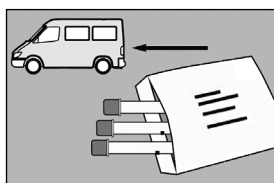

OTPREMA / INKUBACIJA

⑥


Otpremite inkubirane epruvete u laboratorij za testiranje (unutar 3 dana, ako nisu centrifugirane).

Epruvete čuvajte na temperaturi od 4 do 27 °C.

Tehnički savjet

Označite epruvete kao “Inkubirane”.

OPCIJA 2 (nastavak)

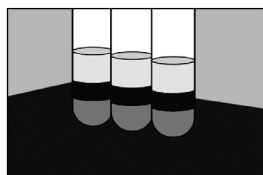

CENTRIFUGIRANJE

⑦

Prije uzorkovanja centrifugirajte epruvete.

Brzina centrifugiranja mora biti 2000-3000 g tijekom 15 minuta.

Plazma u centrifugiranim epruvetama stabilna je tijekom 28 dana kad se pohrani na 2 do 8 °C.

Za ažurirane informacije o licenciranju i izjave o odricanju odgovornosti za specifični proizvod proučite uputu proizvođača QuantiFERON-CMV ELISA.

INFORMACIJE ZA KONTAKT

⑧

QIAGEN

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Zaštićene trgovačke marke: QIAGEN®, QuantiFERON® (QIAGEN grupa).

© 2017 QIAGEN, sva prava pridržana

1075109HR Rev. 01 01/2017



QIAGEN

19300 Germantown Road
Germantown, MD 20874
SAD
+1-800-426-8157



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Njemačka



Sample & Assay Technologies