

Důležitá poznámka

Důležité informace o produktu pro použití přístroje EZ2® Connect MDx

Vážený zákazníku přístroje EZ2 Connect MDx,

v tomto upozornění Vám přinášíme důležité informace, které musíte vzít v úvahu, než začnete na svém novém přístroji EZ2 Connect MDx pracovat:

Výchozí jazyk přístroje EZ2 Connect MDx je nastaven na angličtinu. V případě, že potřebujete změnit nastavení jazyka podle oddílu 5.3.7 Nastavení jazyka *uživatelské příručky k přístroji EZ2 Connect MDx* a v rozevíracím seznamu je k dispozici pouze angličtina (jak je znázorněno na obrázku 2), postupujte podle níže uvedených pokynů a nainstalujte si další jazykové balíčky.

Postup instalace jazykových balíčků

1. Před použitím přístroje EZ2 Connect MDx je zcela zásadní, abyste si důkladně přečetli dokument *EZ2 Connect MDx – bezpečnostní pokyny a stručná úvodní příručka* a věnovali pozornost informacím o bezpečnosti.

Důležité: *Uživatelská příručka k přístroji EZ2 Connect MDx*, stručná úvodní příručka a překlady obou dokumentů jsou dostupné v elektronické podobě ve formátu PDF. Tyto dokumenty lze stáhnout z karty **Product Resources** (Produktové zdroje) na webové stránce produktu EZ2 Connect MDx (www.qiagen.com/products/ez2-connect-mdx/).


2. Zapněte přístroj podle pokynů uvedených ve stručné úvodní příručce v kapitole „Nastavení přístroje EZ2 Connect MDx“.

3. Pro stažení jazykového balíčku pro přístroj EZ2 Connect MDx navštivte webovou stránku produktu EZ2 Connect MDx www.qiagen.com/products/ez2-connect-mdx/ a přejděte na kartu **Product Resources** (Produktové zdroje). Při stahování se vytvoří ZIP soubor. Na počítači s operačním systémem Microsoft® Windows® stáhněte a přeneste ZIP soubor do hlavní složky USB flash disku dodaného s přístrojem EZ2 Connect MDx a extrahujte tam ZIP soubor. Po extrakci by mělo být k dispozici 5 jazykových souborů (czech.ez2u, french.ez2u, german.ez2u, italian.ez2u a spanish.ez2u). Zkontrolujte, zda se požadovaný jazykový soubor nachází v hlavní adresáři USB flash disku.

Důležité: Používejte pouze USB flash disk dodávaný společností QIAGEN®. Nepřipojujte do USB portů jiné USB flash disky.

4. Připojte USB flash disk s jazykovým balíčkem.


5. Na panelu nástrojů klepněte na položku **Configuration** (Konfigurace).

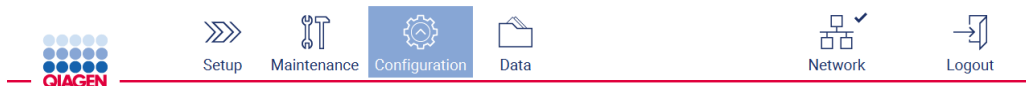

Obrázek 1. Tlačítko **Configuration** (Konfigurace) na panelu nástrojů.

6. Klepněte na položku **Language** (Jazyk).


7. Máte možnost buď nahrát nový jazykový balíček a zpřístupnit tak nový jazyk, nebo změnit nastavení jazyka.

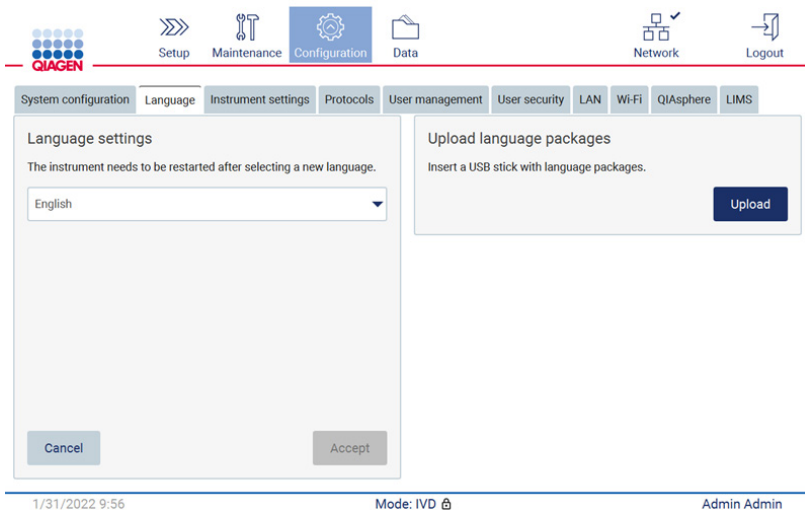

Obrázek 2. Záložka Language (Jazyk).

8. Klepněte na tlačítko **Upload** (Nahrát) v okně „Upload language packages“ (Nahrát jazykové balíčky).


9. Pokud byly na USB disku zjištěny jazykové balíčky pro nahrávání, zobrazí se vyskakovací okno.

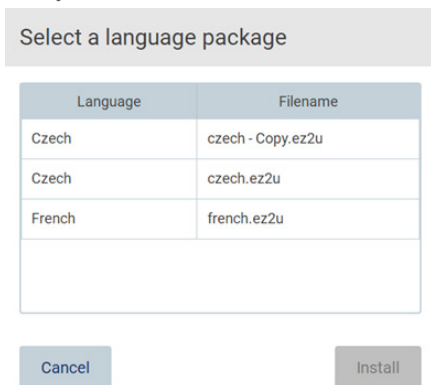


Obrázek 3. Vyskakovací okno s jazykovým balíčkem.

10. Vyberte požadovaný jazykový balíček a klepněte na tlačítko **Install** (Instalovat).
Najednou lze nahrát pouze jeden jazykový balíček.


11. Měla by se zobrazit zpráva o úspěšném nahrání:

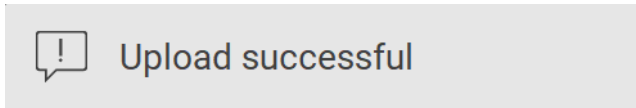

The language package was successfully uploaded.

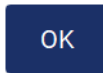

12. Na obrazovce Language (Jazyk) klepněte na rozbalovací seznam **Language settings** (Nastavení jazyka). Nyní by se měl nahráný jazyk/jazyky objevit v seznamu:

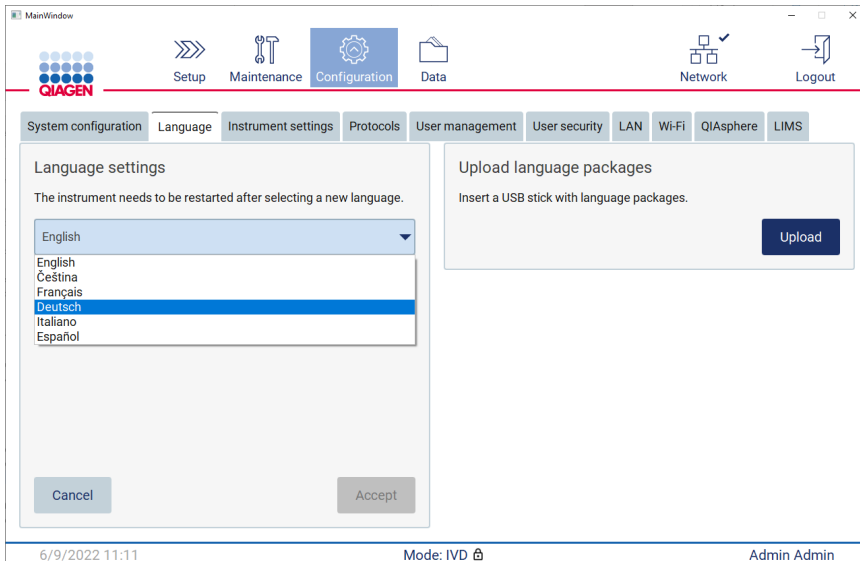

13. Vyberte požadovaný jazyk.

14. Klepněte na tlačítko **Accept** (Přijmout).

Poznámka: Pro nastavení vybraného jazyka bude nutné přístroj EZ2 Connect MDx restartovat.

Podrobné pokyny k aktualizaci softwaru a instalaci/aktualizaci protokolů naleznete v *uživatelské příručce přístroje EZ2 Connect MDx*, která je k dispozici na webové stránce produktu EZ2 Connect MDx www.qiagen.com/products/ez2-connect-mdx/.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na technické služby společnosti QIAGEN nebo na místního zástupce společnosti QIAGEN.

S pozdravem

společnost QIAGEN

Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ2® (QIAGEN Group); Microsoft®, Windows® (Microsoft Corporation). Registrované názvy, ochranné známky atd. použité v tomto dokumentu, i když nejsou výslovně takto označeny, nelze považovat za nechráněné zákonem.
09/2022 HB-3124-001© 2022 QIAGEN, všechna práva vyhrazena.