

Kasutamiseks
QuantiFERON-CMV
ELISA komplektiga
(katalooginr
0350-0201).

QuantiFERON®-CMV

①

verekogumiskatsutid
ühe patsiendi pakend
Katalooginr 0192-0301

SISU


3x 1 ml QF CMV verekogumiskatsuti (Nil, CMV Antigen,
Mitogen)

1x infoleht

Lisateavet leiata *QuantiFERON-CMV infolehest* veebisaidil
www.QuantiFERON.com.

VERE VÕTMINE

②

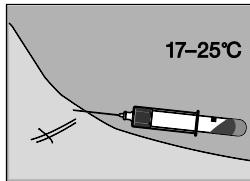

! HOIATUS

- Järgige standardseid vere käsitlemise ettevaatusabinõusid.
- Katsuteid tuleb hoiudada temperatuuril 4–25 °C ja kasutamise ajal peavad need olema toatemperatuuril (17–25 °C).

Võtke verd veenist.

Vaakumi abil täitub katsuti musta tähiseni (1 ml). Verevool võib olla aeglane. Hoidke katsutit nõela küljes 2–3 sekundit pärast verevoolu peatumist. Kui verekogus ei ulatu tähiseni, võtke verd juurde.


Tehniline näpunäide

Libliknõelad – valmistage voolikud enne QuantiFERON-CMV katsutite täitmist ette tühjendamiskatsutiga (ei kuulu komplekti).

VERE VÕTMINE

③

Raputage katsuteid kohe pärast nende täitmist kümme (10) korda piisava tugevusega, et katsuti kogu sisepind oleks verega kaetud ja katsuti seintel olevad antigeenid lahustuksid.

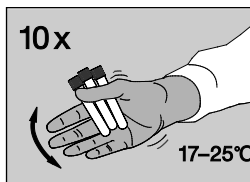


Katsutite temperatuur peab vere võtmise ajal olema vahemikus 17–25 °C.

Liiga energiline raputamine võib geeli lagundada ja põhjustada valesid tulemusi.

Sildistage katsutid vastavalt nõuetele.



Sample & Assay Technologies

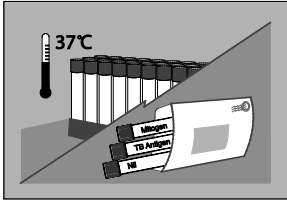

TRANSPORT/INKUBEERIMINE

④


Katsutite temperatuur peab laborisse transportimisel olema vahemikus 17–27 °C. Veri tuleb inkubeerida võimalikult kiiresti 37 °C juures (kuni 16 tunni jooksul pärast vere võtmist).

Labori töötajad peavad verd uuesti segama vahetult enne 37 °C juures inkubeerimist.

Tehniline näpunäide

Tähistage katsutid märkusega „inkubeerimata”.

1. VÕIMALUS Laboris inkubeerimine

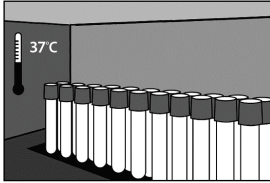

TRANSPORT/INKUBEERIMINE

⑤

Veri tuleb inkubeerida võimalikult kiiresti (kuni 16 tunni jooksul pärast vere võtmist). Inkubeerige katsuteid püstasendis 37 °C juures 16–24 tundi.


QIAGEN võib tarnida inkubaatoreid.

Tehniline näpunäide

Niiskust/CO₂ pole vaja.

2. VÕIMALUS Inkubeerimine verevõtukohas

Kui katsuteid ei inkubeerita 37 °C juures vahetult pärast vere võtmist, tuleb veri uuesti vahetult enne inkubeerimist segada, pöörates katsuti kümme korda tagurpidi.

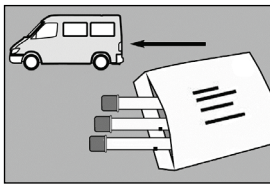

TRANSPORT/INKUBEERIMINE

⑥


Transportige inkubeeritud katsutid katselaborisse (kolme päeva jooksul, kui pole tsentrifuugitud).

Hoiundage katsuteid temperatuuril 4–27 °C.

Tehniline näpunäide

Tähistage katsutid märkusega „inkubeeritud”.

2. VÕIMALUS (jätkatud)

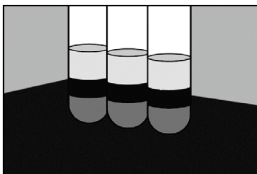

TSENTRIFUUGIMINE

⑦

Tsentrifuugige katsuteid enne proovide analüüsimist.

Keerutage kiirendusega 2000–3000 g 15 minutit.

Tsentrifuugitud katsutites olev plasma on stabiilne 28 päeva, kui hoiundatakse temperatuuril 2–8 °C.

Ajakohase litsentsiteabe ja tootekohased lahtiütlemised leiate QuantiFERON-CMV ELISA infolehest.

KONTAKTANDMED

⑧

QIAGEN

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East / Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

USA / Canada: techservice-na@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com

www.QuantiFERON.com

Kaubamärgid: QIAGEN®, QuantiFERON® (QIAGEN-i kontsern).

© 2017 QIAGEN. Kõik õigused on kaitstud.

1075109ET Vers. 01 01/2017



QIAGEN
19300 Germantown Road
Germantown, MD 20874
USA
+1-800-426-8157



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Saksamaa



Sample & Assay Technologies