

Február 2022

# Používateľská príručka pre Rotor-Gene<sup>®</sup> Q MDx CE



IVD

CE

REF

9002022, 9002032, 9002042



QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, NEMECKO

R1

# Obsah

1	Úvod .....	8
1.1	Informácie o tejto používateľskej príručke .....	8
1.2	Všeobecné informácie .....	9
1.2.1	Technická podpora .....	9
1.2.2	Vyhlásenie o politike .....	10
1.2.3	Správa verzií .....	10
1.3	Zamýšľané použitie prístroja Rotor-Gene Q MDx .....	10
1.3.1	Požiadavky pre prístroj Rotor-Gene Q MDx .....	10
1.4	Potrebné materiály .....	11
1.5	Požadované materiály, ktoré sa nedodávajú .....	11
2	Bezpečnostné informácie .....	12
2.1	Správne použitie .....	13
2.2	Elektrická bezpečnosť .....	15
2.3	Biologická bezpečnosť .....	16
2.4	Chemická bezpečnosť .....	17
2.5	Likvidácia odpadu .....	18
2.6	Mechanická riziká .....	18
2.7	Bezpečnosť údržby .....	20
2.8	Symbyly na prístroji Rotor-Gene Q MDx .....	21
3	Všeobecný popis .....	22
3.1	Princíp prístroja Rotor-Gene Q MDx .....	22
3.1.1	Tepelný výkon .....	22
3.1.2	Optický systém .....	23
3.1.3	Dostupné kanály .....	24
3.2	Externé funkcie prístroja Rotor-Gene Q MDx .....	25
3.2.1	Ventilačné otvory na veku .....	25
3.2.2	Rúčka veka .....	25
3.2.3	Komora rotora .....	25
3.2.4	Stavové kontrolky prístroja .....	25

3.3	Interné funkcie prístroja Rotor-Gene Q MDx .....	26
3.3.1	Stred rotora.....	26
3.3.2	Optická šošovka .....	26
	Optická šošovka je miesto, do ktorého sa zameria svetlo budiacej diódy na skúmavkách. ....	26
4	Postupy inštalácie .....	27
4.1	Dodanie a inštalácia systému.....	27
4.1.1	Vybalenie prístroja Rotor-Gene Q MDx .....	27
4.1.2	Inštalácia hardvéru .....	28
4.1.3	Inštalácia softvéru.....	29
4.1.4	Verzia softvéru.....	32
4.1.5	Doplnkový softvér na počítačoch pripojených k prístrojom Rotor-Gene Q MDx .....	32
4.2	Požiadavky na pracovisko .....	39
4.3	Elektrická prípojka .....	40
4.3.1	Požiadavky na napájanie .....	40
4.3.2	Požiadavky na uzemnenie .....	40
4.3.3	Inštalácia napájacieho kábla.....	40
4.4	Konfigurácia bezpečnosti pre operačný systém Windows.....	40
4.5	Požiadavky pracovnej stanice .....	42
4.6	Vybalenie a inštalácia prístroja Rotor-Gene Q MDx .....	43
4.6.1	Prechod na vyššiu verziu softvéru .....	44
4.7	Príslušenstvo.....	44
4.8	Opätovné zabalenie a odoslanie prístroja Rotor-Gene Q MDx.....	44
4.9	Začíname .....	44
4.9.1	Zapnutie prístroja Rotor-Gene Q MDx a pracovnej stanice .....	44
5	Prevádzkové postupy.....	45
5.1	Použitie softvéru Rotor-Gene Q MDx .....	45
5.1.1	Sprievodca Quick Start (rýchle spustenie).....	45
5.1.2	Sprievodca Advanced.....	49
5.2	Použitie hardvéru prístroja Rotor-Gene Q MDx.....	67

5.2.1	Typy rotorov.....	67
5.2.2	Príprava reakcie .....	70
5.2.3	Nastavenie krúžku Rotor-Disc .....	73
6	Používateľské rozhranie analýzy .....	77
6.1	Pracovný priestor .....	77
6.2	Nástrojová lišta.....	77
6.3	Prezerať nespracované kanály.....	77
6.4	Prepísanie vzoriek.....	78
6.5	Ponuka súboru .....	80
6.5.1	Nový .....	80
6.5.2	Otvoriť a uložiť .....	81
6.5.3	Správy .....	82
6.5.4	Nastavenie.....	83
6.6	Ponuka analýzy .....	84
6.6.1	Analýza.....	84
6.6.2	Kvantifikácia .....	85
6.6.3	Dve kalibračné krivky.....	97
6.6.4	Relatívna kvantifikácia delta delta C <sub>T</sub> .....	101
6.6.5	Analýza krivky topenia.....	104
6.6.6	Komparatívna kvantifikácia.....	107
6.6.7	Aleická diskriminácia.....	109
6.6.8	Analýza bodového grafu .....	111
6.6.9	Analýza EndPoint .....	112
6.6.10	Analýza koncentrácie.....	119
6.6.11	Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia.....	122
6.7	Ponuka cyklu.....	123
6.7.1	Spustenie cyklus.....	123
6.7.2	Pozastavenie cyklu .....	123
6.7.3	Zastavenie cyklu .....	124
6.8	Ponuka prehliadania.....	124
6.8.1	Nastavenia cyklu .....	124

6.8.2	Teplotný graf.....	127
6.8.3	Progres profilu .....	128
6.8.4	Úprava vzoriek.....	129
6.8.5	Možnosti zobrazenia.....	134
6.9	Ochrana prístupu do softvéru Rotor-Gene Q.....	135
6.9.1	Konfigurácia pre operačný systém Windows 7 .....	136
6.9.2	Konfigurácia pre operačný systém Windows 10 .....	141
6.9.3	Spustenie viacerých používateľov na rovnakom počítači .....	143
6.9.4	Preverovacie zoznamy .....	144
6.9.5	Podpisy cyklu.....	146
6.9.6	Zamknutie vzorky .....	147
6.9.7	Zamknuté templáty .....	149
6.10	Ponuka výťažku .....	149
6.11	Ponuka okna.....	150
6.12	Funkcia pomoci.....	150
6.12.1	Odoslanie e-mailu pre podporu .....	151
7	Doplnkové funkcie.....	155
7.1	Templáty analýzy .....	155
7.2	Otvorenie druhého cyklu .....	155
7.3	Možnosti používania stupnice .....	155
7.4	Exportovanie grafov .....	156
7.5	Ikona kľúča.....	159
7.6	Možnosti zvolenej oblasti .....	160
8	Údržba .....	161
8.1	Čistenie povrchu prístroja Rotor-Gene Q MDx.....	161
8.2	Dekontaminácia povrchu prístroja Rotor-Gene Q MDx .....	162
8.3	Oprava prístroja Rotor-Gene Q .....	162
9	Optická verifikácia teploty .....	163
9.1	Princíp OTV.....	163
9.2	Komponenty súpravy Rotor-Disc OTV Kit .....	164
9.3	Spustenie OTV.....	164

10	Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia .....	167
10.1	Prístroje.....	168
10.2	Chemické látky.....	169
10.3	Genotypizačný príklad SNP .....	169
10.4	Príklad analýzy metylácie.....	171
10.5	Odporúčania pre úspešnú analýzu HRM .....	172
10.6	Príprava vzorky .....	174
10.7	Nastavenie softvéru .....	174
10.8	Analýza údajov z real-time PCR .....	180
10.9	Analýza HRM údajov .....	181
11	Riešenie problémov .....	185
11.1	Archívy záznamov.....	186
11.2	Chyby hardvéru a softvéru .....	186
11.2.1	Riešenie problémov s HRM .....	186
11.3	Chybové a výstražné hlásenia .....	187
11.3.1	Všeobecné chyby prístroja .....	187
11.3.2	Hlásenia softvéru Rotor-Gene Q .....	190
12	Glosár .....	194
13	Technické špecifikácie .....	195
13.1	Podmienky okolia – prevádzkové podmienky .....	195
13.2	Podmienky transportu .....	195
13.3	Podmienky skladovania .....	195
13.4	Mechanické údaje a charakteristiky technického vybavenia .....	195
13.5	Špecifikácie (hardvér a softvér).....	196
13.5.1	Tepelné špecifikácie .....	196
13.5.2	Optické špecifikácie.....	196
14	Príloha A – právne informácie.....	197
14.1	Vyhlásenie FCC .....	197
14.2	Zhoda s normou IEC EN 61326 .....	198
14.3	Vyhlásenie o zhode.....	199
14.4	Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) .....	200

---

14.5	Doložka o zodpovednosti .....	201
14.6	Licenčná zmluva pre softvér .....	202
15	Príloha B – matematické postupy .....	205
15.1	Kvantifikácia .....	205
15.1.1	Intervaly spoľahlivosti pre vypočítané koncentrácie .....	205
15.1.2	Intervaly spoľahlivosti pre hodnoty CT .....	206
16	Informácie o objednávaní .....	207
16.1	Produkty, príslušenstvo a spotrebný materiál prístroja Rotor-Gene Q MDx...207	
17	História úprav dokumentu .....	211

# 1 Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali prístroj Rotor-Gene Q MDx. Sme presvedčení, že sa stane neoddeliteľnou súčasťou vášho laboratória.

Pred použitím prístroja Rotor-Gene Q MDx je dôležité, aby ste si pozorne prečítali túto používateľskú príručku a venovali osobitnú pozornosť bezpečnostným informáciám. Pokyny a bezpečnostné informácie v používateľskej príručke sa musia dodržiavať, aby sa zabezpečila bezpečná funkcia prístroja a aby sa prístroj udržiaval v bezpečnom stave.

Nezabudnite, že prístroj Rotor-Gene Q MDx sa dodáva v niekoľkých konfiguráciách. Podrobné informácie, vrátane informácií o objednávke, nájdete v časti 16.

## 1.1 Informácie o tejto používateľskej príručke

Táto používateľská príručka poskytuje informácie o analyzačnom softvéri Rotor-Gene Q MDx v týchto častiach:

- Úvod
- Bezpečnostné informácie
- Všeobecný popis
- Postupy inštalácie
- Prevádzkové postupy
- Údržba
- Riešenie problémov
- Technické špecifikácie
- Prílohy

Dodatky obsahujú nasledujúce informácie:

- Príloha A – právne informácie
- Príloha B – matematické postupy



## 1.2 Všeobecné informácie

### 1.2.1 Technická podpora

V spoločnosti QIAGEN® sme hrdí na kvalitu a dostupnosť našej technickej podpory. Na našich oddeleniach technického servisu pracujú skúsení vedci s rozsiahlymi praktickými a teoretickými poznatkami v oblasti molekulárnej biológie a používania výrobkov od spoločnosti QIAGEN. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s prístrojom Rotor-Gene Q MDx alebo všeobecne s výrobkami od spoločnosti QIAGEN, neváhajte nás kontaktovať.

Zákazníci spoločnosti QIAGEN sú hlavným zdrojom informácií týkajúcich sa pokročilých alebo špecializovaných použití našich výrobkov. Tieto informácie sú užitočné pre iných vedcov, ako aj pre výskumných pracovníkov spoločnosti QIAGEN. Preto vám odporúčame, aby ste nás kontaktovali, ak máte akékoľvek návrhy týkajúce sa výkonnosti výrobku alebo nových aplikácií a techník.

Pre technickú pomoc sa obráťte na technický servis spoločnosti QIAGEN.

Aktuálne informácie o prístroji Rotor-Gene Q MDx nájdete na adrese <https://www.qiagen.com/products/instruments-and-automation/pcr-instruments/rotor-gene-q-mdx/>.

Webová stránka: [support.qiagen.com](https://support.qiagen.com)

Pri kontaktovaní technického servisu spoločnosti QIAGEN kvôli chybám si pripravte nasledujúce informácie:

- Sériové číslo, typ a verzia softvéru Rotor-Gene Q MDx
- kód chyby (ak je to relevantné)
- okamih, kedy sa chyba vyskytla prvýkrát
- frekvencia výskytu chýb (t. j. občasná alebo trvalá chyba)
- kópia súborov protokolu

## 1.2.2 Vyhlásenie o politike

Politikou spoločnosti QIAGEN je zlepšovať produkty, keď budú k dispozícii nové techniky a komponenty. Spoločnosť QIAGEN si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie. V snahe vytvoriť užitočnú a vhodnú dokumentáciu si vážime vaše pripomienky k tejto používateľskej príručke. Kontaktujte technické služby spoločnosti QIAGEN.

## 1.2.3 Správa verzií

Tento dokument je *používateľská príručka pre Rotor-Gene Q MDx*, revízia R1, pre prístroje Rotor-Gene Q MDx pomocou softvéru Rotor-Gene Q verzie 2.3.x (kde x je  $\geq 0$ ).

## 1.3 Zamýšľané použitie prístroja Rotor-Gene Q MDx

Prístroj Rotor-Gene Q MDx je navrhnutý na vykonávanie termálneho cyklovania v reálnom čase, detekcie a/alebo kvantifikácie pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (Polymerase Chain Reaction, PCR) v klinických podmienkach.

Prístroj Rotor-Gene Q MDx je určený na použitie len v kombinácii so súpravami QIAGEN určenými na použitie s prístrojmi Rotor-Gene Q v aplikáciách popísaných v príslušných príručkách k súpravám QIAGEN.

Ak sa prístroj Rotor-Gene Q MDx používa s inými súpravami než súpravami QIAGEN, zodpovednosťou používateľa je overiť si výkonnosť tejto kombinácie produktov pre danú konkrétnu aplikáciu.

Prístroj Rotor-Gene Q MDx je určený na použitie pri diagnostike in vitro.

Prístroj Rotor-Gene Q MDx je určený na použitie profesionálnymi používateľmi, ako sú technici a lekári vyškolení v molekulárno-biologických postupoch a prevádzke prístrojov Rotor-Gene Q MDx.

### 1.3.1 Požiadavky pre prístroj Rotor-Gene Q MDx

Tabuľka nižšie obsahuje hlavné stupne odbornosti a školenia, ktoré sú nutné pre transport, inštaláciu, použitie, údržbu a servis systémov Rotor-Gene Q MDx.

Úloha	Personál	Školenie a skúsenosti
Dodanie	Žiadne špeciálne požiadavky	Žiadne špeciálne požiadavky
Inštalácia	Laboratórni technici alebo obdobný personál	Adekvátne vyškolené a skúsené osoby, ktoré sú oboznámené s použitím počítača a automatizácie všeobecne
Bežné použitie (spracovanie protokolov)	Laboratórni technici alebo obdobný personál	Profesionálni používatelia, napr. technici alebo lekári vyškolení v technikách molekulárnej biológie
Bežná údržba	Laboratórni technici alebo obdobný personál	Profesionálni používatelia, napr. technici alebo lekári vyškolení v technikách molekulárnej biológie
Opravy a ročná údržba	Iba terénni servisní špecialisti spoločnosti QIAGEN	Pravidelne preškolení, certifikovaní a poverení spoločnosťou QIAGEN

## 1.4 Potrebne materiály

**Poznámka:** Používajte len príslušenstvo dodané spoločnosťou QIAGEN.

- Rotor-Gene Q MDx 5Plex (kat. č. 9002020)
- Rotor-Gene Q MDx 5Plex HRM (kat. č. 9002030)
- Rotor-Gene Q MDx 6Plex (kat. č. 9002040)
- Laptop (kat. č. 9026760)
- 72-Well Rotor (kat. č. 9018903)
- Locking Ring 72-Well Rotor (kat. č. 9018904)
- Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes (kat. č. 9018901)
- Rotor Holder (kat. č. 9018908)
- Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250) (kat. č. 981103)
- Rotor Gene Q SW (kat. č. 9023241)

## 1.5 Požadované materiály, ktoré sa nedodávajú


- Bezpečnostné okuliare
- Rukavice
- Laboratórny plášť


Na použitie s prístrojom Rotor-Gene Q MDx je potrebné PCR súprava, ale tá sa musí kúpiť samostatne. Sortiment dostupných súprav nájdete na stránke **QIAGEN.com**.

## 2 Bezpečnostné informácie

Pred použitím prístroja Rotor-Gene Q MDx je dôležité, aby ste si pozorne prečítali túto používateľskú príručku a venovali osobitnú pozornosť bezpečnostným informáciám. Pokyny a bezpečnostné informácie v používateľskej príručke sa musia dodržiavať, aby sa zabezpečila bezpečná funkcia prístroja a aby sa prístroj udržiaval v bezpečnom stave.

V *používateľskej príručke pre Rotor-Gene Q MDx* sú uvedené nasledujúce typy bezpečnostných informácií.


<p><b>VAROVANIE</b></p> 	<p>Výraz VAROVANIE sa používa na informovanie o situáciách, ktoré by mohli viesť k <b>zraneniu</b> vás alebo iných osôb.</p> <p>Podrobnosti o týchto okolnostiach sú uvedené v rámečku podobnom nasledujúcemu.</p>
---	--

<p><b>UPOZORNENIE</b></p> 	<p>Pojem UPOZORNENIE informuje o situáciách, ktoré by mohli mať za následok <b>poškodenie prístroja</b> alebo iného zariadenia.</p> <p>Podrobnosti o týchto okolnostiach sú uvedené v rámečku podobnom nasledujúcemu.</p>
---	---


Usmernenia uvedené v tejto príručke slúžia na doplnenie, a nie nahradenie bežných bezpečnostných požiadaviek platných v krajine používateľa.


Vezmite na vedomie, že môžete byť požiadaní, aby ste si našťudovali miestne nariadenia pre nahlasovanie vážnych incidentov, ktoré vznikli v súvislosti s pomôckou. výrobcovi a/alebo jeho oprávnenému zástupcovi a regulačnému orgánu, ku ktorému používateľ a/alebo pacient prináleží.


## 2.1 Správne použitie

<b>VAROVANIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd</b> Nesprávne použitie prístroja Rotor-Gene Q MDx môže spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.  Prístroj Rotor-Gene Q MDx môže obsluhovať iba kvalifikovaný personál, ktorý bol zodpovedajúco vyškolený.  Servis prístroja Rotor-Gene Q MDx môžu vykonávať iba terénni servisní špecialista spoločnosti QIAGEN.
---	--


Vykonajte údržbu podľa opisu v časti 8. QIAGEN účtuje poplatky za opravy, ktoré sú nutné kvôli nesprávnej údržbe.


<b>VAROVANIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd</b> Prístroj Rotor-Gene Q MDx je príliš ťažký na to, aby ho zdvihla len jedna osoba. Aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu prístroja, nezdvíhajte ho sami.  Ak chcete prístroj premiestniť, kontaktujte technický servis spoločnosti QIAGEN.
---	--


<b>VAROVANIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd</b> Nepokúšajte sa prístroj Rotor-Gene Q MDx počas prevádzky.
---	---


<b>UPOZORNENIE</b> 	<b>Poškodenie prístroja</b> Vyvarujte sa rozliatiu vody alebo chemikálií na prístroj Rotor-Gene Q MDx. Poškodenie spôsobené vyliatím vody alebo chemikálií vedie k strate záruky.
---	--


**Poznámka:** V prípade núdze prístroj Rotor-Gene Q MDx vypnite pomocou vypínača napájania na zadnej strane prístroja a vytiahnite konektor z elektrickej zásuvky.


<b>UPOZORNENIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd</b> Nepokúšajte sa otvoriť veko počas experimentu, alebo kým sa prístroj Rotor-Gene Q MDx otáča. Ak sa vám poradí otvoriť zámok veka a siahnúť dovnútra, riskujete kontakt s dielmi, ktoré sú horúce, pod prúdom alebo sa pohybujú vysokou rýchlosťou a môžete poraniť seba alebo prístroj poškodiť.
---	--

<b>UPOZORNENIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd</b> Ak potrebujete experiment rýchlo zastaviť, vypnite napájanie prístroja a potom veko otvorte. Pre siahnutím dovnútra počkajte, kým komora vychladne. V opačnom prípade riskujete zranenie pri dotyku s horúcimi časťami.
---	---

<b>UPOZORNENIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd</b> Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný výrobcom, môže to nepriaznivo ovplyvniť ochranu poskytovanú zariadením.
---	---

<b>UPOZORNENIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd</b> Voľne položený papier pod prístrojom Rotor-Gene Q MDx narúša jeho chladenie. Odporúča sa, aby bola oblasť pod prístrojom bez akéhokoľvek neporiadku.
---	--


<b>UPOZORNENIE</b> 	<b>Poškodenie prístroja</b> Vždy zamknite poistný krúžok rotora. Tak predídete tomu, aby sa počas experimentu uvoľnili zo skúmaviek viečka. Ak sa viečka počas experimentu uvoľnia, môžu poškodiť komoru.
---	--

<p><b>UPOZORNENIE</b></p> 	<p><b>Riziko poškodenia materiálu</b></p> <p>Pred každým cyklom vizuálne skontrolujte a presvedčte sa, či nie je rotor poškodený alebo deformovaný.</p>
---	---

Ak sa prístroja Rotor-Gene Q MDx počas experimentu dotknete a ste nabitý statickým nábojom, môže dôjsť v najväznejších prípadoch k resetovaniu prístroja Rotor-Gene Q MDx. Softvér prístroja Rotor-Gene Q MDx sa ale reštartuje a bude pokračovať v experimente.

## 2.2 Elektrická bezpečnosť

Pred vykonávaním servisu odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky.

<p><b>VAROVANIE</b></p> 	<p><b>Elektrické nebezpečenstvo</b></p> <p>Akékoľvek narušenie ochranného vodiča (vývod z uzemnenia) vo vnútri alebo mimo prístroja alebo odpojenie koncovej svorky ochranného vodiča povedie pravdepodobne zníženiu alebo strate zabezpečenia prístroja.</p> <p>Úmyselné prerušenie vodiča je zakázané.</p> <p><b>Životu nebezpečné napätie vo vnútri prístroja</b></p> <p>Ak je prístroj pripojený k elektrickému vedeniu, môžu byť koncovky pod prúdom a pri otvorení krytov alebo vybratí častí by pravdepodobne došlo k odhaleniu častí pod prúdom.</p>
--	--


Na zaistenie uspokojivej a bezpečnej prevádzky prístroja Rotor-Gene Q MDx postupujte podľa odporúčania nižšie:

- Sieťový napájací kábel musí byť zapojený do sieťovej napájacej zásuvky, ktorá má ochranný vodič (vývod z uzemnenia).
- Nenastavujte ani nevymieňajte vnútorné súčasti prístroja.
- Nepracujte s prístrojom, pokiaľ boli odobraté akékoľvek jeho kryty alebo časti.
- Ak vnútri prístroja došlo k rozliatiu tekutiny, prístroj vypnite, odpojte ho zo zásuvky a kontaktujte technický servis spoločnosti QIAGEN.

Ak prístroj začne byť elektricky nebezpečný, nedovoľte ostatným, aby s ním pracovali, a kontaktujte technický servis spoločnosti QIAGEN.

Prístroj môže byť elektricky nebezpečný, ak:

- prístroj alebo elektrický napájací kábel javí známky poškodenia,
- bol prístroj dlhú dobu skladovaný v nevhodných podmienkach,
- bol prístroj vystavený veľkému zaťaženiu pri preprave.

<b>VAROVANIE</b> 	<b>Elektrické nebezpečenstvo</b> Prístroj má štítok o elektrickej kompatibilite, na ktorom je uvedené napätie a frekvencia napájania, ako aj menovité prúdy poistiek. Zariadenie by sa malo prevádzkovať len za týchto podmienok
---	---


## 2.3 Biologická bezpečnosť

So vzorkami a reagensmi obsahujúcimi materiál z biologických zdrojov by sa malo zaobchádzať ako s potenciálne infekčným materiálom. Používajte bezpečné laboratórne postupy, ktoré sú uvedené v publikáciách, ako napr. *Biologická bezpečnosť v mikrobiologických a biochemických laboratóriách (Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, HHS <https://www.cdc.gov/labs/BMBL.html>)*.

### Vzorky

Vzorky môžu obsahovať infekčné činidlá. Mali by ste si byť vedomí zdravotných rizík, ktoré takéto látky predstavujú, a mali by tieto vzorky používať, skladovať a likvidovať v súlade s požadovanými bezpečnostnými predpismi.




<p><b>VAROVANIE</b></p> 	<p><b>Vzorky obsahujúce infekčné látky</b></p> <p>Niektoré vzorky používané s týmto prístrojom môžu obsahovať infekčné látky. Zaobchádzajte s týmito vzorkami s najväčšou možnou opatrnosťou a v súlade s požadovanými bezpečnostnými predpismi.</p> <p>Vždy používajte ochranné okuliare, 2 páry rukavíc a laboratórny plášť.</p> <p>Zodpovedná osoba (napr. vedúci laboratória) musí zaviesť potrebné bezpečnostné opatrenia, aby sa zaistila bezpečnosť pracoviska; pracovníci obsluhujúci prístroj musia byť riadne vyškolení a nesmú byť vystavení nebezpečným hladinám infekčných činidiel definovaných v príslušných kartách bezpečnostných údajov (KBÚ) alebo dokumentoch OSHA,* ACGIH† či COSHH‡.</p> <p>Odvetranie výparov a likvidácia odpadu musia prebiehať v súlade s národnými, štátnymi a miestnymi zdravotníckymi a bezpečnostnými predpismi.</p>
---	--

\* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci) (USA).

† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov) (USA).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Kontrola látok škodlivých zdraviu) (Spojené kráľovstvo).

## 2.4 Chemická bezpečnosť

<p><b>VAROVANIE</b></p> 	<p><b>Nebezpečné chemikálie</b></p> <p>Niektoré chemikálie používané s týmto prístrojom môžu byť nebezpečné alebo sa stať nebezpečnými po dokončení protokolu. Vždy používajte ochranné okuliare, rukavice a laboratórny plášť. Zodpovedná osoba (napr. vedúci laboratória) musí zaviesť potrebné bezpečnostné opatrenia, aby sa zaistila bezpečnosť pracoviska; pracovníci obsluhujúci prístroje nesmú byť vystavení nebezpečným úrovniam toxických látok (chemických či biologických) podľa definície v príslušných kartách bezpečnostných údajov (KBÚ) alebo dokumentoch OSHA,* ACGIH† alebo COSHH‡.</p> <p>Odvetranie výparov a likvidácia odpadu musia prebiehať v súlade s národnými, štátnymi a miestnymi zdravotníckymi a bezpečnostnými predpismi.</p>
---	---

\* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci) (USA).

† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov) (USA).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Kontrola látok škodlivých zdraviu) (Spojené kráľovstvo).

## Toxické výpary

Ak pracujete s prchavými rozpúšťadlami alebo toxickými látkami, musíte zabezpečiť účinný laboratórny ventilačný systém na odstránenie vzniknutých výparov.


## 2.5 Likvidácia odpadu


Použité laboratórne vybavenie môže obsahovať nebezpečné chemikálie. Takýto odpad sa musí zbierať a správne likvidovať podľa miestnych bezpečnostných predpisov.


Viac informácií o spôsobe zneškodnenie prístroja Rotor-Gene Q MDx nájdete v časti „Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)“, strana 200.


## 2.6 Mechanická riziká


Veko prístroja Rotor-Gene Q MDx musí zostať počas prevádzky zatvorené.


<b>VAROVANIE</b> 	<b>Pohyblivé diely</b> Aby nedošlo ku kontaktu s pohybujúcimi sa časťami počas prevádzky prístroja Rotor-Gene Q MDx, musí sa prístroja používať so zatvoreným vekom.
---	---

<b>VAROVANIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd</b> Veko prístroja Rotor-Gene Q MDx otvárajte a zatvárajte opatrne, aby ste predišli zachyteniu prstov alebo oblečenia.
---	---


<b>VAROVANIE</b> 	<b>Poškodenie prístroja</b> Zaistite, aby bol rotor a poistný krúžok správne nainštalovaný. Ak sú na rotore alebo poistnom krúžku viditeľné známky poškodenia alebo korózie, prístroj Rotor-Gene Q MDx nepoužívajte a kontaktujte technický servis spoločnosti QIAGEN.
---	---


<p><b>VAROVANIE</b></p> 	<p><b>Poškodenie prístroja</b></p> <p>Ak sa prístroj Rotor-Gene Q MDx spustí hneď po dodaní v chladnom prostredí, môžu sa mechanické časti zablokovať.</p> <p>Nechajte prístroj aklimatizovať na izbovú teplotu na minimálne hodinu predtým, ako ho zapnete.</p>
---	--

<p><b>VAROVANIE</b></p> 	<p><b>Poškodenie prístroja</b></p> <p>V prípade poruchy v dôsledku výpadku napájania vyťahnite napájací kábel, počkajte 10 minút a potom sa pokúste veko manuálne otvoriť.</p>
---	--

<p><b>VAROVANIE</b></p> 	<p><b>Nebezpečenstvo prehriatia</b></p> <p>Na stranách a za prístrojom Rotor-Gene Q MDx je nutné udržiavať minimálny voľný priestor 10 cm a zaistiť dostatočné vetranie.</p> <p>Drážky a otvory, ktoré zaisťujú ventiláciu prístroja Rotor-Gene Q MDx, nesmú byť zakryté.</p>
---	---


#### Nebezpečenstvo vysokých teplôt


<p><b>VAROVANIE</b></p> 	<p><b>Horúci povrch</b></p> <p>Komora prístroja Rotor-Gene Q MDx môže dosiahnuť teploty vyššie ako 120 °C. Komory sa nedotýkajte, keď je horúca.</p>
---	--


<p><b>VAROVANIE</b></p> 	<p><b>Horúci povrch</b></p> <p>Pri pozastavení cyklu nedôjde k úplnému vychladnutiu prístroja Rotor-Gene Q MDx na izbovú teplotu. Pred manipuláciou s rotorom alebo skúmavkami v prístroji buďte opatrní.</p>
---	---


## 2.7 Bezpečnosť údržby

Vykonajte údržbu podľa opisu v časti 8. QIAGEN účtuje poplatky za opravy, ktoré sú nutné kvôli nesprávnej údržbe.

<b>VAROVANIE/ UPOZORNENIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo poranenia osôb a materiálnych škôd</b> Vykonajte len údržbu, ktorá je presne popísaná v tejto používateľskej príručke.
--	---











<b>VAROVANIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo požiaru</b> Pri čistení prístroja Rotor-Gene Q MDx dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu nechajte dvierka prístroja otvorené, aby sa mohli horľavé výpary rozptýliť.
---	--

<b>VAROVANIE/ UPOZORNENIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom</b> Prístroj Rotor-Gene Q MDx nerozoberajte.
--	--

<b>UPOZORNENIE</b> 	<b>Poškodenie krytu prístroja</b> Nikdy nečistite kryt prístroja alkoholom ani roztokmi na báze alkoholu. Alkohol poškodí kryt. Na čistenie krytu použite destilovanú vodu.
---	--

## 2.8 Symboly na prístroji Rotor-Gene Q MDx

Nasledujúce symboly sa môžu objaviť v používateľskej príručke alebo na balení a štítkoch:

Symbol	Umiestnenie	Popis
	V blízkosti komory na vzorky, viditeľné pri otvorení veka	Nebezpečenstvo vysokých teplôt – teplota komory môže dosiahnuť teploty vyššie ako 120 °C
	Zadná časť prístroja	Prečítajte si návod na použitie
	Typový štítok na zadnej strane prístroja	Označenie CE pre európsku zhodu
	Typový štítok na zadnej strane prístroja	Zdravotnícke diagnostické zariadenie na použitie v podmienkach in vitro
	Typový štítok na zadnej strane prístroja	CSA zoznam značiek pre Kanadu a USA
	Typový štítok na pravom bočnom paneli	Zákonný výrobca.
	Typový štítok na pravom bočnom paneli	OEEZ o zneškodnení odpadu z elektrických a elektronických zariadení pre Európu a zvyšok sveta.
	Typový štítok na pravom bočnom paneli	Označenie FCC komisie United States Federal Communications Commission (Federálna komisia Spojených štátov pre komunikácie)
	Typový štítok na pravom bočnom paneli	Označenie RCM (predtým značka C-Tick) pre Austráliu (identifikácia dodávateľa N17965)
	Typový štítok na pravom bočnom paneli	Značka RoHS pre Čínu (obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

## 3 Všeobecný popis

Prístroj Rotor-Gene Q MDx je inovatívny prístroj, ktorý umožňuje vysoko presnú real-time PCR a ktorý je mimoriadne vhodný na diagnostiku in vitro v kombinácii so súpravami QIAGEN označenými ako IVD.

Výkonný a používateľsky príjemný softvér je jednoducho použiteľný pre začiatočníkov, ale zároveň ponúka experimentálnu platformu pre pokročilých používateľov.

### 3.1 Princíp prístroja Rotor-Gene Q MDx

#### 3.1.1 Tepelný výkon

Prístroj Rotor-Gene Q MDx používa sofistikovaný koncept ohrevu a chladenia na dosiahnutie optimálnych podmienok reakcie. Jedinečný rotačný formát zabezpečuje optimálnu tepelnú a optickú jednotu medzi vzorkami, ktorá je kritická pre presnú a spoľahlivú analýzu.


Vzorky nepretržite rotujú pri rýchlosti 400 ot/min počas jedného cyklu. Centrifugácia zabraňuje kondenzácii a odstraňuje vzduchové bubliny, ale nie DNA peletu. Okrem toho sa vzorky pred cyklom nemusia oddeliť odstredením.

Vzorky sa ohrejú a schladia v nízkoobjemovej vzduchovej rúre. Ohrev sa dosiahne pomocou niklovo-chrómového prvku vo veku. Komora sa ochladí ventiláciou vzduchu cez vrchnú časť komory, zatiaľ čo okolitý vzduch sa vyfukuje cez základňu.

#### Ohrievanie



## Chladenie

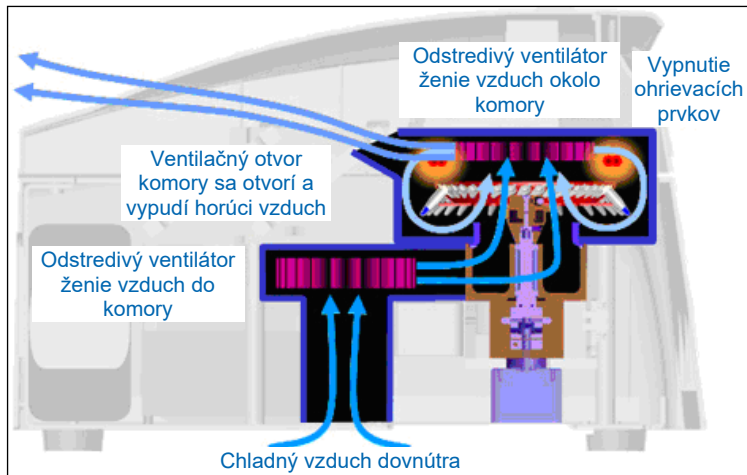


Obrázok ohrievacieho a chladiaceho systému.

### 3.1.2 Optický systém

Výberom až 6 zdrojov budenia a 6 detekčných filtrov v kombinácii s krátkou, pevnou optickou dráhou sa môže prístroj Rotor Gene Q MDx použiť na mnohonásobné reakcie, pričom zaisťuje minimálnu variabilitu fluorescence medzi vzorkami a eliminuje potrebu kalibrácie alebo kompenzácie.

Vzorky sa budia zo spodnej časti komory pomocou svetelnej emisnej diódy. Energia sa prenáša cez tenké steny v základni skúmavky. Emitovaná fluorescencia prechádza cez filtre emisí na strane komory a potom ju zachytí fotonásobič. Pevná optická dráha zabezpečuje neustále budenie každej vzorky, čo znamená, že nie je potrebné použiť pasívne interné referenčné farbivo, ako napríklad ROX™.

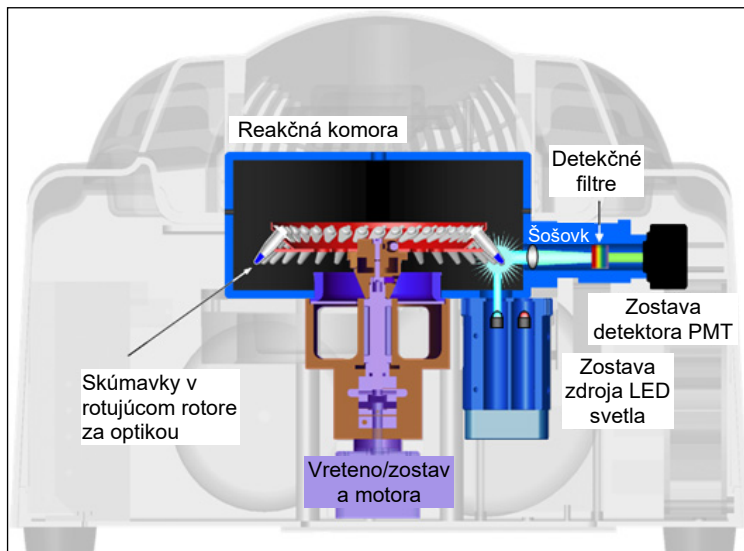

Obrázok optického systému.

### 3.1.3 Dostupné kanály

Kanál	Budenie (nm)	Detekcia (nm)	Príklady detegovaných fluoroforov
Blue	365 ± 20	460 ± 20	Marina Blue <sup>®</sup> , Edans Bothell Blue, Alexa Fluor <sup>®</sup> 350, AMCA-X, ATTO 390
Green	470 ± 10	510 ± 5	FAM <sup>®</sup> , SYBR <sup>®</sup> Green I, Fluorescein, EvaGreen <sup>®</sup> , Alexa Fluor 488
Yellow	530 ± 5	557 ± 5	JOE <sup>™</sup> , VIC <sup>®</sup> , HEX <sup>™</sup> , TET <sup>™</sup> , CAL Fluor <sup>®</sup> Gold 540, Yakima Yellow <sup>®</sup>
Orange	585 ± 5	610 ± 5	ROX, CAL Fluor Red 610, Cy <sup>®</sup> 3.5, Texas Red <sup>®</sup> , Alexa Fluor 568
Red	625 ± 10	660 ± 10	Cy5, Quasar <sup>®</sup> 670, LightCycler <sup>®</sup> Red640, Alexa Fluor 633
Crimson	680 ± 5	712 horný priepust	Quasar 705, LightCycler Red705, Alexa Fluor 680
Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia (HRM)	460 ± 20	510 ± 5	SYBR Green I, SYTO <sup>®</sup> 9, LC Green <sup>®</sup> , LC Green Plus+, EvaGreen

**Poznámka:** Súpravy QIAGEN určené na použitie s prístrojmi Rotor-Gene Q MDx sú optimalizované s ohľadom na určité kombinácie farieb. Viac informácií nájdete v príslušných príručkách súpravy.



## 3.2 Externé funkcie prístroja Rotor-Gene Q MDx



- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Ventilačné otvory na veku | 3 Komora rotora               |
| 2 Rúčka veka                | 4 Stavové kontrolky prístroja |

### 3.2.1 Ventilačné otvory na veku

Prístroj Rotor-Gene Q má ventilačné otvory na zadnej časti veka prístroja. Tieto ventilačné otvory umožňujú prístroju odvádzať teplo z komory počas prevádzky. Zablokovanie alebo nedostatočný priestor okolo ventilačných otvorov môže mať vplyv na výkon prístroja.

### 3.2.2 Rúčka veka

Rúčka veka sa používa na posunutie veka prístroja dozadu. Táto rúčka nie je určená na nesenie hmotnosti prístroja a nesmie sa používať na jeho zdvíhanie.

### 3.2.3 Komora rotora

Komora rotora je miesto, kde sa naložia rotory, ktoré prejdú naprogramovanými krokmi ohrevu a cyklovania.

### 3.2.4 Stavové kontrolky prístroja

Na prístroji Rotor-Gene Q existujú dve stavové kontrolky, Pohotovostná kontrolka udáva, že prístroj sa nepoužíva. Kontrolka chodu bliká, keď sa prístroj Rotor-Gene Q používa.

### 3.3 Interné funkcie prístroja Rotor-Gene Q MDx



Pohľad do vnútra komory prístroja Rotor-Gene Q

1 Stred rotora

2 Optická šošovka

#### 3.3.1 Stred rotora

Stred rotora udržiava rotor na mieste v prístroji.

#### 3.3.2 Optická šošovka

Optická šošovka je miesto, do ktorého sa zameria svetlo budiacej diódy na skúmavkách.

## 4 Postupy inštalácie

### 4.1 Dodanie a inštalácia systému

Pri inštalácii by mala byť prítomná osoba, ktorá je oboznámená s laboratórnym a počítačovým vybavením.

Súčasťou dodávky sú tieto položky:

- Prístroj Rotor-Gene Q MDx
- *Používateľská príručka pre prístroj Rotor-Gene Q MDx*
- Pracovná stanica
- Softvér Rotor-Gene Q MDx (nainštaluje ho terénny servis spoločnosti QIAGEN počas prvého nastavenia)

#### 4.1.1 Vybalenie prístroja Rotor-Gene Q MDx

Prístroj Rotor-Gene Q MDx sa dodáva so všetkými potrebnými komponentmi na zostavenie a spustenie. Balenie obsahuje zoznam všetkých dodaných komponentov.

**Poznámka:** Skontrolujte úplnosť tohto zoznamu, aby ste si boli istí, že sú dodané všetky komponenty.

**Poznámka:** Pred inštaláciou skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu prístroja a jeho príslušenstva.

Balenie s príslušenstvom sa nachádza na vrchu penovej výplne. Balenie s príslušenstvom obsahuje:

- Inštalačnú príručku (v angličtine; preklady sú dostupné na odnímateľnom médiu s príručkami)
- Odnímateľné médium (softvér)
- Odnímateľné médium (manuály)
- Loading Block 96 x 0.2 ml Tubes
- Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes
- Rotor Holder (rozobratý kvôli bezpečnej preprave)
- 36-Well Rotor (tento rotor má červenú farbu)
- 36-Well Rotor Locking Ring

Tieto komponenty sú zabalené na každej strane penovej výplne:

- USB kábel a sériový kábel RS-232
- Sada medzinárodných napájacích káblov
- PCR Tubes, 0.2 ml (1000)
- Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (1000)

Po vybratí týchto komponentov z obalu vyberte penovú výplň na vrchu prístroja Rotor-Gene Q MDx. Opatrne vyberte prístroj Rotor-Gene Q MDx z obalu a domotajte plastový baliaci materiál. Veko posuňte dozadu a otvorte ho, aby ste mali prístup do reakčnej komory.


Vnútri prístroja Rotor-Gene Q MDx sú nainštalované tieto komponenty:

- 72-Well Rotor (tento rotor má modrú farbu)
- 72-Well Rotor Locking Ring

Prenosný počítač môže byť súčasťou balenia v závislosti od podrobností objednávky.

#### 4.1.2 Inštalácia hardvéru


Po vybalení prístroja Rotor-Gene Q MDx začnite s inštaláciou podľa popisu nižšie.

<p><b>UPOZORNENIE</b></p> 	<p><b>Poškodenie prístroja</b></p> <p>Ak sa prístroj Rotor-Gene Q MDx spustí hneď po dodaní v chladnom prostredí, môžu sa mechanické časti zablokovať. Nechajte prístroj aklimatizovať na izbovú teplotu na minimálne hodinu predtým, ako ho zapnete.</p>
---	---

Postupujte nasledovne:

1. Prístroj Rotor-Gene Q MDx položte na rovný podklad.
2. Za prístrojom nechajte dostatočný priestor na úplné otvorenie veka.
3. Zaisťte, aby bol vypínač na zadnej strane prístroja ľahko dostupný.
4. Zadnú časť prístroja ničím neblokujte. Zaisťte, aby sa dal v prípade potreby jednoducho odpojiť napájací kábel, ktorým sa odpojí napájanie prístroja.
5. Pripojte dodaný USB kábel alebo sériový kábel RS-232 do USB alebo komunikačného portu na zadnej strane počítača.

6. Pripojte USB kábel alebo sériový kábel RS-232 na zadnú stranu prístroja Rotor-Gene Q MDx.
7. Potom pripojte prístroj Rotor-Gene Q MDx k napájaniu. Jeden koniec napájacieho kábla pripojte do zásuvky na zadnej strane prístroja Rotor-Gene Q MDx a druhý koniec do elektrickej zásuvky.

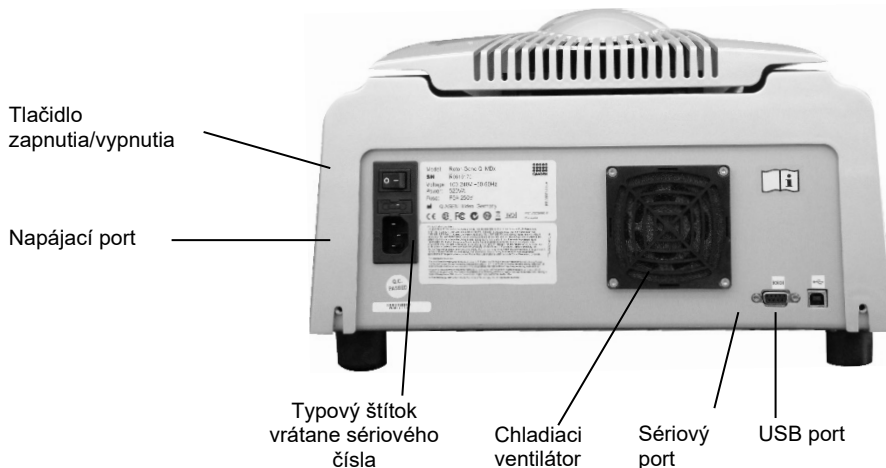


**Poznámka:** Prístroj Rotor-Gene Q MDx pripojte počítaču len pomocou USB kábla a sériových káblov dodaných s prístrojom. Nepoužívajte iné káble.

#### 4.1.3 Inštalácia softvéru

1. Na nainštalovanie softvéru Rotor-Gene Q stiahnite softvér z adresy **QIAGEN.com** a preneste ho do počítača na prenosnom médiu bez vírusov alebo pripojte odnímateľné médium (softvér) dodané s prístrojom do počítača.
2. Ak sa automaticky spustí inštalácia softvéru, zvolte možnosť **Install Operating Software** (Inštalovať operačný softvér) v okne, ktoré sa zobrazí, alebo prejdite do priečinka softvéru RGQ na odnímateľnom médiu.

**Poznámka:** Pokyny k jednoduchšej inštalácii a prevedenie ďalšími krokmi inštalácie nájdete v *inštaláčnej príručke k Rotor-Gene Q*.

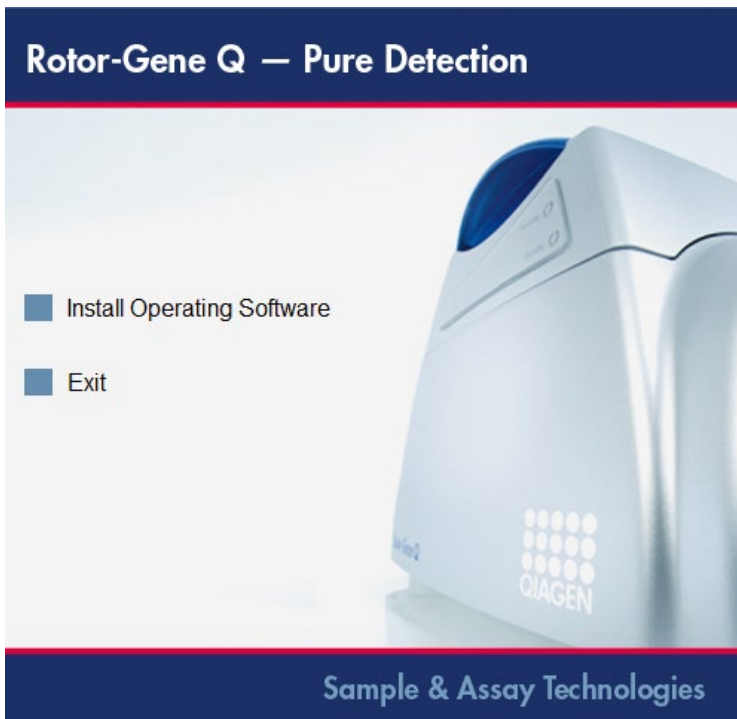

3. Po nainštalovaní softvéru sa na pracovnej ploche automaticky vytvorí ikona.
4. Zapnite prístroj Rotor-Gene Q MDx prepnutím vypínača na ľavej zadnej strane do polohy „I“. Modrá „Standby“ (Pohotovostná) kontrolka na prednej strane prístroja Rotor-Gene Q MDx znamená, že prístroj je pripravený na použitie.

**Poznámka:** Pri prvom spúšťaní počas pripojenia na počítač rozpozná operačný systém prístroj Rotor-Gene Q MDx a zobrazí sa niekoľko hlásení. Návod nájdete v *inštaláčnej príručke Rotor-Gene Q* dodanej s prístrojom (odoberateľné médium a tlačaná verzia).




5. Na spustenie softvéru dvakrát kliknite na ikonu **Rotor-Gene Q Series Software** (Softvér radu Rotor-Gene Q) na pracovnej ploche.



6. Pri prvom spustení sa zobrazí okno s nápisom **Welcome** (Vitajte), ale neobjaví sa pri ďalších vylepšeniach softvéru.



- Machine Serial Number (Sériové číslo stroja):** Zadaťte sériové číslo (7-miestne), ktoré nájdete na zadnej strane prístroja Rotor-Gene Q MDx.
- Port (Port):** Vyberte buď USB alebo sériový kábel. Vyberte vhodný komunikačný port alebo kliknite na tlačidlo **Auto-Detect** (Automatická detekcia).
- Auto-Detect (Automatická detekcia)** Pri použití tejto možnosti dôjde k automatickej detekcii USB alebo sériového portu a zobrazí sa rozbaľovací zoznam **Port** (Port).
- Run in Virtual Mode (for demonstration) (Spustíte virtuálny režim (na ukážku)):** Po zaškrtnutí tohto políčka môžete nainštalovať softvér Rotor-Gene Q na počítač, ktorý nie je pripojený k prístroju Rotor-Gene Q MDx. Softvér je plne funkčný a môže simulovať cykly.  
**Poznámka:** Ak je toto políčko zaškrnuté a prístroj Rotor-Gene Q MDx je pripojený k počítaču, zobrazí sa pred spustením chodu toto hlásenie: **You are about to run in Virtual mode** (Chystáte sa spustiť virtuálny režim). Na spustenie reálneho chodu sa musí nastavenie zmeniť v okne **Setup** (Nastavenie) (pozri časť 6.5.4).
- Begin (Začať):** Po zadaní všetkých informácií kliknite na **Begin** (Začať). Počkajte, kým sa dokončí inicializácia, čo môže trvať niekoľko sekúnd. Ak je zvolený virtuálny režim, zobrazí sa toto hlásenie:

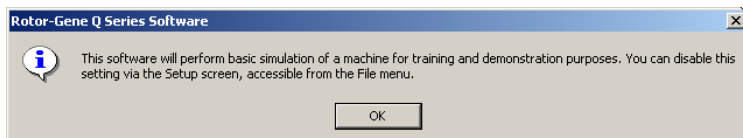


Ak nie je políčko **Run in Virtual Mode** (Spustiť vo virtuálnom režime) zaškrtnuté, prebehne inicializácia softvéru a automaticky sa otvorí.

- Exit Program (Ukončiť program):** Kliknutím na toto tlačidlo ukončíte program.

#### 4.1.4 Verzia softvéru

Na zistenie čísla verzie kliknite na možnosť **Help** (Pomoc) a potom na **About This Software...** (O tomto softvéri...).

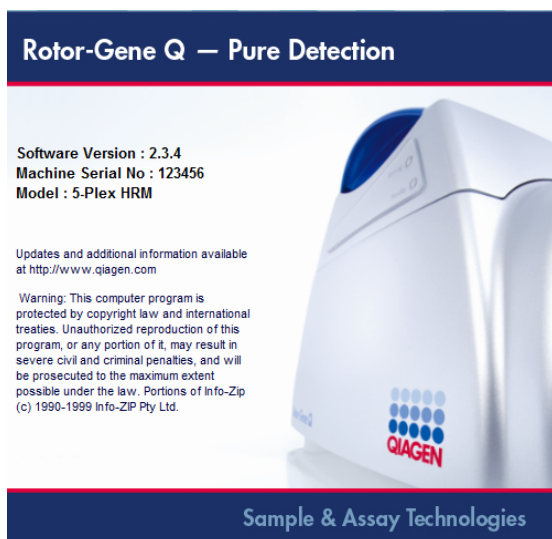

V tomto okne sa zobrazia všeobecné informácie o softvéri, vrátane jeho verzie a sériového čísla a modelu prístroja.

Softvér sa môže voľne skopírovať na použitie v rámci spoločnosti, ktorá vlastní prístroj Rotor-Gene Q MDx. Softvér sa nesmie kopírovať a distribuovať iným organizáciám mimo spoločnosti.

#### 4.1.5 Doplnkový softvér na počítačoch pripojených k prístrojom Rotor-Gene Q MDx

Softvér Rotor-Gene Q spravuje časovo dôležité procesy počas cyklu PCR a proces získania údajov. Z tohto dôvodu je dôležité zabezpečiť, aby žiadne iné procesy nevyužívali značné zdroje systému a tým softvér Rotor-Gene Q nespomaľovali. Je mimoriadne dôležité venovať pozornosť bodom uvedeným nižšie.

Administrátori systému sú poučení o tom, aby pred implementovaním každej zmeny zvážili všetky dopady, ktoré môže táto zmeny mať na zdroje systému.



## Antivírusový softvér

Spoločnosť QIAGEN si uvedomuje hrozbu, ktorú predstavujú počítačové vírusy pre každý počítač, ktorý si vymieňa údaje s inými počítačmi. Verzia 1.0 alebo 2.1 softvéru Rotor-Gene AssayManager sa má primárne nainštalovať v prostredí, v ktorom sa uplatňujú zásady na minimalizovanie tejto hrozby. Napriek tomu spoločnosť QIAGEN odporúča použiť v tomto prípade antivírusový softvér.

Zákazník je zodpovedný za výber a inštaláciu vhodného nástroja na skenovanie vírusov. Spoločnosť QIAGEN validovala softvér Rotor-Gene Q s počítačom QIAGEN v kombinácii s týmito dvomi antivírusovými softvérmi, aby zistili ich kompatibilitu:

- Klient Microsoft Defender vo verzii 4.18.2005.5

Najnovšie verzie antivírusového softvéru, ktoré boli validované v kombinácii so softvérom Rotor-Gene Q a verziou 1.0 alebo 2.1 softvéru Rotor-Gene AssayManager nájdete na adrese QIAGEN.com.

Po zvolení antivírusového softvéru ho nakonfigurujte tak, aby sa pri skenovaní vynechala cesta priečinku databázy. V opačnom prípade existuje riziko chýb pripojenia databázy. Keďže verzie 1.0 alebo 2.1 softvéru Rotor-Gene AssayManager vytvárajú nové archívy databázy dynamicky, je potrebné vynechať celú cestu k priečinku so súbormi a nie jednotlivé súbory. Neodporúčame používať antivírusový softvér, v ktorom je možné zo skenovania vylúčiť len jednotlivé súbory, napr. McAfee Antivirus Plus V16.0.5. Ak sa počítač používa v prostredí bez prístupu na sieť, zabezpečte, aby antivírusový softvér podporoval offline aktualizácie.

Na dosiahnutie konzistentných výsledkov po inštalácii antivírusového softvéru by mali administrátori systému zabezpečiť nasledovné:

- Ako bolo vysvetlené vyššie, cesta k priečinku databázy softvéru Rotor-Gene AssayManager 1.0 a 2.1 (**C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10\_50.RGAMINSTANCE\MSSQL\DATA**) sa musí vylúčiť zo skenovania súborov.
- Databáza vírusov sa nebude aktualizovať, keď sa softvér Rotor-Gene AssayManager 1.0 alebo 2.1 používa.
- Počas získavania údajov z real-time PCR musia byť zakázané úplné alebo čiastočné skenovania pevného disku. V opačnom prípade existuje riziko vplyvu na výkon prístroja.

V príručke vybraného antivírusového softvéru nájdete podrobnosti konfigurácie.


## Firewall a siete

Softvér Rotor-Gene Q môže bežať buď na počítačoch bez prístupu k sieti alebo v prostredí siete, ak sa používa vzdialený server databáz. V prípade používania v prostredí siete sa na počítači dodanom spoločnosťou QIAGEN nakonfiguruje ochrana firewall tak, aby sa blokovala všetka prichádzajúca komunikácia pre všetky porty okrem portov potrebných na vytvorenie sieťového pripojenia.


Nezabudnite, že blokovanie vstupnej komunikácie neovplyvní odpovede na požiadavky odoslané používateľom. Odchádzajúce spojenia sú povolené, pretože tie môžu byť potrebné na získanie aktualizácií.

Ak je vaša konfigurácia odlišná, odporúča spoločnosť QIAGEN nakonfigurovať bránu firewall podľa popisu vyššie. Na tento účel sa musí administrátor systému prihlásiť a vykonať tieto kroky:


1. Otvorte **Control Panel** (Ovládací panel) a vyberte možnosť **Windows Firewall** (Windows Firewall).

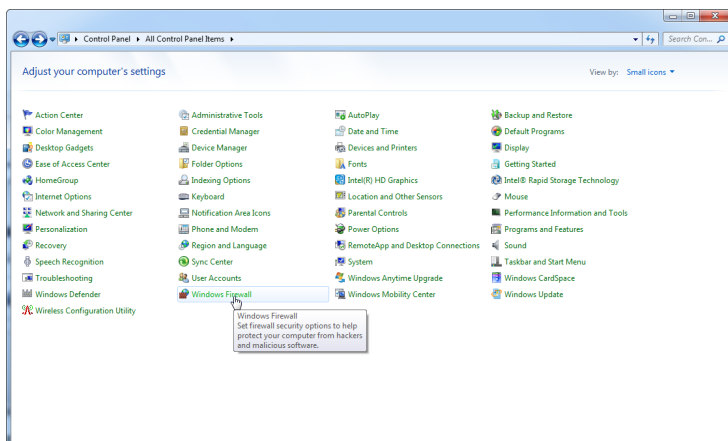

2. Vyberte možnosť **Use recommended settings** (Použiť odporúčané nastavenia).

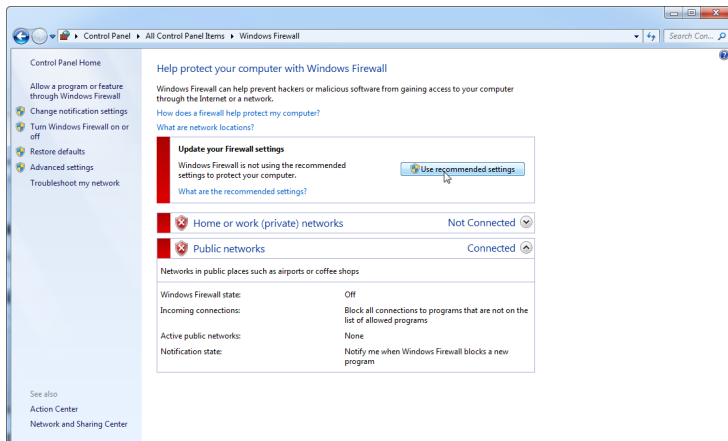


### 3. Skontrolujte, či sú aktívne tieto nastavenia:

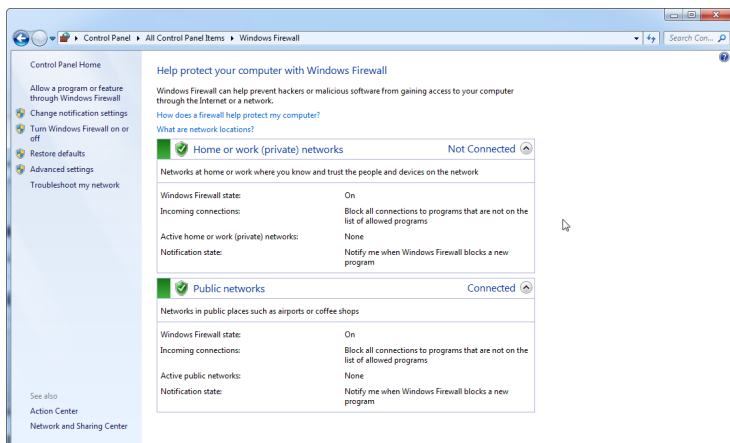


Z bezpečnostných dôvodov a kvôli spoľahlivosti by sa malo namiesto WiFi pripojenia použiť káblové pripojenie na sieť. Prenosné počítače dodané spoločnosťou QIAGEN majú deaktivovaný WiFi adaptér. Ak je vaša konfigurácia odlišná, musí administrátor systému deaktivovať WiFi adaptér manuálne pomocou týchto krokov:


1. Otvorte **Control Panel** (Ovládací panel) a vyberte možnosť **Network and Sharing Center** (Sieť a centrum zdieľania).

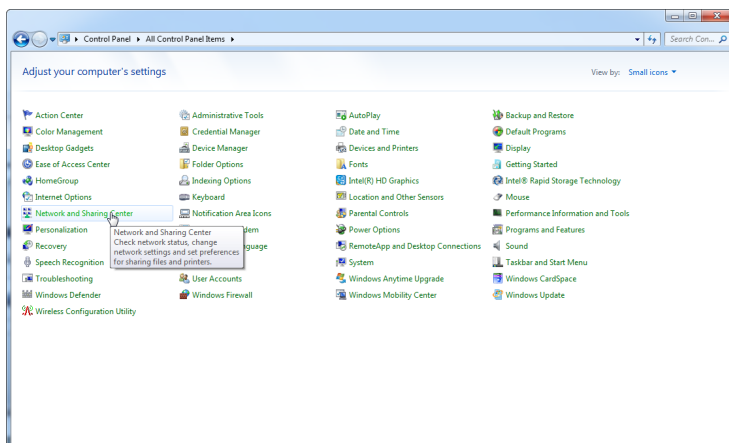


2. Vyberte možnosť **Change adapter settings** (Zmeniť nastavenia adaptéra).

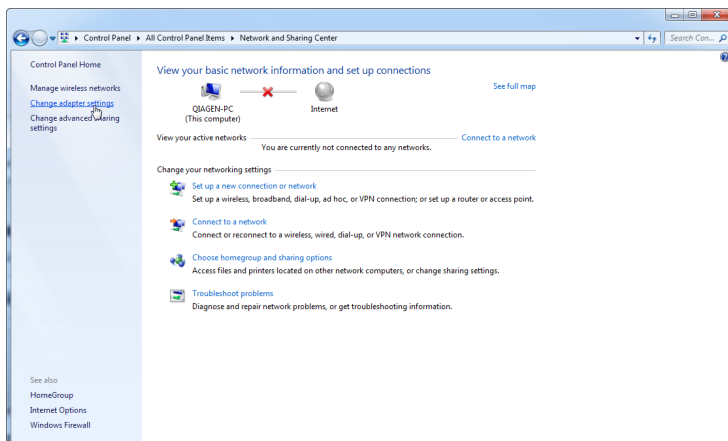

3. Postavte sa na možnosť **Wireless Network Connection** (Bezdrôtové pripojenie na sieť), stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte možnosť **Disable** (Vypnúť).

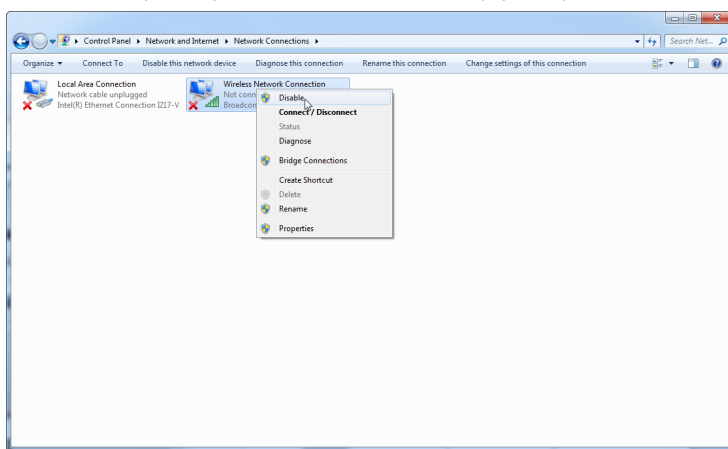

4. Skontrolujte, či je Wireless Network Connection (bezdrôtové pripojenie na sieť) vypnuté.

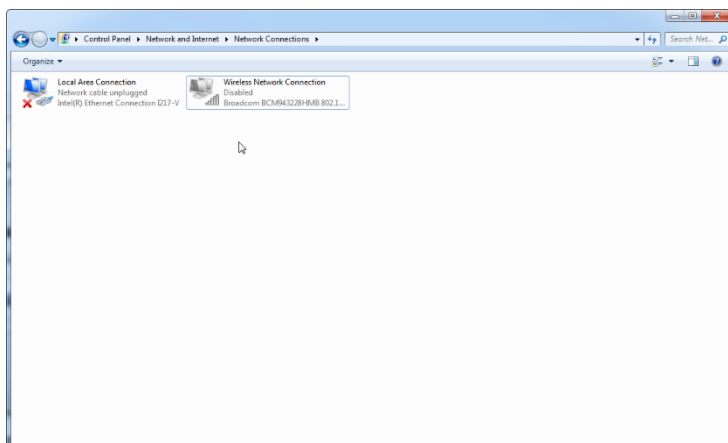

## Systémové nástroje

Mnohé systémové nástroje používajú značné zdroje systému bez interakcie s používateľom. Typické príklady sú nástroje ako:


- Indexovanie súborov, ktoré na pozadí vykonáva množstvo súčasných kancelárskych aplikácií
- Defragmentácia disku, ktorá často tiež využíva úlohu na pozadí
- Každý softvér, ktorý kontroluje aktualizácie na internete
- Vzdialené monitorovanie a nástroje správy

Vezmite na vedomie, že kvôli dynamickej povahe IT sveta nemusí byť tento zoznam úplný a môžu sa vydať nástroje, ktoré nie sú známe v čase písania tohto dokumentu. Je dôležité, aby administrátori systému zabezpečili, aby nebol takýto nástroj aktívny počas PCR cyklu.


## Aktualizácie operačného systému

Prenosné počítače dodané spoločnosťou QIAGEN sú nakonfigurované tak, aby boli automatické aktualizácie operačného systému zakázané. Ak je vaša konfigurácia odlišná, musí administrátor systému deaktivovať každý proces automatickej aktualizácie operačného systému pomocou týchto krokov:


1. Otvorte **Control Panel** (Ovládací panel) a vyberte možnosť **Windows Update** (lokalita Windows Update).

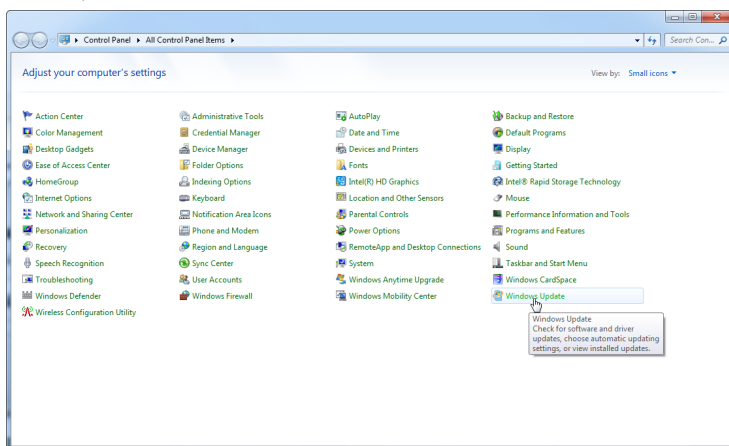


2. Vyberte možnosť **Change settings** (Zmeniť nastavenia).

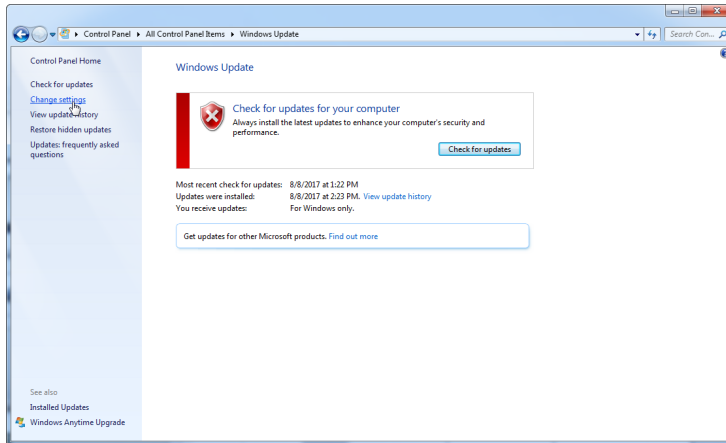

3. Vyberte možnosť **Never check for updates** (Nikdy nevyhľadávať aktualizácie).

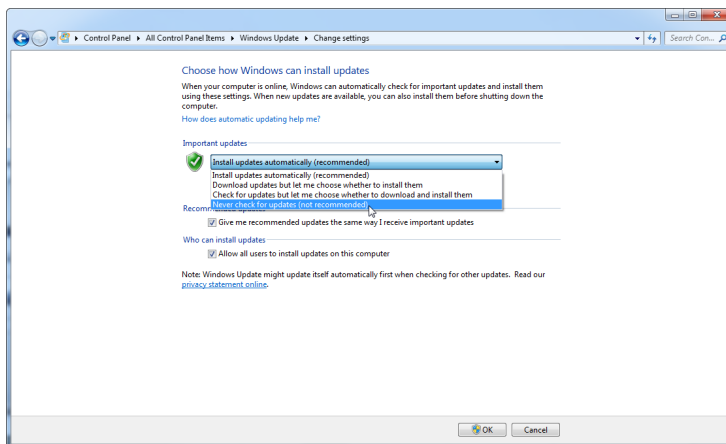

4. Skontrolujte, či je v možnosti **Important updates** (Dôležité aktualizácie) aktívna voľba **Never check for updates** (Nikdy nevyhľadávať aktualizácie) aktívna.

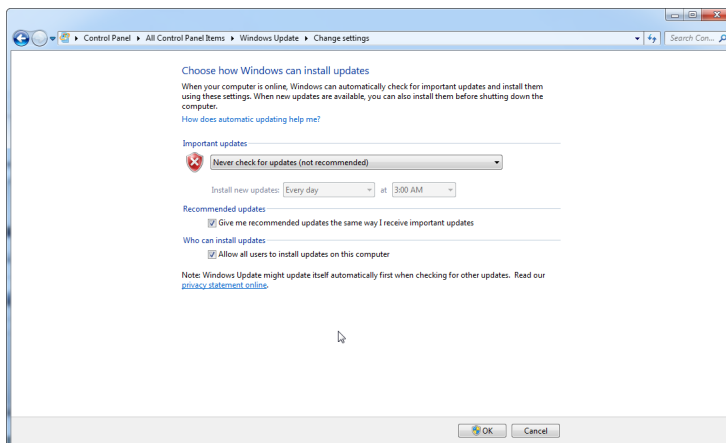

V prípade, že sú potrebné aktualizácie z dôvodu bezpečnostnej zraniteľnosti, poskytnite spoločnosť QIAGEN mechanizmy na inštalovanie definovaného súboru validovaných bezpečnostných záplat pre Windows buď online (ak je na počítači QIAGEN dostupné internetové pripojenie) alebo ako offline balík pripravený na samostatnom počítači s internetovým pripojením.

Viac informácií nájdete na stránke **QIAGEN.com**.


## 4.2 Požiadavky na pracovisko


Prístroje Rotor-Gene Q MDx musia byť umiestnené mimo priameho slnečného svetla, mimo dosahu zdrojov tepla a interferencií spôsobených vibráciami alebo elektrinou. Prevádzkové podmienky (teplota a vlhkosť) nájdete v prílohe A. Miesto inštalácie nesmie byť vystavené nadmernému prievanu, nadmernej vlhkosti, nadmernej prašnosti ani veľkému kolísaniu teploty.

Hmotnosť a rozmery prístrojov Rotor-Gene Q MDx nájdete v prílohe A. Dbajte na to, aby bol pracovný stôl suchý, čistý a poskytoval dodatočný priestor pre príslušenstvo. Ďalšie informácie o požadovaných technických parametroch pre laboratórny stôl získate od technických služieb spoločnosti QIAGEN.

**Poznámka:** Je mimoriadne dôležité, aby sa prístroj Rotor-Gene Q MDx umiestnil na stabilný podklad, ktorý je rovný a bez vibrácií. Prevádzkové podmienky – pozri prílohu A.

Prístroj Rotor-Gene Q MDx sa musí umiestniť do vzdialenosti asi 1,5 m od riadne uzemnenej sieťovej zásuvky so striedavým prúdom.

<b>VAROVANIE</b> 	<b>Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu</b> Prístroj Rotor-Gene Q MDx nie je konštruovaný na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
---	---

<b>VAROVANIE</b> 	<b>Nebezpečenstvo prehriatia</b> Za prístrojom Rotor-Gene Q MDx je nutné v zadnej časti udržiavať minimálny voľný priestor 10 cm, aby bolo zaistené dostatočné vetranie.  Drážky a otvory, ktoré zaisťujú ventiláciu prístroja Rotor-Gene Q MDx, nesmú byť zakryté.
---	--

## 4.3 Elektrická prípojka

### 4.3.1 Požiadavky na napájanie

Prístroj Rotor-Gene Q MDx je napájaný:

- 100 – 240 V AC pri frekvencii 50 – 60 Hz, 520 VA (maximum)

Uistite sa, že menovité napätie prístroja Rotor-Gene Q MDx je kompatibilné s napätím striedavého prúdu dostupným v mieste montáže. Kolísanie sieťového napätia nesmie prekročiť 10 % nominálnej hodnoty napätia.

### 4.3.2 Požiadavky na uzemnenie

Na ochrane personálu obsluhy odporúča spoločnosť QIAGEN, aby sa prístroj Rotor-Gene Q MDx riadne uzemnil. Prístroj je vybavený 3-vodičovým napájacím káblom na striedavý prúd, ktorý po pripojení do vhodnej elektrickej zásuvky so striedavým prúdom prístroj uzemní. Na zachovanie tejto ochrannej funkcie neobsluhujte prístroj z elektrickej zásuvky so striedavým prúdom, ktorá nemá uzemnenie.

### 4.3.3 Inštalácia napájacieho kábla

Jeden koniec napájacieho kábla pripojte do zásuvky na zadnej strane prístroja Rotor-Gene Q MDx a druhý koniec do elektrickej zásuvky.

## 4.4 Konfigurácia bezpečnosti pre operačný systém Windows

Na prenosných počítačoch dodaných spoločnosťou QIAGEN na použitie s vaším prístrojom Rotor-Gene Q MDx je predinštalovaný operačný systém Microsoft Windows 7 alebo Windows 10 a sú nakonfigurované so štandardným (neadministrátorským) používateľským účtom Windows a účtom administrátora. Pri bežnom používaní systému sa použije štandardný účet, pretože softvér Rotor-Gene Q a verzia 1.0 alebo 2.1 softvéru Rotor-Gene AssayManager sú navrhnuté na spustenie bez administrátorských práv. Účet administrátora – účet s červeným pozadím plochy – sa použije len na inštaláciu softvéru Rotor-Gene Q alebo verzie 1.0 alebo 2.1 softvéru Rotor-Gene AssayManager a Doplnkový softvér na počítačoch pripojených k prístrojom Rotor-Gene Q MDx (pozri časť „Antivírusový softvér“). Používanie účtu administrátora rozpoznáte podľa červeného pozadia pracovnej plochy. Pri bežnom používaní sa vždy prihláste ako štandardný používateľ.



Štandardné heslo k účtu administrátora je Q1a#g3n!A6. Heslo administrátora po prvom prihlásení zmeňte. Heslo vytvorte tak, aby bolo bezpečné a nezabudli ste ho. Pre účet operátora neexistuje žiadne heslo.


Ak dôjde k strate hesla administrátora, potom odporúčame kontaktovať spoločnosť Microsoft a využiť ich podporu.

Ak sa vaša konfigurácia líši a neexistuje žiadny neadministrátorský účet, vytvoria administrátori systému ďalší štandardný používateľský účet Windows, aby sa zabránilo prístupu do kritických oblastí systému, ako napríklad Program Files, adresár Windows (napr. prístup k funkcii inštalovania a odinštalovania, vrátane aplikácií, komponentov operačného systému, nastavení dátumu/času, aktualizácií systému Windows, systému firewall, používateľským právam a roliam, aktivovaniu antivírusu) alebo nastaveniam týkajúcim sa výkonu, ako je úspora energie.


Na vytvorenie štandardného používateľského účtu v systéme Windows 7 postupujte podľa týchto krokov popísaných v časti Vytvorenie nového používateľského účtu:

Otvorte ovládací panela systému Windows cez menu **Start** (Štart) a vyberte možnosť **User Accounts** (Používateľské kontá) > **Manage Accounts** (Spravovať kontá).

1. Zvoľte možnosť **Create a new account** (Vytvoriť nové konto).

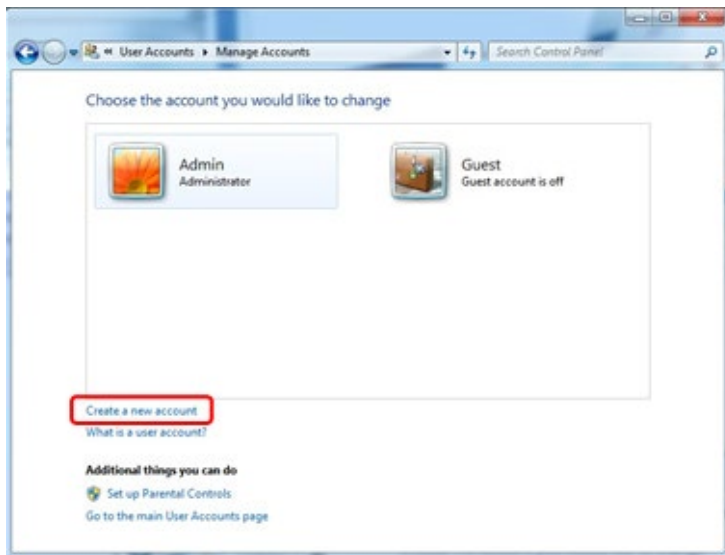

2. Účet pomenujte a ako typ účtu vyberte možnosť **Standard User** (Štandardný používateľ).

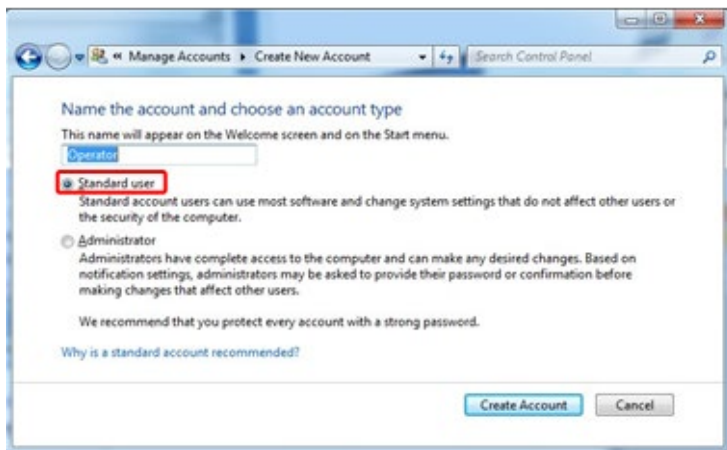

3. Kliknite na **Create Account** (Vytvoriť konto).

## 4.5 Požiadavky pracovnej stanice

Prenosný počítač dodávaný ako príslušenstvo k prístroju Rotor Gene Q MDx spĺňa požiadavky softvéru prístroja Rotor Gene Q, detailne popísané v nasledujúcej tabuľke.

### Požiadavky na systém pracovnej stanice

Popis	Minimálne požiadavky
Operačný systém	Microsoft® Windows® 10 Professional edition (64 bit); Microsoft Windows 7 Professional edition (32 bit alebo 64 bit)* (Service Pack 1)
Procesor	Intel® Core™ 2 Duo 1.66 GHz alebo lepší
Operačná pamäť	Minimálne 1 GB RAM
Priestor na pevnom disku	Minimálne 10 GB pevný disk
Grafika	Adaptér a obrazovka s minimálne 1200 x 800 pixelmi
Porty	RS-232 sériový port alebo USB port
Ukazovacie zariadenie	Je potrebný touchpad alebo myš alebo ekvivalentné zariadenie
Bluetooth	Musí byť vypnuté
PDF prehliadač alebo podobný program	Musí byť nainštalovaný; nie je súčasťou inštalačných balíkov softvéru
Možnosti napájania	Pevné disky nikdy nevypínajte, nehibernujte ani neprepínajte do pohotovostného režimu

\* Na spustenie prístroja softvéru Rotor-Gene Q s bezpečnostnými funkciami (pozri časť 6.9) je potrebný operačný systém Microsoft Windows 10 alebo Windows 7 Professional edition. Bezpečnostné funkcie nie sú dostupné, ak sa používa edícia Home edition systému Windows 10 alebo Windows 7.

† Pri použití verzie 1.0 alebo 2.1 softvéru Rotor-Gene AssayManager® sú tieto požiadavky na počítač odlišné: Je potrebný procesor Intel Core i3-380, operačná pamäť 4 GB RAM, priestor na pevnom disku 250 GB, USB port.

## 4.6 Vybalenie a inštalácia prístroja Rotor-Gene Q MDx

Prístroj Rotor-Gene Q MDx sa dodáva so všetkými potrebnými komponentmi na zostavenie a spustenie. Balenie obsahuje zoznam všetkých dodaných komponentov.

**Poznámka:** Skontrolujte úplnosť tohto zoznamu, aby ste si boli istí, že sú dodané všetky komponenty.

**Poznámka:** Pred inštaláciou skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu prístroja a jeho príslušenstva.

Balenie s príslušenstvom sa nachádza na vrchu penovej výplne. Balenie s príslušenstvom obsahuje:

- Inštaláciu príručku (v angličtine; preklady sú dostupné na odnímateľnom médiu s príručkami)
- Odnímateľné médium (softvér)
- Odnímateľné médium (manuály)
- Loading Block 96 x 0.2 ml Tubes
- Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes
- Rotor Holder (rozobratý kvôli bezpečnej preprave)
- 36-Well Rotor (tento rotor má červenú farbu)
- 36-Well Rotor Locking Ring

Tieto komponenty sú zabalené na každej strane penovej výplne:

- USB kábel a sériový kábel RS-232
- Sada medzinárodných napájacích káblov
- PCR Tubes, 0.2 ml (1000)
- Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (1000)

Po vybratí týchto komponentov z obalu vyberte penovú výplň na vrchu prístroja Rotor-Gene Q MDx. Opatrne vyberte prístroj Rotor-Gene Q MDx z obalu a domotajte plastový baliaci materiál. Veko posuňte dozadu a otvorte ho, aby ste mali prístup do reakčnej komory.

Vnútri prístroja Rotor-Gene Q MDx sú nainštalované tieto komponenty:

- 72-Well Rotor (tento rotor má modrú farbu)
- 72-Well Rotor Locking Ring

Prenosný počítač môže byť súčasťou balenia v závislosti od podrobností objednávky.

#### 4.6.1 Prechod na vyššiu verziu softvéru

Aktualizácie softvéru sú dostupné na webovej stránke spoločnosti QIAGEN na adrese <https://www.qiagen.com/products/instruments-and-automation/pcr-instruments/rotor-gene-q-mdx/>, na ktorú sa dostanete aj z ponuky **Help** (Pomoc) v softvéri. Na stiahnutie softvéru je potrebné sa registrovať online.

#### 4.7 Príslušenstvo

Krúžok Rotor-Disc a príslušenstvo je možné na použitie s prístrojom Rotor-Gene Q MDx objednať samostatne. Viac podrobností nájdete v časti 16.

#### 4.8 Opätovné zabalenie a odoslanie prístroja Rotor-Gene Q MDx

Pri opätovnom balení prístroja Rotor-Gene Q MDx na odoslanie je nutné použiť pôvodný obalový materiál. Ak nie sú k dispozícii pôvodné obalové materiály, obráťte sa na technický servis spoločnosti QIAGEN. Pred balením skontrolujte, či bol prístroj správne pripravený (pozri časť Údržba) a či nepredstavuje žiadne biologické alebo chemické nebezpečenstvo.


#### 4.9 Začíname


##### 4.9.1 Zapnutie prístroja Rotor-Gene Q MDx a pracovnej stanice

Zabezpečte, aby bol prístroj Rotor-Gene Q pripojený k počítaču cez USB alebo RS-232 a počítač aj prístroj Rotor-Gene Q boli pripojené a napájané.

## 5 Prevádzkové postupy

Pred pokračovaním odporúčame, aby ste sa oboznámili s funkciami prístroja, ktoré sú popísané v časti 3.

<p><b>UPOZORNENIE</b></p> 	<p><b>Poškodenie prístroja</b></p> <p>S prístrojom Rotor-Gene Q MDx používajte len prietokové kyvety a spotrebný materiál QIAGEN. Poškodenie spôsobené inými typmi prietokovej kyvety alebo spotrebného materiálu vedie k strate záruky.</p>
---	--

<p><b>UPOZORNENIE</b></p> 	<p><b>Riziko poškodenia materiálu</b></p> <p>Pracovný stôl nepresúvajte a nevystavujte prístroj Rotor-Gene Q MDx vibráciám počas prevádzky, aby ste predišli narušeniu citlivých optických meraní.</p>
--	--


### 5.1 Použitie softvéru Rotor-Gene Q MDx

Nové cykly sa môžu nastaviť pomocou sprievodcu Quick Start (rýchle spustenie) alebo sprievodcu Advanced (pokročilý), ktorí sa zobrazia pri spustení softvéru. Sprievodca Quick Start (rýchle spustenie) je navrhnutý tak, aby umožnil používateľovi spustiť cyklus čo najrýchlejšie. Sprievodca Advanced (Pokročilý) poskytuje viac možností, ako napríklad konfigurácia optimalizácie výťažku a nastavenia objemu. Na uľahčenie majú sprievodcovia niekoľko templátov s prednastavenými podmienkami cyklov a čítacími kanálmi. Na zmenu typu sprievodcu vyberte príslušnú kartu na vrchu okna **New Run** (Nový cyklus).

#### 5.1.1 Sprievodca Quick Start (rýchle spustenie)

Sprievodca Quick Start (rýchle spustenie) umožňuje používateľovi spustiť cyklus čo najrýchlejšie. Používateľ môže zvoliť z niekoľkých bežne používaných templátov a zadať minimum parametrov na spustenie. Sprievodca Quick Start (rýchle spustenie) predpokladá, že reakčný objem je 25 µl. Pre ďalšie reakčné objemy použite sprievodcu Advanced (pokročilý) (pozri časť 5.1.2).

V prvom kroku vyberte dvojitým kliknutím na templát v zozname v okne **New Run** (Nový cyklus) želaný templát cyklu.

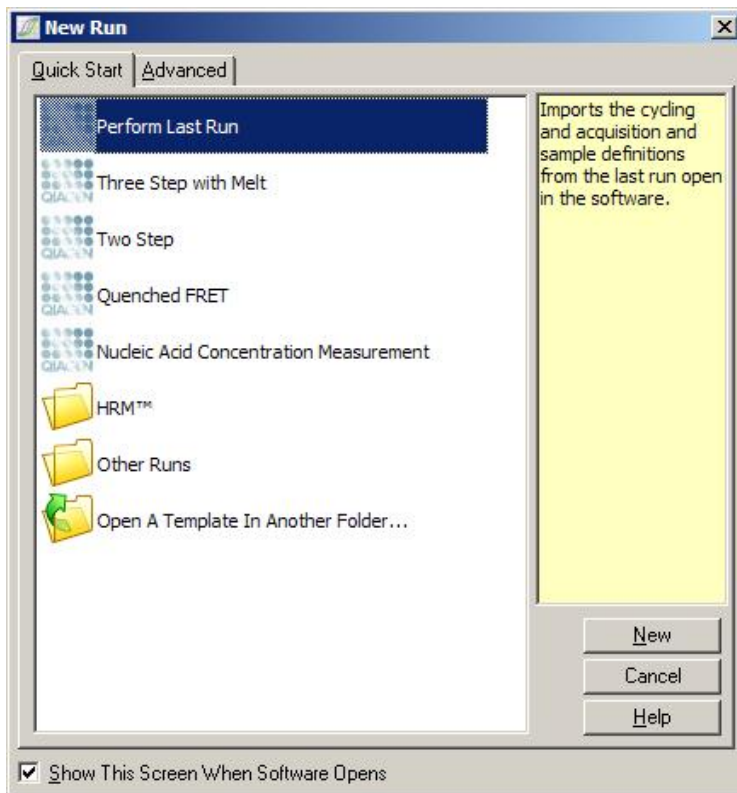

**Perform Last Run** (Spustiť posledný cyklus):

**Perform Last Run** (Spustiť posledný cyklus) použije cyklovanie, získavanie a definície vzoriek z posledného cyklu otvoreného v softvéri.

**Three Step with Melt** (Tri kroky s topením):

Toto je trojkrokový profil cyklovania a krivka topenia so získaním údajov na zelenom kanáli.

**Two Step** (Dva kroky):

Toto je dvojkrokový profil cyklovania so získaním údajov na zelenom, žltom, oranžovom a červenom kanáli.

**Quenched FRET** (Zhášaná FRET):

Toto je trojkrokový profil cyklovania a krivka topenia. Na rozdiel od trojkrovového cyklu s topením sa údaje získajú na konci kroku nasadenia.

**Nucleic Acid Concentration Measurement** (Meranie koncentrácie nukleovej kyseliny):

Toto je prednastavený templát na meranie koncentrácie nukleovej kyseliny pomocou interkalačných farbív.

**HRM:**

Tento priečinok obsahuje profily vysoko-rozlišovacej analýzy kriviek topenia.

**Other Runs** (Ostatné cykly):

Tento priečinok obsahuje doplnkové profily.

Profily cyklovania a získavania pre všetky templáty sa môžu pomocou sprievodcu upravovať.


**Poznámka:** Templáty definované používateľom sa môžu pridať do zoznamu templátov v sprievodcovi Quick Start (rýchle spustenie) tak, že sa skopírujú alebo uložia ako súbory \*.ret do priečinka **C:\Program Files\Rotor-Gene Q Software\Templates\Quick Start Templates**. Po skopírovaní súboru do tohto umiestnenia sa templát zobrazí ako ikona v zozname. Ak chcete ikony pre svoje templáty prispôbiť, vytvorte obrázok \*.ico s rovnakým názvom súboru aký má templát.

K templátom patriacim do jednej skupiny sa môžu vytvoriť podpriečinky. To umožňuje organizovanie templátov, čo môže byť praktické, napríklad ak prístroj používa viacero používateľov.

### Výber rotora

V ďalšom okne vyberte zo zoznamu typ rotora.


Zaškrtnite políčko **Locking Ring Attached** (Poistný krúžok pripevnený) a potom kliknite na možnosť **Next** (Ďalej).

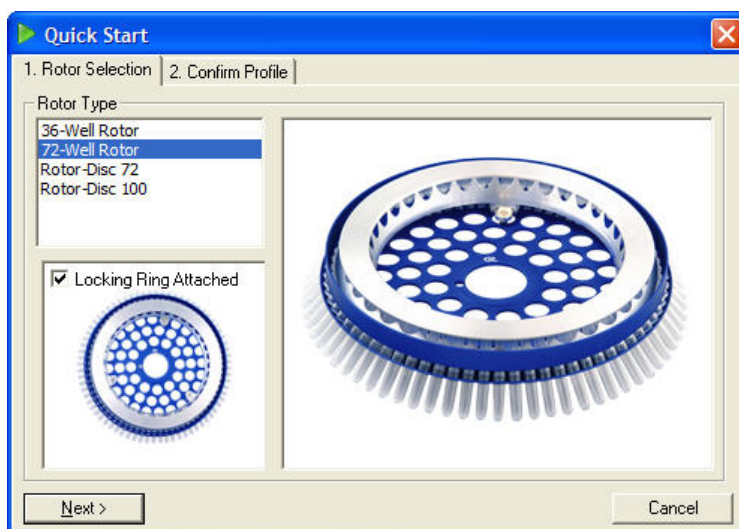

### Potvrdenie profilu


Podmienky cyklovania a čítacích kanálov vybraného templátu sú dôležité. Tie sa môžu zmeniť pomocou okna **Edit Profile** (Editovať profil) (pozri časť Editovanie profilu).

Na spustenie cyklu kliknite na tlačidlo **Start Run** (Spustiť cyklus). Tiež je možné uložiť templát pred spustením cyklu kliknutím na možnosť **Save Template** (Uložiť templát).

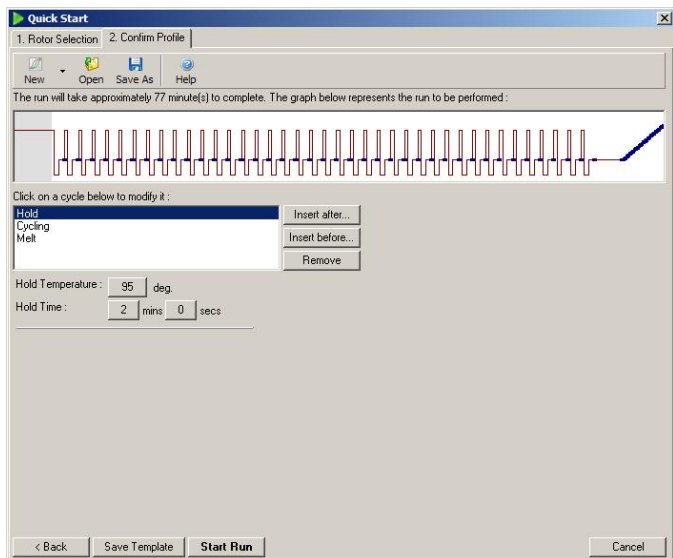

## Uloženie cyklu


Po kliknutí na tlačidlo **Start Run** (Spustiť cyklus) sa zobrazí okno **Save As** (Uložiť ako). Cyklus sa môže uložiť v želanom umiestnení používateľa. K cyklu sa priradí názov súboru, ktorý sa skladá z použitého templátu a dátumu cyklu. Súčasťou názvu súboru je tiež sériové číslo (1, 2 atď.), aby bolo možné automatické pomenovanie množstva cyklov, ktoré v ten istý deň použijú ten istý templát.

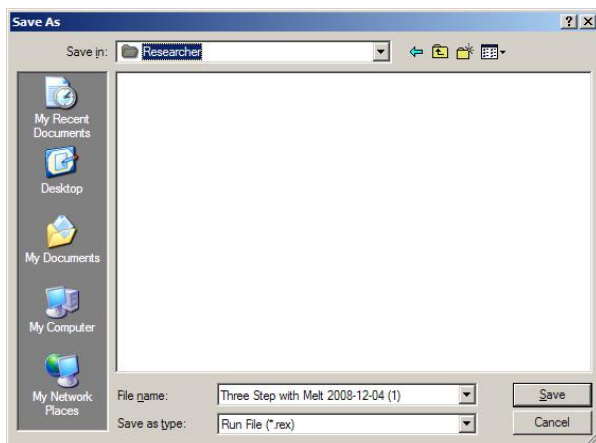



## Nastavenie templátu

Po spustení cyklu umožňuje okno **Edit Samples** (Upraviť vzorky) definovanie a popisovanie vzoriek.

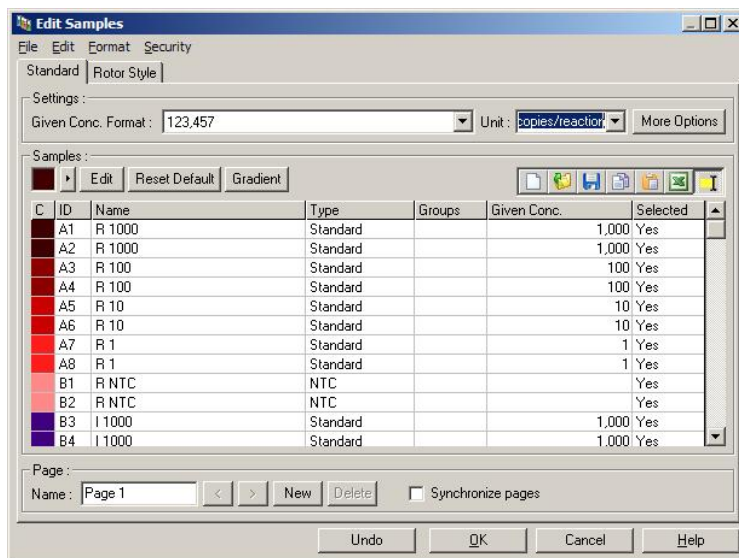


Okno **Edit Samples** (Upraviť vzorky) sa zobrazí po spustení cyklu tak, aby ho používateľ mohol teraz použiť na vloženie názvov vzoriek. Ak sa názvy vzoriek vložia počas cyklu veľmi rýchlo (napr. pomocou skenera čiarových kódov), môže dôjsť k premiestneniu písmen v rámci názvov vzoriek. Preto sa odporúča nepoužívať skener čiarových kódov a, ak je to možné, vkladať názvy vzoriek po dokončení cyklu. Viac informácií o nastavení definícií vzoriek v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky) nájdete v časti 6.8.4.

### 5.1.2 Sprievodca Advanced

Sprievodca Advanced (Pokročilý) poskytuje možnosti, ktoré nie sú dostupné v sprievodcovi Quick Start (Rýchle spustenie), ako napríklad konfigurácia optimalizácie výťažku.

Ak chcete použiť sprievodcu Advanced (pokročilý), vyberte templát dvojitým kliknutím na jej názov v zozname pod kartou **Advanced** (Pokročilé) okna **New Run** (Nový cyklus).

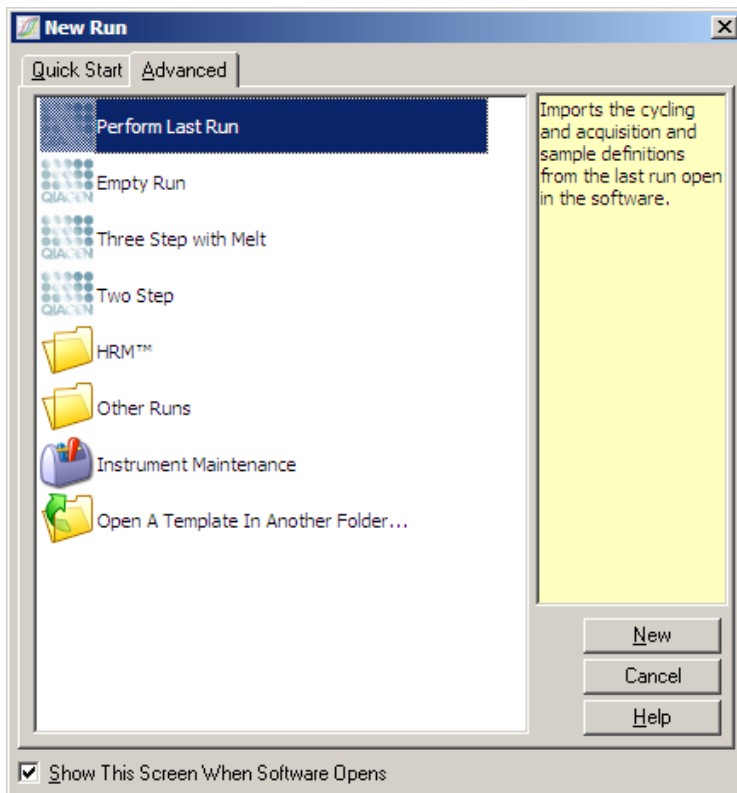

Možnosti templátu dostupné v tomto okne sú podobné ako možnosti dostupné pri použití sprievodcu Quick Start (Rýchle spustenie) (časť 5.1.1).

<b>Perform Last Run</b> (Spustiť posledný cyklus):	<b>Perform Last Run</b> (Spustiť posledný cyklus) importuje cyklovanie, získavanie a definície vzoriek z posledného cyklu otvoreného v softvéri.
<b>Empty Run</b> (Prázdny cyklus):	Toto je prázdny cyklus, ktorý umožňuje používateľovi definovať všetky parametre profilu.
<b>Three Step with Melt</b> (Tri kroky s topením):	Toto je profil dvojkrokového cyklovania o získaní údajov len na zelenom kanáli na urýchlenie cyklu.
<b>HRM:</b>	Tento priečinok obsahuje 2 profily vysoko-rozlišovacej analýzy kriviek topenia.
<b>Other Runs</b> (Ostatné cykly):	Tento priečinok obsahuje doplnkové profily.
<b>Instrument Maintenance</b> (Údržba prístroja):	Obsahuje templát použitý počas optického overenia teploty (Optical Temperature Verification, OTV). Viac informácií nájdete v časti 9. Tento templát je zamknutý, aby sa profil vždy používal správne.

**Poznámka:** Templáty definované používateľom sa môžu pridať do zoznamu templátov tak, že sa skopírujú alebo uložia ako súbory \*.ret do priečinka **C:\Program Files\Rotor-Gene Q Software\Templates\**. Po skopírovaní súboru do tohto umiestnenia sa templát zobrazí ako ikona v zozname.

## Okno 1 sprievodcu novým cyklom

V ďalšom okne vyberte zo zoznamu typ rotora.


Zaškrtnite políčko **Locking Ring Attached** (Poistný krúžok pripevnený) a na pokračovanie kliknite na možnosť **Next** (Ďalej).



## Okno 2 sprievodcu novým cyklom

V ďalšom okne môžete vložiť meno používateľa a poznámky k cyklu. Takisto je potrebné zadať reakčný objem.


Ak sa v okne 1 vyberie rotor 72-Well Rotor, sú v rozbaľovacej ponuke dostupné tri možnosti **Sample Layout** (Usporiadanie vzoriek). Štandardná možnosť je „**1, 2, 3...**“. Väčšina používateľov vyberie túto možnosť. Možnosť „**1A, 1B, 1C...**“ by ste mali zvoliť vtedy, keď sa vzorky vložia do susedných skúmaviek s prúžkom s objemom 0,1 ml pomocou viackanálovej pipety s 8 kanálmi. Usporiadanie „**A1, A2, A3...**“ sa môže vybrať, ak je vhodné.

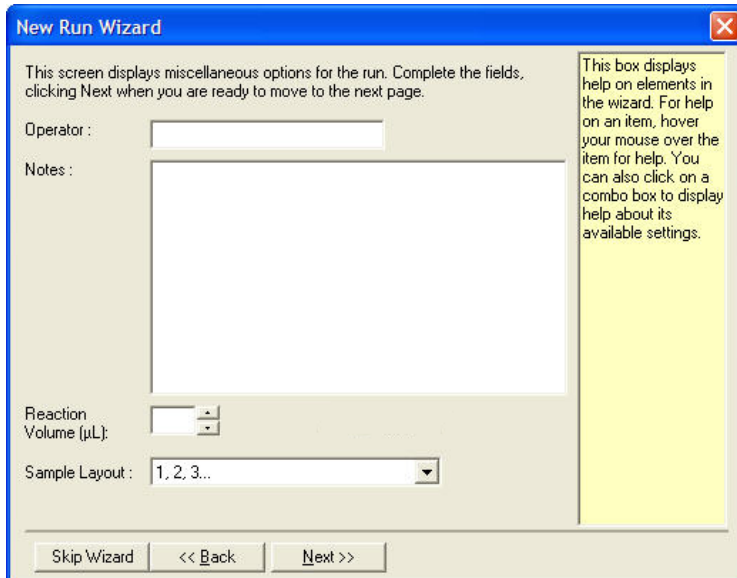

### Okno 3 sprievodcu novým cyklom

V tomto okne je možné zmeniť **Temperature Profile** (Teplotný profil) a **Channel Setup** (Nastavenie kanála). Ak kliknete na tlačidlo **Edit Profile...** (Editovať profil...), zobrazí sa okno **Edit Profile** (Editovať profil...), v ktorom môžete zmeniť podmienky cyklovania a zvoliť čítacie kanály (časť Editovanie profilu).

Po nastavení profilu kliknite na tlačidlo **Gain Optimisation...** (Optimalizácia výťažku...), aby sa zobrazilo okno **Gain Optimisation** (Optimalizácia výťažku...) (pozri stranu 61).

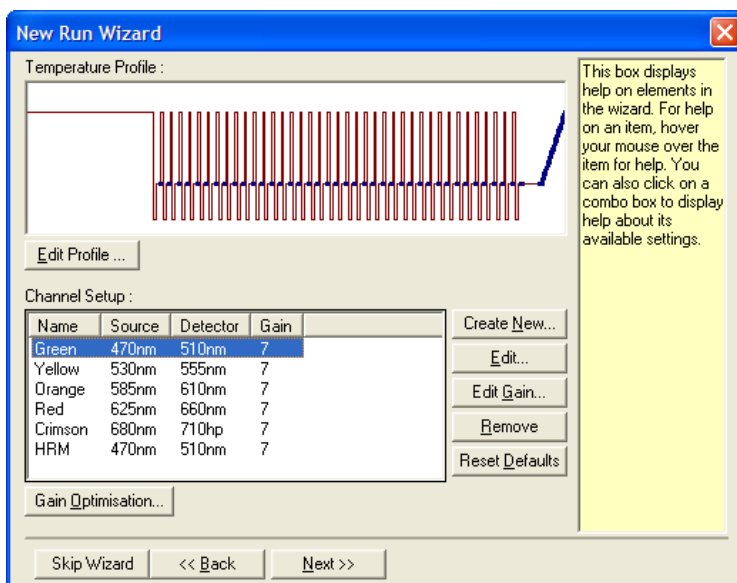

## Editovanie profilu

Okno **Edit Profile** (Editovať profil) umožňuje špecifikovať podmienky cyklovania a čítacích kanálov. Prvotný zobrazený profil je založený na šablóne zvolenom pri nastavovaní cyklu (pozri stranu 45). Profil sa zobrazí graficky. Zoznam segmentov profilu sa zobrazí pod grafickým zobrazením. Tento list môže obsahovať možnosť Hold (Retencia) 53), Cycling (Cyklovať) (strana 54), Melt (Topenie) (strana 54) alebo HRM, ak prístroj disponuje kanálom HRM (strana 57).

Každá fáza profilu sa dá editovať kliknutím na príslušnú oblasť grafického zobrazenia alebo na názov v zozname a potom zmenou zobrazených nastavení.


Insert after... (Vložiť po...): Táto možnosť umožňuje prídanie nového cyklu po vybranom cykle.

Insert before... (Vložiť pred...): Táto možnosť umožňuje prídanie nového cyklu pred vybraným cyklom.


Remove (Odstrániť): Pomocou tejto možnosti odstránite zvolený cyklus z profilu.

### Retencia

Príkazom Hold (Retencia) prikážete prístroju Rotor-Gene Q MDx, aby zostal počas nastaveného času udržiaval vymedzenú teplotu. Na zmenu teploty kliknite na tlačidlo **Hold Temperature** (Retencia teploty) a napíšte alebo použite posuvnú lištu na zvolenie želanej teploty. Na zmenu trvania príkazu Hold (Retencia) kliknite na tlačidlo **Hold Time** (Čas retencie), **mins** (minúty) a **secs** (sekundy).

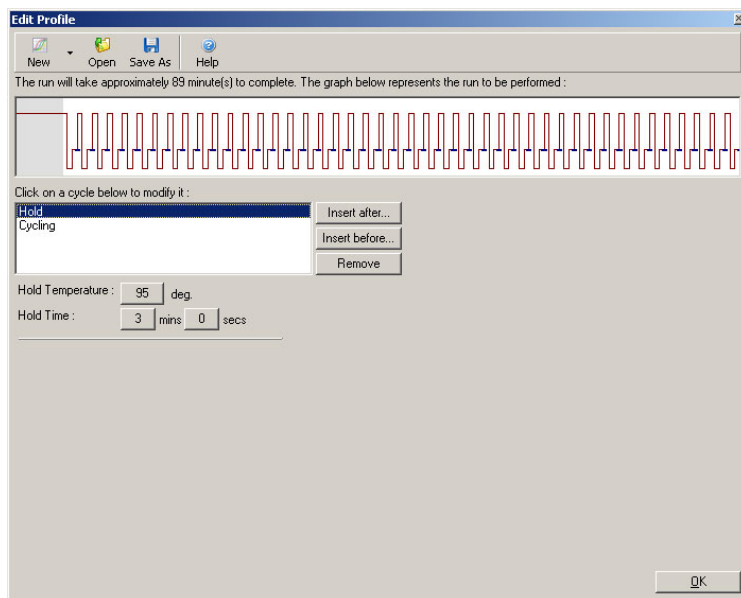

Pri vykonávaní cyklovania optickej denaturácie sa môžu možnosti Hold (Retencia) použiť ako krok kalibrácie. V tomto prípade sa kalibrácia topenia vykonáva pred príkazom Hold (Retencia). Štandardne sa toto nakonfiguruje pre prvú možnosť Hold (Retencia) v cykle, ale môže sa podľa potreby meniť.

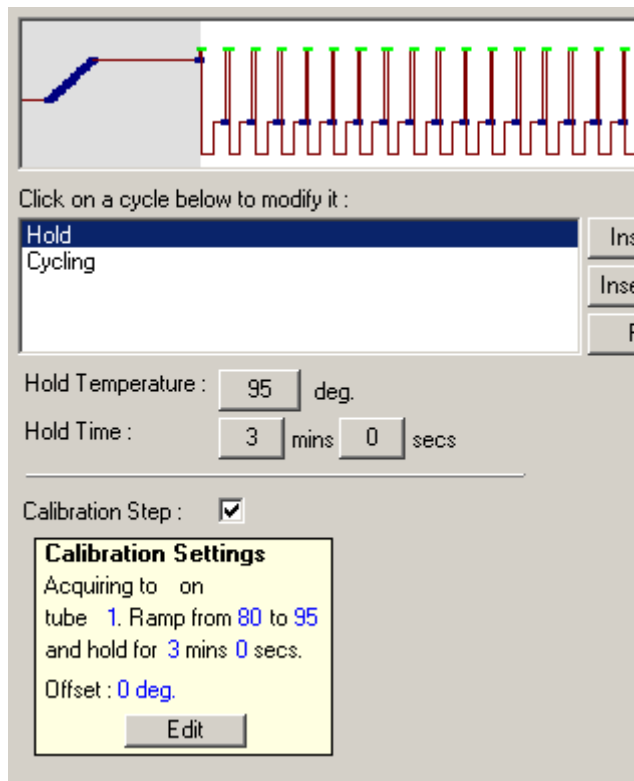


Viac informácií o cyklovaní optickej denaturácie nájdete na strane 57.

### Cyklovanie

Cycling (Cyklovanie) sa opakuje definovaný počet krát používateľom definované kroky teploty a času. Počet opakovaní sa nastaví pomocou tlačidla **This cycle repeats X time(s)**. (Tento cyklus sa opakuje X-krát).

Jeden cyklus sa zobrazí graficky (ako zobrazuje snímka nižšie). Každý krok cyklu sa môžu upraviť. Teplota sa môže zmeniť potiahnutím teplotnej línie v grafe nahor alebo nadol. Trvanie kroku sa môže zmeniť potiahnutím hranice teploty v grafe doľava alebo doprava. Prípadne kliknite na krok a použite tlačidlá teploty a času naľavo od grafu.

Kroky sa môžu do cyklu pridať alebo z neho odobrať pomocou tlačidiel „-“ a „+“ v pravej hornej časti grafu.

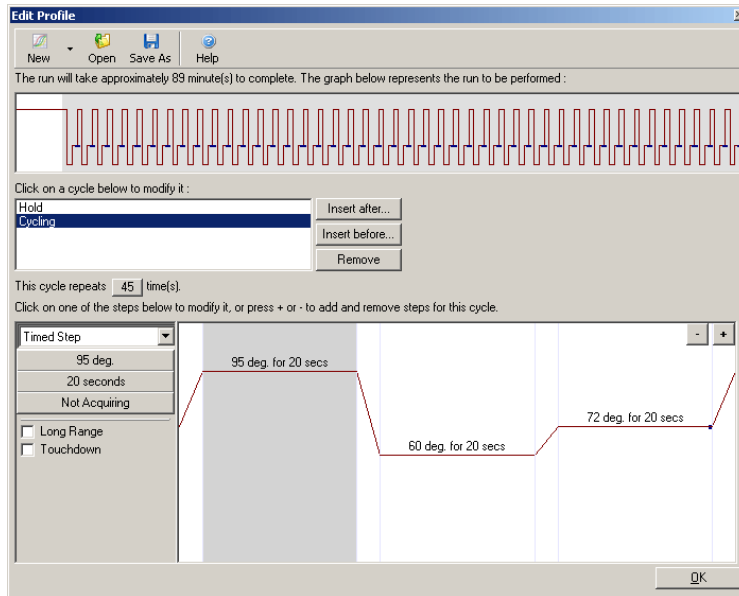

**Long Range (Dlhodobý):** Zaškrtnutím tohto políčka sa čas retencie vybraného kroku predĺži o 1 sekundu s každým novým cyklom.


**Touchdown:** Zaškrtnutím tohto políčka sa zníži teplota o definovaný počet stupňov na definovaný počet prvotných cyklov. Toto sa potom zobrazí na displeji.

## Čítanie

Údaje sa môžu získať na ktoromkoľvek kanáli v každom kroku cyklu. Na nastavenie kanála na čítanie údajov kliknite na tlačidlo **Not Acquiring** (Bez čítania) (ak už je kanál nastavený na čítanie v tomto kroku, sú tu uvedené čítacie kanály).



Po kliknutí na tlačidlo **Not Acquiring** (Bez čítania) sa zobrazí okno **Acquisition** (Čítanie).

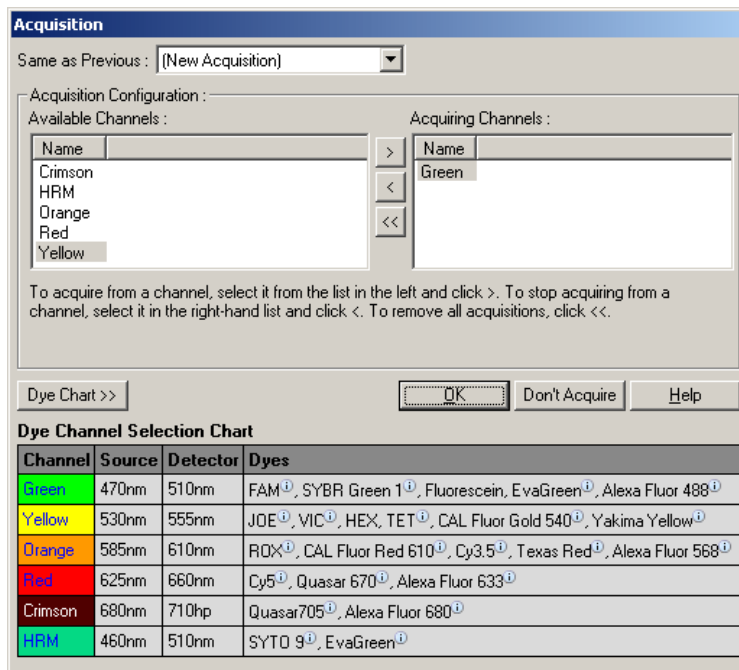

Na nastavenie kanála na čítanie vyberte kanál a presuňte ho zo zoznamu „Available Channels“ (Dostupné kanály) do zoznamu „Acquiring Channels“ (Čítacie kanály) pomocou tlačidla **>**. Na odstránenie vybraného kanála zo zoznamu „Acquiring Channels“ (Čítacie kanály) použite tlačidlo **<**. Tlačidlom **<<** odstránite všetky kanály zo zoznamu „Acquiring Channels“ (Čítacie kanály). Kliknutím na tlačidlo **Don't Acquire** (Nečítať) odstránite z tohto kroku tiež všetky prečítané údaje.

Ak profil obsahuje viac ako jednu sekvenciu cyklovania, môžu sa získané údaje priradiť údajom z predchádzajúceho cyklovania. Na výber kroku cyklovania, ku ktorému sa majú údaje priradiť, použite rozbaľovaciu ponuku **Same as Previous** (Rovnaké ako predchádzajúce).

Tabuľka Dye Channel Selection Chart (Tabuľka výberu farbiva kanála) pomôže používateľovi rozhodnúť sa, ktorý kanál je vhodný pre farbivo, ktoré chce použiť. Farbivá zobrazené v tabuľke sú bežne používané farbivá a neznamenajú obmedzenia prístroja.

Možnosti čítania údajov popísané vyššie platia aj pre kroky „Melt“ (Topenie) okrem prípadu, kedy nie je možné priradiť získané údaje pomocou ponuky **Same as Previous** (Rovnaké ako predchádzajúce).


### Topenie a hybridizácia

Melt (Topenie) je sklon medzi 2 teplotami, od nižšej po vyššiu teplotu. Povolenný teplotný rozsah je 35 – 99 °C.



Na nastavenie topenia špecifikujte začiatočnú teplotu, koncovú teplotu, teplotné prírastky, trvanie retencie pri prvej teplote čítania pred spustením sklonu, čas, počas ktorého sa prírastok udrží a čítacie kanály.

Medzi 2 teplotami sa vygeneruje sklon. Ak je začiatočná teplota vyššia ako koncová teplota, názov kroku sa zmení na **Hybridisation** (Hybridizácia). Možnosť **Acquiring To** (Čítanie do) nastavená na Melt A (Topenie A) na snímke nižšie sa môže zmeniť kliknutím na tlačidlo. Zobrazí sa okno **Acquisition** (Čítanie) a môžu sa zvoliť kanály.

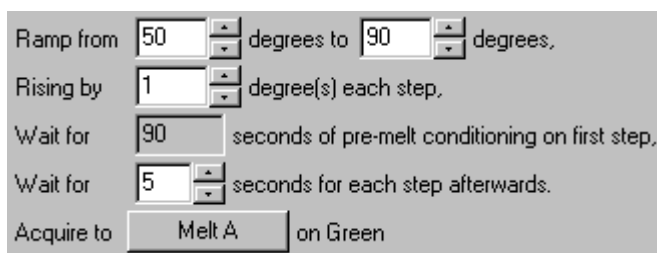

The screenshot shows a configuration window for a temperature ramp. It includes the following fields and labels:

- Ramp from: 50 degrees to 90 degrees.
- Rising by: 1 degree(s) each step.
- Wait for: 90 seconds of pre-melt conditioning on first step.
- Wait for: 5 seconds for each step afterwards.
- Acquire to: Melt A on Green

Pri spustení štandardného topenia sa teplota zvýši v prírastkoch po 1 °C, pričom pred každým čítaním sa počká 5 sekúnd. Prístroj Rotor-Gene Q MDx sa môže nakonfigurovať na vykonávanie topení v prírastkoch po 0,02 °C. Minimálny čas retencie medzi teplotnými krokmi sa líši v závislosti od počtu stupňov medzi každým krokom.

### Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia


Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia (High Resolution Melt, HRM) charakterizuje vzorky dvojreťazcovej DNA na základe ich rozpadu (topenia). Podobá sa klasickej analýze kriviek topenia, ale poskytuje oveľa viac informácií pre širšie spektrum aplikácií. Vzorky sa môžu diskriminovať podľa sekvencie, dĺžky, obsahu GC alebo komplementarity reťazcov až k zmenám jednotlivých párov báz.

Analýza HRM sa môže vykonávať len na prístrojoch, na ktorých je nainštalovaný hardvér a softvér pre HRM. Údaje sa získavajú pomocou špecializovaných zdrojov a detektorov HRM. Analýza HRM zahŕňa tiež možnosť uskutočniť optimalizáciu výťažku pred začatím topenia. Po vykonaní HRM sa môžu údaje analyzovať pomocou analyzačného softvéru HRM (časť 10).

### Cyklovanie optickej denaturácie


Cyklovanie optickej denaturácie je vzrušujúca technika dostupná na prístroji Rotor-Gene Q MDx, ktorá vykonáva analýzu kriviek topenia v reálnom čase na stanovenie maxima topenia referenčnej vzorky. To udáva denaturáciu produktu PCR s vyššou presnosťou ako nastavenie konkrétnej teploty denaturácie počas času retencie. Na uskutočnenie tejto techniky jednoducho vložte referenčnú skúmavku produktu PCR do pozície 1 pre skúmavky v rotore. Referenčná skúmavka musí obsahovať tiež detekčnú chemickú látku, ktorá umožňuje detekciu rozpadu reťazca.

Pri ohriatí na prvotnú teplotu denaturácie sa topenie vykonáva na zelenom kanáli štandardne od 80 °C do 95 °C. Parametre tohto prvotného topenia môže používateľ nastaviť. Z týchto údajov sa vygeneruje krivka topenia a automaticky sa zanalyzuje.

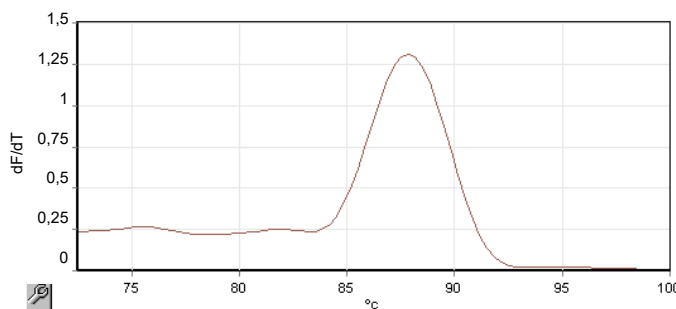

Maximum topenia sa referencuje späť k nespracované údaje, aby sa získal prah denaturácie. Potom sa prístroj pri každom kroku cyklovania optickej denaturácie zohreje čo najrýchlejšie a neustále dochádza z zberu údajov. Keď referenčné skúmanka dosiahne hladinu fluorescence prahu denaturácie, prístroj sa okamžite schladí a prejde do ďalšieho naprogramovaného kroku cyklu. Maximum sa počas cyklovania nevypočíta. Namiesto toho sa hladina fluorescence referencuje s maximum topenia a toto znamená prah denaturácie.

V ďalšom grafe boli prekryté nespracované údaje fluorescence a prvá derivácia. Tu môžeme vidieť zhodu medzi prahom denaturácie a maximum topenia získanú počas kalibrácie.

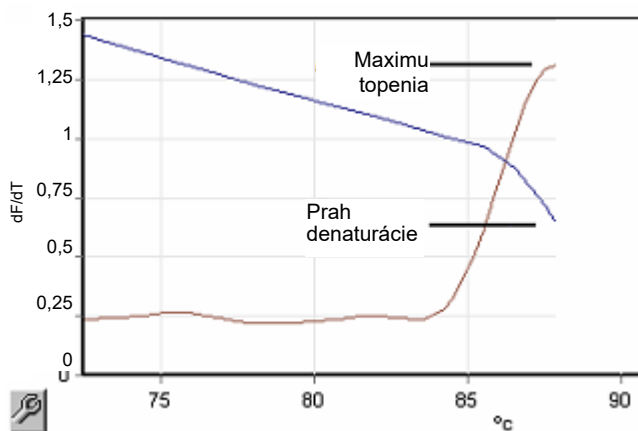

Na vykonanie cyklovania optickej denaturácie potrebujete:

- Vopred amplifikovaný produkt PCR, ktorý umiestnite do pozície 1 v rotore. Táto vzorka by mala obsahovať rovnaký produkt PCR ako vzorky záujmu a detekčnú chemickú látku na monitorovanie rozpadu produktu PCR.

- Profil optickej denaturácie. Môžete vytvoriť nový profil alebo upraviť existujúci (pozri podrobnosti nižšie).


Cyklus optickej denaturácie sa zdá byť takmer identický s ostatnými cyklami. Hladnými rozdielmi je krok topenia automaticky vložený na začiatku profilu a ostrý profil kroku denaturácie počas cyklovania. Cyklus optickej denaturácie nevyžaduje definované retenčné časy, pretože rozpad produktu sa monitoruje v každom cykle.

Na uskutočnenie tejto techniky sú potrebné tieto informácie o cykle:


- Pôvodná teplota denaturácie. Je to rovnaká teplota ako v denaturačnom kroku v profile štandardného cyklovania.
- Pozícia skúmavky vzorky PCR, ktorá vytvorí krivku topenia na zelenom kanáli.
- Musí sa definovať profil cyklovania optickej denaturácie.


Nový cyklus optickej denaturácie vytvoríte takto.

1. Otvorte okno **Edit Profile** (Editovať profil). Potom kliknite na **New** (Nový). V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na „Insert after“ (Vložiť za) a z ponuky vyberte možnosť **New Cycling** (Nové cyklovanie). Kliknutím na graf vyberte jeden z krokov teploty. V rozbaľovacej ponuke prepnite z možnosti **Timed Step** (Časovaný krok) na **Optical Denature** (Optická denaturácia). Zobrazí sa štandardný profil obsahujúci denaturačný krok a krok cyklus optickej denaturácie.

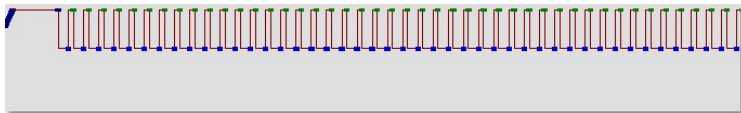


Naklonená časť na začiatku cyklu predstavuje kalibračný proces. Zelené bodky predstavujú čítania vykonané v každom cykle počas ohrievania. Modré bodky predstavujú čítanie na konci kroku nasadenia pri teplote 60 °C. Nezabudnite, že zatiaľ čo profil zobrazuje každý krok s rovnakou teplotou denaturácie, toto nemusí byť ten prípad. Ak vzorka potrebuje trochu dlhší čas na topenie ku koncu cyklu, počká proces optickej denaturácie na topenie podľa údajov fluorescencie a nie podľa času. Z tohto dôvodu sa môže teplotná stopa pre každý cyklus líšiť.

2. Kliknite na prvú polovicu grafu so symbolom optickej denaturácie . Na ľavej strane obrazovky sa zobrazia informácie **Calibration Settings** (Nastavenia kalibrácie).

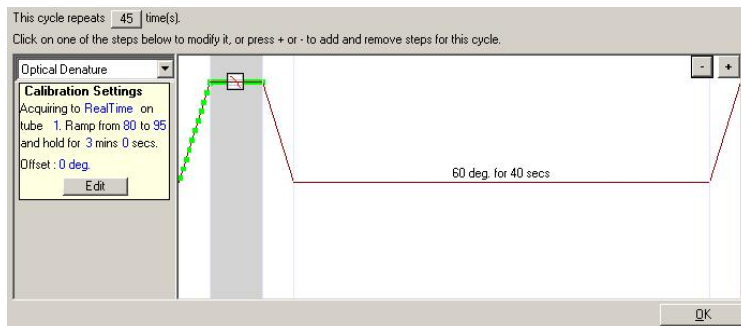


3. Informácie „Calibration Settings“ (Nastavenia kalibrácie) sú zvyčajne správne. Na ich zmenu, ak je potrebné, kliknite na **Edit** (Editovať). Zobrazí sa okno **Calibration Settings** (Nastavenia kalibrácie).

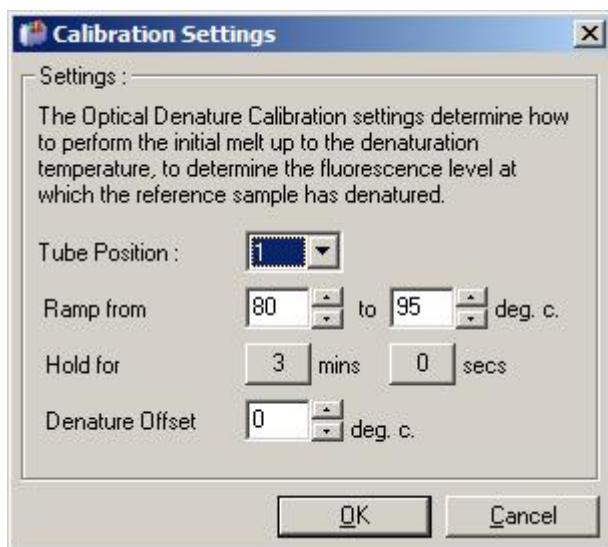

4. Zabezpečte nasledovné:
- Skúmavka uvedená v **Tube Position** (Pozícia skúmavky) obsahuje produkt PCR, ktorý zobrazí maximum topenia na zelenom kanáli.
  - Teplota konečného sklonu vzorku nespáli, ale bude dostatočne vysoká na to, aby sa roztopila.
  - Čas retencie je dostatočný na denaturáciu vzorky.
  - Posun denaturácie je nastavený vhodne. Štandardne je teplota 0°C vhodná pre väčšinu topení. Topenia s veľmi ostrými prechodmi môžu vyžadovať posun denaturácie – 0,5 °C do –2°C, čo určí používateľ, aby sa zaistilo, že prechod do topenia sa zdeteguje.


Takisto môžete definovať denaturačný krok tak, že vložíte nový krok retencie. Kliknite na možnosť **Insert before** (Vložiť pred) a z ponuky vyberte možnosť **New Hold at Temperature** (Nová retencia pri teplote). Zobrazia sa nastavenia kalibrácie.

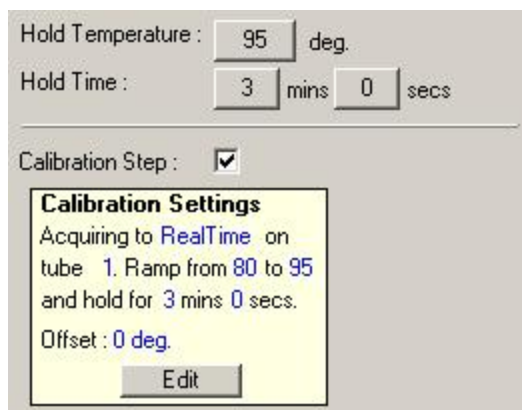

Nastavenia kalibrácie sa synchronizujú s nastaveniami denaturácie, takže prechod na čas retencie v kroku denaturácie automaticky aktualizuje čas retencie kalibrácie. Dôvodom je, že proces kalibrácie a denaturácie sú v cyklovaní optickej denaturácie ekvivalentné.

### Zmena existujúceho kroku na použitie cyklovania optickej denaturácie

Na zmenu existujúceho kroku denaturácie v sekvencii cyklovania vyberte v zozname v okne **Edit Profile** (Editovať profil) cyklus. Potom kliknutím na tento cyklus na displeji zvolte denaturačný krok.

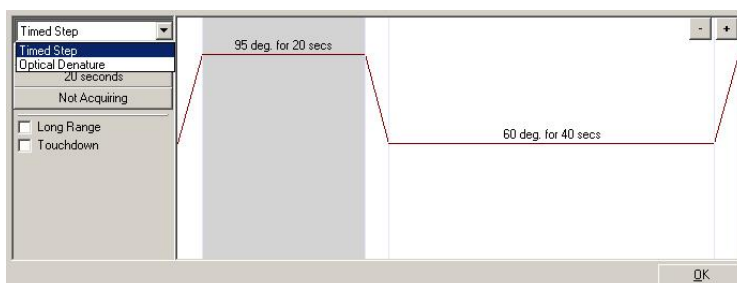

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte **Optical Denature** (Optická denaturácia). Teplota a čas retencie sa odstráni a zobrazí sa ikona **Optical Denature**  (Optická denaturácia).


### Optimalizácia výťažku

Pri nastavovaní nového cyklu je užitočné používať funkciu **Gain Optimisation** (Optimalizácia výťažku). Tá umožňuje optimalizovať výťažok na nastavenie, ktoré poskytne želaný rozsah začiatkovej fluorescencie pri nastavenej teplote (zvyčajne teplota, pri ktorej dochádza k získavaniu údajov) v každom čítanom kanáli. Cieľom optimalizácie výťažku je zaisťiť, aby sa zozbierali všetky údaje v rámci dynamického rozsahu detektora. Ak je výťažok príliš malý, signál sa stratí v šume pozadia. Ak je príliš vysoký, všetky signály sa stratia mimo stupnice (saturovaná).


Rozsah výťažku pre každý kanál je -10 do 10, kde -10 je najmenej citlivý a 10 najviac citlivý.

Pri prvom spustení reakcií odporúčame pripraviť testovaciu vzorku, ktorá bude obsahovať všetky reakčné zložky. Testovaciu vzorku vložte do prístroja Rotor-Gene Q MDx a použite optimalizáciu výťažku na určenie najlepšieho nastavenia výťažku. Ak dôjde pri výťažku zvolenom v optimalizácii výťažku k slabému signálu, potom je potrebné zvýšiť rozsah **Target Sample Range** (Cieľový rozsah vzorky). Ak je signál nasýtený, potom je potrebné znížiť rozsah **Target Sample Range** (Cieľový rozsah vzorky).

Na spustenie optimalizácie výťažku kliknite v okne 3 New Run Wizard (Sprievodca novým cyklom) na tlačidlo **Gain Optimisation...** (Optimalizácia výťažku...) (pozri časť Okno 3 sprievodcu novým cyklom).

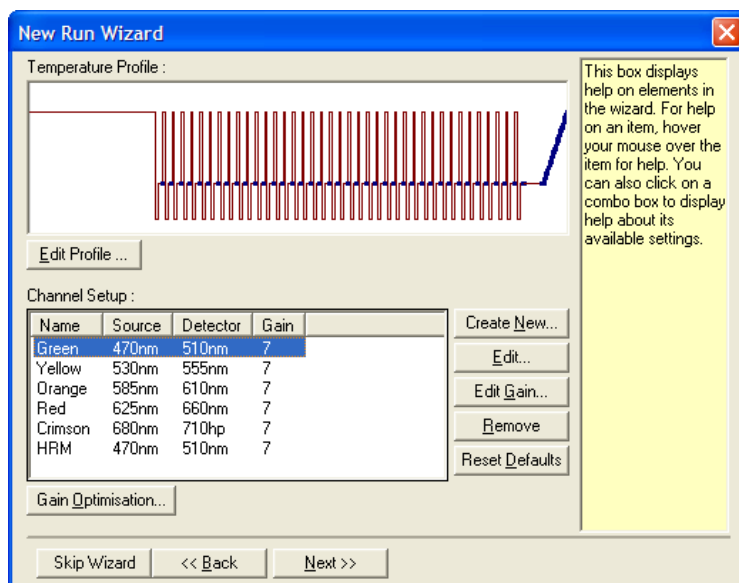

Zobrazí sa okno **Auto-Gain Optimisation Setup** (Nastavenie optimalizácie automatického výťažku). Toto okno umožňuje optimalizáciu pomocou automatického upravenia nastavení výťažku, kým údaje pre všetky zvolené kanály nespádajú do alebo sú nižšie ako určitá prahová hodnota.

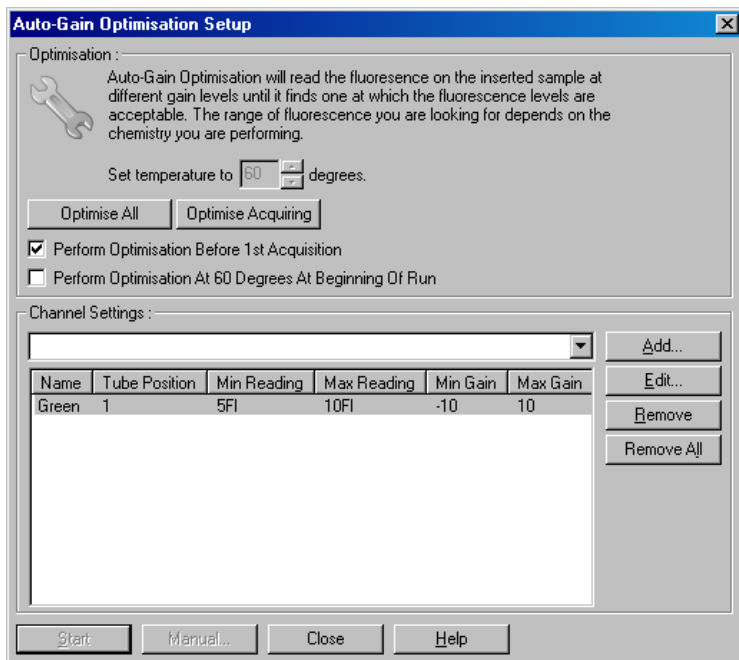

**Set temperature to** (Nastaviť teplotu na):

Pred čítaním sa prístroj Rotor-Gene Q MDx zohreje alebo schladí tak, aby teplota dosiahla určitú hodnotu. Štandardne je táto teplota nastavená ako teplota čítania.

**Optimise All/Optimise Acquiring** (Optimalizovať všetko/optimalizovať čítanie):

Možnosť **Optimise All** (Optimalizovať všetko) sa pokúsi optimalizovať všetky kanály, ktoré softvér pozná. Možnosťou **Optimise Acquiring** (Optimalizovať čítanie) optimalizujete len kanály, ktoré sa používajú v tepelnom profile definovanom v cykle (cyklovanie a topenie).

**Perform Optimisation Before First Acquisition** (Vykonať optimalizáciu pred 1. čítaním):

Toto políčko zaškrtníte, aby ste uskutočnili optimalizáciu výťažku pri prvom cykle, v ktorom dôjde k čítaniu údajov. Táto možnosť sa odporúča pre optimalizáciu automatického výťažku.

**Perform Optimisation At [x] Degrees At Beginning of Run** (Vykonať optimalizáciu pri [x] stupňoch na začiatku cyklu):


Toto políčko zaškrtníte na uskutočnenie optimalizácie výťažku bezprostredne pred spustením cyklu. Prístroj Rotor-Gene Q MDx sa zohreje na presne definovanú teplotu, vykoná sa optimalizácia výťažku a potom začne prvý krok cyklovania, čo je zvyčajne denaturačný krok. Túto možnosť môžete vybrať vtedy, ak by pri optimalizácii výťažku počas cyklu došlo k tomu, že prvotný krok by trval príliš dlho. Možnosť **Perform Optimisation Before 1st Acquisition** (Vykonať optimalizáciu pred 1. čítaním) sa zvyčajne uprednostňuje, pretože sa optimalizácia výťažku vykonáva čo najbližšie k podmienkam cyklu.

**Channel Settings** (Nastavenia kanála):

Táto rozbaľovacia ponuka umožňuje pridávanie kanálov. Vyberte kanál, o ktorý máte záujem, a kliknite na **Add** (Pridať).

**Edit** (Editovať):

Touto možnosťou otvoríte okno, v ktorom je možné nastaviť **Target Sample Range** (Cieľový rozsah vzorky). Hodnota **Target Sample Range** (Cieľový rozsah vzorky) je rozsah prvotnej fluorescencie, ktorý by sa mal nastaviť pre vzorku v konkrétnej skúmavke. Optimalizácia automatického výťažku prečíta každý kanál na základe nastavení výťažku v rozsahu definovanom v možnosti **Acceptable Gain Range** (Prijateľný rozsah výťažku). Vyberie si prvé nastavenie výťažku, pri ktorom dôjde k čítaniu fluorescencie v rámci **Target Sample Range** (Cieľový rozsah vzorky). V uvedenom príklade vyhladá optimalizácia automatického výťažku nastavenie výťažku medzi -10 a 10, pri ktorom bude údaj medzi 5 a 10 FI v skúmavke 1. Vo všeobecnosti je pre interkalačné farbivá vhodná možnosť **Target Sample Range** (Cieľový rozsah vzorky) 1 – 3 FI, zatiaľ čo rozsah 5 – 10 FI je vhodnejší pre chemikálie sondy.

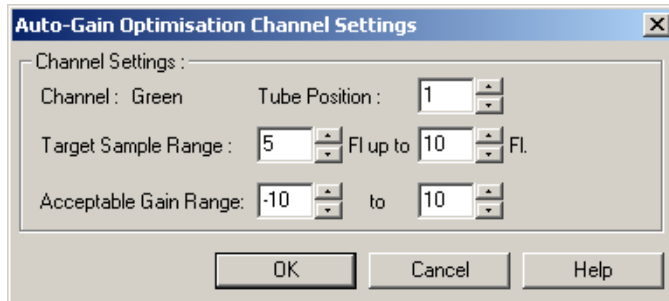

**Remove / Remove All** (Odstrániť/odstrániť všetko): Možnosťou **Remove** (Odstrániť) odstránite zvýraznený kanál. Možnosťou **Remove All** (Odstrániť všetko) odstránite všetky kanály.

**Start** (Štart): Možnosťou **Start** (Štart) spustíte optimalizáciu výťažku. Zvolí sa výťažok, ktorého výsledkom budú hladiny signálu fluorescence v rámci konkrétne určeného rozsahu. Ak fluorescence spadá mimo špecifikovaného rozsahu, nastaví sa výťažok tak, aby sa dosiahla čo najbližšia zhoda.

**Manual** (Manuálne): Pomocou tejto možnosti otvoríte **Manual Gain Adjustment** (Manuálne nastavenie výťažku).


**Changing Gain During a Run** (Zmena výťažku počas cyklu): Ak bol výťažok na začiatku cyklu príliš vysoký alebo príliš nízky, môže sa zmeniť počas prvých cyklov. Vertikálna čiara sa zobrazí tam, kde bol výťažok zmenený. Cykly pred zmenou sa z analýzy vylúčia.

**Poznámka:** Optimalizácia výťažku môže vybrať nastavenie, ktoré nespadá do definovaného rozsahu. To môže byť spôsobené zmenami fluorescence po prvom kroku retencie. Výsledok optimalizácie výťažku poskytuje dobrú predstavu o úrovne fluorescence, na ktorej sa cyklus spustí.

### Manuálne nastavenie výťažku

Ak chcete vykonať „Manual Gain Adjustment“ (Manuálne nastavenie výťažku), kliknite na možnosť **Manual...** (Manuálne...) v okne **Auto-Gain Optimisation Setup** (Nastavenie optimalizácie automatického výťažku). Zobrazí sa okno **Manual Gain Adjustment** (Manuálne nastavenie výťažku). V tomto okne sa zobrazia údaje fluorescence v každej uvedenej teplote v reálnom čase. Táto možnosť sa používa, keď pozadie vzorky nie je známe, a preto sa musí určiť výťažok, aby bol signál vzorky dostatočný na detekciu.



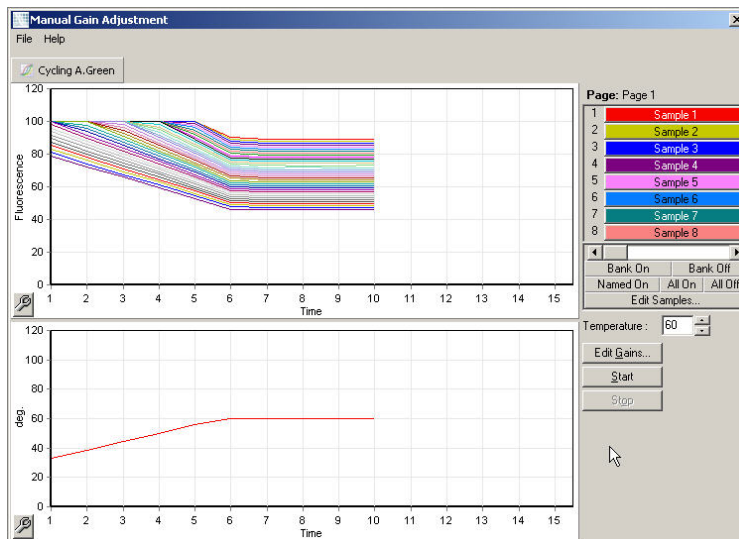

Štandardne sa na displeji zobrazujú všetky vzorky. Vzorky sa dajú presunúť z alebo pridať do zobrazenia pomocou prepínača doprava. Prepínač sa skladá z farebných buniek, z ktorých každá zodpovedá zobrazenej vzorke. Vzorky s jasne sfarbenými bunkami sa zobrazia, zatiaľ čo vzorky s vyblednutou bunkou sa nezobrazia. Vzorky je možné zapnúť alebo vypnúť kliknutím na bunku alebo potiahnutím ukazovateľa myši cez niekoľko vzoriek naraz.


Manuálne nastavenie výťažku odporúčame uskutočniť takto.

1. Nastavte teplotu v okne **Manual Gain Adjustment** (Manuálne nastavenie výťažku) na teplotu čítania potrebnú pre cyklus.
 

**Poznámka:** Teplota sa nenastaví počas prevádzky prístroja Rotor-Gene Q MDx. Prístroj Rotor-Gene Q MDx reštartuje, aby sa zmeny teploty vykonali.
2. Kliknite na **Start** (Štart). Cyklus sa spustí. Teplota prístroja Rotor-Gene Q MDx sa nastaví na teplotu uvedenú v okne. Grafy v okne začnú zobrazovať údaje.
3. Počkajte, kým sa teplota stabilizuje.
4. Všimnite si údaje fluorescencie (FI) koncového bodu.
5. Ak nie je údaj FI na želanej úrovni, kliknite na možnosť **Edit Gains...** (Editovať výťažky...) a upravte ich podľa potreby. Tento proces nemusí byť okamžitý, pretože prístroju Rotor-Gene Q MDx trvá približne 4 sekundy, kým prečíta každý bod v každom kanáli a počas tohto času je používateľské rozhranie deaktivované.
6. Proces zopakujte, kým nie je hodnota FI na želanej úrovni.
7. Kliknite na **Stop** (Zastaviť). Ak cyklus pri stlačení tlačidla **Stop** (Zastaviť) stále číta údaje, dokončí prístroj Rotor-Gene Q MDx najprv čítanie a potom sa zastaví. Tento proces môže trvať až 5 sekúnd pre každý čítací kanál.

#### Okno 4 sprievodcu novým cyklom


Toto okno vytvorí súhrn cyklu. Skontrolujte parametre a ak sú správne, kliknite na **Start Run** (Spustiť cyklus). Budete vyzvaní, aby ste zadali názov súboru. Nastavenia môžete takisto uložiť ako templát pre budúce cykly pomocou tlačidla **Save Template** (Uložiť templát).

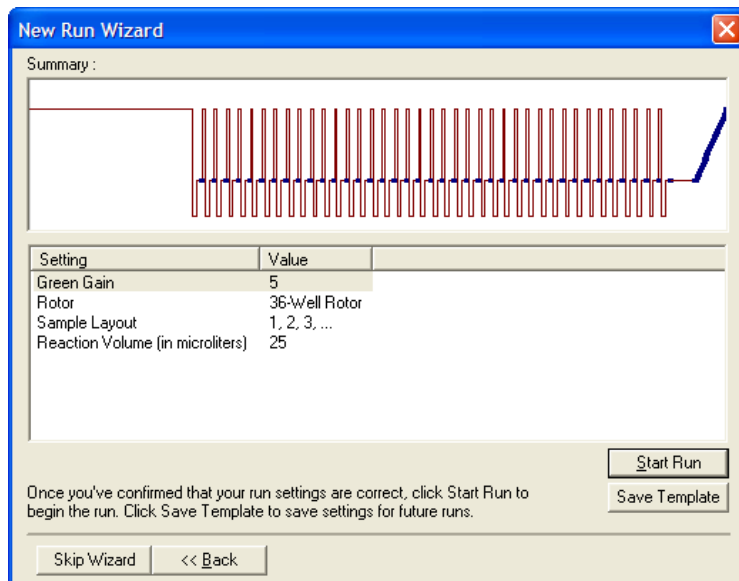

#### Okno 5 sprievodcu novým cyklom

Do tohto okna zadajte počas prebiehajúceho cyklu typy vzoriek a popisy. Funkcia tohto okna je rovnaká akú má okno **Edit Samples** (Upraviť vzorky) (strana 129). Informácie o vzorke sa môžu zadať aj po dokončení cyklu.

Tlačidlom **Finish and Lock Samples** (Dokončiť a zamknúť vzorky) zatvoríte obrazovku a zabránite zmene názvov vzoriek. Viac informácií o tejto možnosti a ostatných bezpečnostných funkciách nájdete v časti „Ochrana prístupu do softvéru Rotor-Gene Q“ (strana 135).

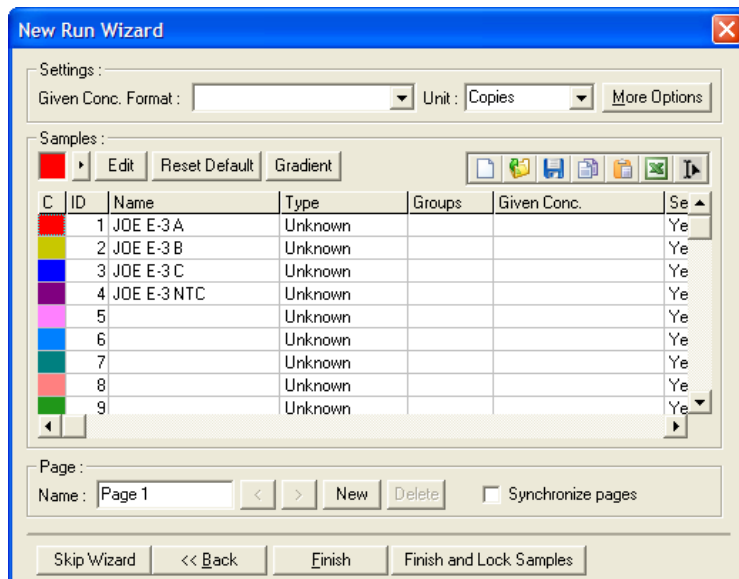

## 5.2 Použitie hardvéru prístroja Rotor-Gene Q MDx


### 5.2.1 Typy rotorov

Najprv zvolte, ktorý typ skúmaviek a rotora používate. Rôznym druhom skúmaviek sa môžu prispôbiť 4 rotory.

**Poznámka:** Rotory 36-Well Rotor a 72-Well Rotor sa dodávajú s prístrojom. Rotory Rotor-Disc® patria do príslušenstva.

**Dôležité:** Počas cyklu používajte rovnaké skúmavky. Nemiešajte rôzne typy skúmaviek alebo skúmavky od rôznych výrobcov, pretože to má vplyv na optickú jednotnosť. Odporúčame používať skúmavky od spoločnosti QIAGEN, ktorú sú konkrétne navrhnuté na použitie s prístrojom Rotor-Gene Q MDx (pozri Informácie o objednávaní). Skúmavky od iných výrobcov môžu autofluoreskovať, čo by mohlo ovplyvniť spoľahlivosť výsledkov. Skúmavky od iných výrobcov sa môžu okrem toho líšiť v dĺžke a hrúbke, čo má za následok nevyrovnanosť optickej dráhy prístroja Rotor-Gene Q MDx a reakcie v skúmavke. Spoločnosť QIAGEN si vyhradzuje právo odmietnuť technickú podporu pri problémoch spôsobených použitím plastových materiálov bez schválenia spoločnosťou QIAGEN v prístroji Rotor-Gene Q MDx.

**Dôležité:** Každé použitie plastových materiálov schválených spoločnosťou QIAGEN na prístroji Rotor-Gene Q MDx môže mať za následok zrušenie záruky.

<b>UPOZORNENIE</b> 	<b>Poškodenie prístroja</b> Pred každým cyklom vizuálne skontrolujte a presvedčte sa, či nie je rotor poškodený alebo deformovaný.
---	---

### 36-Well Rotor

Rotor 36-Well Rotor má červenú farbu. Rotor 36-Well Rotor a krúžok 36-Well Rotor Locking Ring umožňujú použitie skúmaviek s objemom 0,2 ml. Skúmavky nemusia mať opticky jasné uzávery, pretože prístroj Rotor-Gene Q MDx skôr prečíta fluorescenciu z dna skúmavky ako z jej vrchnej časti. Tiež sa môžu použiť skúmavky s vyklenutým uzáverom.



### 72-Well Rotor

Rotor 72-Well Rotor má modrú farbu. Rotor 72-Well Rotor a krúžok 72-Well Rotor Locking Ring sa používajú so skúmavkami a uzávermi Strip Tubes and Caps, 0.1 ml, ktoré sa môžu použiť na malé objemy až do 20 µl. Uzávery poskytujú bezpečné a spoľahlivé utesnenie.



### **Rotor-Disc 72 Rotor**

Rotor Rotor-Disc 72 Rotor má tmavosivú farbu. Rotor Rotor-Disc 72 Rotor a krúžok Rotor-Disc 72 Locking Ring umožňujú použitie krúžku Rotor-Disc 72. Krúžok Rotor-Disc 72 je disk so 72 jamkami na použitie pri vysokej priepustnosti. Na utesnenie krúžku Rotor-Disc 72 sa na jeho vrch naniesie polymérový film a tepelne sa zataví. Film sa nanáša rýchlo a zabraňuje kontaminácii tým, že poskytuje pevné a trvácne uzatvorenie odolné proti manipulácii. Viac informácií o krúžku Rotor-Disc 72 nájdete v časti 5.2.3.



### **Rotor-Disc 100 Rotor**

Rotor-Disc 100 Rotor má zlatú farbu. Rotor-Disc 100 Rotor a krúžok Rotor-Disc 100 Locking Ring umožňujú použitie krúžku Rotor-Disc 100. Krúžok Rotor-Disc 100 je disk so 100 jamkami na použitie pri vysokej priepustnosti. Krúžok Rotor-Disc 100 je rotačný ekvivalent 96-jamkovej doštičky, ale s ďalšími 4 referenčnými jamkami. To umožňuje integráciu prístroja Rotor-Gene Q MDx s laboratórnymi pracovnými tokmi s 96-jamkami. Jamky navyše sa môžu pohodlne použiť na viac vzoriek, dodatočné reakcie kontrolného roztoku alebo orientačné reakcie bez zabratia štandardných polôh v 96-jamkovej doštičke. Na dosiahnutie plynulej kompatibility pracovného toku 96-jamkovej doštičky používa rotor Rotor-Disc 100 Rotor zvyklosti označovania pre 96-jamkovú doštičku, to znamená A1 – A12 až H1 – H12. Ďalšie 4 referenčné jamky sú označené ako R1 – R4. Viac informácií o krúžku Rotor-Disc 100 nájdete v časti 5.2.3.



#### Špecifikácie rotora

Typ rotora	Kapacita jamky (µl)	Vzorka č.	Typ skúmavky	Odporúčaný reakčný objem (µl)
36-Well Rotor	200	36	PCR Tubes, 0.2 ml	20 – 50
72-Well Rotor	100	72	Strip Tubes and Caps, 0.1 ml	20 – 50
Rotor-Disc 72 Rotor	100	72	Rotor-Disc, 72	20 – 25
Rotor-Disc 100 Rotor	30	100	Rotor Disc, 100	15 – 20

**Poznámka:** Rotor 36-Well Rotor a 72-Well Rotor pre prístroj Rotor-Gene Q MDx sa nesmie používať na prístrojoch Rotor-Gene 3000 z dôvodu nekompatibility optického vyrovnaní. S prístrojmi Rotor-Gene 3000 naďalej používajte staršie rotory s 36 a 72 pozíciami.

#### 5.2.2 Príprava reakcie

**Dôležité:** V každom cykle by sa mali použiť adekvátne kontrolné roztoky na zaistenie spoľahlivých výsledkov.

Reakcie sa môžu pripraviť pomocou bloku Loading Block 96 x 0.2 ml Tubes (pre skúmavky PCR Tubes, 0.2 ml), bloku Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes (pre prípravu so skúmavkami a uzávermi Strip Tubes and Caps, 0.1 ml a jednonábovou pipetou), bloku Loading Block 72 x 0.1 ml Multi-channel (pre prípravu so skúmavkami a uzávermi Strip Tubes and Caps, 0.1 ml s viacnábovou pipetou), blokom Rotor-Disc 72 Loading Block (pre krúžok Rotor-Disc 72) alebo blokom Rotor-Disc 100 Loading Block (pre krúžok Rotor-Disc 100). Všetky bloky sú vyrobené z hliníka a môžu sa vopred vychladiť.

Blok Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes (na obrázku) pojme 18 skúmaviek s prúžkom, ako aj až osem skúmaviek s objemom 0,5 ml, ktoré sa môžu použiť na prípravu hlavnej zmesi, a až šesťnásť skúmaviek s objemom 0,2 ml, ktoré sa môžu použiť na prípravu kalibračných kriviek. Postup nižšie popisuje prípravu reakcie pomocou rotora 72-Well Rotor. Rovnaký postup sa môže použiť na prípravu reakcie pomocou rotora 36-Well Rotor a vhodného príslušenstva.

1. Umiestnite skúmavky s prúžkom do vkladacieho bloku a alikvótujte reakčné komponenty.




2. Na skúmavky s prúžkom položte uzávery a vizuálne skontrolujte, či sú pevne uzavreté.



3. Vložte skúmavky s prúžkom do rotora 72-Well Rotor a zaistite, aby každá skúmavka pevne sedela na svojom mieste a mala správnu orientáciu.


Ak nie sú vzorky v rotore umiestnené správne, automaticky ich vyrovná detekčný systém. To môže mať za následok zníženie dosiahnutého signálu fluorescence a senzitivity detekcie. Držiak Rotor Holder, ktorý umožňuje jednoduché vkladanie skúmaviek sa dodáva spolu s prístrojom.

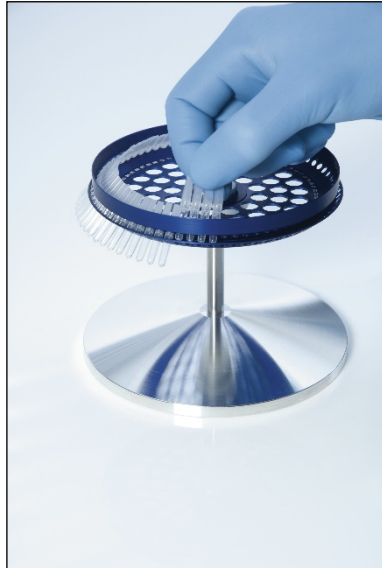

**Dôležité:** Na dosiahnutie maximálnej jednotnosti teploty musí byť v každej pozícii v rotore vložená skúmavka. Naplnenie všetkých pozícií v rotore zaisťuje rovnomerné prúdenie vzduchu ku každej skúmavke. Majte poruke sadu prázdnych uzatvorených skúmaviek, ktoré sa môžu použiť na naplnenie nepoužitých pozícií.

4. Vložte krúžok 72-Well Rotor Locking Ring na rotor 72-Well Rotor tak, že 3 polohovacie kolíky vytlačíte cez otvory rotora.

Krúžok Locking Ring zaisťuje, že uzávery zostanú počas cyklu na skúmavkách.

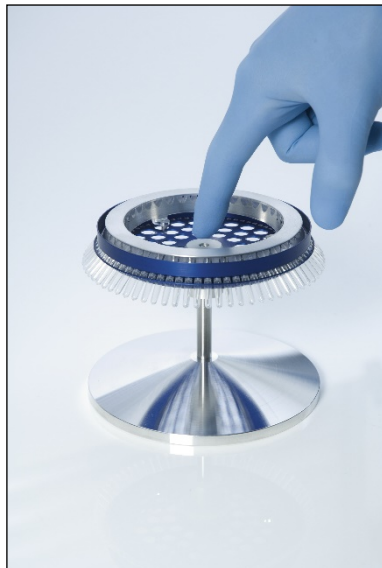



5. Vložte zostavu do komory prístroja Rotor-Gene Q MDx jej zakliknutím na miesto pomocou polohovacieho kolíka v strede rotora. Na vybratie zostavy jednoducho zatlačte na stred rotora, aby sa zostava uvoľnila a vyberte ju von.



6. Zatvorte veko a pomocou softvéru Rotor-Gene Q nastavte profil cyklu.

### 5.2.3 Nastavenie krúžku Rotor-Disc

Krúžok Rotor-Disc 72 alebo Rotor-Disc 100 sa skladá zo 72 alebo 100 jamiek, ktoré sa nachádzajú v jednodielnom kruhu navrhnutom na vysokú priepustnosť. V krúžkoch Rotor-Disc 72 alebo Rotor-Disc 100 sa nepoužívajú uzávery. Namiesto toho sa na vrch naniesie film Rotor-Disc Heat Sealing Film a tepelne sa zataví pomocou zariadenia Rotor-Disc Heat Sealer (prístroj na tepelné zatavovanie). Film zabraňuje kontaminácii tým, že poskytuje pevné a trvácne uzatvorenie odolné proti manipulácii. Tepelné utesnenie krúžku Rotor-Disc sa vykonáva podľa popisu nižšie.

**Dôležité:** Pred začatím tohto procesu si prečítajte produktový list dodaný so zariadením Rotor-Disc Heat Sealer.

1. Zariadenie Rotor-Disc Heat Sealer zapnite pomocou vypínača na zadnej ľavej strane.  
Zasvieti červená kontrolka „Power“ (Napájanie). Zariadenia Rotor-Disc Heat Sealer dosiahne svoju prevádzkovú teplotu približne po 10 minútach, kedy sa farba kontrolky zmení na zelenú „Ready“ (Pripravený).
2. Vyberte permanentné alebo odoberateľné zatavenie.  
**Poznámka:** Keď je zariadenie Rotor-Disc Heat Sealer pripravené, môže sa nechať konštantné bežať samé.
3. Vložte krúžok Rotor-Disc do vkladacieho bloku Rotor-Disc do pozície jedna na krúžku Rotor-Disc a vodiacich otvorov na skúmavky na vkladacom bloku Rotor-Disc.

4. Nastavte reakcie v krúžku Rotor-Disc manuálnym pipetovaním alebo pomocou automatizovaného systému na manipuláciu s kvapalinami.



5. Vyberte stredovú časť jednej vrstvy filmu na tepelné zatavenie krúžku Rotor-Disc Heat Sealing Film a jemne film zahnite na polovicu, pričom strednú časť zatlačíte a opatrne odtrhnete.
6. Film položte na krúžok Rotor-Disc v správnom smere podľa označenie „SIDE UP“ (TOUTO STRANOU NAHOR). Zaistíte, aby bola značka „SIDE UP“ (TOUTO STRANOU NAHOR) na spodku vkladacieho bloku krúžku Rotor-Disc.

Stredový otvor vo filme by sa mal ľahko nasunúť na valec vkladacieho bloku Rotor-Disc a na vrch krúžku Rotor-Disc.



7. Zostavu zasuňte do zariadenia Rotor-Disc Heat Sealer pomocou vodiacich koľajníc na strane vkladacieho bloku krúžku Rotor-Disc. Zaistite, aby sa vkladací blok krúžku Rotor-Disc úplne zatlačil dovnútra.



8. Na aktivovanie zatavovacieho mechanizmu najprv zatlačte na modrú anodizovanú tyčinku na vrchu zariadenia na tepelné zatavenie a potom zatlačte čiernu záklopku späť.



9. Po spustení zatavovacieho mechanizmu nadol sa rozsvieti oranžová kontrolka „Sealing“ (Tavenie). Ak nie je vkladací blok krúžku Rotor-Disc v správnej polohe, zaznie výstražný signál.
10. Po dokončení utesňovania zaznie nepretržitý zvukový signál a oranžová kontrolka „Sealing“ (Tavenie) začne blikať. Zatlačte na modrú anodizovanú tyčinku, aby sa utesňovací mechanizmus nadvihol a uvoľnil späť do svojej pôvodnej polohy.

---

**Dôležité:** Nepokračujte v utesňovaní dlhšie ako udáva zvukový signál, v opačnom prípade sa môže krúžok Rotor-Disc zdeformovať.


**Poznámka:** Ak náhodou neuvoľníte blokovací mechanizmus, začne blikajúca oranžová kontrolka „Sealing“ (Tavenie) trvalo svietiť, čím vás upozorní a zvukový signál sa zmení na prerušovaný zvuk.

11. Vkladací blok krúžku Rotor-Disc vysuňte von zo zariadenia Rotor-Disc Heat Sealer. Nechajte film vychladnúť na približne 10 sekúnd. Odstráňte nadbytočný uzatvárací film jeho zatlačením nadol, aby sa odpojil. Nadmerný film neťahajte nahor.
12. Vyberte krúžok Rotor-Disc z vkladacieho bloku.
13. Vložte krúžok Rotor-Disc do rotora pomocou navádzacieho zúbku do polohy jedna, ktorý slúži ako pomôcka na správne umiestnenie.

## 6 Používateľské rozhranie analýzy


### 6.1 Pracovný priestor

Pracovný priestor je pozadie hlavného okna. V tejto oblasti je možné otvoriť diagramy nespracovaných údajov a výsledky analýzy. Ak je naraz otvorených niekoľko okien, môžu sa tieto organizovať kliknutím na tlačidlo **Arrange** (Usporiadať) v nástrojovej lište. Existuje niekoľko dostupných možností usporiadania okien, ktoré môžete zvoliť kliknutím na šípku nadol vedľa tlačidla **Arrange** (Usporiadať).

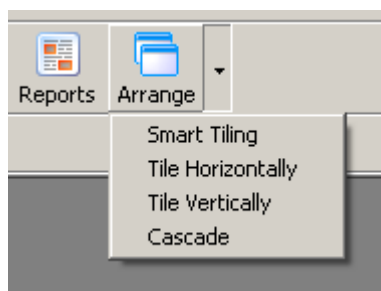


### 6.2 Nástrojová lišta

Tieto tlačidlá sú klávesová skratky pre často používané operácie. Tieto operácie sú dostupné ak v rozbaľovacích ponukách.

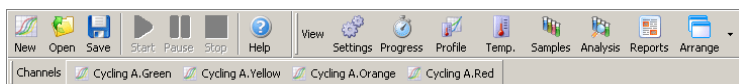

### 6.3 Prezerat' nespracované kanály


Na tieto tlačidlá kliknite vtedy, ak si chcete prezrieť nespracované (neanalyzované) údaje z konkrétnych kanálov v cykle.

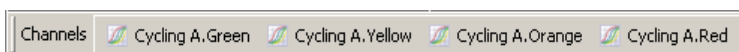

Pri prezeraní týchto údajov máte k dispozícii veľa možností zmeny prezentácie údajov. Nespracované údaje sa dajú takisto pretvoriť tak, aby uľahčili rôzne typy analýzy.

**Adjust Scale**  
(Upraviť stupnicu):

Na výber možnosti **Adjust Scale** (Upraviť stupnicu) kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné okno. Možnosťou **Adjust Scale** (Upraviť stupnicu) otvoríte okno, v ktorom môžete určiť stupnicu.

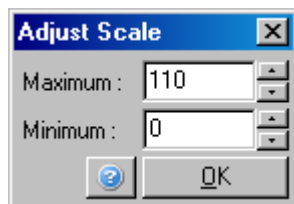

**Autoscale** (Automatická stupnica):


V možnosti **Autoscale** (Automatická stupnica) sa môžete pokúsiť prispôsobiť stupnicu maximálnym a minimálnym údajom.

**Default Scale** (Prednastavená stupnica):

Pomocou možnosti **Default Scale** (Prednastavená stupnica) resetujete stupnicu na zobrazenie od 0 do 100 fluorescenčných jednotiek.

Ikona klávesa:

Viac informácií nájdete v časti 7.5.

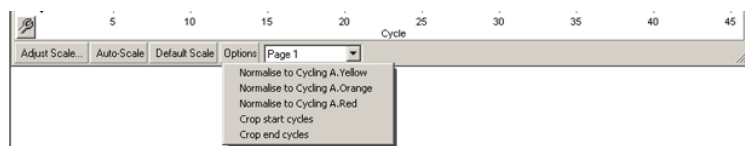

**Options** (Možnosti):

Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka zobrazená vyššie, ktorá poskytuje možnosti transformácie nespracovaných údajov.

**Normalise to ...**  
(Normalizovať na ...):

Táto možnosť umožňuje normalizáciu údajov o amplifikácii z pasívneho referenčného farbiva, ako napríklad ROX, získaných v inom kanáli.

**Crop start cycles** (Orezať začiatkové cykly):

Pomocou tejto možnosti vytvoríte novú skupinu údajov kanála, z ktorej boli odstránené niektoré začiatkové cykly. Je to užitočné v prípade zistenia veľkých skokov v pôvodných cykloch, k čomu môžu dôjsť pri použití určitých chemických látok.

**Crop start cycles** (Orezať koncové cykly):

Pomocou tejto možnosti vytvoríte novú skupinu údajov kanála, z ktorej boli odstránené niektoré koncové cykly.

**Page 1** (Strana 1):

Táto možnosť udáva stranu, ktorá je aktuálne zvolená na zobrazenie diagramov nespracovaných údajov. Okno **Edit Samples** (Upraviť vzorky) umožňuje vytvorenie viacerých definícií vzoriek. Môžu sa napríklad prezerať údaje s meniacou sa hrúbkou čiary, definície vzoriek a ostatné možnosti zobrazenia. Je to mimoriadne užitočné v prípade realizácie relatívneho kvantitatívneho vyjadrenia v jednom kanáli, pretože používateľ môže definovaním 2 strán vzoriek jednoducho prepnúť zobrazenie medzi sledovaným génom a housekeeping vzorkami.


## 6.4 Prepísanie vzoriek

Na pravej strane hlavného okna sa nachádza prepínač, ktorý obsahuje legendu k vzorkám. Skladá sa z farebných buniek, z ktorých každá zodpovedá zobrazenej vzorke. Prepínač sa používa na určenie, ktoré vzorky sa môžu zobraziť na displeji. Vzorky s jasne sfarbenými bunkami sa zobrazia, zatiaľ čo vzorky s vyblednutou bunkou sa nezobrazia. Vzorky je možné zapnúť alebo vypnúť kliknutím na bunku alebo potiahnutím ukazovateľa myši cez niekoľko vzoriek naraz. Tlačidlami **Bank On** (Banka zapnutá) a **Bank Off** (Banka vypnutá) skryjete alebo zobrazíte všetky vzorky, ktoré sú momentálne viditeľné v zozname. Posuvná lišta sa môžu použiť na zobrazenie ďalšej skupiny vzoriek.

**Poznámka:** Počet zobrazených vzoriek je dynamický a závisí od dostupného miesta v okne.

Po kliknutí na možnosť **Named On** (Zapnuté pomenované) sa zobrazia len tie vzorky, ktoré majú nejaký názov. Toto je rýchly spôsob zobrazenia len relevantných vzoriek. Kliknutím na **All On** (Zapnúť všetko) a **All Off** (Vypnúť všetko) sa v tomto poradí zobrazia všetky alebo žiadna zo vzoriek v rotore. Po stlačení tlačidla **Edit Samples...** (Upraviť vzorky...) sa otvorí okno **Edit Samples** (Upraviť vzorky), v ktorom je možné editovať názvy, typy a štandardné koncentrácie vzoriek (pozri časť 6.8.4).

Prepínač je zobrazený nižšie. Ďalšie zobrazené možnosti sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na prepínač.

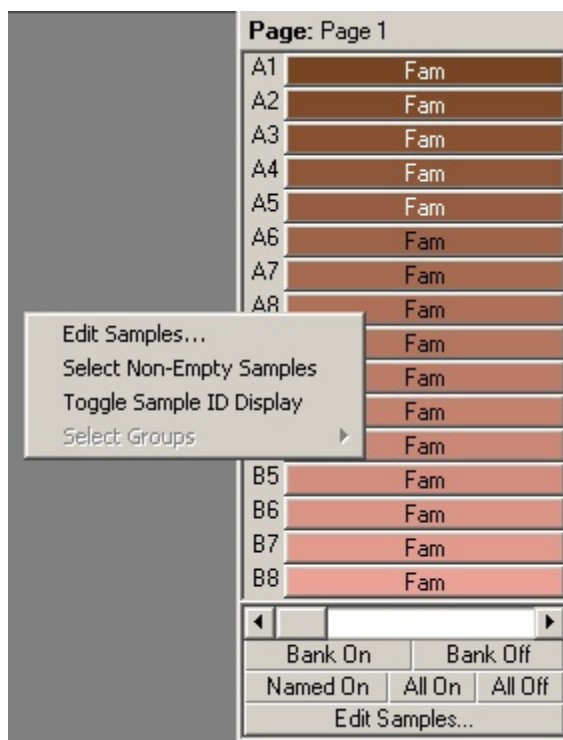

**Page (Strana):**

Tento štítok na vrchu prepínača ukazuje stranu vzorky, ktorá sa zobrazuje. Strany umožňujú rozmanité nezávislé analýzy z jedného súboru údajov kanála. Môžete spustiť napríklad dve kalibračné krivky v zelenom kanáli a vygenerovať nezávislé správy. Viac informácií o nastavení strán vzoriek nájdete v časti 6.8.4.

**Toggle Sample ID Display**  
(Prepnúť zobrazenie ID vzorky):

Ak sa používa rotor 72-Well Rotor, zobrazia sa vzorky vo formáte A1 až A8, B1 až B8 atď. Možnosť **Toggle Sample ID Display** (Prepnúť zobrazenie ID vzorky) umožňuje používateľovi prepínať numerické poradie vzorky (1 až 72).

**Select Non-Empty Samples**  
(Vybrať nie prázdne vzorky):

Touto možnosťou odznačíte všetky vzorky, ktoré majú v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky) uvedený **Type** (Typ) ako **None** (Žiadny). Vďaka tomu sa zobrazia len vzorky relevantné pre analýzu.


**Select Groups**  
(Vybrať skupiny):

Ak ste definovali skupiny, prepnete (zapnúť/vypnúť) pomocou tejto funkcie zobrazenie vzoriek v skupinách. Skupiny náhodné zbierky vzoriek, ktoré umožňujú pokročilé správy so štatistickými výsledkami. Je napríklad možné definovať skupiny upravených a neupravených vzoriek pacientov. Skupiny sa môžu vytvoriť v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky).

## 6.5 Ponuka súboru

### 6.5.1 Nový

Po zvolení možnosti **File** (Súbor) a potom **New** (Nový) sa zobrazí okno **New Run** (Nový cyklus). V tomto okne sú dostupné bežne používané šablóny usporiadané v kartách **Quick Start** (Rýchly štart) a **Advanced** (Pokročilé). Po zvolení šablón vás sprievodca prevedie nastavením cyklu a umožní úpravu nastavení a profilov.

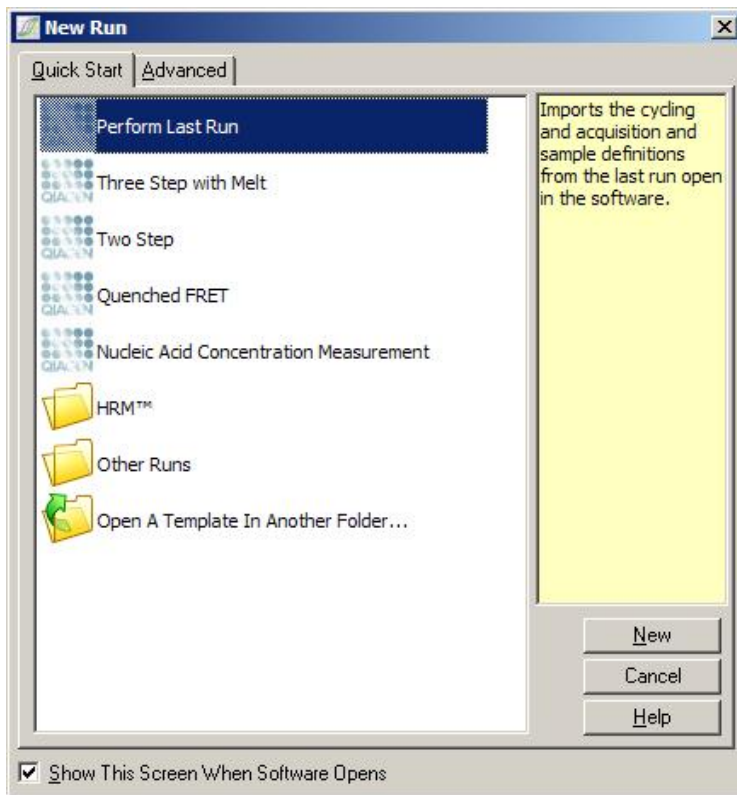

Viac informácií o dostupných šablónach nájdete v časti 5.1.1 a 5.1.2.

### Nový cyklus

<b>New</b> (Nový):	Touto možnosťou iniciujete nastavenie cyklu pomocou vybraného šablónu.
<b>Cancel</b> (Zrušiť):	Touto možnosťou zatvoríte okno.
<b>Help</b> (Pomoc):	Touto možnosťou otvoríte online pomocníka.
<b>Show This Screen When Software Opens</b> (Zobrazíť túto obrazovku pri spustení softvéru):	Ak je toto políčko zaškrtnuté, zobrazí sa pri spustení softvéru okno <b>New Run</b> (Nový cyklus).




## 6.5.2 Otvoriť a uložiť

**Open...** (Otvoriť...): Touto možnosťou otvoríte predtým uložený súbor cyklu Rotor-Gene Q (\*.rex) alebo archív cyklu Rotor-Gene Q (súbor \*.rea).

**Open Recent...** (Otvoriť nedávne...): Pomocou tejto možnosti zobrazíte posledné 4 súbory, ktoré boli otvorené alebo uložené.

**Save** (Uložiť): Pomocou tejto možnosti uložíte všetky zmeny, ktoré nastali v súbore cyklu.

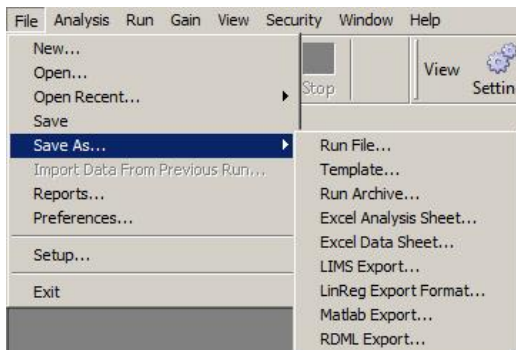

**Save As...** (Uložiť ako...): Túto funkciu použite na uloženie súboru cyklu alebo údajov v rôznych formátoch. Možnosti sú uvedené nižšie.

**Run File...** (Súbor cyklu...): Touto možnosťou uložíte kópiu súboru. Používateľ môže zmeniť názov a miesto uloženia. Toto je prednastavený formát.

**Template...** (Templát...): Uloží nastavenie profilu a súvisiace nastavenia, ale nie údaje o cykle. Templát sa môže použiť na spustenie budúcich cyklov.

**Run Archive...** (Archív cyklu...): Uloží cyklus v kompaktnjšom formáte súboru. Pred odoslaním súborov e-mailom ich uložte v tomto formáte. Tým sa zníži čas potrebný na odoslanie súboru a zaistí sa, že e-mailoví klienti súbory nepoškodia.

**LIMS Export** (Export LIMS): Uloží analýzu vo formátoch kompatibilných s LIMS podľa požiadaviek používateľa. Kontaktujte prosím technické oddelenie spoločnosti QIAGEN, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

**Excel Data Sheet...** (Hárak údajov Excelu...): Pomocou tejto možnosti exportujete všetky nespracované kanály do hárku Excel®. Exportujú sa iba vybrané vzorky.

**Excel Analysis Sheet...** (Hárak analýzy Excelu...): Exportujú sa všetky analýzy v aktuálnom cykle do jedného hárku Excelu.

**LinReg Export Format...** (Formát exportu LinReg...): Exportujú sa všetky nespracované údaje kanálu do formátu, ktorý dokáže prečítať nástroj LinReg (nástroj analýzy efektívnosti). Viac podrobností nájdete v časti „Exportovanie do LinReg“ nižšie.

**Matlab Export...** (Export Matlab...): Údaje sa exportujú do formátu, ktorý dokáže prečítať vedecký balík Matlab (alebo jeho open-source ekvivalent Octave). To môže byť užitočné pre výskum metód.

**LIMS Export** (Export RDML): Pomocou tejto možnosti vytvoríte export súboru vhodný pre RDML v1.1. Vytvorený súbor exportu RDML je súbor vo formáte XML skomprimovaný ako ZIP súbor a príponou \*.rdml a je vhodný pre dokument so schémou RDML ([https://rdml.org/rdml\\_v\\_1\\_1.html](https://rdml.org/rdml_v_1_1.html)) dostupný na webovej stránke [https://rdml.org/rdml\\_v\\_1\\_1.html](https://rdml.org/rdml_v_1_1.html).

## Exportovanie do LinReg

LinReg je nástroj vyvinutý vedcom C. Ramakersom a jeho spolupracovníkmi.\* Nástroj LinReg je dostupný na adrese: <https://medischebiologie.nl/files/>.


Softvér Rotor-Gene Q umožňuje používateľovi exportovať nespracované údaje vo formáte, ktorý sa potom môže importovať nástrojom LinReg na analýzu.

1. Otvorte súbor cyklu Rotor-Gene Q obsahujúci nespracované údaje.
2. Exportujte údaje do súboru exportu nástroja LinReg tak, že zvolíte možnosť **Save As...** (Uložiť ako) a potom **LinReg Export Format...** (Formát exportu LinReg...).
3. Microsoft Excel automaticky zobrazí exportované nespracované údaje.
4. Spustíte nástroj LinReg.

Nástroj vás požiada, aby ste vybrali rozsah bunky, v ktorej sa nachádzajú nespracované údaje. Nástroj dokáže analyzovať len jeden nespracovaný kanál naraz, takže by ste mali zvoliť vhodnú oblasť hárku Excelu.

### 6.5.3 Správy


Po zvolení možnosti **Report** (Správy) sa zobrazí okno **Report Browser** (Prehliadač správ). Ak už boli údaje analyzované, správa analýzy sa môže zobraziť z okna **Report Browser** (Prehliadač správ). S rôznym stupňom podrobností je k dispozícii niekoľko typov správ.

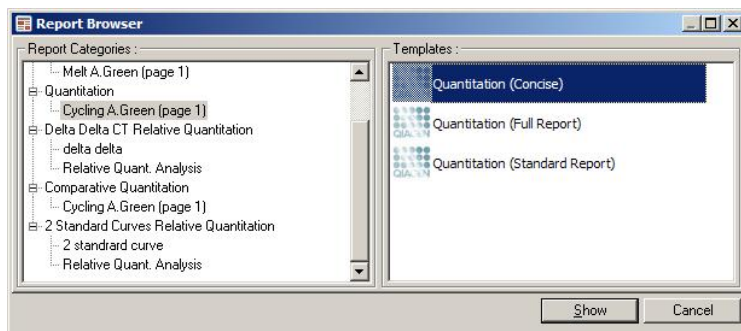

\* Ruijter, J.M., Ramakers, C., Hoogaars, W.M., Karlen, Y., Bakker, O., van den Hoff, M.J., and Moorman, A.F. (2009) Amplification efficiency: linking baseline and bias in the analysis of quantitative PCR data. *Nucleic Acids Res.* **37**, e45.

## 6.5.4 Nastavenie

Prvotné nastavenie prístroja Rotor-Gene Q MDx by sa malo uskutočniť počas inštalácie. Táto možnosť ale umožňuje zmenu nastavenia pripojenia prístroja Rotor-Gene Q MDx, ak ju chcete vykonať po inštalácii.

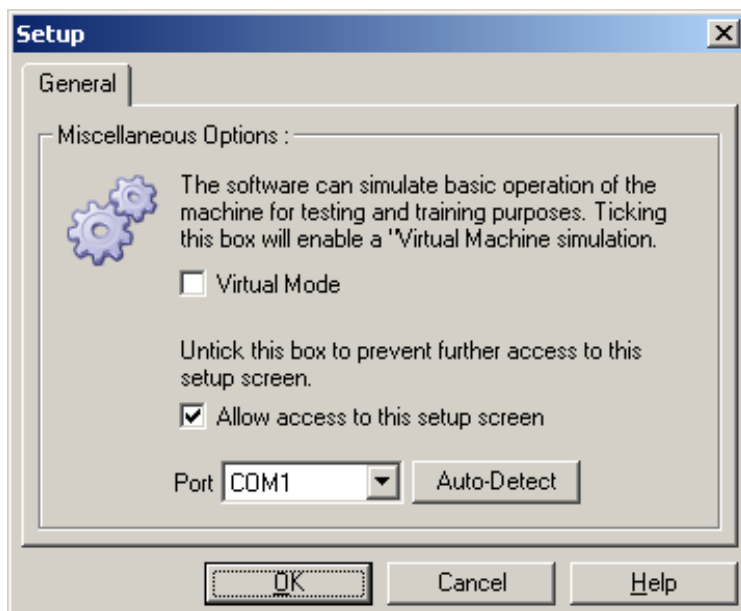


- Virtual Mode** (Virtuálny režim): Túto možnosť zvolíte, ak sa bude softvér používať bez pripojeného prístroja Rotor-Gene Q MDx. Softvér si zachová všetky funkcie. Tento režim je užitočný na účely ukážky, analýzy údajov a nastavenia templátov.
- Allow access to this setup screen** (Povoliť prístup k tejto obrazovke nastavenia): Ak sa táto možnosť počas nastavenia nezaškrtnie, nebude toto okno viac dostupné. Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje používateľom v zmenách nastavení. Na opätovné získanie prístupu kontaktujte svojho predajcu.
- Port** (Port): Vyberte správny komunikačný port, aby bola možná komunikácia medzi počítačom a prístrojom Rotor-Gene Q MDx.
- Auto-Detect** (Automatická detekcia): Ak si nie ste istí tým, ktorý port máte vybrať, kliknite na možnosť **Auto-Detect** (Automatická detekcia) a vyhľadajte všetky dostupné porty.

## 6.6 Ponuka analýzy

### 6.6.1 Analýza

Po kliknutí na možnosť **Analysis** (Analýza) sa zobrazí okno **Analysis** (Analýza). Toto okno umožňuje vytvorenie nových analýz a zobrazenie existujúcich analýz. Pomocou týchto kariet vyberiete metódu analýzy. Zobrazí sa zoznam kanálov, ktoré je možné pomocou vybranej metódy analyzovať. Nezávisle je možné analyzovať cyklus s viacerými testami v rovnakom kanáli za predpokladu, že sa nastaví ako samostatné strany v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky). Vedľa strán, ktoré sa už analyzovali, sa nachádza zelená fajka. To znamená, že nastavenia prahovej hodnoty a normalizácie sa pre túto analýzu už uložili. Na prezeranie alebo analyzovanie kanálu na dvakrát kliknite. Zobrazí sa okno konkrétnej analýzy.

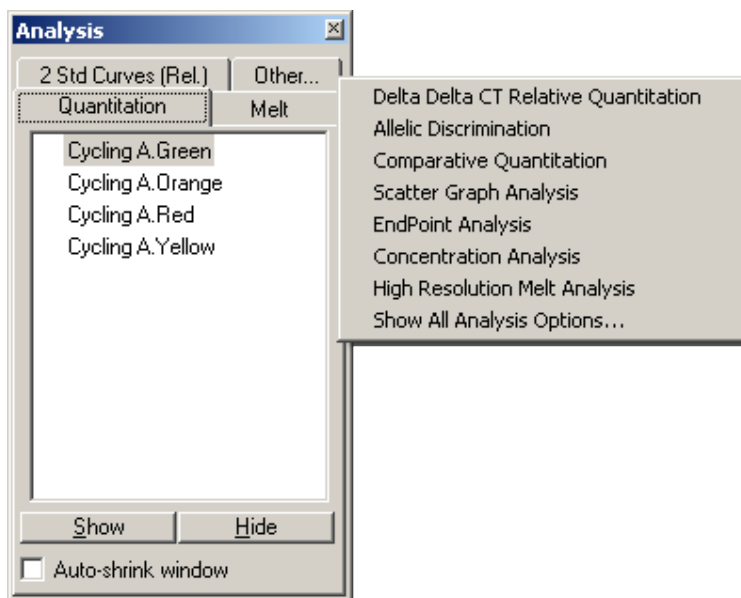


**Auto-shrink window**  
(Automatické zmenšenie okna):

Po zvolení možnosti **Auto-shrink window** (Automatické zmenšenie okna) sa okna zmenší, keď sa nepoužíva. Ak presuniete kurzor nad okno, znova sa zväčší.

### Organizácia pracovného priestoru

Vždy po spustení analýzy sa jej okná usporiadajú tak, aby sedeli s oknami, ktoré už na obrazovke sú. Zobrazenie mnohých okien môže byť nešikovné. Zatvorte okná, ktoré nepotrebujete, potom na nástrojovej lište kliknite na možnosť **Arrange** (Usporiadať). Okná sa automaticky usporiadajú podľa metódy **Smart Tiling** (Inteligentné dlaždice). Prípadne vyberte ďalší spôsob usporiadania kliknutím na šípku vedľa tlačidla **Arrange** (Usporiadať). Po kliknutí pravým tlačidlom myši na názov analýzy sa zobrazia ďalšie možnosti.

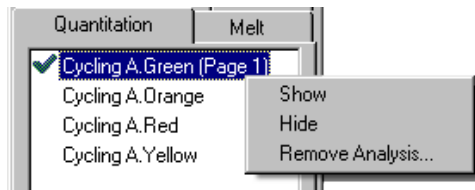


- Show (Zobrazit):** Zobrazí sa vybraná analýza.
- Hide (Skrýť):** Vybraná analýza sa skryje.
- Remove Analysis... (Odstrániť analýzu...):** Vybraná analýza sa úplne odstráni. To znamená, že všetky nastavenia normalizácie alebo kôš topení vytvorený v analýze sa stratí.

## 6.6.2 Kvantifikácia

V okne **Analysis** (Analýza) vyberte kartu **Quantitation** (Kvantifikácia) a potom dvakrát kliknite na názov kanálu alebo kanál a vyberte a potom stlačte tlačidlo **Show** (Zobrazit'), pomocou ktorého sa sledovaný kanál otvorí. Zobrazia sa tri okná: hlavná obrazovka, kalibračná krivka a výsledky.


## Správy

- Reports** (Správy): Možnosť **Reports** (Správy) otvorí okno **Report Browser** (Prehliadač správ), v ktorom sa môže vygenerovať správa aktuálnej analýzy. Sú k dispozícii 3 možnosti: štandardná správa, úplná správa a stručná správa. Dvakrát kliknite na želanú možnosť a otvorte správu v okne **Preview** (Prehľad). Po vygenerovaní správy sa môžu tlačidlá na vrchu okna **Preview** (Prehľad) použiť na vytlačenie, uloženie alebo odoslanie správy e-mailom alebo jej exportovanie do Wordu.

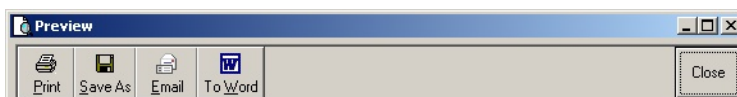

## Kalibračná krivka

Std. Curve (Kalibračná krivka): Týmto tlačidlo sa otvorí okno **Standard Curve** (Kalibračná krivka). Štandardne sa toto okno otvorí po otvorení analýzy. Ak okno zatvoríte, môže sa znova otvoriť pomocou tohto príkazu.

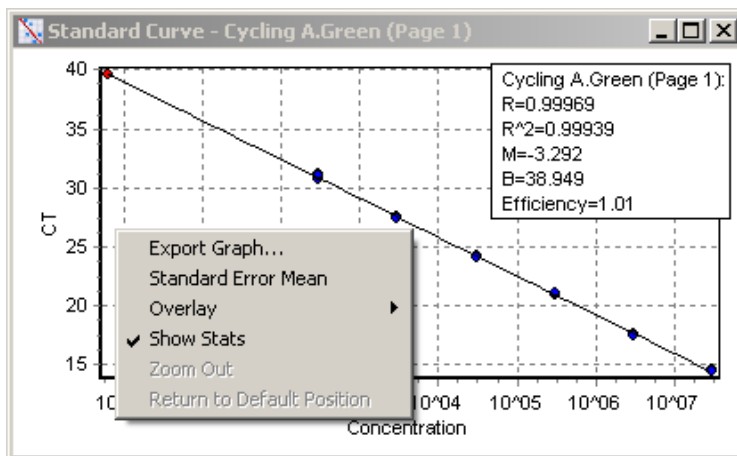

Hodnoty na kalibračnej krivke sa dynamicky prepočítajú kliknutím a potiahnutím prahovej línie v hlavnom okne, keďže prahová úroveň sa mení.

Modré body na krivke predstavujú vzorky, ktoré sa definovali ako štandardy a červené body predstavujú dátové body neznámych vzoriek.

**Poznámka:** Pri opätovnom definovaní štandardov na prepočet kalibračnej krivky sa pri vypnutí viditeľnosti kalibračnej krivky pomocou prepínača na pravej strane obrazovky tieto štandardy odstraňuje z výpočtu kalibračnej krivky. Odstránenie štandardov z grafu na zvýšenie hodnoty R<sup>2</sup> nie je vedecky opodstatnené. Zlyhaný štandard je známkou toho, že mohlo dôjsť k zlyhaniu vzoriek, takže by mal byť súčasťou výsledkov.

Efficiency (Efektívnosť): Toto je reakčná efektívnosť cyklu. Táto hodnota je podrobnejšie popísaná na strane 94.

Hodnota R<sup>2</sup> (Koefficient korelácie): Hodnota R<sup>2</sup>, alebo hodnota R2, je percentuálna hodnota údajov, ktorá je konzistentná s hypotézou, že štandardy tvoria kalibračnú krivku. Ak je hodnota R2 nízka, potom štandardy nenesedia na línii najvhodnejších hodnôt. To znamená, že výsledky (t. j. vypočítané koncentrácie) nemusia byť spoľahlivé. Dobrá hodnota R2 je približne 0,999.


**Poznámka:** Vysokú hodnotu R<sup>2</sup> je možné dosiahnuť s nízkou kalibračnou krivkou vtedy, ak sa spustil nedostatočný počet štandard. Hodnota R<sup>2</sup> sa zlepšuje so znižovaním počtu štandard. Na presnejšiu indikáciu spoľahlivosti údajov použite ako pomôcku intervaly spoľahlivosti vo vypočítaných koncentráciách.

Hodnota R (Druhá odmocnina koeficientu korelácie): Hodnota R je druhá odmocnina hodnoty R<sup>2</sup>. Vo všeobecnosti je hodnota R<sup>2</sup> užitočnejšia na určenie korelácie.

M a B: Sklon (M) a ohraničený úsek (B) kalibračnej krivky sa automaticky vypočítajú pomocou vzorca  $y = Mx + B$  a zobrazia sa v okne Standard Curve (Kalibračná krivka).


Export Graph... (Exportovať graf...): Po kliknutí pravým tlačidlom myši na kalibračnú krivku sa zobrazí možnosť exportovania grafu (pozri časť 7.4).

Overlay (Prekrývanie): Pri viacerých kvantifikačných cykloch v tom istom cykle je možné vytvoriť prekrývanie kalibračných kriviek v tom istom okne. Táto funkcia je užitočná na grafické prezeranie rozdielu medzi rôznymi prahovými hodnotami. Táto funkcia je zobrazená na snímke obrazovky nižšie.

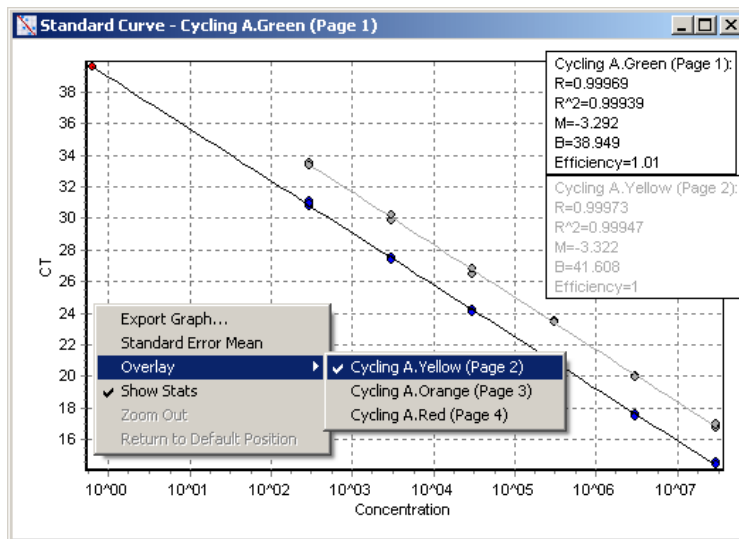

### Výpočet kalibračnej krivky

„conc = ...\*CT + ...“ a „CT = ...“ sú 2 verzie rovnice použitej na vytvorenie spojitosti medzi hodnotami CT a koncentráciami. V publikáciách sa najčastejšie používa vzorec „CT = ...“. Kalibračná krivka môže byť buď „Floating“ (Pohyblivá) alebo „Fixed“ (Pevná). Ak je krivka „Floating“ (Pohyblivá), vypočíta sa optimálna rovnica pre kalibračnú krivku vždy, keď sa prahová hodnota presunie do hlavného okna. Ak je krivka „Fixed“ (Pevná), nemusí sa rovnica meniť, pretože sa importovala z iného cyklu.

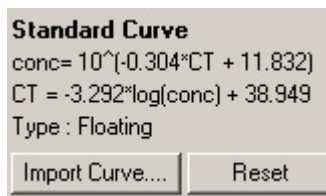

### Importovanie krivky


Importovanie kalibračnej krivky umožňuje odhad koncentrácií, keď nie je kalibračná krivka dostupná v konkrétnom cykle a efektívnosť reakcie sa medzi 2 cyklami nezmenila. Krivky sa môžu importovať z iného kanála alebo z iného cyklu kliknutím na možnosť **Import Curve** (Importovať krivku).

Kalibračnú krivku je v prípade potreby možné upraviť. Úprava kalibračnej krivky znamená, že do aktuálneho cyklu sa importuje len efektívnosť zdrojovej kalibračnej krivky. Či sa má kalibračná krivka upraviť alebo nie, závisí od použitého chemického zloženia.

Na úpravu kalibračnej krivky použijete referenciu v novom cykle so známou koncentráciou. Referenciu definujete nastavením typu vzorky na „Standard“ (Štandard) a zadaním hodnoty koncentrácie v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky). Na zlepšenie presnosti je možné zadať niekoľko kópií rovnakej referencie. Nezabudnite, že nie je možné definovať viac ako jednu referenčnú koncentráciu alebo štandard. Je napríklad možné mať 3 referencie kópií pre 1000 kópií, ale nie je možné mať jednu referenciu na 1000 kópií a ďalšiu so 100 kópiami v rovnakom cykle.

Po importovaní kalibračnej krivky sa typ kalibračnej krivky zmení na „Fixed“ (Pevná). Ak chcete zmeniť typ kalibračnej krivky späť na „Floating“ (Pohyblivá), kliknite na **Reset** (Reset).

Snímka okna **Import Standard Curve** (Importovať kalibračnú krivku) je zobrazený nižšie.

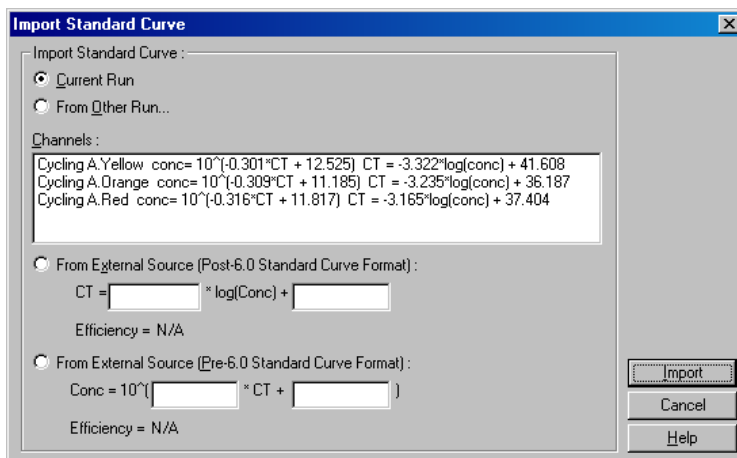

Pomocou tohto okna je možné importovať kalibračnú krivku z iného kanála analyzovaného v aktuálnom cykle alebo z iného cyklu.

**Current Run** (Aktuálny cyklus): Po zvolení tejto možnosti sa kvantifikačné analýzy na ostatných kanáloch z tohto cyklu zobrazia s príslušnými kalibračnými krivkami.

**From Other Run...** (Z iného cyklu...): Výberom tejto možnosti otvoríte dialógové okno, z ktorého môžete vybrať súbor cyklu, ktorý sa má otvoriť. Ak sa pre cyklus uskutočnila kvantifikačná analýza, zobrazia sa kalibračné krivky pre každý analyzovaný kanál.

**Poznámka:** Nastavenia kvantifikačnej analýzy sa musia uložiť v súbore cyklu.

**Channels** (Kanály): Vytvorí sa zoznam analyzovaných kanálov a ich vzorcov kalibračných kriviek.

**From External Source** (Z externého zdroja): V tejto časti je možné priamo zadať hodnoty M a B. To je užitočné v prípade, kedy hodnoty pochádzajú z externého zdroja, ako napríklad hárku Excelu.



## Výpočet C<sub>T</sub>

**Invert raw data** (Invertovať nespracované údaje):

Niektoré chemické látky produkujú fluorescenčný signál, ktorý sa exponenciálne znižuje namiesto zvyšovania. Tieto údaje sa dajú analyzovať pomocou možnosti „Quantitation“ (Kvantifikácia), ale na to by malo byť zaškrtnuté políčko **Invert raw data** (Invertovať nespracované údaje). Pri všetkých ostatných kvantifikačných analýzach by mala táto možnosť zostať nezaškrtnutá.




**C<sub>T</sub> Calculations** (Výpočet C<sub>T</sub>):

Hodnota C<sub>T</sub> je číslo cyklu v bode, v ktorom amplifikačná krivka prechádza cez prahovú hodnotu detekcie. Nastavením hraničnej línie a výpočtom priesečnice s každou krivkou sa stanoví hodnota C<sub>T</sub> pre každú vzorku.

**Threshold** (Prahová hodnota):

Na nastavenie prahovej hodnoty kliknite na ikonu (mriežka s červenou šípkou) a potom kliknite a podržte ukazovateľ na grafe a potiahnite čiaru na želanú úroveň. Prípadne zadajte hodnotu logaritmu. Alternatívne môžete použiť aj možnosť **Auto-Find Threshold** (Automatické nájdenie prahovej hodnoty) a automaticky určiť prahovú hodnotu. Pri nastavovaní prahovej hodnoty manuálne by sa mal táto nastaviť v exponenciálnej fáze cyklu, výrazne nad úrovňou pozadia, aby sa predišlo šumu a pod začiatkom stabilnej úrovne signálu v neskorších cykloch.

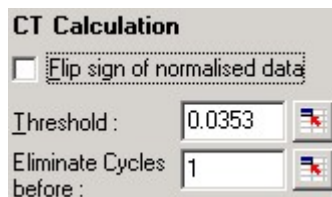

**Eliminate Cycles before** (Eliminovať cykly pred):

Na nastavenie tejto možnosti kliknite na ikonu (mriežka s červenou šípkou) a potom kliknite a podržte ukazovateľ na grafe a potiahnite čiaru doprava. Tým sa eliminuje prahová hodnota pre nízke čísla cyklov.

**Poznámka:** Táto možnosť je užitočná, ak počas prvotných cyklov nevzniká žiadny šum, napríklad z dôvodu zmiešavacích efektov vzorky.

**Auto-Find Threshold** (Automatické nájdenie prahovej hodnoty):

Táto funkcia naskenuje vybraný región grafu, aby našla nastavenie prahovej hodnoty, ktoré poskytne optimálne odhady daných koncentrácií. Zvolený región je možné zmeniť zadaním nových horných a dolných hraníc v zobrazených textových poliach.

Pre väčšinu analýz sú vhodné prednastavené horné a dolné hranice. Rozsah prahových úrovní sa naskenuje a získa sa najlepšie umiestnenie kalibračnej krivky na základe vzoriek, ktoré sa definovali ako štandardy (t. j. keď je hodnota R najbližšie k 1,0).



## Výsledky

Pomocou tejto možnosti sa otvorí okno **Quantitation Results** (Kvantifikačné výsledky). Štandardne sa toto okno otvorí po otvorení analýzy. Ak okno zatvoríte, môže sa znova otvoriť pomocou tohto príkazu.

Quant. Results - Cycling A.Green (Page 1)														
Analysis	No.	Colour	Name	Type	Ct	Ct Comment	Given Conc	Calc. Conc [c]	% Var	Rep. Ct	Rep. Ct Std	Rep. Ct (95% CI)	Rep. Calc. Conc	Rep. Calc. Conc (95%)
Cycling A.Green (Page 1)	1	10e8	Standard		3.73		1.00E+08	7.17E+07	28.1%	3.73	0.00	(3.73, 3.74)	7.17E+07	(1.17E+07, 4.39E+08)
Cycling A.Green (Page 1)	2	10e8	Standard		3.74		1.00E+08	7.17E+07	29.3%					
Cycling A.Green (Page 1)	3	10e8	Standard		3.74		1.00E+08	7.16E+07	29.4%					
Cycling A.Green (Page 1)	4	10e7	Standard		6.11		1.00E+07	1.44E+07	44.0%	6.06	0.06	(5.91, 6.21)	1.49E+07	(3.29E+06, 6.73E+07)
Cycling A.Green (Page 1)	5	10e7	Standard		6.08		1.00E+07	1.47E+07	46.6%					
Cycling A.Green (Page 1)	6	10e7	Standard		5.99		1.00E+07	1.56E+07	55.9%					
Cycling A.Green (Page 1)	7	10e6	Standard		10.43		1.00E+06	2.72E+05	22.8%	10.38	0.09	(10.15, 10.60)	8.00E+05	(2.62E+05, 2.44E+06)
Cycling A.Green (Page 1)	8	10e6	Standard		10.27		1.00E+06	8.58E+05	14.2%					
Cycling A.Green (Page 1)	9	10e6	Standard		10.43		1.00E+06	7.71E+05	22.9%					
Cycling A.Green (Page 1)	10	10e5	Standard		13.49		1.00E+05	9.66E+04	3.2%	13.65	0.13	(13.31, 13.98)	8.74E+04	(2.96E+04, 2.59E+05)
Cycling A.Green (Page 1)	11	10e5	Standard		13.75		1.00E+05	8.13E+04	18.7%					
Cycling A.Green (Page 1)	12	10e5	Standard		13.69		1.00E+05	8.48E+04	15.2%					
Cycling A.Green (Page 1)	13	10e4	Standard		15.66		1.00E+04	2.24E+04	123.7%	15.46	0.25	(14.84, 16.08)	2.56E+04	(7.62E+03, 8.36E+04)
Cycling A.Green (Page 1)	14	10e4	Standard		15.54		1.00E+04	2.42E+04	141.7%					
Cycling A.Green (Page 1)	15	10e4	Standard		15.18		1.00E+04	3.09E+04	208.8%					
Cycling A.Green (Page 1)	16	10e3	Standard		21.36		1.00E+03	4.71E+02	52.9%	21.09	0.24	(20.49, 21.69)	5.69E+02	(9.13E+01, 3.50E+03)
Cycling A.Green (Page 1)	17	10e3	Standard		20.89		1.00E+03	6.47E+02	26.3%					
Cycling A.Green (Page 1)	18	10e3	Standard		21.02		1.00E+03	5.94E+02	40.6%					
Cycling A.Green (Page 1)	19	10e2	Standard	NEG (Multi Ct)			1.00E+02							
Cycling A.Green (Page 1)	20	10e2	Standard		23.98		1.00E+02	7.99E+01	20.1%					
Cycling A.Green (Page 1)	21	10e2	Standard	NEG (Multi Ct)			1.00E+02							
Cycling A.Green (Page 1)	22	NTC	NTC	NEG (NTC)										
Cycling A.Green (Page 1)	23	NTC	NTC	NEG (NTC)										
Cycling A.Green (Page 1)	24	NTC	NTC	NEG (NTC)										

V okne **Quantitation Results** (Kvantifikačné výsledky) sú v tabuľke zhrnuté výsledky z cyklu. Kliknutím pravým tlačidlom myši a zvolením možnosti **Export to Excel** (Exportovať do Excelu) tabuľku exportujete do Excelu. Excel sa otvorí automaticky. Na skopírovanie údajov do existujúceho hárku vyberte namiesto toho možnosť **Copy** (Kopírovať), otvorte hárak a potom zvolte možnosť **Paste** (Prilepiť).

V okne **Quantitation Results** (Kvantifikačné výsledky) sú zobrazené tieto stĺpce.

Analysis (Analýza):	Aktuálna skupina údajov (čítací kanál a strana vzorky).
No. (Č.):	Číslo vzorky.
Color (Farba):	Definovaná farba jednotlivých grafov vzoriek.
Type (Typ):	Definovaný typ vzorky.
C <sub>T</sub> :	Stanovená hodnota C <sub>T</sub> .
C <sub>T</sub> Comment (Komentár C <sub>T</sub> ):	Automatická anotácia určenia hodnoty C <sub>T</sub> , ak sú hodnoty C <sub>T</sub> vylúčené. Sú možné tieto značky: NEG (Multi Ct): Prahová hodnota prechádza krivkou fluorescence minimálna dvakrát (dvojitá priesečníca). Nie je možné určiť jednoznačnú hodnotu C <sub>T</sub> . NEG (NTC): Celkové zníženie fluorescence nespĺňa podmienky definované vo funkcii „NTC threshold“ (Prahová hodnota NTC) ponuky <b>Outlier Removal</b> (Odstránenie mimoriadnej hodnoty). Krivka fluorescence napríklad pretína danú prahovú hodnotu, ale malý nárast sklonu naznačuje beztemplátový kontrolný roztok a hodnota C <sub>T</sub> nie je zadaná. NEG (R.Eff): Celkové zníženie fluorescence nespĺňa podmienky definované vo funkcii „Reaction efficiency threshold“ (Prahová hodnota efektívnosti reakcie) ponuky <b>Outlier Removal</b> (Odstránenie mimoriadnej hodnoty) (pozri nižšie). Vzorky, ktoré nemajú určitú efektívnosť reakcie sa vylúčia a hodnota C <sub>T</sub> nie je uvedená. Táto značka udáva len to, či je príslušná funkcia aktivovaná.
%Var (% odchýlka):	Percentuálne kolísanie medzi vypočítanou a známou koncentráciou. %Var = abs. (vypočítané / zadané - 1)
Rep. Ct (Kópia Ct):	Priemerná hodnota CT všetkých vzoriek s rovnakým názvom ako táto vzorka.
Rep. Ct Std. Dev.:	Štandardná odchýlka hodnoty CT všetkých vzoriek s rovnakým názvom ako táto vzorka.
Rep. Ct. 95% C.I.:	Rozsah hodnoty C <sub>T</sub> , ktorý štatisticky tvorí 95 % odchýlky hodnoty C <sub>T</sub> . Toto je konzervatívne štatistické meranie, ktoré sa môže použiť ako meranie kvality. Tento rozsah je možné zúžiť pomocou viacerých kópií alebo menšej odchýlky v kópiách.

Rep. Calc. Conc.: Vypočítaná koncentrácia všetkých vzoriek s rovnakým názvom.  
**Poznámka:** Toto nie je prostý priemer vypočítaných koncentrácií. Je to geometrická stredná hodnota, ktorá je matematicky vhodnejším priemerom z dôvodu exponenciálnej povahy real-time amplifikácie.

Rep. Calc. Conc. 95% C.I.: Rozsah koncentrácií, ktorý tvorí 95 % odchýlky v jednotlivých vzorkách, ako aj model lineárnej regresie, na ktorom je odchýlka založená. Interpretácia tohto merania je, že je to rozsah koncentrácií, ktoré by mohli dosahovať 95 % času, ak by sa tento cyklus vykonával opakovane s rovnakou mierou odchýlky. Toto je konzervatívny odhad a rozsah môže byť pomerne veľký kvôli odchýlke vlastnej každej analýze v reálnom čase. Tento rozsah môže byť veľký, ak sa štandardy spustia s koncentraciami, ktoré sú iné ako koncentrácie neznámych vzoriek, ak sa použije malý počet kópií alebo ak je odchýlka výrazná.  
**Dôležité:** Odchýlky zistené týmto meraním sú spojené s exponenciálnym procesom amplifikácie v reálnom čase a nie sú spôsobené prístrojom Rotor-Gene Q MDx. Podobné testy uskutočnené na cyklovačoch na báze blokov by priniesli väčšiu odchýlku spôsobenú nižšou rovnomernosťou teploty systémov na báze blokov. Na želané porovnanie cyklovačov odporúčame porovnať štandardnú odchýlku hodnoty CT.

**Poznámka:** Detailnejšie informácie o intervaloch spoľahlivosti nájdete v prílohe B.

**Poznámka:** Okrem stĺpcov Farba, Ct a Ct komentár sa môže každý stĺpec zobrazit' alebo skryť kliknutím na okno a potom označením alebo odznačením názvu stĺpca.

No.	C	Name	Ct	Ct Comment	Given Conc (Cop)	Calc. Conc (Copie)	% Var
1		3x10 <sup>8</sup>	Analysis		300.000.000.	324.345.068,	8,1%
2		3x10 <sup>8</sup>	✓ No.		300.000.000.	301.264.230,	0,4%
3		3x10 <sup>8</sup>	✓ Color		300.000.000.	308.453.920,	2,8%
4		3x10 <sup>8</sup>	✓ Name		300.000.000.	298.576.301,	0,5%
5		3x10 <sup>7</sup>	Type		30.000.000.	27.524.578,	8,3%
6		3x10 <sup>7</sup>	✓ Ct		30.000.000.	26.405.444,	12,0%
7		3x10 <sup>7</sup>	✓ Ct Comment		30.000.000.	28.701.296,	4,3%
8		3x10 <sup>7</sup>	✓ Given Conc (Copies)		30.000.000.	23.847.613,	20,5%
9		3x10 <sup>6</sup>	✓ Calc Conc (Copies)		3.000.000.	3.392.142,	13,1%
10		3x10 <sup>6</sup>	✓ % Var		3.000.000.	3.170.880,	5,7%
11		3x10 <sup>6</sup>	✓ Rep. Ct		3.000.000.	3.130.752,	4,4%
12		3x10 <sup>6</sup>	✓ Rep. Ct Std. Dev.		3.000.000.	3.166.396,	5,5%
13		3x10 <sup>5</sup>	✓ Rep. Ct (95% CI)		300.000.	321.913,	7,3%
14		3x10 <sup>5</sup>	Rep. Calc. Conc.		300.000.	305.744,	1,9%
15		3x10 <sup>5</sup>	Rep. Calc. Conc. (95% CI)		300.000.	312.045,	4,0%
16		3x10 <sup>5</sup>			300.000.	324.696,	8,2%
17		3x10 <sup>4</sup>	19,47		30.000.	32.420,	8,1%
18		3x10 <sup>4</sup>	19,59		30.000.	29.872,	0,4%
19		3x10 <sup>4</sup>	19,53		30.000.	31.102,	3,7%
20		3x10 <sup>4</sup>	19,52		30.000.	31.301,	4,3%
21		3x10 <sup>3</sup>	22,93		3.000.	2.850,	5,0%
22		3x10 <sup>3</sup>	22,96		3.000.	2.793,	6,9%
23		3x10 <sup>3</sup>	22,94		3.000.	2.825,	5,8%
24		3x10 <sup>3</sup>	22,91		3.000.	2.888,	3,7%
25		3x10 <sup>2</sup>	26,03		300.	322,	7,5%
26		3x10 <sup>2</sup>	26,11		300.	305,	1,6%
27		3x10 <sup>2</sup>	26,26		300.	275,	8,5%
28		3x10 <sup>2</sup>	26,18		300.	291,	3,1%

Kvôli vyššiemu pohodliu vypočíta funkcia **AutoStat** (Automatická štatistika) automaticky priemer, štandardnú odchýlku a minimálne a maximálne hodnoty skúmaných vzoriek. Potiahnutím ľavým tlačidlom myši vyberte skúmané výsledky a hodnoty sa zobrazia v tabuľke na pravej strane obrazovky.

Na tejto snímke obrazovky sa analyzujú koncentrácie niekoľkých vzoriek.

Ct	Given Conc (Cop)	Calc Conc (Copie)	% Var	f
14.42	30000000	2825064	5.8%	
14.59	30000000	25142920	16.2%	
14.40	30000000	28730050	4.2%	
17.44	3000000	3422624	14.1%	
17.58	3000000	3103391	3.4%	
17.42	3000000	3467111	15.6%	
20.99	300000	285353	4.9%	
20.92	3000000	298898	0.4%	
21.04	300000	275802	8.1%	
21.20	300000	30286	1.0%	

Statistics	
Maximum :	28730050
Minimum :	25142920
Count :	3
Mean :	27328521
Std. Dev :	1.07537
(Orders of Mag.)	

**Dôležité:** Funkcia **AutoStat** (Automatická štatistika) je kontextovo závislá. To znamená, že ak je to možné, generuje len informácie, ktoré sú užitočné.

Napríklad:

- Nie je možné získať 95 % interval spoľahlivosti zo súbory vybraných vypočítaných koncentrácií, pretože je potrebné zohľadniť aj model regresie.
- Pre vypočítané koncentrácie sa uvedie štandardná odchýlka „Orders of Magnitude“ (Rádové hodnoty) a nie absolútna hodnota. Toto je percentuálna odchýlka. Hodnota 1,07537 napríklad predstavuje odchýlku 7,54 %  $(278,974 - 322,611) = (300,000/1.07537 - 00,000 * 1.07537)$ . Správa o absolútnej hodnote nemá pre kalibračnú krivku význam. Hodnotu je možné nahlásiť pri najnižšej koncentrácii, aby sa vytvorila vnímaná nízka chyba ( $\pm 3$  kópie) alebo pri vysokej koncentrácii ( $\pm 3\ 000\ 000$  kópií). Z tohto dôvodu sa vytvorí štandardná odchýlka „Orders of Magnitude“ (Rádové hodnoty).
- Pre vypočítané koncentrácie sa namiesto aritmetického priemeru používa geometrický priemer. Ten tvorí exponenciálnu povahu real-time PCR. Napríklad v prípade dvojnásobého riadenia 1, 2, 8 a 16 kópiami by mal byť priemer 4 kópie, pretože je v strede sérií riadenia. Ale aritmetický priemer je 6,75. Geometrický priemer je  $(1 * 2 * 8 * 16)^{(1/4)} = 4$  kópie.

### Normalizácia dynamickej skúmanky

Možnosť **Dynamic Tube** (Dynamická skúmanka) sa vyberie štandardne a používa sa na určenie priemerného pozadia každej vzorky pred začatím amplifikácie.

Štandardná normalizácia zaberie prvých 5 cyklov a použije ich ako indikátor úrovne pozadia každej vzorky. Všetky dátové body vzorky sa potom vydedia touto hodnotou, aby sa údaje normalizovali. Tie môžu byť nepresné, pretože pre niektoré vzorky nemusí byť úroveň pozadia počas prvých 5 cyklov indikátorom úrovne pozadia pred amplifikáciou. Naopak, normalizácia dynamickej skúmvky používa druhú deriváciu každej vzorky na určenie bodu vzostupu každej vzorky. Úroveň pozadia sa potom spriemeruje z cyklu 1 do tohto počtu cyklov vzostupu pre každú vzorku. Takto sa dosiahnu najpresnejšie kvantitatívne výsledky.

Nezabudnite, že pre niektoré skupiny údajov nie je fluorescencia pozadia konzistentná počas cyklov pred začatím amplifikácie. V týchto prípadoch môže byť potrebné odznačiť normalizáciu dynamickej skúmvky kliknutím na možnosť **Dynamic Tube** (Dynamická skúmvka), pretože by mohlo dôjsť k menej presnej kvantifikácii.

### Korekcia sklonu šumu

Fluorescencia pozadia (FI) vzorky by mala v ideálnom prípade zostať pre amplifikáciu konštantná. Ale niekedy vykazuje FI pozvoľné zvýšenie alebo zníženie počas niekoľkých cyklov, ktoré je spôsobené použitou chemickou látkou. To spôsobí skreslenú úroveň šumu. Korekcia sklonu šumu používa na určenie úrovne šumu lineárnu regresnú priamku namiesto priemeru a vykonáva normalizáciu k tejto priame. Výberom tejto možnosti kliknutím na tlačidlo **Slope Correct** (Korekcia sklonu) je možné údaje z kópií opraviť, ak sú základné hodnoty vzorky výrazne naklonené. Korekcia sklonu šumu zlepšuje údaje vtedy, keď sa pozoruje naklonenie pozadí nespracovaných údajov smerom nahor alebo nadol pred bodom vzostupu (C<sub>T</sub>).

Ak nie je sklon stabilný alebo ak vykazujú prvotné cykly základných údajov výrazné zosilnenie alebo zoslabenie signálu v porovnaní so zvyškom krivky, môže viesť korekcia sklonu šumu k niektorým neželaným vplyvom, ako napríklad krivky negatívnych kontrolných roztokov, ktoré pretnú prahovú hodnotu z dôvodu aproximácie základných údajov ako lineárnej regresnej priamky a príslušnej normalizácie nespracovaných údajov. Dôsledkom je, že táto funkcia nemusí vždy zlepšiť kvalitu údajov a mala by sa používať len vtedy, ak vykazujú krivky nespracovaných údajov stabilný sklon.

### Nastavenie bodu vzostupu


Algoritmus nastavenia bodu vzostupu sa môže použiť na definovanie minimálnej dĺžky základnej línie použitej pre normalizáciu. Na nastavenie bodu vzostupu je potrebné definovať dva parametre. Ak sa bod vzostupu vypočíta pomocou možnosti **Dynamic Tube** (Dynamická skúmvka), ktorá je menšia ako prvý parameter, použije sa ako bod vzostupu druhý parameter. Nastavenie bodu vzostupu sa môže použiť len spolu s normalizáciou **Dynamic Tube** (Dynamická skúmvka).

## Ignorovať prvé

Signál fluorescence z niekoľkých prvých cyklov nemusí byť pre zvyšok cyklu typický. Z tohto dôvodu sa môžu lepšie výsledky dosiahnuť vtedy, ak sa niekoľko prvých cyklov ignoruje. Môže sa ignorovať do 10 cyklov. Ak ale prvé cykly vyzerajú podobne ako tie nasledujúce, dosiahnu sa lepšie výsledky tak, že sa odznačí možnosť **Ignore First** (Ignorovať prvé), pretože algoritmus normalizácie bude mať k dispozícii viac údajov, s ktorými bude pracovať.

## Odstránenie mimoriadnej hodnoty

Na rozlíšenie medzi zmenami vo fluorescencii a skutočnými reakciami v beztemplátových kontrolných roztokoch (NTC) sú k dispozícii 2 merania: **NTC Threshold** (Prahová hodnota NTC) a **Reaction Efficiency Threshold** (Prahová hodnota efektívnosti reakcie). Pre väčšinu aplikácií sa odporúča možnosť **NTC Threshold** (Prahová hodnota NTC). Použitý postup by sa mal validovať.

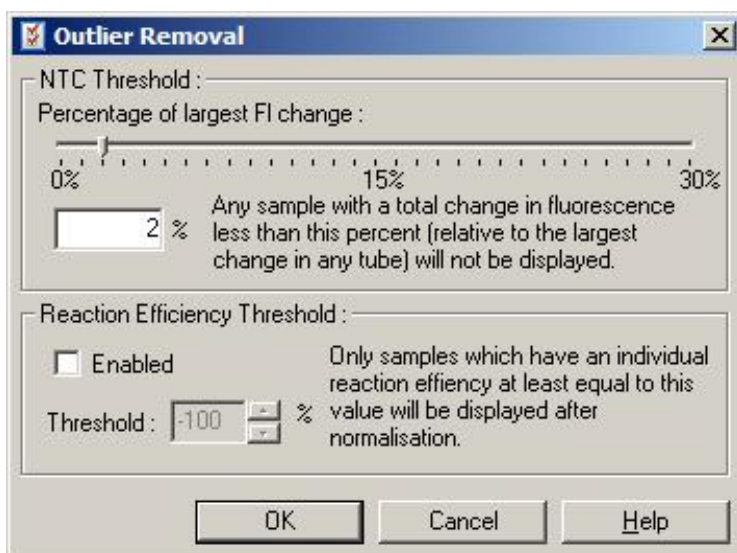

**NTC Threshold**  
(Prahová hodnota NTC):

Umožňuje vylúčiť z analýzy vzorky alebo roztoky NTC, ktoré majú mierne smerovanie nahor. Všetky vzorky so zmenou nižšou ako „NTC Threshold“ (Prahová hodnota NTC) sa nezahrnú do správy a v stĺpci „CT Comment“ (Komentár CT) sa nezobrazí značka „NEG (NTC)“.

Percentuálna hodnota je relatívna k najväčšej maximálnej zmene pozorovanej v každej skúmavke. Ak napríklad začne jedna vzorka na pozadí 2 FI a zvýši sa na 47 FI, potom predstavuje 45 FI 100 %. „NTC Threshold“ (Prahová hodnota NTC) na úrovni 10 % by považovalo každú vzorku s FI menším ako 4,5 za šum.

**Reaction Efficiency Threshold**  
(Prahová hodnota efektívnosti reakcie):


„Reaction Efficiency Threshold“ (Prahová hodnota efektívnosti reakcie) je alternatívna metóda vylúčenia šumu z analýzy. Tento algoritmus normalizácie používa techniky odhadu efektívnosti reakcie využívané v porovnávacej kvantifikácii (pozri časť 6.6.6). Všetky vzorky, ktoré nemajú efektívnosť reakcie na aspoň tejto úrovni sú vylúčené v stĺpci „CT Comment“ (Komentár CT) sa zobrazí značka „NEG (R.Eff)“.

Úroveň 0 % = udáva, že počas exponenciálnej fázy sa neuskutočnila žiadna reakcia. 100 % udáva, že počas exponenciálnej fázy sa uskutočnila úplne efektívna reakcia. Negatívne percentuálne hodnoty udávajú, že počas exponenciálnej fázy poklesol signál fluorescence.

Aktuálne výsledky prieskumu neposkytujú presvedčivé údaje o presných úrovniach efektívnosti, ktorá je potrebná na rozlíšenie pravých reakcií od kontaminácie a iných vplyvov. Z tohto dôvodu odporúčame použiť túto funkciu konzervatívne s predpokladom, že každá vzorka s pravou reakciou bude mať nejakú viditeľnú exponenciálnu fázu s istým vzrastom fluorescence. Pri nastavení hodnoty na viac ako 0 % sa vylúčia niektoré vzorky s neefektívnym, ale viditeľným zvýšením fluorescence, zatiaľ čo pri nastavení hodnoty na menej ako 0 % sa zobrazia vzorky, ktorých fluorescence sa počas exponenciálnej fázy znížila, čo je potrebné jasne vylúčiť.

**Poznámka:** Ak sa hodnota vyradí z dôvodu použitia jednej z týchto techník, nezobrazí sa príslušná hodnota CT v okne **Quantitation Results** (Kvantitatívne výsledky). Zároveň sa v stĺpci „CT Comment“ (Komentár CT) zobrazí značka, ktorá naznačuje vylúčenie. Je preto dôležité presvedčiť sa, či je stĺpec „CT Comment“ (Komentár CT) stále zobrazený.

Na obrázku nižšie sú z dôvodu „Reaction Efficiency Threshold“ (Prahová hodnota efektívnosti reakcie) vylúčené vzorky 7, 8 a 9.

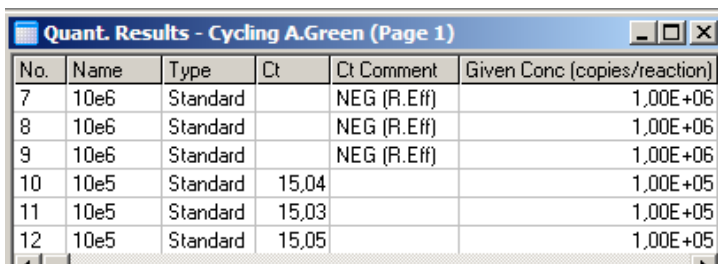

No.	Name	Type	Ct	Ct Comment	Given Conc (copies/reaction)
7	10e6	Standard		NEG (R.Eff)	1,00E+06
8	10e6	Standard		NEG (R.Eff)	1,00E+06
9	10e6	Standard		NEG (R.Eff)	1,00E+06
10	10e5	Standard	15,04		1,00E+05
11	10e5	Standard	15,03		1,00E+05
12	10e5	Standard	15,05		1,00E+05

### Sklon, amplifikácia, efektívnosť reakcie

Sklon (M) reakcie (zobrazený v okne **Standard Curve** (Kalibračná krivka)) sa môže použiť na stanovenie exponenciálnej amplifikácie a efektívnosť reakcie pomocou týchto výpočtov:

$$\text{Exponenciálna amplifikácia} = 10^{(-1/M)}$$

$$\text{Efektívnosť reakcie} = [10^{(-1/M)}] - 1$$

Optimálne hodnoty pre M, exponenciálnu amplifikáciu a efektívnosť reakcie sú -3,322, 2 a 1 v tomto poradí. Efektívnosť reakcie sa zobrazí v správe (v úplných a štandardných správach, pozri stranu 84) a v okne **Standard Curve** (Kalibračná krivka).

Sklon sa vypočíta ako zmena hodnoty  $C_T$  vydelená zmenou vo vstupe logaritmu (napr. číslo kópie). Amplifikácia s efektívnosťou 100 % znamená zdvojenie produktu amplifikácie v každom cykle, čo má za následok hodnotu  $M$  na úrovni  $-3,322$ , faktor amplifikácie 2 a efektívnosť reakcie 1.

Ak je hodnota  $M$   $-3,322$ , prebehnú výpočty nasledovne:

Exponenciálna amplifikácia:  $10^{(-1/-3,322)} = 2$

Efektívnosť reakcie:  $[10^{(-1/-3,322)}] - 1 = 1$

Alternatívny príklad: hodnota  $M$  3,8 znamená, že reakcia má exponenciálnu amplifikáciu približne s hodnotou 1,83 a efektívnosť reakcie je 0,83 (alebo 83 %).

### Posun

Vo vzorci popisujúcom vzťah medzi 2 premennými sa posun vyjadří písmenom  $B$  ( $y = Mx + B$ ). Posun sa niekedy nazýva aj ohraničený úsek.  $B$  predstavuje hodnotu  $C_T$  pre danú koncentráciu 1 jednotky. Nahradením 1 vo vzorci pre koncentráciu ako je zobrazené nižšie:

$$C_T = \log(1) * M + B$$

$$C_T = 0 * M + B$$

Výsledok je  $C_T = B$

Ohraničený úsek sa môže v každom cykle meniť a je menej stabilným meraním ako sklon. Z tohto dôvodu sa sklona analyzuje častejšie ako ohraničený úsek.

### Hlavné okno

V hlavnom okne sa zobrazujú grafy amplifikácie na logaritmickú mierku.


Kliknutím na možnosť **Linear Scale** (Lineárna stupnica) v spodnej časti okna sa stupnica zmení z logaritmickú na lineárnu a naopak. Pri zmene týchto mierok sa zmení len zobrazenie grafov, nie výpočtov. Toto je možné overiť pomocou označovacieho nástroja kliknutím pravým tlačidlom na graf a výberom možnosti **Show pinpointer** (Zobraziť ukazovateľ). Vďaka logaritmickú mierke sú menšie hodnoty na grafe viditeľnejšie, zatiaľ čo lineárna stupnica uľahčuje prezeranie celej reakcie.

**Poznámka:** Grafy amplifikácie sa aktualizujú v reálnom čase počas toho, ako prístroj Rotor-Gene Q MDx získava počas cyklu údaje. Toto monitorovanie údajov v reálnom čase umožňuje používateľovi vidieť výsledky hneď ako krivky vykážu exponenciálny rast. Je možné vyvodiť predbežné závery a prijať rozhodnutia pre ďalší cyklus.



## Templáty kvantifikačnej analýzy

Templáty kvantifikačnej analýzy umožňujú používateľovi exportovať nastavenia normalizácie a prahovej hodnoty do jedného súboru \*.qut. Tento súbor sa môže importovať a znova použiť v iných experimentoch. Viac informácií nájdete v časti 7.1.

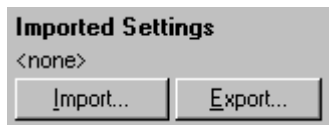

### 6.6.3 Dve kalibračné krivky

Relatívna analýza expresie génu pomocou normalizovaného génu sa môže uskutočniť s využitím metódy 2 kalibračných kriviek.

Táto metóda vyžaduje kalibračnú krivku pre každý gén. Koncentrácia každého génu sa kvantifikuje podľa jeho kalibračnej krivky. Expresia sledovaného génu sa potom normalizuje so normalizovaným génom ( často housekeeping gén).

Je dôležité, aby sa štandardy a vzorky kópií počas prípravy vzorky správne označili (pozri časť Nastavenie templátu). Konkrétne musia mať najmä korešpondujúce vzorky v každej analýze rovnaký názov. V mnohonásobnej reakcii, kde sú pozície skúmavky sledovaného génu a normalizačného génu rovnaké, stačí jedna sada definícií vzoriek. Pri uskutočňovaní relatívnej analýzy s normalizačným génom pomocou jedného kanála (t. j. reakcie sa spustia v samostatných skúmavkách pomocou rovnakého fluoroforu) by mali vzniknúť 2 strany vzoriek. Prvá by mala označovať pozíciu skúmavky s názvami vzoriek sledovaného génu, pričom ostatné pozície zostanú nepomenované. Druhá by mala označovať pozície normalizačného génu. Softvér potom vzorky spáruje na základe ich názvov v rámci 2 analýz.


### Analýza expresie pomocou metódy dvoch kalibračných kriviek

Údaje sa môžu najprv analyzovať pre každý gén pomocou kvantifikačnej analýzy. V opačnom prípade sa výsledky pre každý gén určia pomocou nástroja **Autofind Threshold** (Automatické nájdete prahovej hodnoty).


1. V okne **Analysis** (Analýza) vyberte kartu **2 Std Curves (Rel.)** (2 kalibračné krivky (rel.)).  
Kliknite na **New Analysis...** (Nová analýza...).




2. Zadáte názov analýzy.

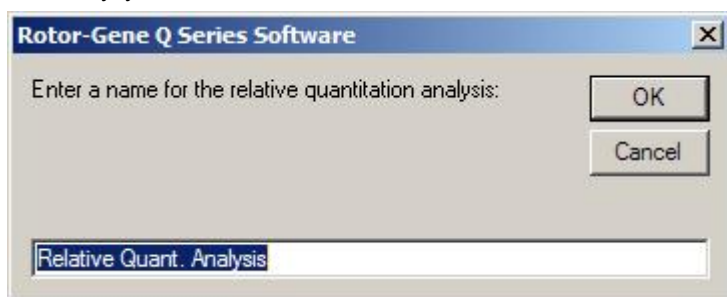


3. Označte strany použité na analýzu normalizačného génu a analýzu sledovaného génu. Napríklad po kliknutí na možnosť **Gene of Interest Standard Curve** (Kalibračná krivka sledovaného génu) sa otvorí okno **Selection of Gene of Interest Standard...** (Výber kalibračnej krivky sledovaného génu...). Vyberte stranu, na ktorej sa sledovaný gén kvantifikoval. Postup zopakujte aj pre normalizačný gén. Voliteľne môžete definovať kalibračný roztok. Ak je zvolená táto možnosť, priradí sa kalibračnému roztoku hodnota 1 a všetky ostatné koncentrácie vzoriek sa vypočítajú relatívne k tejto vzorke.

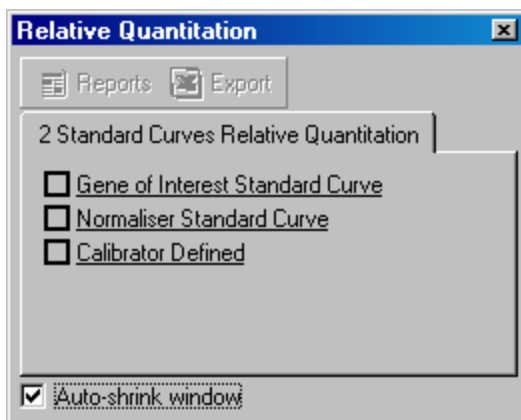


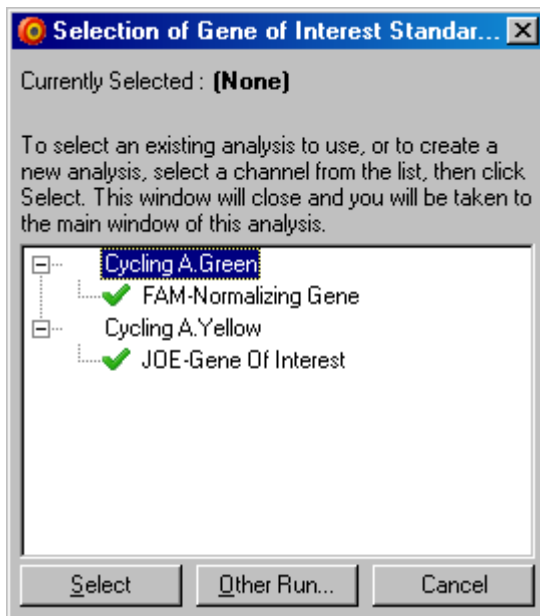



Po dokončení výberu sa možnosti označia fajkou, ako je zobrazené nižšie.

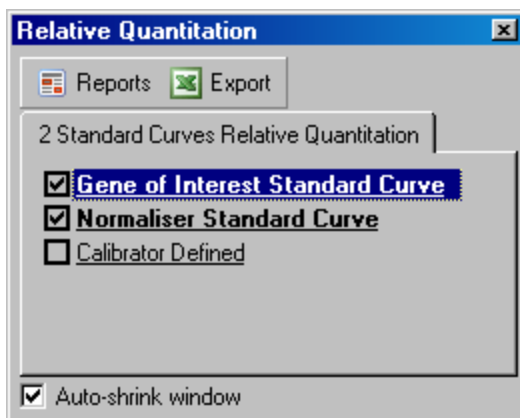

4. Kliknite na tlačidlo **Reports** (Správy) a zobrazí sa **Report Browser** (Prehliadač správ). Zo zoznamu vyberte analýzu so správnym názvom. Kliknite na tlačidlo **Show** (Zobraziť) a zobrazí sa správa relatívnej kvantifikácie. Možnosťou **Export** (Exportovať) môžete exportovať výsledky do nového hárku Excel. Ak je súčasťou aj kontrolný roztok, vypočítajú sa výsledky vzhľadom na vzorku kalibračného roztoku, ktorému je priradená hodnota 1.

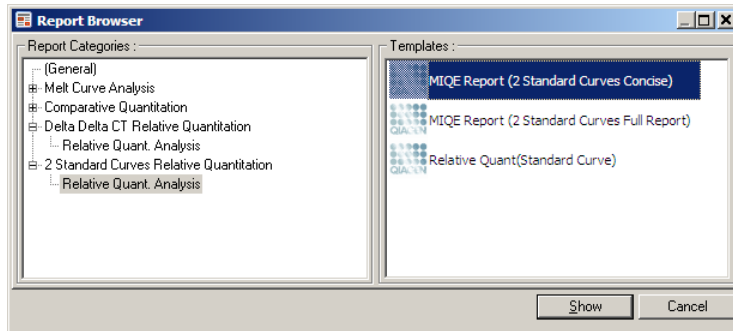

5. Zobrazia sa koncentrácie prečítané z kalibračných kriviek sledovaného génu (GOI Conc. (Konc. GOI)) a normalizačného génu (Norm. Conc.) (Konc. norm.), ako aj relatívnej koncentrácie (Relative Conc. (Relatívna konc.)). Výsledky sa uložia ako súbor Word.

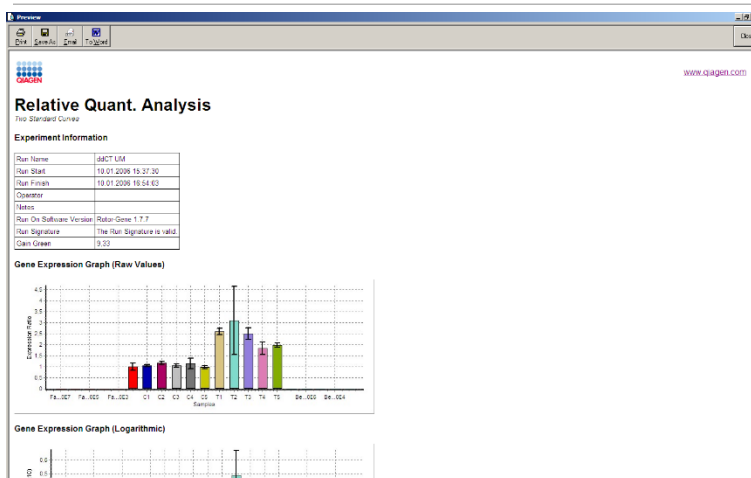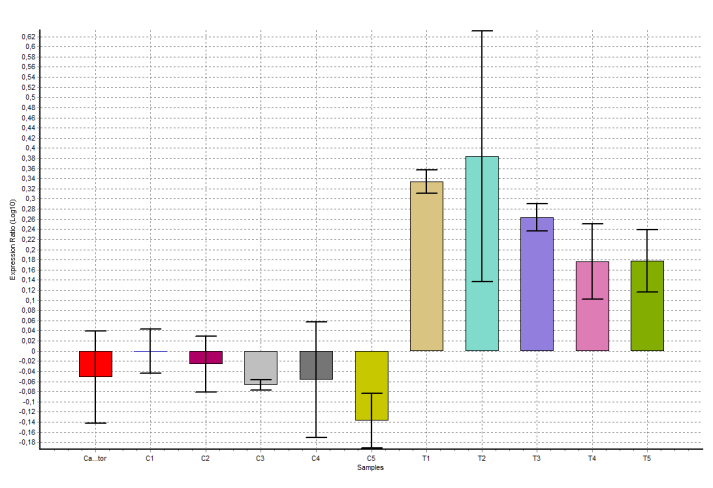

6. Hodnoty Rel Min a Rel Max sa vygenerujú z výpočtu štandardnej odchýlky kvocientu zo štandardných odchýlok GOI a normalizačného roztoku pomocou tohto vzorca:

$$CV_{relconc} = \sqrt{CV_{GOI}^2 + CV_{Norm}^2}$$

kde:

$$cv = \frac{s}{X} = \frac{stddev}{meanvalue}$$

#### 6.6.4 Relatívna kvantifikácia delta delta CT

Metóda delta delta CT umožňuje relatívnu analýzu expresie génu. Popisujú ju Livak a Schmittgen (2001)\*.

Táto metóda nevyžaduje zahrnutie kalibračných kriviek do každého cyklu. Každá vzorka sa najprv normalizuje na množstvo pridanej matrice tak, že sa porovná s normalizačným génom. Tieto normalizované hodnoty sa ďalej normalizujú vzhľadom na úpravu kalibračným roztokom. Kalibračný roztok by mohol byť napríklad nekultivovaný, neupravený kontrolný roztok alebo vzorka v nulovom čase.


Je nevyhnutné, aby bola efektívnosť amplifikácie sledovaného génu a normalizačného génu rovnaká a aby sa toto overilo podľa odporúčaní Livaka a Schmittgena.

Je nevyhnutné, aby sa názvy vzoriek definovali v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky) správne u vzoriek označených rovnako v každej kvantitatívnej analýze zloženia.


1. Údaje analyzujte pomocou možnosti „Quantitation“ (Kvantifikácia). Po vykonaní validácie nie je potrebné spustiť kalibračnú krivku.

Z karty **Other** (Ostatné) v okne **Analysis** (Analýzy) vyberte možnosť **Delta Delta CT Relative Quantitation** (Relatívna kvantifikácia delta delta CT). Vyberte možnosť **New Analysis** (Nová analýza).


\* Livak, K.J. and Schmittgen, T.D. (2001) Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the  $2^{-\Delta\Delta C(T)}$  method. *Methods* **25**, 402.

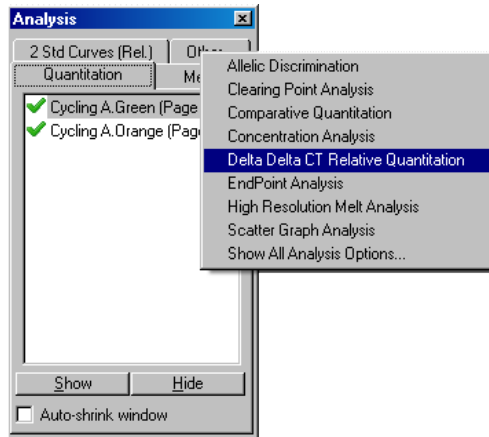


2. Zadáajte názov analýzy.

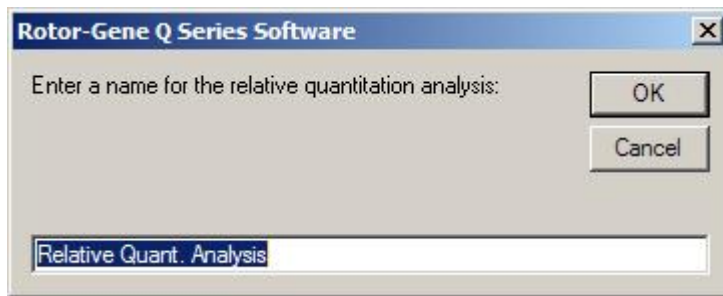


3. Na pokračovanie analýzy je potrebné skontrolovať **Validation Run Performed** (Vykonaný validačný cyklus). Definujte strany, na ktorých sa analyzovalo sledovaný gén a normalizačný gén.

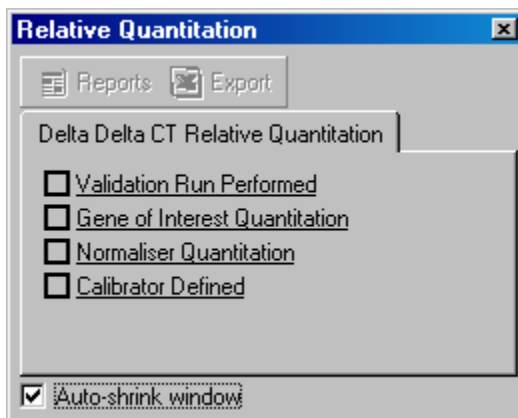

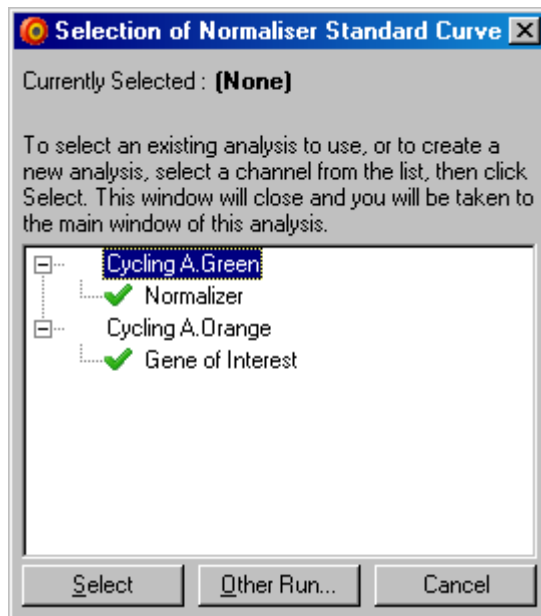

4. Kliknite na tlačidlo **Reports** (Správy) a zobrazí sa **Report Browser** (Prehliadač správ). Zo zoznamu vyberte analýzu so správnym názvom. Kliknite na tlačidlo **Show** (Zobraziť) a zobrazí sa správa relatívnej kvantifikácie. Možnosťou **Export** (Exportovať) môžete exportovať výsledky do nového hárku Excel. Ak je súčasťou aj kontrolný roztok dosiahnu sa výsledky vzhľadom na vzorku kalibračného roztoku, ktorému je priradená hodnota 1.

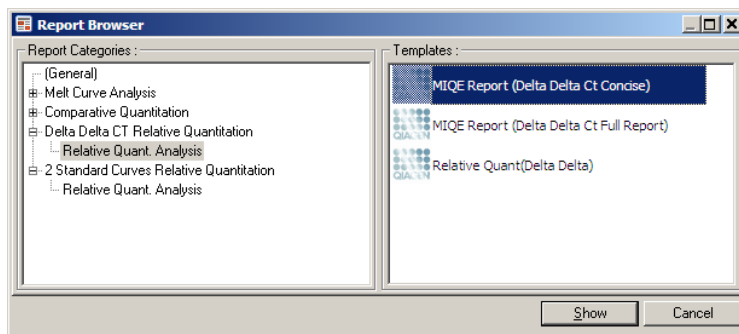

Príklad výsledkov z tejto analýzy je zobrazený nižšie. Zobrazia sa hodnoty  $C_T$  pre sledovaný gén (GOI  $C_T$ ), hodnoty  $C_T$  pre normalizačný gén (Norm.  $C_T$ ), Delta  $C_T$ , Delta Delta  $C_T$ , a relatívna koncentrácia (Relative Conc.). Expresia je relatívna ku vzorke kalibračného roztoku, ktorej je priradená relatívna expresia 1.

Viac informácií o odvodení výpočtov Rel Min (Rel. min.) a Rel Max (Rel. max.) nájdete v publikácii od Livaka a Schmittgena (2001).\*


\* Livak, K.J. and Schmittgen, T.D. (2001) Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the  $2^{-\Delta\Delta C(T)}$  method. *Methods* **25**, 402.

C	Replicate Name	GOI CT	Norm. CT	Delta CT	Delta Delta CT	Relative Conc.	Rel Min	Rel Max	Calibrator
	Dilution 8		28.37						
	Dilution 7	37.61	28.39	9.22	4.40	0.04728	0.04128	0.05414	
	Dilution 6	35.72	28.28	7.44	2.62	0.16228	0.14904	0.17669	
	Dilution 5	35.04	28.24	6.80	1.98	0.25292	0.11715	0.54605	
	Dilution 4	32.94	28.12	4.82	0.00	1.00000	0.69432	1.44025	Yes
	Dilution 3	31.66	28.23	3.43	-1.38	2.60825	2.16257	3.14579	
	Dilution 2	30.05	28.02	2.03	-2.79	6.92153	6.49040	7.38130	
	Dilution 1	28.61	27.92	0.69	-4.12	17.41896	16.47839	18.41322	
	QS 0.1 IU/µl		28.11						
	0.316 IU/µl	37.62	28.10	9.51	4.70	0.03957	0.03633	0.04094	
	1 IU/µl	36.84	28.15	8.69	3.88	0.06805	0.04415	0.10489	
	3.16 IU/µl	34.45	28.05	6.40	1.59	0.33305	0.28206	0.39325	
	QS4	32.67	28.29	4.38	-0.43	1.34925	1.09820	1.65770	
	QS3	30.07	27.98	2.09	-2.73	6.61982	6.18888	7.08076	
	QS2	26.88	27.64	-0.76	-5.57	47.61474	45.02202	50.35677	
	QS1	24.07	27.10	-3.03	-7.85	230.60440	208.45384	255.10870	


## 6.6.5 Analýza krivky topenia

Analýza krivky topenia analyzuje deriváciu nespracovaných údajov po vyhladení. Táto analýza sa zvyčajne používa na rozlíšenie genotypickej a alelickej diskriminácie. Maximá na krivke sa zoskupia do súborov a všetky maximá pod prahovou hodnotou sa vyradia. Súbor sa potom môžu mapovať do genotypov pomocou príkazu „Genotypes“ (Genotypy).

Po skončení cyklu sa môžu pri určitých chemických látkach pridať kroky topenia, aby sa vizualizovala kinetika rozpadu amplifikovaných produktov. Teplota sa lineárne zvýši a zaznamená sa fluorescencia každej vzorky. Nežná analýza krivky topenia je zobrazená nižšie.

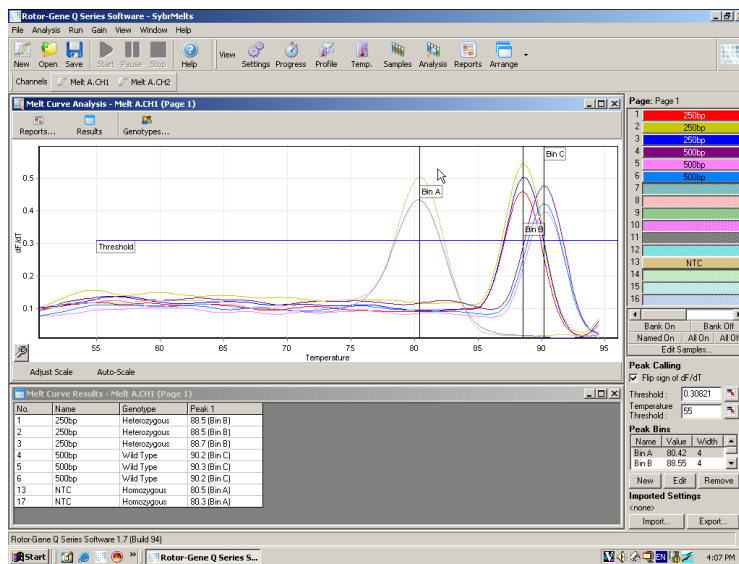



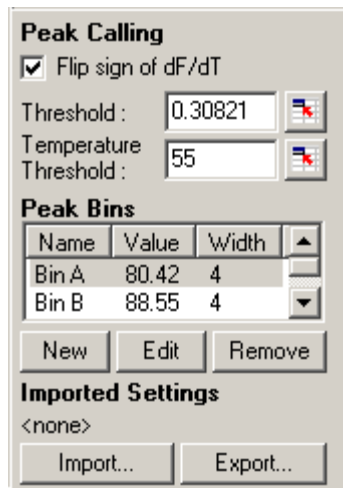

**Flip sign of dF/dT**  
(Značka obrátenia dF/dT):

Pred definovaním maxim musí byť značka dF/dT správna, aby skupina údajov dosiahla kladné maximá.

**Defining peaks**  
(Definovanie maxim):

V analýze krivky topenia sa môžu maximá definovať a uložiť do správy pomocou rôznych postupov. Jedným je automatické privolanie všetkých maxim pre každú vzorku. Ďalším je priradenie maxim do súborov, čo môže byť užitočné pre genotypizáciu.

Súbory definujú oblasť, v ktorej sa očakáva výskyt maxim. Softvér na analýzu kriviek topenia zhromaždí maximá do skupín súborov na základe aktuálnych hodnôt maxima v krivke. Súbory sa môžu v prípade potreby editovať.


Každé maximum, ktoré spadá do definovaného rozsahu súboru sa priradí do súboru. Ak existujú 2 súbory blízko seba, potom sa maximum priradí do najbližšieho súboru.

**Poznámka:** Súbory by sa nemali vizuálne umiestniť v rámci odhadu pozície maxima. Súbory umiestnite do približnej sledovanej oblasti, potom použite skutočne hlásené hodnoty v tabuľke s výsledkami na presnejší výsledok.


**Peak Bins** (Súbory maxim):

Na definovanie súboru kliknite na tlačidlo **New Bin** (Nový súbor), potom kliknite a podržte tlačidlo na grafe, aby ste určili stred súboru. Na prídanie ďalšieho súboru proces zopakujte. Na vymazanie súborov použite tlačidlo **Remove** (Odstrániť).

**Threshold** (Prahová hodnota):

Na nastavenie prahovej hodnoty (os y) kliknite na ikonu , potom kliknite a podržte ukazovateľ na grafe a potiahnite čiaru prahovej hodnoty na želanú úroveň.

**Temperature Threshold**  
(Prahová hodnota teploty):

Na nastavenie prahovej hodnoty (os x) kliknite na ikonu , potom kliknite a podržte ukazovateľ na grafe a potiahnite čiaru prahovej hodnoty doprava. Tým sa odstráni čiaru prahovej hodnoty pre nižšie teploty.

**Poznámka:** Toto je užitočné vtedy, keď je šum v signále pri nízkych teplotách.

## Správy


Otvorí sa **Report Browser** (Prehliadač správ), v ktorom je možné vybrať na prehliadanie správu. Správa sa môže generovať na základe aktuálne zvoleného kanála alebo je možné vygenerovať viackanálovú správu genotypizácie.

## Výsledky

Zobrazí sa okno **Melt Curve Results** (Výsledky krivky topenia), v ktorom sú zobrazené maximá vzorky.

## Genotypy

Kliknite na **Genotypes...** (Genotypy) a zvolte genotypy podľa obrázku nižšie.

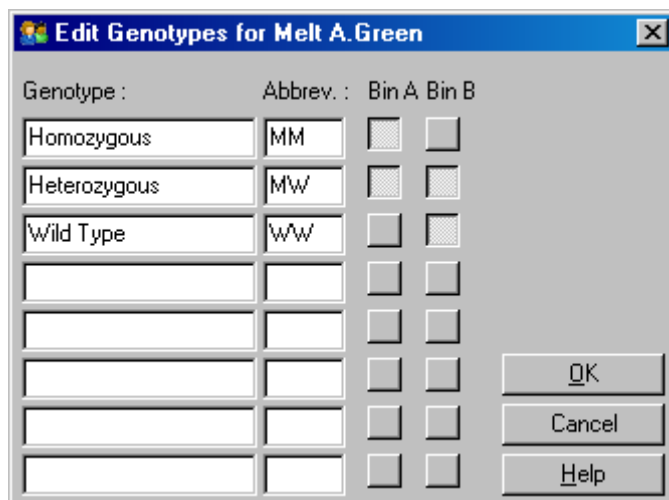


Toto okno umožňuje priradenie genotypov k incidencii maxim v súboroch. Štandardná konfigurácia genotypov je zobrazená na snímke obrazovky, pričom heterozygotné vzorky majú 2 maximá, homozygotné vzorky maximum v prvej polovicu súboru a vzorky divokého typu maximum v druhom súbore. Do políčka vedľa názvu každého genotypu je možné uviesť skratku. Tá sa používa pri tlačení správ multikanálových genotypov tak, aby sa dali jednoducho prečítať všetky výsledky z viacerých kanálov.

Pri mnohonásobnej analýze sa musia genotypy pripraviť v každom kanáli. Ak sa napríklad spustí dvojkanálová analýza so zhášaním FRET, v ktorej sa v každom kanáli očakávajú divoké typy genotypov a heterozygotne genotypy, musia sa parametre súboru nastaviť pre každý kanál. Výsledky sa potom uvedú vo viacnásobnej správe.

## Templáty analýzy kriviek topenia

Templáty analýzy kriviek topenia umožňujú používateľovi exportovať nastavenia normalizácie, prahovej hodnoty, genotypu a súboru do jedného súboru \*.met. Tento súbor sa môže importovať a znova použiť v iných experimentoch. Viac informácií nájdete v časti 7.1.

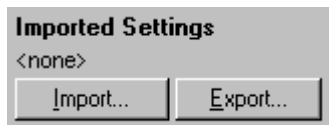

### 6.6.6 Komparatívna kvantifikácia


Komparatívna kvantifikácia porovnáva relatívnu expresiu vzoriek s kontrolnou vzorkou v cykle, v ktorom nie je dostupná kalibračná krivka. Táto možnosť sa často používa j analýze microarray. Warton et al. (2004)\* poskytujú príklad tejto techniky.

1. Na uskutočnenie analýzy vyberte v okne **Analysis** (Analýza) možnosť **Other** (Ostatné) a potom **Comparative quantitation** (Komparatívna kvantifikácia). Dvakrát kliknite na kanál, ktorý sa má analyzovať.
2. Z rozbaľovacej ponuky na pravej strane obrazovky pod prepínačom vyberte vzorku kontrolného roztoku.
3. Výsledky sa automaticky vypočítajú a zobrazia v okne **Comparative Quantitation Results** (Výsledky komparatívnej kvantifikácie) pod grafom.

V prvých stĺpcoch okna **Comparative Quantitation Results** (Výsledky komparatívnej kvantifikácie) je uvedené číslo vzorky a jej názov. Stĺpec **Takeoff** (Vzostup) udáva bod vzostupu vzorky. Druhá derivácia grafy amplifikácie produkuje maximá zodpovedajúce maximálnej miere nárastu fluorescencie v reakcii. Bod vzostupu sa definuje ako cyklus, v ktorom je druhá derivácia na 20 % maximálnej úrovne a udáva koniec šumu a prechod do exponenciálnej fázy.

Tento graf ukazuje druhú deriváciu grafy amplifikácie s relatívnymi pozíciami maxima druhej derivácie a bodom vzostupu.

\* Warton, K., Foster, N.C., Gold, W.A., and Stanley, K.K. (2004) A novel gene family induced by acute inflammation in endothelial cells. *Gene* **342**, 85.

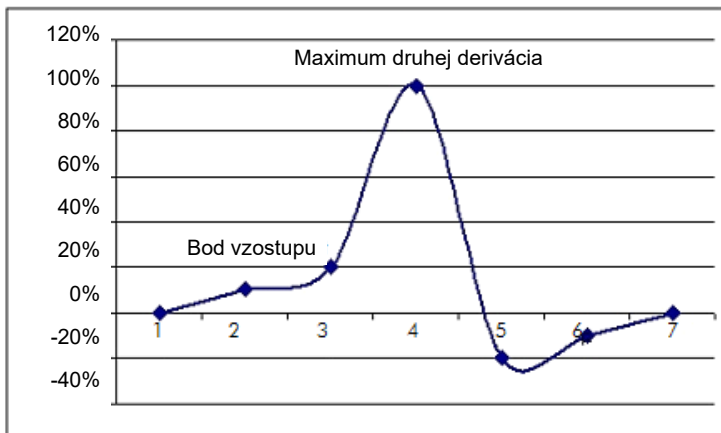

V stĺpci „Amplification“ (Amplifikácia) je uvedená efektívnosť vzorky. Výsledkom reakcie so 100 % efektívnosťou by bola hodnota amplifikácie 2 pre každú vzorku, čo znamená, že amplikón sa v každom cykle zdvoji. V nespracovaných údajoch by sa mal signál zdvojiť v exponenciálnej fáze. Ak bol signál napríklad 50 jednotiek fluorescence v cykle 12 a potom 51 jednotiek fluorescence v cykle 13, mal by sa zvýšiť na 53 jednotiek fluorescence v cykle 14. Všetky hodnoty amplifikácie pre každú vzorku sa spriemerujú, aby sa dosiahla hodnota amplifikácie, ktorá sa zobrazí v pravej časti obrazovky pod prepínačom. Čím väčšia je odchýlka medzi odhadovanými hodnotami amplifikácie každej vzorky, tým väčší bude interval spoľahlivosti (udávaný hodnotou po znamienku  $\pm$ ). Interval spoľahlivosti pre veľký počet vzoriek (N) udáva pravdepodobnosť na úrovni 68,3 %, že skutočná amplifikácia vzoriek sa nachádza v tomto rozsahu (1 štandardná odchýlka). Pri zdvojení intervalu  $\pm$  sa dosiahne interval spoľahlivosti pre väčší počet vzoriek N na úrovni 95,4 %.

### Kópia kalibračného roztoku

Podobne ako pri metóde delta delta  $C_T$  je potrebné vzorka kalibračného roztoku a merania sú relatívne k tejto vzorke. Kópie kalibračného roztoku sa môžu analyzovať, pretože ak má viacero pozícií vzoriek ten istý názov, použije sa priemer bodov vzostupu týchto vzoriek. Na správne použitie tejto funkcie musia mať kópie rovnaké názvy.



Na výpočet expresie sa použije priemerná amplifikácia. Vzorky s nízkou hodnotou amplifikácie bude napríklad trvať dlhšie, kým dosiahne určitý absolútny počet kópií ako pri vzorke s vyššou hodnotou amplifikácie. V stĺpci „Rep. Conc.“ (Konc. kópie) okna **Comparative Quantitation Results** (Výsledky komparatívnej kvantifikácie) je uvedená relatívna koncentrácia. Relatívna koncentrácia každej vzorky porovnaná so vzorkou kalibračného roztoku sa vypočíta na základe bodu vzostupu a efektívnosti reakcie. To sa vyjadří zápisom čísla.

**Poznámka:** Hodnota zobrazená v možnosti **Average Amplification** (Priemerná amplifikácia) napravo od znamienka  $\pm$  predstavuje štandardnú odchýlku priemernej amplifikácie po odstránení mimoriadnych hodnôt amplifikácie. Ak je táto hodnota väčšia, potom môže byť vo vypočítaných hodnotách koncentrácie veľká chyba.

Relatívne koncentrácie vypočíta softvér nasledovne:

1. Bod vzostupu každej vzorky sa vypočíta z maxím druhej derivácie.
2. Vypočíta sa priemerný nárast v 4 cykloch nespracovaných údajov po vzostupe. Toto je hodnota amplifikácie vzorky.
3. Amplifikácie mimoriadnych hodnôt sa odstránia, pretože spôsobujú šum vo fluorescencii pozadia.
4. Zostávajúce amplifikácie sa spriemerujú. Výsledkom je priemerná amplifikácia.
5. Priemerný bod vzostupu sa vypočíta pre každú kópiu kalibračného roztoku.
6. Relatívna koncentrácia vzorky sa vypočíta ako amplifikácia <sup>^</sup> (vzostup kalibračného roztoku – vzostup vzorky).
7. Výsledky sa vyjadria číslom v stĺpci „Rep. Conc.“ (Konc. kópie) okna **Comparative Quantitation Results** (Výsledky komparatívnej kvantifikácie.).

#### 6.6.7 Alelická diskriminácia

Alelická diskriminácia používa kinetické údaje v reálnom čase z 2 alebo viacerých kanálov do vzoriek genotypov. Na uskutočnenie tejto analýzy vyberte v okne **Analysis** (Analýza) možnosť **Other** (Ostatné) a potom **Allelic Discrimination** (Alelická diskriminácia). Pri vykonávaní alelickej diskriminácie nestačí len dvakrát kliknúť, aby sa kanál analyzoval, pretože táto analýza sa vykonáva pomocou viacerých kanálov naraz. Na uskutočnenie analýzy buď podržte kláves CTRL a kliknutím označte každý kanál, ktorý chcete analyzovať alebo potiahnite ukazovateľ myši ponad tieto kanály. Po označení želaných kanálov kliknite na **Show** (Zobraziť). Zoznam sa aktualizuje a bude obsahovať všetky kanály na jednom riadku so značkou fajky vedľa nich. To znamená, že sa všetky použijú v jednej analýze. Na odstránenie jedného alebo viacerých z týchto kanálov kliknite pravým tlačidlom na analýzu a vyberte možnosť **Remove analysis...** (Odstrániť analýzu...). Tieto kanály sa potom môžu použiť v inej analýze alelickej diskriminácie. Jeden kanál sa môže naraz použiť v jednej analýze.

**Reports (Správy):** Na prehládanie sa otvorí správa „Allelic Discrimination Analysis“ (Analýza alelickej diskriminácie).


**Results (Výsledky):** Zobrazí sa okno **Allelic Discrimination Analysis** (Analýza alelickej diskriminácie). Toto okno sa otvorí automaticky, keď sa prvýkrát zobrazí analýza.

**Normalization options (Možnosti normalizácie):** Na optimalizovanie normalizácie nespracovaných údajov sú k dispozícii rozmanité možnosti:

- **Dynamic Tube** (Dynamická skúmavka) (normalizácia dynamickej skúmavky)
- **Slope Correct** (Korekcia sklonu) (korekcia sklonu šumu)
- **Ignore First x cycles** (Ignorovať prvé x cykly) (korekcia šumu v prvotných cykloch)
- **Takeoff point adjustment** (Nastavenie bodu vzostupu)


Viac podrobností nájdete na strane 92.

**Discrimination Threshold (Prah diskriminácie):** Do týchto textových polí zadajte hodnoty pre umiestnenie prahovej hodnoty diskriminácie. Všetky krivky prechádzajúce cez túto prahovú hodnotu sa považujú za genotypizačné vzorky. Kliknite na ikonu napravo každého textového poľa, potom potiahnite prahovú hodnotu na grafe a nastavte tieto hodnoty vizuálne.

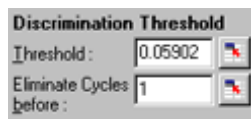


**Genotypes (Genotypy):** Otvorí sa okno **Genotyping** (Genotypizácia), ktoré sa používa na definovanie toho, ktorý genotyp sa v každom kanáli bude detegovať. Toto okno umožňuje priradenie genotypov kanálom na analýzu alelickej diskriminácie.

Na príklade nižšie je vzorka heterozygotná, ak údaje v kanáloch Cycling A.Green a Cycling A.Yellow prechádza cez prahovú hodnotu.

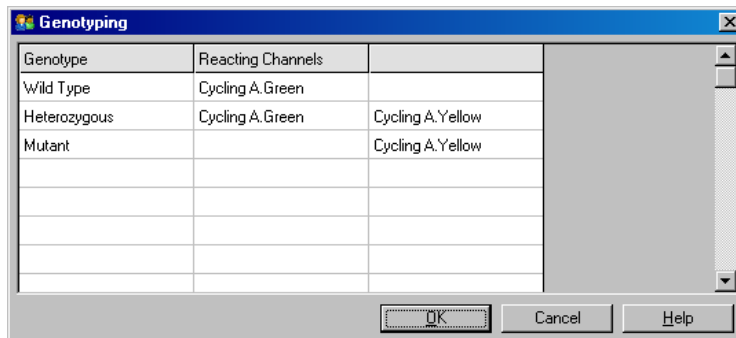

**Allelic analysis templates (Templáty alelickej analýzy):** Templáty alelickej analýzy umožňujú export nastavení normalizácie, prahovej hodnoty a genotypu do jedného súboru \*.alt. Tento súbor sa môže importovať a znova použiť v iných experimentoch. Viac informácií nájdete v časti 7.1.

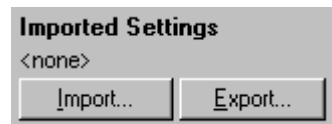


## 6.6.8 Analýza bodového grafu

Analýza bodového grafu umožňuje genotypizáciu na základe relatívnej expresie schém amplifikácie cez 2 kanály. Na rozdiel od alelickej diskriminácie sa genotyp určí na základe regiónov definovaných z bodového grafu a nie z jednej prahovej hodnoty. Na uskutočnenie tejto analýzy vyberte v okne **Analysis** (Analýza) možnosť **Other** (Ostatné) a potom **Scatter Graph Analysis** (Analýza bodového grafu).

Pri vykonávaní bodového grafu nestačí len dvakrát kliknúť, aby sa kanál analyzoval, pretože táto analýza sa vykonáva pomocou 2 kanálov naraz. Na uskutočnenie analýzy buď podržte kláves SHIFT a kliknutím označte kanály, ktoré chcete analyzovať alebo potiahnite ukazovateľ myši ponad tieto kanály. Po označení želaných kanálov kliknite na **Show** (Zobraziť).


Zoznam sa aktualizuje a bude obsahovať všetky kanály na jednom riadku so značkou fajky vedľa nich. To znamená, že sa všetky použijú v jednej analýze. Na odstránenie jedného alebo viacerých z týchto kanálov kliknite pravým tlačidlom na analýzu a vyberte možnosť **Remove analysis...** (Odstrániť analýzu...). Tieto kanály sa potom môžu použiť v inej analýze bodového grafu. Jeden kanál sa môže naraz použiť v jednej analýze.

Reports (Správy):	Na prehliadanie sa otvorí správa <b>Scatter Analysis</b> (Bodová analýza).
Results (Výsledky):	Zobrazí sa okno Scatter Analysis Results (Výsledky bodovej analýzy). Toto okno sa otvorí automaticky, keď sa prvýkrát zobrazí analýza.
Normalization options (Možnosti normalizácie):	<p>Na optimalizovanie normalizácie nespracovaných údajov sú k dispozícii rozmanité možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dynamic Tube</b> (Dynamická skúmavka) (normalizácia dynamickej skúmavky)</li><li>• <b>Slope Correct</b> (Korekcia sklonu) (korekcia sklonu šumu)</li><li>• <b>Ignore First x cycles</b> (Ignorovať prvé x cykly) (korekcia šumu v prvotných cykloch)</li><li>• <b>Takeoff point adjustment</b> (Nastavenie bodu vzostupu)</li></ul> <p>Viac podrobností nájdete na strane 92.</p>
Genotypes (Genotypy):	Otvorí sa okno <b>Genotyping</b> (Genotypizácia), ktoré sa používa na definovanie toho, ktorý genotyp sa v každom kanáli bude detegovať. V tomto okne je možné genotypy priradiť na základe kanálov, v ktorých vzorka reaguje. Vybrané kanály sa použijú na označenie rohov bodového grafu a prevedú používateľa do všeobecnej oblasti bodového grafu, v ktorej sa majú definovať regióny.

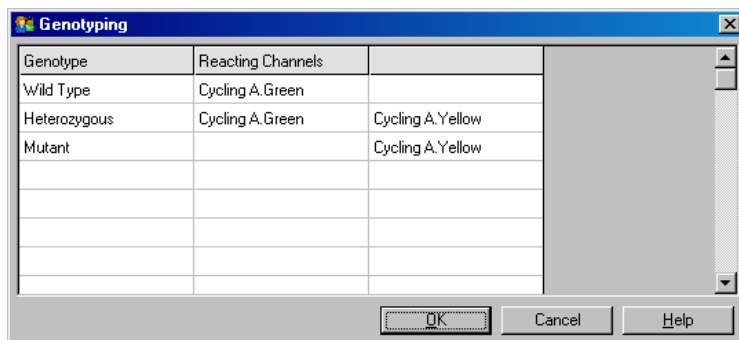


Scatter Graph (Bodový graf): V bodovom grafe sa zobrazuje relatívna expresia 2 vybraných kanálov. Zobrazenie je normalizované tak, aby predstavovalo rôzne miery veľkosti účinku v každom kanáli a premenený logaritmus tak, aby zvýraznil rozdiely v expresii medzi vzorkami.

Na genotypizáciu definuje používateľ regióny kliknutím a potiahnutím vybranej oblasti na grafe. Zvolená oblasť sa potom môže označiť na základe genotypov nakonfigurovaných v okne **Genotyping** (Genotypizácia).

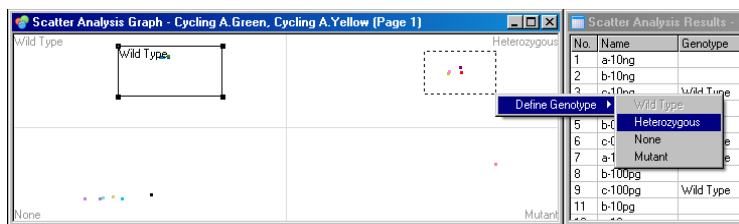

Scatter graph analysis templates (Templáty analýzy bodového grafu):

Templáty analýzy bodového grafu umožňujú exportovanie nastavení genotypov a regiónov do súboru \*.sct. Tento súbor sa môže importovať a znova použiť v iných experimentoch. Viac informácií nájdete v časti 7.1.

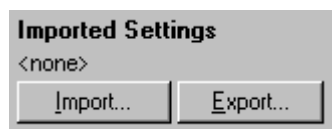


## 6.6.9 Analýza EndPoint

Analýza EndPoint umožňuje diskrimináciu medzi amplifikovanými a neamplifikovanými vzorkami na konci cyklu. Výsledky sú kvalitatívne (pozitívne/negatívne), nie kvantitatívne.

Analýza EndPoint je zobrazená na snímke obrazovky nižšie.



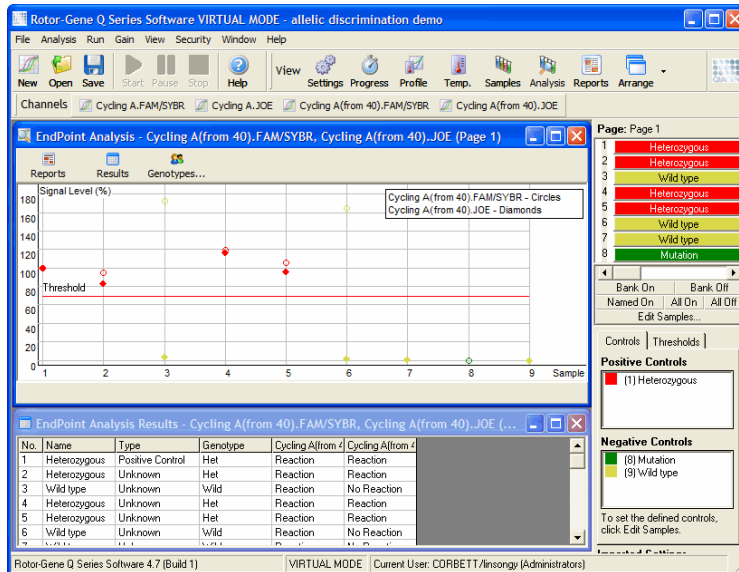


Analýza EndPoint je podobná alelickej diskriminácii v tom, že výsledky sú kvalitatívne a názvy je možné priradiť určitým permutáciám reakcií v rôznych kanáloch. V analýze EndPoint je ale dostupné len jedno čítanie na rozdiel od alelickej diskriminácie, ktorá používa čítanie cyklu po cykle pre každú vzorku. To znamená, že používateľ musí identifikovať pozitívne a negatívne kontrolné roztoky, aby analýzu zjednodušil. Pri nespracovaných údajoch sa úrovne signálu normalizujú vzhľadom na známe pozitívne a negatívne kontrolné roztoky pre každý kanál. Používateľ potom vyberie percentuálne vyjadrenie úrovne signálu ako prahovú hodnotu.

## Výrazy použité v analýze EndPoint

Niektoré výrazy použité v analýze EndPoint sú vysvetlené nižšie.

Positive control (Pozitívny kontrolný roztok):	Vzorka, o ktorej je známe, že sa bude amplifikovať.
Negative control (Negatívny kontrolný roztok):	Vzorka, o ktorej je známe, že sa nebude amplifikovať. Predstavuje typický signál pozadia.
Threshold (Prahová hodnota):	Prahová hodnota je úroveň signálu, nad ktorou sa vzorka považuje za pozitívnu (amplifikovanú). Toto nastavenie musí používateľ pre každý cyklus nastaviť.
Signal level (Úroveň signálu):	Percentuálna hodnota signálu fluorescencie normalizovaná tak, aby bol najvyšší signál pozitívneho kontrolného roztoku 100 % a najnižší signál negatívneho kontrolného roztoku 0 %.
Genotype (Genotyp):	Interpretácia rôznych permutácií reakcií na rôznych kanáloch. Napríklad genotyp „heterozygotný“ by sa mohol priradiť vzorkám, ktoré reagujú v oboch kanáloch – zelenom a žltom. Genotyp sa môže použiť aj sumarizovanie výsledkov reakcií s internými kontrolnými roztokmi. Výsledky sa môžu napríklad sumarizovať ako „inhibited“ (inhibované), „positive“ (pozitívne) alebo „negative“ (negatívne) v závislosti od toho, či bola v niektorých kanáloch pozorovaná reakcia alebo nie.

## Konfigurácia profilu

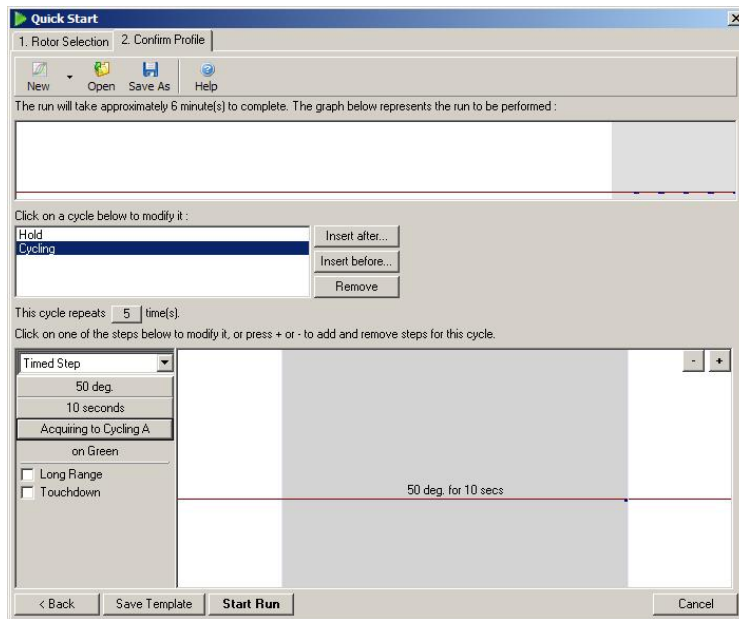

Na uskutočnenie analýzy EndPoint vytvorte profil s retenciou pri teplote 50 °C počas niekoľkých minút, potom krok cyklovania s jedným krokom (50 °C na 10 sekúnd) pri čítaní potrebného kanála. Počet opakovaní nastavte na 5, ako je zobrazené vyššie. Tieto časy sú len odporúčania a môžu sa vo vašej konkrétnej aplikácii líšiť. Čím viac opakovaní v profile, tým viac dostupných informácií na vykonanie analýzy. Analýza automaticky spriemeruje všetky údaje, aby sa dosiahla jedna hodnota pre každú vzorku. Neexistuje konkrétny počet potrebných opakovaní. Pokiaľ nie je potrebná vysoká úroveň presnosti, zvyčajne stačí 5 opakovaní.


## Analýza

Analýzu EndPoint je možné uskutočniť na viacerých kanáloch zároveň. Na vytvorenie novej analýzy kliknite na kartu **EndPoint** (EndPoint), vyberte kanály ich pretiahnutím pomocou ukazovateľa myši a potom kliknite na **Show** (Zobraziť).




### Definovanie kontrolných roztokov

Pri prvom otvorení analýzy EndPoint sa zobrazí toto hlásenie, ak neboli identifikované pozitívne ani negatívne kontrolné roztoky.

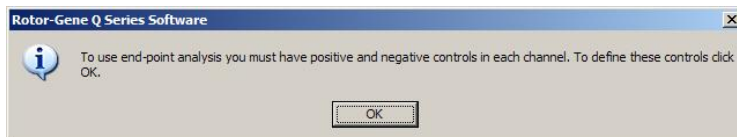

Kliknite na **OK**. Zobrazí sa okno **Edit Samples** (Upraviť vzorky), v ktorom je možné definovať pozitívne a negatívne kontrolné roztoky. Aby bola vzorka definovaná ako pozitívny alebo negatívny kontrolný roztok, kliknite na bunku s typom vzorky a potom vyberte z rozbaľovacej ponuky relevantný typ kontrolného roztoku.

**Poznámka:** Kontrolné roztoky sa musia prepnúť na „on“ (zap.) pomocou prepínača na pravej strane hlavného okna, aby sa dala uskutočniť analýza.

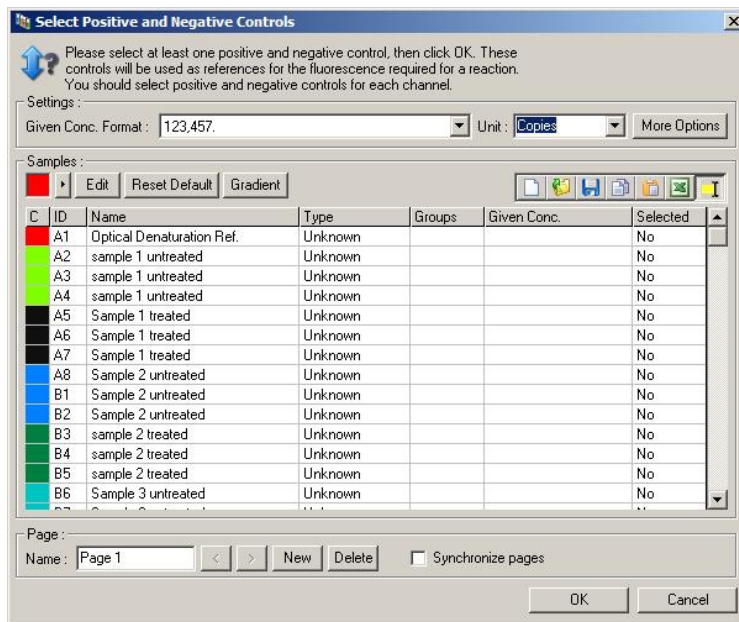

Táto obrazovka funguje rovnakým spôsobom ako okno **Edit Samples** (Upraviť vzorky) (časť Nastavenie templátu).

## Normalizácia

Normalizácia údajov analýzy EndPoint vloží všetky úrovne signálu v rozsahu 0 – 100 % do stupnice. Je potrebné zvoliť aspoň jeden pozitívny a jeden negatívny kontrolný roztok alebo viac roztokov pri analyzovaní viacerých kanálov a v prípade, že štandardy sa neznásobia. Viac ako jeden pozitívny a jeden negatívny kontrolný roztok by sa mal použiť vtedy, ak existuje riziko, že pozitívny kontrolný roztok sa nemusí amplifikovať.

1. V každom kanáli by sa mali analyzovať všetky pozitívne kontrolné roztoky a jeden s najvyššou fluorescenciou sa nastaví na 100 %. To znamená, že ak sa spustia kontrolné roztoky kópií, môže pozitívny kontrolný roztok zlyhať bez ovplyvnenia cyklu.
2. Všetky negatívne kontrolné roztoky sa zanalyzujú a jeden s najnižšou úrovňou fluorescencie sa nastaví na 0 %.
3. Neupravené hodnoty fluorescencie zvyšných vzoriek sa použijú na stupnici vzhľadom na najvyšší pozitívny kontrolný roztok a najnižší negatívny kontrolný roztok.

Napríklad:

Vzorka	Typ	Fluorescencia
1	Pozitívny kontrolný roztok	53,6
2	Pozitívny kontrolný roztok	53,0
3	Negatívny kontrolný roztok	4,5
4	Negatívny kontrolný roztok	4,3
5	Vzorka	48,1
6	Vzorka	6,4

Tento cyklus bol úspešný, pretože 2 pozitívne kontrolné roztoky a 2 negatívne kontrolné roztoky sú blízko seba a sú mimo hodnôt fluorescencie vzoriek.


Normalizované hodnoty sú:

Vzorka	Typ	Expresia (%)
1	Pozitívny kontrolný roztok	100,0
2	Pozitívny kontrolný roztok	97,3
3	Negatívny kontrolný roztok	0,4
4	Negatívny kontrolný roztok	0,0
5	Vzorka	84,2
6	Vzorka	4,0

Vzorka 1 bol pozitívny kontrolný roztok s najvyššou fluorescenciou, takže bol nastavený na 100 %. Ďalší pozitívny kontrolný roztok bol o trochu nižší. Vzorka 4, najnižší negatívny kontrolný roztok bol nastavený na 0 %. Teraz je jasné, že vzorka 5 sa pravdepodobne amplifikovala, zatiaľ čo vzorka 6 sa pravdepodobne neamplifikovala.

**Poznámka:** V závislosti od vybraných pozitívnych a negatívnych kontrolných roztokov je možné dosiahnuť úroveň expresie vyššie ako 100 % alebo nižšie ako 0 %. Výsledok väčší ako 100 % sa môže interpretovať tak, že expresia vzorky je vyššia ako pozitívne kontrolné roztoky. Výsledok nižší ako 0 % sa môže interpretovať tak, že existuje menšia pravdepodobnosť amplifikácie vzorky ako amplifikácie pozitívneho kontrolného roztoku. Keďže je táto analýza kvalitatívna, takého výsledky nepredstavujú žiadne obavy.

Ak negatívne kontrolné roztoky dosiahnu vyššiu fluorescenciu ako pozitívne kontrolné roztoky, nepripravili sa vzorky správne a zobrazí sa toto hlásenie.

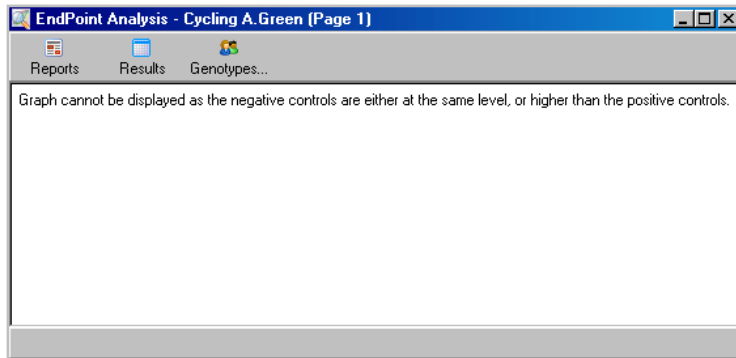

### Normalizácia vo viacerých kanáloch

Je možné analyzovať údaje signálu vo viacerých kanáloch, ale príprava vzorky je zložitejšia. Analýza EndPoint predpokladá, že multiplexovanie sa vykonáva tak, aby mala každú skúmavku len jednu pozíciu. V súčasnosti nie je možné analyzovať prípravu, v ktorej je pozícia vzorky pozitívnym kontrolným roztokom pre jeden kanál a negatívnym kontrolným roztokom pre iný kanál.

Aj keď je v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky) daná jedna definícia vzorky na jednu pozíciu skúmavky, dôjde k normalizácii nezávisle pre každý kanál.

Ak je pozícia skúmavky pozitívny kontrolný roztok pre minimálne jeden kanál, mala by sa táto pozícia špecifikovať v stĺpci „Type“ (Typ) okna **Edit Samples** (Upraviť vzorky) ako pozitívny kontrolný roztok. V opačnom prípade by mal byť jej typ **Sample** (Vzorka). To platí aj pre negatívne kontrolné roztoky.

Ak je napríklad vzorka pozitívny kontrolný roztok v zelenom kanáli, ale nie v žltom, mala by sa vzorka stále definovať ako pozitívny kontrolný roztok. Keďže sa v každom kanáli používa najvyšší pozitívny kontrolný roztok, ak je v žltom kanáli aspoň jeden pozitívny kontrolný roztok, ktorý sa amplifikuje, definícia vzorky ako kontrolného roztoku pre zelený kanál sa ignoruje.


### Prahová hodnota

Prahová hodnota sa používa na určenie percentuálnej hodnoty expresie potrebnej na reakciu v každom kanáli. Po definovaní jedného pozitívneho a jedného negatívneho kontrolného roztoku sa všetky kanály normalizujú na rovnakú stupnicu 0 – 100 %. Z tohto dôvodu je potrebná len jedna prahová hodnota, dokonca aj pri analyzovaní viacerých kanálov.

Kliknite na líniu prahovej hodnoty a potiahnite ju do oblasti medzi 0 a 100. Prahová hodnota by nemal byť príliš blízko ku vzorkám na jednej alebo druhej strane línie, pretože to znamená, že cyklus nie je konečný. Ak je rozdiel medzi vzorkou, ktorá sa definuje ako amplifikovaná alebo neamplifikovaná, len niekoľko percent, znamená to, že reakcia sa opakovala, vzorka sa môže objaviť na druhej strane prahovej hodnoty.

## Genotypy


Touto možnosťou sa otvorí okno **Genotyping** (Genotypizácia), ktoré sa používa na definovanie toho, ktorý genotyp sa v každom kanáli bude detegovať.

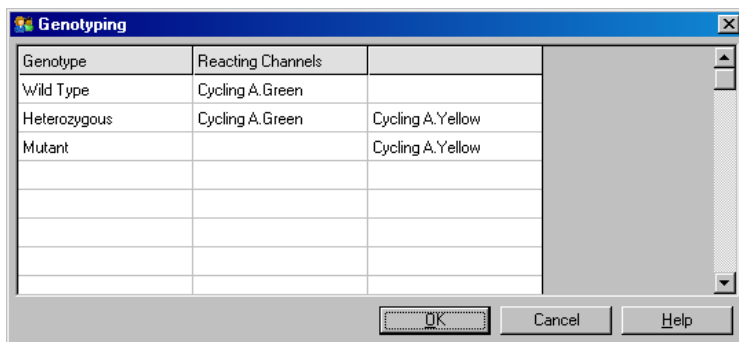

Toto okno umožňuje priradiť genotypy ku kanálom. Na príklade vyššie je vzorka heterozygotná, ak údaje v kanáloch Cycling A.Green a Cycling A.Yellow prechádza cez prahovú hodnotu.

## Templáty analýzy EndPoint


Templáty analýzy EndPoint umožňujú používateľovi exportovať nastavenia genotypu a prahovej hodnoty do jedného súboru \*.ent. Tento súbor sa môže importovať a znova použiť v iných experimentoch. Viac informácií nájdete v časti 8.1.

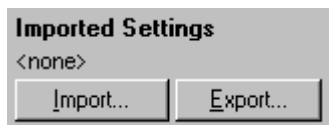

### 6.6.10 Analýza koncentrácie

Analýza koncentrácie umožňuje použiť prístroj Rotor-Gene Q MDx na meranie koncentrácií DNA alebo na získanie údajov z fluorimetra.

Na snímke obrazovky nižšie je zobrazená analýza.

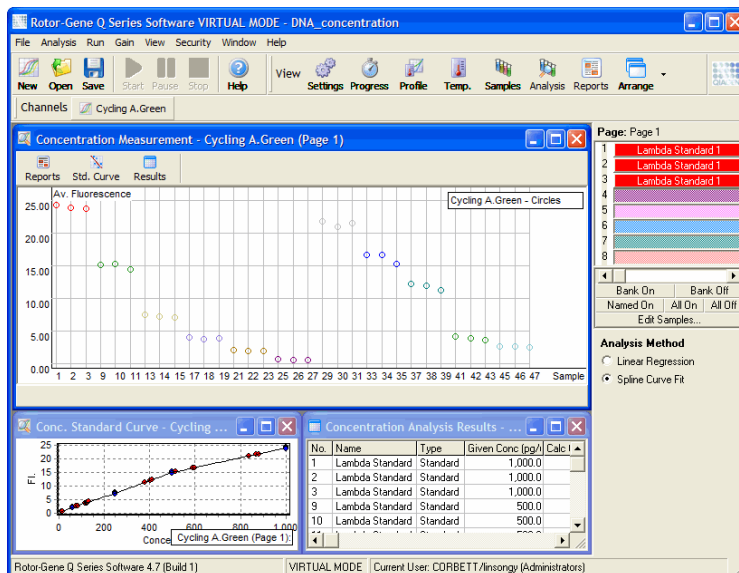

## Príprava spracovania

Na uskutočnenie analýzy koncentrácie najprv pripravte fluorescenčné štandardy a vzorky, ideálne v troch kópiách.

## Príprava štandardov

Kalibračná krivka sa používa na stanovenie koncentrácie DNA z každej meranej vzorky.

DNA použitá v kalibračnej krivke by mala byť DNA podobného typu ako v meraných vzorkách. Pomocou spektrofotometrie v UV oblasti by sa mala stanoviť koncentrácia aspoň jednej vzorky DNA a táto vzorka by sa mala použiť ako štandard. Je potrebné použiť minimálne 3 štandardy (s kópiami). Je dôležité, že DNA štandardy použité pri detekcii fluorescencie sú lineárne len v rozsahu 1 – 100 ng/μl. Ak sa koncentrácia DNA v tomto rozsahu rozdelí na polovice, stane sa tak aj s údajom o fluorescencii. Intervaly spoľahlivosti pre všetky koncentrácie mimo tohto rozsahu sú veľmi široká z dôvodu nelineárnosti chemického zloženia.


## Typ meranej DNA

Pri meraní rôznych foriem DNA (napr. genómová DNA v porovnaní s plazmidovou DNA) boli pozorované rozdiel. Preto by sa mali spolu používať len podobné typy DNA a plazmidová DNA by sa nemala používať ako štandard pri meraní genómovej DNA.



## Príprava cyklu

Na prípravu cyklu vyberte možnosť **Nucleic Acid Concentration Measurement** (Meranie koncentrácie nukleovej kyseliny) zo sprievodcu Quick Start (rýchle spustenie).

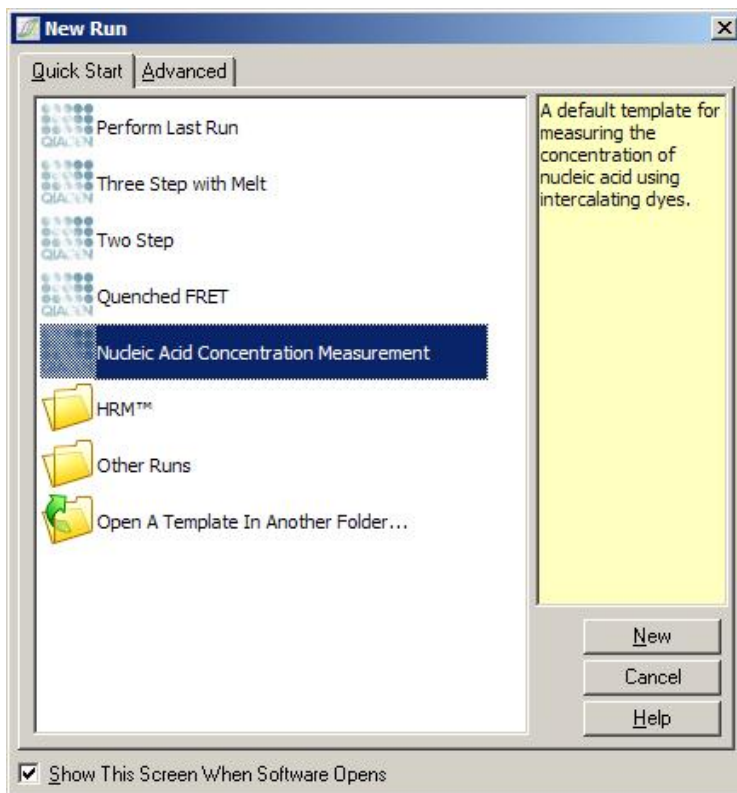

**Poznámka:** Pozitívny kontrolný roztok, ako napríklad štandard s vysokou koncentráciou, musí byť v skúmavke na pozícii 1. Bez pozitívneho kontrolného roztoku nebude softvér schopný optimalizovať nastavenia výťažku pre maximálnu senzitivitu. Pred každým cyklom budete vyzvaní, aby ste toto zabezpečili.

## Analýza

Analýza koncentrácie funguje tak, že vytvára spojitosť medzi úrovňou fluorescencie a hodnotou koncentrácie. Sú dostupné dva modely analýzy. Zvolenie optimálnej analýzy závisí od chemického zloženia a aplikácie.

Možnosť „Linear Regression“ (Lineárna regresia) analyzuje údaje pri predpoklade lineárneho vzťahu a odhade neznámych hodnôt na základe vygenerovaného lineárneho modelu. Chybu merania určí tak, že preskúma odchýlku údajov od lineárneho modelu. Ak sú údaje koncentrácie


lineárne, je toto najvhodnejšia analýza, pretože poskytuje používateľovi štatistickú analýzu odchýlky (ANOVA).

Možnosť „Spline Curve Fit“ (Priradenie spline krivke) predpokladá, že porastú len hodnoty koncentrácie s fluorescenciou. Zatiaľ čo tento prístup dokáže presnejšie odhadnúť nelineárne údaje, nedokáže poskytnúť analýzu ANOVA, pretože nepredpokladá lineárny model.

### 6.6.11 Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia

Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia (High Resolution Melt, HRM) charakterizuje vzorku na základe dĺžky sekvencie, obsahu GC a komplementarity. Analýza HRM sa používa pri genotypizácii, ako je napríklad analýza mutácií génov alebo jednonukleotidový polymorfizmus (SNP) a v epigenetických aplikáciách na analýzu stavu metylácie DNA. Analýza HRM poskytuje presné výsledky a v porovnaní s inými metódami šetrí náklady na sondy a štítky.

Na uskutočnenie tejto analýzy vyberte v okne **Analysis** (Analýza) možnosť **Other** (Ostatné) a potom **High Resolution Melt Analysis** (Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia). Dvakrát kliknite na kanál, ktorý sa má analyzovať. Krivky topenia z nespracovaného kanálu sa normalizujú pomocou spriemerovania všetkých začiatkových a koncových hodnôt fluorescencie a potom prinútia koncové body každej vzorky, aby boli rovnaké ako priemer.

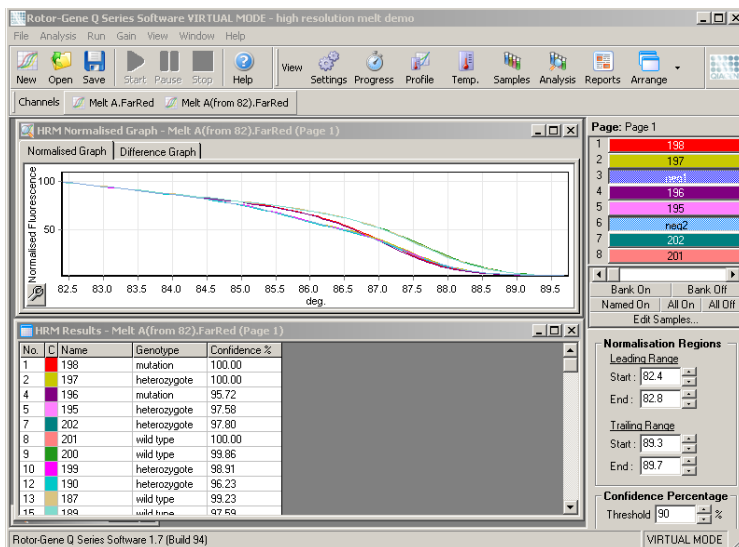

Vzorky sa automaticky vyberú kliknutím na možnosť **Genotypes** (Genotypy). Zadáte názov genotypu, potom číslo vzorky, ktorá sa používa ako pozitívny kontrolný roztok, aby sa vzorky vybrali automaticky.

HRM Genotypes	
Genotype	Control
mutation	198
wild type	201
heterozygote	197

Clear    OK    Cancel    Help

Viac podrobností o analýze HRM nájdete v časti 10.


## 6.7 Ponuka cyklu

### 6.7.1 Spustenie cyklus

Touto možnosťou spustíte definovaný teplotný profil s aktuálnymi nastaveniami výťažku. Pred spustením cyklu sa zobrazí okno **Profile Run Confirmation** (Potvrdenie cyklu profilu). Zobrazí sa grafické zobrazenie teplotného profilu spolu s nastaveniami výťažku pre každý kanál.

### 6.7.2 Pozastavenie cyklu

Táto možnosť umožňuje pozastaviť a obnoviť chod cyklu. Pozastavenie a obnova môžu vážne ovplyvniť výsledky cyklu. Z tohto dôvodu udáva marker v údajoch, že cyklus bol pozastavený a dĺžku tejto pauzy. V karte hlásení okna **Run Settings** (Nastavenia cyklu) sa zobrazí hlásenie (pozri časť 6.8.1).

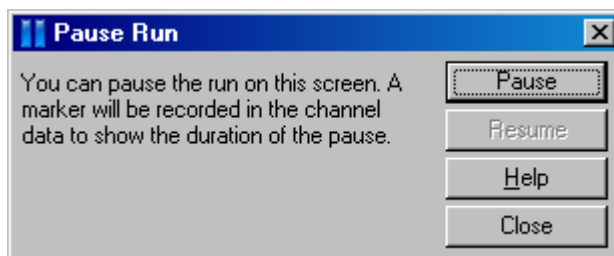

#### VAROVANIE



#### Horúci povrch

Pri pozastavení cyklu nedôjde k úplnému vychladnutiu prístroja Rotor-Gene Q MDx na izbovú teplotu. Pred manipuláciou s rotorom alebo skúmavkami v prístroji buďte opatrní.

### 6.7.3 Zastavenie cyklu

Ak sa zvolí táto možnosť, objaví sa hlásenie s výzvou na potvrdenie zastavenia cyklu.


## 6.8 Ponuka prehliadania

### 6.8.1 Nastavenia cyklu

#### Všeobecné informácie


Toto okno umožňuje nastavenie informácií o cykle, názvu súboru cyklu, údajov o analýze, operátora a všetkých súvisiacich poznámok.

V okne sa zobrazujú všetky informácie, okrem profilu, potrebné na konfiguráciu cyklu. Po dokončení cyklu sa v tomto okne zobrazia tieto informácie: použitý cyklovač, nastavenia výťažku, počet kanálov a čas štartu a konca.

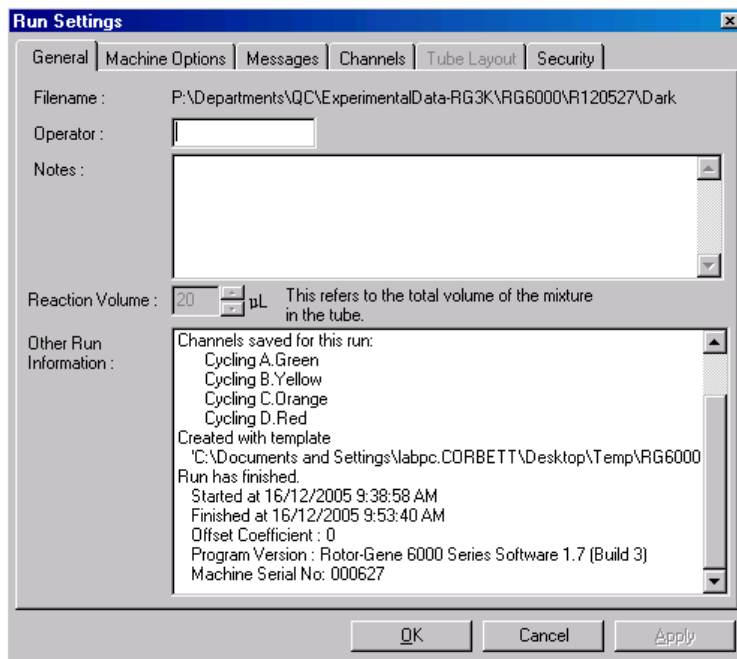

## Možnosti stroja

Na tejto karte sú zobrazené nastavenia konfigurácie prístroja Rotor-Gene Q MDx.

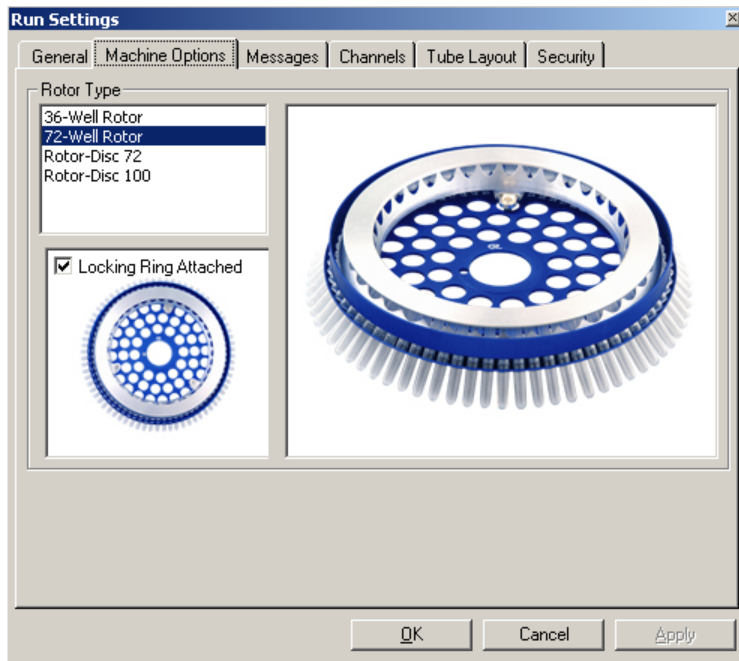


Rotor by sa mal nastaviť tak, aby zodpovedal rotou aktuálne nainštalovanému v prístroji Rotor-Gene Q MDx. Pri otvorení existujúceho cyklu bude toto nastavenie reflektovať rotor, ktorý bol nainštalovaný v cyklovači v tom čase.

## Hlásenia

V tejto karte sa zobrazujú hlásenia o tom, či používateľ urobil nejaké zmeny, ako napríklad pozastavenie cyklovača alebo preskočenie cyklov počas spracovania. Takisto sa tu zobrazujú varovania prijaté počas cyklu. Táto karta by sa mala skontrolovať, ak výsledky nie sú podľa predstáv.

## Kanály

Pri konfigurácii nového cyklu zobrazuje karta kanálov aktuálnu konfiguráciu dostupných kanálov. Pri prezeraní existujúceho cyklu predstavujú zobrazené informácie konfiguráciu kanálov pri uskutočňovaní cyklu. Ak cyklus poškodí nastavenia kanálov, je možné štandardné kanály obnoviť kliknutím na možnosť **Reset Defaults** (Resetovať pôvodné nastavenia).

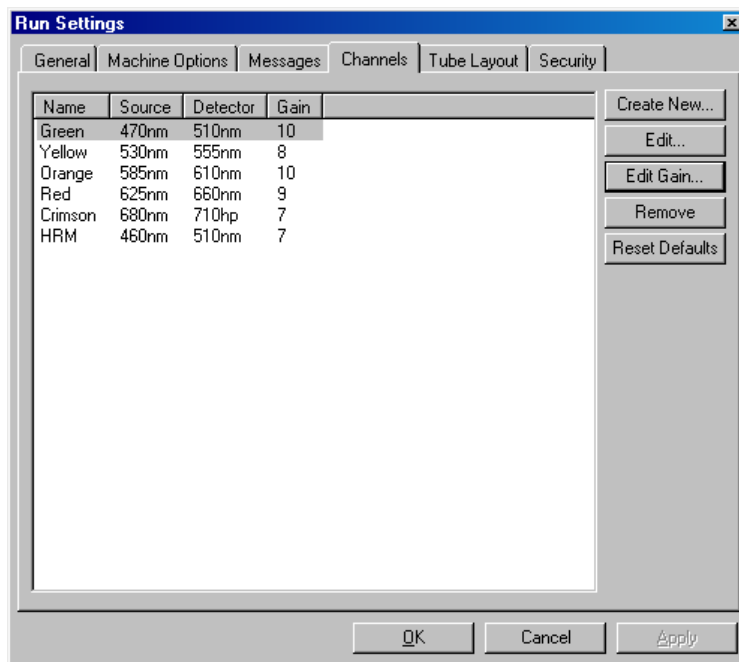

- Name (Názov):** Toto je názov kanálu.
- Source (Zdroj):** Určuje vlnovú dĺžku budenia LED zdroja.
- Detector (Detektor):** Určuje vlnovú dĺžku detekcie a typ filtra (nm = pásmo priepustnosti, hp = vysoká priepustnosť).
- Gain (Výťažok):** Určuje výťažok konkrétneho kanála.
- Create New... (Vytvoriť nový...):** Táto funkcia umožňuje vytvorenie nových kanálov. Po kliknutí na možnosť **Create New...** (Vytvoriť nový...) sa otvorí okno, do ktorého je potrebné zadať nový názov, zdroj a detekčný filter. Filtry sa môžu vybrať z rozbaľovacej ponuky vedľa každého okna.
- Channels (Kanály):** Do štandardnej konfigurácie pre 4-kanálovú multiplexovú detekciu patrí zelený, žltý, oranžový a červený kanál.


## Rozmiestnenie skúmavky

Pri použití rotora 72-Well Rotor je možné vzorky usporiadať tak, aby sa veľmi podobali označeniu na bloku 9 x 8. Štandardne umožňuje táto karta s rozmiestnením skúmaviek sekvenčné označenie vzoriek (t. j. 1, 2, 3...). To znamená, že vzorky sa označia za sebou v poradí, v ktorom sa umiestnia do prístroja Rotor-Gene Q MDx. Prípadne sa môžu vzorky označiť 1A, 1B, 1C atď. Táto možnosť môže byť užitočná vtedy, ak sa vzorky pripravujú pomocou viackanálovej pipety.

## Zabezpečenie


Karta zabezpečenia zobrazuje informácie o podpise cyklu. Podpis cyklu je nezrušiteľný kľúč, ktorý sa obnovuje vždy pri zmene súboru. Ak sa nejaká časť súboru \*.rex zmení mimo softvéru, podpis a súbor sa viac nebudú zhodovať. Kontrola podpisu umožňuje potvrdiť, či sa nespracované údaje nezmenili mimo aplikácie, či sa s profilom nemanipulovalo, a či je teplotný graf platný. Podpis takisto chráni proti narušeniu, ako napríklad chyby systému súborov.

**Poznámka:** Ak sa súbory \*.rex posielajú e-mailom, môže dôjsť pri procese šifrovania k zneplatneniu podpisu. Aby ste tomu predišli, skomprimujte súbor pred jeho odoslaním e-mailom do balíka zip.

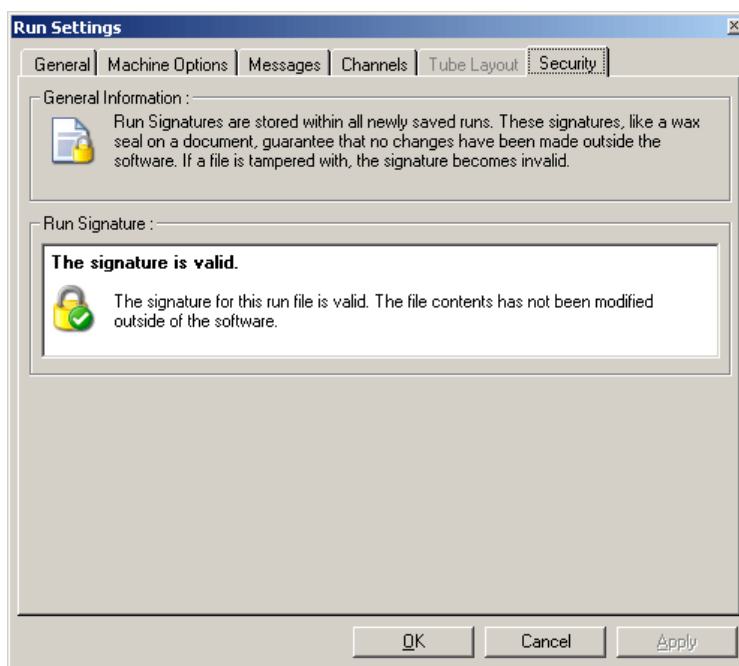


### 6.8.2 Teplotný graf

Z ponuky **View** (Prehliadať) vyberte možnosť **Temperature Graph** (Teplotný graf) alebo kliknite na tlačidlo **Temp.** (Teplota), aby sa otvorilo okno **Temperature** (Teplota). Na grafe sa zobrazuje priebeh nastavených teplôt počas cyklovania. Neodráža meranie teploty v reálnom čase. Počas progresu cyklu sa pre každý krok programu zobrazí možnosť **Set** (Nastaviť), **Actual** (Skutočný) a **Hold** (Retencia). Pre existujúci súbor cyklu sa zobrazí okno **Temperature** (Teplota), v ktorom sa zobrazí história teploty počas cyklu. Vertikálna stupnica predstavuje teplotu a horizontálna stupnica predstavuje čas. Na rolovanie dozadu a dopredu v okne **Temperature** (Teplota) použite posuvnú lištu.

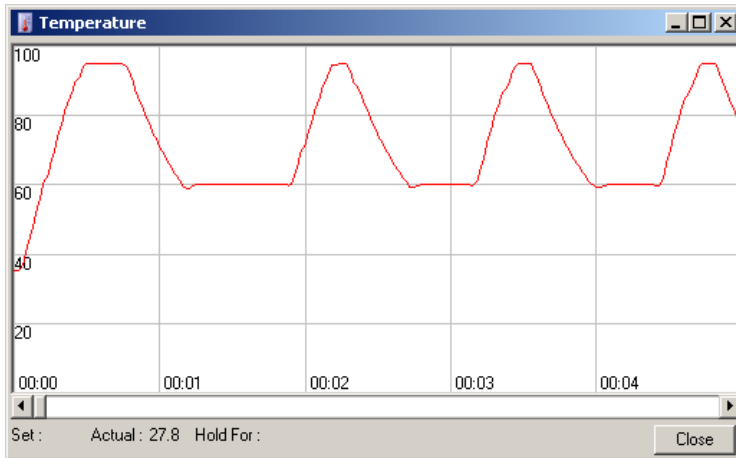

### 6.8.3 Progres profilu


Z ponuky **View** (Prehliadať) vyberte možnosť **Profile Progress** (Progres profilu) alebo kliknite na tlačidlo **Progress** (Progres), aby sa otvorilo okno **Profile Progress** (Progres profilu). Toto okno obsahuje grafické zobrazenie tepelného profilu súvisiaceho s cyklom. Počas priebehu cyklu udáva tieňovaná časť okna počet cyklov, ktoré sa dokončili. Takisto je k dispozícii odhad, koľko minút zostáva do konca cyklu.

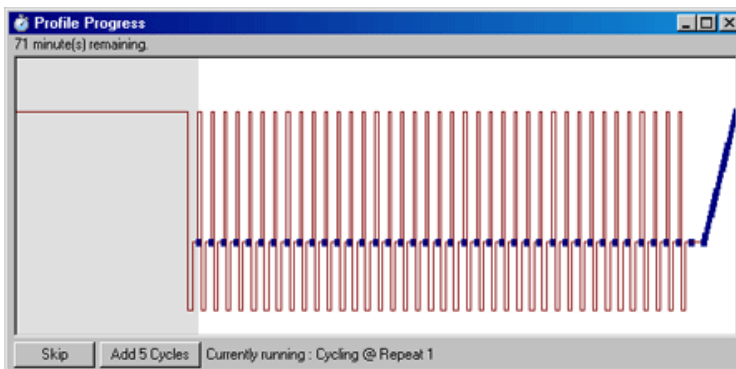

- Skip** (Preskočiť): Možnosť **Skip** (Preskočiť) umožňuje preskočiť niektoré kroky profilu.
- Add 5 Cycles** (Pridať 5 cyklov): Možnosť **Add 5 Cycles** (Pridať 5 cyklov) pridá 5 opakovaní aktuálneho kroku cyklu.



## 6.8.4 Úprava vzoriek

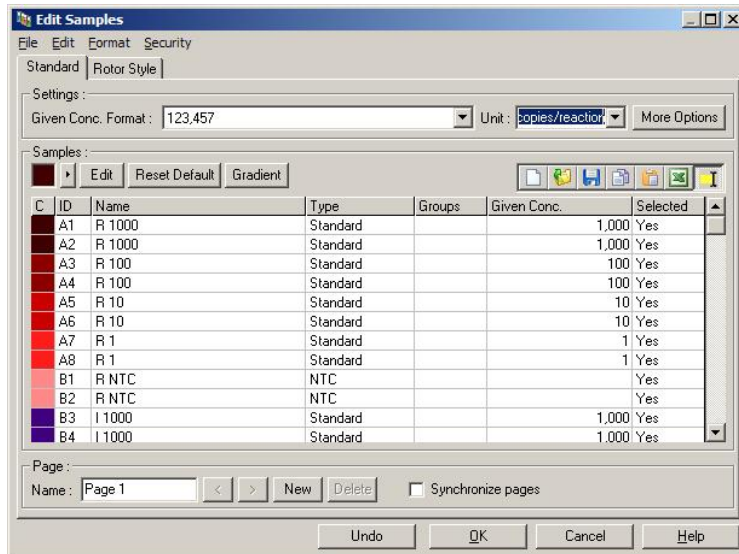

Kliknite na tlačidlo **Samples** (Vzorky) a zobrazí sa okno **Edit Samples** (Upraviť vzorky). Do okna **Edit Samples** (Upraviť vzorky) sa dostanete aj kliknutím pravým tlačidlom myši na zoznam vzoriek v pravej časti obrazovky. Toto okno má rovnakú funkciu ak okno **Edit Samples** (Upraviť vzorky) v sprievodcoch s výnimkou toho, že funkcie v nástrojovej lište sú dostupné aj v ponuke File (Súbor) a Edit (Upraviť).

Na vrchu okna sú zobrazené štyri ponuky, **File** (Súbor), **Edit** (Upraviť), **Format** (Formát) a **Security** (Zabezpečenie). Ponuka File (Súbor) sa používa na vytvorenie nového (prázdneho) okna **Edit Samples** (Upraviť vzorky), na otvorenie existujúcej templáty vzorky alebo na uloženie názvov vzoriek ako templáty na budúce použitie. Prípona týchto súborov templátov je \*.smp. Ponuka **Edit** (Upraviť) umožňuje skopírovať a prilepiť riadky. Ponuka Security (Zabezpečenie) umožňuje zamknutie definícií vzoriek.


**Poznámka:** Ak sa názvy vzoriek vložia počas cyklu veľmi rýchlo (napr. pomocou skenera čiarových kódov), môže dôjsť k premiestneniu písmen v rámci názvov vzoriek. Preto sa odporúča nepoužívať skener čiarových kódov a, ak je to možné, vkladať názvy vzoriek po dokončení cyklu.



Táto rozbaľovacia ponuka sa používa na výber vhodného formátu na zobrazenie koncentrácie. Koncentrácie sa automaticky formátujú podľa aktuálne zvolenej polohy.




Táto rozbaľovacia ponuka umožňuje nastavenie merných jednotiek pre test.

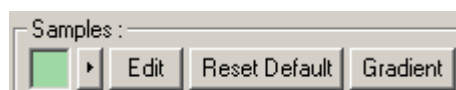

**Tlačidlo****Dôležitosť**

Line style (Štýl riadku):

Štýl riadku je možné zmeniť tak, aby sa zlepšila čitateľnosť grafov na čiernobielych tlačiarňach. Niektoré riadky sa dajú zvýrazniť zmenou ich štýlu. Na prístup k tejto funkcii kliknite na pravú šípku vedľa tlačidla **Edit** (Upraviť).

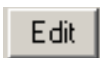

Po stlačení tlačidla **Edit** (Upraviť) sa otvorí volič farieb. Pri priradovaní farieb k skúmavkám je možné zvoliť viacero riadkov.



Kliknite na možnosť **Reset Default** (Resetovať pôvodné nastavenie) a resetujete všetky vybrané bunky farieb späť na ich pôvodné hodnoty farieb.



Možnosť **Gradient** (Sklon) umožňuje výber sklonu z prvej po poslednú vybranú farbu. Počas prípravy vzorky je možné definovať niekoľko sklonov.



Pomocou ikony **New** (Nový) sa vymaže okno **Edit Samples** (Upraviť vzorky) pri príprave na zadávanie údajov.



Po kliknutí na ikonu **Open** (Otvoriť) sa otvorí dialógové pole, v ktorom je možné vybrať súbor prístroja Rotor-Gene Q MDx na importovanie.

**Poznámka:** Počet vzoriek v otvorenom okne a importovaný súbor sa musia zhodovať.



Pomocou ikony **Save** (Uložiť) sa otvorí dialógové pole, do ktorého je možné zadať názov a priečinok, do ktorého sa uloží kópia aktuálnych definícií vzoriek.



Pomocou ikony **Copy** (Kopírovať) sa skopírujú vybrané bunky.



Ikonou **Paste** (Prilepiť) sa do aktuálne vybranej pozície na mriežke prilepia bunky, ktoré sa zvolili pomocou príkazu na kopírovanie.



Po kliknutí na ikonu **Excel** (Excel) sa otvorí dialógové pole, ktoré vás požiada o zadanie názvu súboru a priečinka, do ktorého sa uložia informácie o vzorke. Po stlačení možnosti **Save** (Uložiť) sa automaticky otvorí súbor Excel.



Ikonou **Append/Overwrite** (Pripojiť/prepísať) sa zmení editovanie buniek v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky). Ak sa vyberie možnosť prepísania, prepíšu sa pri editovaní už existujúce údaje. Ak sa vyberie možnosť pripojenia, pridajú sa počas editovania na koniec existujúcich údajov nové údaje.

Sample Types (Typy vzoriek):


Vzorky je možné definovať ako jeden z niekoľkých typov, ktoré sú uvedené v tejto tabuľke.

Typ vzorky	Popis
None (Žiadny)	Žiadna vzorka na tejto pozícii
NTC	Beztemplátový kontrolný roztok
Negative Control (Negatívny kontrolný roztok)	Negatívny kontrolný roztok
Positive Control (Pozitívny kontrolný roztok)	Pozitívny kontrolný roztok
Unknown (Neznámy)	Neznámy vzorka na analýzu
Standard (Štandard)	Štandardné hodnoty sa používajú na vytvorenie kalibračnej krivky na výpočet neznámych koncentrácií vzorky
Calibrator (Kalibračný roztok) (RQ)	Kalibračnému roztoku sa priradí sa hodnota 1 a všetky ostatné koncentrácie vzoriek sa vypočítajú relatívne k tejto vzorke


Page (Strana):

Táto funkcia umožňuje používateľovi mať rôzne definície vzoriek a tiež oddeliť experimenty v tom istom cykle. To je užitočné pri analýze rôznych produktov v rôznych kanáloch. Medzi rôznymi stranami sa môžete presúvať pomocou šípok. Tlačidlá **New** (Nový) a **Delete** (Vymazať) použijete na vytvorenie a mazanie strán. Pre rovnaký kanál je možné mať niekoľko definícií vzoriek, aby bolo možné spustiť niekoľko kalibračných kriviek bez multiplexovania. Na samostatných stranách jednoducho definujte sledované vzorky a ich súvisiace kalibračné krivky. Jeden kanál sa potom môže nezávisle analyzovať s každou sadou definícií. Strany vzoriek sa môžu označiť ako **Page 1** (Strana 1), **Page 2** (Strana 2) atď. alebo je možné im priradiť názvy (napr. „Housekeeper“ (Housekeeper)). Tento názov sa zobrazí v správach.

Pri prezeraní nespracovaných údajov je možné v rozbaľovacej ponuke vedľa tlačidla **Options** (Voľby) vybrať definície vzorky použité na zobrazenie údajov:

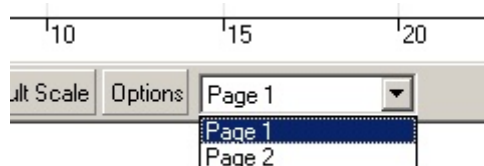

Stranu vzorky, ktoré sa počas analýzy má použiť, je možné vybrať v okne **Analysis** (Analýza) (pozri časť 6.6.1).

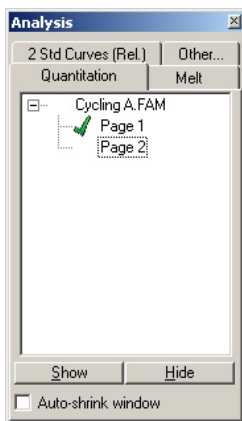

Given Conc. (Daná konc.):


Zobrazuje koncentrácie každého štandardu. Jednotky je možné definovať ako desatinné alebo logaritmické čísla. Ak sú štandardy série riedení, je potrebné napísať len prvé 2 štandardy. Stlačením tlačidla ENTER program automaticky pridá do série ďalšie logické riedenie.

Line style (Štýl riadku):

Štýl riadku je možné zmeniť tak, aby sa zlepšila čitateľnosť grafov na čiernobielych tlačiarnach. Niektoré riadky sa dajú zvýrazniť zmenou ich štýlu. Na prístup k tejto funkcii kliknite na pravú šípku vedľa tlačidla **Edit** (Upraviť).



Nástrojová lišta zobrazí prednastavený štýl **Solid** (Nepretrúšený). Ten sa dá zmeniť na **Dashed** (Prerušovaný), **Dotted** (Čiarkovaný), **Hairline** (Deliaca čiara), **Thin** (Tenký) alebo **Thick** (Hrubý). Po skončení kliknite na ľavú šípku a vráťte sa do náhľadu Edit (Upraviť), Reset Default (Resetovať pôvodné nastavenie) a Gradient (Sklon).

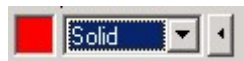

Multiple row entry (Zadanie do viacerých riadkov):

Ak je potrebné tú istú informáciu vložiť do niekoľkých riadkov naraz, označte všetky tieto riadky a začnite písať. Informácia sa vloží do každého riadku. Toto funguje aj pri výbere rovnakých typov, výbere farieb alebo zadávaní koncentrácií.

Sample type hotkey (Klávesová kombinácia typu vzorky):


Na rýchly výber typu vzorky zadajte prvé písmeno jej názvu. Napríklad na nastavenie 5 vzoriek ako beztemplátové kontroly ich vyberte v stĺpci s typom vzoriek a potom stlačte N ako NTC. Všetky vzorky sa skonvertujú do NTC.

Save it, reuse it (Uložiť, použiť opakovane):

Úplný popis vzorky sa môže uložiť ako súbor vzorky (\*.smp) a načítať do budúcich cyklov s rovnakou konfiguráciou vzorky.

## Štýl rotora

Táto karta v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky) poskytuje alternatívny spôsob zadávania názvov vzoriek. Vyberte kópie kliknutím a potiahnutím ukazovateľa myši na obrázok rotora. Zoznam v pravej časti okna sa aktualizuje. Je možné napísať názov vzorky a tým sa nastaví rovnaký názov pre aktuálny výber. Softvér rozpozná tieto jamky ako kópie.

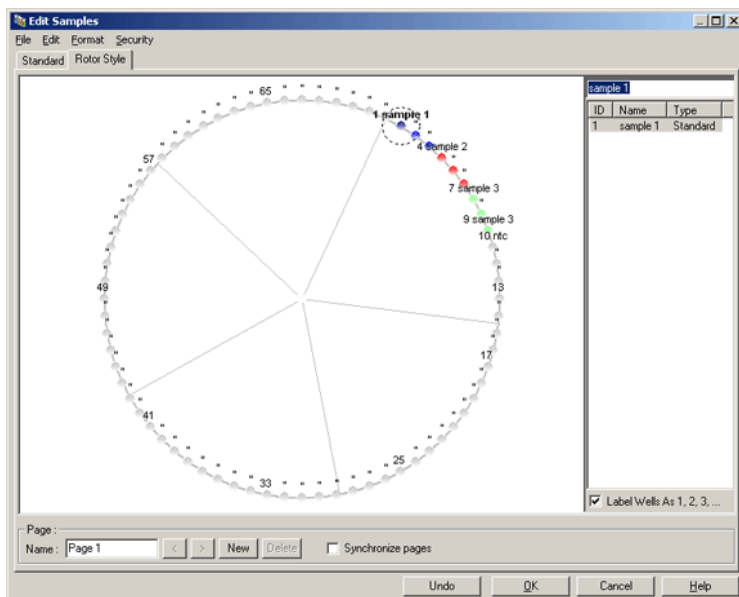


Karta **Rotor Style** (Štýl rotora) umožňuje obmedzenú verziu karty **Standard** (Štandard) a je vyhradená pre používateľov, ktorí chcú rýchlo vytvoriť názvy vzoriek a farieb. V tejto karte nie je možné definovať niektoré nastavenia, ako napríklad to, či vzorka predstavuje štandard alebo známu koncentráciu každého štandardu. Ak sa tieto musia definovať, mala by sa použiť karta štandardu.

## Vhodnosť strany vzorky

Do okna **Sample Page Suitability** (Vhodnosti strany vzorky) sa dostanete kliknutím na možnosť **More Options** (Viac možností) v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky) a potom kliknutím na **Define Suitabilities** (Definovať vhodnosti). Okno **Sample Page Suitability** (Vhodnosti strany vzorky) umožňuje používateľom priradiť strany vzoriek ku kanálom. Strana vzorky pre sledovaný gén sa môžu napríklad aplikovať do zeleného kanálu a strana vzorky pre „housekeeping“ gén sa môže aplikovať do žltého kanálu. V tomto príklade znižuje nastavenie vhodnosti strany vzorky počet dostupných možností analýzy, aby zahŕňali len tie, ktoré sú relevantné pre konkrétny test.

Okno **Sample Page Suitability** (Vhodnosti strany vzorky) je zobrazené nižšie.

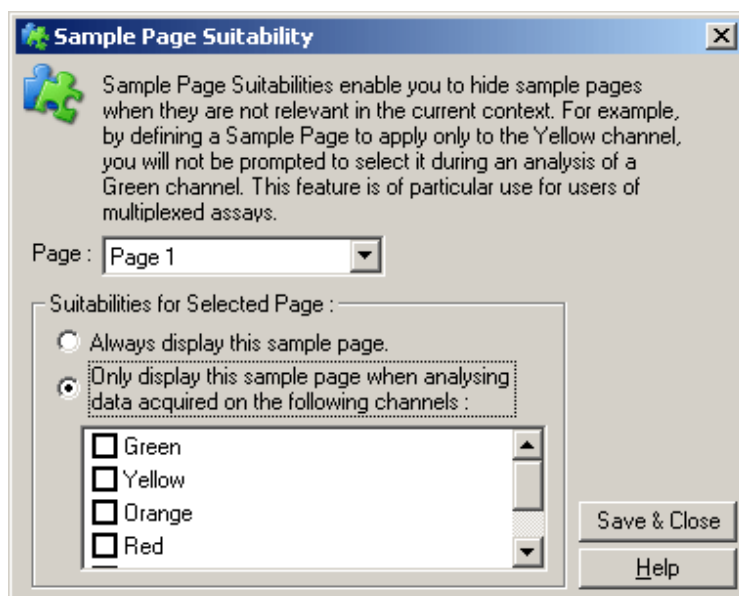


**Poznámka:** Pri príprave testu vytvorte všetky strany vzorky a vhodnosti strany vzorky a potom ich uložte ako templát. Tým sa zníži množstvo prípravy potrebnej pre každý cyklus.


## Skupiny

Skupiny vzoriek umožňujú výpočet štatistiky pre náhodnú skupinu vzoriek. Na rozdiel od kópií, ktoré musia mať identické názvy, môžu mať vzorky akékoľvek názvy, môžu sa uložiť kdekoľvek v rotore a môžu patriť do viacerých skupín.

1. Na definovanie skupiny napíšete celý názov skupiny vedľa vzorky a stlačíte ENTER.

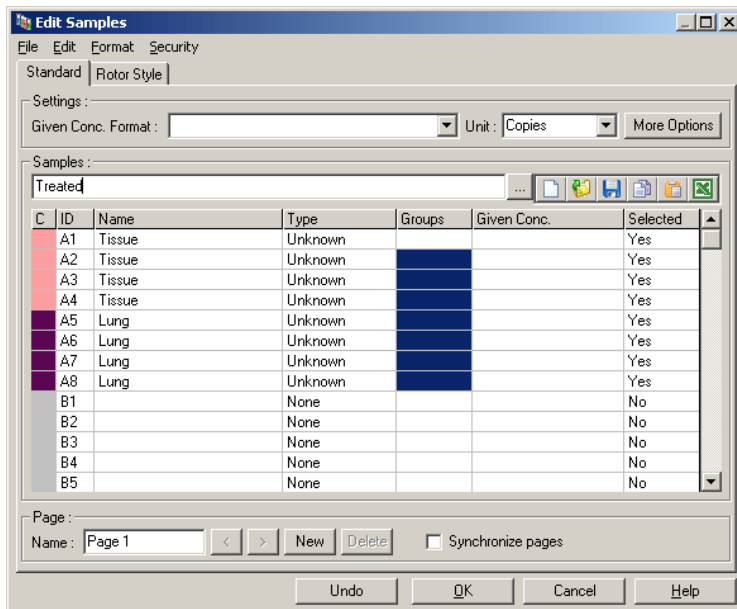

2. Zobrazí sa okno **Edit Group** (Upraviť skupinu).

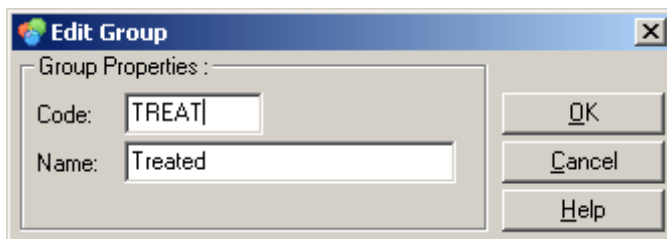


3. Definujte vhodnú skratku a potom kliknite na **OK**. Skratka sa teraz môže použiť na nastavenie skupín. Súhrnné výsledky, ako napríklad priemerná hodnota a 95 % interval spoľahlivosti sa pre skupiny vypočítajú automaticky v ktorejkoľvek analýze.

No.	Name	Type	Ct	Given Conc (Cop)	Calc Conc (Copie)	% Var	Rep. Ct	Rep. Ct Stc	Rep. Ct (95% CI)	Rep.
A1	Tissue	Unknown	18.82				18.75	0.17	[18.48, 19.02]	
A2	Tissue	Unknown	18.75							
A3	Tissue	Unknown	18.92							
A4	Tissue	Unknown	18.52							
A5	Lung	Unknown	18.73				18.70	0.09	[18.55, 18.85]	
A6	Lung	Unknown	18.62							
A7	Lung	Unknown	18.81							
A8	Lung	Unknown	18.63							
A1-A8	Treated	Group					18.72	0.13	[18.62, 18.83]	

## 6.8.5 Možnosti zobrazenia

Ponuka Display Options (Možnosti Zobrazenia) je zobrazená nižšie.

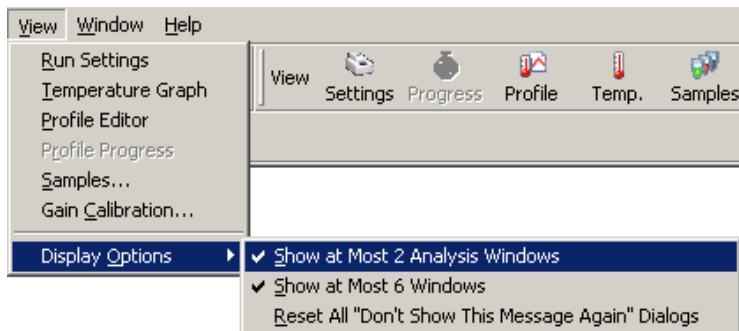

**Show at Most 2 Analysis Windows** (Zobraziť maximálne 2 okná analýzy):

Ak je zaškrtnutá táto možnosť, zobrazia sa naraz maximálne 2 okná analýzy. Ak sa otvorí viac okien, môžu byť ich čitateľnosť znížená. Pri zaškrtnutí tejto možnosti sa zatvorí prvé okno analýza a nahradí sa posledným otvoreným oknom. Ak nie je táto možnosť zaškrtnutá, je možné zobrazit' viac ako 2 okná analýzy.

**Show at Most 6 Analysis Windows** (Zobraziť maximálne 6 okien analýzy):

Na zvýšenie čitateľnosti odstráni softvér nepoužívané okná, keď sa otvoria nové okná. Táto možnosť je aktivovaná štandardne, pretože udržiava obrázok softvéru Rotor Gene Q čistú. Ak je potrebné zobrazit' viac ako 6 okien naraz, odznačte túto možnosť.

**Reset All "Don't Show This Message Again" Dialogs** (Resetovať všetky dialógové okná „Nezobrazovať toto hlásenie znova“):

Ak je táto možnosť označená, zobrazí softvér znova všetky dialógové okná, v ktorých bola zaškrtnutá možnosť **Do not display this message again** (Nezobrazovať toto hlásenie znova). V tom sú zahrnuté hlásenia o podozrivých nastaveniach, ktoré sa mohli predtým nastaviť tak, aby sa nezobrazovali. Táto možnosť je užitočná pre nového používateľa, ktorý nie je oboznámený s prístrojom Rotor-Gene Q MDx alebo softvérom Rotor-Gene Q.

## 6.9 Ochrana prístupu do softvéru Rotor-Gene Q

**Poznámka:** Táto kapitola popisuje ochranu prístupu do softvéru Rotor-Gene Q. Pozri dokumenty *používateľská príručka hlavného použitia aplikácie Rotor-Gene AssayManager v1.0* alebo *používateľská príručka hlavného použitia aplikácie Rotor-Gene AssayManager v2.1 Core Application*, v ktorých nájdete informácie o relevantnom softvéri Rotor-Gene AssayManager.

Softvér Rotor-Gene Q zahŕňa funkcie, ktoré umožňujú jeho bezpečnú obsluhu. Pri správnej konfigurácii dokáže softvér Rotor-Gene Q zaistiť nasledovné:

- Prístup k prístroju Rotor-Gene Q MDx alebo analyzačnému softvéru je obmedzený na skupiny používateľov
- Úpravy v súboroch cyklus sa zaznačia do denníka
- Neoprávnené úpravy je možné zistiť (podpisy)
- Templáty použité na uskutočnenie cyklu sa zapisujú do denníka
- Názvy vzoriek sú chránené

## Integrácia pomocou zabezpečenia systému Windows

Aby bolo možné zabezpečiť silnú úroveň zodpovednosti, nespravuje softvér Rotor-Gene Q zabezpečenie interne. Účty, skupiny a heslá sa spravujú pomocou vstavaného modelu zabezpečenia systému Windows (Windows Security). Integrácia umožňuje rovnaké heslo, ktoré zabezpečí prístup k sieťovým súborom a programom na ovládanie prístupu k softvéru Rotor-Gene Q, čo vedie k menšej administratíve. Vo väčších spoločnostiach môžu napríklad administrátori siete jednoducho odstrániť prístup k bývalým používateľom z dôvodu centralizovaného modelu zabezpečenia.

Z tohto dôvodu zahŕňa bezpečné nastavenie softvéru Rotor-Gene Q primárne konfiguráciu rolí zabezpečenia systému Windows podľa najlepších postupov.

### Predpoklady

Na používanie zabezpečenia musí byť na počítači nainštalovaný operačný systém Windows 10 alebo Windows 7 Professional edition. Funkcie zabezpečenia sa nedajú používať s operačným systémom Windows 10 alebo Windows 7 Home edition, pretože verzie Home edition nemajú podrobný model prístupu používaný softvérom. Softvér musí byť nainštalovaný pomocou možnosti **Force authentication through Windows domain** (Nútená autentifikácia cez doménu Windows).

**Poznámka:** Ponuka zabezpečenia sa nezobrazí, ak ste prihlásení do domény Linux Samba. Aby ste mohli využívať funkcie zabezpečenia, musíte sa buď prihlásiť lokálne alebo do serveru Windows.

#### 6.9.1 Konfigurácia pre operačný systém Windows 7

Táto časť popisuje spôsob nastavenia systému na bezpečné spustenie softvéru Rotor-Gene Q.

Aby ste mohli používať funkcie zabezpečenia, musí byť softvér nainštalovaný pomocou možnosti **Force authentication through Windows domain** (Nútená autentifikácia cez doménu Windows). Táto možnosť overí doménu Windows pre vašu úroveň prístupu a prihlasovacie údaje a je nevyhnutá pre poskytovanie funkcií zodpovednosti a zabezpečenia.




## Spustenie ako administrátor

Mnoho používateľov spúšťa svoje počítače ako administrátor bez hesla. Aj keď je to veľmi pohodlné, nie je pri takomto spôsobe spúšťania možné určiť, kto počítač používa. Tým sa eliminuje zodpovednosť a zabráni sa aktivovaniu bezpečnostných opatrení softvéru Rotor-Gene Q. Pri spustení ako administrátor sú aktivované všetky funkcie softvéru. Preto takéto spustenie zaistí, aby používatelia, ktorí nepotrebujú funkcie zabezpečenia mali prístup ku všetkým funkciám softvéru.

## Vytvorenie nového používateľského účtu

Pre každého používateľa softvéru vytvorte používateľský účet. Pri každom používateľovi opakujte kroky uvedené nižšie dovtedy, kým sa nevytvoria všetky účty.

1. Na vytvorenie nového používateľa vyberte možnosť **Start/Control Panel/Administrative Tools/Computer Management (Štart/Ovládací panel/Nástroje pre správu/Správa počítača)** a prejdite do možnosti **Local Users and Groups (Miestni používatelia a skupiny)** na ľavej strane.
2. V zobrazenom okne vyberte priečinok **Users (Používatelia)**. Pravým tlačidlom myši kliknite na okno napravo a vyberte **New User (Nový používateľ)**.

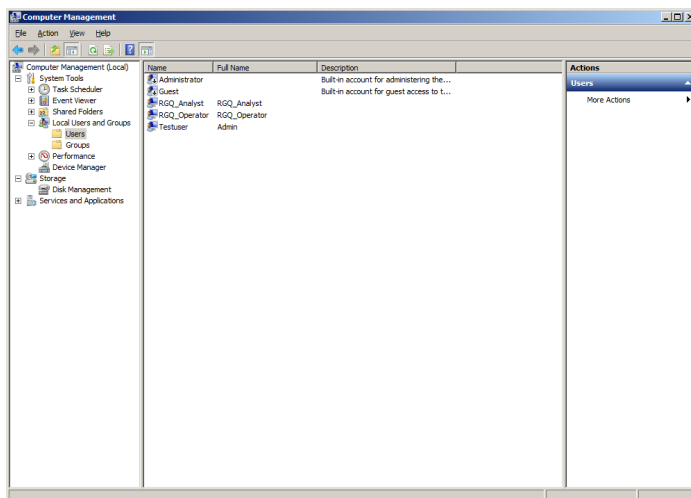

3. Zadajte používateľské meno a heslo. Štandardne sa používateľ vytvorí s bežnými prístupovými právami. To znamená, že softvér je možné spustiť, ale nie je možné inštalovať nové programy alebo meniť systémové nastavenia.

4. Kliknite na **Create** (Vytvoriť). Teraz sa môžete prihlásiť ako tento používateľ.


### Priradenie rolí každému používateľovi

Teraz by ste mali každému používateľovi priradiť roly. Prístup je rozdelený na tieto oblasti:

- Rotor-Gene Q Operator (Operátor softvéru Rotor-Gene Q) – môže uskutočňovať cykly, ale nemôže generovať správy alebo vykonávať analýzu
- Rotor-Gene Q Analyst (Analytik softvéru Rotor-Gene Q) – môže vykonávať analýzu a generovať správy, ale nemôže vykonávať nové cykly
- Rotor-Gene Q Operator and Analyst (Operátor a analytik softvéru Rotor-Gene Q) – má práva obidvoch rolí
- Administrator (Správca) – môže odomknúť názvy vzoriek a vykonávať všetky operácie priradené role analytik a operátor
- None (Žiadne) – prístup k softvéru je odmietnutý


Na priradenie rolí:

1. Prihláste sa do systému Windows ako administrátor alebo použite na spustenie a prihlásenie sa do softvéru ikonu **Rotor-Gene Q Software Login** (Prihlásenie sa do softvéru Rotor-Gene Q).

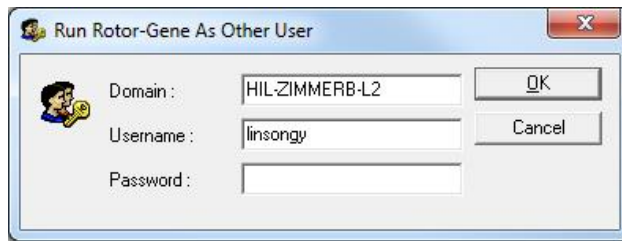


**Poznámka:** Na vytvorenie skupín RG so softvérom Rotor-Gene Q je potrebné spustiť softvér s administrátorskými právami. To je možné kliknutím pravým tlačidlo myši na ikonu na pracovnej ploche a zvolením možnosti **Run as administrator** (Spustiť ako správca) v kontextovej ponuke.

- Po otvorení softvéru kliknite na ponuku **Security** (Zabezpečenie). Pri prvom použití ponuky **Security** (Zabezpečenie) nakonfiguruje softvér Rotor-Gene Q počet skupín systému, ktoré budú kontrolovať prístup do softvéru.

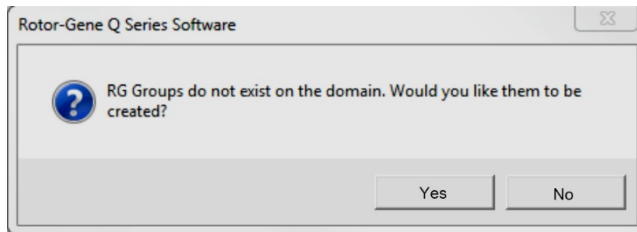


- Kliknite na **Yes** (Áno). Zobrazí sa okno **User Admin** (Správca používateľov). Na hornom paneli sa zobrazia všetci používatelia počítača. Niektoré účty používa systém, takže vám nebudú známe. Na dolnom paneli sa zobrazia skupiny priradené k používateľovi.

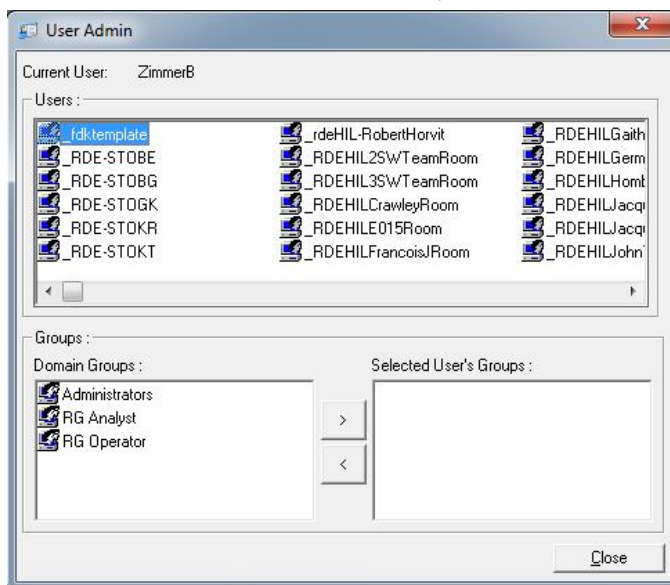


- Na priradenie skupiny k používateľovi vyberte používateľské meno zo zoznamu. Dolný panel sa aktualizuje. Ak používateľ nepatrí do žiadnych skupín, nemôže softvér spustiť.


5. V príklade nižšie priradíme používateľa **linsongy** do skupiny RG Analyst tak, že skupinu vyberieme na ľavej strane a potom klikneme na tlačidlo >. Na odstránenie skupín ich označte a potom kliknite na tlačidlo <.

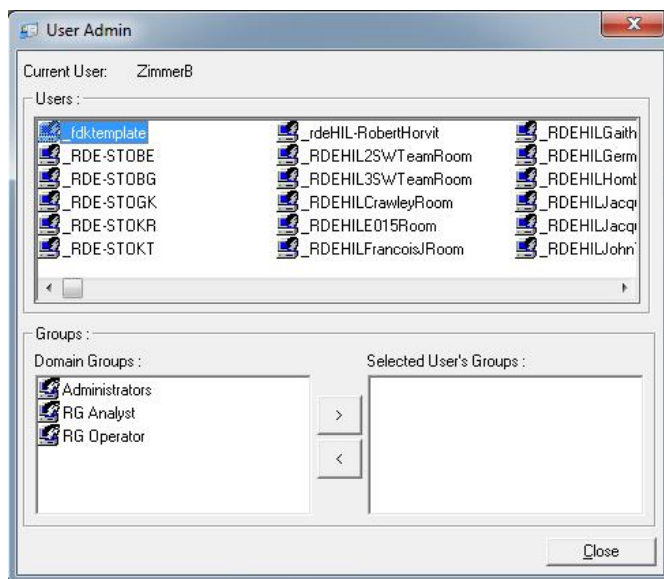


6. Teraz sa prihláste ako tento používateľ. V role analytik RG nie je dostupná ponuka **Run** (Cyklus) a tlačidlo **Profile** (Profil). Existujúce súbory ale môžete otvoriť a analyzovať podľa popisu na snímke obrazovky nižšie. Táto stavová lišta udáva, že používateľ **linsongy** má rolu analytik RG.

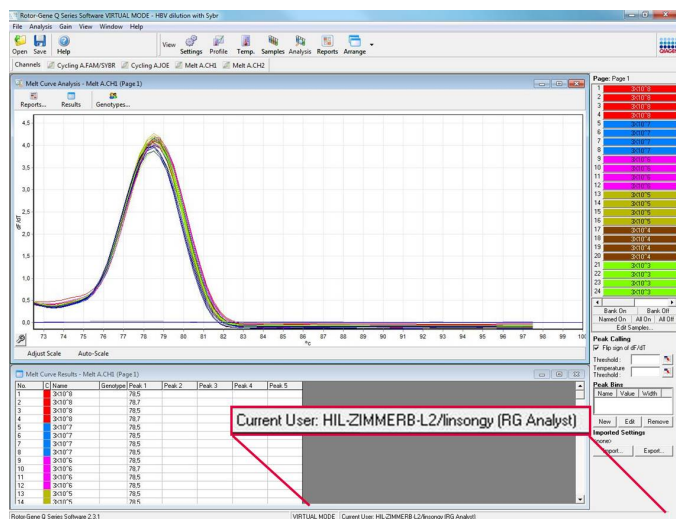

7. Po opätovnom prihlásení ako správca je možné práva role operátor RG priradiť používateľovi **linsongy** a práva roly analytik RG sa môžu znova odstrániť. Potom je potrebné softvér spustiť znova. Tentokrát chýba ponuka **Analysis** (Analýza) a tlačidlo **Reports** (Správy) a ponuka Run (Cyklus) je aktivovaná. Táto stavová lišta udáva, že používateľ **linsongy** patrí do skupiny operátor RG.

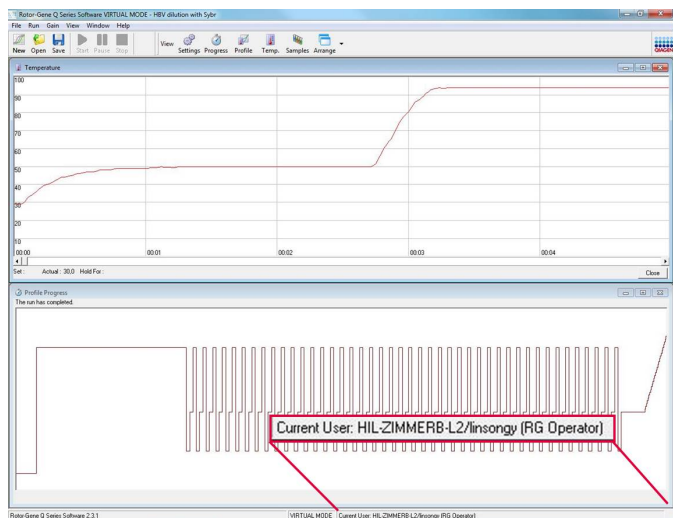

8. Ak sa prihlásite ako správca a odstránite z používateľa **linsongy** všetky skupiny, zobrazí toto hlásenie, keď používateľ **linsongy** spustí softvér.

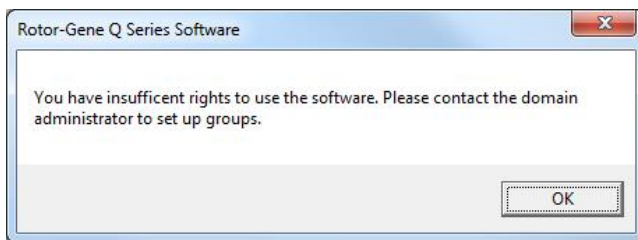

## 6.9.2 Konfigurácia pre operačný systém Windows 10

Táto časť popisuje spôsob nastavenia systému na bezpečné spustenie softvéru Rotor Gene Q.

Aby ste mohli používať funkcie zabezpečenia, musí byť softvér nainštalovaný pomocou možnosti **Force authentication through Windows domain** (Nútená autentifikácia cez doménu Windows). Táto možnosť overí doménu Windows pre vašu úroveň prístupu a prihlasovacie údaje a je nevyhnutá pre poskytovanie funkcií zodpovednosti a zabezpečenia.

### Spustenie ako administrátor


Mnoho používateľov spúšťa svoje počítače ako administrátor bez hesla. Aj keď je to veľmi pohodlné, nie je pri takomto spôsobe spúšťania možné určiť, kto počítač používa. Tým sa eliminuje zodpovednosť a zabráni sa aktivovaniu bezpečnostných opatrení softvéru Rotor-Gene Q.

Pri spustení ako administrátor sú aktivované všetky funkcie softvéru. Preto takéto spustenie zaisťuje, aby používatelia, ktorí nepotrebujú funkcie zabezpečenia mali prístup ku všetkým funkciám softvéru.


## Vytvorenie nového používateľského účtu

Pre každého používateľa softvéru vytvorte používateľský účet. Pri každom používateľovi opakujte kroky uvedené nižšie dovtedy, kým sa nevytvoria všetky účty.

1. Na vytvorenie nového používateľa vyberte možnosť **Start** (Štart), prejdite do možnosti **Computer Management** (Správa počítača), stlačte **Enter** a prejdite do možnosti **Local Users and Groups** (Miestni používatelia a skupiny) na ľavej strane.
2. V zobrazenom okne vyberte priečinok **Users** (Používatelia). Pravým tlačidlom myši kliknite na okno napravo a vyberte **New User** (Nový používateľ).

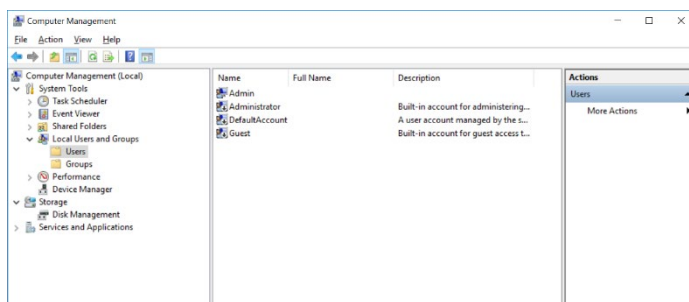

3. Zadáajte používateľské meno a heslo. Štandardne sa používatelia vytvoria s bežnými prístupovými právami. To znamená, že softvér je možné spustiť, ale nie je možné inštalovať nové programy alebo meniť systémové nastavenia.

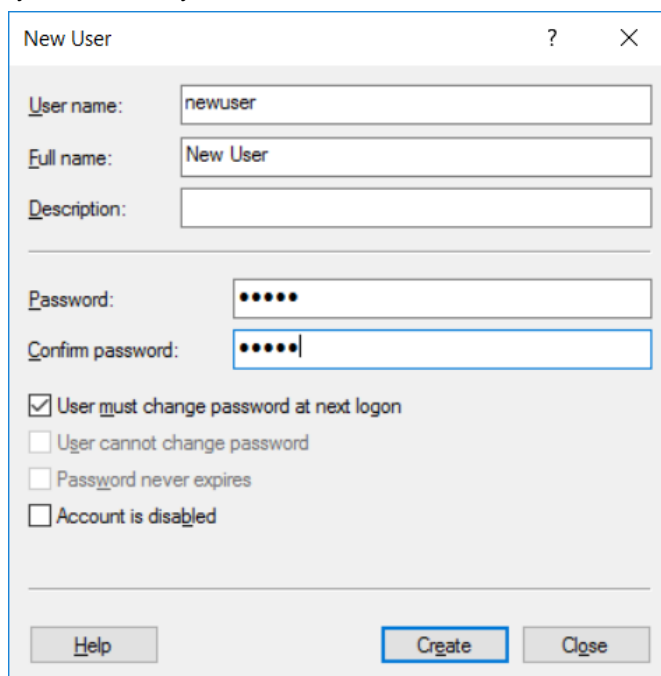

**New User**

User name: newuser

Full name: New User

Description:

Password: ●●●●●●

Confirm password: ●●●●●●

User must change password at next logon

User cannot change password

Password never expires

Account is disabled

Buttons: Help, Create, Close

4. Kliknite na **Create** (Vytvoriť). Teraz sa môžete prihlásiť ako tento používateľ.

## Priradenie rolí každému používateľovi

Teraz by ste mali každému používateľovi priradiť roly. Prístup je rozdelený na tieto oblasti:


- Rotor-Gene Q Operator (Operátor softvéru Rotor-Gene Q) – môže uskutočňovať cykly, ale nemôže generovať správy alebo vykonávať analýzu
- Rotor-Gene Q Analyst (Analytik softvéru Rotor-Gene Q) – môže vykonávať analýzu a generovať správy, ale nemôže vykonávať nové cykly
- Rotor-Gene Q Operator and Analyst (Operátor a analytik softvéru Rotor-Gene Q) – má práva obidvoch rolí
- Administrator (Správca) – môže odomknúť názvy vzoriek a vykonávať všetky operácie priradené role analytik a operátor
- None (Žiadne) – prístup k softvéru je odmietnutý

**Poznámka:** V systéme Microsoft Windows 10 nie je možné vytvoriť skupiny používateľov pomocou softvéru Rotor-Gene Q. Skupiny musí vytvoriť v doméne správca domény, ktorý môže takisto priradiť používateľov do konkrétnej skupiny. Ponuka Run (Cyklus) je aktivovaná. Táto stavová lišta udáva, že používateľ **linsongy** patrí do skupiny operátor RG.


### 6.9.3 Spustenie viacerých používateľov na rovnakom počítači

Na používanie softvéru Rotor-Gene Q viacerými používateľmi vytvorte používateľský účet, ktorý nemá prístup do softvéru Rotor-Gene Q. Prihláste sa do systému Windows pomocou tohto účtu tak, aby používatelia nemali anonymný prístup k prístroju Rotor-Gene Q MDx.

1. Pomocou ikony **Rotor-Gene Q Software Login** (Prihlásenie sa do softvéru Rotor-Gene Q) môžu používatelia otvoriť svoj používateľský účet v softvéri Rotor-Gene Q.

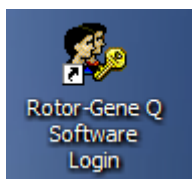

2. Zadať používateľské meno a heslo (povinné) do poľa, ktoré sa zobrazí.

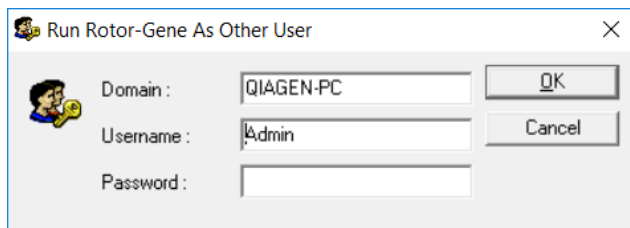


- Doména je buď počítač, do ktorého sa prihlasujete alebo názov vašej lokálnej siete spolu s názvom hostiteľa. Poradte sa so svojim správcom siete, ak si nie ste istí, ktorú doménu máte do poľa zadať.

**Poznámka:** Po prihlásení bude mať tento používateľ k dispozícii všetky používateľské súbory. Každý používateľ môže súbory uložiť vo svojej vlastnej oblasti. Tým sa zaisť vysoká úroveň bezpečnosti.

**Poznámka:** Každý používateľ by sa mal po dokončení cyklu odhlásiť, aby ostatní používatelia nemohli vykonávať cyklus v jeho mene.

### 6.9.4 Preverovacie zoznamy


Vždy keď používateľ uloží súbor sa jeho podrobnosti zaznamenajú v možnosti **Run settings** (Nastavenia cyklu) v karte **Messages** (Hlásenia) ako Security Audit Trail Summary (Súhrn bezpečnostného preverovacieho zoznamu) a Security Audit Trail Detail (Detail o bezpečnostnom preverovacom zozname).

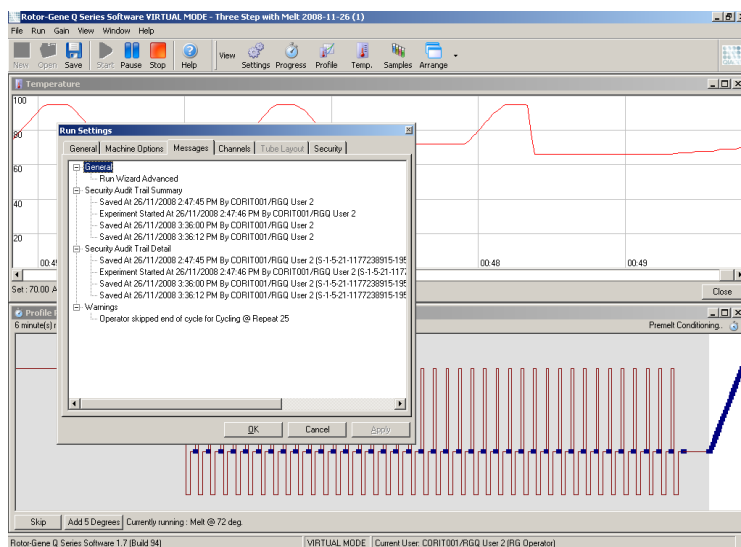

Ten sa môže použiť na sledovanie toho, kto zmenil obsah súboru. Security Audit Trail Detail (Detail o bezpečnostnom preverovacom zozname) obsahuje viac podrobností, ako napríklad jedinečný identifikátor používateľa. Tento identifikátor je dôležitý na to, aby používateľ nemohol vytvoriť účet s rovnakým názvom na inom počítači a tým vystupovať ako iný používateľ. V tomto prípade budú používateľské mená rovnaké, ale identifikačné čísla účtov budú iné.




V podrobnostiach je zobrazený identifikátor pre účet CORIT001/RGQ používateľa 2, S-1-5-21-1177238915-195.

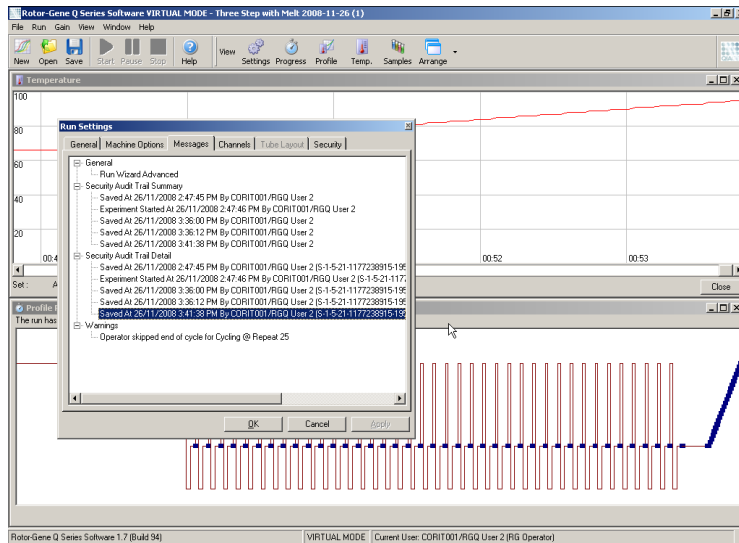



## 6.9.5 Podpisy cyklu

Preverovací zoznam sa uloží do súbor cyklu softvéru Rotor-Gene Q. Aby sa predišlo nechcenej zmene týchto súborov, mali by sa uložiť na bezpečné miesto prístupné len určeným účtom systému Windows. Ak sa ale súbory uložia v zdieľanom priestore, poskytujú Run Signatures (Podpisy Cyklu) dodatočnú bezpečnosť. Na snímke obrazovky je zobrazená karta **Security** (Zabezpečenie) v možnosti Run Settings (Nastavenia cyklu) pre súbor s Run Signature (Podpis Cyklu).

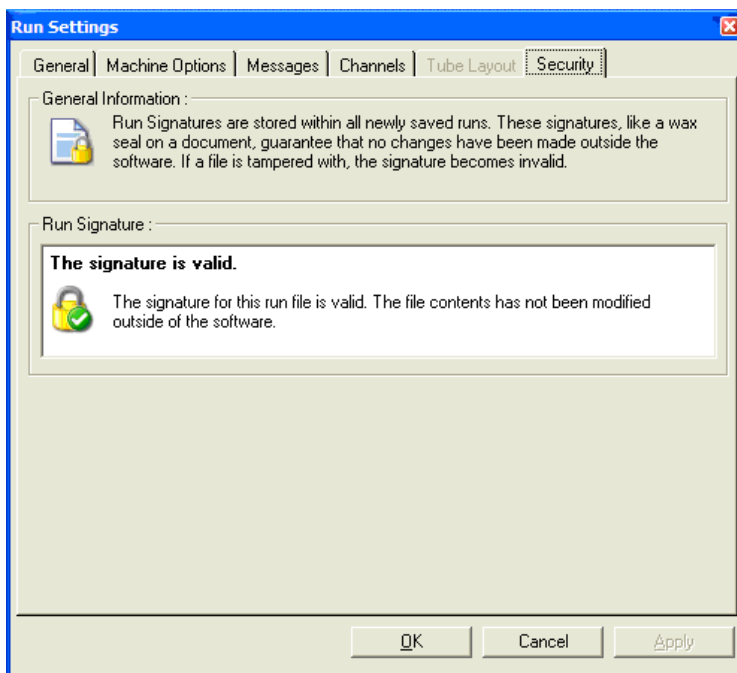

Run Signature (Podpis Cyklu) je dlhé slovo, ktoré sa vygeneruje vždy, keď sa súbor uloží a je spojené s obsahom tohto súboru. Napríklad podpis pre tento súbor je **517587770f3e2172ef9cc9bd0c36c081**. Ak sa súbor otvorí v programe Notepad a vykoná sa v ňom úprava (napr. dátum cyklu sa zmení na dátum spred 3 dní), zobrazí sa pri opätovnom otvorení súboru toto hlásenie.

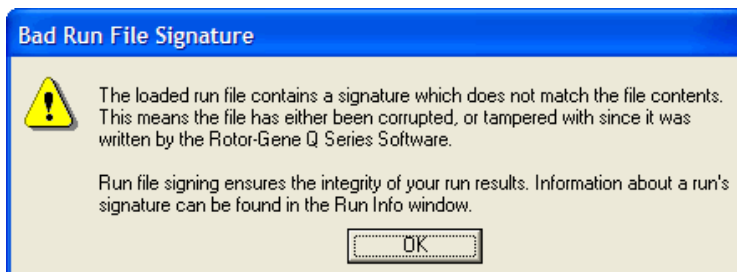

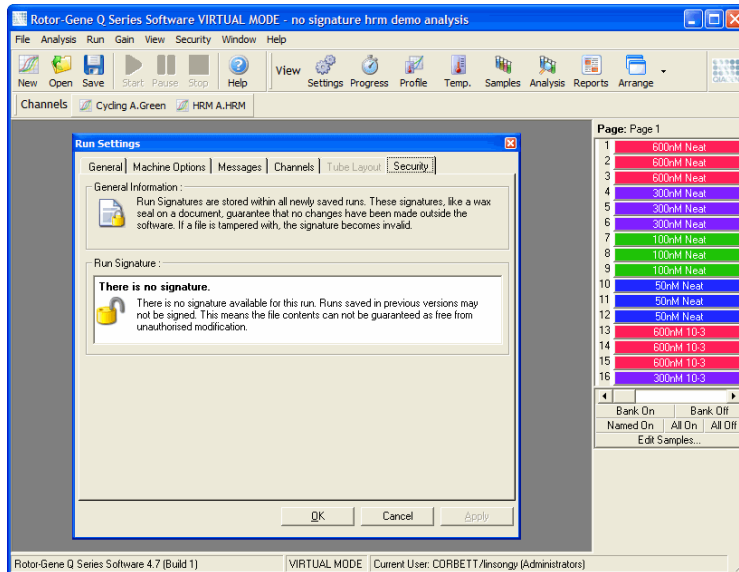


**Poznámka:** Ak sa súbory posielajú e-mailom, môže dôjsť pri procese šifrovania k zneplatneniu podpisu. Aby ste tomu predišli, skomprimujte súbor pred jeho odoslaním e-mailom do balíka zip.

### 6.9.6 Zamknutie vzorky


Je dôležité zabezpečiť, aby sa názvy vzoriek náhodne alebo úmyselne nezmenili, keď používateľ spustí cyklus. Z tohto dôvodu poskytuje softvér Rotor-Gene Q možnosť zamknutia vzorky. Názvy vzoriek môže zamknúť každý používateľ, ale odomknúť ich môže len správca. Pre používateľov, ktorí spúšťajú svoje počítače v režime administrátora má táto možnosť obmedzenú hodnotu. Na využitie tejto možnosti musí byť počítač nakonfigurovaný bezpečne podľa popisu v predchádzajúcich častiach.

**Poznámka:** Ak chcete vzorky zamknúť, nespúšťajte softvér ako správca. Vytvorte účet v skupinách pre roly operátor RG a analytik RG a heslo správcu neprezradte. Používatelia budú potom potrebovať oprávnenie od správcu na to, aby súbory odomkli.


Vzorky sa môžu zamknúť pred spustením cyklu pri použití sprievodcu Advanced (Pokročilý) kliknutím na možnosť **Finish and Lock Samples** (Dokončiť a zamknúť vzorky).

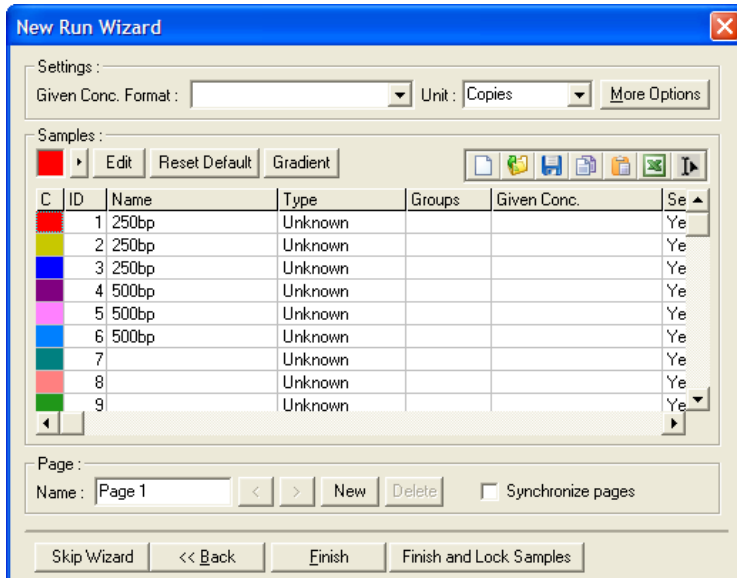


Zobrazí sa toto varovanie. Potvrďte ho kliknutím na tlačidlo **Yes** (Áno).

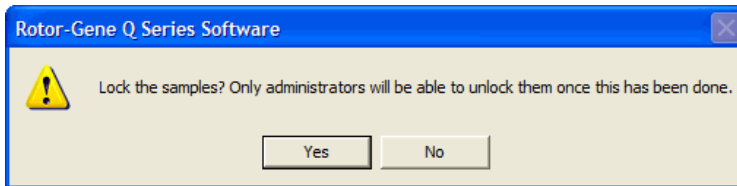

Po zamknutí vzoriek už nebude možné ich upravovať v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky).

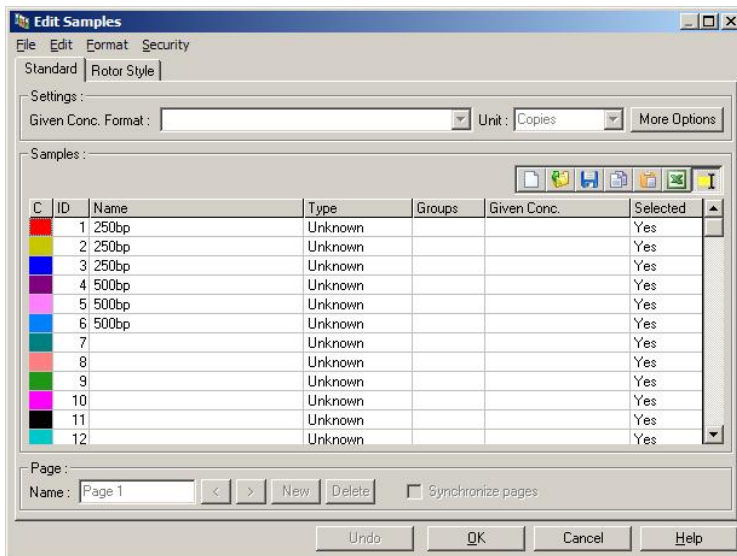


Vzorky sa môžu zamknúť a odomknúť v okne **Edit Samples** (Upraviť vzorky). Ale odomknúť ich môže len správca po tom, ako boli zamknuté.

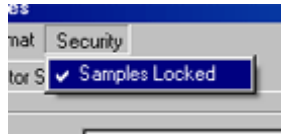

Akákkoľvek nedovolená zmena súboru spôsobí zneplatnenie Run Signature (Podpis Cyklu).

### 6.9.7 Zamknuté templáty


Momentálne používateľ nemôže vytvoriť pomocou softvéru Rotor-Gene Q súbory templátov len na čítanie. V prípade potreby je ale možné toto špecifikovať ako požiadavku, aby sa všetky cykly vykonávali pomocou konkrétneho súboru templátu. Aby sa zaistilo, že prístup k templátu bude možný len na jeho čítanie, mal by sa uložiť na sieťovom disku, na ktorom nemôžu používatelia údaje meniť. Používatelia môžu stále spustiť a meniť svoje vlastné profily, ale templát na sieťovom disku je chránený. Aby bolo možné sledovať, ktorý templát sa použil, uloží softvér Rotor-Gene Q názov súboru templátu, ktorý sa použil. Tieto informácie sú dostupné po kliknutí na tlačidlo **Settings** (Nastavenia), ktorým sa otvorí okno **Run Settings** (Nastavenia cyklu). Informácie o templáte sa uložia v časti **Other Run Information** (Ostatné informácie o cykle).

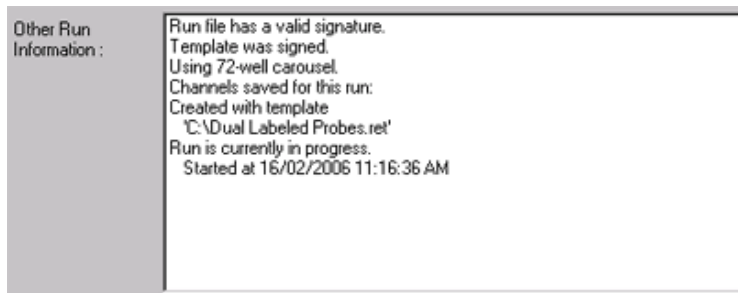

### 6.10 Ponuka výťažku

Kliknite na ponuku **Gain** (Výťažok), aby ste zobrazili **Gain Settings** (Nastavenia výťažku) pre aktuálny cyklus. Tým sa nastaví výťažok konkrétneho kanála pred cyklom. Nastavenia výťažku sa zachovávajú z posledného cyklu. Je možné ich zmeniť, ak sa cyklus ešte nespustil alebo počas prvotných cyklov. Na zmenu polí použijete šípky nahor/nadol vedľa každého textového poľa. Potom kliknite na **OK**.

Výťažok sa zmení počas prvotných cyklov. V príslušnom kanáli sa nakreslí červená čiara, ktoré označuje miesto zmeny výťažku. Cykly pred zmenou výťažku sa vylúčia z analýzy.

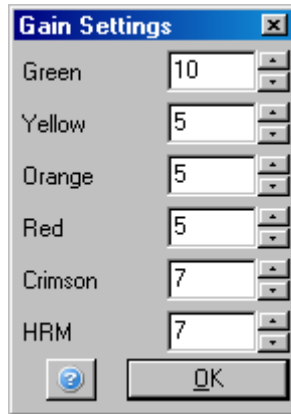


## 6.11 Ponuka okna

Táto ponuka umožňuje vertikálne alebo horizontálne uloženie okien alebo ich zoradenie okien v kaskáde. Ďalšie možnosti sú dostupné po kliknutí na šípku napravo od tlačidla **Arrange** (Usporiadať).

## 6.12 Funkcia pomoci

Pri použití tlačidla **Help** (Pomoc) alebo ponuky Help (Pomoc) sa otvorí rozbaľovacia ponuka.

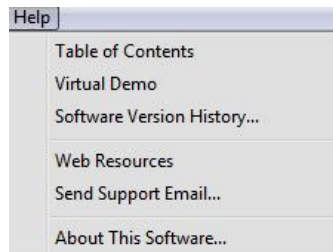

<b>Table of Contents</b> (Obsah):	Umožňuje prístup k funkcii Help (Pomoc).
<b>Virtual Demo</b> (Virtuálne demo):	Odkaz na webovú stránku spoločnosti QIAGEN s interaktívnym predstavením softvéru.
<b>Software Version History...</b> (História verzií softvéru...):	Umožňuje krátky prehľad nových funkcií pridaných od naposledy nainštalovanej verzie softvéru.
<b>Web Resources</b> (Webové zdroje):	V novom okne prehliadača sa otvorí webová stránka spoločnosti QIAGEN s hodnotnými najnovšími informáciami o prístrojoch Rotor Gene Q MDx a príslušných reagenciách.
<b>About This Software...</b> (O tomto softvéri...):	Informácie o pripojenom prístroji, sériovom čísle prístroja Rotor-Gene Q MDx a verzii softvéru.

## 6.12.1 Odoslanie e-mailu pre podporu

Možnosť **Send Support Email** (Odoslať e-mail pre podporu) v ponuke **Help** (Pomoc) vám umožňuje odoslať e-mailu pre podporu spoločnosti QIAGEN vrátane všetkých relevantných informácií z cyklu. Pomocou možnosti **Save As** (Uložiť ako) uložíte všetky informácie do súboru, ktorý môžete skopírovať na disk alebo poslať cez sieť, ak nemáte prístup k e-mailu na počítači, na ktorom beží prístroj Rotor-Gene Q MDx.

Pri prvom použití funkcie odoslania e-mailu pre podporu na prenosnom počítači, ktorý sa voliteľne dodáva s prístrojom Rotor-Gene Q MDx (závisí od krajiny), musíte nakonfigurovať nastavenia e-mailu.


**Poznámka:** Môžete urobiť záznamy IT vedúceho vo vašej spoločnosti.

### Nakonfigurujte nastavenia e-mailu


Kliknite na možnosť **Send Support Email...** (Odoslať e-mail pre podporu...). Otvorí sa toto okno.



1. Zadať svoje meno a kliknite na **Next** (Ďalší). Otvorí sa okno **Internet E-mail Address** (Internetová e-mailová adresa).

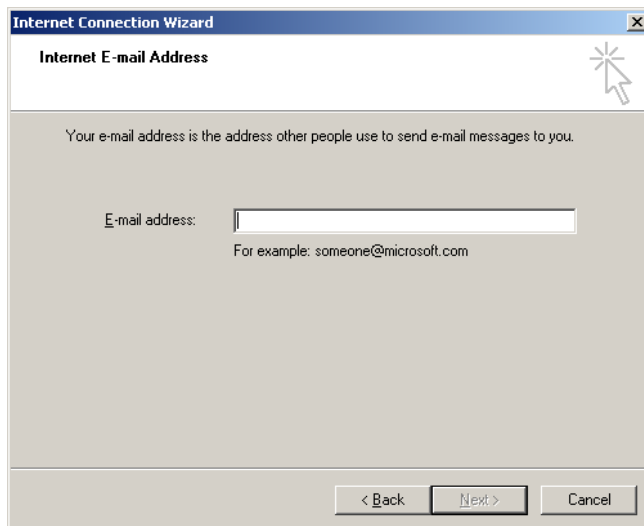


2. Zadáte svoju e-mailovú adresu a stlačíte **Next** (Ďalší). Otvorí sa okno **E-mail Server Names** (Názvy e-mailových serverov).

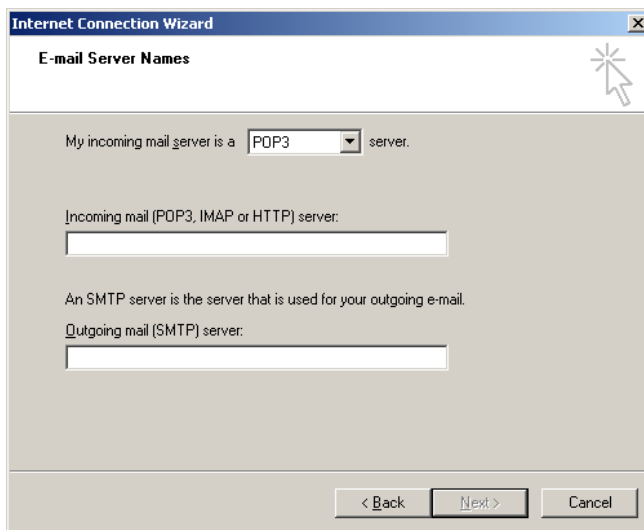


3. Vyberte typ poštového servera pre prichádzajúce e-maily a vyberte názvy serverov pre prichádzajúce a odchádzajúce e-maily. Potom kliknite na **Next** (Ďalší). Otvorí sa okno **Internet Mail Logon** (Prihlásenie e-mailu na internete).



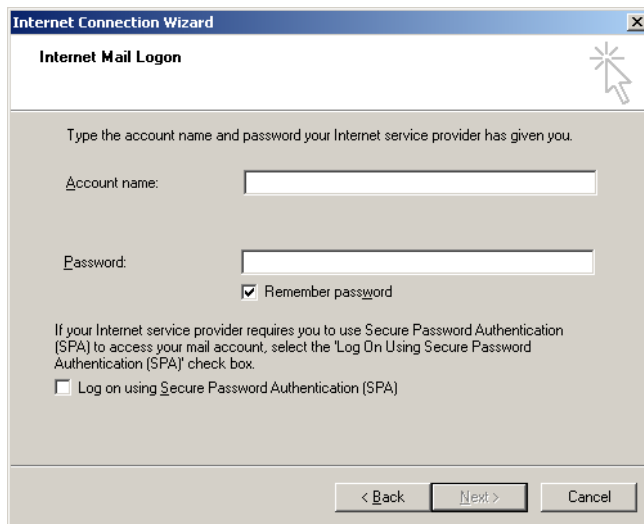


4. Zadájte názov svojho e-mailového účtu a heslo, ak váš server používa autentifikáciu pomocou hesla. Potom kliknite na **Next** (Ďalší). Otvorí sa toto **Congratulations** (Gratulujeme).

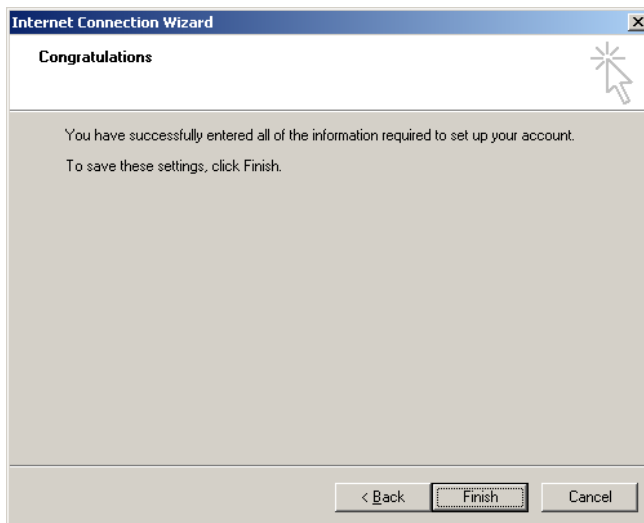

5. Potvrďte kliknutím na **Finish** (Dokončiť) a dokončíte nastavenie e-mailového účtu.

### Nastavenie v programe Outlook

1. Z ponuky **Start** (Štart) otvorte možnosť **Outlook Express (Start (Štart), All programs (Všetky programy) > Outlook Express (Outlook Express))**.
2. Vyberte možnosť **Tools** (Nástroje) a potom **Options** (Možnosti). Zobrazí sa okno nižšie.

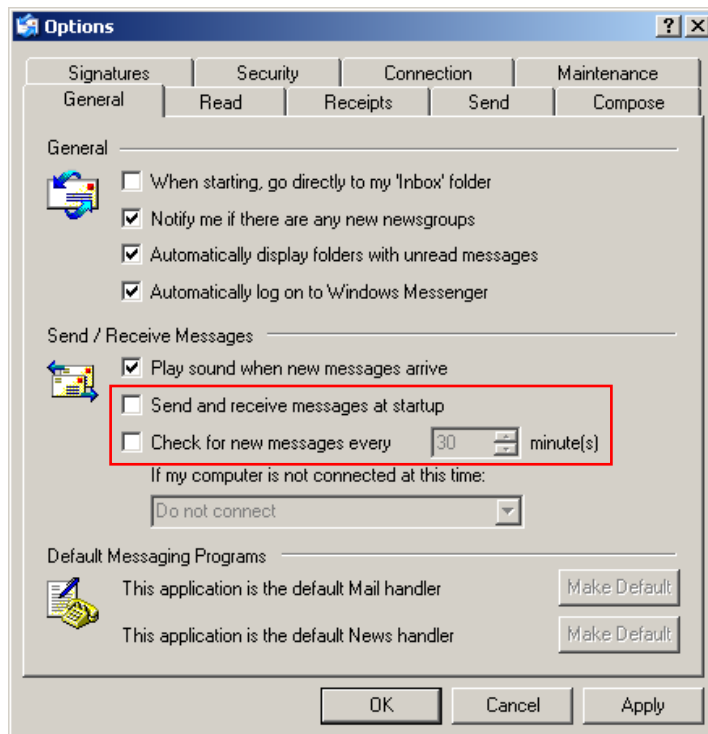

**Dôležité:** Aby počas PCR cyklov nedochádzalo k prijímaniu e-mailov, deaktivujte prednastavené vstupy na obrazovke **Send/Receive Messages** (Odoslať/prijať hlásenia).

3. Deaktivujte možnosť **Send and receive messages at startup** (Odoslať a prijať hlásenia pri spustení).
4. Deaktivujte možnosť **Check for new messages every 30 minutes** (Kontrolovať nové hlásenia každých 30 minút).
5. Zmeny potvrdíte tlačidlom **OK**.

## 7 Doplnkové funkcie


### 7.1 Templáty analýzy

Niektoré analýzy vyžadujú, aby používateľ definoval prahové hodnoty, nastavenia normalizácie a nastavenia genotypov. Tieto nastavenia sa často opakovane používajú vo viacerých experimentoch.

Templáty analýzy umožňujú používateľovi tieto nastavenia uložiť a opakovane použiť. Tým sa zníži potreba opakovaného zadávania nastavení a tiež riziko chýb.

Templáty analýzy podporujú kvantifikačná analýza, analýza kriviek topenia, analýzy alelickej diskriminácie, analýza bodového grafu a analýza EndPoint. Tieto analýzy umožňujú používateľovi exportovať templát, ktorý je pre analýzu jedinečný (napr. kvantifikačná analýza umožňuje exportovať a importovať súbory \*.qut, ktoré obsahujú nastavenia kvantifikácie).

Po importovaní alebo exportovaní templátu analýza sa názov súboru templátu zobrazí pre ďalšie použitie.

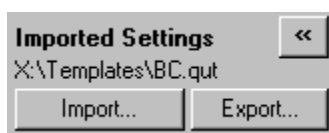


### 7.2 Otvorenie druhého cyklu

Počas uskutočňovania cyklu je možné otvoriť a analyzovať cykly, ktoré sa uskutočnili skôr. V druhom okne nie sú aktívované niektoré funkcie, ako napríklad **New** (Nový) alebo **Start Run** (Spustiť cyklus). Nový cyklus je možné spustiť z prvého okna po dokončení prvého cyklu.

### 7.3 Možnosti používania stupnice

Do možnosti **Adjust Scale** (Upraviť stupnicu) sa dostanete kliknutím na možnosť **Adjust Scale...** (Upraviť stupnicu...) v dolnej časti hlavného okna alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na graf a výberom možnosti **Adjust Scale...** (Upraviť stupnicu...) zo zobrazenej ponuky. Stupnica sa dá manuálne vložiť do zobrazeného okna.

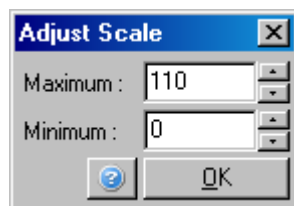

Do možnosti **Auto-Scale** (Automatická stupnica) sa dostanete kliknutím na možnosť **Auto-Scale...** (Automatická stupnica...) v dolnej časti hlavného okna alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na graf a výberom možnosti **Auto-Scale...** (Automatická stupnica...) zo zobrazenej ponuky. V možnosti **Auto-Scale** (Automatická stupnica) sa môžete pokúsiť prispôsobiť stupnicu maximálnym a minimálnym údajom.


Do možnosti **Default Scale** (Prednastavená stupnica) sa dostanete kliknutím na možnosť **Default Scale...** (Prednastavená stupnica...) v dolnej časti okna alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na graf a výberom možnosti **Default Scale...** (Prednastavená stupnica...) zo zobrazenej ponuky. Pomocou možnosti **Default Scale** (Prednastavená stupnica) resetujete stupnicu na zobrazenie od 0 do 100 fluorescenčných jednotiek.

## 7.4 Exportovanie grafov


### Export obrázku

Tieto kroky popisujú spôsob uloženia obrázku.

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť **Export** (Exportovať).
2. Zobrazí sa dialógové okno **Export Dialog** (Dialógové okno exportu). Zo zoznamu **Format** (Formát) vyberte požadovaný formát.

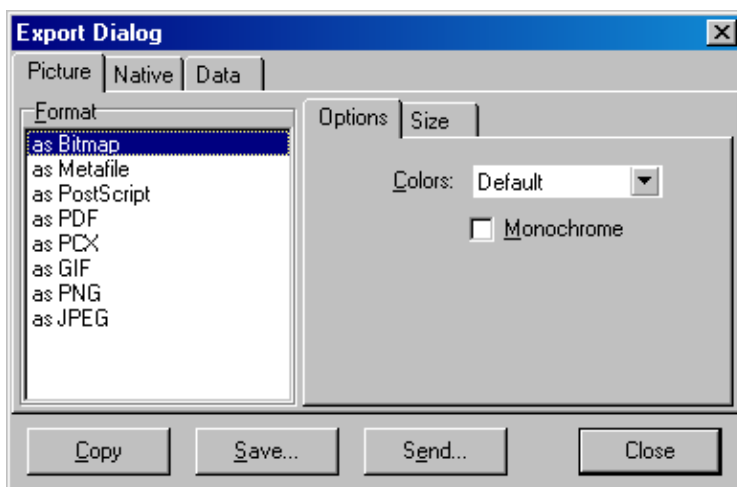

3. Vyberte kartu **Size** (Veľkosť) a určite želanú veľkosť.

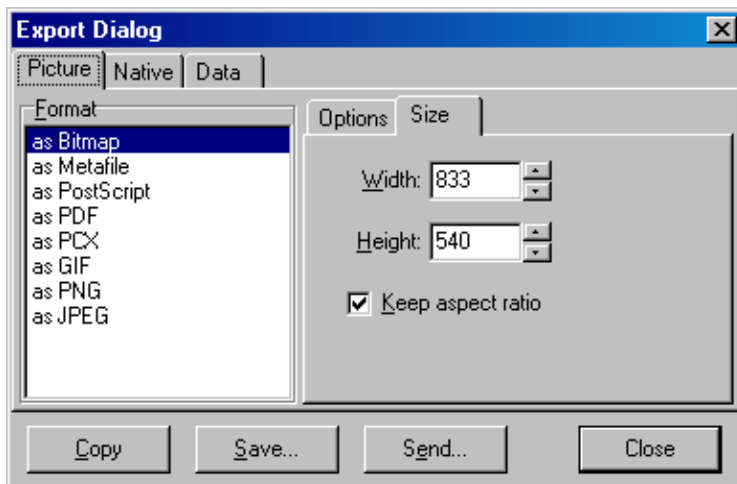

4. Zaškrtnite políčko **Keep aspect ratio** (Zachovať pomer strán), aby si obrázok zachoval správny pomer pri nastavovaní svojej veľkosti.
5. Kliknite na **Save** (Uložiť) a v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, vyberte názov súboru a umiestnenie súboru.


Ak je potrebný obrázok s vyšším rozlíšením, odporúčame buď zväčšovať jeho veľkosť, kým nespĺňa vaše požiadavky, alebo uložiť graf ako metasúbor (\*.emf, \*.wmf). Toto formát na báze vektora, ktorý sa môže otvoriť v softvéri ako napríklad Adobe® Illustrator® a umožňuje používateľovi vytvoriť obrázok s každým rozlíšením.

### Export natívneho formátu

Grafy v softvéri Rotor-Gene Q používa komponent tretej strany TeeChart®, ktorý vyvinul softvér Steema. Na uloženie grafu v natívnom formáte vyberte kartu v dialógovom okne **Export Dialog** (Dialógové okno exportu) „**Native**“ (Natívny) (pozri predchádzajúcu snímku obrazovky) a potom kliknite na **Save** (Uložiť). Natívny formát je štandardný formát súbor TeeChart. Ten umožňuje používateľovi používať program TeeChart Office zo softvéru Steema. Program TeeChart Office je dostupný ako freeware a nainštaluje sa ako súčasť softvérového balíka Rotor-Gene Q. Na spustenie softvéru kliknite na ikonu programu **TeeChart** na pracovnej ploche.




Program TeeChart Office umožňuje manipuláciu s exportovanými grafmi, vrátane zmeny farieb kriviek, pridávanie anotácií, zmien fontov a nastavovania dátových bodov.

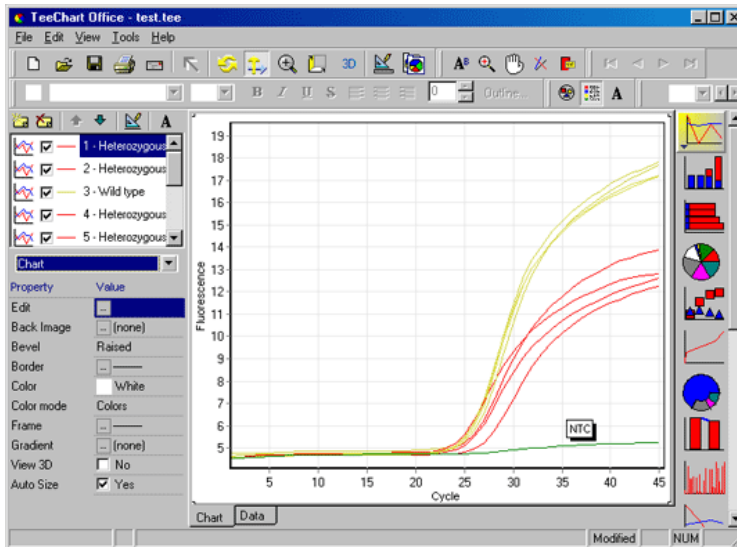

## Export údajov

Na exportovanie údajov v rôznych formátoch vyberte v okne **Export Dialog** (Dialógové okno exportu) kartu **Data** (Údaje). Exportovaný súbor obsahuj nespracované dátové body použité v grafe.

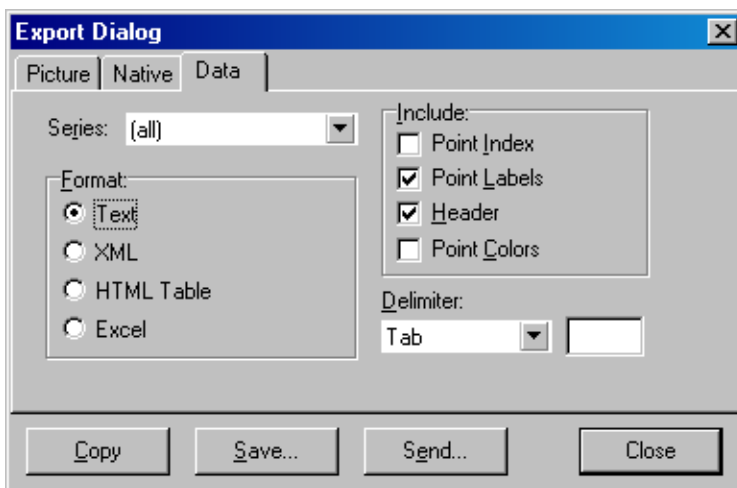


Exportovanie nespracovaných údajov a údajov analýzy je možné aj po vybraní možnosti **Save As** (Uložiť ako) v ponuke **File** (Súbor) (pozri časť 6.5).

## 7.5 Ikona klúča



Ikona klúča sa zobrazí v dolnej ľavej časti hlavného okna. Kliknutím na ikonu klúča sa aktivuje niekoľko možností. Tieto možnosti sú dostupné aj kliknutím pravým tlačidlom myši na graf.

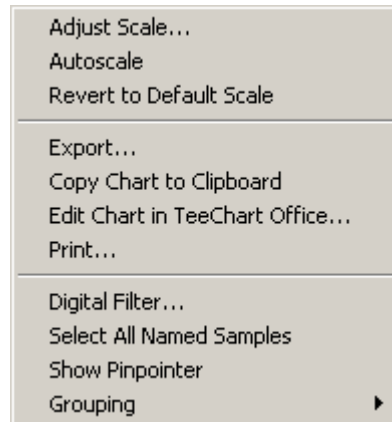

**Adjust Scale** (Nastaviť stupnicu),  
**Autoscale** (Automatická  
stupnica), **Revert to Default Scale**  
(Prepnúť späť na prednastavenú  
stupnicu):

Pozri časť 7.3.

**Export...** (Export...):

Uloží graf v rôznych formátoch (pozri časť 6.4).

**Copy Chart to Clipboard**  
(Vložiť do schránky):

Obrázok grafu sa kopíruje do schránky.

**Edit Chart in TeeChart  
Office...** (Upraviť graf v  
programe TeeChart Office...):


Graf sa otvorí priamo v programe TeeChart Office na editovanie  
(pozri časť 6.4).

**Print** (Tlačiť):

Graf sa vytlačí.

**Digital Filter...** (Digitálny  
filter...):

Zmení sa aktuálne zvolený digitálny filter na grafe. Digitálny filter vyhladzuje  
údaje pomocou posuvného okna bodov.

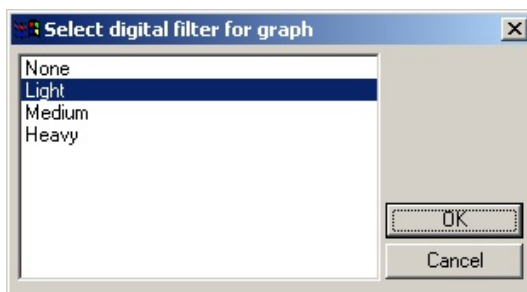

**Show Pinpointer** (Zobraziť  
ukazovateľ):


Otvorí sa okno, v ktorom sa zobrazia presné súradnice polohy ukazovateľa  
myši.

**Grouping** (Zoskupenie):

Vizuálne zoskupenie vzoriek s rovnakým názvom. Táto možnosť môže byť  
užitočná pri cykloch s plným rotorom. Výber tejto možnosti neovplyvní  
vypočítané hodnoty.

## 7.6 Možnosti zvolenej oblasti

Oblasť grafu je možné vybrať kliknutím a podržaním ľavého tlačidla myši a pretiahnutím ukazovateľa myši. Zobrazia sa tieto možnosti.

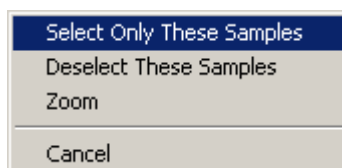

**Select Only These Samples**  
(Vybrať len tieto vzorky):

Vzorky mimo zvolenej oblasti sa odznačia.

**Select Only These Samples**  
(Vybrať len tieto vzorky):

Vzorky mimo zvolenej oblasti sa odznačia.

**Zoom** (Priblížiť/oddialiť):

Priblíženie/oddialenie zvolenej oblasti grafu. Na oddialenie kliknite na tlačidlo **Default Scale** (Prednastavená stupnica).



## 8 Údržba

Udržiavanie pracovného výkonu prístroja Rotor-Gene Q MDx je jednoduché. Na udržanie optického výkonu musia byť šošovky, ktoré sa nachádzajú na zdroji vyžarovania aj zdroji detekcie, čisté. To sa dosiahne jemným utretím šošoviek vatovou tyčinkou navlhčenou v etanole alebo izopropanole\*.

**Poznámka:** Šošovky čistíte minimálne raz mesačne v závislosti od používania. Zároveň utrite aj komoru rotora.

Oblasť pracovného stola udržiavajte čistú a bez prachu a hárkov papiera. Vstup vzduchu prístroja Rotor-Gene Q MDx sa nachádza v spodnej časti a voľný materiál, ako napríklad papier alebo prach, môžu znížiť jeho výkon.



Aby ste predišli hromadeniu prachu, držte veko prístroja Rotor-Gene Q MDx zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

**Poznámka:** Používajte len diely dodané spoločnosťou QIAGEN.

### 8.1 Čistenie povrchu prístroja Rotor-Gene Q MDx

Vonkajšie povrchy prístroja Rotor-gene Q je možné čistiť pomocou bežne dostupných laboratórnych chemikálií

\* Počas práce s chemikáliami noste vždy vhodný laboratórny plášť, jednorazové rukavice a ochranné okuliare. Viac informácií nájdete na príslušných kartách bezpečnostných údajov (KBÚ), ktoré sú k dispozícii u dodávateľa produktov.

## 8.2 Dekontaminácia povrchu prístroja Rotor-Gene Q MDx

Ak dôjde k znečisteniu komory rotora, môže sa vyčistiť utretím povrchu handrou nepúšťajúcou vlákna navlhčenou (ale nie mokrou) v roztoku bielidla s koncentráciou 0,1 % (v/v). \* Komoru utrite handrou nepúšťajúcou vlákna navlhčenou vo vode PCR stupňa, aby ste utreli zvyšky bielidla.

## 8.3 Oprava prístroja Rotor-Gene Q

V prípade potreby opravy alebo servisu prístroja Rotor-Gene Q kontaktujte technický servis spoločnosti QIAGEN na adrese <https://www.qiagen.com/service-and-support/technical-support/technical-support-form/>.

\* Počas práce s chemikáliami noste vždy vhodný laboratórny plášť, jednorazové rukavice a ochranné okuliare. Viac informácií nájdete na príslušných kartách bezpečnostných údajov (KBÚ), ktoré sú k dispozícii u dodávateľa produktov.

## 9 Optická verifikácia teploty

Optická verifikácia teploty (Optical Temperature Verification, OTV) je metóda, ktorou sa verifikuje teplota v skúmavke v prístroji Rotor-Gene Q MDx. Validácia teploty v skúmavke môže byť dôležitý postup v certifikovaných laboratóriách. OTV sa vykonáva pomocou súpravy Rotor-Disc OTV Kit (pozri časť 16). Ďalej je uvedený len krátky úvod do princípu OTV. Vykonávanie postupu OTV je vysvetlené v softvéri prístroja Rotor-Gene Q MDx. Podrobnejší popis postupu OTV, vrátane príručky na riešenie problémov, nájdete v *príručke pre Rotor-Disc OTV*.

### 9.1 Princíp OTV

OTV využíva optické vlastnosti 3 termochromatických tekutých kryštálov (Thermochromatic Liquid Crystals, TLC)\* ako absolútne teplotné referencie. Pri zohriatí sa kryštály TLC zmenia z nepriehľadných na priehľadné pri veľmi presnej teplote (50 °C, 75 °C a 90 °C). Samotné kryštály TLC nefluoreskujú. Preto je potrebné zakryť zdroj budenia pomocou fluorescenčnej vložky tak, aby optický prístroj Rotor-Gene Q MDx dokázal detegovať body premeny TLC. Kryštály TLC, ktoré nedosahujú svoju teplotu premeny sú nepriehľadné a odrážajú svetlo. Časť odrazeného svetla s rozptýli smerom k detektoru, čím sa zvýši fluorescencia. Keď teplota v skúmavke dosiahne bod premeny kryštálu TLC, stane sa kryštál TLC priehľadným a svetlo bude prechádzať cez vzorku a nebude sa viac odrážať smerom k detektoru, čo má za následok zníženie fluorescencie. Zmena fluorescencie sa používa na určenie presnej teploty premeny každého kryštálu TLC. Teplota premeny s porovná s teplotou v súbore s kalibráciou z výroby pre disk OTV Rotor-Disc, aby bolo možné overiť, či sa prístroj Rotor-Gene Q MDx nachádza v rozsahu špecifikácie teploty.

\* Počas práce s chemikáliami noste vždy vhodný laboratórny plášť, jednorazové rukavice a ochranné okuliare. Viac informácií nájdete na príslušných kartách bezpečnostných údajov (KBÚ), ktoré sú k dispozícii u dodávateľa produktov.

## 9.2 Komponenty súpravy Rotor-Disc OTV Kit

Na vykonanie OTV sú potrebné tieto komponenty:



- Súprava Rotor-Disc OTV Kit, ktorá obsahuje:
  - Utesnený rotor Rotor-Disc 72 OTV (obsahuje TLC)
  - Fluorescenčná rozptyľovacia vkladacia doštička (prístroj Rotor-Gene 3000 alebo prístroje Rotor-Gene Q/6000)
  - Odnímateľné médium, ktoré obsahuje tieto súbory: Súbor s sériovým číslom rotora OTV a dátumom expirácie (\*.txt); súbor s testovacím templátom OTV (\*.ret); produktový list (\*.pdf); súbor s kalibráciou z výroby (\*.rex)
  - Produktový list
- Softvér radu Rotor-Gene verzie 1.7 alebo vyššej s ľahko použiteľným sprievodcom rotora OTV
- Rotor-Disc 72 Rotor
- Rotor-Disc 72 Locking Ring

## 9.3 Spustenie OTV


1. Fluorescenčnú vložku položte na emisné šošovky v dolnej časti komory prístroja Rotor-Gene Q MDx.
2. Disk OTV Rotor-Disc vložte do rotora Rotor-Disc 72 Rotor. Zaisťte ho pomocou poistného krúžku Rotor-Disc 72 Locking Ring. Vložte zostavu do prístroja Rotor-Gene Q MDx a zacvaknite ju na miesto. Zatvorte veko prístroja Rotor-Gene Q MDx.



3. Otvorte sprievodcu Advanced (Pokročilý) tak, v okne **New Run** (Nový cyklus) zvolíte kartu **Advanced** (Pokročilý). V sprievodcovi Advanced (Pokročilý) kliknite na možnosť **Instrument Maintenance** (Údržba prístroja) a potom na **OTV**. Sprievodca vás požiada o sériové číslo OTV, toto sa nachádza na OTV krúžku. Potom kliknite na možnosť **Start** (Štart).

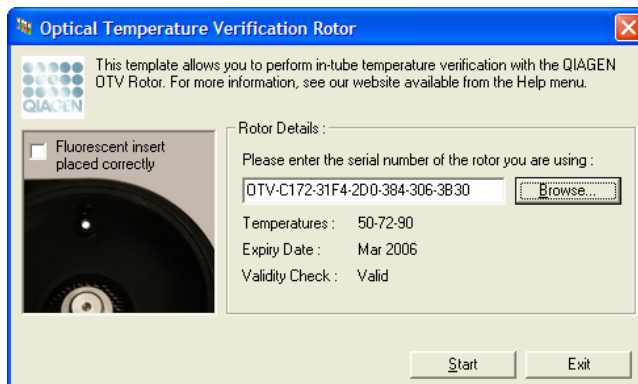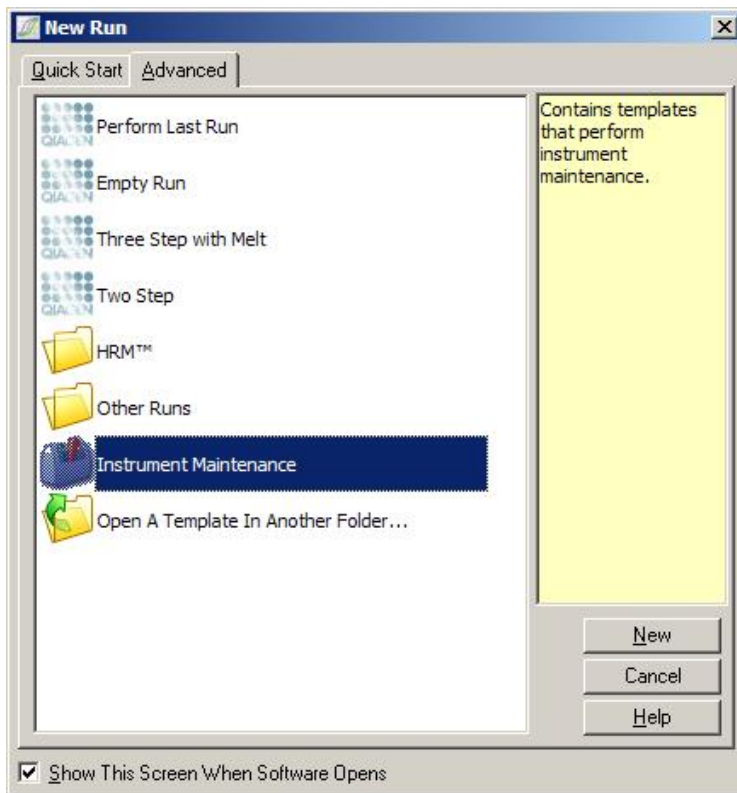


4. Softvér si potom vyžiada názov súboru pre cyklus. Cyklus sa následne spustí.
5. Cyklus vykoná rad topení, ktoré stanovujú tepelné charakteristiky prístroja Rotor-Gene Q MDx.

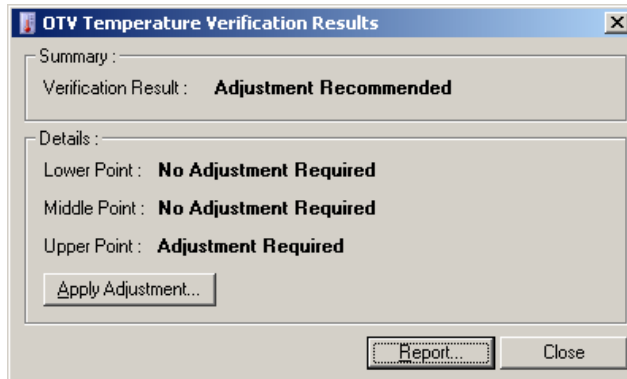

6. Po skončení cyklu softvér určí, či je prístroj Rotor-Gene Q MDx v rámci špecifikácie.
7. Ak je potrebná úprava, mal by používateľ kliknúť na možnosť **Apply Adjustment** (Uplatniť úpravu). Používateľ bude následne vyzvaný na vykonanie verifikačného cyklu. Po dokončení verifikačného cyklu by už nemala byť potrebná žiadna úprava. Ak je potrebná ďalšia úprava, kontaktujte predajcu.
8. Keď je prístroj Rotor-Gene Q MDx v rámci špecifikácie, môžete si pozrieť správu cyklu a vytlačiť ju.

## 10 Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia

Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia (High Resolution Melt, HRM) je inovatívna technika, ktorá je založená na analýze topenia DNA. HRM charakterizuje vzorky DNA podľa ich procesu rozpadu, keď sa so zvyšujúcou sa teplotou menia z dvojreťazcovej DNA (dsDNA) na jednoreťazcovú DNA (ssDNA) (pozri obrázok nižšie). Prístroj na HRM zachytáva signály fluorescence s mimoriadne vysokou optickou a tepelnou presnosťou a vytvára mnohé možnosti využitia.

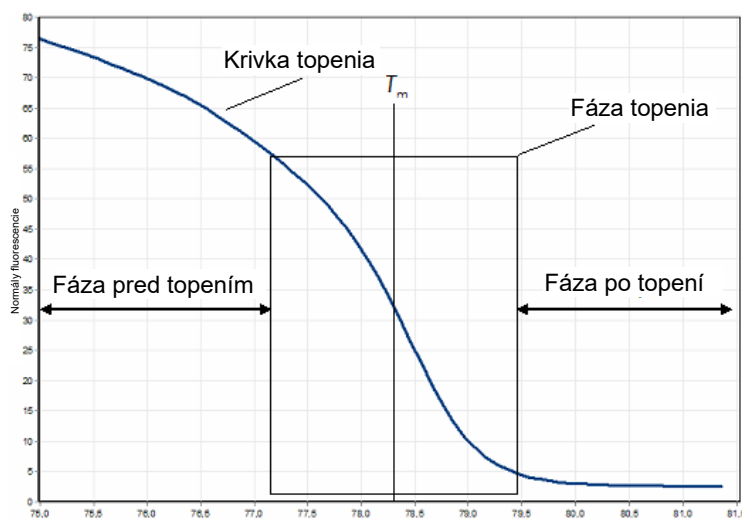

**Typický graf HRM.** Pomocou krivky topenia sa zakreslí premena z vysokej fluorescence prvotnej fázy pred topením cez zníženie fluorescence vo fáze topenia až na základnú úroveň fluorescence v fáze po topení. Fluorescencia sa znižuje s uvoľňovaním interkalačného farbiva DNA z ssDNA počas jej topenia ja jednoreťazcovú DNA. Stredový bod fázy topenia, v ktorom je rýchlosť zmeny fluorescence najväčšia, definuje teplotu topenia ( $T_m$ ) DNA počas analýzy.

Pred vykonaním analýzy HRM je potrebné amplifikovať cieľovú sekvenciu na vysoký počet kópií. To sa zvyčajne robí pomocou PCR za prítomnosti interkalačného fluorescenčného farbiva dsDNA. Farbivo neinteraguje s ssDNA, ale aktívne interkaluje s dsDNA a počas interkalácie jasne fluoreskuje. Zmena vo fluorescencii sa môžu využiť na meranie zvýšenia koncentrácie DNA počas PCD a potom priamo na meranie tepelne indukovaného topenia DNA pri HRM. Počas HRM je fluorescencia na začiatku vysoká, pretože vzorka začína ako dsDNA. Fluorescencia sa znižuje so zvyšujúcou sa teplotou a DNA sa rozpadá na jednoreťazcovú. Pozorovaný proces topenia je charakteristický pre konkrétnu vzorku DNA.

Pomocou HRM dokáže prístroj Rotor-Gene Q MDx charakterizovať vzorky na základe dĺžky sekvencie, obsahu GC a komplementarity sekvencie DNA. Metóda HRM sa môže použiť v aplikáciách s genotypizáciou, ako napríklad analýza inzercí/delícií alebo jednonukleotidový polymorfizmus (Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs) alebo na skríning neznámych genetických mutácií. Takisto sa môže použiť v epigenetických aplikáciách na detekciu a analýzu stavu metylácie DNA. Tiež sa môže použiť na kvantitatívnu detekciu malej časti variantnej DNA na pozadí sekvencie divého typu pri senzitivitách blížiacich sa hodnote 5 %. To sa môže využiť napríklad na študovanie somaticky získaných mutácií alebo zmien v stave metylácie CpG ostrovov.

HRM na prístroji Rotor-Gene Q MDx uľahčuje viaceré aplikácie, vrátane:

- Identifikácia kandidátskych predispozičných génov
- Asociačné štúdie (porovnanie prípadov a kontrolných roztokov, genotypu a fenotypu)
- Určenie prevalencie alely v rámci populácie alebo podskupiny
- Skríning a validácia SNP
- Skríning straty heterozygotnosti
- Genetická daktyloskopia (DNA fingerprinting)
- Charakterizácia blokov haplotypu
- Analýza metylácie DNA
- DNA mapovanie
- Identifikácia druhov
- Objavovanie mutácií
- Určenie pomeru somaticky získaných mutácií
- Typizácia HLA

Metóda HRM je jednoduchšia a nákladovo efektívnejšia ako genotypizačné testy pomocou sond a na rozdiel od bežných metód je to systém uzatvorených skúmaviek, ktorý zabraňuje kontaminácii produktov PCR. Výsledky sú porovnateľné s bežnými metódami, ako napríklad SSCP, DHPLC, RFLP a sekvenovanie DNA.

## 10.1 Prístroje

Prístroj Rotor-Gene Q MDx má tieto vynikajúce termo-optické schopnosti v reálnom čase potrebné pre HRM.



- Vysokointenzívne osvetlenie
- Vysokosenzitivná optická detekcia
- Rýchly zber údajov
- Jemne kontrolovaná teplota vzorky
- Minimálna tepelná a optická odchýlka variácia medzi vzorkami

## 10.2 Chemické látky


Spoločnosť QIAGEN ponúka súpravu Type-it® HRM PCR Kit na analýzu SNP a mutácií pomocou HRM a súpravu EpiTect® HRM PCR Kit na analýzu metylácie. Obidve súpravy obsahujú interkalačné fluorescenčné farbivo tretej generácie EvaGreen. Súpravy kombinujú optimalizovaný pufer HRM a polymerázu HotStarTaq® Plus DNA Polymerase, aby sa predišlo nešpecifickej amplifikácii produktov a dosiahli sa spoľahlivé výsledky.


**Poznámka:** Všetky súpravy QIAGEN HRM a reagensie sú indikované na použitie len s prístrojmi Rotor-Gene Q v aplikáciách popísaných v príslušných príručkách súprav QIAGEN.

## 10.3 Genotypizačný príklad SNP

V zobrazenom príklade sa súprava Type-it HRM PCR Kit použila v analýze HRM na rozlíšenie medzi homozygotným divým typom, homozygotným mutantom a heterozygotnými formami ľudského SNP rs60031276. Technické podrobnosti nájdete v príručke pre Type-it HRM PCR.

**A**

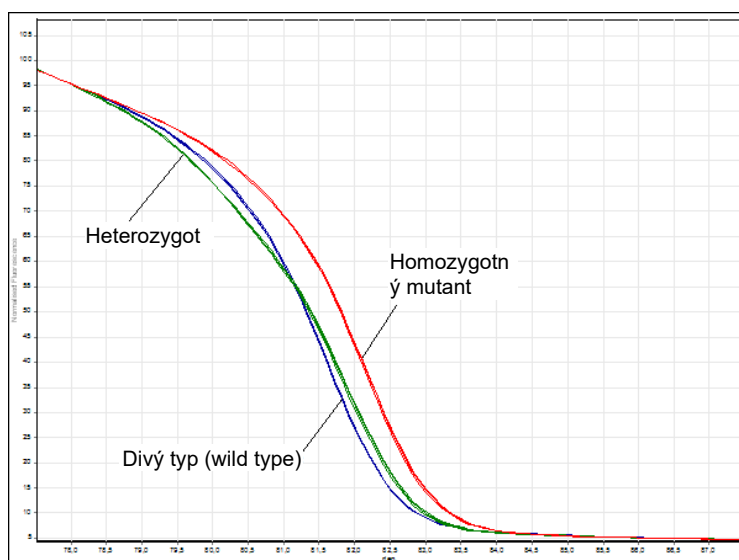

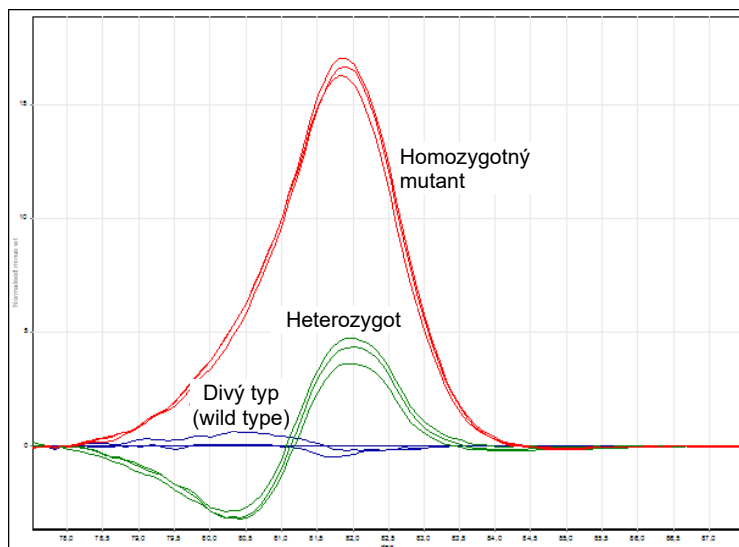**B****C**


HRM Results - HRM A.HRM (Page 1)				
No.	C	Name	Genotype	Confidence %
22	■	AA Human SNP rs60031276	homo AA	100,00
23	■	unknown	homo AA	99,49
24	■	unknown	homo AA	99,76
28	■	AG Human SNP rs60031276	hetero AG	100,00
29	■	unknown	hetero AG	99,49
30	■	unknown	hetero AG	98,47
34	■	GG Human SNP rs60031276	homo GG	100,00
35	■	unknown	homo GG	98,80
36	■	unknown	homo GG	99,53

**Genotypizácia SNP pomocou HRM.** Ľudský SNP rs60031276 (substitúcia A do G) v géne PPP1R14B (proteínová fosfatáza 1, regulačná (inhibitor) podjednotka 14B) sa analyzoval pomocou prístroja Rotor-Gene Q s využitím 10 ng genómovej DNA rôznych genotypov a súpravy Type-it HRM Kit. Homozygotný divý typ (AA), homozygotný mutant (GG) a heterozygotné (AG) vzorky sú zobrazené na **A** na kalibračnej normalizovanej krivke topenia a **B** graf rozdielov normalizovanom pre vzorky divého typu. Softvéru Rotor-Gene Q sa priradili genotypy **C** pre neznáme vzorky.


## 10.4 Príklad analýzy metylácie

Na zobrazenom príklade sa v analýze HRM použila súprava EpiTect HRM PCR Kit na diskrimináciu rôznych pomerov metylovanej a nemetylovanej DNA. Technické podrobnosti nájdete v príručke pre EpiTect HRM PCR.

**A**

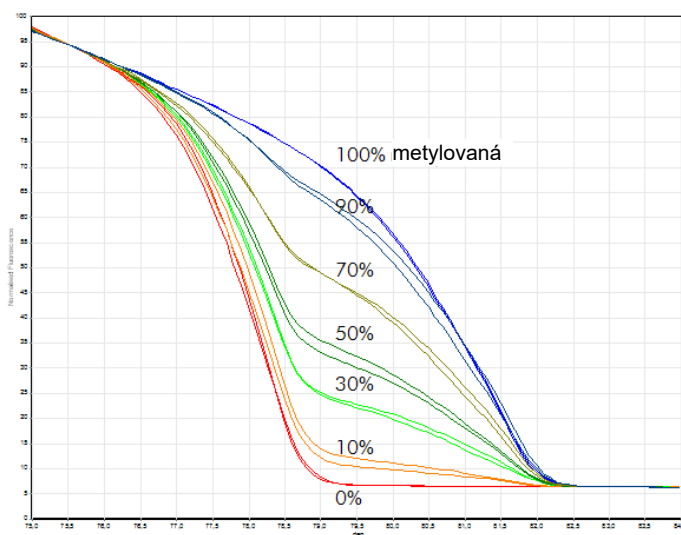

**B**

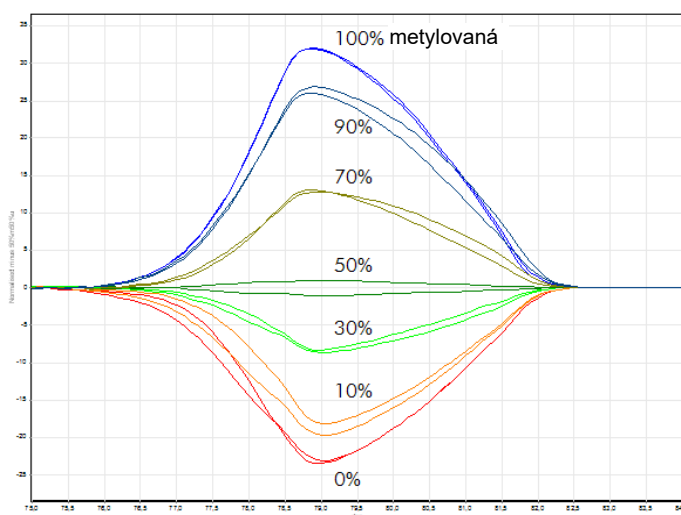

**Kvantitatívna analýza metylácie pomocou HRM.** Rôzne pomery metylovanej a nemetylovanej DNA-APC (karcinomatózne poly póza ocli) sa analyzovali a diskriminovali pomocou analýzy metylácie HRM na prístroji Rotor-Gene Q pomocou súpravy EpiTect HRM Kit. Na obrázku je zobrazená **A** kalibračná normalizovaná krivka topenia a **B** graf rozdielov normalizovaný pre 50 % metylové vzorku.

## 10.5 Odporúčania pre úspešnú analýzu HRM

Úspech analýzy HRM závisí vo veľkej miere od konkrétnej skúmanej sekvencie. Určité sekvenčné motívy, ako napríklad vlásenky (karpina pool) alebo iné sekundárne štruktúry lokalizované v regiónoch s nezvyčajne vysokým alebo nízkym obsahom GC alebo opakované sekvencie, môžu ovplyvniť výsledok. Okrem toho je možné pri použití štandardizovaných súprava a optimalizovaných protokolov od spoločnosti QIAGEN prekonať mnohé potenciálne spomenuté problémy. Nižšie sú uvedené niektoré jednoduché odporúčania, ktoré pomôžu zaistiť tento úspech.

### **Analyzujte malé fragmenty DNA**

Analyzujte fragmenty, ktoré nie sú väčšie ako približne 250 p. Veľké produkty je možné analyzovať úspešne, ale zvyčajne s nižším rozlíšením. To je spôsobené tým, že napríklad variácia s jednou bázou má väčší vplyv na proces topenia ampliónu 100 p ako ampliónu 500 p.

### **PCR musí obsahovať len konkrétny produkt**

Vzorky kontaminované post-PCR artefaktami, ako napríklad premiérové chiméry alebo nešpecifické produkty, môžu skomplikovať interpretáciu výsledkov HRM. Súpravy od spoločnosti QIAGEN na analýzu HRM zabezpečujú maximálnu špecifickú bez potreby optimalizácie.

### **Používajte dostatočný pred amplifikačný templát**

Údaje analýzy real-time PCR môžu byť veľmi užitočné pri riešení problémov analýzy HRM. Grafy amplifikácie by mali mať hodnotu  $C_T$  (cyklus prahovej hodnoty) menšiu alebo rovnú 30 cyklom. Produkty, ktoré sa amplifikácia neskôr (z dôvodu začiatočnej teploty alebo degradácie templátu) zvyčajne produkujú variabilné výsledky HRM, čo je spôsobené artefaktami PCR.

### **Normalizujte koncentráciu templátu**

Množstvo templátu pridaného do reakcie by malo byť konzistentné. Normalizujte začiatočné koncentrácie tak, aby boli všetky grafy amplifikácie navzájom v rámci 3 hodnôt  $C_T$ . Tým sa zaistí, že vstupné koncentrácie budú v rozsahu 10-násobku.

## **Kontrolujte prítomnosť aberačných grafov amplifikácie**

Pred spustením HRM si dôkladne prezrite údaje grafu amplifikácie a hľadajte abnormálny tvar grafu amplifikácie. Grafy s logaritmicko-lineárnou fázou, ktorá nie je strmá, je kľukatá alebo ktorá v porovnaní s inými reakciami dosahuje nízku stabilnú úroveň signálu, môže naznačovať nedostatočnú amplifikáciu alebo signál fluorescencie, ktorý je príliš slabý (napr. k tomuto môže dôjsť, ak bola koncentrácia priméru príliš nízka). Nedostatočné reakcie môžu byť spôsobené inhibítormi reakcie alebo nesprávnou prípravou reakcie. Údaje o HRM z takýchto vzoriek môžu byť bezvýsledný alebo mať nízke rozlíšenie. Aby ste predišli nespoľahlivým výsledkom, odporúčame súpravy QIAGEN na prípravu vzorky a analýzu HRM.

## **Udržiavajte koncentrácie postamplifikačných vzoriek podobné**

Koncentrácie fragmentov DNA ovplyvňuje jej teplotu topenia ( $T_m$ ). Z tohto dôvodu musia byť koncentrácie vzoriek DNA čo najpodobnejšie. Pri analyzovaní PCR produktov zaistíte, aby bola každá reakcia amplifikovaná do fázy stabilnej úrovne. Na stabilnej úrovni sa všetky reakcie amplifikácia do rovnakej miery bez ohľadu na ich začiatkové množstvo. Nezabudnite ale, že nedostatočné reakcie nemusia dosiahnuť stabilnú úroveň s rovnakým amplifikovaným množstvom, napríklad z dôvodu nekonzistentnej prípravy testu (napr. príliš nízka koncentrácia priméru).

## **Zabezpečte jednotnosť vzoriek**

Všetky vzorky musia mať rovnaký objem a mali by obsahovať rovnakú koncentráciu farbiva. Proces topenia DNA ovplyvňujú soli v reakčnej zmesi, takže je dôležité, aby bola koncentrácia pufru, MG a ostatných solí čo najjednoduchšia vo všetkých vzorkách. Podobne použite len rovnaké reakčné skúmavky od toho istého výrobcu, aby ste predišli odchýlkam spôsobeným hrúbkou plastu a autofluorescenčnými vlastnosťami.

## **Zaistite dostatočný zber údajov z fáz pred topením a po topení**

Dátové body HRM zachyťte v rozsahu približne 10 °C tak, aby bol sústredený okolo sledovanej hodnoty  $T_m$  (pozri obrázok na strane 10). Takto sa získa dostatočný počet základných dátových bodov pre efektívnu normalizáciu krivky a výsledkom budú lepšie reprodukovateľné kópie a jednoduchšia interpretácia údajov.


## 10.6 Príprava vzorky

Degradácii vzorky je potrebné predchádzať purifikáciou a skladovaním. Vyhýbajte sa nadmerným množstvám inhibítorov, ako napríklad z prenosu etanolu. Na zlepšenie výsledkom HRM odporúčame udržiavať konzistentné množstvo použitého templátu medzi vzorkami. Odporúča sa spektrofotometrická analýza na určenie koncentrácie a čistoty DNA. Na prípravu vzorky odporúčame použiť súpravy QIAGEN.


**Poznámka:** Pri hodnote 260 nm sa jedna jednotka absorbancie rovná 50 µg/ml DNA. Čistá DNA vykazuje pomer 260 nm k 280 nm s hodnotou 1,8.

## 10.7 Nastavenie softvéru


1. Pomocou možnosti **New...** (Nový...) z ponuky **File** (Súbor) otvorte nový súbor cyklu. V sprievodcovi Advanced (Pokročilý) vyberte možnosť **HRM**.

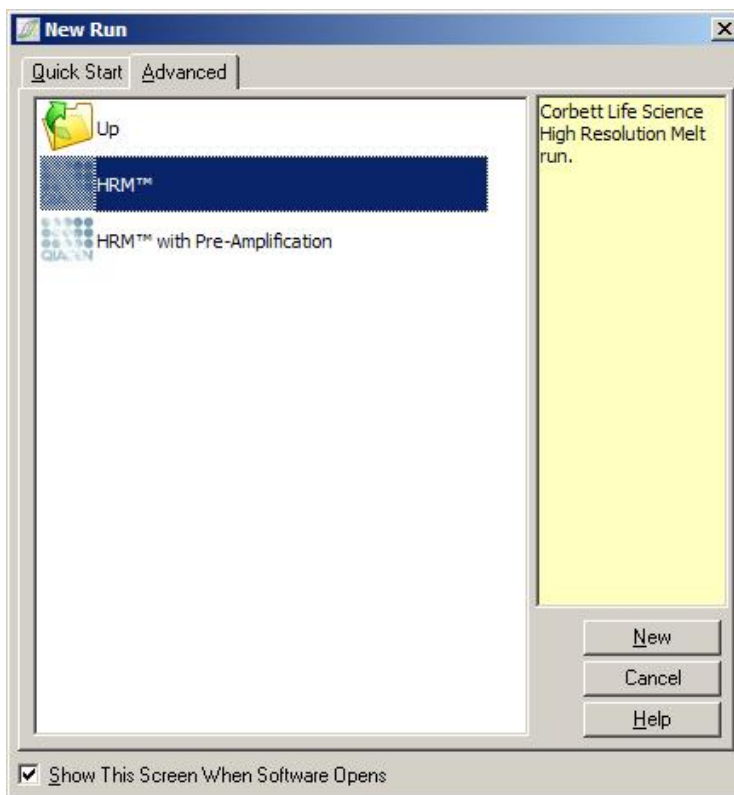


- Nastavte typ rotora (v tomto príklade sa používa rotor 72-Well Rotor). Pred pokračovaním na ďalší krok musí byť poistný krúžok na svojom mieste a políčko **Locking Ring Attached** (Pripevnený poistný krúžok) musí byť zaškrtnuté.

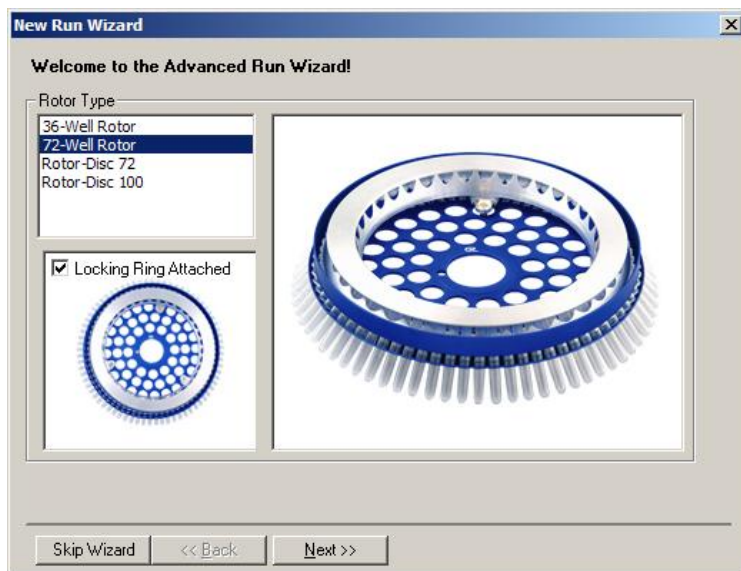


- Nastavte podrobnosti cyklu. Zadajte meno operátora (voliteľné) a pridajte poznámky k experimentu (voliteľné). Vyberte reakčný objem (povinný údaj) a želané usporiadanie vzoriek.

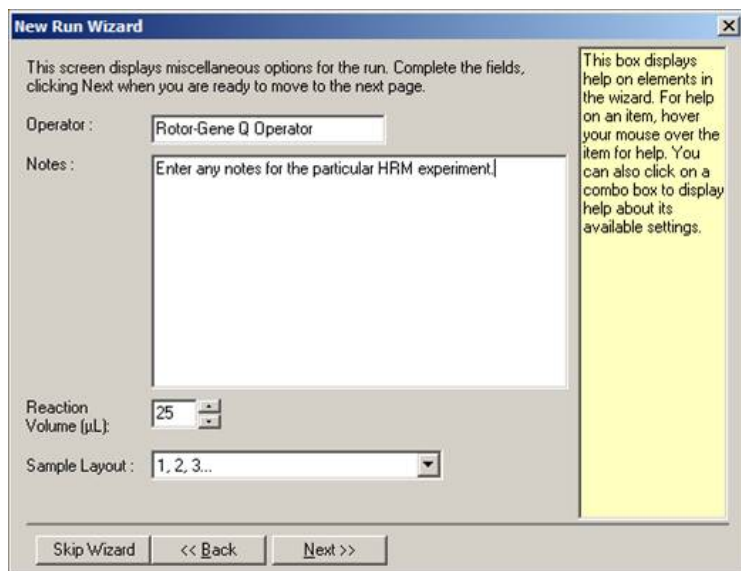

4. Kliknite na tlačidlo **Edit Profile...** (Editovať profil...) a upravte časy a teploty reakcie.

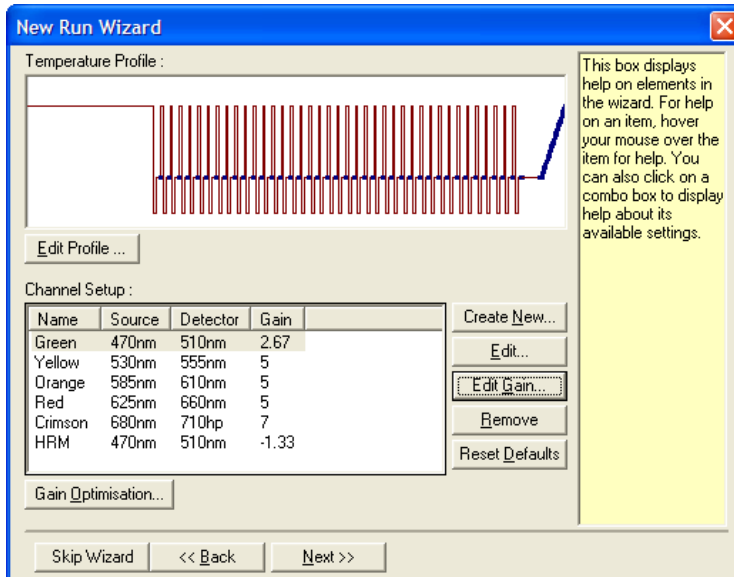


5. Nastavte vhodný prvotný čas retencie. Tento čas závisí od typu použitej polymerázy DNA. Súpravy Type-it HRM PCR Kit a the EpiTect HRM PCR Kit vyžadujú 5-minútový aktivačný čas. Predvolený aktivačný čas je 10 minút.

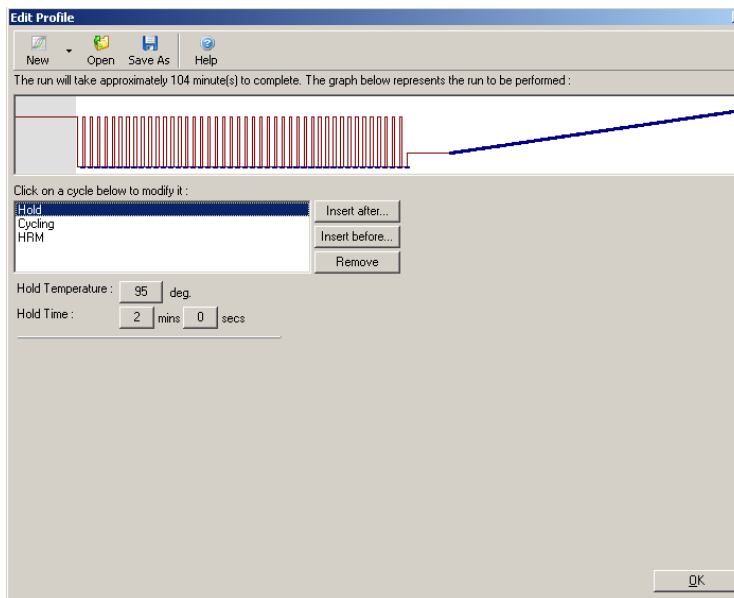





6. Upravte cyklovanie tak, aby bolo vhodné pre amplikón.

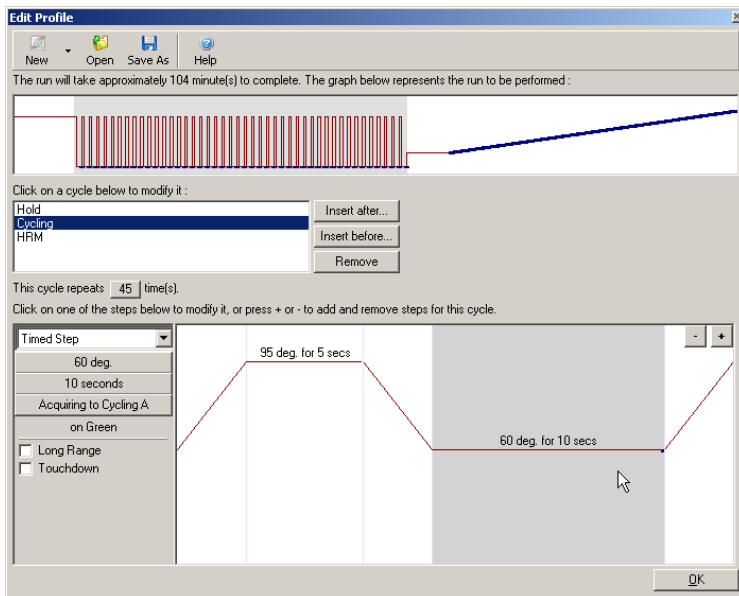


7. Zaisťte, aby sa zozbierali údaje o fluorescencii. Údaje zbierajte to zeleného kanála na konci kroku nasadania.

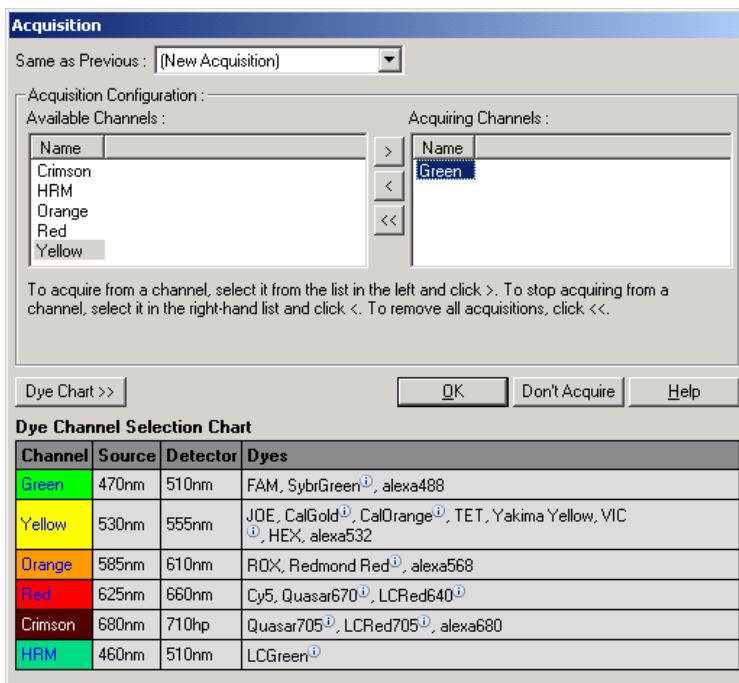


8. Nastavte podmienky HRM cyklu. Upravte podmienky tak, aby bolo vhodné pre amplikón. Pre prvú sadu experimentov stanovte širokú oblasť topenia. Ako vodidlo vhodného rozsahu použite teoretickú hodnotu  $T_m$ . Keď určíte, kde sa produkt bude topiť, zmenšite oblasť topenia tak, aby nebola väčšia ako 10 °C. Začiatok topenia musí nastať 5 °C pred prvým prechodom k topeniu. Štandardná hodnota je nastavená na 0,1 °C s retenciou na 2 sekundy pri každom kroku. Minimálna hodnota prechodu je 0,05 °C s jednosekundovou retenciou pri každom kroku. Údaje sa automaticky zozbierajú do HRM kanála. Štandardne sa tiež uskutoční automatická optimalizácia výťažku. Softvér vyhľadá optimálne nastavenia výťažku tak, aby najvyššie hodnota fluorescence nebola na stupnici do 100 vyššia ako 70 jednotiek. Pamätajte, že hodnota sa môžu zvýšiť na maximálne 100.

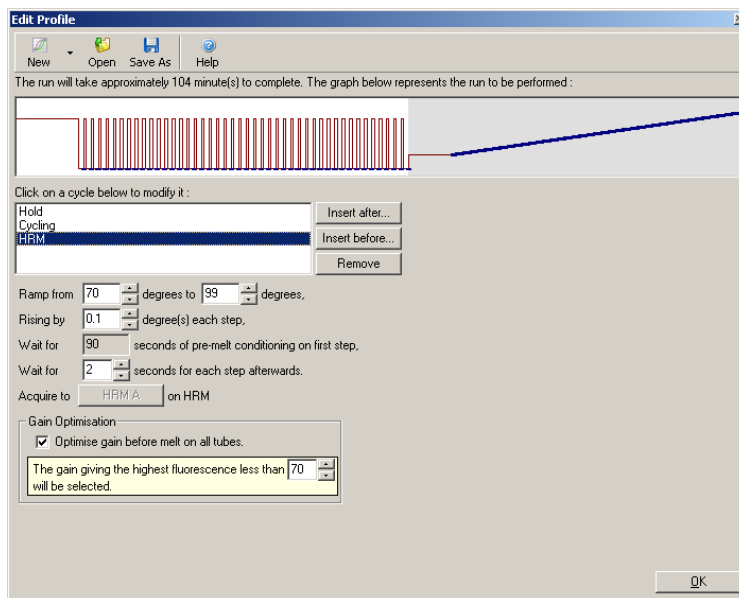


9. Voliteľné: nastavte automatickú optimalizáciu výťažku. To platí len pre krok amplifikácie v reálnom čase a nastavenie platí pre zelený kanál. Kliknite na tlačidlo **Optimize Acquiring** (Optimalizovať zber) (pre optimalizáciu len tých kanálov, ktoré sa používajú počas cyklu). Optimalizácia sa najlepšie uskutoční tesne pred prvým krokom zberu, takže zaškrtnite políčko **Perform Optimization Before First Acquisition** (Vykonať optimalizáciu pred prvým zberom). Odporúčaný rozsah fluorescence pozadia je interkalačné farbivá je medzi 1 a 3 fluorescenčnými jednotkami. Na zmenu tohto nastavenia kliknite na názov kanálu, aby ste ho vybrali v zozname, a potom kliknite na tlačidlo **Edit** (Upraviť).

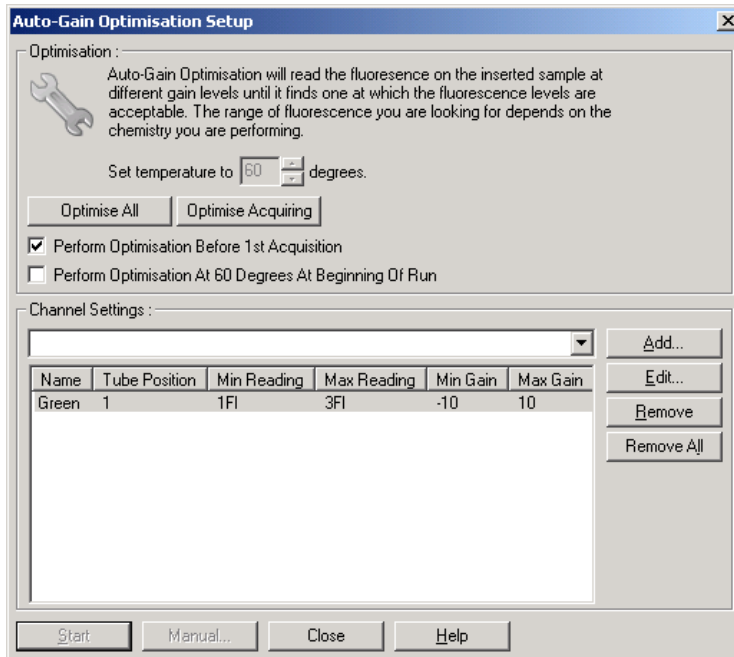

10. Cyklus spustíte kliknutím na možnosť **Start Run** (Spustiť cyklus) a uložte súbor cyklu do svojho počítača.

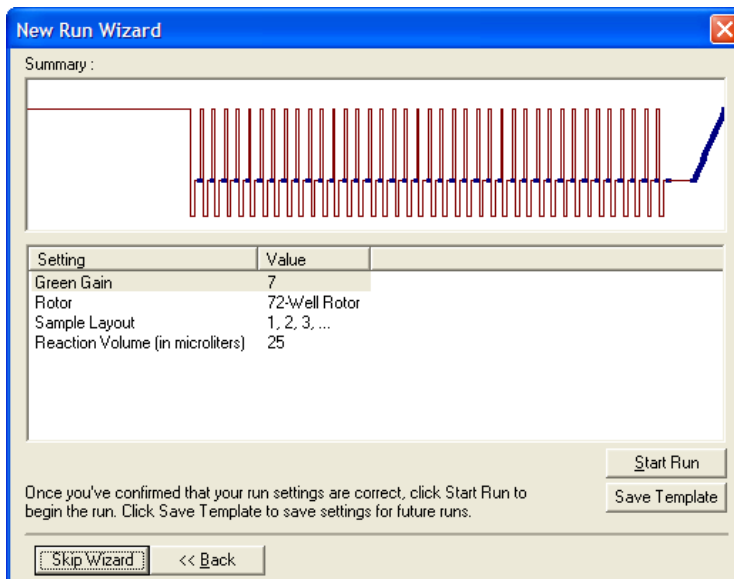


11. Upravte názvy vzoriek (voliteľné). Názvy vzoriek je možné upraviť počas alebo po cykle.

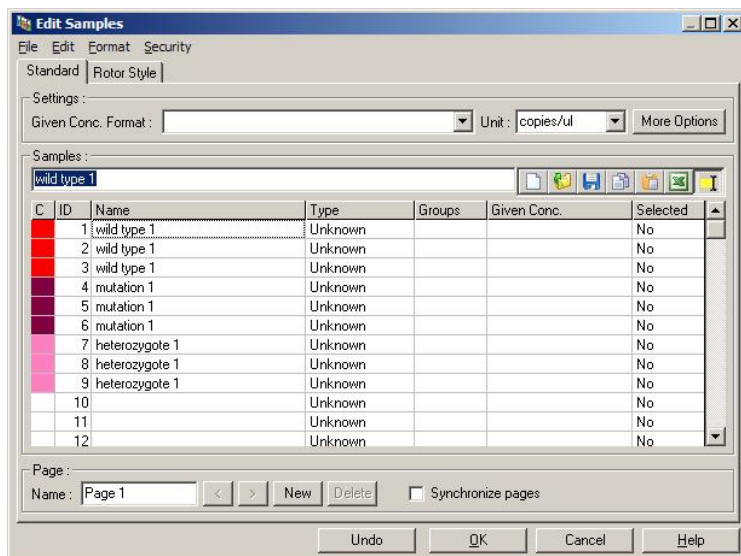

## 10.8 Analýza údajov z real-time PCR

Analýza údajov z real-time PCR pred analýzou údajov z HRM je výhodou. Údaje z real-time PCR môžu zvýrazniť zle prebiehajúce testy. Identifikovanie týchto mimoriadnych hodnôt a ich vyfiltrovanie z následnej analýzy HRM do veľkej miery ovplyvní celkovú účinnosť analýzy HRM, pretože analyzovanie PCR produktu nízke kvality bude mať za následok zlé výsledky HRM. Odporúčame analyzovať kvantitatívne údaje real-time PCR takto.

1. Zanalyzujte real-time údaje pomocou možnosti **Quantitation** (Kvantifikácia) z okna **Analysis** (Analýza). Ak sú hodnoty  $C_T$  30 alebo vyššie, predpokladá sa, že príslušné reakcie sa amplifikovali príliš neskoro. Tieto vzorky sa musia analyzovať ako podozrivé alebo sa musia vyradiť z analýzy ako mimoriadne vzorky. Neskorá amplifikácia je zvyčajne spôsobená príliš malým začiatočným množstvom templátu a/alebo vysokými úrovňami degradácie vzorky.
2. Vyhodnoťte úroveň fluorescence v koncovom bode. Ak je fluorescence v niektorom grafe amplifikácie nízka v porovnaní s väčšinou grafov v skupine údajov, vynechajte tieto vzorky z analýzy, aj keď je hodnota  $C_T$  menšia ako 30. Nízka fluorescence v koncovom bode môže naznačovať nesprávne množstvo farbiva, nesprávne úrovne komponentov reakcie (ako napríklad primérov) alebo činnosť inhibítorov.
3. Možnosť **Comparative Quantitation** (Komparatívna kvantifikácia) v okne **Analysis** (Analýza) využite na zistenie efektívnosti reakcie každej vzorky. Ak nie je efektívnosť podobná ostatným reakciám v experimente alebo je nižšia ako približne 1,4, reakciu vynechajte ako mimoriadnu reakciu.

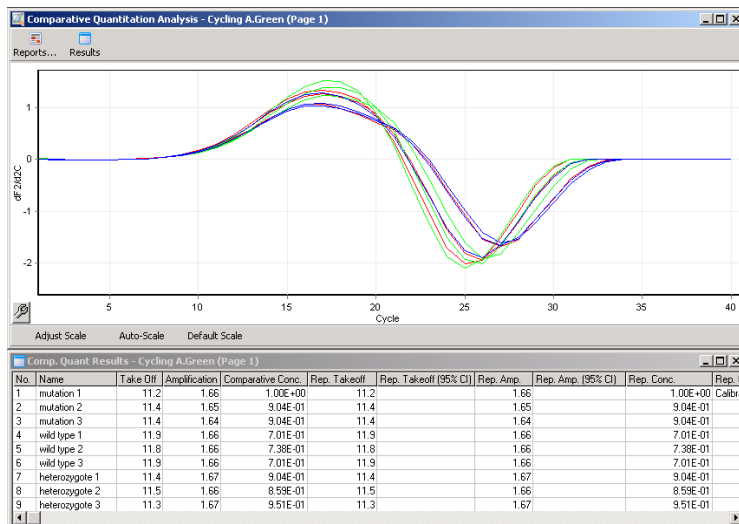

**Výsledky komparatívnej kvantifikácie.** Efektívnosť reakcie je zobrazená v stĺpci „Amplification“ (Amplifikácia) ako skóre z 2 (2 = 100 % efektívnosť).

**Poznámka:** Ak máte podozrenie na prítomnosť primérových dimérov alebo nešpecifických produktov, vyhodnoťte reakcie tak, že nakreslíte derivačný graf pomocou možnosti **Melt** (Topenie) v okne **Analysis** (Analýza). Presvedčte sa, že existuje jedno maximum, ktoré znázorňuje jeden produkt. Ak je to možné, presvedčte sa pomocou gélu, že ide o produkt s jednou amplifikáciou. Ak je produktov viac ako jeden, mala by sa reakcia opakovať alebo znova optimalizovať.

## 10.9 Analýza HRM údajov


Analýza HRM umožňuje vizuálne aj automatické skúmanie genotypov. Výsledky je možné si prezrieť buď ako normalizovaný graf topenia alebo graf s rozdielmi. Normalizované krivky predstavujú základnú reprezentáciu rôznych genotypov na základe posunu krivky (pre homozygoty) a zmenu tvaru krivky (pre heterozygoty).

Grafy rozdielov sú pomôckou pre vizuálnu interpretáciu. Zobrazujú rozdiel fluorescence vzorky od vybraného kontrolného roztoku pri každom prechode teploty. Grafy s rozdielmi poskytujú alternatívny pohľad na rozdiely medzi prechodmi krivky topenia.


**Poznámka:** Analýzy prvej derivácie krivky topenia (ktorá sa používa v štandardnej možnosti **Melt** (Topenie) v okne **Analysis** (Analýza)) sa považuje za nevhodnú pre analýzu HRM. To je spôsobené tým, že údaje pridávajú umelý šum a sťažujú interpretáciu údajov.

Tieto kroky popisujú analýzu výsledkov HRM pomocou softvéru Rotor-Gene Q.

1. V okne **Analysis** (Analýza) vyberte možnosť **HRM** (HRM).

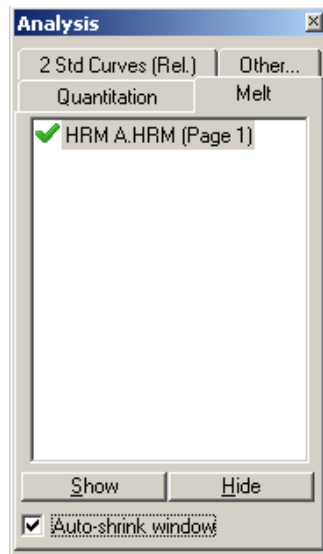


2. Zobrazí sa okno s nespracovanými údajmi, normalizovaný graf a výsledky. Okno s nespracovanými údajmi umožňuje úpravu regiónov normalizácie. Normalizácia umožňuje porovnanie všetkých kriviek s rovnakou začiatočnou a koncovou úrovňou signálu fluorescence ako pomôcku pri interpretácii a analýze. Sú k dispozícii dva kurzory na región, ktorá sa automaticky nachádzajú na koncoch krivky. Dátové body s rámci regiónov sa používajú na normalizovanie fluorescence (len os x) pre začiatok (región) 2 graf topenia. Údaje mimo nastavených regiónov sa ignorujú. Regióny nastavte tak, aby zahŕňali reprezentatívne základné údaje pre fázu pred a po topení. Rozšírenie regiónov (kliknutím a ich pretiahnutím) umožňuje softvéru nastaviť sklon základnej čiary. Na efektívne normalizovanie kriviek nerozširujte regióny normalizácie do fázy topenia.


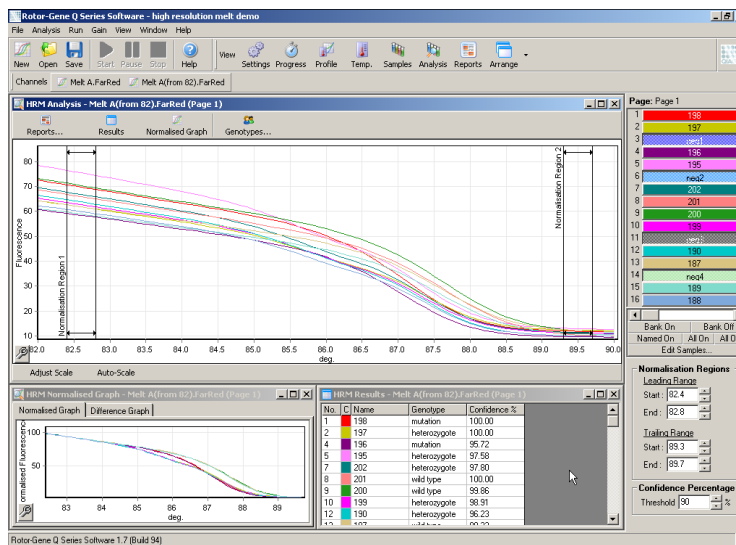


**Poznámka:** Odporúčame pohybovať kurzormi len vtedy, ak sa chcete vyhnúť oblastiam krivky topenia. Pohyb kurzorov smerom k prechodom fázy topenia môže ovplyvniť subtrahčné grafy a percentuálne hodnoty spoľahlivosti.


3. V okne **Normalised Graph** (Normalizovaný graf) sa zobrazia normalizované krivky topenia. Vzorky je možné prezerat' aj ako graf rozdielov v porovnaní s jedným z kontrolných roztokov.

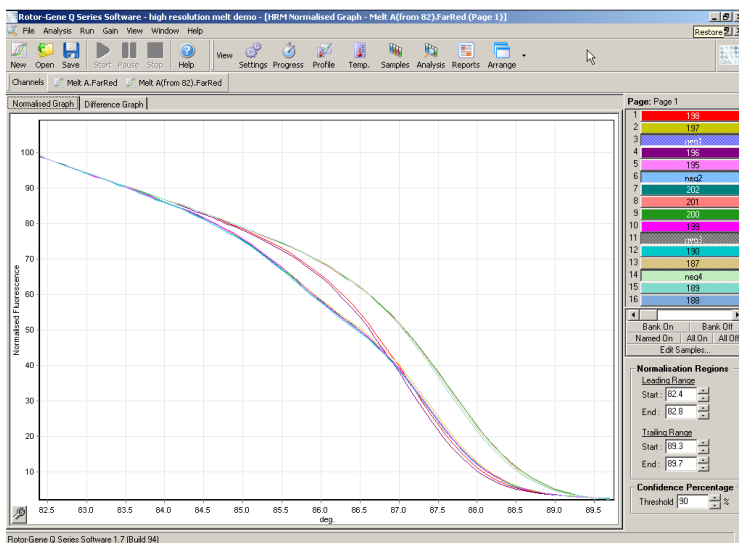

4. Na definovanie genotypov kliknite na tlačidlo **Genotypes...** (Genotypy...). Zadaťte názov každej kategórie genotypu a vyberte reprezentatívnu vzorku pre každú vzorku v zozname.

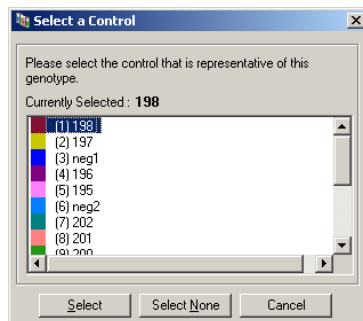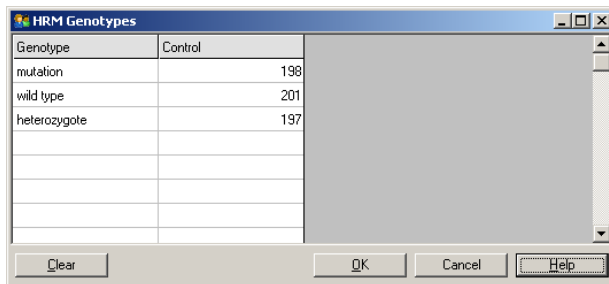

5. Vyberte kartu **Difference graph** (Graf rozdielov) a pozrite si graf rozdielov. Potom si v rozbaľovacej ponuke na vrchu okna vyberte genotyp, s ktorým chcete porovnať všetky ostatné vzorky. V príklade nižšie sú zobrazené všetky vzorky zakreslené ako odrátané z priemerného grafu všetkých vzoriek označených ako **Mutation 1** (Mutácia 1).

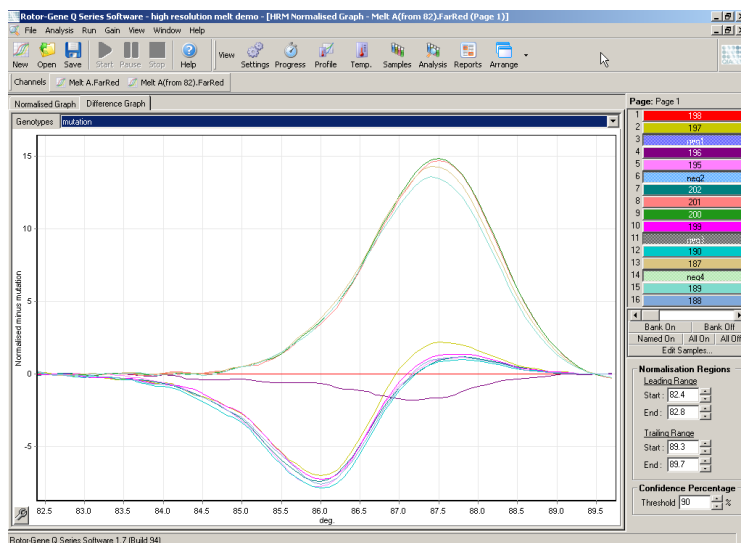

6. Softvér automaticky zaradí genotypy do okna **Results** (Výsledky). Hodnota spoľahlivosti umožňuje kontrolu jednotnosti automaticky zaradených výsledkov. Prahovú hodnotu, nad ktorou dochádza k automatickému zaradeniu, je možné upraviť. Vzorky, ktoré spadajú pod nastavenú prahovú hodnotu sa označia ako odchýlky a bližšie sa preskúmajú alebo znova otestujú.

No.	C	Name	Genotype	Confidence %
1	198	mutation	mutation	100.00
2	197	heterozygote	heterozygote	100.00
4	196	mutation	mutation	95.72
5	195	heterozygote	heterozygote	97.58
7	202	heterozygote	heterozygote	97.80
8	201	wild type	wild type	100.00
9	200	wild type	wild type	99.86
10	199	heterozygote	heterozygote	98.91
12	190	heterozygote	heterozygote	96.23
13	187	wild type	wild type	99.23
15	189	wild type	wild type	97.59

**Normalisation Regions**

**Leading Range**  
 Start: 82.4  
 End: 82.8

**Trailing Range**  
 Start: 89.3  
 End: 89.7

**Confidence Percentage**  
 Threshold: 90 %



# 11 Riešenie problémov

Táto časť obsahuje informácie o postupe v prípade, že sa počas používania systému Rotor-Gene Q MDx System dôjde ku chybe.

Ak je potrebná ďalšia pomoc, obráťte sa na technický servis spoločnosti QIAGEN pomocou nižšie uvedených kontaktných informácií:

Webová stránka: **support.qiagen.com**

Pri kontaktovaní technického servisu spoločnosti QIAGEN kvôli chybe týkajúcej sa softvéru Rotor-Gene Q MDx majte na pamäti kroky vedúce k chybe a všetky informácie, ktoré sa zobrazujú v dialógových oknách. Tieto informácie pomôžu technickému servisu spoločnosti QIAGEN vyriešiť problém.

Pri kontaktovaní technického servisu spoločnosti QIAGEN kvôli chybám si pripravte nasledujúce informácie:

- sériové číslo, typ a verzia softvéru Rotor-Gene Q MDx,
- verzia softvéru (ak platí),
- okamih, kedy sa chyba vyskytla prvýkrát,
- frekvencia výskytu chýb (t. j. občasná alebo trvalá chyba),
- detailný popis chyby,
- fotografia chyby, ak je to možné,
- kópia súborov protokolu.

Tieto informácie vám a vášmu špecialistovi technického servisu spoločnosti QIAGEN pomôžu pri najefektívnejšom riešení vášho problému.

**Poznámka:** Informácie o najnovšej verzii softvéru a verzii protokolu nájdete na adrese **www.qiagen.com**. V niektorých prípadoch môžu byť na riešenie konkrétnych problémov dostupné aktualizácie.

## 11.1 Archívy záznamov

Softvér vedie vo svojom archíve záznamov neupravený záznam o každom cykle spolu s diagnostickými informáciami. Pomocou možnosti **Help** (Pomoc), **Send Support Email** (Odoslať e-mail pre podporu) môžete odoslať e-mail spolu so všetkými potrebnými diagnostickými informáciami technickej podpore spoločnosti QIAGEN (pozri časť 6.12.1).

V rámci šetrenia priestoru na disku sa ukladá len archív záznamov posledných 60 cyklov. Staršie archívy záznamov sa prepíšu po vytvorení nového archívu.

## 11.2 Chyby hardvéru a softvéru

### 11.2.1 Riešenie problémov s HRM

#### Komentáre a návrhy

##### Cyklus HRM sa nedá spustiť

Model prístroja Rotor-Gene Q MDx nie je vybavený možnosťou HRM Kontaktujte svojho miestneho zástupcu spoločnosti QIAGEN.

##### Nezískavajú sa žiadne údaje z HRM

Nesprávne nastavenie Skontrolujte nastavenia filtra.  
Skontrolujte, či je rotor správneho typu.  
Skontrolujte, či sa použili správne reagensy.  
Skontrolujte, či sa reakcia pripravila správne.  
Spustíte experiment s pozitívnym kontrolným roztokom (t. j. test, o ktorom sa vie, že priniesie výsledky).

##### Grafy vyzerajú kľukato

Nedostatočná alebo žiadna amplifikácia Skontrolujte, či sa použili správne protokoly a reagensy. Na analýzu HRM odporúčame použiť súpravy QIAGEN.  
Skontrolujte, či sa reakcia pripravila správne.  
Skontrolujte podmienky cyklovania.  
Skontrolujte začiatočnú kvalitu a kvantitu templátu. Na prípravu vzorky odporúčame použiť súpravy QIAGEN.

##### Amplifikácia alebo grafy topenia sú saturevané

Príliš vysoko nastavený výťažok Použite možnosť **Auto-Gain Optimisation** (Optimalizácia automatického výťažku) (pozri strana 61).

##### Percentuálne hodnoty spoľahlivosti sa zmenili

Regióny normalizácie sa presunuli kliknutím a potiahnutím Regióny normalizácie presúvajte len ak je to potrebné na to, aby ste sa vyhli častiam krivky topenia.

##### V údajoch sa nachádzajú mimoriadne hodnoty

Nekonzistentná príprava reakcie Skontrolujte, či sa použili správne reagensy.  
Skontrolujte, či sú použité skúmavky rovnaké.  
Inhibitory prítomné vo vzorke Skontrolujte, že sa pre všetky vzorky použila rovnaká hlavná zmes.  
Príliš malý alebo degradovaný templát Skontrolujte začiatočnú kvalitu a kvantitu templátu.

## 11.3 Chybové a výstražné hlásenia

### 11.3.1 Všeobecné chyby prístroja

Chybové hlásenie	Komentáre a návrhy
<b>Can't open the serial port &lt;COMPORT&gt;</b> (Nie je možné otvoriť sériový port <COMPORT>)	<p>Táto chyba sa objaví pri spustení softvéru, ak softvér nedokáže komunikovať s prístrojom cez nakonfigurovaný port COM. Táto chyba je často spôsobená chybnými káblami, chybnými sériovými portami, chybnými USB portami, problémom s ovládačom USB alebo problémom s ovládačom meniča USB na sériový port.</p> <p>Káble znova pripojte alebo vymeňte. Preinštalujte príslušné ovládače. Spustíte softvér v režime <b>Virtual mode</b> (Virtuálny režim) a z ponuky <b>File</b> (Súbor) vyberte tlačidlo <b>Setup/Auto-Detect</b> (Nastavenie/automatická detekcia), aby ste resetovali nakonfigurovaný port COM.</p>
<b>Chamber lid open</b> (Otvorené veko komory) Could not continue run; the chamber lid was opened during a run. Please reset the machine, and restart the software. (V cykle nie je možné pokračovať, veko komory sa počas cyklu otvorilo. Resetujte stroj a reštartujte softvér.)	<p>Táto chyba sa vyskytne vtedy, keď softvér zistí otvorené veko v strede cyklu.</p> <p>Resetujte stroj a reštartujte softvér.</p>
<b>Chamber lid open</b> (Otvorené veko komory) The instrument chamber lid is open. Please close the lid and then click Continue. (Veko komory prístroja je otvorené. Zatvorte veko a potom kliknite na Continue (Pokračovať).)	<p>Táto chyba sa vyskytne, keď sa používateľ pokúsi spustiť cyklus, keď je veko prístroja otvorené.</p> <p>Zatvorte veko a potom kliknite na <b>Continue</b> (Pokračovať).</p>
<b>Communication corrupted</b> (Narušené komunikácia)	<p>Táto chyba sa vyskytne, keď údaje prijaté z prístroja nezodpovedajú očakávanému vzoru.</p> <p>Chybu musí ďalej prešetriť terénny servisný špecialista spoločnosti QIAGEN, aby diagnostikoval problém s prístrojom.</p> <p>Kontaktujte svojho predajcu alebo technickú podporu spoločnosti QIAGEN.</p>
<b>Communication out of sequence</b> (Komunikácia mimo sekvencie) Instrument has received data from the machine that is out of sequence. (Prístroj prijal údaje zo stroja, ktorý je mimo sekvencie.)	<p>Táto chyba sa vyskytne, keď údaje prijaté z prístroja nie sú v správnom poradí.</p> <p>Chybu musí ďalej prešetriť terénny servisný špecialista spoločnosti QIAGEN, aby diagnostikoval problém s prístrojom.</p> <p>Kontaktujte svojho predajcu alebo technickú podporu spoločnosti QIAGEN.</p>
<b>Communication protocol error</b> (Chyba komunikačného protokolu) A communication protocol error occurred with this run. (V tomto cykle sa vyskytla chyba komunikačného protokolu.)	<p>Táto chyba sa vyskytne, keď sa komunikačný protokol nakonfigurovaný vo firmvére nezhoduje s očakávaným protokolom.</p> <p>Chybu musí ďalej prešetriť terénny servisný špecialista spoločnosti QIAGEN, aby diagnostikoval problém s komunikačným protokolom alebo prístrojom.</p>
<b>Detector motor jam, stopped machine</b> (Zadretie motora detektora, stroj stojí)	<p>Táto chyba sa vyskytne, keď sa prístroj Rotor-Gene Q MDx spustí hneď po dodaní v chladných podmienkach.</p> <p>V tomto prípade nechajte prístroj aklimatizovať sa teplote na minimálne hodinu predtým, ako ho zapnete.</p> <p>Ak chyba pretrváva, kontaktujte svojho predajcu alebo technickú podporu spoločnosti QIAGEN.</p>

## Chybové hlásenie

## Komentáre a návrhy

### Fatal hardware malfunction (Fatálna porucha hardvéru)

The instrument detected that there was a fatal hardware malfunction. Do not attempt to re-use the machine until the machine has been serviced by your distributor. (Prístroj zistil, že nastala fatálna porucha hardvéru. Nepokúšajte sa prístroj znova použiť, kým neprejde servisom predajcu.)

### Machine error (Chyba stroja)

This run was stopped as machine errors occurred that could not be recovered from. Please contact your distributor if this occurs again, attaching a support archive file. (Tento cyklus sa zastavil, pretože došlo ku chybe, ktorú nie je možné odstrániť. Ak sa chyba opakuje, kontaktujte svojho predajcu a pošlite mu súbor archívu podpory.)

### Machine unplugged (Stroj odpojený)

The instrument is not responding and failed with the message <ERROR MESSAGE >. This is an unrecoverable failure, please reset the instrument and restart the software. (Prístroj neodpovedá a nastala porucha s hlásením <CHYBOVÉ HLÁSENIE>. Toto je neopraviteľná porucha, prístroj resetujte a softvér reštartujte.)

### Machine unplugged (Stroj odpojený)

The instrument is not connected to your computer on <PORT NAME>. Reconnect the serial cable to the back of the computer and then click Continue. (Prístroj nie je pripojený k vášmu počítaču <NÁZOV PORTU>. Znova pripojte sériový kábel k zadnej časti počítača a potom kliknite na Continue (Pokračovať).)

### Object variable or with block variable not set (Nie je nastavená cieľová premenná alebo celková premenná)

### Rotor speed failure (Porucha rýchlosti rotora)

Time out while setting the rotor speed. (Prerušenie počas nastavovania rýchlosti motora).

Táto chyba sa vyskytne vtedy, keď softvér zistí fatálnu poruchu hardvéru a aktivuje ochranný postup na vypnutie prístroja.

Prístroj okamžite vypnite a kontaktujte svojho predajcu alebo technickú podporu spoločnosti QIAGEN.

Táto chyba vznikne, keď softvér zistí chyby na prístroji, ktoré nie je možné odstrániť. Softvér zastavil cyklus.

Skúste iný cyklus. Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu spoločnosti QIAGEN alebo technickú podporu a poskytnite jej súbor archívu pre podporu.

Táto chyba vznikne vtedy, ak prístroj nekomunikuje so softvérom po definovanom intervale prerušenia. Často je spôsobená poruchou prístroja alebo nadmernou aktivitou z počítača, ktorá spôsobí stratu balíka.

Bežné príčiny súvisiace so softvérom zahŕňajú úlohy zaťažujúce procesor, ako napríklad antivírusová ochrana alebo plánované skenovanie antivírusom, bezdrôtové karty alebo infračervené karty.

Deaktivujte alebo odinštalujte príslušný softvér/úlohu s vysokými požiadavkami na procesor.

Resetujte prístroj a reštartujte softvér.

Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu alebo technickú podporu spoločnosti QIAGEN.

Táto chyba vzniká, keď dôjde k strate sériovej alebo USB komunikácie s prístrojom.

Znova pripojte USB kábel k zadnej časti počítača a potom kliknite na tlačidlo **Continue** (Pokračovať).

Táto chyba vznikne pri spustení softvéru, ak došlo k poškodeniu prednastaveného templátu experimentu. To sa môže stať vtedy, ak sa softvér/počítač vypne bez správneho ukončenia, napríklad počas výpadku napájania.

Vymažte súbor **C:\Program Files\Rotor-Gene Q Software\Templates\normal.ret** a potom softvér reštartujte.

Táto chyba vznikne, keď sa softvér pokúsil nastaviť rýchlosť rotora a nepodarilo sa mu nastaviť cieľovú rýchlosť v rámci obdobia prerušenia.

Chybu musí ďalej prešetriť terénny servisný špecialista spoločnosti QIAGEN, aby diagnostikoval problém s prístrojom.

Kontaktujte svojho predajcu alebo technickú podporu spoločnosti QIAGEN.

## Chybové hlásenie

## Komentáre a návrhy

### **Serial port in use** (Sériový port sa používa)

The serial port is currently being used by another application. Close any applications such as communications or synchronization software and then retry.“ (Sériový port momentálne používa iná aplikácia. Zatvorte všetky aplikácie, ako napríklad komunikačný alebo synchronizačný softvér a potom to skúste znova.)

Táto chyba sa vyskytne, keď sa softvér pokúsi pripojiť k stroju na nakonfigurovanom porte COM, keď tento port používa iný softvér.

Zatvorte všetky aplikácie, ako napríklad komunikačný alebo synchronizačný softvér a potom to skúste znova.

### **Shutdown timeout** (Prerušenie pri vypnutí)

The instrument has exceeded the expected time to shutdown. Please reset the machine, and reset the software. (Prístroj prekročil očakávaný čas na vypnutie. Zariadenie a softvér resetujte.)

K tejto chybe dochádza vtedy, keď softvér vydal príkaz na vypnutie prístroja a zariadenia neustále posiela späť údaje aj po očakávanom období respira.

Resetujte stroj a reštartujte softvér.

### **Temperature protection activated** (Aktivovaná tepelná ochrana)

The instrument detected that the chamber temperature increased above a safe level. It has therefore entered a self-protection mode. Please turn off the instrument and contact your distributor if the problem persists. (Prístroj zistil, že teplota komory vystúpila nad bezpečnú úroveň. Preto prešiel do režimu vlastnej ochrany. Prístroj vypnite a ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.)

K tejto chybe dochádza vtedy, keď softvér zistil, že teplota komory sa zvýšila nad bezpečnú úroveň, a preto sa aktivoval proces samoochrany.

Prístroj okamžite vypnite a kontaktujte svojho predajcu alebo technickú podporu spoločnosti QIAGEN.

### **Thermistor is open** (Termistor je otvorený)

The instrument detected that the thermistor is open, and so to prevent damage to the machine, it has been turned off. Please contact your distributor if this occurs again. (Prístroj zistil, že termistor je otvorený a aby sa predišlo poškodeniu zariadenia, došlo k jeho vypnutiu. Ak sa problém vyskytne znova, kontaktujte svojho predajcu.)

K tejto chybe dochádza vtedy, keď softvér zistil, že termistor je otvorený, a preto nedokáže prečítať teplotu; softvér potom aktivuje proces samoochrany, aby zariadenie vypol.

Prístroj okamžite vypnite a kontaktujte svojho predajcu alebo technickú podporu spoločnosti QIAGEN.

### **Unrecoverable errors occurred** (Došlo k neodstrániteľným chybám)

This run was stopped as machine errors occurred that could not be recovered from. Please contact your distributor if this occurs again, attaching a support archive file. (Tento cyklus sa zastavil, pretože došlo ku chybe, ktorú nie je možné odstrániť. Ak sa chyba opakuje, kontaktujte svojho predajcu a pošlite mu súbor archívu podpory.)

K tejto chybe dochádza v strede cyklu, keď softvér urobil všetko možné, ale všetky tieto pokusy zlyhali.

Chybu musí ďalej prešetriť terénny servisný špecialista spoločnosti QIAGEN, aby diagnostikoval problém s prístrojom.

Kontaktujte svojho predajcu alebo technickú podporu spoločnosti QIAGEN.

### 11.3.2 Hlásenia softvéru Rotor-Gene Q

Toto je zoznam hlásení týkajúcich sa používania, varovania a ostatných hlásení, ktoré sa môžu zobrazit' v softvéri Rotor-Gene Q počas prevádzky hardvéru a softvéru. Každá časť tohto hlásenia, ktorá je variabilná, t. j. charakteristické popisy chyby, je uvedená v zátvorkách (napr. < ERROR DESCRIPTION > (POPIS CHYBY)).

#### Text hlásenia

##### Všeobecné hlásenia

- 1 A raw channel already exists for this page. If you would like to recreate this page, you must first delete the raw channel via the Options button and then try again. (Nespracovaný kanál pre túto stranu už existuje. Ak chcete túto stranu vytvorit' znovu, musíte najprv vymazať nespracovaný kanál pomocou tlačidla Options (Možnosti) a potom to skúsiť znova.)
- 2 A serious problem has occurred which requires shutting down the software. After you click OK, your current work will be saved, and the machine will be turned off, if possible. If this problem persists, please contact your distributor. (Vyskytol sa vážny problém, ktorý vyžaduje vypnutie softvéru. Po kliknutí na OK sa vaša súčasná práca uloží a zariadenia sa vypne, ak je to možné. Po kliknutí na OK sa vaša súčasná práca uloží a zariadenia sa vypne, ak je to možné. Ak tento problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.)
- 3 Cannot delete this page. There must always be at least one sample page. (Nie je možné vymazať túto stranu. Vždy musí existovať aspoň jedna strana pre vzorky.)
- 4 Can't connect to instrument on serial port <COMPORT>. Check the machine is correctly plugged into the back of the computer, then retry. (Nie je možné sa pripojiť k prístroju na sériovom porte <COMPORT>. Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené do zadnej časti počítača a potom to skúste znova.)
- 5 Can't open the serial port <COMPORT> to connect to the instrument. Check you do not have any communications software open, then retry. (Nie je možné otvoriť sériový port <COMPORT> na pripojenie sa k prístroju. Skontrolujte, či nie je otvorený nejaký komunikačný softvér a potom to skúste znova.)
- 6 Could not save to run because some data on the form was invalid. Please check your entries then try again. (Nebolo možné uložiť cyklus, pretože niektoré údaje na formulári sú neplatné. Skontrolujte svoje záznamy a skúste to znova.)
- 7 Couldn't save file. Confirm the disk has enough space and that it is free of errors. (Nebolo možné uložiť súbor. Potvrďte, že na disku je dostatok miesta a žiadne chyby.)
- 8 E-mail application could not be started. Confirm that it has been correctly installed on your computer. (E-mailová aplikácia nebolo možné spustiť. Overte, či bola na vašom počítači nainštalovaná správne.)
- 9 Encountered an error during run: <ERROR DESCRIPTION>. The run will continue, and a message will be logged in the messages tab of Run Info. (Počas cyklu došlo ku chybe: <POPIS CHYBY>. Cyklus bude pokračovať a hlásenie sa zaznamená do karty hlásení možností Run Info (Informácie o cykle.)).
- 10 Instrument was not detected. Please ensure you have correctly connected the instrument, and that the instrument is turned on. (Prístroj nebolo možné detegovať. Skontrolujte, či je prístroj správne pripojený, a či je zapnutý.)
- 11 Logging is currently disabled due to a previous error. Archived logs cannot be viewed until the software has been restarted. (Zaznamenávanie je momentálne deaktivované z dôvodu predchádzajúcej chyby. Archivované záznamy nie je možné prezerat', kým sa softvér nerešartuje.)
- 12 Not all samples could be normalised as the fluorescent level was too low. (Nebolo možné normalizovať všetky vzorky, pretože úroveň fluorescencie bola príliš nízka.)
- 13 Only runs performed with the same rotor as the current run may be imported. (Importovať je možné len cykly s rovnakým rotorom ako je súčasný cyklus.)
- 14 Please note that log files for the current run will not be available until it has completed. (Nezabudnite, že súbory denníka pre aktuálny cyklus nebudú dostupné, kým sa cyklus neskončí.)
- 15 Please type valid number of times to repeat. It should be more than 0. (Uveďte platný počet opakovaní. Mal by byť väčší ako 0.)
- 16 Problem encountered while updating log data. Logging has been disabled, but will be reenabled on the next run. (Počas aktualizácie údajov denníka sa vyskytol problém. Zaznamenávanie sa deaktivovalo, ale znova aktivuje pri ďalšom cykle.)
- 17 Run file signing ensures the integrity of your run results. Information about a run's signature can be found in the Run Info window. (Podpis súboru cyklu umožňuje celistvosť výsledkov vášho cyklu. Informácie o podpise cyklu nájdete v okne Run Info (Informácie o cykle).)

## Text hlásenia

- 18 Sample ID is locked. Cannot paste over locked samples. (ID vzorky je zamknuté. Nie je možné vkladať do zamknutých vzoriek.)
- 19 TeeChart Office has not been installed on this computer. Please re-install the Rotor-Gene software. (Program TeeChart Office sa na tomto počítači nenainštaloval. Preinštalujte softvér Rotor-Gene.)
- 20 The COM port configured for the instrument is not selected. You must select a COM port. (Port COM nakonfigurovaný pre prístroj nie je zvolený. Musíte vybrať port COM.)
- 21 The loaded run file contains a signature which does not match the file contents. This means the file has either been corrupted, or tampered with since it was written by the Rotor-Gene software. (Načítaní súbor cyklu obsahuje podpis, ktorý sa nezhoduje s obsahom súboru. To znamená, že súbor je buď poškodený alebo došlo k neoprávnenému zásahu do súboru od jeho zápisu softvérom Rotor-Gene.)
- 22 The loaded run file has no signature. The contents of this file cannot be guaranteed. (Načítaný súbor cyklu nemá žiadny podpis. Obsah tohto súboru nie je možné garantovať.)
- 23 The Machine serial number is not valid. Serial numbers must be at least 6 digits long. (Sériové číslo zariadenie je neplatné. Sériové čísla musia mať minimálne 6 číslic.)
- 24 The machine will now be cooled to <TEMPERATURE> degrees. The chamber and surfaces will still be very hot when opening the machine. Please exercise due caution and wear protective gloves if touching any of the surfaces or tubes. (Zariadenie sa teraz môže schladiť na teplotu <TEPLOTA> stupňov. Komora a povrchy budú pri otvorení zariadenia stále veľmi horúce. Pri dotýkaní sa povrchov alebo skúmaviek buďte opatrní a noste ochranné rukavice.)
- 25 The regional settings for your computer are conflicting. Ensure your currency and numeric decimal placeholders are matching. (Regionálne nastavenia pre váš počítač sú protichodné. Náhradné znaky pre menu a desatinné čísla sa musia zhodovať.)
- 26 The serial number entered in the welcome screen <SERIAL NUMBER1> does not match the serial number stored in the attached machine <SERIAL NUMBER2>. The computer's serial number has now been updated to match the connected machine. (Zadané sériové číslo na úvodnej obrazovke <SÉRIOVÉ ČÍSLO 1> sa nezhoduje so sériovým číslom uloženým v pripojenom zariadení <SÉRIOVÉ ČÍSLO 2>. Sériové číslo počítača sa aktualizovalo tak, aby sa zhodovalo s pripojeným zariadením.)
- 27 There was a problem communicating with the communication board. You should reboot the computer and then retry. (Vyskytol sa problém s komunikáciou s komunikačnou doskou. Počítač reštartujte a skúste to znova.)
- 28 There was a timeout attempting to talk to the instrument. Check it is correctly plugged in. (Pri pokuse o komunikáciu s prístrojom došlo k prerušeniu. Skontrolujte, či je prístroj pripojený správne.)
- 29 This feature cannot be used in virtual mode. (Táto funkcia sa nedá použiť vo virtuálnom režime.)
- 30 This profile file was created in a more recent version of the Rotor-Gene software. Certain aspects may not load correctly. (Tento súbor profilu bol vytvorený v novšej verzii softvéru Rotor-Gene. Niektoré aspekty sa nemusí načítať správne.)
- 31 This run file was created in a more recent version of the Rotor-Gene software. Certain aspects of the run may not load correctly. (Tento súbor cyklu bol vytvorený v novšej verzii softvéru Rotor-Gene. Niektoré aspekty sa nemusí načítať správne.)
- 32 This sample file was created in a more recent version of the Rotor-Gene software. Certain aspects may not load correctly. (Tento súbor profilu bol vytvorený v novšej verzii softvéru Rotor-Gene. Niektoré aspekty sa nemusí načítať správne.)
- 33 This software will perform basic simulation of a machine for training and demonstration purposes. You can disable this setting via the Setup screen, accessible from the File menu. (Tento softvér vykoná základnú simuláciu zariadenia na účely školenia a demonštrácie. Toto nastavenie môžete deaktivovať v ponuke File (Súbor).)
- 34 This template was created in a more recent version of the Rotor-Gene software. Certain aspects of the template may not load correctly. (Tento templát bol vytvorený v novšej verzii softvéru Rotor-Gene. Niektoré aspekty sa nemusí načítať správne.)
- 35 Unable to load this sample file as tube layouts do not match. Load these samples before starting the run. (Nie je možné načítať tento súbor vzorky, pretože rozmiestnenie skúmaviek sa nezhoduje. Vzorky načítajte pred spustením cyklu.)
- 36 Unable to open communications with the machine because another application is already using <COMPORT>. Check you do not have any applications running that use the same serial port, then retry. (Nebolo možné vytvoriť komunikáciu so zariadením, pretože port <COMPORT> už používa iná aplikácia. Skontrolujte, či nebežia aplikácie, ktoré používajú ten istý sériový port a potom to skúste znova.)
- 37 Unrecoverable errors were encountered while attempting to load the file. The file was not loaded. (Počas pokusu o načítanie súboru došlo k neopraviteľnej chybe. Súbor sa nenačítal.)
- 38 You cannot stop the program while the run is in progress. (Program nemôžete spustiť, kým prebieha cyklus.)
- 39 You have insufficient rights to use the software. Please contact the domain administrator to set up groups. (Nemáte dostatočné práva na použitie softvéru. Ak chcete vytvoriť skupiny, kontaktujte správcu domény.)

## Text hlásenia

- 40 You must have performed a quantitation analysis to export samples. (Na exportovanie vzoriek musíte uskutočniť kvantitatívnu analýzu.)
- 41 You must select a COM port before continuing. (Pred pokračovaním musíte vybrať port COM.)
- 42 Your run could not be saved to its default location. On the following window, select an alternative location to save your run. (Váš cyklus nie je možné uložiť do štandardného umiestnenia. V tomto okne zvolte alternatívne umiestnenie na uloženie svojho cyklu.)
- 43 Your settings have been saved. Click OK to close the software. (Vaše nastavenia sa uložili. Kliknite na OK a softvér zatvorte.)
- 44 You must select a rotor before continuing. (Pred pokračovaním musíte zvoliť rotor.)
- 45 You cannot start the run until you tick the checkbox to confirm that the locking ring has been attached. (Cyklus nemôžete spustiť, kým nezaškrtnete políčko, ktorým potvrdíte pripevnenie poistného krúžku.)

### Hlásenia o úprave automatického výťažku

- 46 Manual gain adjustment uses the channels you have defined in your profile. As you have not defined any acquisition points in your profile, you cannot perform manual gain adjustment. (Manuálne nastavenie výťažku používa kanály, ktoré ste definovali vo svojom profile. Keďže ste vo svojom profile nedefinovali žiadne čítacie body, nemôžete vykonať manuálnu úpravu výťažku.)
- 47 The temperature you entered was not saved because it was outside the range of the machine. Enter a valid temperature. (Vami zadaná teplota sa neuložila, pretože bola mimo rozsahu zariadenia. Zadajte platnú teplotu.)

### Hlásenia editora

- 48 Please enter a valid group code. Group codes must be a maximum of 5 characters, and contain no spaces or commas. (Zadajte platný kód skupiny. Kódy skupiny musia mať maximálne 5 znakov a nesmú obsahovať žiadne medzery ani čiarky.)
- 49 Please enter a valid group name. Group names cannot contain commas or be empty. (Zadajte platný názov skupiny. Názvy skupiny nesmú obsahovať čiarky a nesmú byť prázdne.)

### Hlásenia kalibrácie optickej denaturácie

- 50 Unable to set as optical denature point due to calibration failure. Please enter a valid number of seconds to hold. It should be a positive value. (KVôli poruche kalibrácie nie je možné nastaviť bod optickej denaturácie. Zadajte platný počet sekúnd čakania. Počet by mal byť kladná hodnota.)
- 51 A melt peak could not be detected during Optical Denature Calibration. This may be because the incorrect tube was selected for calibration, or that an inappropriate chemistry was used for this sample. A timed step profile was run instead. (Počas kalibrácie optickej denaturácie nebolo možné určiť maximum topenia, to môže byť spôsobené výberom nesprávnej skúmavky na kalibráciu alebo nevhodnými použitými chemickými látkami pre túto vzorku. Namiesto toho sa spustil profil časového kroku.)

### Hlásenia OTV

- 52 You must enter a valid OTV serial number to perform the run. (Na vykonanie cyklu musíte zadať platné sériové číslo OTV.)
- 53 This temperature verification file has been corrupted. Please uninstall and re-install the Rotor-Gene software to correct this error. (Tento súbor verifikácie teploty je poškodený. Na opravenie tejto chyby odinštalujte a znova nainštalujte softvér Rotor-Gene.)
- 54 This run file is not correctly signed. Results cannot be displayed. (Tento súbor cyklu nemá správny podpis. Výsledky sa nedajú zobrazit.)
- 55 You cannot start until you tick the checkbox to confirm that the fluorescent insert has been placed correctly. (K spusteniu nemôže dôjsť, kým nezaškrtnete políčko, ktorým potvrdíte správne umiestnenie fluorescenčnej vložky.)
- 56 This rotor has expired. Please contact your distributor to obtain a replacement. (Expiračná doba rotora uplynula. Kontaktujte svojho predajcu a zakúpte si náhradný rotor.)

### Hlásenia ponuky zabezpečenia

- 57 Could not open the Windows user/group manager. (Nebolo možné otvoriť správcu používateľov/skupín systému Windows.)
- 58 Could not create groups. (Nebolo možné vytvoriť skupiny.)
- 59 Cannot modify access of inbuilt accounts. (Nebolo možné zmeniť prístup do zabudovaných účtov.)

### Ponuka analýzy

- 60 You have only selected one channel for analysis. To select multiple channels, drag a rectangle around the channels you wish to display in the analysis selection window. (Na analýzu ste zvolili len jeden kanál. Na výber viacerých kanálov potiahnutím vytvorte obdĺžnik okolo kanálov, ktoré chcete zobraziť v okne výberu analýzy.)
- 61 You have selected multiple channels for analysis. This analysis technique only allows single channels to be analysed. (Na analýzu ste zvolili niekoľko kanálov. Tento postup analýzy umožňuje len analyzovanie jedného kanálu.)

### Hlásenia merania koncentrácie



## Text hlásenia

- 62 Concentration Measurement performs auto-gain optimisation on the first rotor position. Ensure you have your highest concentration standard in the first rotor position. (Meranie koncentrácie vykonáva optimalizáciu automatického výťažku na prvej pozícii rotora. Na prvej pozícii rotora musí byť štandard s najvyššou koncentráciou.)
- Hlásenia analýzy koncového bodu**
- 63 To use end-point analysis you must have positive and negative controls in each channel. To define these controls click OK. (Na použitie analýzy koncového bodu musíte mať v každom kanáli pozitívne a negatívne kontrolné roztoky. Na definovanie týchto kontrolných roztokov kliknite na OK.)
- 64 You have not defined any positive controls. You must define positive controls for each channel you are analysing. (Nedefinovali ste žiadne pozitívne kontrolné roztoky. Pre každý analyzovaný kanál musíte definovať pozitívne kontrolné roztoky.)
- 65 You have not defined any negative controls. You must define negative controls for each channel you are analysing. (Nedefinovali ste žiadne negatívne kontrolné roztoky. Pre každý analyzovaný kanál musíte definovať negatívne kontrolné roztoky.)
- 66 You have not defined any NTC controls. You must define NTC controls for each group. (Nedefinovali ste žiadne NTC kontrolné roztoky pre každú skupinu. Pre každú skupinu musíte definovať NTC kontrolné roztoky.)
- Hlásenia analýzy HRM**
- 67 Genotype <GENOTYPE NAME> does not have a control defined. (Genotyp <GENOTYPE NAME> (NÁZOV GENOTYPU) nemá definovaný kontrolný roztok.)
- 68 Duplicate genotype combinations are not allowed. (Kombinácie duplikátov genotypu nie sú povolené.)
- 69 High resolution melts are not supported on this instrument. Please contact your distributor for more information. (Tento prístroj nepodporuje topenia s vysokým rozlíšením. Kontaktujte svojho predajcu, ktorý vám poskytne viac informácií.)
- Hlásenia analýzy topenia**
- 70 The genotypes can not be defined until bins have been placed. Please define all bins and then try again. (Genotypy nie je možné definovať, kým sa neumiestnia súbory. Definujte všetky súbory a potom to skúste znova.)
- 71 You must enter an abbreviation for <GENOTYPE NAME> genotype. (Musíte zadať skratku genotypu <GENOTYPE NAME> (NÁZOV GENOTYPU).)
- Hlásenia bodového diagramu**
- 72 Scatter plot analysis requires exactly 2 channels to be selected. To select multiple channels, drag a rectangle around the channels you wish to display in the analysis selection window, or click while holding the SHIFT key on each channel. (Analýza bodového grafu vyžaduje presne 2 zvolené kanály. Na výber viacerých kanálov potiahnutím vytvoríte obdĺžnik okolo kanálov, ktoré chcete zobraziť v okne výberu analýzy alebo podržte kláves SHIFT a kliknite na každý kanál.)
- Hlásenia kvantitatívnej analýzy**
- 73 The auto-find threshold feature requires that you have defined at least 2 selected standards. To set this up, right-click on the sample list and select "Edit Samples..." (Funkcia automatického hľadania prahovej hodnoty vyžaduje, aby ste definovali minimálne 2 zvolené štandardy. Na ich nastavenie kliknite pravým tlačidlom myši na zoznam vzoriek a vyberte možnosť „Edit Samples“ (Upraviť vzorky...))

## 12 Glosár

Výraz	Popis
Čítanie	Čítanie je zber údajov o fluorescencii. Každé čítanie (sada údajov o fluorescencii) z kanálu sa zobrazí v softvéri ako neanalyzované údaje v okne „Raw channel“ (Nespracovaný kanál). Tieto údaje je možné analyzovať pomocou možností v ponuke „Analysis“ (Analýza).
Súbory	V analýze kriviek topenia sa súbory definujú ako región, v ktorom sa očakáva vznik maxima topenia. Genotypy je možné definovať na základe prítomnosti maxim v určitých súboroch alebo kombináciách súborov.
CE-IVD	Súlade s európskou smernicou 98/79/Es pre zdravotnícke pomôcky na diagnostiku in vitro.
Kanál	Kanál sa skladá zo svetelnej diódy (Light Emitting Diode, LED) s budiacim filtrom spolu s emisným filtrom. LED diódy a budiaci filter budia vzorky na danej vlnovej dĺžke. Fluorescencia emitovaná vzorkami prechádza cez emisný filter predtým, ako ju deteguje fotonásobič.
Výťažok	Prístroj Rotor-Gene Q MDx využíva fotonásobič na zber fotónov fluorescencie a mení ich na elektronické signály. Výťažok je nastavenie, ktoré určuje senzitivitu fotonásobiča. Ak je výťažok nastavený príliš vysoko, je signál príliš saturovaný. Ak je výťažok nastavený príliš nízko, nie je možné rozlíšiť signál od šumu pozadia.
Optimalizácia výťažku	Optimalizácia výťažku je proces, ktorý dynamicky prispôsobuje nastavenie výťažku a umožňuje tak výber vhodného nastavenia, ktorého výsledkom bude optimálna detekcia signálu.
Vkladací blok	Vkladacie bloky sú hliníkové bloky dostupné v rôznych formátoch, ktoré sa používajú na pridržanie skúmaviek alebo diskov Rotor-Disc počas prípravy reakcie. Vkladacie bloky disku Rotor-Disc sa používajú aj so zariadením Rotor-Disc Heat Sealer na zatavenie diskov Rotor-Disc.
Poistný krúžok	Poistné krúžky sú kovové krúžky, ktoré sa osadia na rotor, aby sa predišlo uvoľneniu skúmaviek a uzáverov počas prevádzky prístroja Rotor-Gene Q MDx. Uvoľnené uzávěry a skúmavky môžu spôsobiť poškodenie prístroja.
Rotor	Kovový rotor pridrižiava skúmavky alebo disky Rotor-Disc v prístroji Rotor-Gene Q MDx. Umožňuje otáčanie vzoriek v komore prístroja a zaisťuje, aby boli vzorky správne umiestnené vzhľadom na optický systém. Rotor sa zaisťuje poistným krúžkom.
Rotor-Disc	Disky Rotor-Disc sú kruhové doštičky vertikálne orientovaných reakčných jamiek. Sú k dispozícii formáty diskov Rotor-Disc pre 72 a 100 reakcií. Disky Rotor-Disc sa zatavia pomocou filmu Rotor-Disc Heat Sealing Film a zariadenia Rotor-Disc Heat Sealer.

## 13 Technické špecifikácie

Spoločnosť QIAGEN si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie.

### 13.1 Podmienky okolia – prevádzkové podmienky

Napájanie	100 – 240 V AC, 50 – 60Hz, 520 VA (maximum) Spotreba energie 60 VA (pohotovostný režim) Kolísanie sieťového napätia nesmie prekročiť 10 % nominálnej hodnoty napätia.
Poistka	poistka F5A 250 V
Šírenie tepla/tepelné zaťaženie	Priemer: 0,183 kW (632 BTU/hodina) Maximum: 0,458 kW (1578 BTU/hodina)
Kategória prepätia	II
Teplota vzduchu	18 až 30°C
Relatívna vlhkosť	10 – 75 % (bez kondenzácie)
Nadmorská výška	Do 2000 m
Miesto prevádzky	Len na použitie vo vnútri budov
Úroveň znečistenia	2
Ekologická trieda	3K2 (IEC 60721-3-3) 3M2 (IEC 60721-3-3)

### 13.2 Podmienky transportu

Teplota vzduchu	–25°C až 60°C v obale výrobcu
Relatívna vlhkosť	Max. 75 % (bez kondenzácie)
Ekologická trieda	2K2 (IEC 60721-3-2)

### 13.3 Podmienky skladovania

Teplota vzduchu	15°C až 30°C v obale výrobcu
Relatívna vlhkosť	Max. 75 % (bez kondenzácie)
Ekologická trieda	1K2 (IEC 60721-3-1)

### 13.4 Mechanické údaje a charakteristiky technického vybavenia

Rozmery	Šírka: 370 mm Výška: 286 mm Hĺbka (bez káblov): 420 mm Hĺbka (otvorené dvere): 538 mm
Hmotnosť	12,5 kg pri štandardnej konfigurácii
Kapacita	Do 100 vzoriek na cyklus pomocou disku Rotor-Disc 100
Softvér	Softvér Rotor-Gene Q verzie 2.3.x (kde x je ≥ 0)

## 13.5 Špecifikácie (hardvér a softvér)

### 13.5.1 Tepelné špecifikácie

Popis	Špecifikácia
Teplotný rozsah	35 °C až 99 °C (50 °C až 99 °C pre cyklovacie aplikácie)
Presnosť teploty	± 0,5 °C (kalibrované pomocou postupu Rotor-Disc OTV)
Rozlíšenie teploty	± 0,02°C (najmenší naprogramovateľný prírastok)
Jednotnosť teploty	± 0,02°C

### 13.5.2 Optické špecifikácie

Popis	Špecifikácia
Zdroje budenia	Vysokoenergetické svetelné diódy
Detektor	Fotonásobič
Čas čítania	4 s

## 14 Príloha A – právne informácie

### 14.1 Vyhlásenie FCC

„Federálna komisia Spojených štátov pre komunikácie“ (United States Federal Communications Commission, USFCC) (47 CRF 15. 105) uvádza, že používatelia tohto výrobku musia byť informovaní o týchto skutočnostiach a okolnostiach.

„Toto zariadenie je v zhode s časťou 15 FCC: Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie vyžarovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí byť odolné voči akémukolvek prijímanému rušeniu vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.“

„Tento digitálny prístroj triedy B spĺňa podmienky kanadskej smernice ICES-0003.“

Nasledujúce vyhlásenie sa vzťahuje na výrobky uvádzané v tejto príručke, ak nie je stanovené inak. Vyhlásenie týkajúce sa iných výrobkov bude uvedené v priloženej dokumentácii.

**Poznámka:** Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že je v zhode s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC a spĺňa všetky požiadavky kanadskej normy pre zariadenia spôsobujúce interferenciu ICES-003 pre digitálne prístroje. Tieto limity sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany proti škodlivému rušeniu v obytnom prostredí. Zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú energiu a ak nebude inštalované v súlade s návodom, môže spôsobovať škodlivé rušenie, ktoré môže ovplyvniť rádiovú komunikáciu. Neexistuje ale žiadna záruka, že v konkrétnom prostredí nedôjde k žiadnej interferencii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie pri prijímaní rádiového alebo televízneho signálu, ktoré je možné určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi skúsiť odstrániť rušenie jedným z týchto spôsobov:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode ako je obvod prijímača

Kontaktujte predajcu alebo skúseného technika pre rádio/TV príjem a požiadajte ho o pomoc.

---

## 14.2 Zhoda s normou IEC EN 61326

Softvér Rotor-Gene Q MDx spĺňa požiadavky na emisie interferencie a odolnosti proti interferencii, ktorá je popísaná v normách IEC 61326-1 a IEC 61326-2-6.

Spoločnosť QIAGEN GmbH Germany nezodpovedá za žiadne rádiové alebo televízne rušenie spôsobené neoprávnenými úpravami tohto zariadenia alebo náhradou alebo pripojením prepojovacích káblov a iného zariadenia, než zariadenia špecifikovaného QIAGEN GmbH Germany. Za odstránenie rušenia spôsobeného takouto neoprávnenou úpravou, náhradou alebo pripojením zodpovedá používateľ.

---

## 14.3 Vyhlásenie o zhode

Názov a adresa legálneho výrobcu

QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
Nemecko

Aktuálne vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať od technických služieb spoločnosti QIAGEN.

## 14.4 Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Táto časť poskytuje informácie o likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení používateľmi.

Symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami (pozri nižšie) označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s iným odpadom. Musí sa odovzdať do schváleného zariadenia na spracovanie alebo na určené zberné miesto na recykláciu v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Separovaný zber a recyklácia odpadových elektronických zariadení v čase likvidácie pomáha chrániť prírodné zdroje a zabezpečuje recykláciu produktu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.



Recykláciu môže na vyžiadanie za príplatok zabezpečiť spoločnosť QIAGEN. V Európskej únii, v súlade s konkrétnymi požiadavkami na recykláciu OEEZ a tam, kde je spoločnosť QIAGEN dodáva náhradný výrobok, sa poskytuje bezplatná recyklácia elektronických zariadení označených OEEZ.

Ak chcete recyklovať elektronické zariadenia, obráťte sa na miestne obchodné zastúpenie spoločnosti QIAGEN a požiadajte ho o formulár pre vrátenie. Po odoslaní formulára vás bude spoločnosť QIAGEN kontaktovať buď na vyžiadanie následných informácií pre plánovanie zberu elektronického odpadu, alebo aby vám poskytla individuálnu ponuku.



---

## 14.5 Doložka o zodpovednosti

Spoločnosť QIAGEN bude zbavená všetkej zodpovednosti v rámci tejto záruky v prípade, že opravy či úpravy vykonávajú osoby iné než jej vlastný personál s výnimkou prípadov, kedy spoločnosť udelila písomný súhlas na vykonanie takých opráv a úprav.

Všetok materiál vymenený v rámci záruky má záručnú dobu totožnú s pôvodnou záručnou dobou a táto v žiadnom prípade neprekračuje pôvodnú dobu záruky, ak nie je písomnou formou zástupcom spoločnosti dohodnuté inak. Dĺžka záručnej doby čítačiek a prídavných zariadení a pridruženého softvéru sa riadi podmienkami, ktoré poskytuje výrobca týchto zariadení. Údaje a záruky poskytnuté akoukoľvek osobou, vrátane zástupcov spoločnosti QIAGEN, ktoré nezodpovedajú podmienkam tejto záruky alebo sú s nimi v rozpore, nebudú pre spoločnosť záväzné, ak ich referent spoločnosti QIAGEN nevydá v písomnej podobe a neschváli.

## 14.6 Licenčná zmluva pre softvér

1. V nasledujúcom texte odkazuje názov „Qiagen“ na spoločnosť Qiagen GmbH a jej pridružené spoločnosti a výraz „softvér“ znamená programy a údaje dodané na fyzickom médiu (napr. CD-ROM) alebo prostredníctvom internetu s týmito podmienkami. (Ak si nie ste istý ohľadom niektorého aspektu tejto zmluvy alebo máte otázky, pošlite ich e-mailom na adresu support@qiagen.com.) Softvér a všetka sprievodná dokumentácia bola vyvinutá len pomocou súkromných výdavkov. Dodáva a licencuje sa ako „komerčný počítačový softvér“.

### 2. Licencia

Vaša licencia neznamena prepožičanie vlastníckeho práva na softvér a nie je predajom práv na softvér. Spoločnosť Qiagen vám udeľuje neprenosnú nevýhradnú licenciu nasledovne:

2.1 Vo svojej organizácii použijete akýkoľvek počet kópií softvéru za predpokladu, že budú softvér používať len zamestnanci tejto organizácie a že vaša organizácia v súčasnosti vlastné prístroj Rotor-Gene Q. Sprístupnenie tohto softvéru na použitie mimo vašej organizácie je porušením tejto zmluvy.

2.2 Vytvoríte len toľko kópií softvéru, koľko je potrebných na účely zálohy alebo ak je kopírovanie nevyhnutných krokom pri oprávnenom používaní softvéru. Vo všetkých kópiách musíte reprodukovat všetky oznámenia o autorských právach v pôvodnom softvéri. Za žiadnych okolností nesmiete kopírovať softvér na vývesnú tabuľu, internetovú stránku ani podobný verejný alebo súkromný distribučný systém.

2.3 Softvér nesmiete poskytnúť žiadne tretej strane ako dar alebo pôžičku alebo ako predmet prenájmu.

2.4 Softvér ani žiadnu jeho časť nesmiete zahrnúť do iných programov alebo počítačových systémov, ktoré ste vytvorili alebo ktoré používate.

2.5 Súbor s údajmi ani iné súbory spracované softvérom (možnosť uložiť ako sa zobrazí počas bežnej prevádzky softvéru) nesmiete používať ani inak vytvárať.

2.6 Žiadnu časť softvéru nesmiete rozložiť, uplatniť na ňu reverzné inžinierstvo, reverznú kompiláciu, odomknúť ju ani preložiť alebo sa nejakým spôsobom pokúsiť zistiť zdrojový kód alebo základné algoritmy softvéru. Nesmiete meniť žiadne súbory s údajmi ani iné súbory tvoriace softvér (možnosť uložiť ako sa zobrazí počas bežnej prevádzky softvéru).

2.7 Ak ide len o ukážkovú alebo skúšobnú verziu softvéru, máte licenciu len na jej použitie na účely hodnotenia a v rámci popísaných obmedzení (ako napríklad časový limit alebo limitovaný počet cyklov alebo iné obmedzenia). Softvér sa môže alebo nemusí pokúsiť vynútiť uvedené obmedzenia, ale ak sa tak nestane, neznamená to, že vaša licencia tieto obmedzenia neobsahuje.

2.8 Súhlasíte s tým, že od spoločnosti Qiagen alebo jej autorizovaného predajcu získate každý potrebný registračný/licenčný kľúč a že budete s týmto kľúčom manipulovať dôverne a neposkytnete ho tretím stranám.

### 3. Vypovedanie licencie

3.1 Ak nedodržíte tieto všeobecné podmienky licencie, potom môže spoločnosť Qiagen vypovedať túto licenciu bez dosahu na ostatné práva.

3.2 Do 7 dní od vypovedanie tejto licencie pošlete spoločnosti Qiagen list potvrdzujúci zničenie pôvodných a všetkých ostatných kópií softvéru a zničenie všetkých kópií registračného/licenčného kľúča. Túto licenciu môžete kedykoľvek vypovedať dodaním tohto potvrdenia.

### 4. Obmedzená záruka/ručenie

4.1 Spoločnosť poskytuje záruku len v týchto prípadoch:

a) Ak je softvér dodaný na CR-ROMe, musí byť tento bez chýb materiálu a remeselných chýb pre bežné použitie počas obdobia deväťdesiatich dní od dátumu kúpy. (Každý chybný CD-ROM vymeníme zadarmo.)

b) Pri správnom použití sa bude softvér v zásade správať v súlade s dokumentáciou dodanou spolu so softvérom alebo inou špecifikáciou zverejnenou spoločnosťou Qiagen počas obdobia deväťdesiatich dní od dátumu kúpy.

4.2 Úplne ručenie spoločnosťou Qiagen a váš výhradný opravný prostriedok bude na výbere spoločnosti Qiagen buď vo forme kompenzácie hodnoty dvestopäťdesiat amerických dolárov (250 \$) alebo výmeny softvéru, ktorý nespĺňa obmedzenú záruku.

4.3 S VÝNIMKOU ZÁRUK POSKYTNUTÝCH V ČASTI 4.1 VYŠŠIE A V MAXIMÁLNOU ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ QIAGEN NA SOFTVÉR ŽIADNE INÉ ZÁRUKY.

---

4.4 V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ANI PODĽA ŽIADNE PRÁVNEJ TEÓRIE, PREČINU, ZMLUVY ALEBO INÉHO PREDPISU NEBUDE SPOLOČNOSŤ QIAGEN RUČIŤ VÁM ANI ŽIADNEJ INEJ OSOBE ZA ŽIADNE NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ŽIADNEHO CHARAKTERU VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA ŠKÔD V PRÍPADE POŠKODENIA DOBRÉHO MENA, ZASTAVENIA PRÁCE, POŠKODENIA ALEBO PORUCHY POČÍTAČA ALEBO VŠETKÝCH INÝCH KOMERČNÝCH ŠKÔD ALEBO STRÁT, DOKONCA ANI VTEDY KEĎ BUDE SPOLOČNOSŤ QIAGEN UPOVEDOMENÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ÚPLNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI QIAGEN PODĽA TEJTO ZMLUVY OBMEDZENÁ NA LICENČNÝ POPLATOK, KTORÝ ZAPLATÍTE ZA SOFTVÉR. TOTO OBMEDZENIE RUČENIA NEBUDE PLATIŤ NA RUČENIE ZA SMRŤ ALEBO ZRANENIE OSÔB V ROZSAHU, V KTOROM ZÁKON TAKÉTO OBMEDZENIE ZAKAZUJE

## 15 Príloha B – matematické postupy

Táto príloha popisuje podrobnejšie použité matematické postupy.

### 15.1 Kvantifikácia

Vypočítané koncentrácie získate z jednoduchého modelu lineárnej regresie so známymi hodnotami logaritmických koncentrácií ( $x$ ) a experimentálnych hodnôt CT ( $y$ ).

Logaritmické koncentrácie a hodnoty CT štandardov sa používajú na vytvorenie modelu vo forme:

$$y = Mx + B$$

#### 15.1.1 Intervaly spoľahlivosti pre vypočítané koncentrácie

Na odhad nového pozorovania  $x_0$  z kalibračnej krivky používame tento interval spoľahlivosti 100(1-  $\alpha$ ) %.

$$\frac{Y_0 - \hat{\beta}_0}{\hat{\beta}_1} \pm \frac{S}{\hat{\beta}_1} \left( 1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right)^{\frac{1}{2}} t_{n-2, \alpha/2}$$

Toto je interval spoľahlivosti pre koncentráciu jednej neznámej.

Predpokladajme, že máme  $k$  pozorovaní v  $x = x_0$  a ich priemer označíme  $\bar{Y}_0$ . Potom,

$$\bar{Y}_0 \sim N\left(\beta_0 + \beta_1 x_0, \frac{\sigma^2}{k}\right)$$

a podobnými argumentmi ako vyššie vyjde

$$\frac{Y_0 - \hat{\beta}_0}{\hat{\beta}_1} \pm \frac{S}{\hat{\beta}_1} \left( \frac{1}{k} + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right)^{\frac{1}{2}} t_{n-2, \alpha/2}$$

Tento vzorec určuje, ako sa stanovujú intervaly spoľahlivosti pre koncentrácie neznámych kópií.

Na odhadnutie štandardov je možné získať aj užší interval spoľahlivosti:

$$\frac{Y_0 - \hat{\beta}_0}{\hat{\beta}_1} \pm \frac{S}{\hat{\beta}_1} \left( \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right)^{\frac{1}{2}} t_{n-2, \alpha/2}$$

Implikácia tohto vzorca je, že prídanie kópií do jednotlivej koncentrácie štandardu znižuje so zvyšujúcim sa  $n$  šírku intervalu pre všetky odhady. Prídanie veľkého počtu kópií do neznámej znižuje neistotu do hodnoty jedného štandardu. Kópie navyše znižujú neistotu spôsobenú neznámou, ktoré nie je súčasťou lineárneho modelu.

### 15.1.2 Intervaly spoľahlivosti pre hodnoty CT

Predpokladáme, že chyba v hodnotách CT kópie je lineárna a normálne distribuovaná.

Preto používame interval spoľahlivosti jednej vzorky  $t$ . Nech  $\mu$  je stredná hodnota pre hodnoty CT kópie  $(x_0 \dots x_{n-1})$ . Potom interval spoľahlivosti  $100(1 - \alpha) \%$  pre hodnotu  $\mu$  CT je:

$$\left( \bar{x} - t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Radi by sme poďakovali Peterovi Cookovi z katedry matematiky univerzity University of NSW v Sydney v Austrálii, ktorého pomoc pri verifikovaní použitých matematických postupov bola neoceniteľná.

## 16 Informácie o objednávaní

### 16.1 Produkty, príslušenstvo a spotrebný materiál prístroja Rotor-Gene Q MDx

Produkt	Obsah	Kat. č.
Rotor-Gene Q MDx 5plex	Real-time PCR cyklovač a s 5 kanálmi (zelený, žltý, oranžový, červený, karmínový), prenosný počítač, softvér, príslušenstvo, 1-ročná záruka na diely a prácu	9002022
Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM	Real-time PCR cyklovač a vysokorozlišovací analyzátor kriviek topenia High Resolution Melt Analyzer s 5 kanálmi (zelená, žltá, oranžová, červená, karmínová) plus kanál HRM, prenosný počítač, softvér, príslušenstvo, jednoročná záruka na diely a prácu	9002032
Rotor-Gene Q MDx 6plex	Real-time PCR cyklovač so 6 kanálmi (modrý, zelený, žltý, oranžový, červený, karmínový), vrátane prenosného počítača, softvéru, príslušenstva, 1-ročnej záruky na diely a prácu	9002042
<b>Príslušenstvo</b>		
Rotor-Disc 100 Starter Kit	Súprava obsahuje: 2 balenia Rotor-Disc 100, Rotor-Disc Heat Sealer, Rotor-Disc Heat Sealing Film, Rotor-Disc 100 Rotor a Locking Ring, Rotor-Disc 100 Loading Block, Rotor-Disc Pipetting Aid	Na otázku
Rotor-Disc 100 (30)	30 jednotlivito balených diskov na 3000 reakcií	981311
Rotor-Disc 100 (300)	10 × 30 jednotlivito balených diskov na 30 000 reakcií	981313

Produkt	Obsah	Kat. č.
Rotor-Disc 100 Rotor	Na držanie diskov Rotor-Disc 100 v prístroji Rotor-Gene Q MDx, vyžaduje poistný krúžok Rotor-Disc 100 Locking Ring	9018895
Rotor-Disc 100 Locking Ring	Na zaistenie disku Rotor-Disc 100 v rotore Rotor-Disc 100	9018896
Rotor-Disc 100 Loading Block	Hliníkový blok na manuálnu a automatickú prípravu reakcie v diskoch Rotor-Disc 100	9018909
Rotor-Disc Pipetting Aid	Pomôcka na označovanie jamiek počas manuálnej prípravy reakcie na bloku Rotor-Disc Loading Block	9018897
Rotor-Disc Heat Sealer	Prístroj na tepelné zatavenie na použitie s diskami Rotor-Disc; vyžaduje blok Rotor-Disc 72 alebo 100 Loading Block	9018898
Rotor-Disc Heat Sealing Film (60)	60 filmov na zatavenie diskov Rotor-Disc 100 alebo Rotor-Disc 72	981601
Rotor-Disc Heat Sealing Film (600)	10 × 60 filmov na zatavenie diskov Rotor-Disc 100 alebo Rotor-Disc 72	981604
Rotor-Disc 72 Starter Kit	Súprava obsahuje: 3 balenia Rotor-Disc 72, Rotor-Disc Heat Sealer, Rotor-Disc Heat Sealing Film, Rotor-Disc 72 Rotor a Locking Ring, Rotor-Disc 72 Loading Block, Rotor-Disc Pipetting Aid	Na otázku
Rotor-Disc 72 (24)	24 jednotlivo balených diskov na 1728 reakcií	981301
Rotor-Disc 72 (240)	10 × 24 jednotlivo balených diskov na 17 280 reakcií	981303
Rotor-Disc 72 Rotor	Na držanie diskov Rotor-Disc 72 v prístroji Rotor-Gene Q MDx, vyžaduje poistný krúžok Rotor-Disc 72 Locking Ring	9018899
Rotor-Disc 72 Locking Ring	Na zaistenie disku Rotor-Disc 72 v rotore Rotor-Disc 72	9018900



<b>Produkt</b>	<b>Obsah</b>	<b>Kat. č.</b>
Rotor-Disc 72 Loading Block	Hliníkový blok na manuálnu a automatickú prípravu reakcie v diskoch Rotor-Disc 72	9018910
Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250)	250 stripov po 4 skúmavky a uzávery na 1000 reakcií	981103
Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (2500)	10 × 250 pásov so 4 skúmavkami a uzávermi na 10 000 reakcií	981106
72-Well Rotor	Na držanie Strip Tubes and Caps, 0.1 ml; vyžaduje rotor Locking Ring 72-Well Rotor	9018903
Locking Ring 72-Well Rotor	Na držanie Strip Tubes and Caps, 0.1 ml v rotore 72-Well Rotor	9018904
Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes	Hliníkový blok na manuálnu prípravu reakcie s jednonálovou pipetou do skúmaviek 72 × 0,1 ml	9018901
Loading Block 72 x 0.1 ml Multi-channel	Hliníkový blok na manuálnu prípravu reakcie s viacnálovou pipetou v skúmavkách 72 x 0,1	9018902
PCR Tubes, 0.2 ml (1000)	1000 tenkostenných skúmaviek na 1000 reakcií	981005
PCR Tubes, 0.2 ml (10000)	10 x 1000 tenkostenných skúmaviek na 10 000 reakcií	981008
36-Well Rotor	Na držanie skúmaviek PCR Tubes, 0.2 ml; vyžaduje poistný krúžok 36-Well Rotor Locking Ring	9018907
36-Well Rotor Locking Ring	Na zaistenie skúmaviek PCR Tubes, 0.2 ml v rotore 36-Well Rotor	9018906
Loading Block 96 x 0.2 ml Tubes	Hliníkový blok na manuálnu prípravu reakcie v štandardnom teste 8 x 12 pomocou skúmaviek 96 x 0,2 ml	9018905
Rotor-Disc OTV Kit	Súprava na optickú verifikáciu teploty systémov Rotor-Gene zahŕňa disk Rotor-Disc vopred naložený termochromatickými tekutými kryštálmi, fluorescenčné vložky, vyžaduje rotor Rotor-Disc 72 Rotor a poistný krúžok	981400

Produkt	Obsah	Kat. č.
Rotor Holder	Locking Ring alebo súpravu Rotor-Disc 72 Starter Kit  Bezkovový držiak na uloženie skúmaviek a diskov Rotor-Disc do rotorov	9018908

Aktuálne licenčné informácie a právne informácie týkajúce sa produktu nájdete v sprievodcovi alebo používateľskej príručke k súprave QIAGEN. Sprievodcov a používateľské príručky k súpravám QIAGEN nájdete na lokalite [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) alebo o ne môžete požiadať oddelenie technických služieb spoločnosti QIAGEN alebo svojho miestneho distribútora.

## 17 História úprav dokumentu

<b>Dátum</b>	<b>Zmeny</b>
R1, február 2022	Prvé vydanie

#### Obmedzená licenčná zmluva na softvér Rotor-Gene Q MDx

Použitie tohto produktu predstavuje súhlas kupujúceho alebo používateľa tohto produktu s nasledovnými podmienkami:

1. Produkt sa môže používať výlučne v súlade s protokolmi poskytovanými spolu s produktom a týmto návodom na použitie a môže sa používať výlučne s komponentmi obsiahnutými v súprave. Spoločnosť QIAGEN neudeluje žiadnu licenciu v rámci žiadneho zo svojich práv na ochranu duševného vlastníctva na používanie alebo spájanie komponentov tejto súpravy s akýmkoľvek komponentmi, ktoré netvorí súčasť tejto súpravy s výnimkou ustanovení uvádzaných v protokoloch dodávaných spolu s produktom, tomto návode na použitie v ďalších protokoloch, ktoré sú dostupné na adrese [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com). Niektoré z týchto protokolov boli poskytnuté používateľmi produktov od spoločnosti QIAGEN pre používateľov produktov od spoločnosti QIAGEN. Tieto protokoly neboli podrobne testované ani optimalizované spoločnosťou QIAGEN. Spoločnosť QIAGEN na ne neposkytuje žiadne záruky a neručí za to, že ich použitím nedôjde k porušeniu práv tretích strán.
2. Iné než výslovne uvedené licencie – spoločnosť QIAGEN neposkytuje žiadnu záruku na to, že táto súprava a/alebo jej použitie neporuší práva tretích strán.
3. Táto súprava a jej komponenty sú licenčne poskytnuté na jednorazové použitie a nesmú sa opätovne používať, opravovať ani predávať.
4. Spoločnosť QIAGEN sa špecificky zrieka všetkých ostatných (výslovných alebo implicitných) licencií než tých, ktoré sú tu výslovne uvedené.
5. Kupujúci a používateľ tejto súpravy súhlasia s tým, že iným osobám neumožnia ani nepovolí vykonať žiadne kroky, ktoré by mohli viesť k akýmkoľvek činnostiam, ktoré sú zakázané vyššie, alebo k nim napomáhať. Spoločnosť QIAGEN môže uplatňovať príslušné zákazy uvádzané v tejto obmedzenej licenčnej zmluve pred akýmkoľvek súdom a bude požadovať všetky náklady na vyšetrovanie a súdne konania (vrátane nákladov na právne zastupovanie) pri každom takomto kroku s cieľom uplatniť ustanovenia tejto obmedzenej licenčnej zmluvy alebo práv duševného vlastníctva súvisiacich so súpravou a/alebo jej komponentmi.

Aktualizované licenčné podmienky nájdete na adrese [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)

Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, EpiTect®, HotStarTaq®, Rotor-Disc®, Rotor-Gene®, Rotor-Gene AssayManager®, Type-it® (QIAGEN Group); Adobe®, Illustrator® (Adobe Systems, Inc.); Alexa Fluor®, HEX™, JOE™, Marina Blue®, ROX™, SYBR®, SYTO®, TET™, Texas Red®, VIC® (Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries); CAL Fluor®, Quasar® (Biosearch Technologies, Inc.); Core™, Intel® (Intel Corporation); Cy® (GE Healthcare); EvaGreen® (Biotium, Inc.); Excel®, Microsoft®, Windows® (Microsoft Corporation); LC Green® (Idaho Technology, Inc.); LightCycler® (Roche Group); Symantec® (Symantec Corporation); TeeChart® (Steema Software SL); Yakima Yellow® (Nanogen, Inc.). Registrované názvy, ochranné známky atď. použité v tomto dokumente sa nesmú považovať za známky nechránené podľa zákona, i keď neboli ako také označené príslušným symbolom. Registrované názvy, ochranné známky atď. použité v tomto dokumente sa nesmú považovať za známky nechránené podľa zákona, i keď neboli ako také označené príslušným symbolom.

TeeChartOffice: Copyright 2001 – 2013 by David Berneda. Všetky práva vyhradené.

#### Pre príslušné krajiny:

Termálny real-time cyklovač je licencovaný podľa amerických patentových práv čakajúcich na prerokovanie pre prístroje alebo systém so zabudovaným termálnym real-time cyklovačom s detektormi fluorescencie, ktoré majú prednosť pred americkým sériovým číslom 07/695,201 a príslušnými nárokmi na každý patent cudzieho duplikátu, ktorý vlastní spoločnosť Applied Biosystems LLC vo všetkých oblastiach, vrátane výskumu a vývoja, všetkých aplikovaných oblastiach diagnostiky in vitro ľudských a zvieracích vzoriek. Žiadne práva nie sú vyjadrené priamo, nepriamo ani prostredníctvom prekážky uplatnenia žalobného nároku na žiadne patenty real-time metód, vrátane ale nie len 5 nukleázových testov, alebo na žiadny patent s nárokom na reagenciu alebo súpravu. Ďalšie informácie o nadobudnutí doplnkových práv vám poskytne riaditeľ pre vydávanie licencií v spoločnosti Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Kalifornia, 94404, USA.

#### Pre príslušné krajiny:

Kúpou tohto produktu získate obmedzenú neprenosnú licenciu na jeden alebo viac amerických patentov č. 6,787,338; 7,238,321; 7,081,226; 6,174,670; 6,245,514; 6,569,627; 6,303,305; 6,503,720; 5,871,908; 6,691,041; 7,387,887; 7,273,749; 7,160,998; amerických patentových prihlášok č. 2003-0224434 a 2006-0019253 a patentových prihlášok PCT č. WO 2007/035806 a všetky predžiadania a divízne a príslušné nároky na patenty a patentové prihlášky mimo Spojených štátov, ktoré vlastní univerzita University of Utah Research Foundation, Idaho Technology, Inc., Evotec Biosystems GmbH a/alebo spoločnosť Roche Diagnostics GmbH len na in vitro diagnostiku ľudských a zvieracích vzoriek. Žiadne práva nie sú vyjadrené priamo, nepriamo ani prostredníctvom prekážky uplatnenia žalobného nároku na žiadnu reagenciu ani súpravu, ani podľa iného patentu alebo patentových nárokov, ktoré vlastní univerzita University of Utah Research Foundation, Idaho Technology, Inc., Roche Diagnostics GmbH alebo žiadna iná strana. Tento produkt sa môže používať len so schválenými reagenčiami, ako napríklad plne licencované súpravy a testy QIAGEN. Informácie o získaní licencií na in vitro diagnostiku alebo reagencie vám poskytne spoločnosť Roche Molecular Systems, 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588, USA.

HB-3090-001 02/2022 © 2022 QIAGEN, všetky práva vyhradené.

---

Objednávky [www.qiagen.com/contact](http://www.qiagen.com/contact) | Technická podpora [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com) | Webová lokalita [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)