
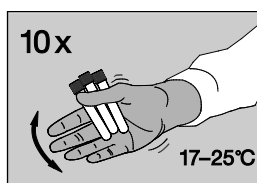


Za upotrebu sa  
QuantiFERON-CMV  
ELISA kompletom  
(Kat. br. 0350-0201).

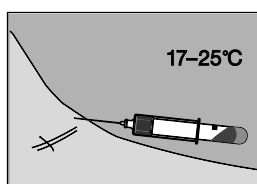

## QuantiFERON®-CMV

### Epruvete za vađenje krvi

### Pakovanje za jednog pacijenta

Kat. br. 0192-0301

①

#### SADRŽAJ

3x 1 ml QF CMV epruveta za vađenje krvi (Nil, CMV Antigen, Mitogen)

1x štampani dodatak u pakovanju

Više informacija potražite u *QuantiFERON-CMV štampanom dodatku u pakovanju*, koji možete pronaći na veb-adresi [www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com).

#### VAĐENJE KRVI

②

#### ⚠ UPOZORENJE:

- Potrebno je primeniti standardne mere opreza pri rukovanju uzorkom krvi.
- Epruvete se mogu čuvati na temperaturi od 4 °C do 25 °C, a u trenutku korišćenja moraju biti sobne temperature (od 17 °C do 25 °C).

Krv izvadite putem venepunkcije.

*Vakuum ispunjava epruvetu do crne oznake (1 ml). Protok krvi može biti spor. Nakon prestanka protoka krvi, zadržite epruvetu na igli dodatnih 2 do 3 sekunde. Dopunite epruvetu ako nivo krvi nije blizu oznake.*

#### Tehnički savet

Igle sa leptirićem – pre nego što napunite QuantiFERON-CMV kivetu, pripremite sistem pomoću prazne epruvete (nije u kompletu)

#### VAĐENJE KRVI

③

Odmah nakon što ste napunili epruvete, protresite ih deset (10) puta, dovoljno energično da bi cela unutrašnja površina epruvete bila obložena krvlju i da bi se rastvorili antigeni na zidovima epruvete.




*U trenutku punjenja temperatura epruveta bi trebalo da bude od 17 do 25 °C.*

*Ukoliko epruvetu tresete previše energično, to može da dovede do razlaganja gela i dobijanja netačnih rezultata.*

*Ispravno obeležite epruvete.*



Sample & Assay Technologies

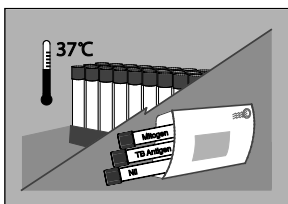

#### TRANSPORT/INKUBACIJA

④

Epruvete dostavite laboratoriji pri temperaturi od 17 do 27 °C. Krv mora da se inkubira na temperaturi od 37 °C, što je pre moguće (u okviru od 16 sati od vađenja).


*Laboratorijsko osoblje mora ponovo da promeša sadržinu epruvete neposredno pre inkubacije na temperaturi od 37 °C.*

#### Tehnički savet

Epruvete obeležite oznakom „Nije inkubirano“.

#### OPCIJA 1

##### Inkubacija u laboratoriji

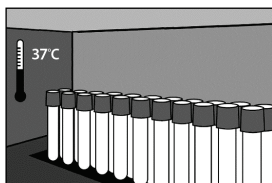

#### TRANSPORT/INKUBACIJA

⑤

Inkubacija krvi se mora izvršiti što je pre moguće (u okviru od 16 časova od vađenja). Epruvete inkubirajte u uspravnom položaju, na temperaturi od 37 °C, u roku od 16 do 24 sata.

*Inkubatori se mogu nabaviti i od kompanije QIAGEN.*


#### Tehnički savet

Vlažnost/CO<sub>2</sub> nisu potrebni.

#### OPCIJA 2

##### Inkubacija na mestu vađenja krvi

Ukoliko se ne izvrši inkubacija epruveta na temperaturi od 37 °C ubrzo po uzimanju krvi, neposredno pre postupka inkubacije potrebno je da ponovno promešate sadržinu epruvete tako što ćete epruvetu okrenuti 10 puta.

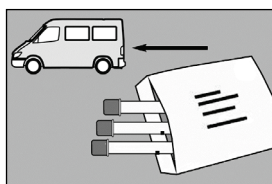

#### TRANSPORT/INKUBACIJA

⑥


Inkubirane epruvete transportujte do laboratorije (u roku od 3 dana, ukoliko nije izvršeno centrifugiranje).

*Epruvete čuvajte na temperaturi od 4 do 27 °C.*

#### Tehnički savet

Epruvete obeležite oznakom „Inkubirano“.

#### OPCIJA 2 (nastavak)

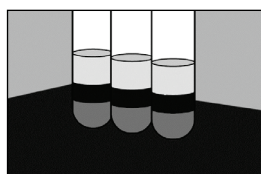

#### CENTRIFUGIRANJE

⑦

Pre uzimanja uzorka izvršite centrifugiranje epruveta.

*Centrifugirajte pri brzini od 2000 do 3000g u trajanju od 15 minuta.*

Plazma u centrifugiranim epruvetama će biti stabilna 28 dana ako se čuva na temperaturi od 2 do 8 °C.

Aktuelne podatke o licenci i odricanju odgovornosti specifičnom za određene proizvode, potražite u QuantiFERON-CMV ELISA štampanom dodatku u pakovanju.

## KONTAKT INFORMACIJE

⑧

### QIAGEN

Asia-Pacific: [techservice-ap@qiagen.com](mailto:techservice-ap@qiagen.com)

Europe: [techserviceQFT-eu@qiagen.com](mailto:techserviceQFT-eu@qiagen.com)

Middle East / Africa: [techserviceQFT-eu@qiagen.com](mailto:techserviceQFT-eu@qiagen.com)

USA / Canada: [techservice-na@qiagen.com](mailto:techservice-na@qiagen.com)

Latin America (not including Brazil or Mexico):

[techservice-latam@qiagen.com](mailto:techservice-latam@qiagen.com)

Mexico: [techservice-MX@qiagen.com](mailto:techservice-MX@qiagen.com)

Brazil: [techsebr@qiagen.com](mailto:techsebr@qiagen.com)

[www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com)

Registrovani žigovi: QIAGEN®, QuantiFERON® (QIAGEN grupa).

© 2017 QIAGEN, sva prava zadržana

1075109SR Rev. 01 01.2017.



**QIAGEN**

19300 Germantown Road  
Germantown, MD 20874  
SAD  
+1-800-426-8157



EC	REP
----	-----

QIAGEN GmbH  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
Nemačka



Sample & Assay Technologies