

Důležitá poznámka

Souprava *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, ref. č. 874111

Souprava *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), ref. č. 870311

Vážení uživatelé soupravy *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit,

již dříve jste byli informováni, že společnost QIAGEN revidovala Návod k použití pro soupravy *therascreen* EGFR PCR Kit, aby snížila riziko plynoucích z fluorescenčních artefaktů, vedoucích k neplatným cyklům nebo falešně pozitivním výsledkům mutací, a aby zdůraznila důležitost důkladného promíchání reagensů. Byla zavedena nižší mezní hodnota pro delta C_T (ΔC_T) a další manuální kontrola hodnot delta CT (ΔCT), aby se zamezilo falešně pozitivním výsledkům způsobeným těmito fluorescenčními artefakty.

V této důležité poznámce bychom Vás chtěli informovat, že automatické stanovování výsledků v softwaru Rotor-Gene bylo aktualizováno a byly vydány nové revize příslušné příručky pro soupravy:

- Revize 7 pro soupravu *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, ref. č. 874111
- Revize 5 pro soupravu *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), ref. č. 870311

Tyto nové revize příručky zahrnují všechny odpovídající změny Návodu k použití. Další podrobnosti najdete v historii revizí dokumentu příslušné příručky soupravy *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit.

Balíček pro analýzu, aby bylo možné provádět automatické stanovování výsledků (k dispozici pouze pro ref. č. 874111), je dostupný na produktových webových stránkách pro soupravu *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit na adrese **www.qiagen.com**. Chcete-li stáhnout balíček pro analýzu, přejděte na **Product Resources** (Produktové zdroje) > **Supplementary Protocols** (Doplňkové protokoly).

Překlady této důležité poznámky

Společnost QIAGEN poskytuje vytištěnou důležitou poznámku v anglickém jazyce. Překlady důležité poznámky jsou k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF. Přeložené dokumenty můžete získat na kartě Product Resources (Produktové zdroje) na příslušné webové stránce produktu na internetové adrese **www.qiagen.com**.

Pokud máte jakékoli otázky či obavy, kontaktujte prosím oddělení technických služeb místního zastoupení společnosti QIAGEN. Kontaktní údaje naleznete na těchto webových stránkách:

Dceřiné společnosti QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

Obchodní partneři a dovozci společnosti QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

S přátelským pozdravem

společnost QIAGEN
www.qiagen.com